

с 2 или 3 отведениями. Кабель пациента подключается к рекордеру через линейный разъем, содержащий 7 контактов.

Между применениями провода отведений и кабели пациента должны очищаться и дезинфицироваться согласно установленным требованиям при помощи 70% изопропиленового спирта и мягкой ткани для дезинфекции и неабразивного жидкого мыла и мягкой ткани для очистки. Стерилизация не требуется.

Объем памяти

Холтеровские данные пациента хранятся в рекордере на съемной SD карте памяти. Для круглосуточного сохранения в обычном режиме SD карта должна иметь емкость не менее 28 мегабайт; емкость 56 мегабайт необходима для записи круглосуточной работы в режиме высокого разрешения.

Данные «Event» пациента сохраняются в долговременной памяти встроенной в рекордер.

2.3 Вариант исполнения "DR181":

Цифровой рекордер «DR181» применяется в качестве системы мониторинга ЭКГ по Холтеру.

