

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Эстэйд-Сервисгруп»

А.М. Проценко

2016 г.



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВМЕЩЕННОЕ С
ПАСПОРТОМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ
«ДС ойл» и «ДС ойл+», форма выпуска: спрей, жидкость
по ТУ 9391-006-59004022-2011**

г. Москва
2016 г.

1. Общие сведения.

Смазка универсальна для прямых и угловых стоматологических наконечников, головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов электрических и воздушных, хирургического оборудования.

Область применения – общая медицина и стоматология.

Продукт используется в медико-технической области в качестве смазки для стоматологических наконечников и хирургического оборудования (например, катетеров). Служит для тщательной консервации и обработки хирургических инструментов, различных приспособлений и аппаратов, включая смазку шарниров и мест соединения. Кроме того, подходит для использования в качестве изоляционной поверхности при изготовлении различных моделей оборудования. Может быть использован в качестве изоляции на пластике и гипсовых моделях. Используется с заполняющими материалами. Эпоксидная смола изолируется от восковых форм.

Смазка в форме выпуска спрей используется самостоятельно. В форме выпуска жидкость используется в аппаратах по уходу за наконечниками.

2. Способ применения.

Форма выпуска спрей и жидкость.

- При смазке спреем используются соответствующие насадки на баллон спрея.
- Необходимо контролировать качество выходящего масла.
- Нижние части и головки разборных наконечников смазываются отдельно, т.к. загрязнение нижней части может попасть в головку.
- Цанга смазывается еженедельно.
- При установке наконечника на электрический микромотор после смазывания, возможно попадание масла внутрь мотора, что может привести к его выходу из строя. Для предотвращения этого наконечник после смазки необходимо тщательно протереть сухой салфеткой.

Форма выпуска жидкость

- Используйте смазку в соответствии с инструкцией производителя аппарата по уходу за наконечниками.
- Стерилизацию наконечников производить в автоклаве при температуре 134°C в течение 3,5 минут.
- В случае если в инструкции к наконечнику имеются указания не совпадающие с приведенными выше, необходимо строго следовать указаниям инструкции.

3. Комплектность.

Спрей может комплектоваться в двух видах поставки:

Вид поставки -1

В состав комплекта входят:

- спрей-смазка в металлическом баллоне 1 шт.

Вид поставки- 2

В состав комплекта входят:

- спрей-смазка в металлическом баллоне 1 шт;
- насадки на распылитель – 3 шт.

Смазка в жидкой форме выпускается в пластиковой таре емкостью 1л, 2 л.

По требованию заказчика спрей или жидкость могут поставляться в другой комплектации и упаковке по выбору заказчика.

4. Маркировка.

Маркировка баллона или канистры для смазки должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование смазки;
- номер партии;
- гарантийный срок хранения;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год и месяц выпуска;
- обозначение настоящих технических условий;
- инструкцию по применению.

Место нанесения маркировки – этикетка, наклеенная на баллон или канистру.

Упаковочная коробка должна содержать маркировку с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования смазки;
- обозначения настоящих технических условий;
- года и месяца выпуска.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением на ящики манипуляционных знаков «Верх», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры».

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

5. Упаковка.

Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников «ДС ойл», «ДС ойл+» в форме выпуска спрей изготавливается в металлическом баллоне. В форме выпуска жидкости изготавливается в пластиковой таре.

Допускается использование других упаковочных материалов, разрешенных к применению на территории РФ, по качеству не уступающих указанным в настоящих технических условиях.

В качестве транспортной тары должны применяться ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Количество упаковываемых баллонов или канистр определяет предприятие-изготовитель по согласованию с заказчиком.

6. Транспортирование и хранение.

Смазку транспортируют всеми крытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта.

Условия транспортирования в диапазоне температур от +4 °С до +25 °С.

Смазка в упаковке производителя должна храниться в диапазоне температур от минус 5 °С до + 40 °С.

Смазку необходимо хранить вне зоны досягаемости детей.

Смазка легко воспламеняется. Хранить вдали от источников тепла, не курить.

Предохранять от контакта с глазами.

Применять только на материалах, нечувствительных к спиртам.

7. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие смазки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией. Гарантийный срок хранения смазки – 5 лет со дня изготовления.

8. Техническое обслуживание и ремонт.

Изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

9. Утилизация.

Утилизация просроченных изделий и потребительской тары производится в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" по классу Г.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 3 листов
Генеральный директор
Браденко О. М.

