

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО "Эстад-Сервисгруп"

ЭСТАД-
СЕРВИСГРУП

А.М.Проценко

2010г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система универсальная адгезивная с нанонаполнителем "ДиСи Бонд"
ТУ 9391-004-59004022-2010

г.Москва
2010 г.

Инструкция предназначена для медицинского персонала стоматологических учреждений.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Универсальная адгезивная система с нанонаполнителем «ДиСи Бонд» предназначена для склеивания и создания максимальной связи дентина, эмали зуба, композитных материалов, фарфора, металлокерамики и металлов. Нанонаполнитель, входящий в состав адгезива, лучше проникает в дентинные канальцы, повышает механическую прочность гибридного слоя и отвечает за малую толщину фиксирующей пленки.

Адгезив предназначен для:

- Всех классов прямых композитных реставраций
- Починки композитных реставраций и металлокерамики
- Фиксации конструкций на композитные цементы
- Фиксации виниров
- Непрямых реставраций из металла, керамики или композита в сочетании с композитным адгезивным цементом.

Адгезив выпускается в виде жидкости, готовой к употреблению в пластиковом флаконе.

2. ПРИМЕНЕНИЕ АДГЕЗИВА

2.1. Изолируйте зуб и подготовьте полость в присущей для себя манере. Очистите всю поверхность суспензией пемзы и дезинфицирующего средства или водой.

2.2. Обрабатывайте эмаль и дентин травящим составом в соответствии с инструкцией производителя.

2.3. Тщательно промойте. Удалите излишки воды, промокнув поверхность губчатым тампоном или бумажным штифтом, оставив дентин и эмаль заметно

влажными с блестящей поверхностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании «ДиСи Бонд» встряхните бутылку.

2.4. Держа флакон под углом 45 градусов, выдавите 1-2 капли в лунку для перемешивания. С помощью кисточки нанесите не менее двух слоев на отпрепарированную поверхность, смачивая кисточку между нанесением слоев. Перемешивать 10-15 секунд.

2.5. Слабым потоком воздуха, мягко, но тщательно просушите поверхность до полного испарения растворителя, но не пересушивая. После высыхания поверхность должна быть блестящей, в противном случае нанесите еще один слой адгезива.

2.6. Засветите обработанную поверхность в течение 10-15 секунд. Если для проведения реставрации необходим еще один слой, повторите процедуру.

2.7. Продолжайте реставрацию зуба.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Изделие не содержит компонентов, предельные значения которых нужно контролировать на рабочем месте.

3.2. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.

3.3. При правильном использовании защиты рук резиновыми перчатками не требуется, однако желательно.

3.4. Избегать попадания в глаза.

3.5. Не использовать по истечении срока годности.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Адгезив «ДиСи Бонд» безопасен в применении. Признаки раздражения возможны лишь при использовании адгезива персоналом с повреждениями кожи рук, а также при попадании адгезива в глаза или в желудок.

4.2. При попадании адгезива в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды в течение 15 мин, закапать 2 капли 30% раствора сульфацила натрия. Если раздражение сохраняется, обратиться за медицинской помощью.

4.3. При попадании адгезива в желудок: **Не вызывать рвоту!** Запить его

большим количеством воды, после этого принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля, обратиться за медицинской помощью.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Адгезив транспортируют всем крытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта. Условия транспортирования в диапазоне температур от + 5 °С до +25 °С.

5.2 Адгезив в упаковке производителя должны храниться в диапазоне температур от + 5 °С до + 25 °С.

5.3 Адгезив необходимо хранить вне зоны досягаемости детей.

5.4 Адгезив легко воспламеняются. Хранить вдали от источников тепла, не курить.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие адгезива требованиям ТУ 9391-004-59004022-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок хранения адгезива – 2 года со дня изготовления