


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Эстэйл-Сервисгруп"

М.Проценко

2011г.

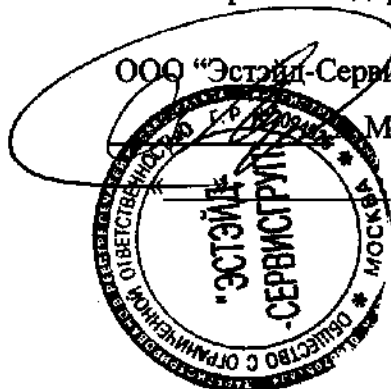

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ

**ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ОЧИСТКИ И  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «ДС КЛИНСТЭНД»  
И ДИСКИ ПОРОЛОНОВЫЕ СМЕННЫЕ  
ОДНОРАЗОВЫЕ  
по ТУ 9398-004-59004022-2011**

Г.Москва  
2011 г.

## 1. Общие сведения.

Подставка для очистки и дезинфекции эндодонтических инструментов с дисками поролоновыми сменными одноразовыми «ДС Клинтэнд» (далее – Клинтэнд). Область применения – стоматология.

Клинтэнд применяется для хранения использованного эндодонтического инструмента в дезинфицирующем растворе, механической очистки рабочей поверхности эндодонтических инструментов и дезинфекции их рабочих поверхностей перед повторным использованием, транспортировки и использования на рабочем столе стоматолога. Диски поролоновые сменные одноразовые могут поставляться отдельно от Клинтэнда.



## 2. Комплектность.

Клинтэнды могут комплектоваться в двух видах поставки.

В состав комплекта в сборе входят:

Вид поставки-1

- крышка – 1 шт ;
- дно – 1 шт;
- диск поролоновый – 1 шт,
- упаковка – 1 шт.

В состав комплекта входят:

Вид поставки- 2

- диск поролоновый одного типоразмера – по 25 и более шт.;
- упаковка – 1 шт.

По требованию заказчика диски поролоновые могут поставляться в другой комплектации и упаковке по выбору заказчика.

### Способ применения

Дно подставки наполняется дезинфицирующим раствором, сверху накладывается поролоновый диск и фиксируется крышкой. Один поролоновый диск - должен применяться только для одного пациента.

#### **4.Упаковка.**

Клинстенд одного вида поставки должен быть уложен согласно сборочному чертежу в картонную коробку.

Допускается использование других упаковочных материалов, разрешенных к применению на территории РФ, по качеству не уступающих указанным в настоящих технических условиях.

В качестве транспортной тары должны применяться ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.Количество упаковываемых клинстендов определяет предприятие-изготовитель по согласованию с заказчиком.

#### **5.Транспортирование и хранение.**

Изделия транспортируют всеми крытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта.

Условия транспортирования в диапазоне температур от +4°С до +25°С.

Клинстенды в упаковке производителя должны храниться в диапазоне температур от минус 25°С до + 40°С.

Изделия необходимо хранить вне зоны досягаемости детей.

Поролон легко воспламеняется. Хранить вдали от источников тепла, не курить.

#### **6.Гарантии изготовителя.**

Гарантийный срок хранения подставки – 3 года со дня изготовления.

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 3 листов

*Прислано*

