



**ООО НПФ «ЛИТА-ЦВЕТ»**

Россия, 105264, Москва, 9 Парковая, 48 корп. 4 ☎ Тел./факс: (495) 965 0500, 965 0539 ☎ E-mail: info@lita-tsvet.ru ☎ URL: http://www.lita-tsvet.ru

Утверждена  
Приказом Росздравнадзора  
От \_\_\_\_\_ 2009 г.  
№ \_\_\_\_\_



## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению повязки гелевой для заживления ран «Лита-Цвет - 2»**

**НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕЛЯ.** Повязка гелевая для заживления ран «Лита-Цвет-2» - стерильное перевязочное средство в виде геля, готовое к употреблению. Обладает защитными свойствами, так как образует на ране эластичную воздухопроницаемую пленку, и способствует ранозаживлению без образования грубых рубцов. Несущей основой повязки является гидрогелевая композиция: гидроксипропилцеллюлоза и «Эксоллин»<sup>®</sup>, (фирменный препарат, содержащий экстракт коллагена, обогащенный уроновыми и аминокислотами, минеральными веществами и микроэлементами). Повязка может содержать антибиотик - гентамицина сульфат и использоваться как профилактическое средство для предотвращения септического воспаления. Лечебный эффект повязки полностью обеспечивается взаимодействием компонентов геля и раны. Повязка активно действует в течение трех суток.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.** Повязка предназначена для защиты и лечения ран и ожогов во всех фазах раневого процесса, а также для профилактики септического воспаления и патологического рубцевания в послеоперационных ранах.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.** Редко возникающие аллергические реакции. Повязку следует применять с осторожностью при длительном использовании на больших поверхностях кожи, особенно у пациентов с хронической почечной недостаточностью, невритом слухового нерва и у беременных.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.** Повязку нанести на рану, при необходимости наложить стерильную марлевую салфетку и зафиксировать на ране с помощью бинта или пластыря или рану закрыть стерильным пластырем с мягкой впитывающей подушечкой из нетканого материала. Смену повязок производить через 24-72 часа в зависимости от состояния раны. При использовании повязки на гнойно-некротических ранах необходима предварительная очистка их обычными методами.

**ХРАНЕНИЕ.** При комнатной температуре. Срок хранения - 3 года.

Зав.лабораторией, к.фарм.н.

Н.И.Синицына