



- 1) Повышение ВГД
- 2) Кистовидный макулярный отек
- 3) Отслойка сетчатки
- 4) Атрофия радужки
- 5) Воспалительные явления в переднем отрезке глаза
- 6) Синехии
- 7) Спадание передней камеры
- 8) Преципитаты на ИОЛ

- 9) Эндофталмийт
- 10) Помутнение ИО
- 11) Фиброз задней капсулы
- 12) Гипопион
- 13) Аметропия высокого порядка или анизейкония
- 14) Отек роговицы
- 15) Иридо-хрусталиковый (зрачковый) блок
- 16) Децентрация ИОЛ
- 17) Дислокация или подвывих ИОЛ

Инструкция

Картонную упаковку открывают, потянув за крышку. Открыв стерильную упаковку, аккуратно вынимают блистер с ИОЛ. Открыв стерильный блистер, вынимают ИОЛ с помощью пинцета (без зубцов). Все манипуляции, необходимые для имплантации ИОЛ, должны проводиться с использованием пинцетов без зубцов и инструментами с полированными поверхностями.

Предупреждение: не рестерилизовать – только одноразовое использование!

После открытия блистера ИОЛ должна быть имплантирована немедленно. Проверьте срок годности на упаковке перед использованием.

Предостережение – не использовать, если внешняя упаковка повреждена!

Хирург информируется о том, что, поскольку ИОЛ является гидрофильной, она может абсорбировать вещества, с которыми она контактирует (например, антибиотик, вискоэластик).

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (ИЗ НИЗКОЙ В ВЫСОКУЮ) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОМУТНЕНИЮ ИОЛ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ИОЛ ДО ДОСТИЖЕНИЯ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ ПРОЗРАЧНОСТИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИОЛ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ.

Условия хранения

Хранение в сухом прохладном месте (макс. 45°C, мин. 0°C). Срок годности 36 месяцев от даты производства.

Директор ООО «Медицинские
Современные Технологии и Консалтинг»



Шабалин Н.Б.