

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

"01" 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического базисного «ЛИГАДЕНТ» ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический базисный «ЛИГАДЕНТ» относится к группе твердых восков - тип 2 по ГОСТ 31566-2012 и предназначен для моделирования базисов съемных, полных и частичных пластиночных зубных протезов. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический базисный «ЛИГАДЕНТ» выпускается в виде пластин красно-розового цвета. Полупрозрачные пластинки воска без внутренних напряжений в размягченном состоянии легко соединяются друг с другом, не приликая к пальцам. Воск легко формуется в разогретом состоянии и обрабатывается при комнатной температуре острым инструментом. После слабого нагрева над пламенем восковые пластинки имеют гладкую поверхность. При изготовлении протеза воск легко без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм, не оставляет следов на фарфоровых и пластмассовых зубах и не окрашивает пластмассу протеза. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31566-2012. Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральная смола, краситель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Для изготовления базиса пластинку воска обрезают шпателем приблизительно по форме модели и, размятив воск, равномерно разогревая его над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формируют базис, прижимая воск к модели пальцами рук, избегая при этом излишних усилий, чтобы не истончить местами восковую пластинку. Изготовление базиса съемного протеза проводится общепринятыми в стоматологии методами. Прикусные шаблоны, восковые валики изготавливают из разогретой восковой пластинки, свернутой в несколько слоев. Валик скрепляют с базисом, расплавленным на шпателе воском.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Пластины	- 500± 15г.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
"01" «03» 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Воска зуботехнического бюгельного «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический бюгельный «ЛИГАДЕНТ» предназначен для создания промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический бюгельный «ЛИГАДЕНТ» выпускается в виде дисков красно-розового цвета. Полупрозрачные диски воска без внутренних напряжений в размягченном состоянии легко соединяются друг с другом, не прилипая к пальцам. Обладает высокой пластичностью, легко формируется на модели, хорошо обрабатывается. Диски с рельефом имитируют макро и микро рельеф слизистой оболочки твердого неба. Воск имеет незначительное термическое линейное. Основными компонентами являются парафин, церезин и краситель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Восковую пластинку разогревают над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формуют.

ФОРМА ВЫПУСКА:


Диски	- 100± 5г.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

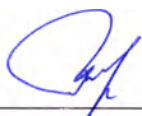

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
"01" 05 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Воска зуботехнического моделировочного «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок, дуг и каркасов бюгельных и мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный «ЛИГАДЕНТ» выпускается в виде палочек квадратного сечения. Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральный и синтетический воск, канифоль сосновая и краситель. Воск имеет хорошие пластические свойства, обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает 0,02 %. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012. Цвет синий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Восковую палочку, перед применением, разогревают над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Бруски 40х9х9мм.(20шт.)	- 55± 2г.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

"01" 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического моделировочного универсального «ЛИГАДЕНТ»

ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный универсальный «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для моделирование коронок, мостов, соединение элементов мостовидных протезов. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный универсальный «ЛИГАДЕНТ» выпускается цвета мята-опак, расфасованный в банках. Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральные и синтетические воска и краситель. Воск имеет хорошие пластические свойства, температура плавления 74°C, обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает 0,02 %. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Разогретым электрошпателем набирают необходимое количество воска и по каплям наносят на модель.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °C до +25 °C. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. . Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер



А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

"01" 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**воска зуботехнического моделировочного окклюзионного «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный окклюзионный «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для моделирование флигарных жевательных поверхностей. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный окклюзионный «ЛИГАДЕНТ» выпускается цвета белый-опак, расфасованный в банках. Основными компонентами являются парафин, церезин и краситель. Воск имеет хорошие пластические свойства, обладает высокой твердостью, малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает 0,02 %. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Разогретым электрошпателем набирают необходимое количество воска и по каплям наносят на модель.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. . Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
"01" 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Воска зуботехнического погружного «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический погружной «ЛИГАДЕНТ» представляет собой восковую композицию, позволяющую получить восковый колпачок с толщиной стенки (0,35±0,05) мм. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический погружной «ЛИГАДЕНТ» выпускается в виде стружки или капли, желтого цвета. Применяется для работы с электрической воскотопкой, т. к. она позволяет поддерживать длительные промежутки времени наиболее точную температуру воска. Твердый, неэластичный погружной воск с отличными формовочными качествами. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение. Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральный воск и краситель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Температура воска при погружении должна находиться в интервале 84°C - 92°C. Температура кристаллизации начинается от 70 °C.

ФОРМА ВЫПУСКА:


Банка	- 100± 5г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °C до +25 °C. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

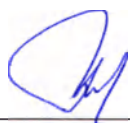

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**воска зуботехнического моделировочного цервикального «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный цервикальный «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и используется для моделирования инлеев и цервикальных краев коронок. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный цервикальный «ЛИГАДЕНТ» выпускается красного цвета, расфасованный в банках. Основными компонентами являются парафин, церезин и краситель. Воск имеет хорошие пластические свойства, обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает 0,02 %. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Разогретым электрошпателем набирают необходимое количество воска и по каплям наносят на модель.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "ИПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
"01" "03" 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического моделировочного базового «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный базовый «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для выравнивания неровностей и заполнения полостей гипсовой модели. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный базовый «ЛИГАДЕНТ» представляет собой сложный состав на основе парафина, церезина, природных и синтетических смол и красителя. Очень твердый и тугоплавкий воск идеально заполняет воздушные раковины и неровности гипсовой модели. Хорошо скоблится и полируется. Температура плавления 88-90 °С. Рабочая температура шпателя 133-135 °С. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012. Цвет белый-опак.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Разогреть шпатель до рабочей температуры. Набрать необходимое количество воска и произвести необходимое моделирование. Излишки воска соскоблить шпателем или скальпелем.


ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

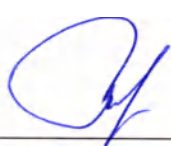главный инженер  А.В.Никонов

«01» марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического моделировочного клеевого «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный клеевой «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для соединения отдельных частей восковых конструкций, таких как: мосты, замки, части бюгельного протеза, литниковые каналы. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный клеевой «ЛИГАДЕНТ» представляет собой многокомпонентную композицию на основе парафина, церезина и красителя. Твердый, контрастный воск с низкой температурной усадкой позволяет производить соединительные работы воскового моделирования. Сгорает без остатка. Температура плавления 88-90 °С. Рабочая температура шпателя 125-130 °С. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012. Цвет темно-синий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Разогреть шпатель до рабочей температуры. Набрать необходимое количество воска и произвести необходимое моделирование. Излишки воска соскоблить шпателем или скальпелем.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "ИПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

"01" 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического моделировочного фрезерного «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный фрезерный «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для моделирования элементов протеза с последующей механической обработкой вращающимся инструментом. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный фрезерный «ЛИГАДЕНТ» представляет собой сложную многокомпонентную композицию на основе парафина, церезина, стеарина, природного воска и красителя. Температура плавления 65-68 °С. Рабочая температура электрошпателя 110-115 °С. Оптимальная частота вращения фрезы 2500-5000 об/мин. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012. Цвет синий-опак.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Разогреть шпатель до рабочей температуры. Набрать необходимое количество воска и произвести необходимое моделирование. Излишки воска соскоблить шпателем или скальпелем. Обработать фрезой до получения необходимой формы.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер



А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "ИПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
"01" 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического моделировочного для поднутрений «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный для поднутрений «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и предназначен для для блокирования поднутрений, полостей или неровностей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный для поднутрений «ЛИГАДЕНТ» представляет собой многокомпонентный состав на основе парафина, церезина, натуральной смолы и красителя. Идеален при дублировании с помощью силиконов, дублирующего геля. Хорошо скоблится, образуя сухую не вязкую стружку. Матовость воска позволяет распознать тонкие участки работы. Температура плавления 80 °С. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012. Цвет розовый-опак.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Разогреть шпатель до рабочей температуры. Набрать необходимое количество воска и произвести необходимое моделирование. Излишки воска соскоблить шпателем или скальпелем.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 75± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер  А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического моделировочного липкого «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический моделировочный липкий «ЛИГАДЕНТ» относится к группе мягких восков - тип 1 по ГОСТ 31567-2012 и применяется для склеивания и соединения перед пайкой между собой металлических частей бюгельного протеза. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический моделировочный липкий «ЛИГАДЕНТ» представляет собой сложный состав на основе парафина, церезина, природного воска и красителя. В холодном состоянии очень хрупкий и твердый. Температура плавления 70°C. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение и соответствует требованиям ГОСТ 31567-2012. Цвет светло-коричневый.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Разогреть шпатель до рабочей температуры. Набрать необходимое количество воска и произвести необходимое моделирование. Излишки воска соскоблить шпателем или скальпелем.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Банка	- 90± 3г.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °C до +25 °C. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев

«01» 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического литникового «ЛИГАДЕНТ»

ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический литниковый «ЛИГАДЕНТ» применяется для моделирования литниковых каналов в технике модельного литья. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический литниковый «ЛИГАДЕНТ» представляет собой состав на основе парафина, церизина и красителя. Выпускается в виде прутков круглого сечения различных диаметров. Твердый и достаточно эластичный воск, позволяет быстро и прогнозируемо смоделировать литниковые каналы на восковой модели. Выгорает без остатка. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение. Цвет зелёный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Отрезать необходимое количество восковой заготовки. Соединить с восковой моделью или восковыми прутками других диаметров. Сформировать литниковый канал.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Выпускаемый диаметр 2.5мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 5мм

Прутки по 15 см. - 100±5г.

Картонная коробка-пенал - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер



А.В.Никонов

«01» марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "НПП "ЛИГА"

О.А.Алексеев
" 01 " 03 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

воска зуботехнического профилированного «ЛИГАДЕНТ»
ТУ 9391-001-22286416-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Воск зуботехнический профилированный «ЛИГАДЕНТ» предназначен для моделирования бюгельных протезов и создания литниково-питающей системы при отливке металлических деталей зубных протезов. Применяется в ортопедической стоматологии для создания временных конструкций - моделей зубных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Воск зуботехнический профилированный «ЛИГАДЕНТ» представляет собой состав на основе парафина, церезина, стеарина, натурального воска, канифоли и красителя. Применяется при создании литниково-питающей системы восковой профиль легко соединяется с восковыми моделями, образуя прочный спай, не вступает в реакцию со связующими и огнеупорными массами, выплавляется и сгорает без остатка. Цвет красный, синий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа. Восковой профиль разогревают над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формуют. Воск имеет незначительное термическое линейное расширение.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Профиля различного сечения.	- 100±5г.
Картонная коробка-пенал	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения 2 года. Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности. Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции. Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Воск зуботехнический пожаро и взрывобезопасный, не токсичный. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется потребителем.

Разработчик

главный инженер

А.В.Никонов

« 01 » марта 2016 г.

