



mtp medical technical promotion gmbh

Копия верна

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструмент колющий, в наборах или отдельных упаковках

Троакар, 5 мм, 020206-01, 020206-30.

Троакар, 10 мм, 020274-01, 020274-10.

Троакар, 10 мм, 020275-01, 020275-10.

Троакар, 12 мм, 020276-01, 020276-10.

Редукционный клапан, 5 мм, 020273-01.

Игла Вереша, 120 мм, 020280-01.



mtp medical technical promotion gmbh

Производитель

«мтп медикал техникал промоушн гмбх», тейк-офф ГевербеПарк 46, 78579 Нойхаузен об Экк, Германия. «mtp medical technical promotion gmbh», take-off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germany.

Назначение изделий - «Инструмент колющий, в наборах или отдельных упаковках» применяется в абдоминальной, торакальной и гинекологической хирургии для формирования отверстий, через которые вводятся эндоскопические инструменты.

Гарантийные обязательства производителя

Условия хранения и срок годности изделия указан на упаковке. Изделия в нарушенной индивидуальной упаковке не пригодны к использованию, и подлежат утилизации в установленном порядке.

Класс потенциального риска применения – 2а.

Материалы - для производства инструментов колющих компания mtp medical technical promotion gmbh использует поливинилхлорид, полипропилен, сталь нержавеющей.

Метод стерилизации - стерилизация этиленоксидом. Изделия являются одноразовыми и подлежат утилизации после однократного использования.


take-off GewerbePark 46, D-78579 Neuhausen obEck, Germany +49(7467)9 45 04-0, +49(7467)9 45 04-99




mtp medical technical promotion gmbh

Описание изделий

Редукционный клапан, 020273-01 – внутренний диаметр 5мм, предназначен для работы с троакарами, стерильно, 1 шт.

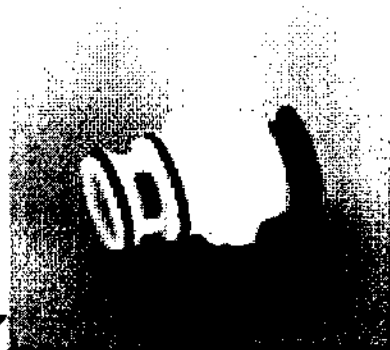

Игла Вереша 020280-01 для инсуффляции пневмоперитонеума перед проведением малоинвазивной хирургии - 120мм, имеет LUER-Lock, стерильно по 1 шт. в упаковке.

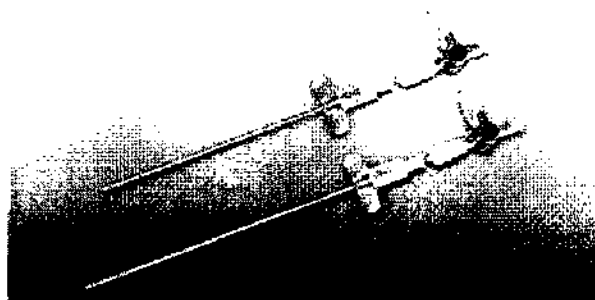

Троакары для инсуффляции пневмоперитонеума перед проведением малоинвазивной хирургии. Троакар состоит из трубки с вставленным в нее стилетом (остроконечный/тупоконечный); после введения троакара в полость этот стилет удаляется.

Троакар, 020206-01, 020206-30 – внутренний диаметр 5мм., длина 100мм., стерильно 1 или 30 шт. в упаковке.


Троакар, 020274-01, 020274-10 - внутренний диаметр 10мм., длина 100мм., стерильно 1 или 10 шт. в упаковке.

Троакар, 020275-01, 020275-10 - внутренний диаметр 10мм., длина 100мм., стерильно 1 или 10 шт. в упаковке.



mtp medical technical promotion gmbh

Троакар, 020276-01, 020276-10 - внутренний диаметр 12мм., длина 100мм., стерильно 1 или 10 шт. в упаковке.

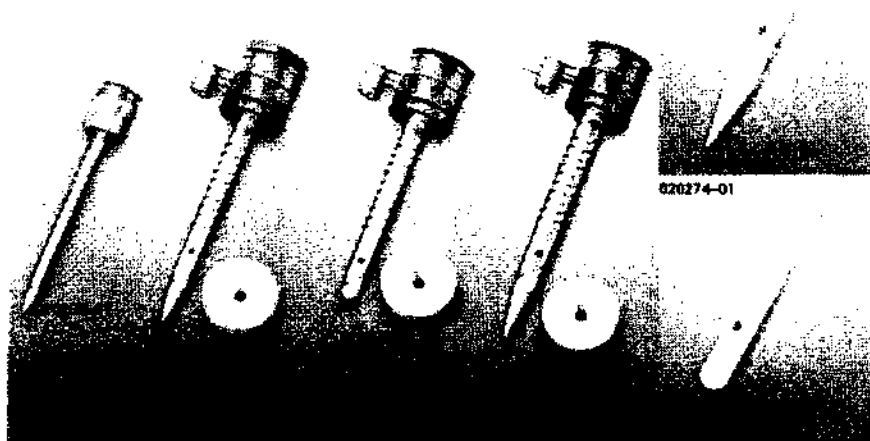

Транспортировка и хранение - Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение изделия производится в условиях согласно рекомендациям производителя.

Упаковка - Изделия поставляются стерильными в индивидуальной упаковке, собранными по несколько штук в общую коробку.

take-off GewerbePark 46, D-78579 Neuhausen obEck, Germany +49(7467)9 45 04-0, +49(7467)9 45 04-99