



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
комплекта изделий стоматологического для ретракции десны
и остановки капиллярного кровотечения
«РЕ-КОРД»
ТУ 9391-013-45814830-2001

Комплект «Ре-Корд» состоит из ретракционной жидкости для тампонирования и нитей различной толщины:

- № 1 – тонкой;
- № 2 – средней;
- № 3 – толстой.

Выпускаются нити (обработанные), содержащие ретракционные компоненты, а также нити необработанные.

НАЗНАЧЕНИЕ

Нить из комплекта «Ре-Корд» применяется для ретракции десны, а также для устранения десневого просачивания во время препарирования полостей, расположенных в пришеечной области зуба.

Жидкость из комплекта «Ре-Корд» применяется при апикальных и десневых кровотечениях, а также для пропитывания необработанных нитей.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Терапевтический эффект жидкости «Ре-Корд» связан с вяжуще-сокращающими свойствами хлористого алюминия, входящего в состав.

Ретракция (сжатие и открепление) десны носит временный характер (в течение 30 минут). Затем мягкие ткани восстанавливают свою первоначальную форму.

Ретракционная нить «Ре-Корд» представляет собой готовую к применению форму: скрученные хлопковые волокна, обработанные по специальной технологии.

Необработанные нити легко пропитываются жидкостью «Ре-Корд» непосредственно перед проведением ретракции.

Применение жидкости «Ре-Корд» перед снятием слепков позволяет получить отпечатки с четко обозначенными краями шеек отпрепарированных зубов, применение ретракционной нити позволяет без кровотечения поставить матрицы или другие приспособления в межзубный промежуток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для устранения капиллярного кровотечения используют ватный тампон, смоченный жидкостью «Ре-Корд», который слегка прижимают к десне. В случае кровотечения из канала жидкость вводят в канал с помощью пипетки или эндодонтической иглы.

Для ретракции десны изолируют участок от слюны и ватным тампоном, смоченным жидкостью «Ре-Корд», обрабатывают поверхность десны в пришеечной области. Затем отрезают необработанную нить (до 10 см), пропитывают ее жидкостью «Ре-Корд», обматывают ею зуб на уровне десны и с помощью инструментов осторожно проталкивают нить между зубом и десной.

При использовании обработанных (пропитанных) нитей ретракцию десны можно проводить без предварительной обработки десны ретракционной жидкостью.

Для усиления ретракции через 5-10 минут десну можно дополнительно обработать жидкостью «Ре-Корд».

ФОРМА ВЫПУСКА

Комплект:

Ретракционная жидкость (флакон-капельница)	- 5 мл
Ретракционная нить (необработанная) № 1 или № 2 или № 3	- 2 м
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Комплект:

Ретракционная жидкость (флакон-капельница)	- 15 мл
Ретракционная нить (необработанная) № 1 + № 2 + № 3	- по 2 м
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Выпускаются отдельно:

Ретракционная жидкость (флакон-капельница)	- 5 мл
Ретракционная нить (обработанная) № 1 или № 2 или № 3	- 2 м
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности - 2 года.