



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
цемента стоматологического стеклоиономерного
рентгеноконтрастного химического отверждения
"СТИОДЕНТ"

ТУ 9391-039-45814830-2000

НАЗНАЧЕНИЕ

"Стиодент" - водозатворимый, рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент. Предназначен для пломбирования корневых каналов.

СВОЙСТВА

Стоматологический материал "Стиодент" обладает высокой биосовместимостью, хорошей адгезией к дентину, рентгеноконтрастностью, низкой растворимостью, высокой механической прочностью.

Порошок стеклоиономерного цемента «Стиодент» представляет собой механическую смесь измельченного алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты, легко смешивается с водой до получения необходимой консистенции.

Стеклоиономерная реакция начинается сразу же после смешивания порошка и воды и сопровождается выделением ионов фтора, что укрепляет дентин и оказывает бактерицидное действие.

"Стиодент" в комбинации с гуттаперчевыми или металлическими штифтами позволяет достичь весьма прочного и надежного пломбирования корневых каналов. "Стиодент" может использоваться и без штифтов.

При необходимости канал можно распломбировать, комбинируя химическое действие препарата "Сольвадент" с механическим воздействием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом работы капельницу заполняют дистиллированной водой до половины ее объема. Для правильной дозировки капельницу следует держать строго вертикально и достаточно высоко, чтобы капля падала свободно. Баночку с порошком несколько раз встряхивают. Порошок дозируют ложкой-мерником, заполняя ее вровень с краями, избыток порошка удаляют шпателем.

Материал замешивают на специальном блокноте или стекле пластмассовым или металлическим шпателем порциями в течение 30-

40 сек. Рекомендуется порошок и жидкость смешивать в весовом соотношении 2,3:1, что соответствует 1 мернику порошка (0,23г) и 2 каплям воды (0,1г). Рабочее время материала 9-10 мин. при температуре 18...23°C и относительной влажности 45-55%. Более высокая температура сокращает рабочее время, материал следует замешивать на охлажденном стекле.

Корневой канал обрабатывают и очищают по общепринятой методике. Подготовленный материал с помощью каналонаполнителя вносят в корневой канал и тщательно уплотняют. Полное отверждение материала в корневом канале проходит в течение 30 - 40 минут.

Металлические инструменты сразу после использования рекомендуется промыть водой или дезинфицирующим составом.

Вниманию стоматологов !!!

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

Не допускать попадания порошка на мягкие ткани полости рта или кожу. При попадании немедленно промыть водой.

В случае попадания порошка в глаза необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (банка)	10 г
Капельница	1 шт.
Мерная ложка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +25°C.

Избегать попадания влаги.

Срок годности – 2 года.