



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
материала стоматологического светового отверждения для  
временных пломб  
«ТемпоФот»  
ТУ 9391- 114 -45814830-2008**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

«ТемпоФот» применяется в качестве временного пломбировочного материала для изоляции полостей под вкладку или покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса.

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

«ТемпоФот» представляет собой светоотверждаемый композиционный материал на основе полиуретанакрилата и мелкодисперсного наполнителя.

В состав пасты «ТемпоФот» входят:

- активаторы светового отверждения;
- стабилизаторы;
- технологические добавки, обеспечивающие оптимальную консистенцию;
- бактерицидное вещество (хлорид бензалкония), которое оказывает микростатическое и микробоцидное действие на бактерии и кандиды.

Отвержденный материал «ТемпоФот» обладает сбалансированными свойствами твердости и эластичности, что обеспечивает стабильность пломбы на период временного пломбирования, и позволяет при этом легко и без остатка удалить материал из полости.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

В подготовленную высушенную полость внести пасту «ТемпоФот» подходящим инструментом (круглым шпатель, шпателем и т.д.). Провести моделирование при наличии небольшого избытка материала. При использовании материала «ТемпоФот» в качестве временного пломбировочного для изоляции полостей под вкладки и накладок перед полимеризацией необходимо изолировать контактные пункты с помощью зубной нити или матрицы (для сохранения подвижности зубов).

Провести полимеризацию материала светом галогеновой лампы длиной волны 450 – 500 нм в течение 20-40 сек (в зависимости от толщины слоя). Слой толщиной 5 мм отверждается за 40 сек. Торец световода необходимо держать в непосредственной близости к отверждаемому материалу. Если источник света невозможно близко поднести к материалу, то необходимо продлить время полимеризации.

Проверить окклюзию. Избыток материала срезать при помощи скальпеля. Для шлифовки подходят силиконовые финиры.

Для удаления вставить во временную пломбу жесткий инструмент и вытащить ее.

**Внимание!** Материал «ТемпоФот» может химически связываться с материалами прокладок. В этом случае используйте для изоляции глицерин или вазелин. Недопустимо совместное применение эвгенол-содержащих материалов для прокладок.

В случае длительной изоляции более чем на две недели и при пломбировании окклюзионной или краевой области в обязательном порядке рекомендуется провести усиление композитом (например «ДентЛайт»). Для этого незначительное количество композита нанести на намеченные места и провести полимеризацию по контуру вместе с пастой «ТемпоФот».

#### **ФОРМА ВЫПУСКА**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Паста (шприц)            | 3 г   |
| Инструкция по применению | 1 шт. |

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре **от +5°C до +25°C.**

Срок годности – **2 года.**

*При транспортировании в зимнее время ( $t$  ниже 0°C) материал необходимо выдержать при  $t$  +18°C .... +23°C в течение суток.*



