

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»
В.П. Чуев
«07» 06 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического композитного
для изготовления временных ортопедических конструкций
«ТЕМПОКОР»
ТУ 9391-127-45814830-2012

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический композитный материал «Темпокор» предназначен для изготовления временных коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Темпокор» - полимерный композитный материал на основе многофункциональных метакрилатов выпускается в виде двух паст (основной и каталитической) разных цветовых оттенков по шкале VITA (A₂, A₃, A_{3.5}, B₂, C₂). Полученный в результате смешивания равных количеств паст композитный цемент отверждается в течение короткого времени с образованием прочного материала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед препарированием или предполагаемым удалением зуба необходимо сделать оттиск при помощи альгинатного или силиконового оттискового материала. Оттиск очистить и просушить потоком воздуха.

Подготовленные зубы просушить и обработать вазелином или пастой «Аксил». Прилегающие композитные реставрации также изолировать вазелином.

Равные количества основной и каталитической паст «Темпокор» смешать пластмассовым шпателем в течение 20-30 секунд растирающими движениями во избежание захвата пузырьков воздуха. Полученная паста должна быть однородной по цвету. Заполнить подготовленный оттиск полученным цементом без избытка.

Не позднее чем через 45 секунд, оттиск, заполненный материалом «Темпокор», поместить в полость рта и зафиксировать на подготовленных зубах, оказывая умеренное давление.

Извлечь временную конструкцию из полости рта вместе с оттиском приблизительно через 2-3 минуты пока материал находится в **эластичном состоянии**.

Внимание! Следует осуществлять контроль процесса отверждения материала интраорально с помощью зонда, так как температура полости рта оказывает существенное воздействие на скорость отверждения материала.

К дальнейшей обработке ортопедической конструкции можно приступить после полного ее отверждения (через 5-7 минут с момента извлечения из полости рта). Липкий ингибированный кислородом воздуха слой на поверхности конструкции удалить спиртовым раствором. Для обработки временной конструкции использовать дисковые фрезы, гибкие диски и т.д. Проконтролировать окклюзию в полости рта и при необходимости сошлифовать конструкцию соответствующими инструментами.

Поверхность полученной временной конструкции покрыть светоотверждаемым лаком «Аксил-LC» или отполировать вручную с помощью полиров.

Для фиксации временной конструкции рекомендуется использовать безэвгенольный цемент («Темпофикс-безэвгенольный»).

Внимание! Эвгенолсодержащие материалы препятствуют полному отверждению композитных цементов для постоянной фиксации.

ФОРМА ВЫПУСКА

I.

Основная паста (шприц) одного из цветов (A ₂ , A ₃ , A _{3.5} , B ₂ , C ₂)	- 3,5 г
Каталитическая паста (шприц)	- 3,5 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

II. Набор

Основная паста (шприц) A ₂	- 2 шт. x 3,5 г
Основная паста (шприц) A ₃	- 2 шт. x 3,5 г
Основная паста (шприц) B ₂	- 2 шт. x 3,5 г
Каталитическая паста (шприц)	- 6 шт. x 3,5 г
Блокнот	- 1 шт.
Шпатель для смешивания в п/э пакете	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Коробка-ложемент	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от **+5°C до +10°C**.

Срок годности - 18 месяцев.

Несоблюдение условий хранения сокращает срок годности материала и может привести к изменению рабочих характеристик материала.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.