

КОД ОКП 94 4460

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МЕДИКОМ»
Агафонов И. В.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Небулайзеры компрессорные SENSITEC с принадлежностями

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88),
ГОСТ Р 50267.0.2-2005(МЭК 60601-1-2-2001)
" технической документации изготовителя

2013

I. Небулайзеры компрессорные SENSITEC, варианты исполнения:

SENSITEC NB-10, SENSITEC NB-20, SENSITEC NB-30, SENSITEC NB-40, SENSITEC NB-101, SENSITEC NB-102 в составе:

1. Компрессор.
2. Небулайзерная камера.
3. Трубка соединительная.
4. Загубник.
5. Маска для взрослых .
6. Маска для детей.
7. Адаптер 12V.
8. Шнур сетевой
9. Воздушные фильтры.
10. Руководство по эксплуатации.

II. Принадлежности:

1. Небулайзерная камера.
2. Трубка соединительная.
3. Загубник.
4. Маска для взрослых.
5. Маска для детей.
6. Носовая канюля.
7. Адаптер 12В.
8. Шнур сетевой
9. Воздушные фильтры.
10. Пипетка.
11. Предохранитель.
12. Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля.
13. Сумка для переноски небулайзера.
14. Чехол для небулайзера.
15. Руководство по эксплуатации.
16. Упаковочный лист.

Содержание

1. Назначение.
2. Общее описание
3. Основные технические характеристики
4. Эксплуатация и меры предосторожности
5. Возможные неисправности и способы их устранения
6. Техническое обслуживание
7. Хранение и транспортировка

1. Назначение.

Небулайзеры компрессорные SENSITEC, варианты исполнения:
NB-10, NB-20, NB-30, NB-40, NB-101, NB-102

Небулайзер обеспечивает эффективное распыление медикамента и применяется для терапии заболеваний дыхательной системы. Применяется в пульмонологии, интенсивной терапии, оториноларингологии, аллергологии и фтизиатрии.

2. Общее описание

Небулайзеры компрессорные SENSITEC, варианты исполнения:
NB-10, NB-20, NB-30, NB-40, NB-101, NB-102

Небулайзер – аппарат, который производит мелкодисперсный аэрозоль, может использоваться в домашних условиях и в лечебно-профилактических учреждениях для аэрозольной терапии. Небулайзер обеспечивает эффективное распыление медикамента, позволяет вводить высокие дозы лекарственных веществ в чистом виде, таких как бронходилататоры, антисептики, антибиотики, минеральные воды, муколитики, и фитосборы.

Механизм действия небулайзера основан на дисперсном распылении лекарственного средства. Приобретая консистенцию аэрозоля, препарат быстрее достигает всех отделов дыхательной системы и оказывает терапевтический эффект. Аэродинамический размер частиц менее 5 микрон позволяет проводить эффективные ингаляции верхних и нижних дыхательных путей. Компрессор подает мощный поток воздуха в специальную камеру. Сильная струя воздуха разбивает лекарственный препарат на сверхмалые частицы. В таком виде через маску или мундштук лекарственное средство поступает к пациенту в организм.

3. Основные технические характеристики

3.1 Небулайзер компрессорный SENSITEC, исполнение NB-10


SENSITEC



Питание	230 или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65±10% Вт
Объем емкости	от 2 до 13 мл
Размер частиц	от 0,5 до 5 мкм
ММАД	2,44 мкм
Средняя скорость распыления	0,4 мл/мин
Уровень шума	Ниже 55 дБ

Диапазон давления компрессора	280-350 кПа/2.8-3.5 Бар
Диапазон рабочего давления	100 - 150 кПа/1-1.5 Бар
Расход	6-8 мл
Минимальное количество	0.15 мл
Диапазон рабочих температур	от 10°C до 40°C
Влажность	от 10% до 95% Rh
Габариты	255x130x170 мм
Вес	1.35 кг
В комплекте	маска для взрослых 1 шт, маска для детей 1 шт, фильтры воздушные 5 шт, соединительная трубка 1 шт, небулайзерная камера 1 шт, загубник 1 шт.


3.2 Небулайзер компрессорный SENSITEC, исполнение NB-20

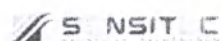

Питание	230 или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65±10% Вт
Объем емкости	от 2 до 13 мл
Размер частиц	от 0.5 до 5 мкм
ММАД	2.44 мкм
Средняя скорость распыления	0.4 мл/мин
Уровень шума	Ниже 55 дБ
Диапазон давления компрессора	280-350 кПа/2.8-3.5 Бар
Диапазон рабочего давления	100 - 150 кПа/1-1.5 Бар
Расход	6-8 мл
Минимальное количество	0.15 мл
Диапазон рабочих температур	от 10°C до 40°C
Влажность	от 10% до 95% Rh
Габариты	255x130x170 мм
Вес	1.35 кг
В комплекте	маска для взрослых 1 шт, маска для детей 1 шт, фильтры воздушные 5 шт, соединительная трубка 1 шт, небулайзерная камера 1 шт, загубник 1 шт.

3.3 Небулайзер компрессорный SENSITEC, исполнение NB-30


SENSITEC

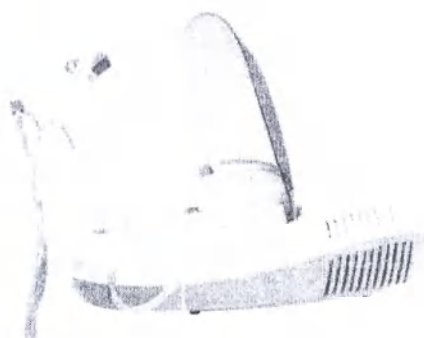

Питание	230 или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65±10% Вт
Объем емкости	от 2 до 13 мл
Размер частиц	от 0,5 до 5 мкм
ММАД	2,44 мкм
Средняя скорость распыления	0,4 мл/мин
Уровень шума	Ниже 55 дБ
Диапазон давления компрессора	280-350 кПа/2.8-3.5 Бар
Диапазон рабочего давления	100 - 150 кПа/1-1.5 Бар
Расход	6-8 мл
Минимальное количество	0,15 мл
Диапазон рабочих температур	от 10°C до 40°C
Влажность	от 10% до 95% Rh
Габариты	255x130x170 мм
Вес	1,35 кг
В комплекте	маска для взрослых 1 шт, маска для детей 1 шт, фильтры воздушные 5 шт, соединительная трубка 1 шт, небулайзерная камера 1 шт, загубник 1 шт.


3.4 Небулайзер компрессорный SENSITEC, исполнение NB-40

SENSITEC

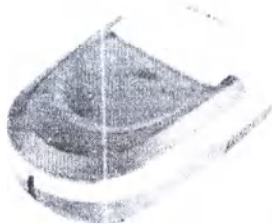

Питание	230 или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65±10% Вт
Объем емкости	от 2 до 13 мл
Размер частиц	от 0,5 до 5 мкм
ММАД	2,44 мкм
Средняя скорость распыления	0,4 мл/мин
Уровень шума	Ниже 55 дБ
Диапазон давления компрессора	280-350 кПа/2,8-3,5 Бар
Диапазон рабочего давления	100 - 150 кПа/1-1,5 Бар
Расход	6-8 мл
Минимальное количество	0,15 мл
Диапазон рабочих температур	от 10°C до 40°C
Влажность	от 10% до 95% Rh
Габариты	255х130х170 мм
Вес	1,35 кг
В комплекте	маска для взрослых 1 шт. маска для детей 1 шт. фильтры воздушные 5 шт. соединительная трубка 1 шт. небулайзерная камера 1 шт. загубник 1 шт.

3.5 Небулайзер компрессорный SENSITEC, исполнение NB-102

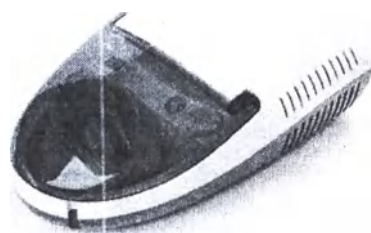

Питание	230 или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65±10% Вт
Объем емкости	от 2 до 13 мл
Размер частиц	от 0,5 до 5 мкм
ММАД	2,44 мкм
Средняя скорость распыления	0,4 мл/мин
Уровень шума	Ниже 55 дБ
Диапазон давления компрессора	280-350 кПа/2,8-3,5 Бар
Диапазон рабочего давления	100 - 150 кПа/1-1,5 Бар
Расход	6-8 мл
Минимальное количество	0,15 мл
Диапазон рабочих температур	от 10°C до 40°C
Влажность	от 10% до 95% Rh

Габариты	255x130x170 мм
Вес	1.35 кг
В комплекте	маска для взрослых 1 шт, маска для детей 1 шт, фильтры воздушные 5 шт, соединительная трубка 1 шт, небулайзерная камера 1 шт, загубник 1 шт.

3.6 Небулайзер компрессорный SENSITEC, исполнение NB-101



Питание	230 или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65±10% Вт
Объем емкости	от 2 до 13 мл
Размер частиц	от 0,5 до 5 мкм
ММАД	2,44 мкм
Средняя скорость распыления	0.4 мл/мин
Уровень шума	Ниже 55 дБ
Диапазон давления компрессора	280-350 кПа/2.8-3.5 Бар
Диапазон рабочего давления	100 - 150 кПа/1-1.5 Бар
Расход	6-8 мл
Минимальное количество	0.15 мл
Диапазон рабочих температур	от 10°C до 40°C
Влажность	от 10% до 95% Rh
Габариты	255x130x170 мм
Вес	1.35 кг
В комплекте	маска для взрослых 1 шт, маска для детей 1 шт, фильтры воздушные 5 шт, соединительная трубка 1 шт, небулайзерная камера 1 шт, загубник 1 шт, адаптер 12В, шнур сетевой

4.0 Эксплуатация и меры предосторожности

Общие сведения

Данное руководство по эксплуатации предназначены для обеспечения безопасной и корректной эксплуатации небулайзеров компрессорных SENSITEC. Эксплуатация с нарушениями требований, изложенных в настоящем руководстве, может привести к причинению серьезного вреда здоровью персонала или выходу аппарата из строя.

538

Вся информация, представленная в настоящем руководстве, основана на имеющихся в распоряжении производителя сведениях об изделиях на момент публикации руководства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, необходимые для дальнейшего усовершенствования продукции. Производитель не несет ответственности за последствия не соответствующей требованиям данного руководства эксплуатации изделий.

Обозначения

Требующие особого внимания пункты в настоящем руководстве выделены следующими обозначениями:

ОСТОРОЖНО!

Данное обозначение относится к требованиям по безопасности. Невыполнение этих требований способно привести к причинению серьезного вреда здоровью или к смерти.

ВНИМАНИЕ!

Данное обозначение относится к ситуациям, могущим привести к выходу аппарата из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Под этим обозначением находятся советы и иная полезная информация касательно эксплуатации.

Требования по безопасности

Правила по использованию небулайзера.

- При выборе типа, дозы и режима введения лекарственного средства следуйте указаниям Вашего лечащего врача и/или пульмонолога.
- Во избежание распространения инфекций, не допускается использование комплектующих различными пациентами без предварительной дезинфекции. Также необходимо провести очистку и дезинфекцию комплектующих, если вы их используете первый раз или после длительного хранения.
- После использования промойте все части, удостоверьтесь, что они должным образом продезинфицированы и высушены, после чего храните их в чистом месте.
- После дезинфекции небулайзерной камеры, промойте ее под струей воды. Никогда не оставляйте очищающий раствор в камере, мундштуке или аэрозольной трубке.
- Храните прибор в чистом месте.
- Храните прибор в месте недоступном для детей. Прибор содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены.
- Не используйте и не храните прибор там, где он может быть подвержен воздействию вредных паров или летучих веществ.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Никогда не размещайте прибор в таком месте, где его вентиляционные отверстия могут быть закрыты. При использовании не накрывайте небулайзер одеялом, полотенцем и т.д.
- Всегда очищайте небулайзер и его составные части от остатков лекарственных веществ. Используйте всегда только свежие лекарственные растворы.
- Не допускается применение анестезирующих смесей, огнеопасных при контакте с воздухом, кислородом и закисью азота.
- Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
- Перед использованием прибора убедитесь:
 - что все детали подсоединены должным образом,
 - что воздушный фильтр находится внутри крышки фильтра,
 - что воздушный фильтр чист, если воздушный фильтр изменил цвет или использовался длительное время, замените его новым.
- Не наливайте в емкость для лекарств более 13 мл лекарственного раствора.
- Не наклоняйте распылитель более, чем на 45 градусов, не трясите его во время использования.
- Не перегибайте воздушный шланг как во время хранения, так и во время использования небулайзера.

- Не роняйте прибор и не подвергайте его повреждениям.
- Не блокируйте крышку воздушного фильтра.
- Не сушите небулайзер и его компоненты в микроволновой печи или феном.
- Одобрено только для использования человеком. Используйте его только по назначению.

Требования по электробезопасности

- Прибор не защищен от проникновения жидкости.
- Нельзя прикасаться к прибору мокрыми руками.
- Перед дезинфекционной обработкой прибора обязательно отсоедините его от электросети. Отключайте прибор от сети, если Вы не используете его.
- Не отсоединяйте распылитель при работающем приборе.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или штепсель.
- Не допускается контакта сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Ремонт данного прибора должен осуществляться только в центрах технического обслуживания, рекомендованных компанией.

Действия в критических ситуациях

При возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей и сохранности имущества (возгорание, поражение электрическим током) немедленно выключите и обесточьте небулайзер!

Действия при выходе изделия из строя

- Не допускайте эксплуатации неисправного или с поврежденным кабелем питания небулайзера!
- Неисправный аппарат подлежит возврату организации-продавцу с целью ремонта.

Сборка и установка

Распаковка

Распакуйте небулайзер и принадлежности. Убедитесь в их целости и комплектности. В случае обнаружения дефектов немедленно свяжитесь с организацией-продавцом. Оригинальную упаковку сохраняйте на случай возникновения необходимости транспортировки изделия.

Электропитание

Небулайзеры предназначены для подключения к сети переменного тока 220В. При существенных отклонениях от указанного напряжения возможно изменение мощности, стабильности работы и сокращение срока службы аппарата.

Убедитесь в наличии и исправности плавкого предохранителя в основании аппарата.

Инструкции по эксплуатации

Подготовка прибора к работе

Перед работой с небулайзером тщательно вымойте руки. Достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Очистите и продезинфицируйте распылитель, мундштук, маску для лица (если их используют в первый раз после длительного хранения прибора и/или в том случае, если ими пользуются несколько человек). Установите небулайзер на ровную устойчивую поверхность таким образом, чтобы при проведении ингаляций было удобно пользоваться распылителем, аксессуарами и кнопкой включения/выключения.

Перед использованием прибора убедитесь:

- что все детали подсоединены должным образом;
- что воздушный фильтр находится внутри крышки фильтра;

540

- что воздушный фильтр чист (если воздушный фильтр изменил цвет или использовался длительное время, замените его новым).

Максимально допустимое время установления рабочего режима - 1 мин

Подготовка распылителя к работе.

1. Снимите крышку распылителя с емкости для лекарств:

Поверните крышку распылителя против часовой стрелки, а потом потяните ее вверх.

2. Залейте необходимое количество прописанного врачом раствора в емкость для лекарств.

ВНИМАНИЕ: емкость для лекарств составляет от 2 до 13 мл

Примечание: на емкости для лекарств нанесена шкала. Она служит для примерной оценки емкости лекарственного раствора. Шкала отображает емкость лекарства при установленном диффузоре.

3. Наденьте крышку распылителя на емкость для лекарств: совместите крышку распылителя с емкостью для лекарств, таким образом, чтобы выступы на крышке вошли в углубления на камере, потом поверните крышку по часовой стрелке.

Подсоединение воздушного шланга.

1. Присоедините воздушный шланг к разьему для воздушной трубки компрессора.

2. Присоедините другой конец воздушного шланга к разьему для воздушного шланга распылителя.

Убедитесь, что воздушный шланг подсоединен надежно, во избежание утечек воздуха.

Во время подсоединения воздушного шланга не пролейте лекарство, держите распылитель строго вертикально.

Используйте держатель для распылителя на корпусе прибора для временного удержания распылителя в вертикальном положении.

3. Подсоедините маску или мундштук к распылителю.

4. Убедитесь, что выключатель находится в положении **О**, т.е. прибор выключен.

5. Достаньте сетевой шнур из отсека для хранения, вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

Прием лекарственного средства

1. Держите распылитель строго вертикально.

Внимание! Не наклоняйте распылитель более, чем на 45 градусов. Лекарственное средство может вытечь в рот.

2. Нажмите на выключатель, чтобы он находился в положении **I**. Компрессор включится и начнется распыление.

3. Проводите ингаляцию в соответствии с предписаниями Вашего лечащего врача и/или пульмонолога.

Обратите внимание: Иногда вдыхаемый аэрозоль кажется прохладным. Его температура зависит от температуры окружающей среды и температуры лекарственного раствора.

Если раствор хранился в холодильнике, то доведите его до комнатной температуры.

Температура аэрозоля на выходе около 16-20°C является нормальной.

4. Использование мундштука: возьмите мундштук в рот и во время ингаляции дышите ровно.

Использование мундштука оптимально для подачи лекарства глубоко в легкие, рекомендуется для взрослых и детей от 5 лет.

5. Использование масок: наденьте маску таким образом, чтобы она закрывала нос и рот, и проводите ингаляцию лекарственного средства. Вдыхайте и выдыхайте через маску.

Маски рекомендованы для лечения верхних дыхательных путей и позволяют орошать все отделы полости носа, глотки, а также гортань и трахею. При использовании маски большая часть лекарственных веществ оседает в верхних дыхательных путях. Для детей до 3х лет рекомендуется использование детской маски.

6. После завершения ингаляции выключите питание небулайзера.

В воздушном шланге может образоваться конденсат, в данном случае отсоедините воздушный шланг от распылителя, включите компрессор и просушите воздушный шланг до удаления жидкости.

Внимание! Не храните воздушный шланг, если в нем наличествуют конденсат или влага. Это может привести к бактериальной инфекции.

Отключите прибор от электрической розетки.

После процедуры необходимо прополоскать рот кипяченой водой комнатной температуры, а если вы использовали маску, то промыть глаза и лицо водой.

Внимание: прибор оснащен функцией защиты от перегрева. В том случае, если компрессор начинает излишне перегреваться, происходит его отключение. Если это произошло, выключите прибор, нажав кнопку **О** . Отключите прибор от сети переменного тока. Дайте остыть прибору в течение 30 минут. Прибор может работать 30 мин без перерыва, после этого необходим перерыв в 30 мин.

Замена воздушного фильтра

Воздушный фильтр подлежит замене в случае его механического повреждения или сильного загрязнения.

- 1. Откройте отделение для принадлежностей. Потянув вверх, извлеките камеру воздушного фильтра из прибора.
- 2. Извлеките воздушный фильтр с помощью пинцета и установите новый.
- 3. Установите камеру воздушного фильтра обратно.

Предостережение: использование загрязненного фильтра или изготовленного из другого материала, например хлопка, может привести к поломке прибора. Используйте только оригинальные фильтры для данного прибора. Не включайте прибор при отсутствии фильтра. Не пытайтесь мыть или очищать фильтр. Если фильтр намок, замените его, чтобы избежать закупорки. Чтобы предотвратить закупорку крышки воздушного фильтра, регулярно мойте крышку.

5.Возможные неисправности и способы их устранения

№ п/п	Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1.	При включении прибор не работает.	1. Прибор неправильно подсоединен к электросети. 2. Нет электричества.	1. Проверьте правильность подсоединения. 2. Убедитесь, что электричество не отключено.
2.	Прибор работает слишком громко.	Неправильно прикреплена крышка воздушного фильтра	Прикрепите крышку воздушного фильтра как положено.
3.	Прибор слишком горячий.	Перекрыты вентиляционные отверстия.	Освободите вентиляционные отверстия.

4.	Аэрозоль не образуется совсем либо образуется в недостаточном количестве.	1. В распылителе недостаточное количество раствора для ингаляции. 2. Излишнее количество раствора для ингаляции в распылителе. 3. Отсоединен воздушный шланг. 4. Распылитель собран неправильно, отсутствует диффузор. 5. Воздушный фильтр засорен. 6. Распылитель наклонен более, чем на 45 градусов. 7. Воздушный шланг перегнут или поврежден. 8. Воздушный шланг закупорен.	1. Добавьте раствор для ингаляции (не более 13 мл, но и не менее 2 мл). 2. Удалите излишек раствора для ингаляции. 3. Подсоедините воздушный шланг. 4. Соберите распылитель правильно, проверьте наличие диффузора. 5. Замените воздушный фильтр. 6. Держите камеру вертикально, под углом не более 45 градусов. 7. Замените воздушный шланг на новый. 8. Прочистите воздушный шланг или замените его новым.
----	---	--	---

Поиск и устранение неисправностей

Если небулайзер не включается:

- Убедитесь, что кабель питания включен в розетку, на которую подано питание 220В переменного тока.
- Убедитесь, что выключатель на панели небулайзера находится в положении «Вкл».
- Проверьте соединения трубок.

В случае неэффективности перечисленных выше мероприятий обратитесь к организации-продавцу.

Запасные части

ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальные запасные части. В противном случае гарантия на изделие аннулируется автоматически!

6. Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации необходимо производить периодические осмотры изделия с целью выявления возможных неисправностей. При обнаружении таковых надлежит принять меры с целью их устранения, вплоть до возврата поставщику для ремонта.

Осмотры следует проводить как минимум ежегодно, обращая внимание на следующие моменты:

- Надежность винтовых соединений в корпусе аппарата.
- Загрязненность фильтра.
- Работоспособность выключателя и предохранителя.

При обнаружении дефектов следует немедленно вывести аппарат из эксплуатации. При ремонте следует пользоваться только оригинальными запасными частями. К производству ремонтных работ может быть допущен только сертифицированный сервисный инженер.

Инструмент требует регулярной проверки на безопасность. Рекомендуются проводить тест раз в год согласно предписанным инструкциям госучреждений.

Очистка

Вынуть вилку из розетки. После каждого применения выполнять чистку всех используемых аксессуаров. Возможно промыть аксессуары в мыльном растворе и затем в проточной воде. Затем при необходимости произвести дезинфекцию.

Дезинфекция

Дезинфицирующий агент - 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или любым дезинфицирующим средством по МУ №287-113. После очистки все аксессуары необходимо просушить.

Информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)

Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые) телефоны, увеличивается, используемые медицинские приборы могут быть чувствительными к электромагнитным помехам, создаваемым другими устройствами. Электромагнитные помехи могут нарушать работу медицинского прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Медицинские приборы также не должны мешать функционированию других устройств.

7. Хранение и транспортировка

- Небулайзеры не предназначены для использования вне помещений. Атмосферные осадки способны привести к выходу изделия из строя!
 - Небулайзер в упаковке завода-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от - 40 до + 55 °С, относительной влажности не более 95% и атмосферном давлении от 0,05 до 0,106 МПа. Аппарат допускается перемещать на любом виде закрытого транспорта при соблюдении правил перевозки. Сохраняйте оригинальную упаковку!
- Аппарат необходимо оберегать от ударов и падений при транспортировке!**

8. Утилизация и срок эксплуатации

В целях защиты окружающей среды прибор подлежит утилизации отдельно от бытового мусора. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС 2002/96/ЕС – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) «По отходам электрического и электронного оборудования». При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Срок эксплуатации аппарата составляет не менее 10 лет.

Название, юридический адрес предприятий-изготовителей изделия медицинского назначения (изделия медицинской техники)

1. Апексмед Интернэшнл Б. В., Нидерланды
Apexmed International B. V., Keizersgracht, 62-64, 1015 CS Amsterdam, the Netherlands.
2. Шеньчжень Хомед Медикал Дивайс Ко., Лтд., КНР
Shenzhen Homed Medical Device Co., Ltd., 3rd Floor, Block 2, Longgu Industrial Site of Longhua, Baoan District, Shenzhen city, Guangdong Province, P.R. China.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:

ООО «МЕДИКОМ»,

129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3.

Тел./факс: (495) 651-91-16

Генеральный директор
ООО «МЕДИКОМ»


Атафонов Илья Викторович



Прошнуровано и скреплено печатью листов

Генеральный директор
ООО "МЕДИКОМ"

И.В. Агафонов

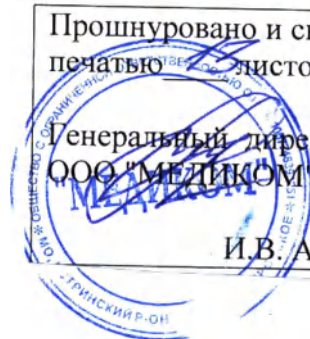

Протокол
Апелляционный
Арбитражный
31(0)

Название
(издание)
1. Апелляционный
Арбитражный
2. Шенген
Shengen
Баоан