











Россия, 630559, Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 492
Для прием: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
ПАСПОРТ № 3338-17
Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Миура)
Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным методом
ТУ 9398-611-235-40 172-2015
Хранить при температуре 2-8°C
Использовать при температуре 2-8°C. Допускается хранение при температуре до 25°C не более 10

Примерка: тел (383) 221 801-31
Факс (383) 232 34-44
Примерка: тел (383) 221 801-31
Факс (383) 232 34-44
Примерка: тел (383) 221 801-31
Факс (383) 232 34-44

Инструкция по применению
Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным методом
Мочевая кислота-Ново жидкая форма
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным методом. Методом «Мочевая кислота-Ново жидкая форма» (далее по тексту - метод) производится определение содержания мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче человека.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным методом. Методом «Мочевая кислота-Ново жидкая форма» (далее по тексту - метод) производится определение содержания мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче человека.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА
1. Принцип действия
Метод основан на реакции окисления мочевой кислоты с образованием аллоксана и оксипурина. Окисление мочевой кислоты катализируется ферментом оксидоредуктазой мочевой кислоты (ОКС). Интенсивность окисления мочевой кислоты определяется фотометрически при длине волны 410 нм.



