

中华人民共和国浙江省宁波市天一公证处

公 证 书



«Подтверждаю точность, правильность и
I hereby certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста перевода
reliability of this document translated
на русский язык»
into Russian

ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МОЧЕПРИЕМНИКИ ПРИКРОВАТНЫЕ АРЕХМЕД, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Мочеприемник прикроватный, объем: 1000 мл., 1500 мл., 2000 мл.
2. Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000 мл., 2500 мл., 2600 мл., 4000 мл.
3. Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой:
 - Однокамерный 200 мл. / 2000 мл., 200 мл. / 2500 мл., 200 мл. / 2600 мл., 400 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл., 500 мл. / 2500 мл., 500 мл. / 2600 мл.
 - Двухкамерный: 400 мл. / 2500 мл., 400 мл. / 2600 мл.
 - Трехкамерный: 500 мл. / 1500 мл., 500 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл.

Дата выпуска документа: 01.01.2017

Дата пересмотра документа: 01.01.2027

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

«Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.», China
(«Нинбо Грейткэа Трейдинг Ко., Лтд.»), Китай

/ General Manager
(должность/position)

Hu Yong Xiang (имя/name)
(подпись/signature)

«22» Aug. 2017 г.
«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

М.П. / Stamp



Для государственной регистрации в качестве медицинского изделия на территории Российской Федерации в соответствии с «Правилами государственной регистрации медицинских изделий», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2013 № 1416 в редакции постановления Правительства РФ от 17.10.2013 № 930 предоставляем настоящие сведения.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Нинбо Грейткэа Трэйдинг Ко., Лтд.», Китай
 «Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.», China.,
 Address: Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou, Ningbo, China,
 Tel.: +86-574-83088921,
 Fax: +86-574-83088900,
 greacare@greatcare.cn

2. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА

«Нинбо Грейткэа Трэйдинг Ко., Лтд.», Китай
 «Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.», China.,
 Address: Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou, Ningbo, China,
 Tel.: +86-574-83088921,
 Fax: +86-574-83088900,
 greacare@greatcare.cn

3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемники прикроватные APXMED, варианты исполнения:

1. Мочеприемник прикроватный, объем: 1000 мл., 1500 мл., 2000 мл.
2. Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000 мл., 2500 мл., 2600 мл., 4000 мл.
3. Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой:
 - Однокамерный 200 мл. / 2000 мл., 200 мл. / 2500 мл., 200 мл. / 2600 мл., 400 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл., 500 мл. / 2500 мл., 500 мл. / 2600 мл.
 - Двухкамерный: 400 мл. / 2500 мл., 400 мл. / 2600 мл.
 - Трехкамерный: 500 мл. / 1500 мл., 500 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл., проектируются компанией Apexmed International B.V., находящейся по адресу Keizersgracht, 62-64, 1015 CS Amsterdam, the Netherlands, (Нидерланды).

4. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемники прикроватные объем мешка: 1000; 1500; 2000 мл. (исполнение прикроватные) или 2000; 2500; 2600; 4000 мл. (исполнение люкс), предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных и домашних условиях, квалифицированным медицинским персоналом. Порцию собранной мочи можно при необходимости предоставить для проведения анализа. Предназначены для облегчения мобильности больных.

Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой:

- Однокамерный: 200 мл. / 2000 мл., 200 мл. / 2500 мл., 200 мл. / 2600 мл., 400 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл., 500 мл. / 2500 мл., 500 мл. / 2600 мл.
- Двухкамерный: 400 мл. / 2500 мл., 400 мл. / 2600 мл.
- Трехкамерный: 500 мл. / 1500 мл., 500 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл.

5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности отсутствуют.

6. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемники прикроватные АРЕХМЕД предназначены для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных и домашних условиях, квалифицированным медицинским персоналом. Порцию собранной мочи можно при необходимости предоставить для проведения анализа. Предназначены для облегчения мобильности больных.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемники применяются в гипургии для ухода за больными, людьми с ограниченными возможностями, а также для сбора мочи для анализа у пациентов. Также мочеприемники предназначены для индивидуального применения в условиях лечебных учреждений, и в домашних условиях под наблюдением обученных специалистов.

8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделия применяется в помещениях при температуре воздуха - плюс 25 ± 10 °С; относительной влажности воздуха - 35-85%; атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.). Рекомендуется защищать мочеприемник от воздействия экстремально низких температур.

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

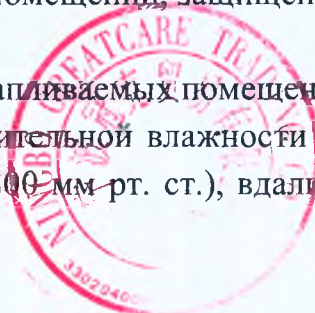
Температура: от -5°С до + 50°С.

Относительная влажность воздуха до 25-95 %.

Атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Мочеприемники должны храниться в сухом помещении, защищенном от атмосферных явлений.

Хранить медицинское изделие в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35 °С; относительной влажности воздуха: 35-85%; атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.), вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.



9. КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация в соответствии с Приложением IX Директивы Совета Медицинскому изделию присвоен класс I в соответствии с Приложением IX Директивы Совета Европейского экономического сообщества 93/42/ЕЕС:

Орган здравоохранения, страна	Класс	Ссылка	Документ
Европейская комиссия, ЕС	Класс I	93/42/ЕЕС с внесенными поправками	Директива ЕС на медицинские изделия
Министерство здравоохранения, РФ	Класс I	Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012	Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012

10. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мочеприемники прикроватные АРЕХМЕД применяют:

- лежащие пациенты после операций, которые не могут пользоваться уткой или другими санитарно-гигиеническими приспособлениями;
- обездвиженные больные;
- пожилые люди с необратимыми возрастными изменениями;
- сбор мочи и контроль диуреза (объема выделенной мочи) у пациента;

11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний в процессе применения мочеприемника прикроватного АРЕХМЕД - не выявлено.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ)

Побочных действий в процессе применения мочеприемника АРЕХМЕД не выявлено.



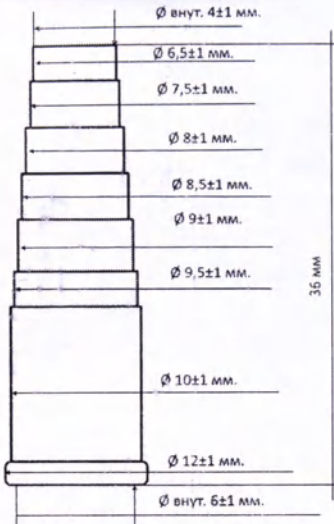
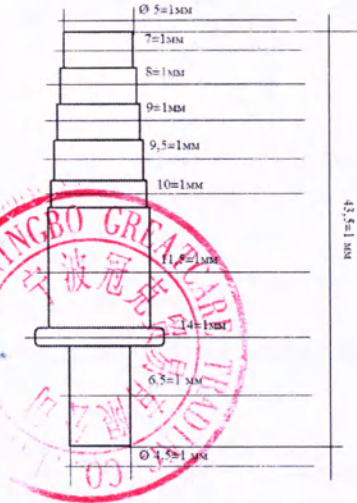
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ

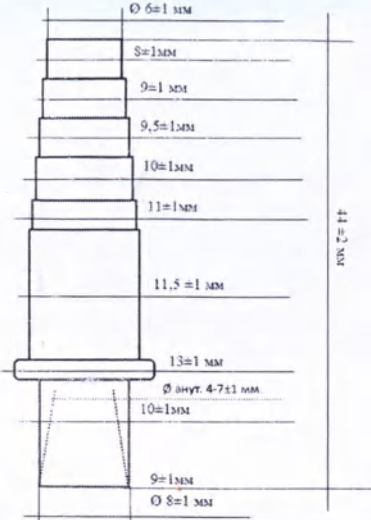
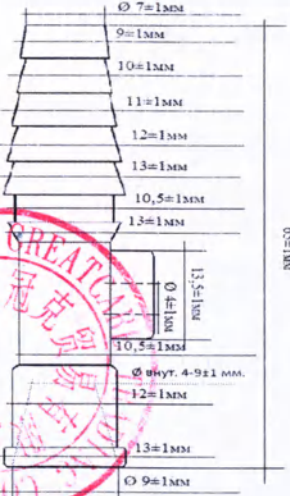
Технические характеристики изделий указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Общий вид (Мочеприемник прикроватный, объем: 1000 мл.)	№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
	1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 10-16±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
	2.	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
	2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.13

 Рис.14						
 Рис.15	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.16	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.17	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай/ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA/ Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

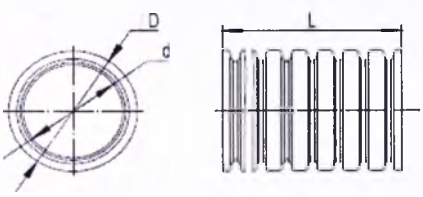
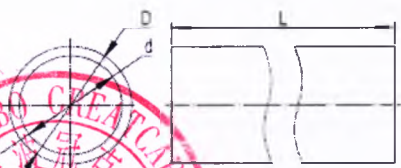
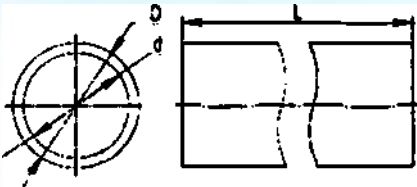
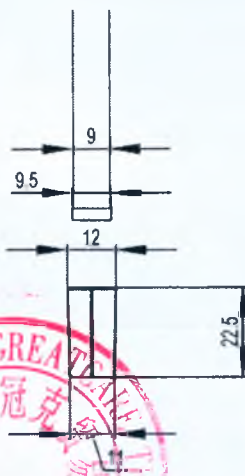
	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.18

Рис.19

						
Рис.20	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 255 мм. х 165 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 1000 мл
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис

	6.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.22	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

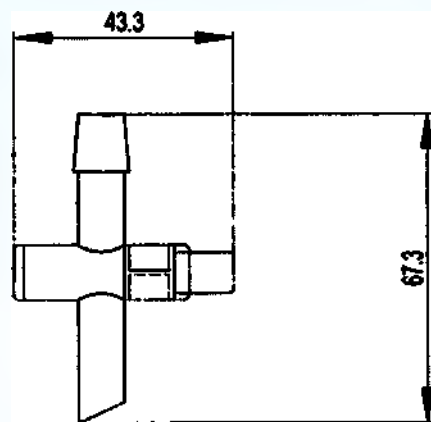


Рис.23

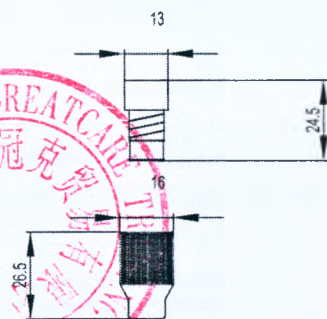
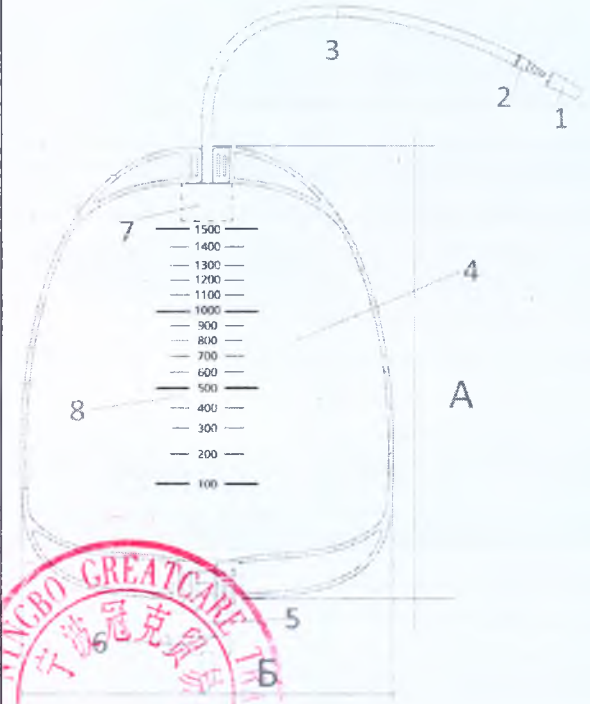


Рис. 24

			CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005,	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости	1	Находится внутри моче-приемника

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	(АхБ) 35 мм. х 25 мм. ±5 мм.		
	8.	Шкала	Чернила GC02, Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-1000 мл.		



Общий вид (Мочеприемник прикроватный, объем: 1500 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
 Рис.25		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 10-16±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

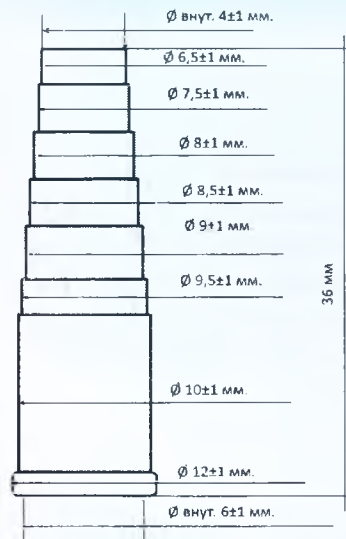


Рис.26

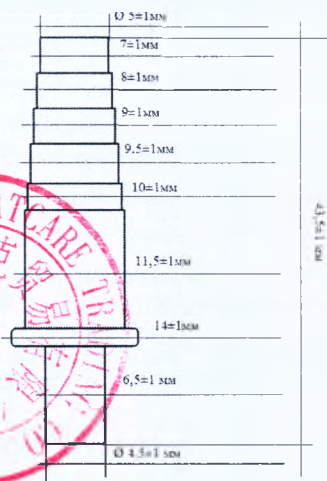


Рис.27

2.2

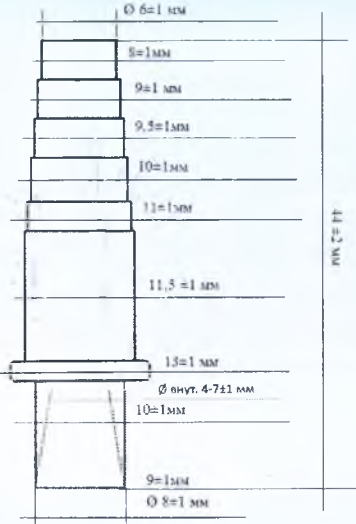
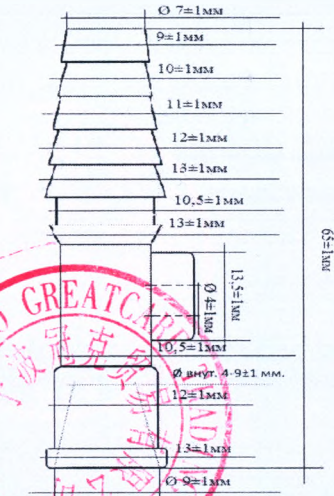
Коннектор

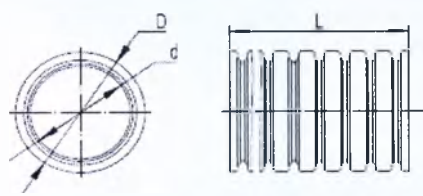
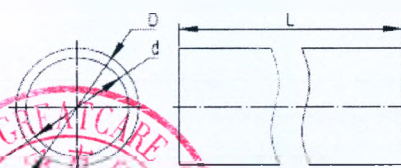
Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис
По согласованию с заказчиком

 Рис.28	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.29	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай/ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA/ Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.30	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.31	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

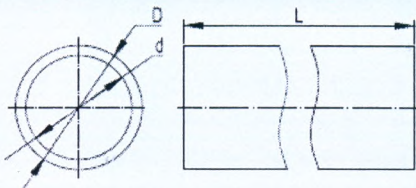


Рис.32

4.

Емкость

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC clear film BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

Толщина от 0,2 мм.
Масса изделия не более 100 гр.
Масса изделия в упаковке не более 150 гр.
Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 255 мм. х 165 мм. ±15 мм.

1

1500 мл

5.

Трубка сливная

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

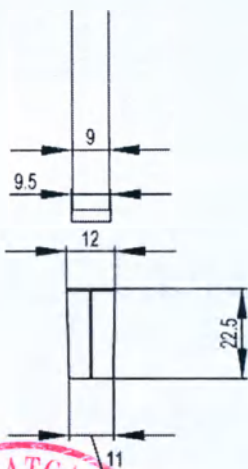
L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости).
Ø наруж. 9±1 мм.
Масса не более 20 гр.

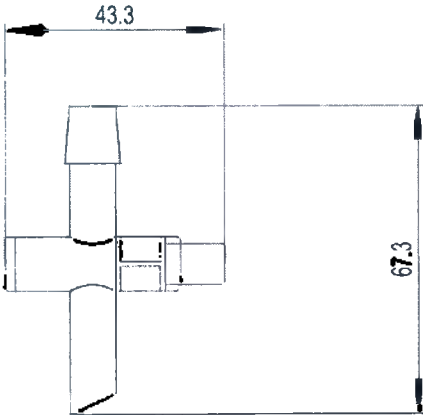
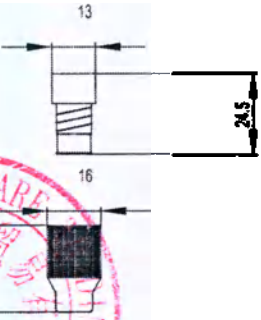
1

См. Рис



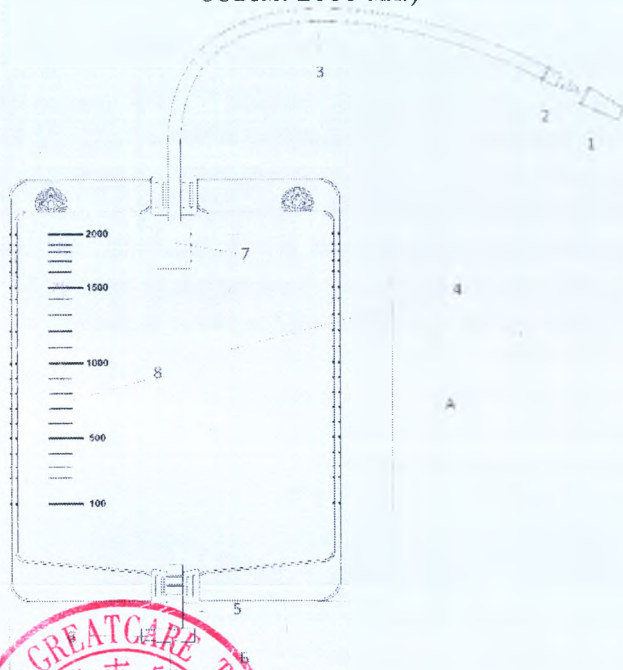
Рис.33

	6.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис. 34	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

			CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005,	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости	1	Находится внутри моче-приемника

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	(АхБ) 35 мм. x 25 мм. ±5 мм.		
	8.	Шкала	Чернила GC02, Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-1500 мл.		



Общий вид (Мочеприемник прикроватный, объем: 2000 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
 Рис.37		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 10-16±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

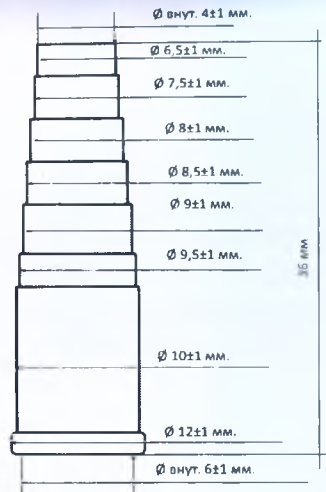


Рис.38

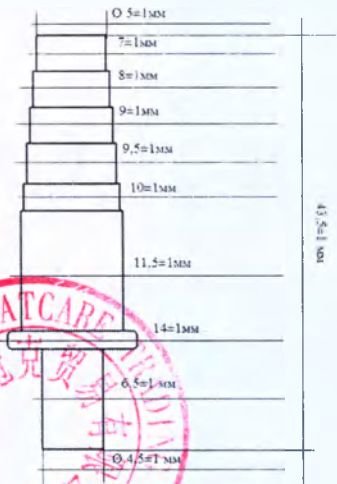
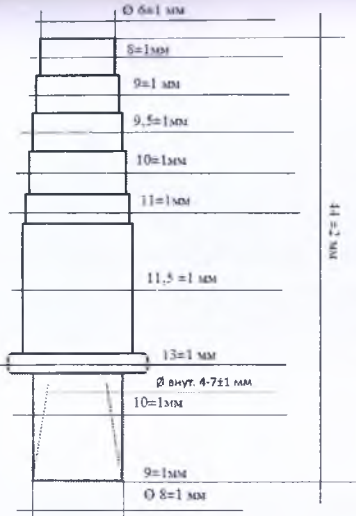
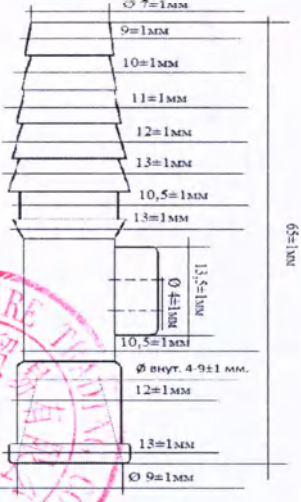
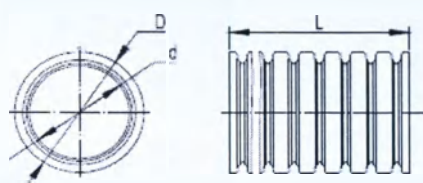
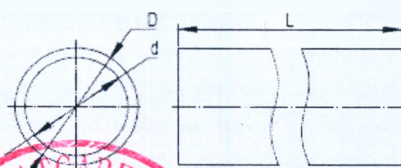


Рис.39

2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
-----	-----------	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

 Рис.40	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.41	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай/ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA/ Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3.2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.42	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.43	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-6± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

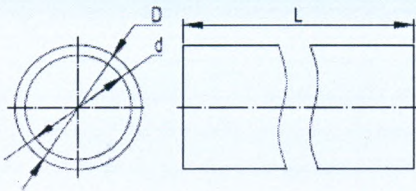
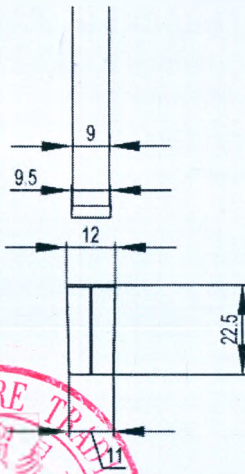


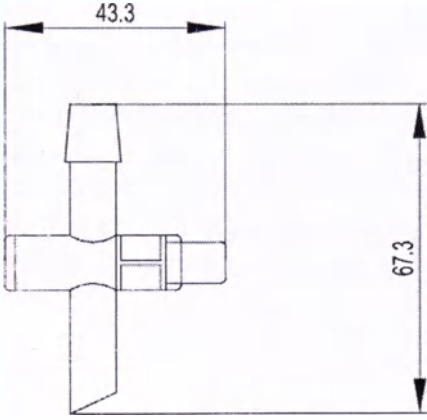
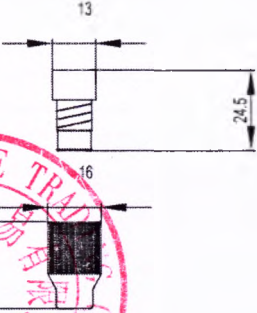
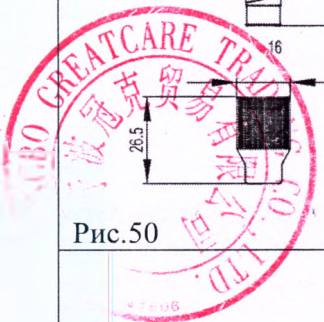
Рис.44

4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 300 мм. х 198 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 2000 мл
5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис



Рис.45

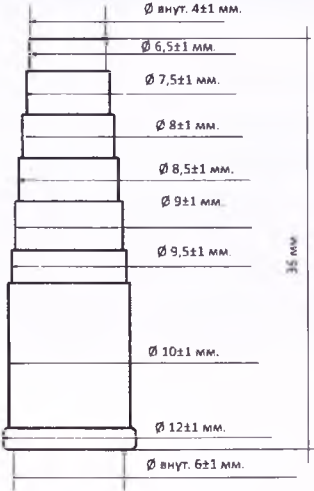
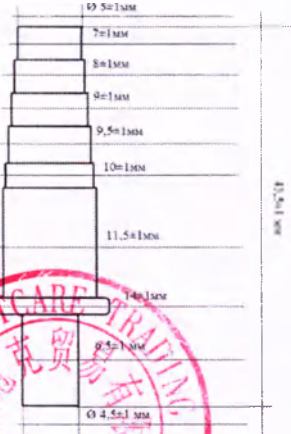
	6.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.46	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие 43,3 $\pm$ 2 мм. 67,3 $\pm$ 2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

			CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005,	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости	1	Находится внутри моче-приемника

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	(АхБ) 35 мм. х 25 мм. ±5 мм.		
	8.	Шкала	Чернила GC02, Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-2000 мл.		



Общий вид (Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Ко-л-во	Прим.
 Рис. 51		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-17±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.52			Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.53	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

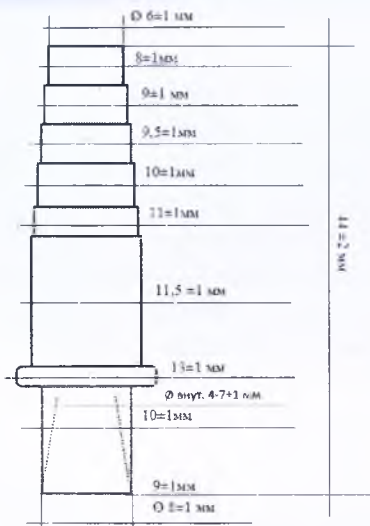


Рис.54

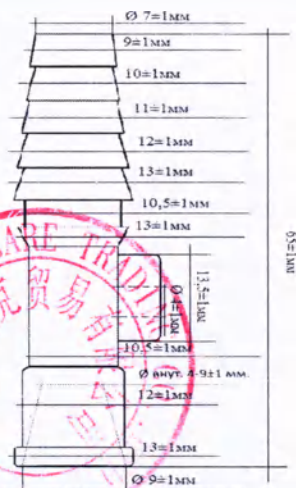


Рис.54

2.4 Коннектор

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

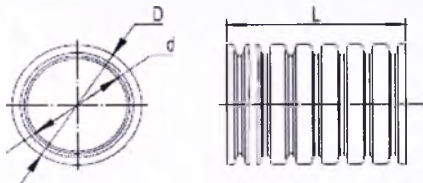
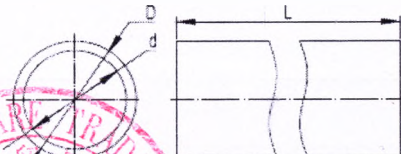
Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон
RTV-2
Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай

Размеры представлены на рисунке

1

По согласованию с заказчиком

См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)		Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.55	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.56	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

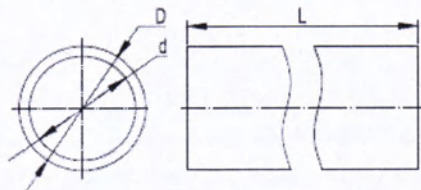
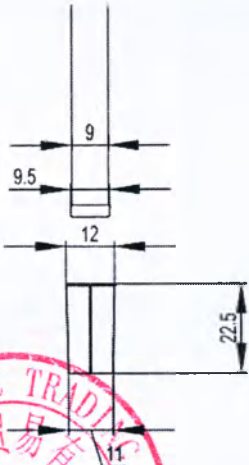


Рис.57



Рис.58

	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 250 мм. х 270 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 2000 мл
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной,		Стандартное изделие		См. Рис

		Т-образный, поворотный)			Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком	
 Рис.59	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм. Ø наруж. 11±1 мм. Длина 22,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие 43,3±2 мм. 67,3±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

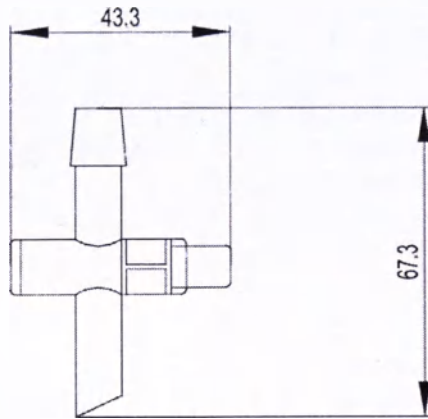


Рис.60

CO., LTD./ Полипропи-
лен PP
**Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T**
Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

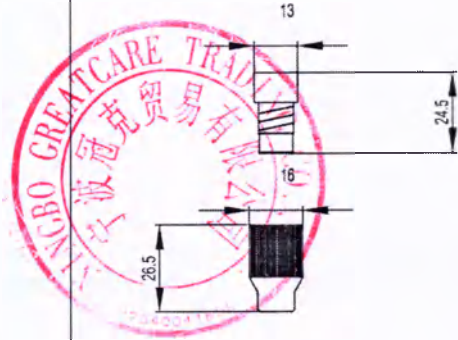


Рис. 61

6.3

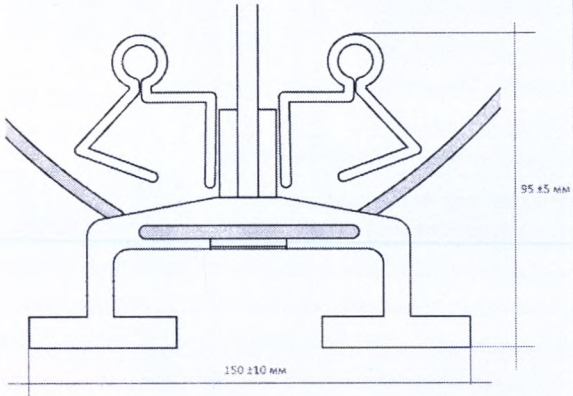
Кран пово-
ротный

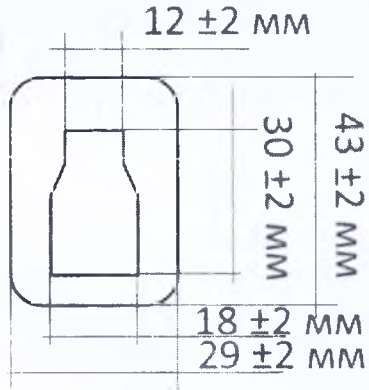
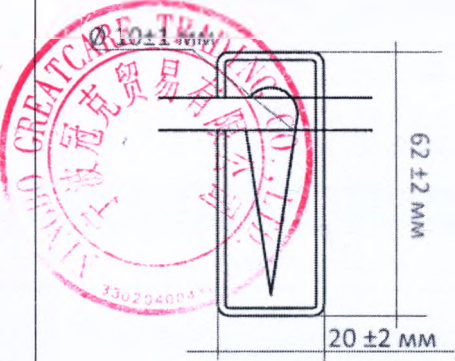
LDPE
Полиэтилен высокого
давления
SABIC LDPE
2022TN00
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD.

Стандартное изде-
лие
13±2 мм.
24,5±2 мм.
16±2 мм.
26,5±2 мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по согласо-
ванию с заказ-
чиком

	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости (АхБ) 65 x 70 мм. ±5 мм.	1	Находится внутри моче-приемника
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-2000 мл.		
 Рис. 62	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис. 63	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис

 Рис.64	11. Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.		
 Рис.65	12. Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

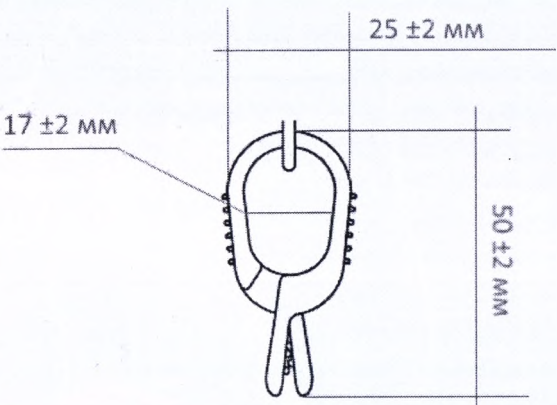
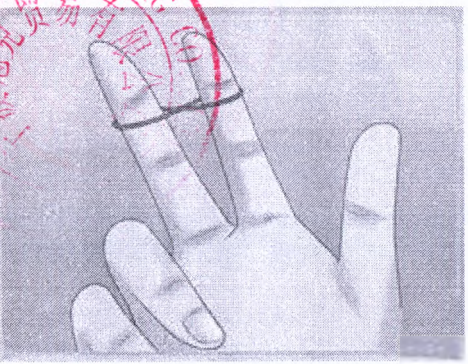
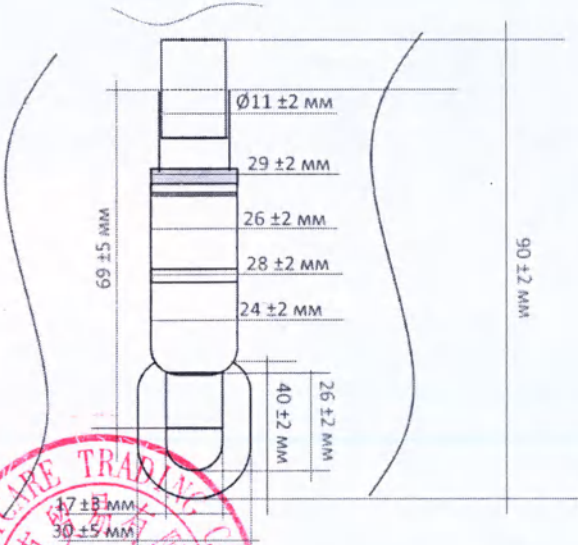
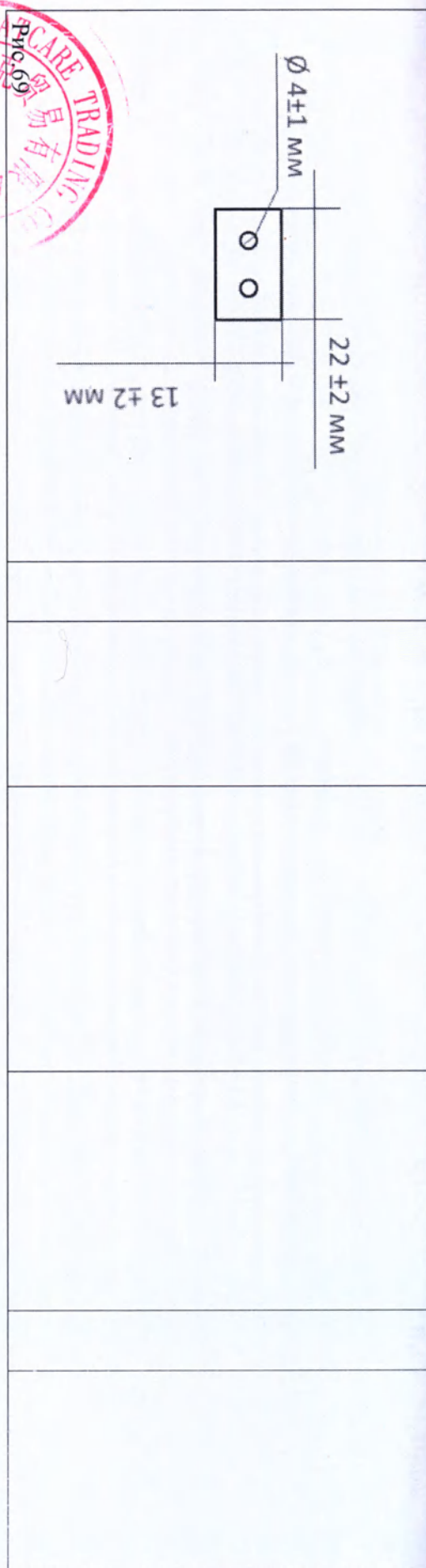
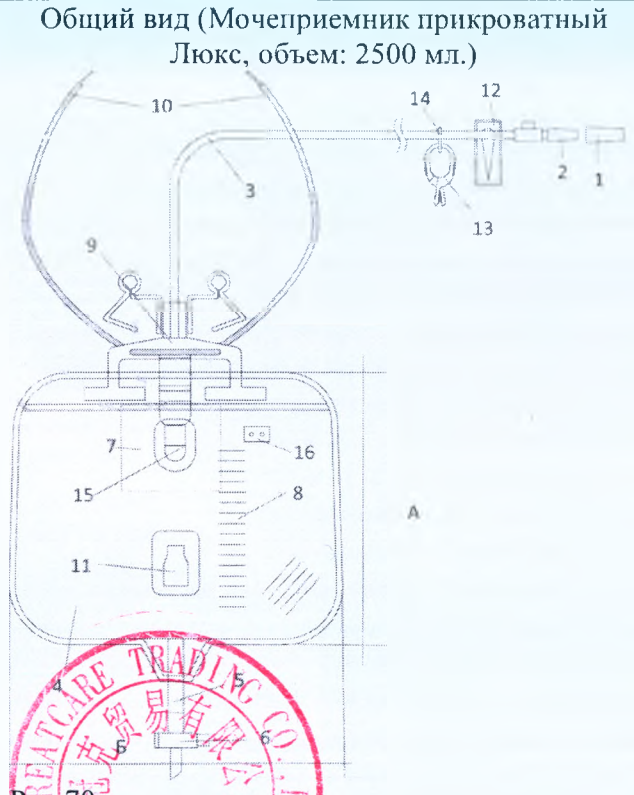
	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис

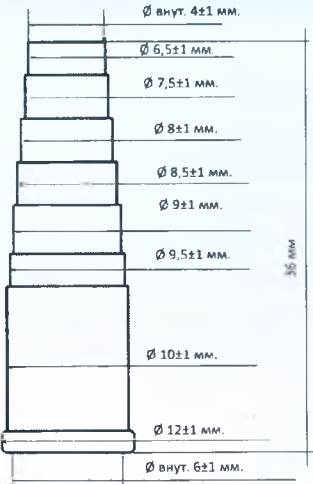
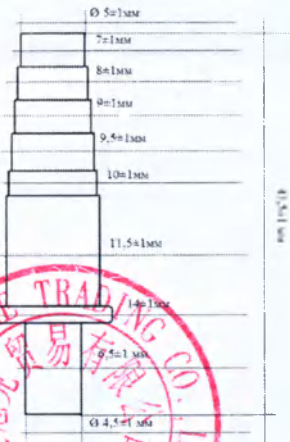
Рис.66

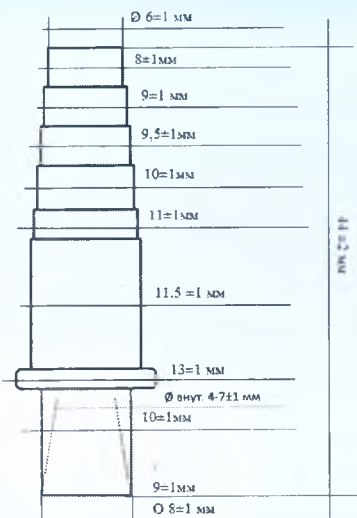
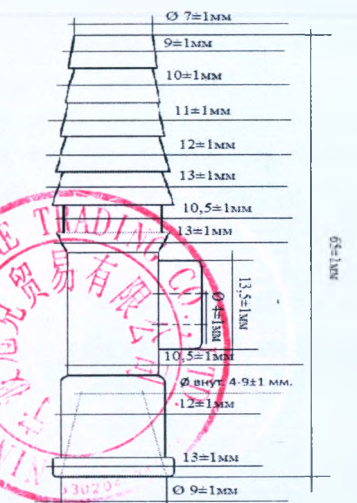
Рис.67

 Рис. 68	15.	Камера капельная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
	16.	Микро-фильтр для компенсации давления	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (абсолютная) вязкость 5 Па•с	1	См. Рис



Общий вид (Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2500 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Ко-л-во	Прим.
 Рис. 70		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-17±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.71			Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.72	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			По согласованию с заказчиком
	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

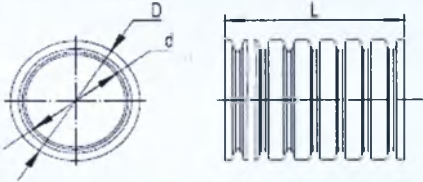
	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.75

Рис.76

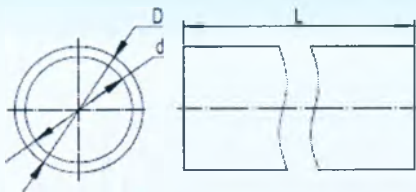
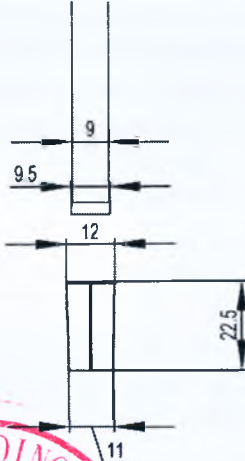


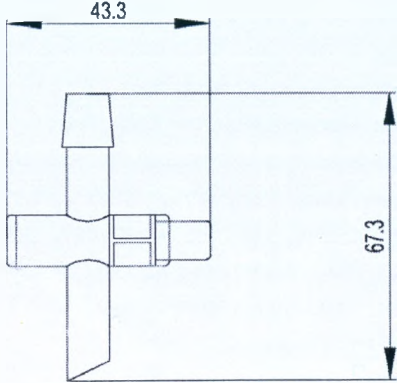
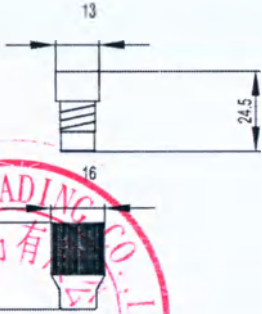
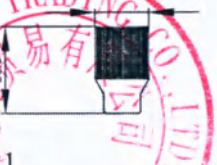
Рис.77

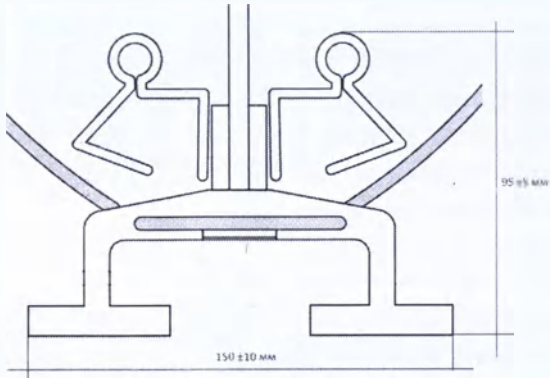
4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 255 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 2500 мл
5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.



Рис.78

		поворот- ный)			Тип определя- ется по согласо- ванию с заказ- чиком
 Рис. 79	6.1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согласо- ванию с заказ- чиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согласо- ванию с заказ- чиком

			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
Рис.80 	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
Рис.81 	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости (АхБ) 65 x 70 мм. ±5 мм.	1	Находится внутри моче-приемника

	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-2500 мл.		
 Рис.82	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис.83	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

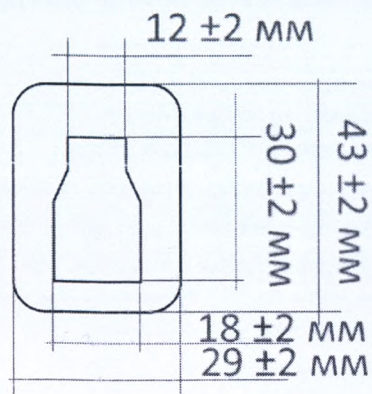


Рис.84

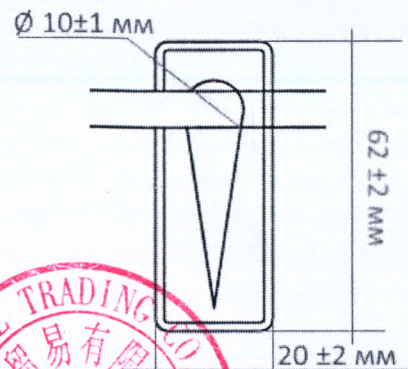
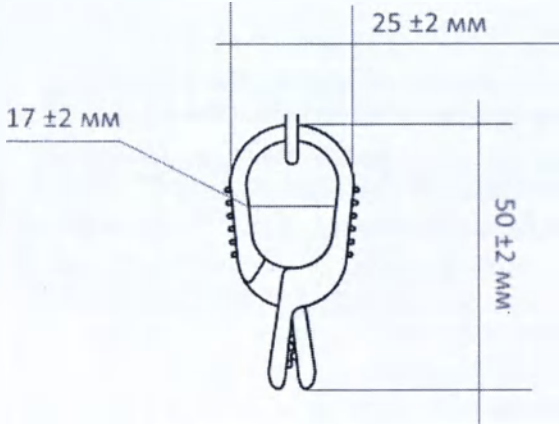


Рис.85



12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
13.	Клипса бе- львая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке	1	См. Рис

 25 ± 2 мм 17 ± 2 мм 50 ± 2 мм			Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Масса не более 30 гр.		
Рис.86 	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
Рис.87 	15.	Камера капельная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

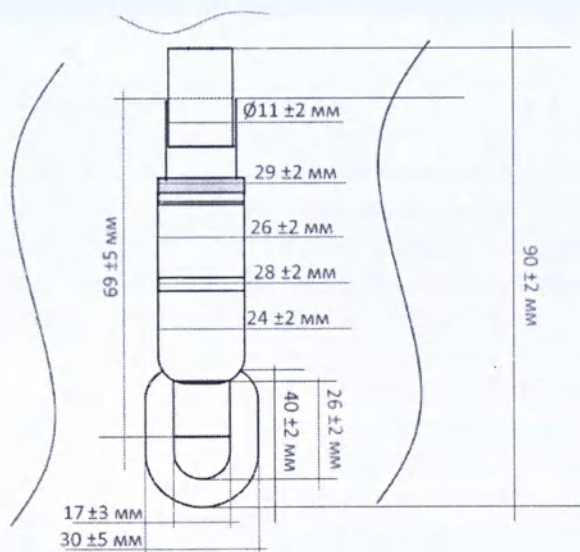


Рис.88

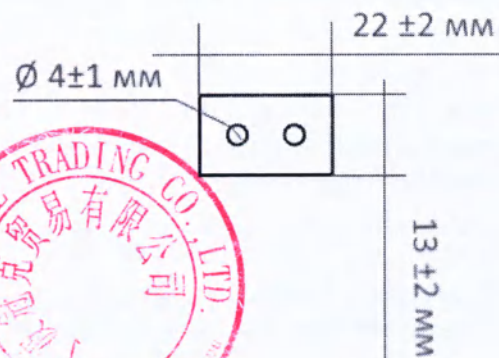


Рис.89

16.

Микро-
фильтр для
компенса-
ции давле-
ния

Полиамид PA
PA 40J01-20.5
Zhejiang, China
(Mainland), Китай

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 5
гр.
Динамическая (аб-
солютная) вязкость
5 Па•с

1

См. Рис

Общий вид (Мочеприемник прикроватный
Люк, объем: 2600 мл.)

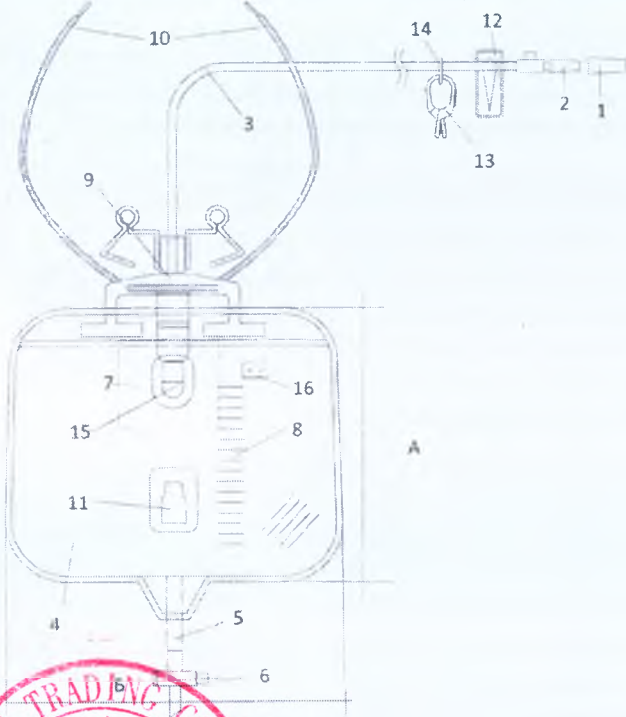


Рис. 90



№	Спецификация	Материал	Раз-р	Ко л- во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-17±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

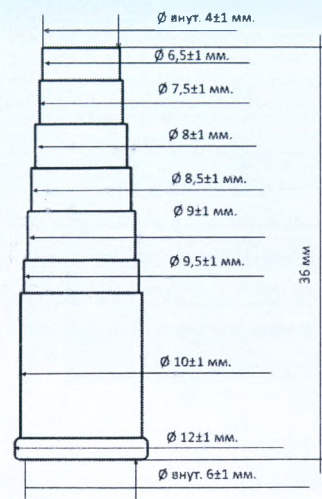


Рис.91

Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

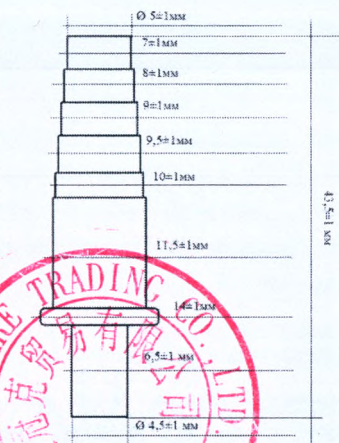


Рис.92

2.2

Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
 Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
 Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис
 По согласованию с заказчиком

2.3

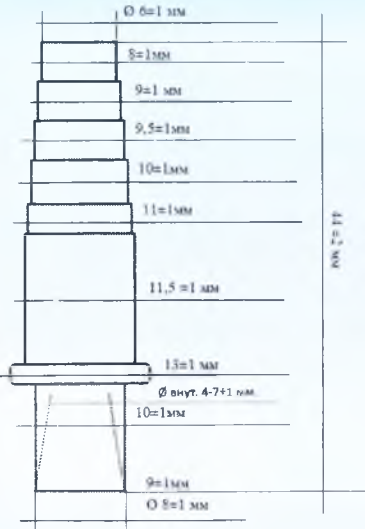
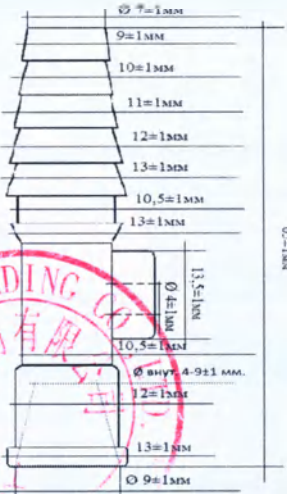
Коннектор

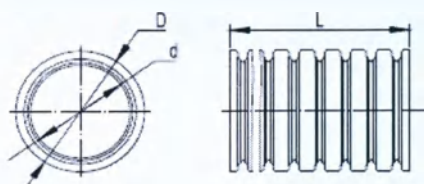
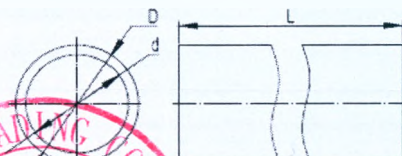
Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис

 Рис.93		Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA		По согласованию с заказчиком
 Рис.94	2.4 Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	I См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.95	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.96	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

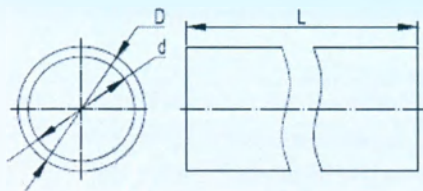


Рис.97

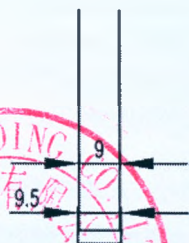
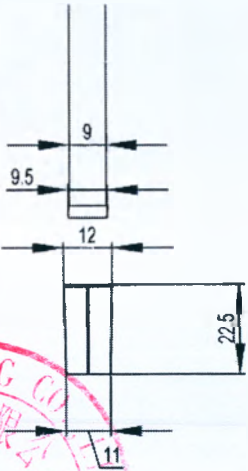
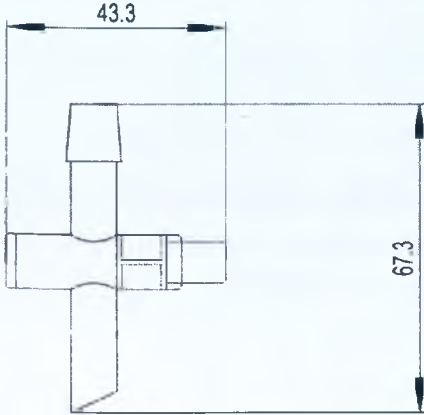
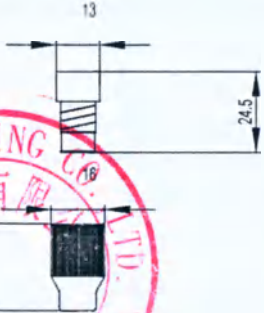


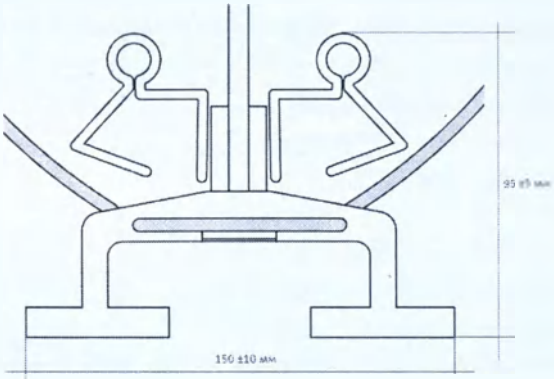
Рис.98



	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 255 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1 См. Рис 2600 мл
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1 См. Рис
	6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие	См. Рис Кран выпускается 3 типов.

		поворот- ный)				Тип определя- ется по согласо- ванию с заказ- чиком
 Рис.99	6.1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согласо- ванию с заказ- чиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согласо- ванию с заказ- чиком

			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
Рис.100  Рис.101	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005,	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости	1	Находится внутри моче-приемника

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	(АхБ) 65 x 70 мм. ±5 мм.		
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-2600 мл.		
 Рис.102	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис.103	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

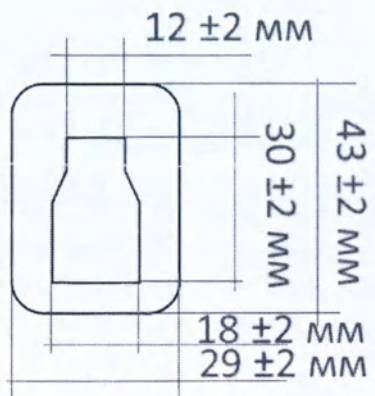


Рис.104

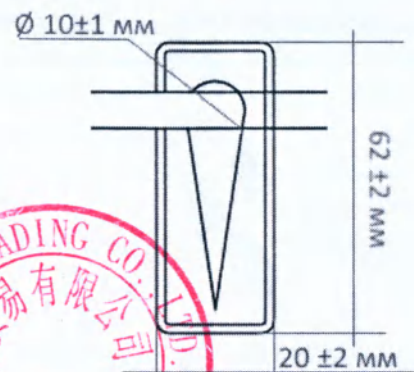


Рис.105

12.

Зажим скользящий

Полипропилен PP
Yungsox PP
Copolymer, 5250T
Formosa Polypropyl-
ene (Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

Габаритные размеры представлены на рисунке
Масса не более 30 гр.

1

См. Рис

13.

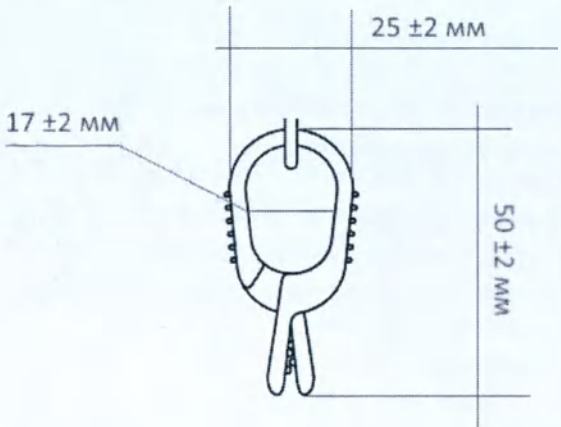
Клипса белая

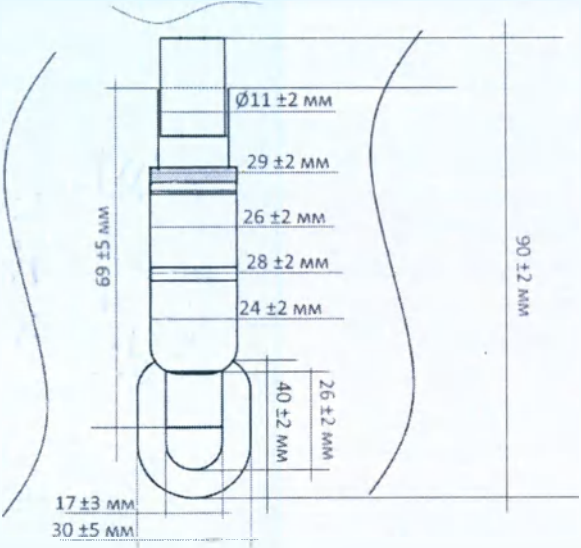
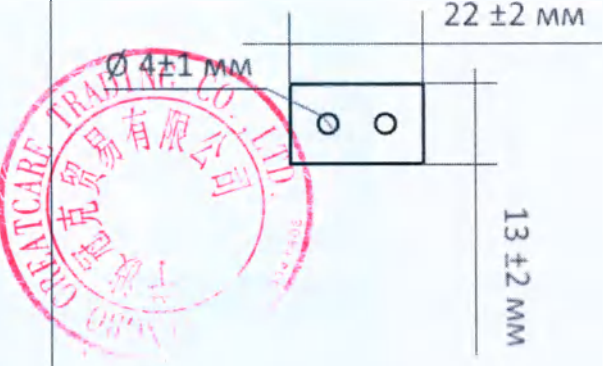
ABS - пластик
ABS (ABS RESIN)
GE-150

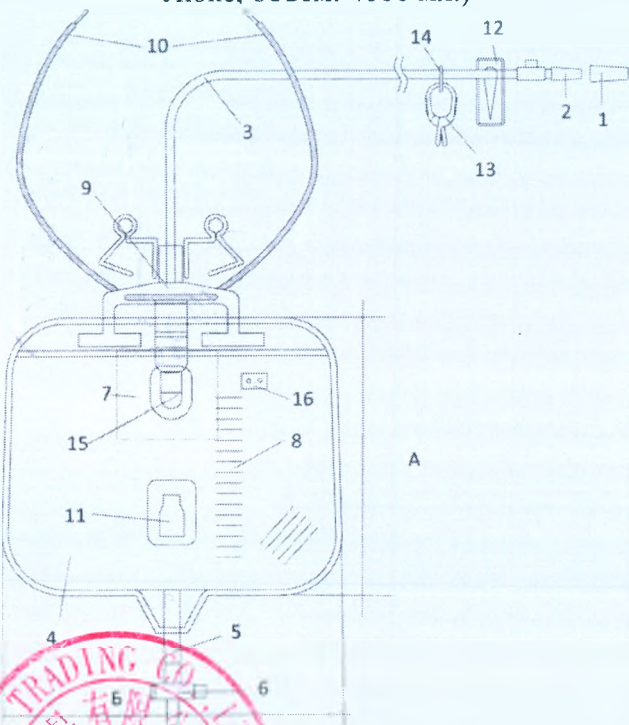
Габаритные размеры представлены на рисунке

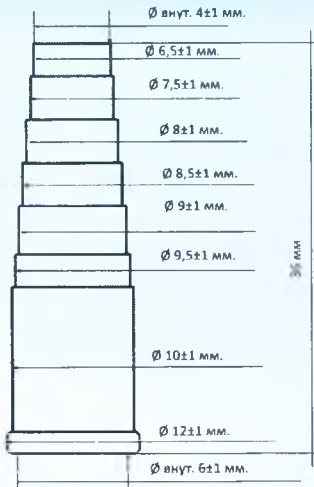
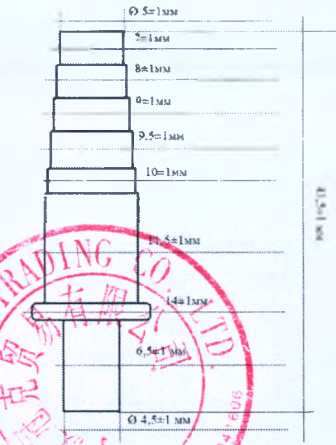
1

См. Рис

 Рис.106			Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Масса не более 30 гр.		
 Рис.107	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Камера капельная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

						
	16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (аб- солютная) вязкость 5 Па•с	1	См. Рис

Общий вид (Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 4000 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Ко-л-во	Прим.
 Рис. 110		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-17±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.111			Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.112	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

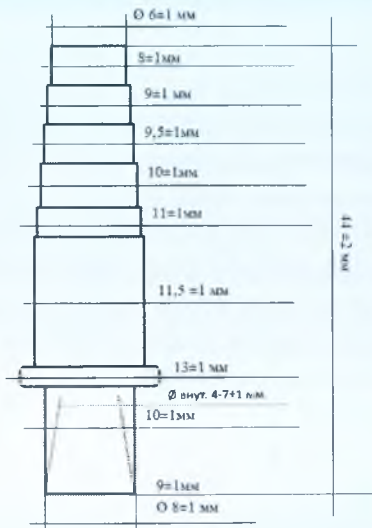


Рис.113

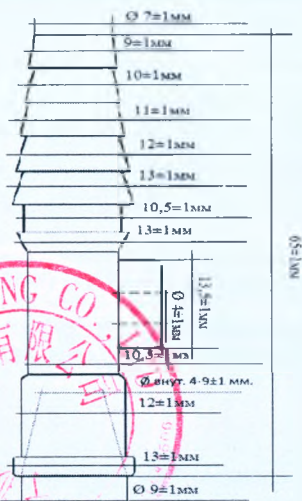


Рис.114

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

По согласованию с заказчиком

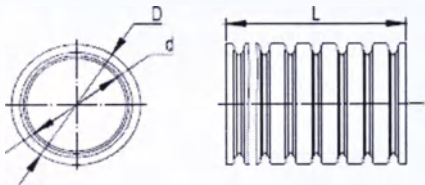
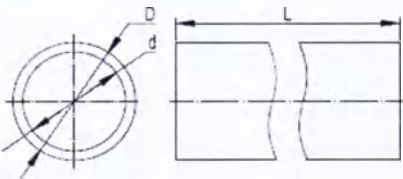
2.4 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон
RTV-2
Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.115	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.116	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 30 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

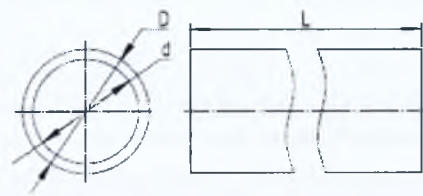
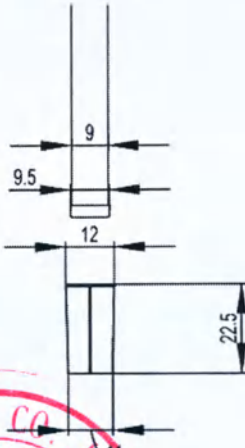


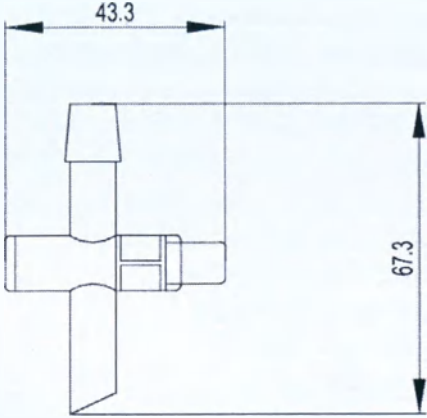
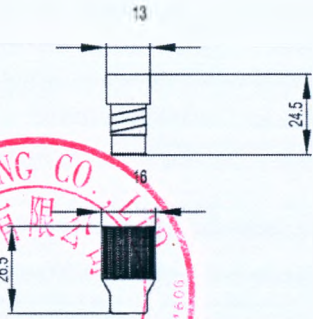
Рис.117

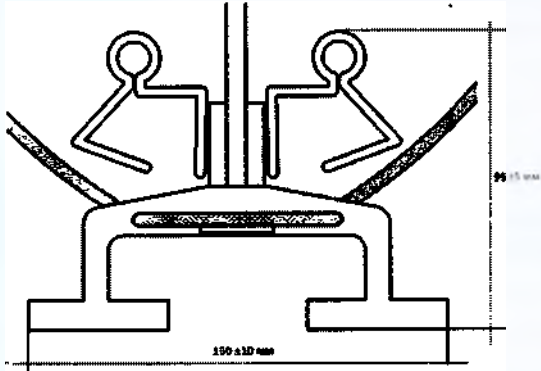
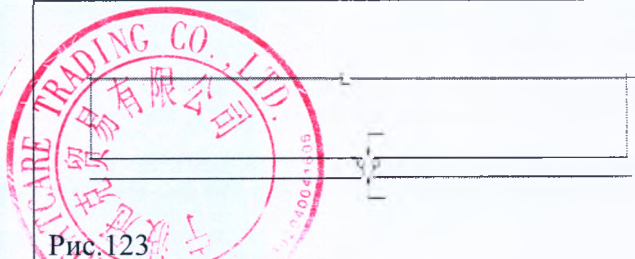
	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 300 мм. х 340 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 4000 мл
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной,		Стандартное изделие		См. Рис

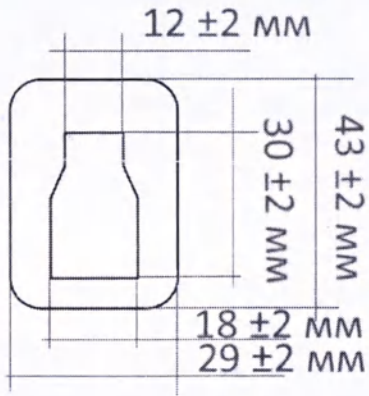
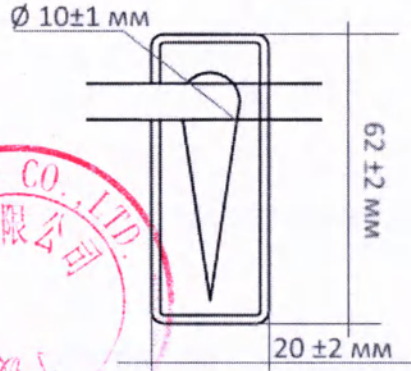


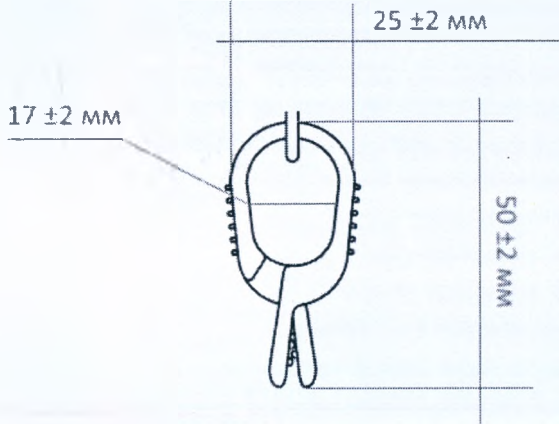
Рис.118

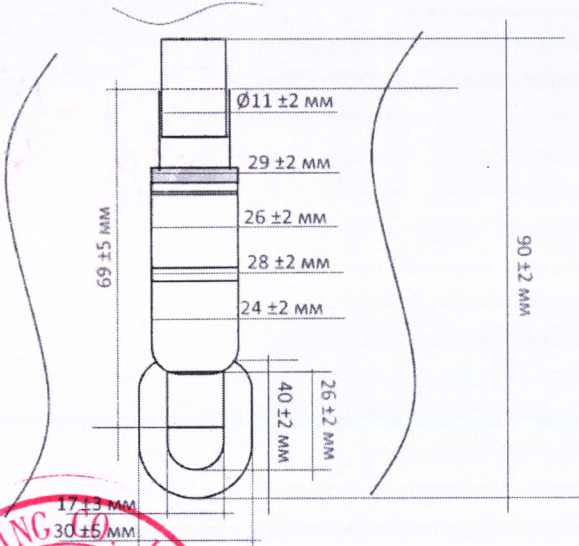
		Т-образный, поворотный)			Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.119	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1 См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

			CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA		
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

	7.	Клапан против обратного тока	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. длина x ширина мешка/емкости (АхБ) 65 x 70 мм. ±5 мм.	1	Находится внутри моче-приемника
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	100-4000 мл.		
	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис

 Рис. 124	11. Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис. 125	12. Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.126	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.127	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис

 Рис. 128	15.	Камера ка-пельная	Поливинилхлорид ме-дицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные раз-меры представ-лены на рисунке Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
	16.	Микро-фильтр для компен-сации давле-ния	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз-меры представ-лены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (аб-солютная) вязкость 5 Па•с	1	См. Рис

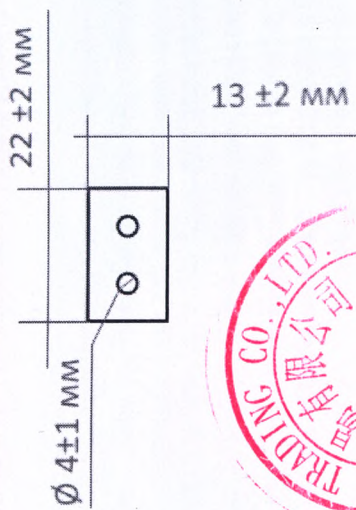


Рис. 129

Общий вид (мембранный прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2000 мл.)

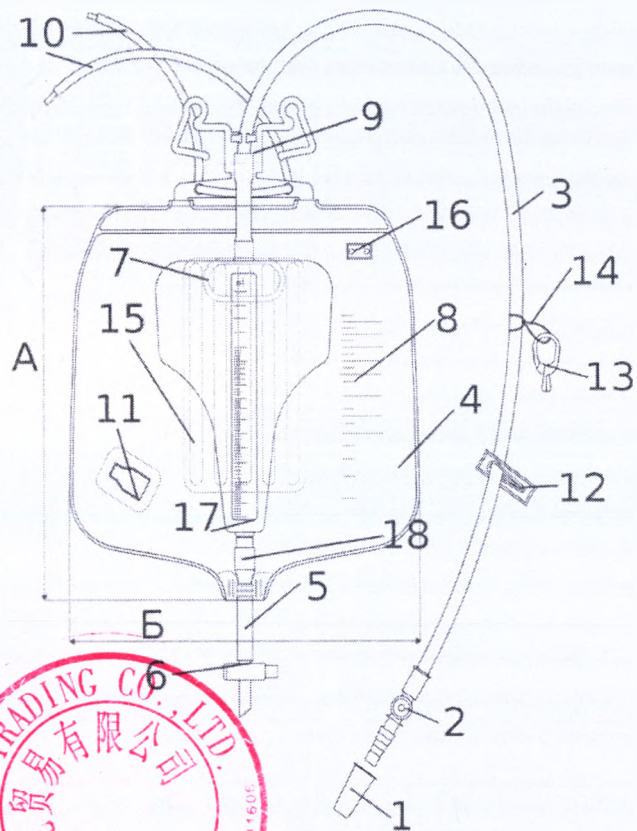


Рис.130

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

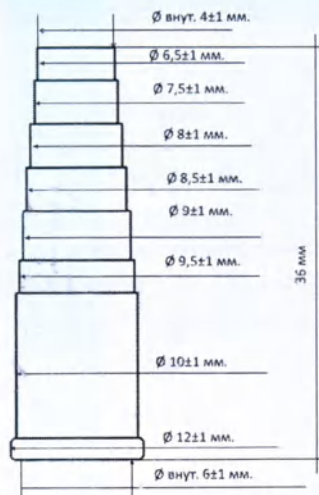


Рис.131

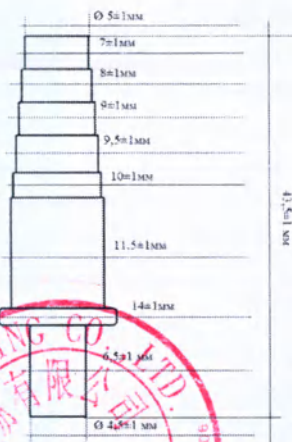


Рис.132

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

2.2 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис По согласованию с заказчиком

2.3 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис

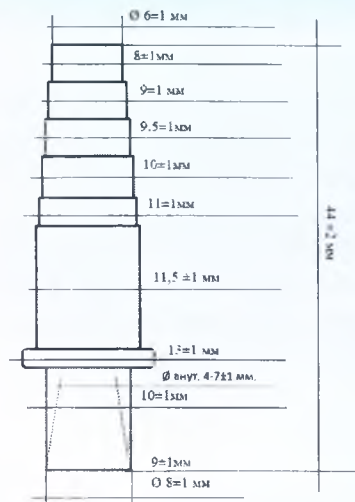


Рис.133

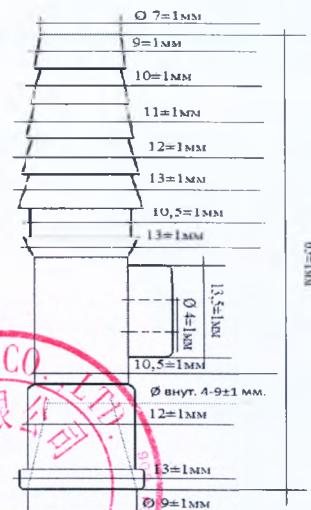


Рис.134

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

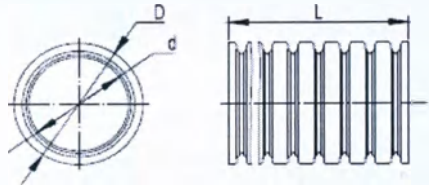
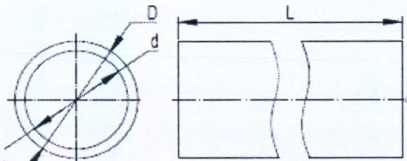
По согласованию с заказчиком

2.4 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай

Размеры представлены на рисунке

1 См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.135	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.136	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

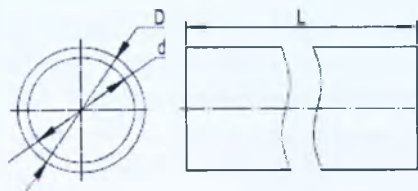
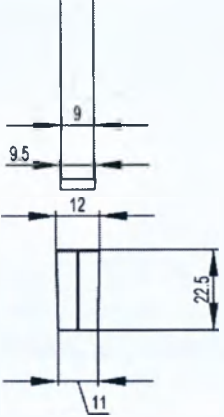
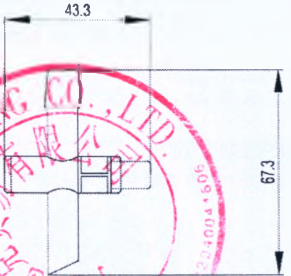


Рис.137

	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 280 мм. х 270 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 200 мл. / 2000 мл. Камера – 200 мл. Емкость -- 2000 мл.
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной,		Стандартное изделие		См. Рис

		Т-образный, поворотный)				Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.139	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.140	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропилен PP	Стандартное изделие 43,3±2 мм. 67,3±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

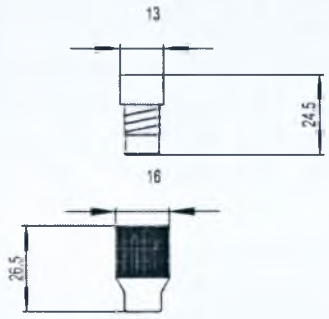
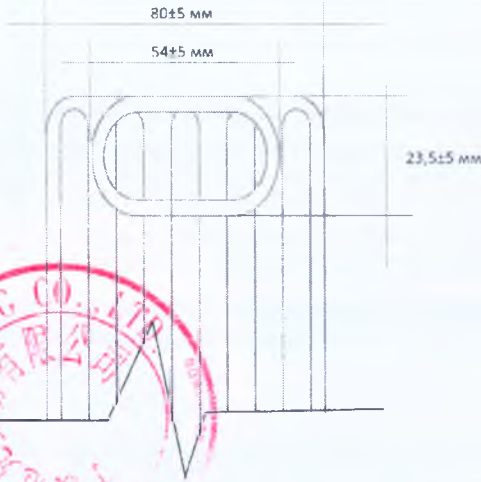
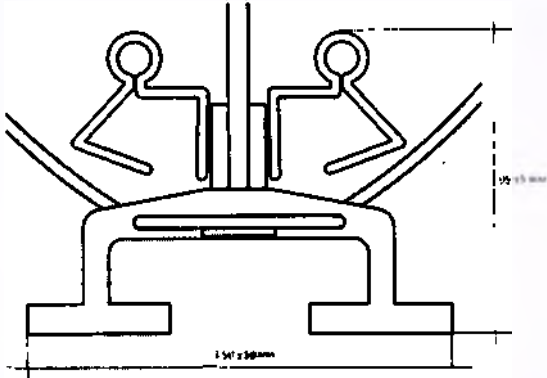
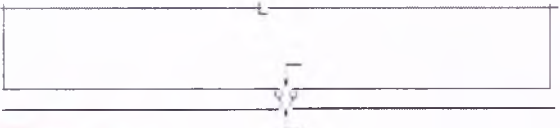
			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	Находится внутри моче-приемника

Рис.141

Рис.142

	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	200 мл. / 2000 мл.		
 Рис. 143	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис. 144	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

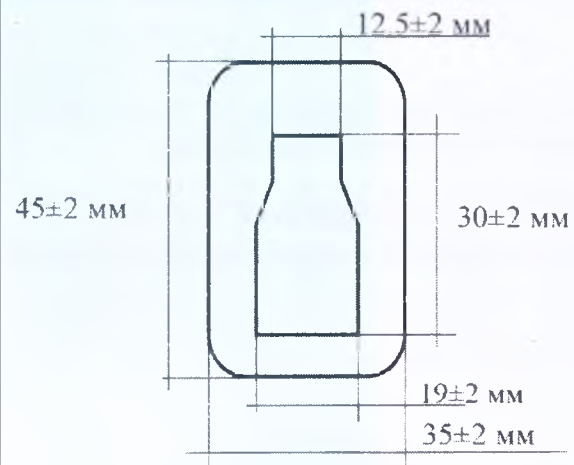


Рис.145

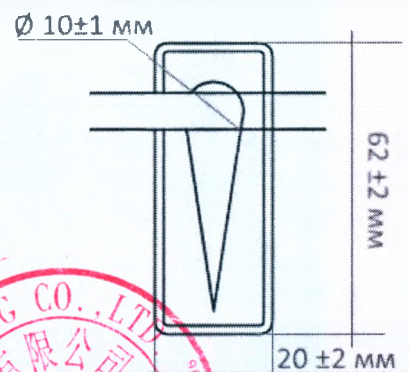


Рис.146

12.

Зажим
скользящий

Полипропилен PP
**Yungsox PP
Copolymer, 5250T
Formosa Polypropyl-
ene (Ningbo) Co., LTD.,
CHINA**

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 30
гр.

1

См. Рис

13.

Клипса бе-
льевая

ABS - пластик
**ABS (ABS RESIN)
GE-150**

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке

1

См. Рис

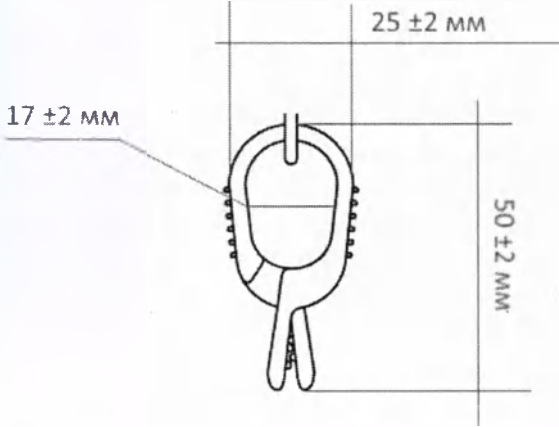
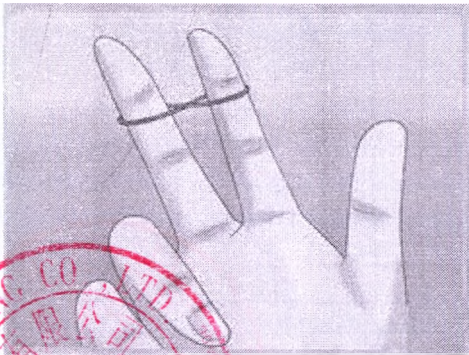
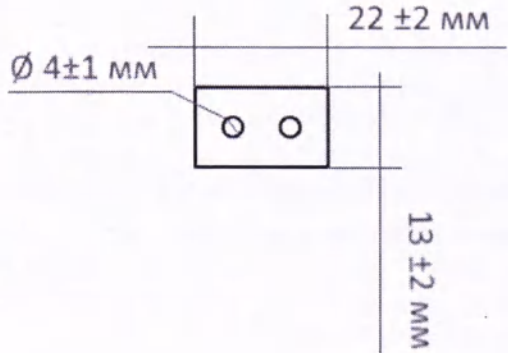
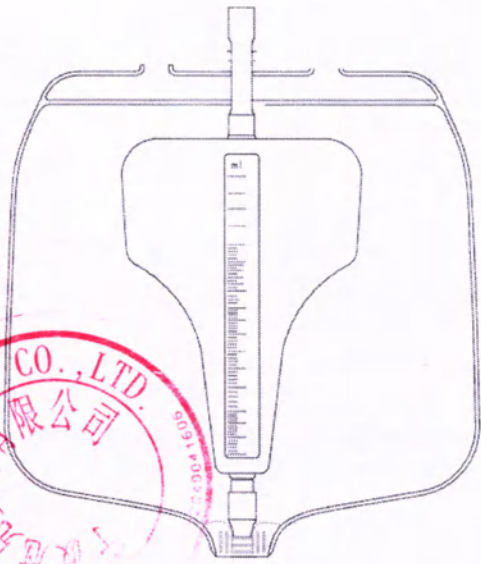
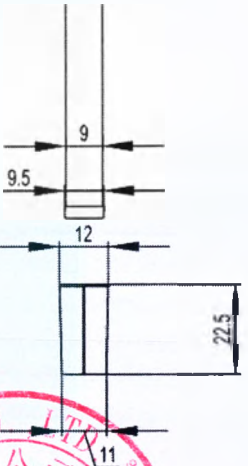
 Рис.147			Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Масса не более 30 гр.		
 Рис.148	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
 Рис.15	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

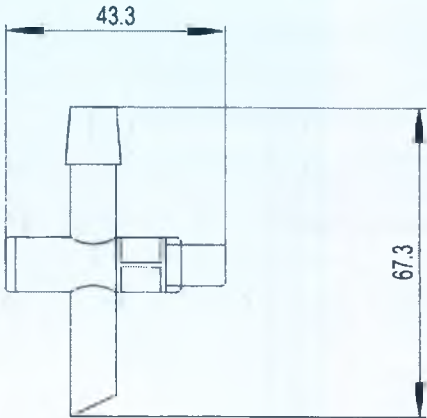
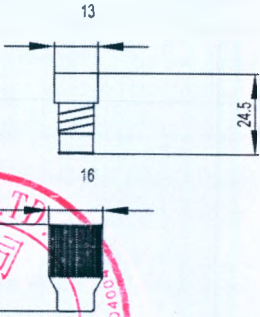


Рис. 149

16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр.	1	См. Рис	

 Рис.150				Динамическая (абсолютная) вязкость 5 Па•с		
 Рис.151	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 200 мл.	1	См. Рис

	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворот- ный)		Стандартное изде- лие		См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис. 152	18. 1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя-

			PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			ется по согласованию с заказчиком
Рис.153  Рис.154	18. 3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2500 мл.)

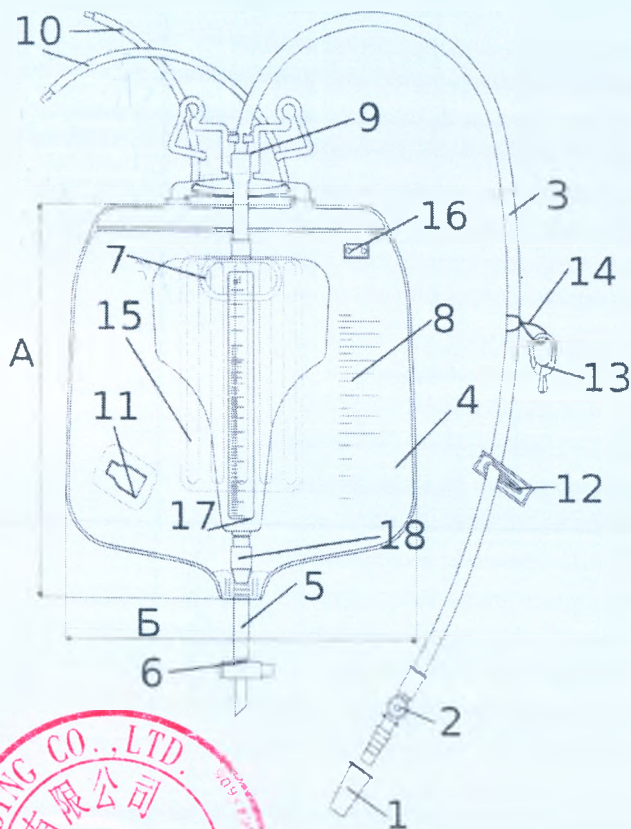


Рис. 155

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

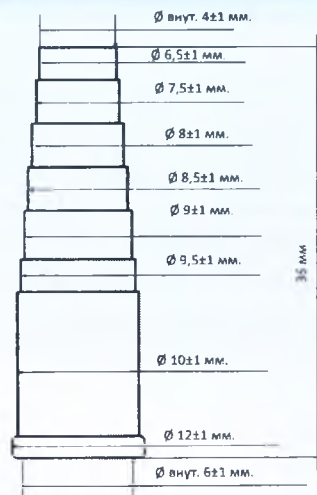


Рис.156

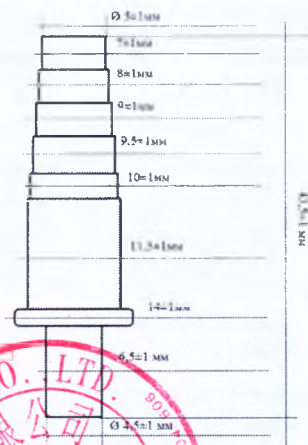


Рис.157

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

2.2 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис
По согласованию с заказчиком

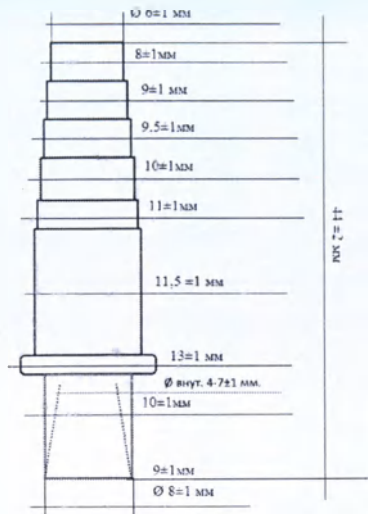
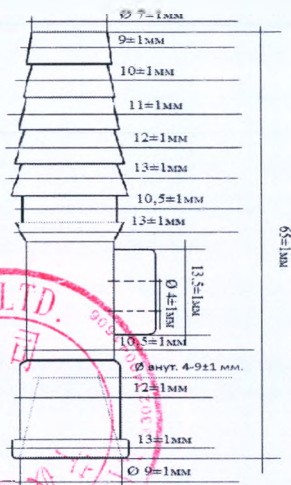
2.3 Коннектор

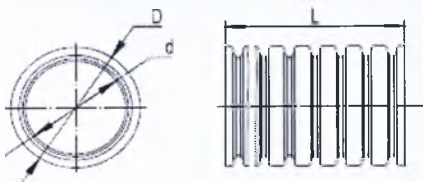
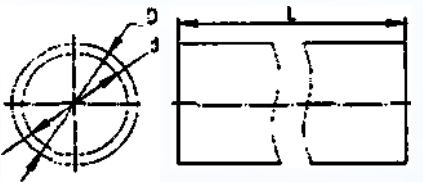
Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,

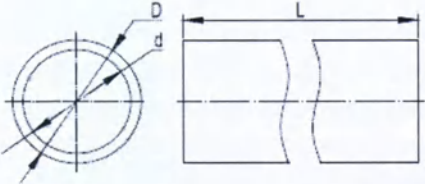
Размеры представлены на рисунке

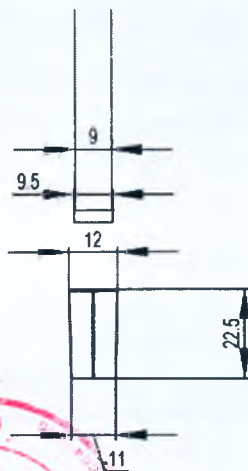
1

См. Рис

 Рис.158		Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			По согласованию с заказчиком
 Рис.159	2.4 Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.160	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.161	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.162	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 280 мм. х 270 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 200 мл. / 2500 мл. Камера – 200 мл. Емкость – 2500 мл.
 Рис.163	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.

		поворот- ный)				Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис. 164	6.1	Кран сдви- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5\pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5\pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие $43,3\pm 2$ мм. $67,3\pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

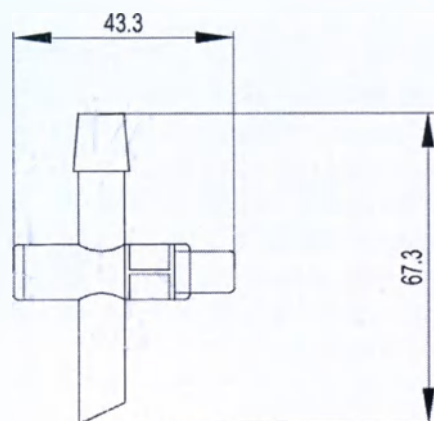


Рис.165

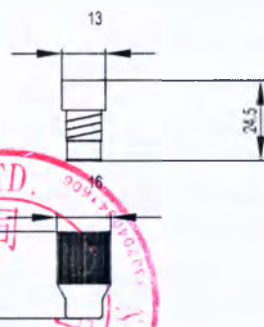
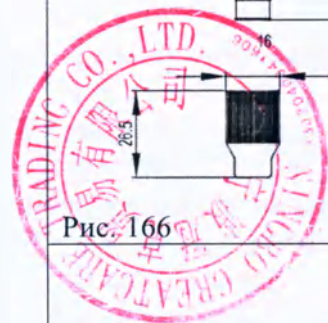


Рис.166



6.3

Кран пово-
ротный

**Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T**
Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

LDPE
Полиэтилен высокого
давления
SABIC LDPE
2022TN00
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD.

Стандартное изде-
лие
13±2 мм.
24,5±2 мм.
16±2 мм.
26,5±2 мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

7.

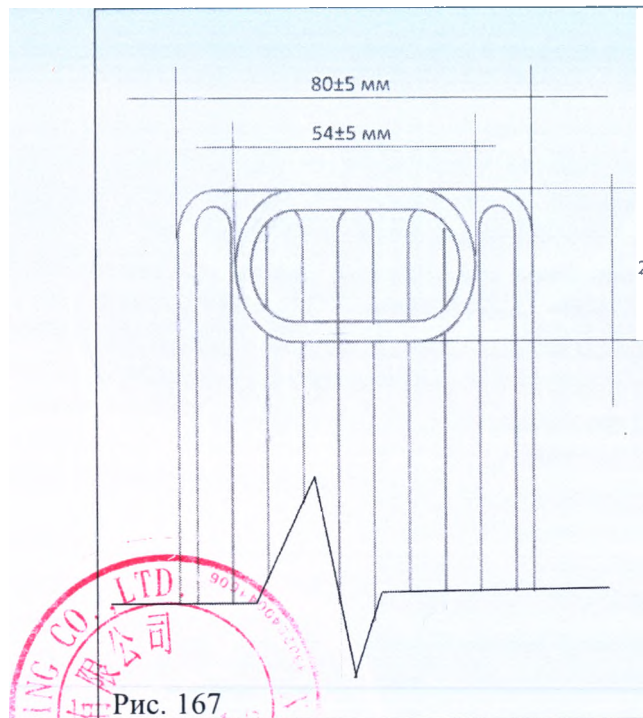
Слив дре-
нажный

Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC clear film BC005,

Размеры представ-
лены на рисунке

1

Находится
внутри моче-
приемника

 80±5 мм 54±5 мм 23,5±5 мм Рис. 167				Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай		
		8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	200 мл. / 2500 мл.	
		9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	См. Рис

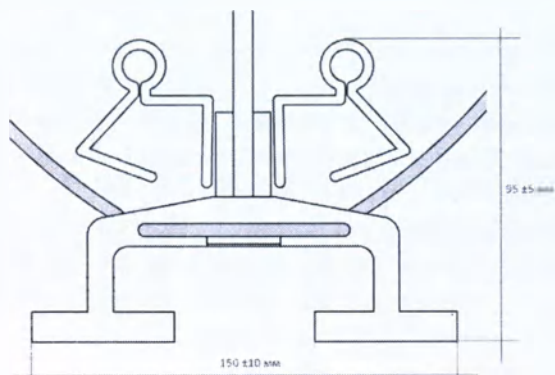


Рис.168

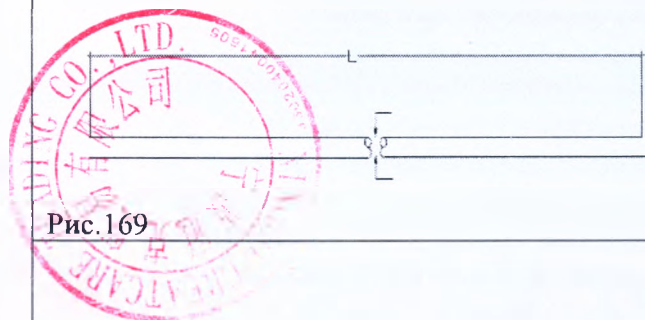


Рис.169

10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

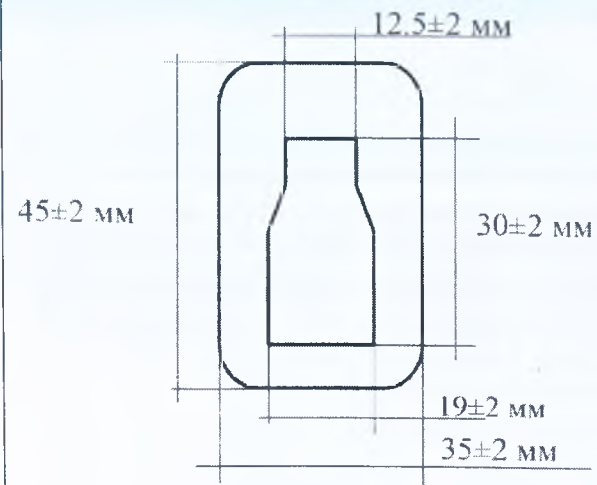


Рис.170

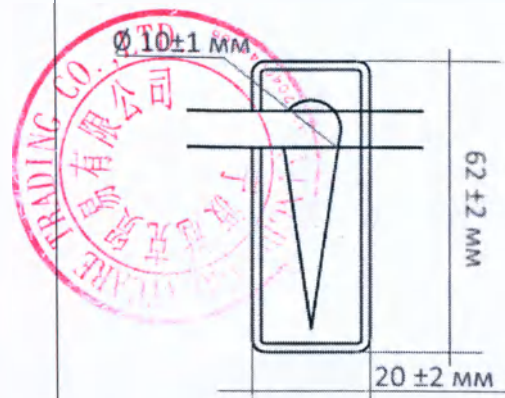


Рис.171

12.

Зажим
скользящий

Полипропилен PP
Yungsox PP
Copolymer, 5250T
Formosa Polypropyl-
ene (Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 30
гр.

1

См. Рис

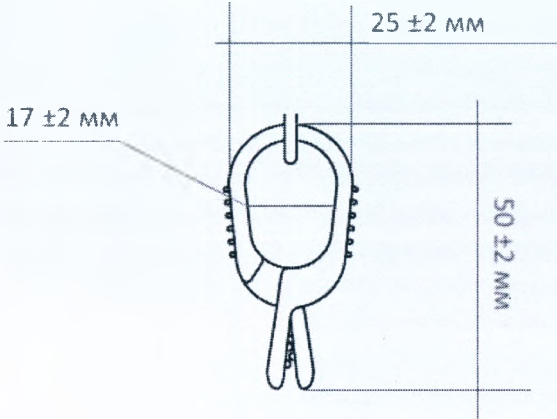
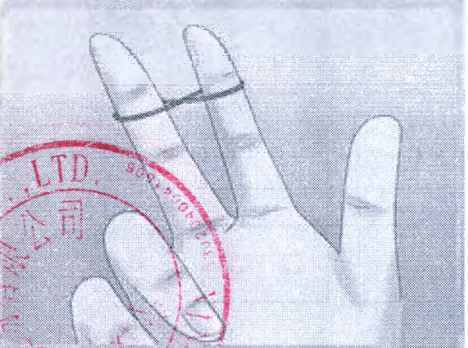
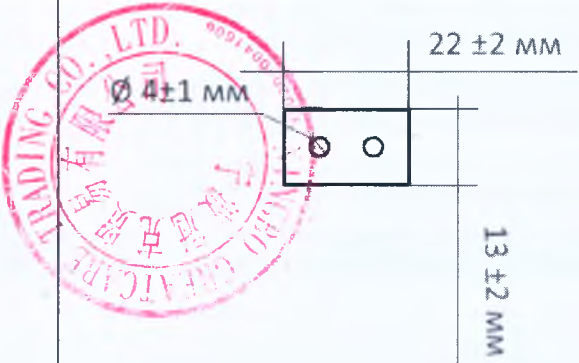
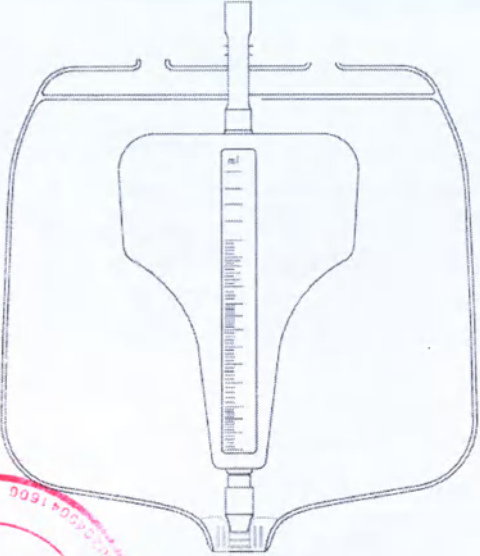
 Рис.171	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.172	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Желоба направляющие	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Габаритные размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

 Рис.173		щие для равномерного слива мочи	Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Масса не более 30 гр.		
 Рис.174	16.	Микро-фильтр для компенсации давления	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (абсолютная) вязкость 5 Па•с	1	См. Рис

 Рис.175	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 200 мл.	1	См. Рис
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	18. 1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

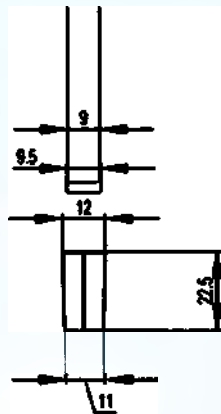


Рис.176

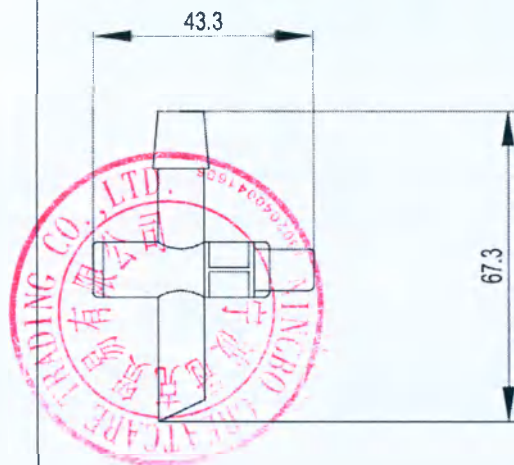


Рис.177

18.
2 Кран Т-об-
разный

CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD., Китай

Ø наруж. 11 ± 1 мм.
Длина $22,5 \pm 2$ мм.
Масса не более 20
гр.

Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

LDPE
Полиэтилен высокого
давления
**SABIC LDPE
2022TN00**
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD./ Полипропи-
лен PP
**Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T**
**Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA**

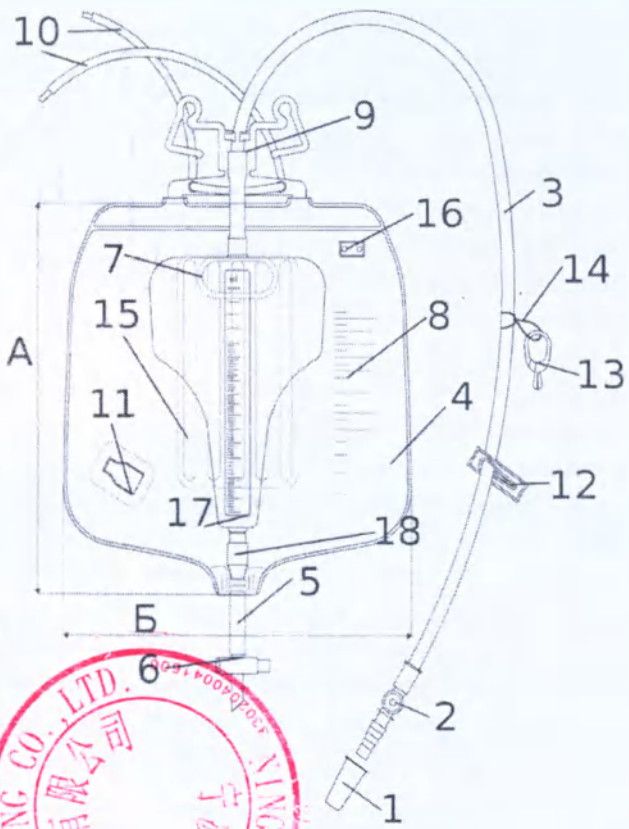
Стандартное изде-
лие
 $43,3 \pm 2$ мм.
 $67,3 \pm 2$ мм.
Масса не более 40
гр.

1
См. Рис
Кран камеры
измеритель-
ной выпуска-
ется 3 типов
Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком



Рис. 178

18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
----------	----------------------	---	--	--

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2600 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
 Рис. 179		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

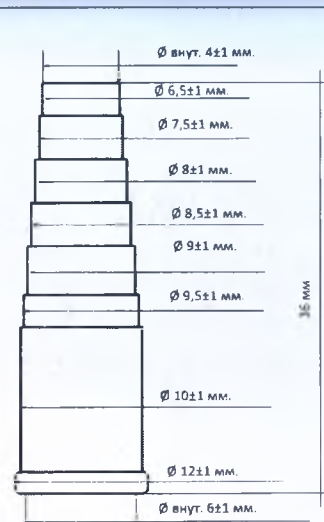


Рис.180

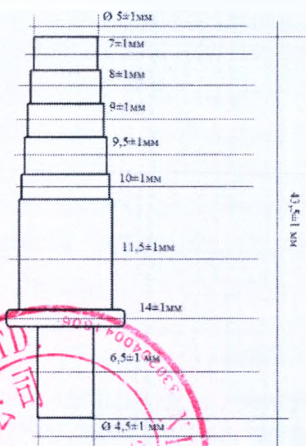


Рис.181

Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

2.2

Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис
По согласованию с заказчиком

2.3

Коннектор

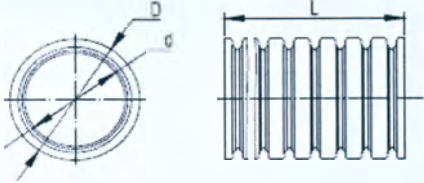
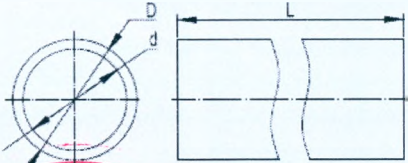
Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			По согласованию с заказчиком
	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.184	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.185	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

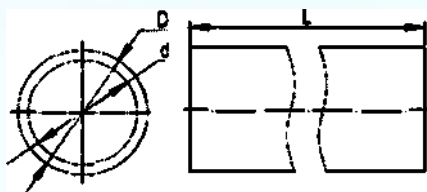


Рис.186

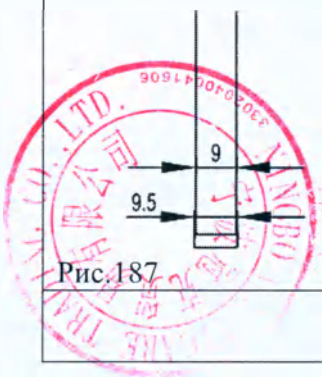
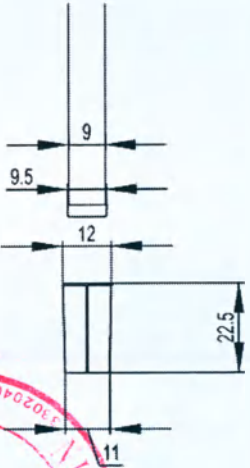
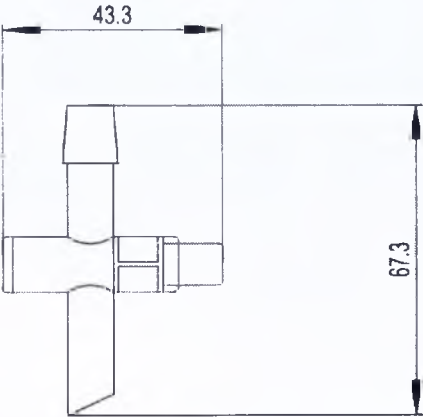
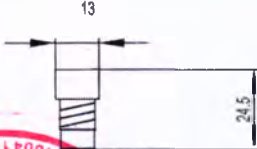
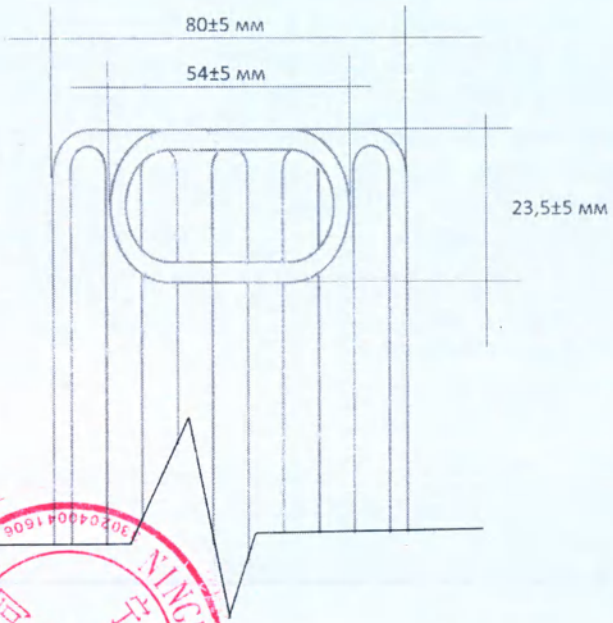


Рис.187

				Масса не более 50 гр.		
	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 200 мл. / 2600 мл. Камера – 200 мл. Емкость – 2600 мл.
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной,		Стандартное изделие		См. Рис

		Т-образный, поворотный)				Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.188	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

			CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	I	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005,	Размеры представлены на рисунке	I	Находится внутри моче-приемника

 80±5 мм 54±5 мм 23,5±5 мм Рис. 191			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай			
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	200 мл. / 2600 мл.		
	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

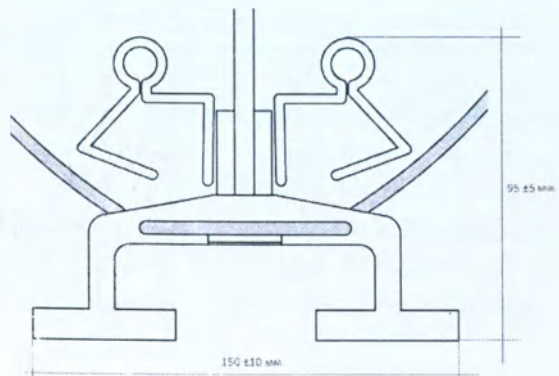


Рис.192

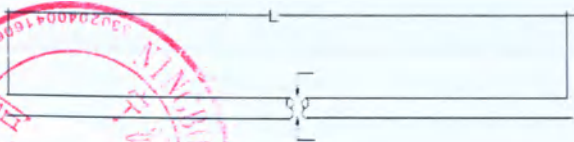
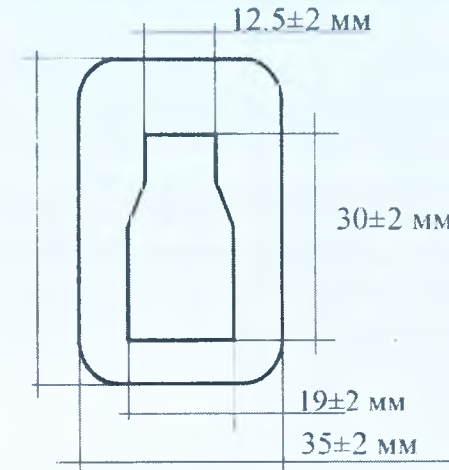
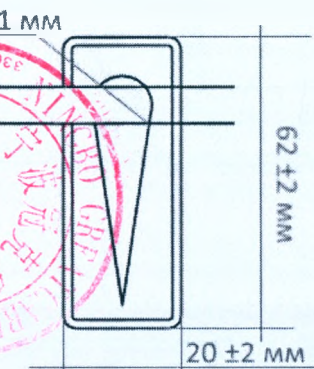


Рис.193



10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.194						
 Рис.195	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

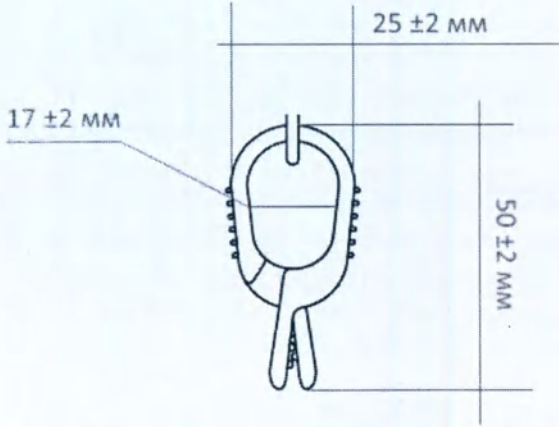
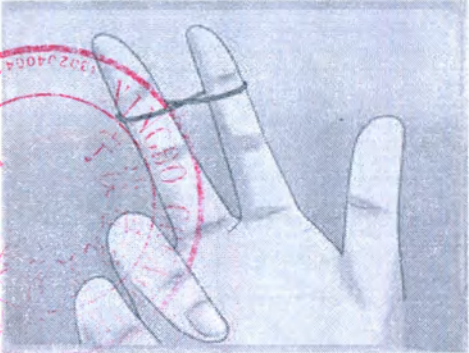
 Рис.196	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.197	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис



Рис.198

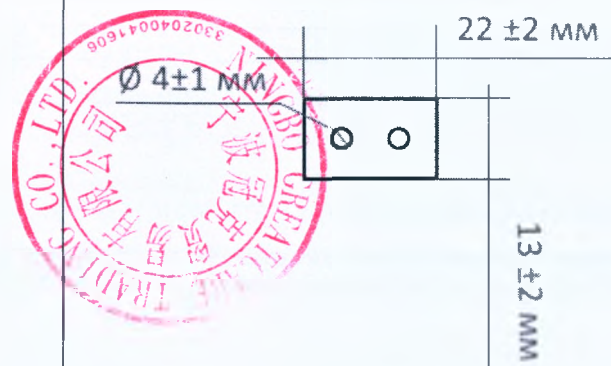


Рис.199

16.

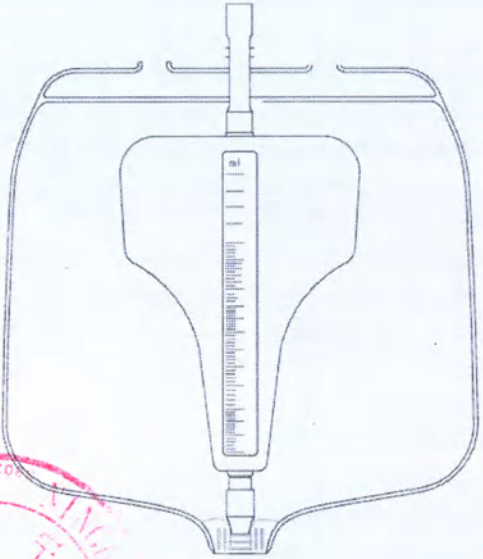
Микро-
фильтр для
компенса-
ции давле-
ния

Полиамид PA
PA 40J01-20.5
Zhejiang, China
(Mainland), Китай

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 5
гр.
Динамическая (аб-
солютная) вязкость
5 Па•с

1

См. Рис

 Рис.200	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 200 мл.	1	См. Рис
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	18. 1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

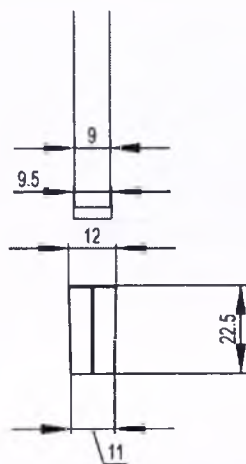


Рис.201

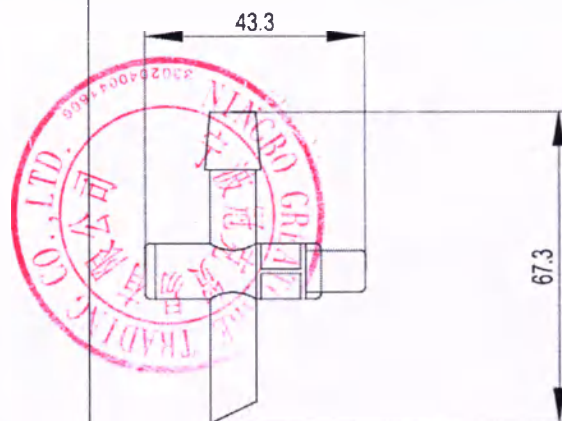


Рис.202

CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD., Китай

Ø наруж. 11 ± 1 мм.
Длина $22,5 \pm 2$ мм.
Масса не более 20
гр.

Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

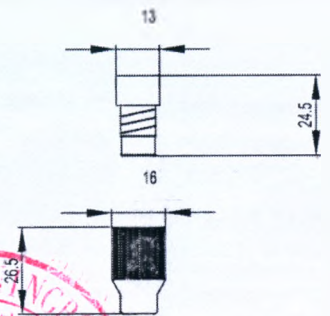
18.
2 Кран Т-об-
разный

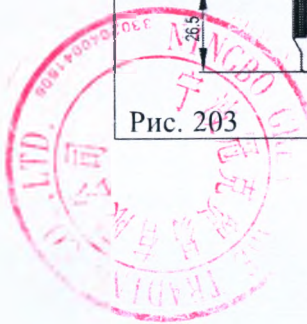
LDPE
Полиэтилен высокого
давления
SABIC LDPE
2022TN00
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD./ Полипропи-
лен PP
**Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T**
Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

Стандартное изде-
лие
 $43,3 \pm 2$ мм.
 $67,3 \pm 2$ мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран камеры
измеритель-
ной выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

 Рис. 203	18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
---	----------	----------------------	---	--	---	--



Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 400 мл. / 2000 мл.)

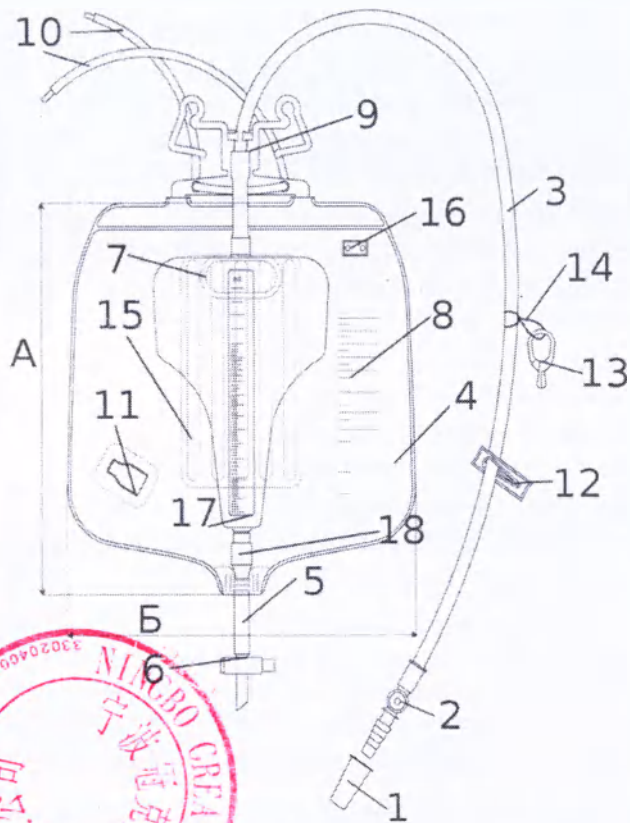
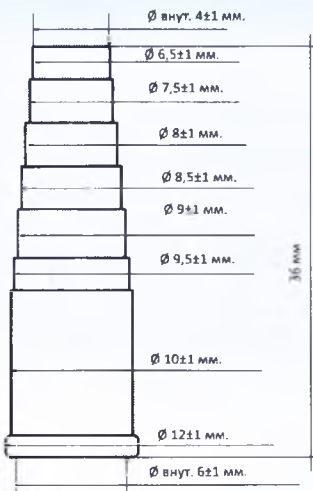
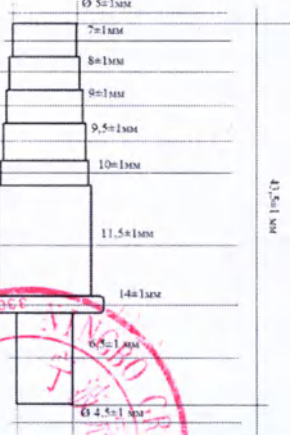


Рис.204

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.205			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.206	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

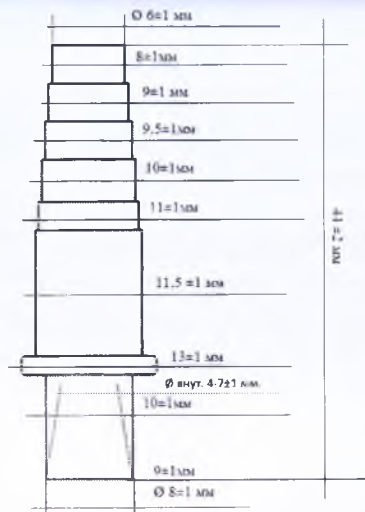


Рис.207

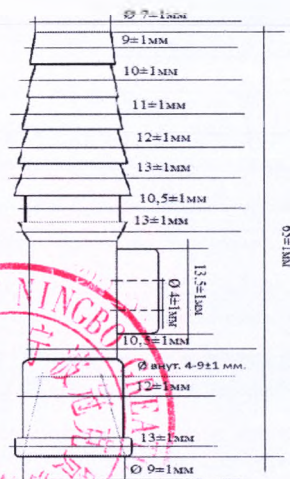


Рис.208

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

Рис. 207-208
НПО с заказчи-
ком

2.4

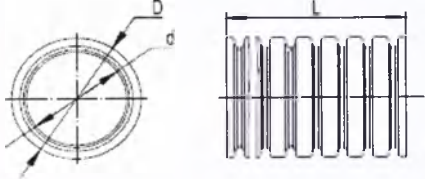
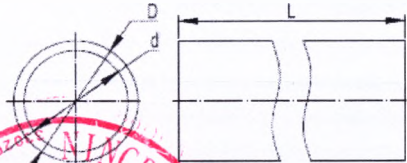
Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай

Размеры представ-
лены на рисунке

1

См. Рис
По согласо-
ванию с заказчи-
ком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.209	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.210	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

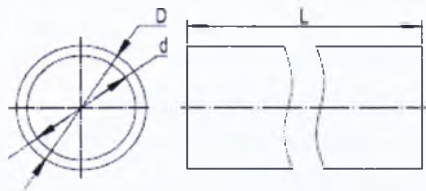


Рис.211

3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 400 мл. / 2000 мл. Камера – 400 мл. Емкость – 2000 мл.
5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.

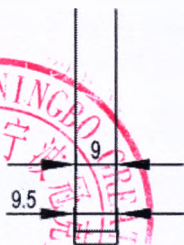
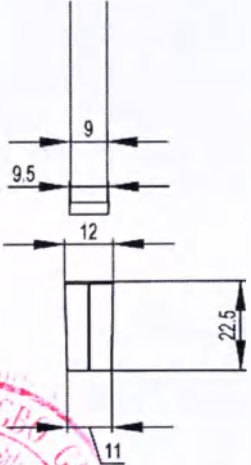
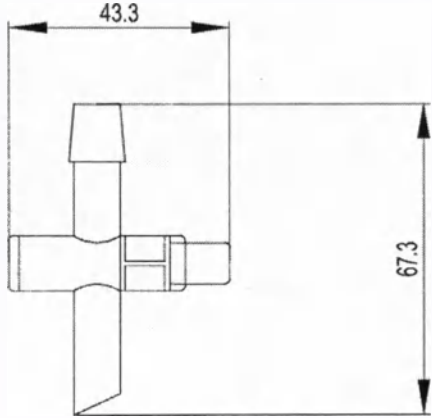
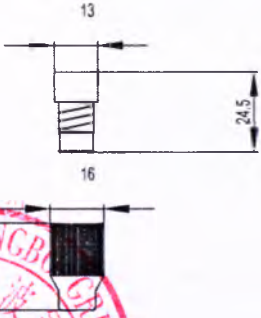
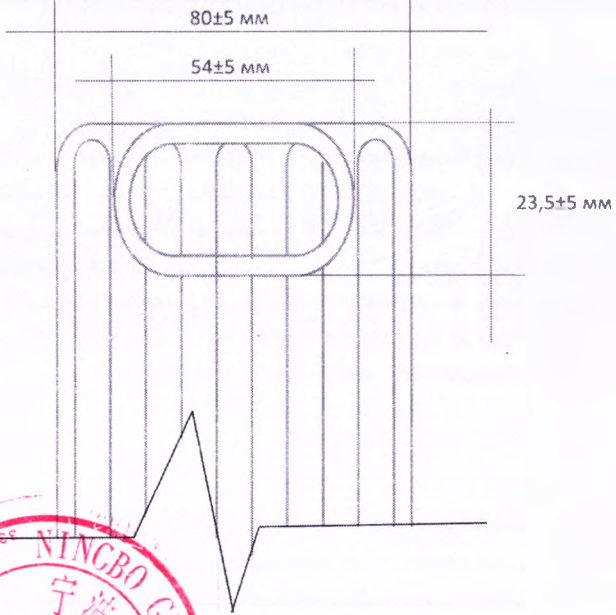


Рис.212

		поворот- ный)			Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис.213	6.1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
Рис.214 	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
Рис. 215	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005.	Размеры представлены на рисунке	1	Находится внутри моче-приемника

 80±5 мм 54±5 мм 23,5±5 мм Рис. 216			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай			
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	400 мл. / 2000 мл.		
	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

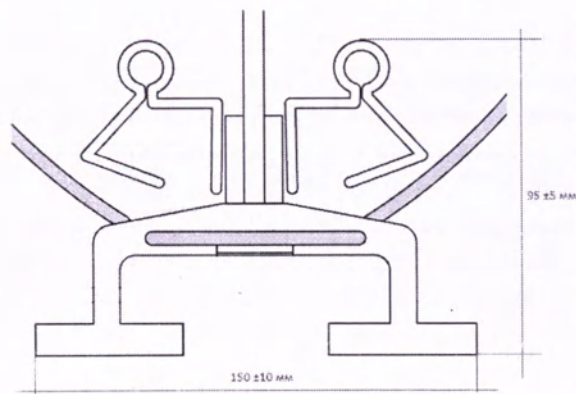


Рис.217

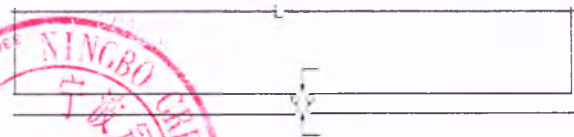


Рис.218

10.

Шнур для
подвешива-
ния

Термопластичный эла-
стомер – терилен **Ther-
moplastic Elastomer (**
TPE) Compound
Cixi jiahua plastic fac-
tory Ltd., CHINA

L 720 ±15 мм.
Ø 5±2 мм.
Масса не более 20
гр.

1

См. Рис

11.

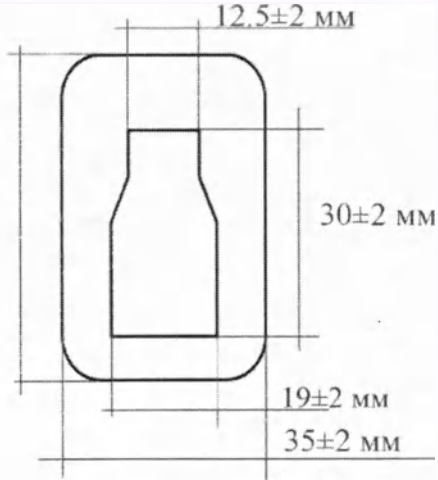
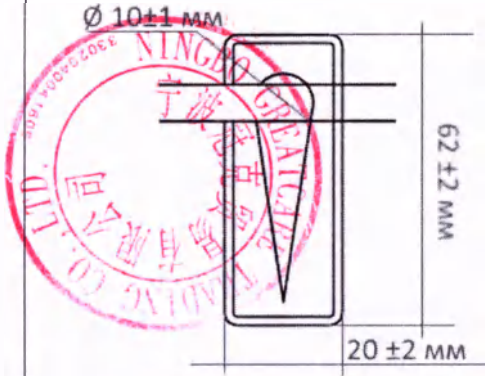
Карман для
укладки
крана слив-
ного

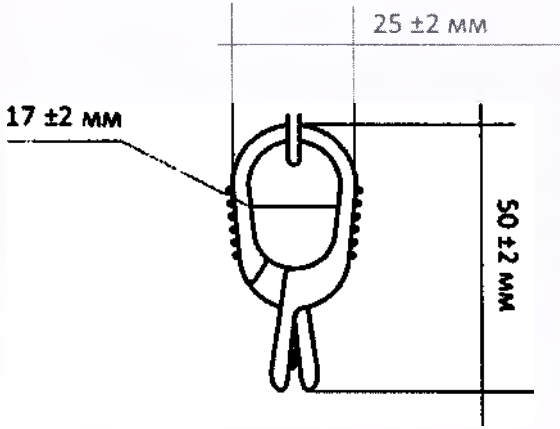
Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 30
гр.

1

См. Рис

 Рис.219						
 Рис.220	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.221	13. Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.222	14. Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15. Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

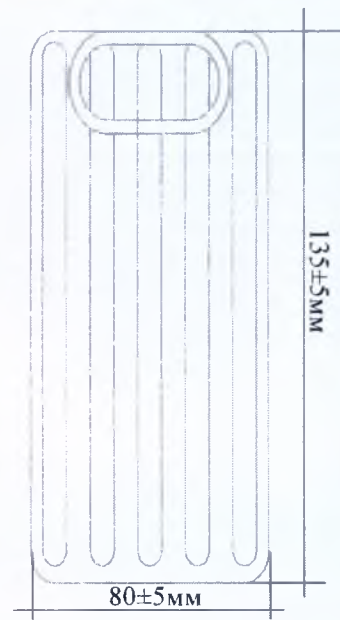


Рис.223

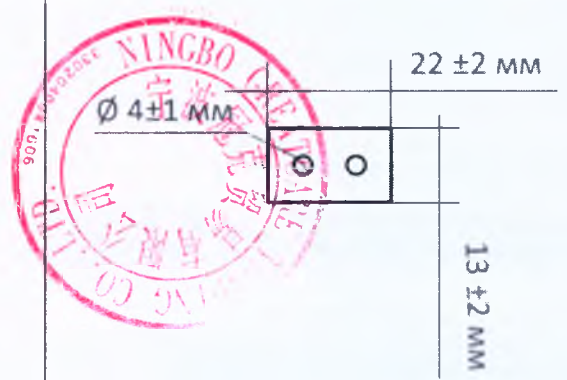
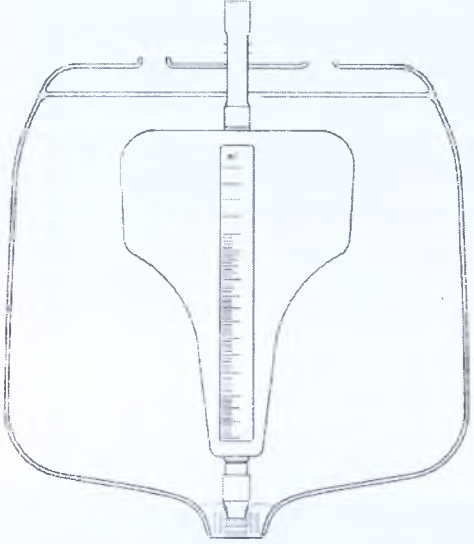


Рис.224

16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (аб- солютная) вязкость 5 Па·с	1	См. Рис
-----	--	---	--	---	---------

 Рис.225	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 400 мл.	1	См. Рис
 Кран сдвижной	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	18. 1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

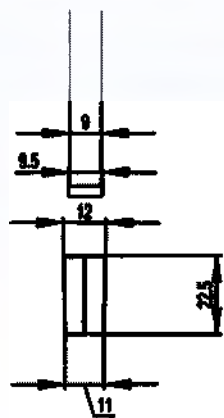


Рис.226

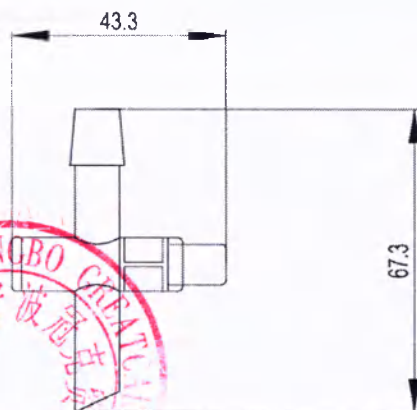


Рис.227

18.
2

Кран Т-об-
разный

LDPE
Полиэтилен высокого
давления
**SABIC LDPE
2022TN00**
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD./ Полипропи-
лен PP
**Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T**
**Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA**

Стандартное изде-
лие
43,3±2 мм.
67,3±2 мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран камеры
измеритель-
ной выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

18.
3

Кран пово-
ротный

LDPE

Стандартное изде-
лие

1

См. Рис

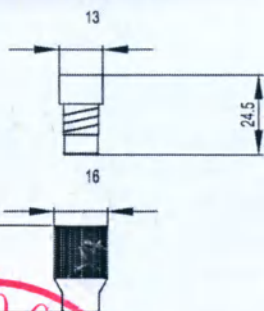
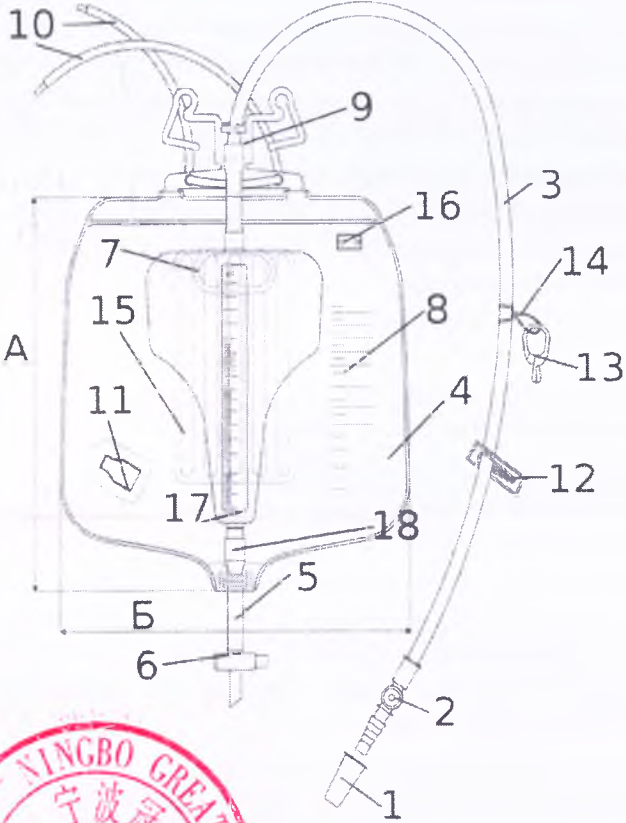


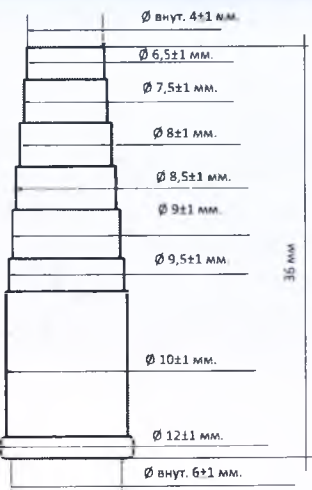
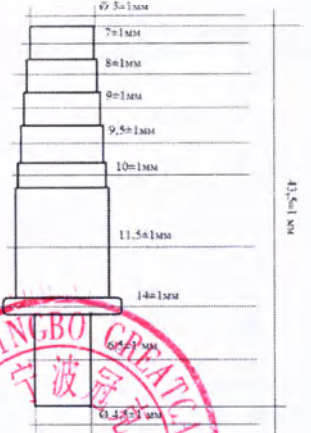
Рис. 228

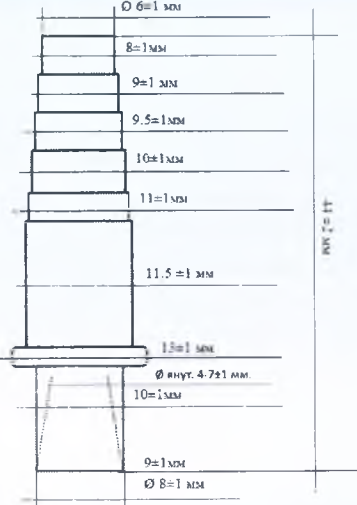
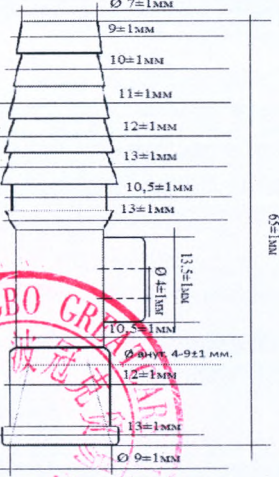
Полиэтилен высокого давления
SABIC LDPE
2022TN00
 CHINA - HANGZHOU
 - SABIC INNOVATIVE
 PLASTICS MANAGE-
 MENT (SHANGHAI)
 CO., LTD.

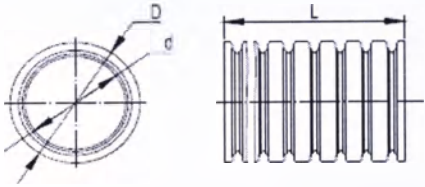
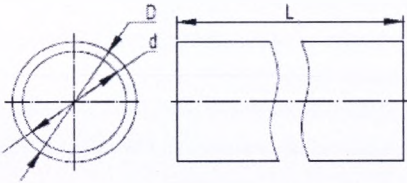
13±2 мм.
 24,5±2 мм.
 16±2 мм.
 26,5±2 мм.
 Масса не более 40 гр.

Кран камеры измеритель-
 ной выпуска-
 ется 3 типов.
 Тип определя-
 ется по согла-
 сованию с за-
 казчиком

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 400 мл. / 2600 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
 Рис.229		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.230			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.231	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.232	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

 Рис.232			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA		По согласованию с заказчиком
 Рис.233	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1 См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.234	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.235	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

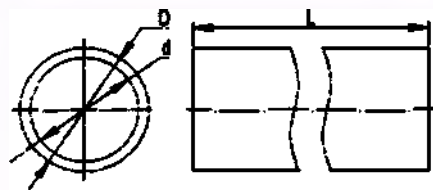


Рис.236

Масса не более 50 гр.

4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 400 мл. / 2600 мл. Камера – 400 мл. Емкость – 2600 мл.
5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.

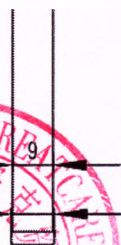
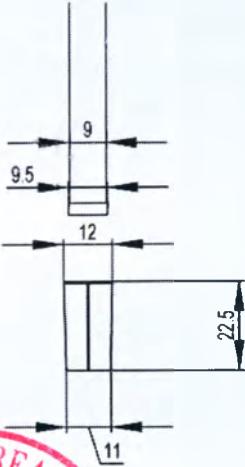


Рис.237

		поворот- ный)			Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.1	Кран сдви- жной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком



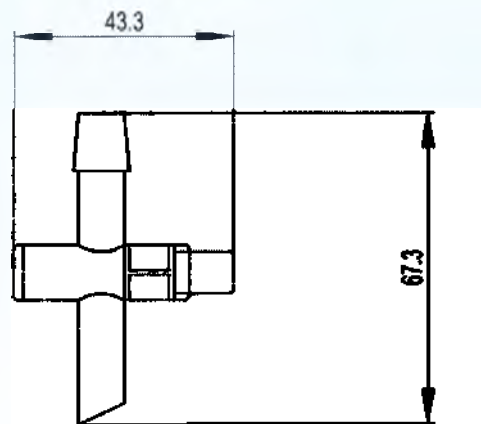


Рис.239

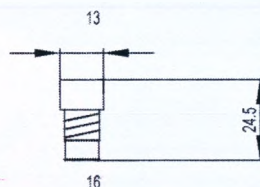


Рис. 240

6.3

Кран пово-
ротный

Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T
Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

LDPE
Полиэтилен высокого
давления
SABIC LDPE
2022TN00
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD.

Стандартное изде-
лие
13±2 мм.
24,5±2 мм.
16±2 мм.
26,5±2 мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по сопла-
сованию с за-
казчиком

7.

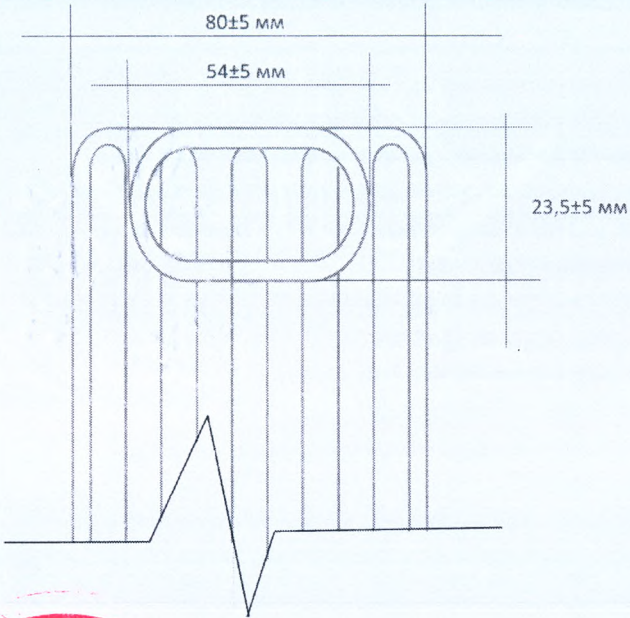
Слив дре-
нажный

Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC clear film BC005,

Размеры представ-
лены на рисунке

1

Находится
внутри моче-
приемника

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай			
Рис. 241	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	400 мл. / 2600 мл.		
	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

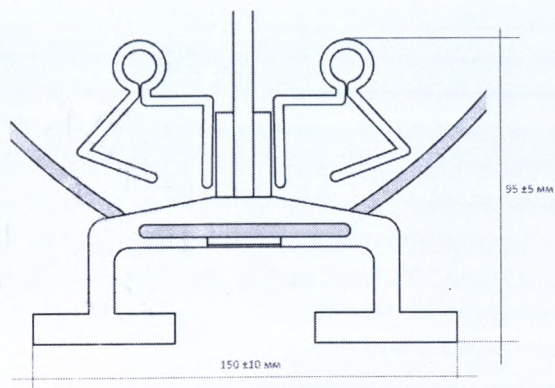


Рис.242

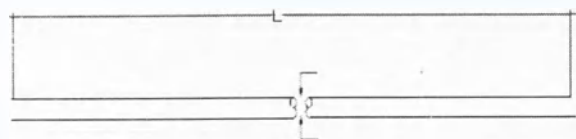
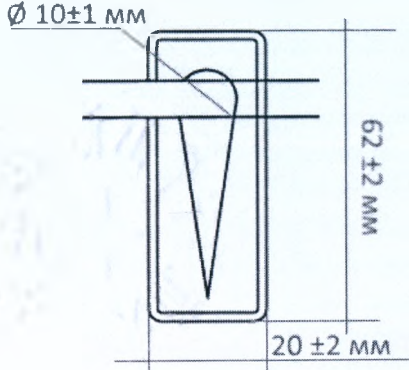
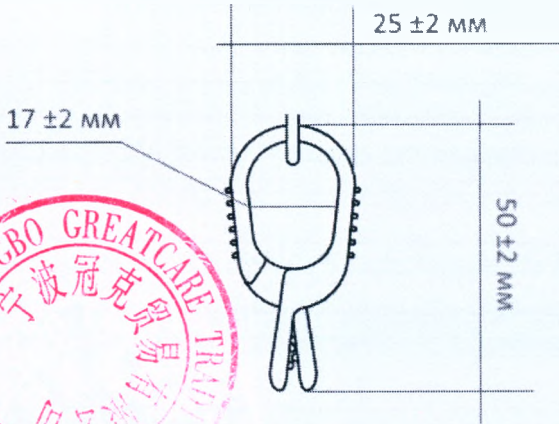


Рис.243



Рис.244

10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ± 15 мм. Ø 5 ± 2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.245	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.246	13.	Клипса бе- львая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

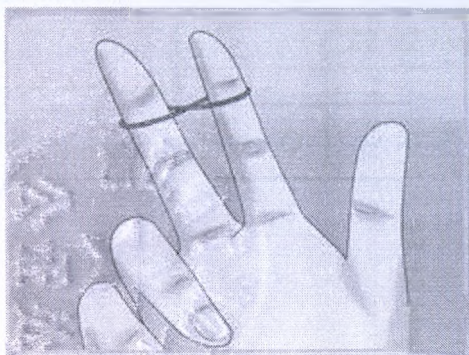


Рис.247

14.

Эластичное
крепление
клипсы

Термопластичный
эластомер TPE
RP 3161 Ruipu
Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.

Представляет собой резиновое крепление овальной формы
Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм

1

См. Рис

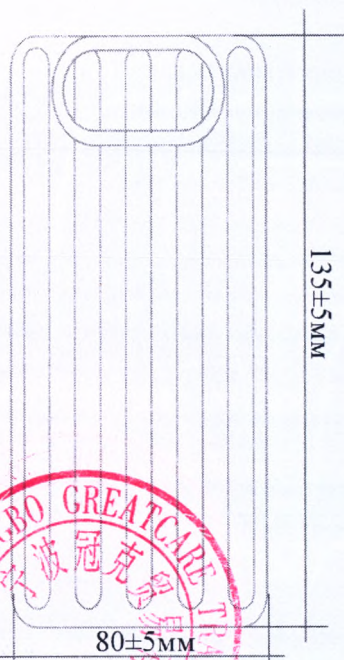


Рис.248

15.

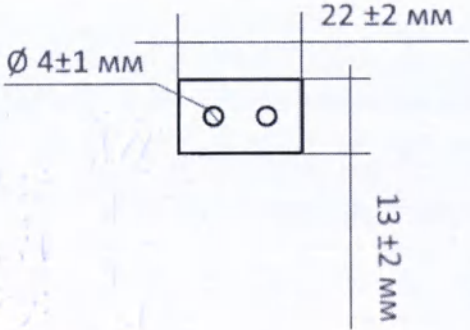
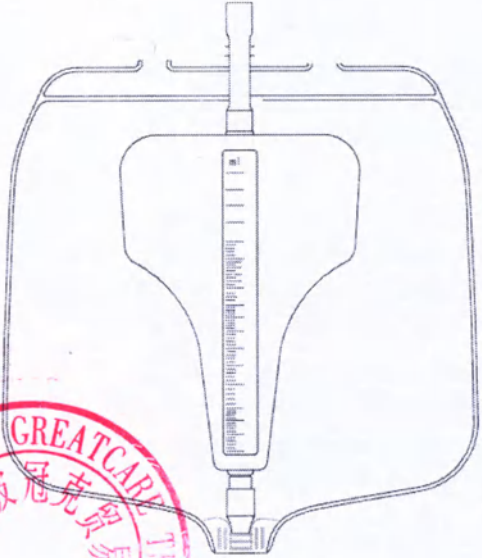
Желоба
направляющие для равномерного
слива мочи

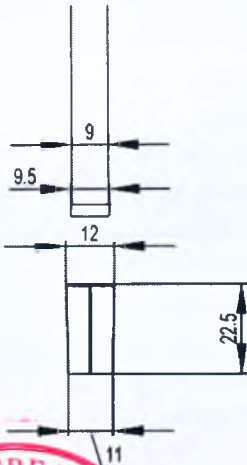
Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай

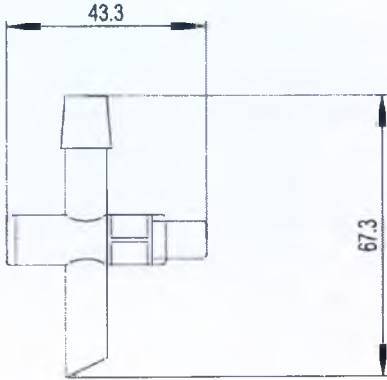
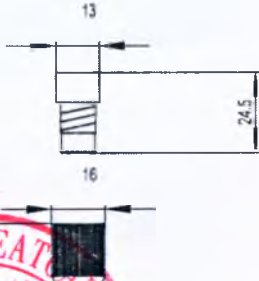
Габаритные размеры представлены на рисунке
Масса не более 30 гр.

1

См. Рис

 Рис.249	16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (аб- солютная) вязкость 5 Па•с	1	См. Рис
 Рис.250	17.	Камера из- меритель- ная	Поливинилхлорид ме- дицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 400 мл.	1	См. Рис

	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворот- ный)		Стандартное изде- лие		См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис. 251	18. 1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя-

			PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA		ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

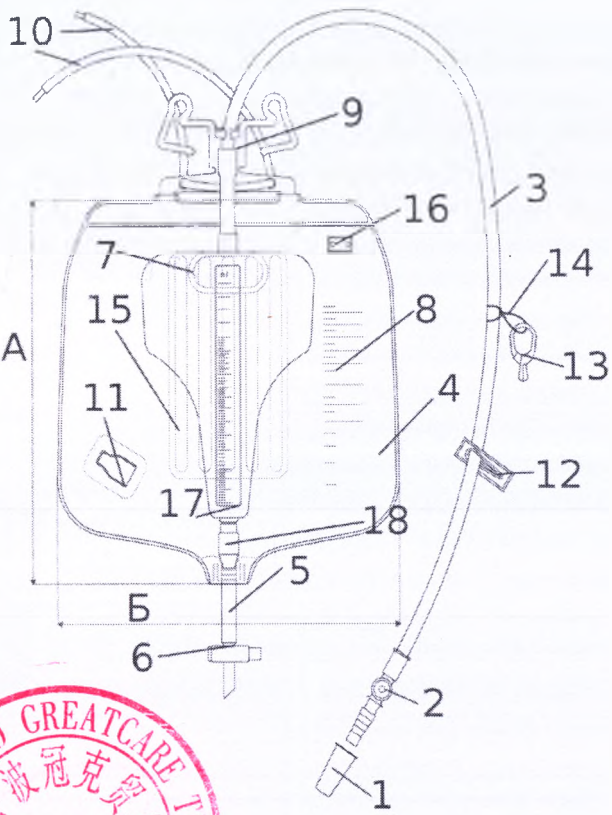
Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 500 мл. / 2500 мл.)		№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
		1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
		2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
		2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005. Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.254

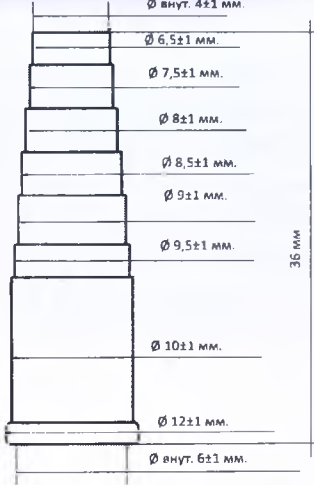
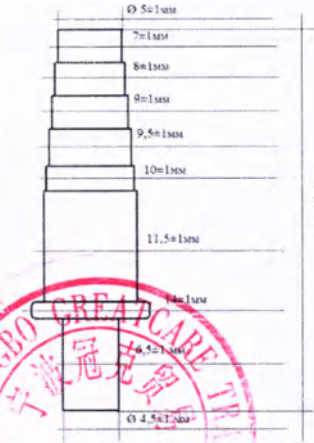
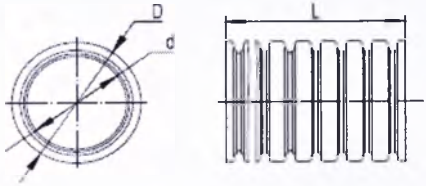
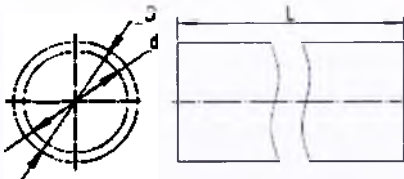
 Рис.255			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.256	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

Рис.257			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			По согласованию с заказчиком
Рис.258	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.259	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.260	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 ,	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

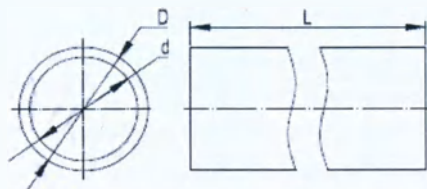


Рис.261

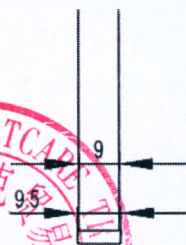
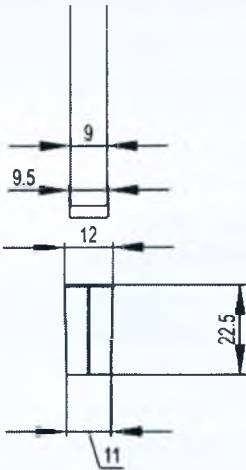


Рис.262

			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Масса не более 30 гр.		
	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 500 мл. / 2500 мл. Камера – 500 мл. Емкость – 2500 мл.
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной,		Стандартное изделие		См. Рис

		Т-образный, поворотный)				Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	6.1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изделие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
Рис. 263 	6.2	Кран Т-образный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)	Стандартное изделие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

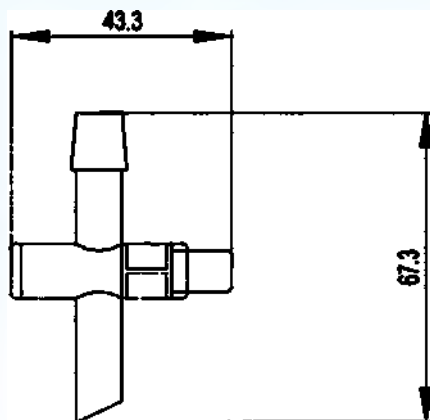


Рис.264

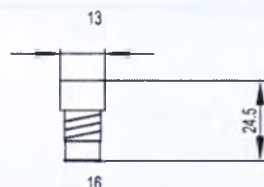
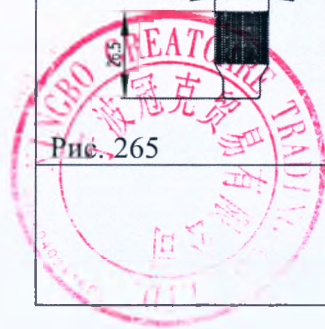


Рис. 265



CO., LTD./ Полипропи-
лен PP
**Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T**
Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

6.3

Кран пово-
ротный

LDPE
Полиэтилен высокого
давления
SABIC LDPE
2022TN00
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD.

Стандартное изде-
лие
13±2 мм.
24,5±2 мм.
16±2 мм.
26,5±2 мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

7.

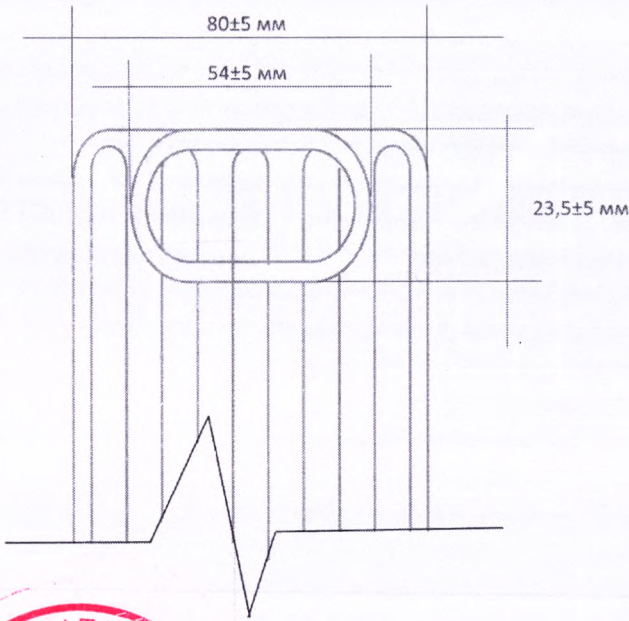
Слив дре-
нажный

Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC clear film BC005,

Размеры представ-
лены на рисунке

1

Находится
внутри моче-
приемника

 Рис. 266			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай			
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	500 мл. / 2500 мл.		
	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

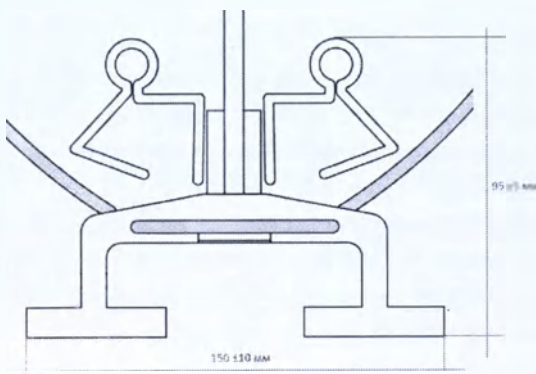
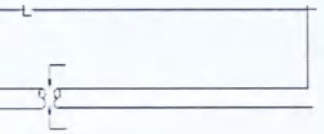


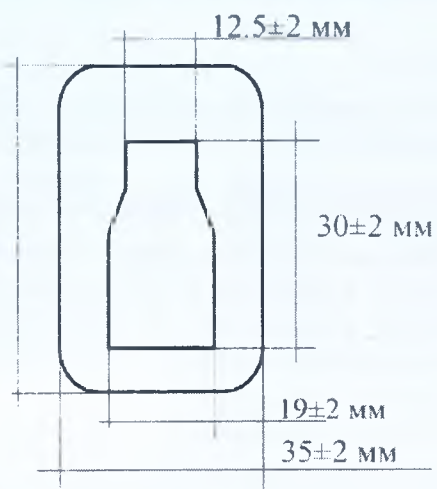
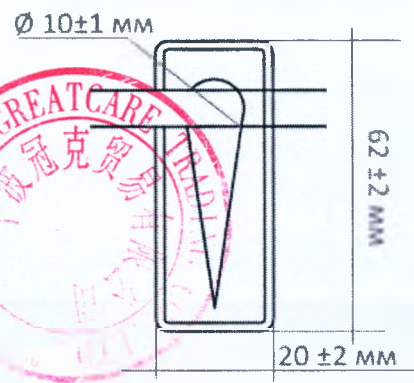
Рис.267



Рис.268



10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.269					
 Рис.270	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1 См. Рис

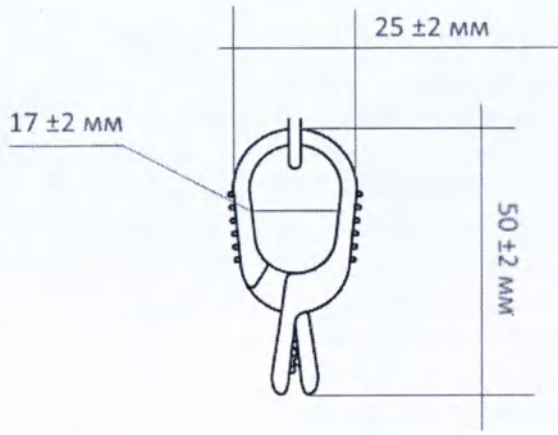
 Рис.271	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.272	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис



Рис.273

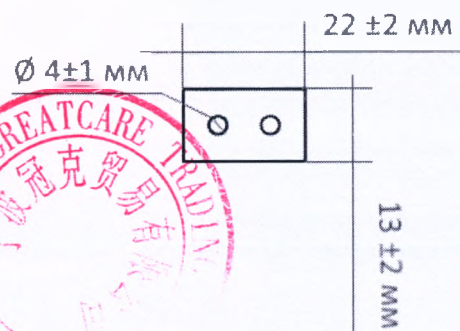


Рис.274

16.

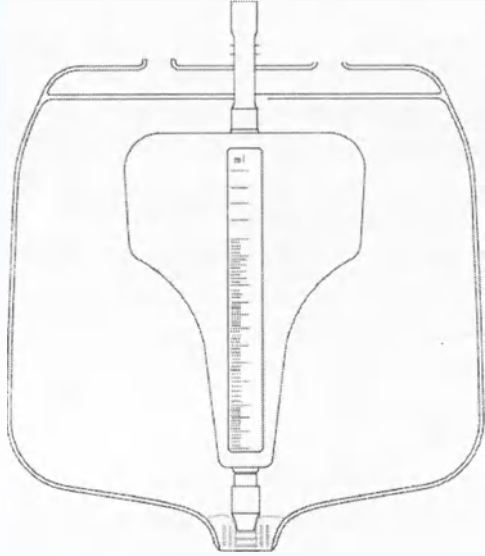
Микро-
фильтр для
компенса-
ции давле-
ния

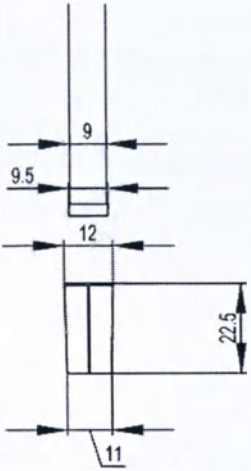
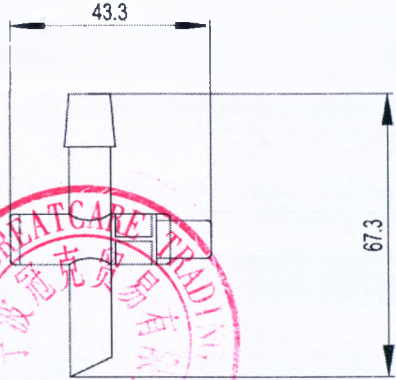
Полиамид PA
PA 40J01-20.5
Zhejiang, China
(Mainland), Китай

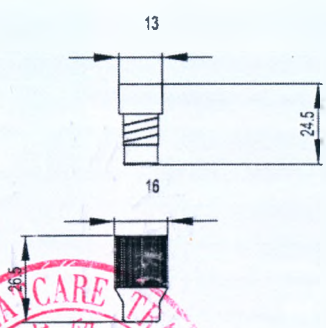
Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 5
гр.
Динамическая (аб-
солютная) вязкость
5 Па·с

1

См. Рис

 Рис.275	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 500 мл.	1	См. Рис
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	18. 1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

 Рис.276			CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис.277	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP Yungsox PP Copoly- mer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

 Рис. 278	18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
---	----------	----------------------	---	--	---	--

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 500 мл. / 2600 мл.)

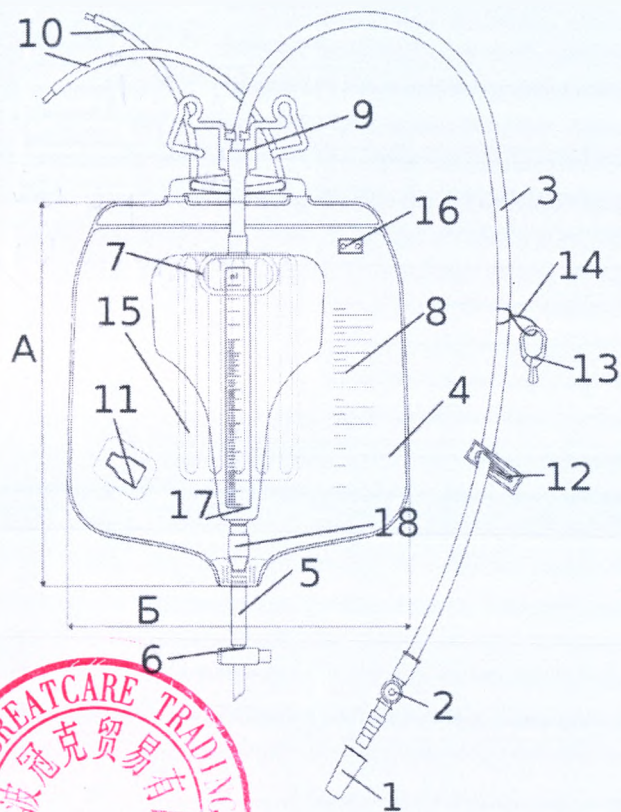
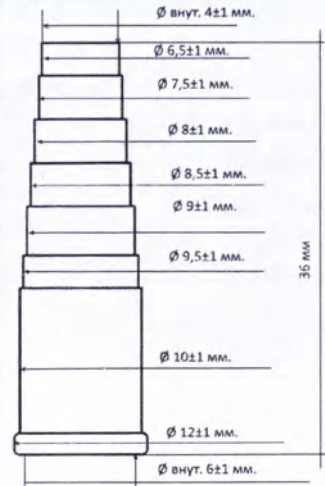
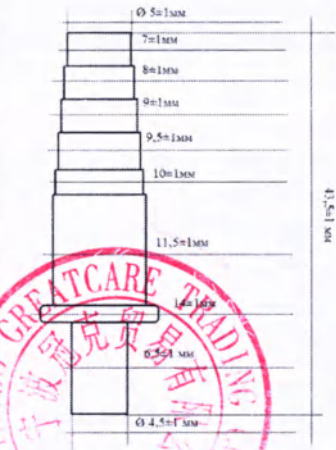


Рис.279

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.280			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.281	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

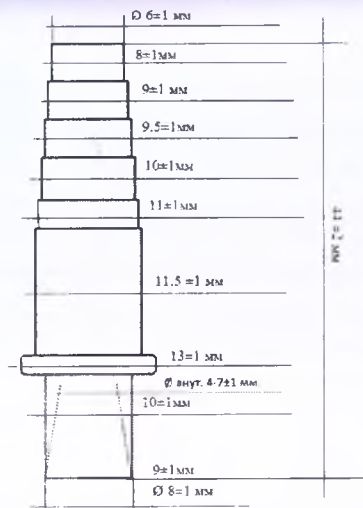


Рис.282

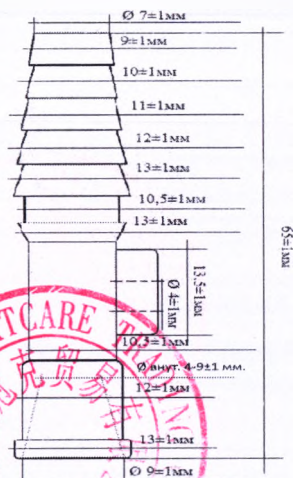


Рис.283

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

По согласованию с заказчиком

2.4 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон
RTV-2
Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис По согласованию с заказчиком

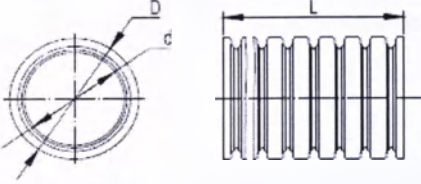
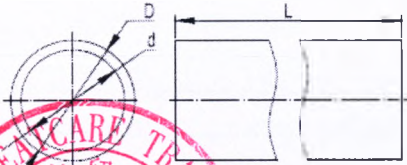
	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.284

Рис.285

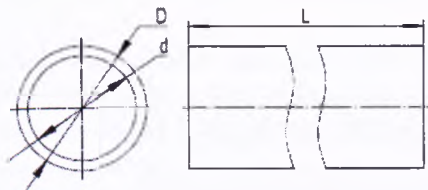


Рис.286

4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 500 мл. / 2600 мл. Камера — 500 мл. Емкость — 2600 мл.
5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.



Рис.287

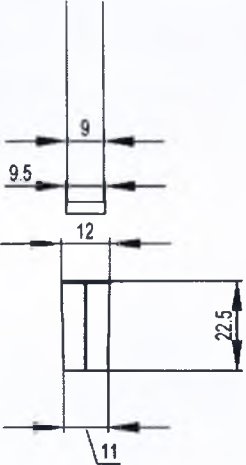
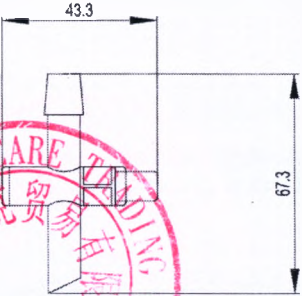
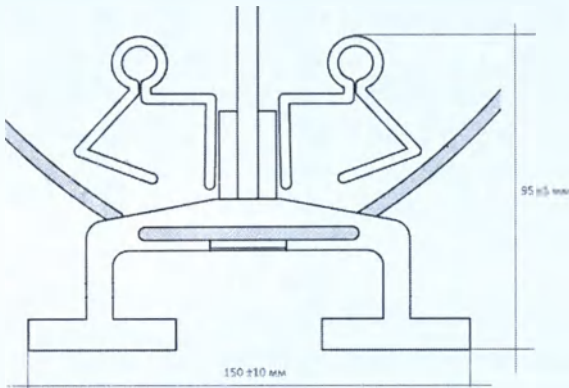
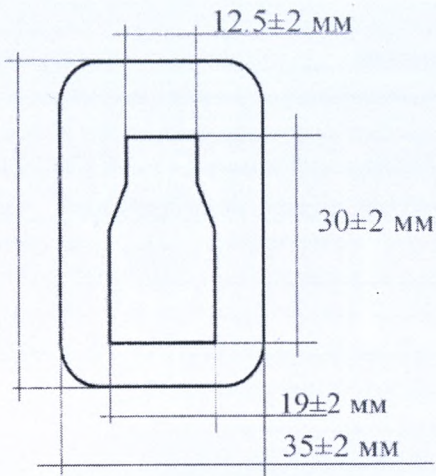
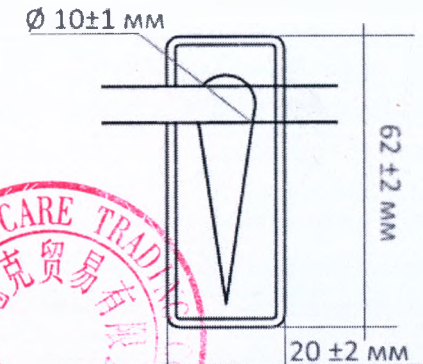
		поворот- ный)			Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.1	Кран сдви- жной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие 43,3±2 мм. 67,3±2 мм. Масса не более 40 гр.	1 См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

Рис.288

Рис.289

			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
Рис.290	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
Рис.291	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	Находится внутри моче-приемника

	8.	Шкала	Чернила GC02, Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	500 мл. / 2500 мл.		
 Рис.292	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис.293	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.294						
 Рис.295	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

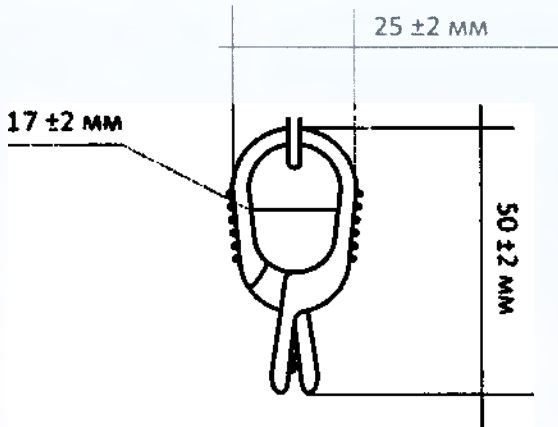
 Рис.296	13. Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.297	14. Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15. Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис



Рис.298

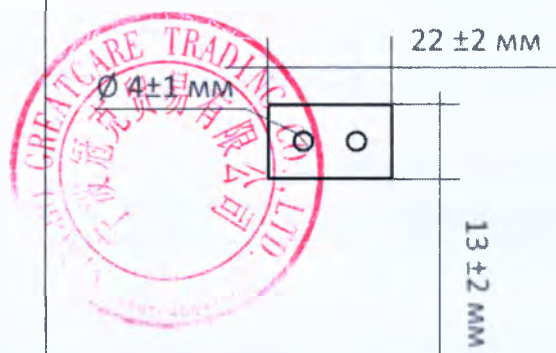
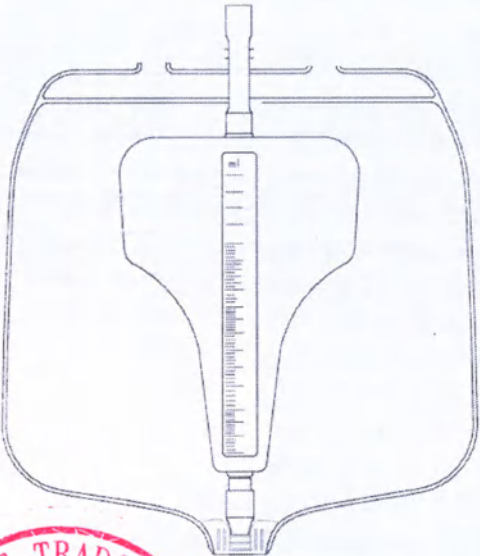


Рис.299

16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид PA PA 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр. Динамическая (аб- солютная) вязкость 5 Па•с	1	См. Рис
-----	--	---	--	---	---------

 Рис. 300	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 500 мл.	1	См. Рис
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	18. 1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

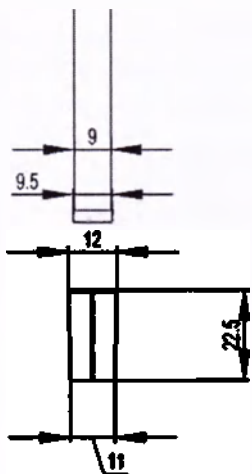


Рис.301

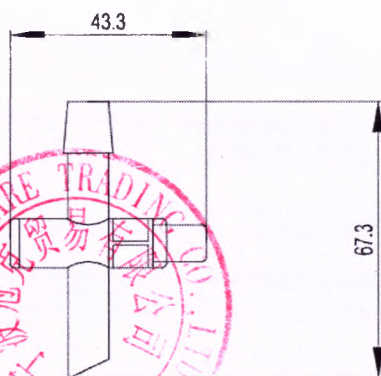


Рис.302

CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD., Китай

Ø наруж. 11 ± 1 мм.
Длина $22,5 \pm 2$ мм.
Масса не более 20
гр.

Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

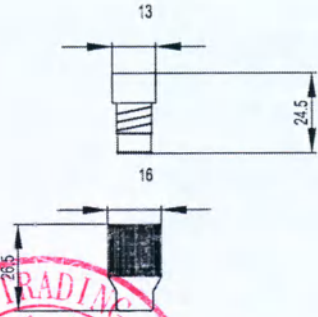
18.
2 Кран Т-об-
разный

LDPE
Полиэтилен высокого
давления
SABIC LDPE
2022TN00
CHINA - HANGZHOU
- SABIC INNOVATIVE
PLASTICS MANAGE-
MENT (SHANGHAI)
CO., LTD./ Полипропи-
лен PP
Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T
Formosa Polypropylene
(Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

Стандартное изде-
лие
 $43,3 \pm 2$ мм.
 $67,3 \pm 2$ мм.
Масса не более 40
гр.

1

См. Рис
Кран камеры
измеритель-
ной выпуска-
ется 3 типов.
Тип определя-
ется по согла-
сованию с за-
казчиком

 Рис. 303	18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
---	----------	----------------------	---	--	---	--

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Двухкамерный 400 мл. / 2500 мл.)

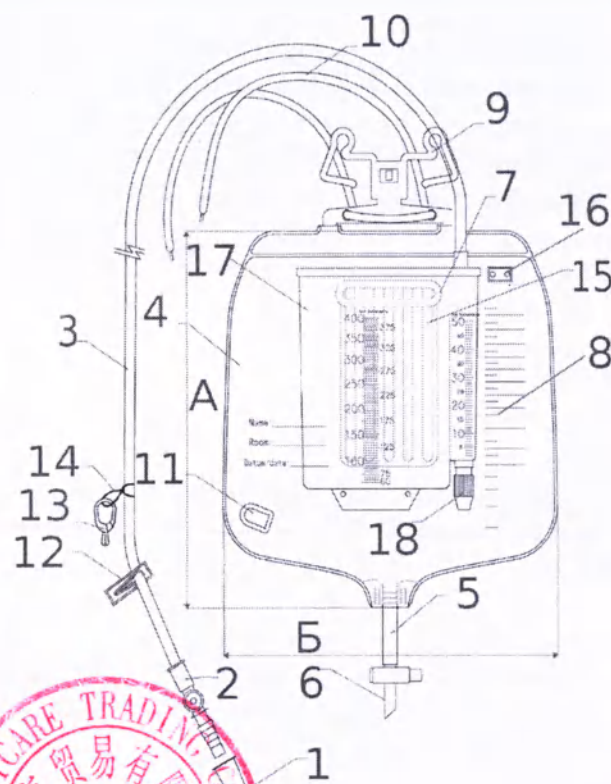


Рис.304

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.305		Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
Рис.306	2.2 Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3 Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

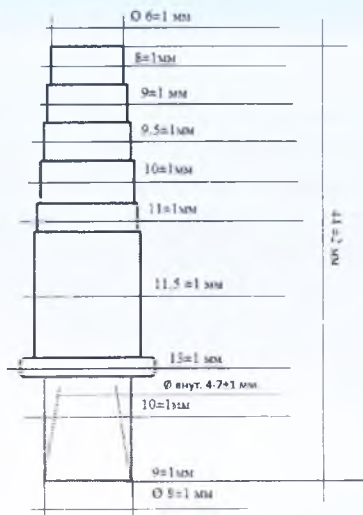


Рис.307

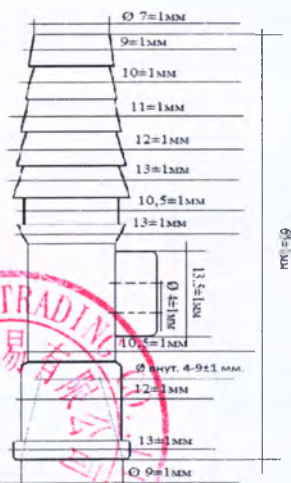


Рис.308

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

По согласованию с заказчиком

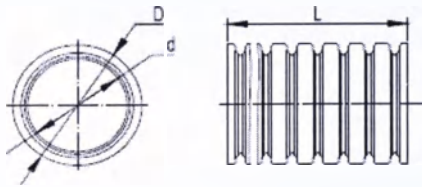
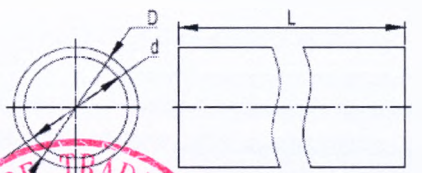
2.4 Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон
RTV-2
Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.309	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.310	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

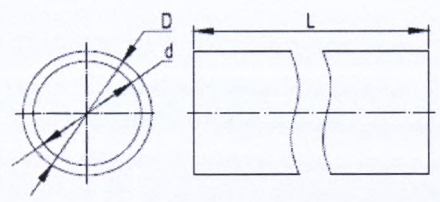
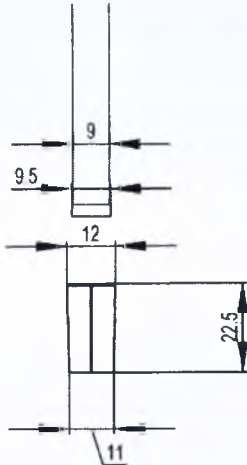
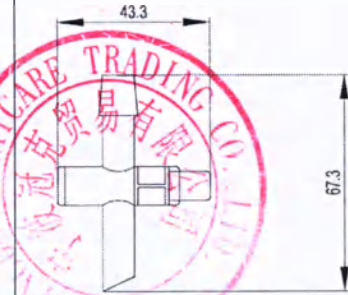


Рис.311

	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 400 мл. / 2500 мл. Камера – 400 мл. Емкость – 2500 мл.
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.



Рис.312

		поворот- ный)			Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком	
	6.1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм. Ø наруж. 11±1 мм. Длина 22,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие 43,3±2 мм. 67,3±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

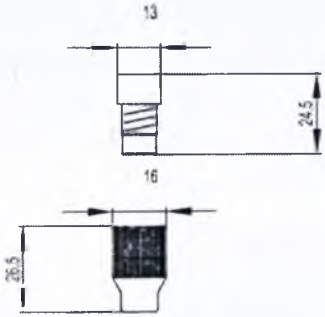
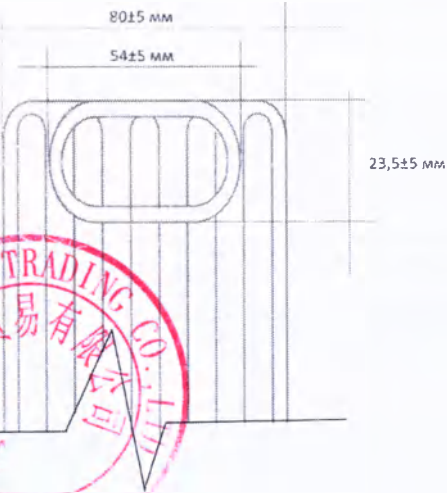
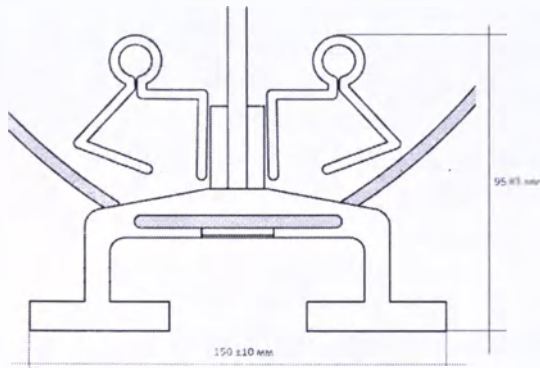
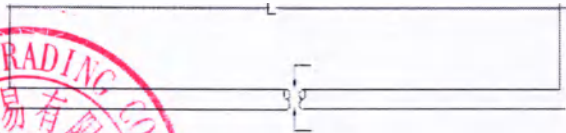
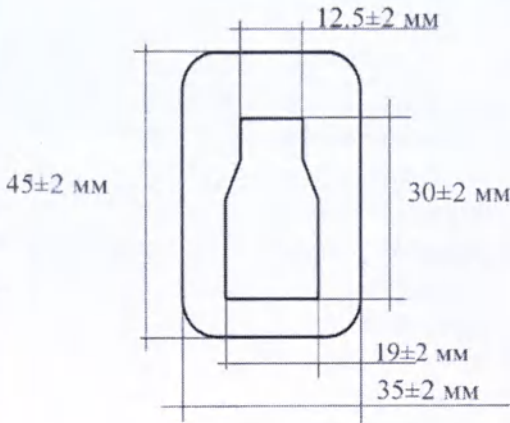
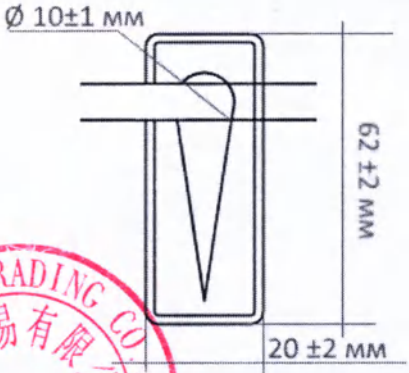
			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	Находится внутри моче-приемника

Рис. 315

Рис. 316

	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	400 мл. / 2500 мл.		
 Рис.317	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис.318	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.319						
 Рис.320	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
	13.	Клипса бе- льевая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке	1	См. Рис

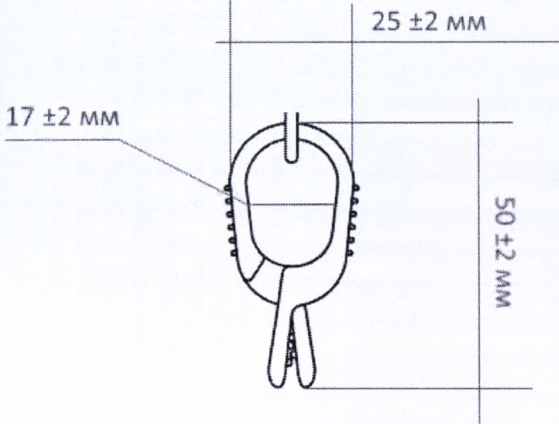
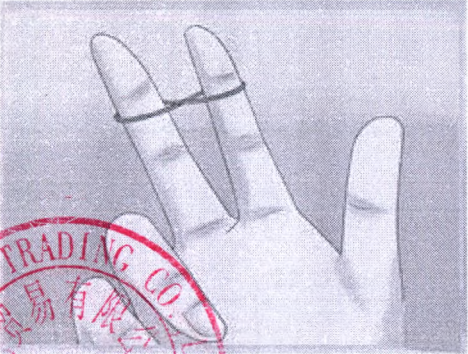
 Рис.321			Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Масса не более 30 гр.		
 Рис.322	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	АхБ 140x80 ±5 мм Масса не более 30 гр.	1	См. Рис



Рис.323

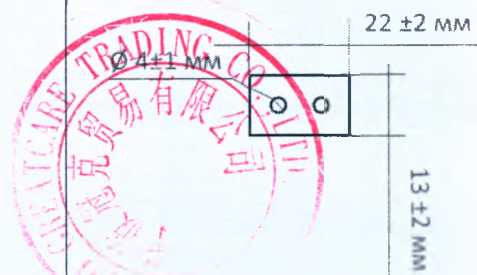


Рис.324

16.

Микро-
фильтр для
компенса-
ции давле-
ния

Полиамид РА
РА 40J01-20.5
Zhejiang, China
(Mainland), Китай

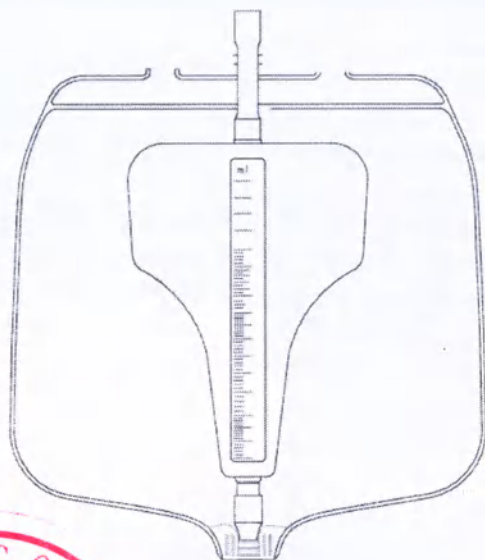
Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 5
гр.
Динамическая (аб-
солютная) вязкость
5 Па•с

1

См. Рис



Рис.325



	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 400 мл.	1	См. Рис
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)		Стандартное изделие		См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	18. 1	Кран сдвижной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00	Стандартное изделие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

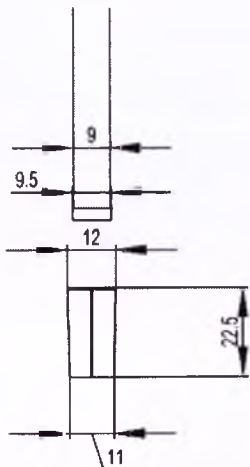
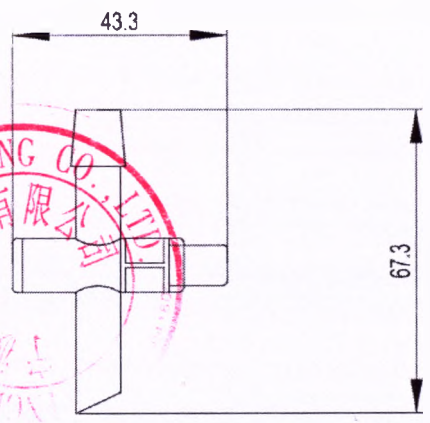
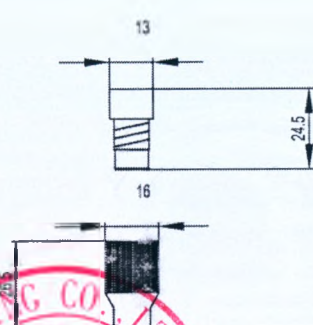
			CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.		Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP Yungsox PP Copoly- mer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

Рис.326

Рис.327

 Рис. 328	18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
---	----------	----------------------	---	--	--

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Двухкамерный 400 мл. / 2600 мл.)

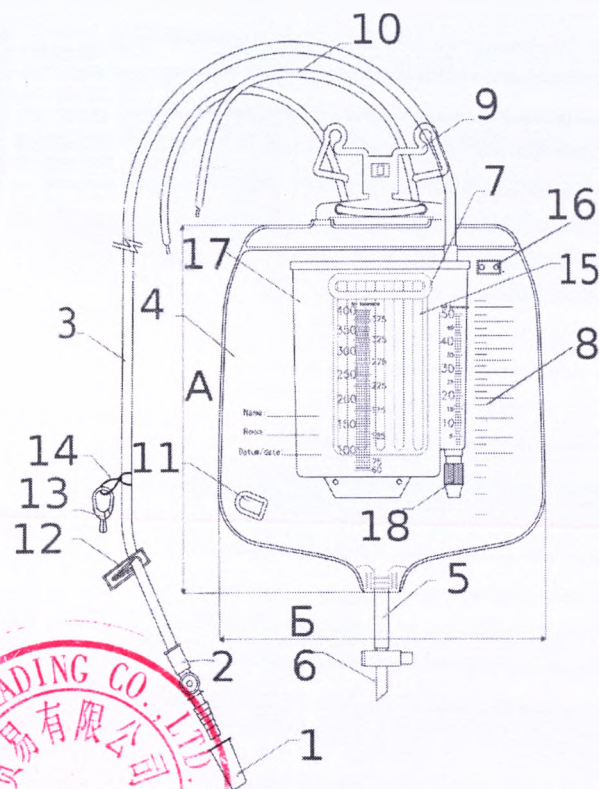


Рис.329

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

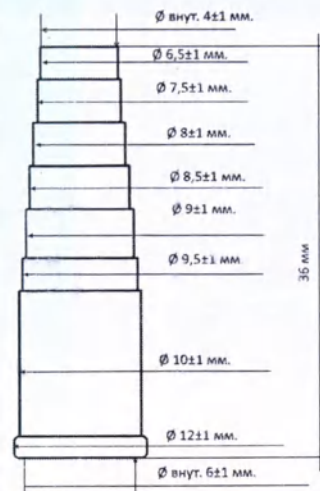


Рис.330

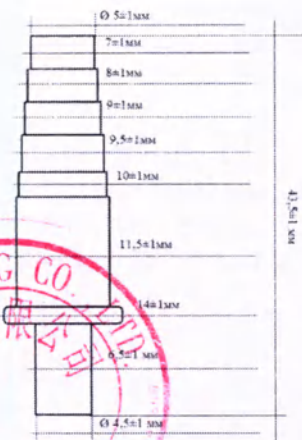


Рис.331

Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

2.2

Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис
По согласованию с заказчиком

2.3

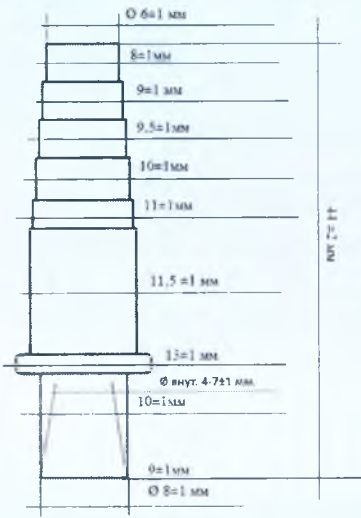
Коннектор

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,

Размеры представлены на рисунке

1

См. Рис

 Рис.332			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			По согласованию с заказчиком
 Рис.333	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

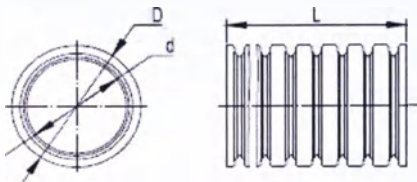
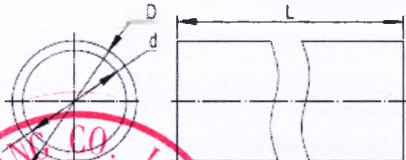
	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

Рис.334

Рис.335

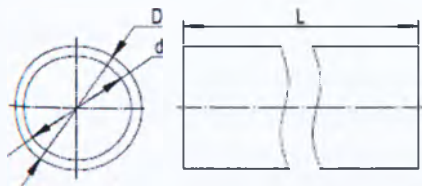
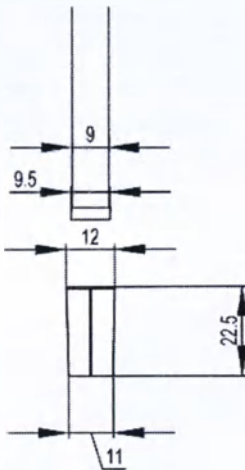
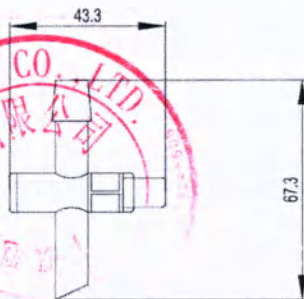


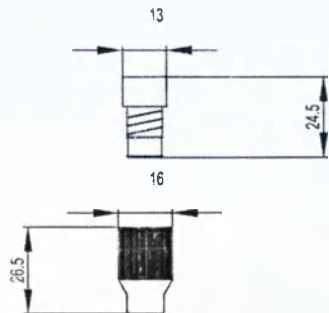
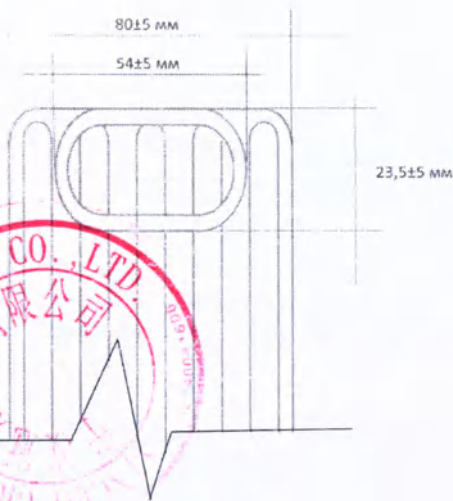
Рис.336

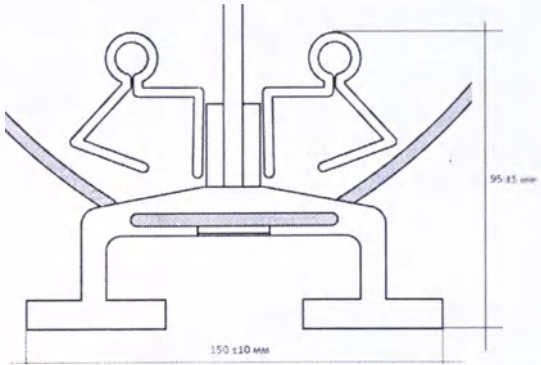


Рис.337

				Масса не более 50 гр.		
	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 400 мл. / 2600 мл. Камера – 400 мл. Емкость – 2600 мл.
	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов

		поворот- ный)				ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9±1 мм. Ø наруж. 9,5±1 мм. Ø наруж. 12±1 мм. Ø наруж. 11±1 мм. Длина 22,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие 43,3±2 мм. 67,3±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис. 340	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис. 341	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	Находится внутри моче-приемника

	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	400 мл. / 2600 мл.		
 Рис.342	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис.343	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

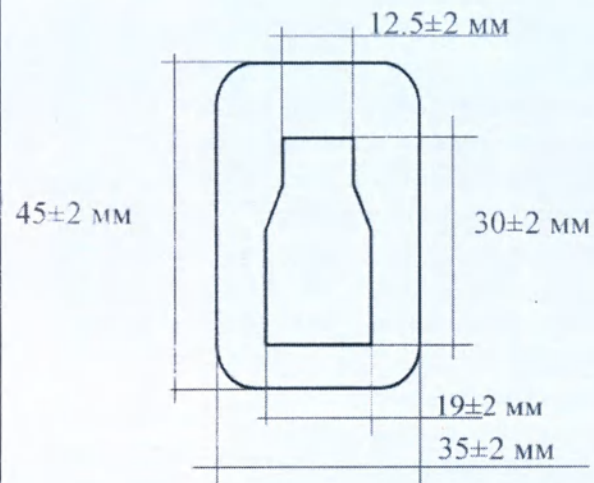


Рис.344

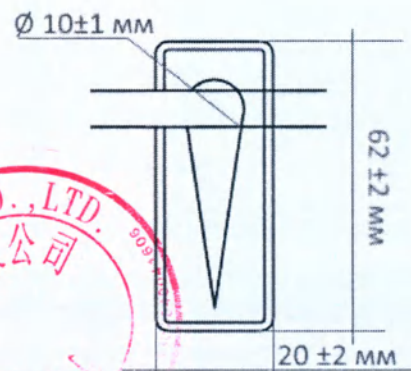


Рис.345

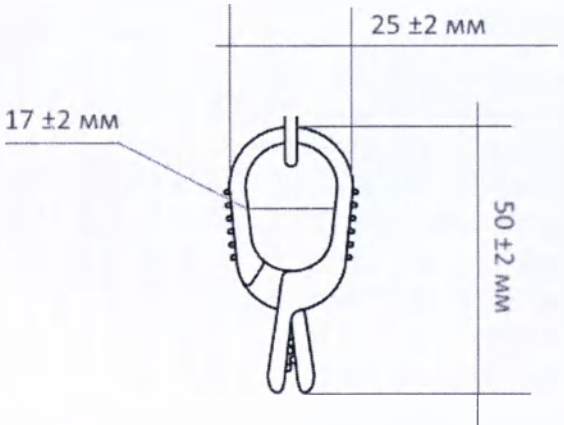
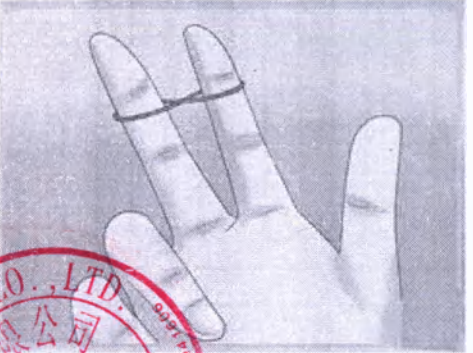
12. Зажим
скользящий

Полипропилен PP
Yungsox PP
Copolymer, 5250T
Formosa Polypropyl-
ene (Ningbo) Co., LTD.,
CHINA

Габаритные раз-
меры представ-
лены на рисунке
Масса не более 30
гр.

1

См. Рис

 Рис.346	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.347	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	АхБ 140x80 ±5 мм Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

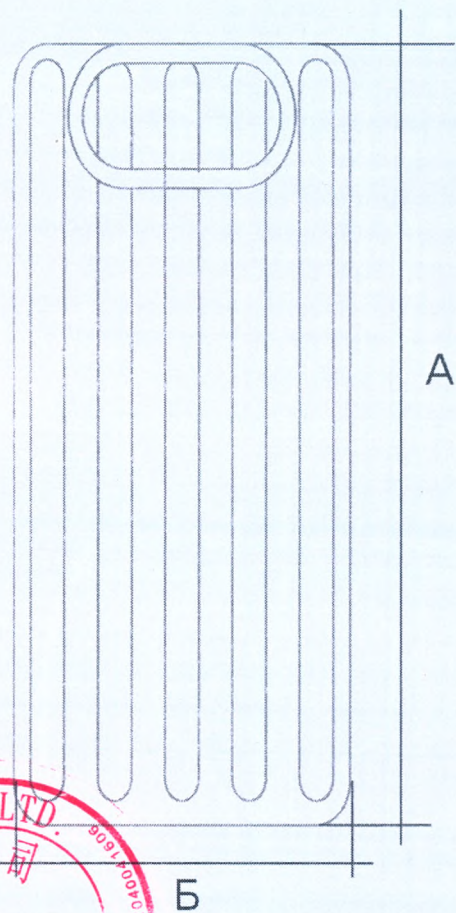


Рис.348

16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид РА РА 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр.	1	См. Рис
-----	--	---	---	---	---------

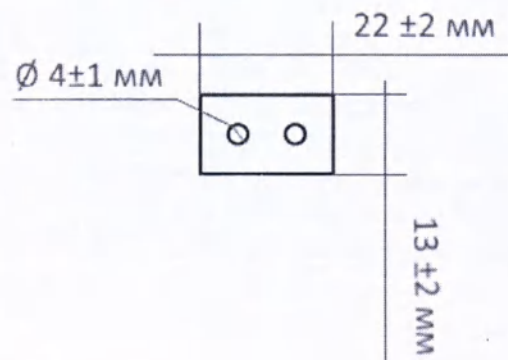


Рис.349

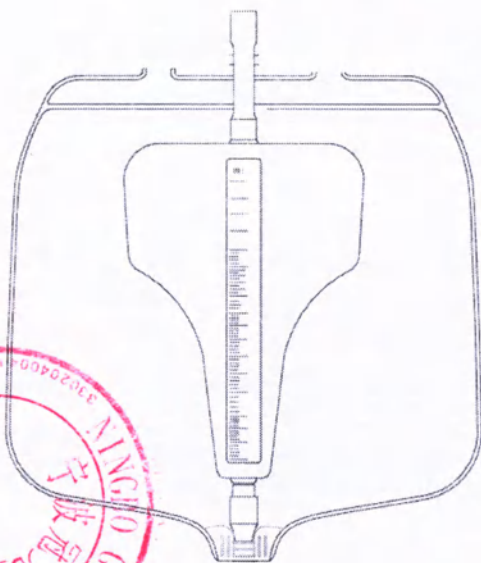


Рис.350

17.

Камера измерительная

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

Динамическая (абсолютная) вязкость
5 Па•с

Объем камеры 400
мл.

1

См. Рис

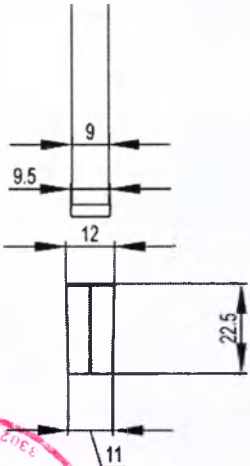
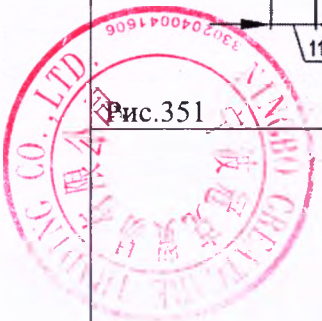
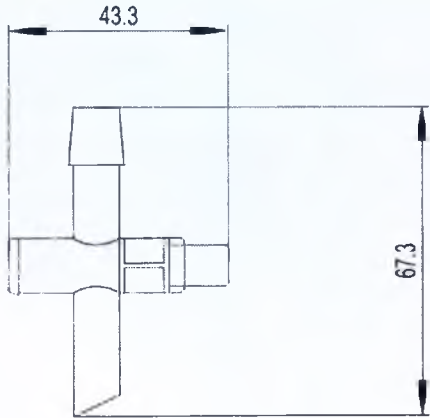
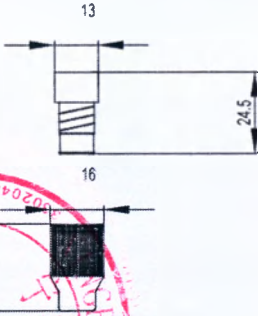
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворот- ный)		Стандартное изде- лие		См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя-

Рис.351

 Рис.352			PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			ется по согласованию с заказчиком
 Рис.353	18. 3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Трехкамерный 500 мл. / 1500 мл.)

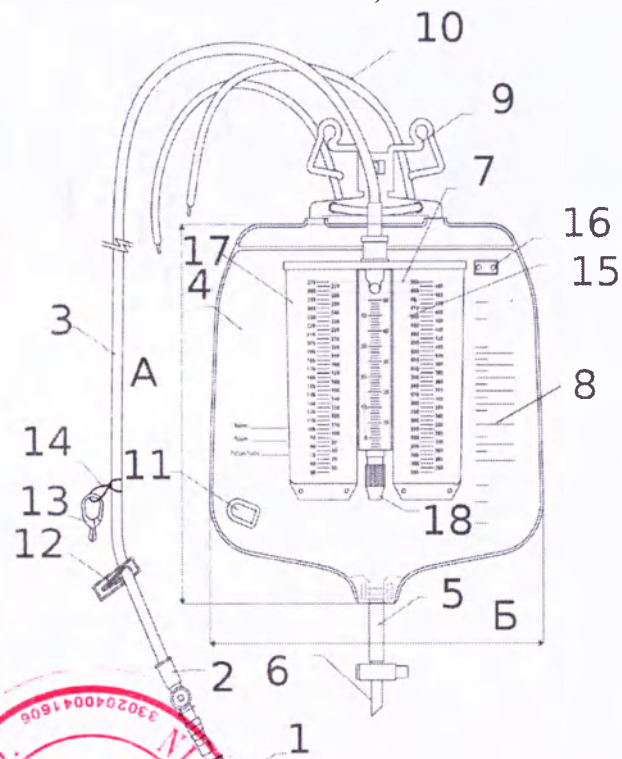
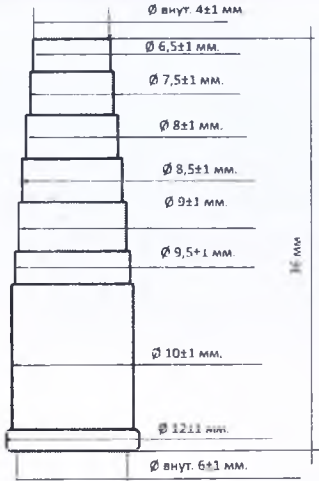
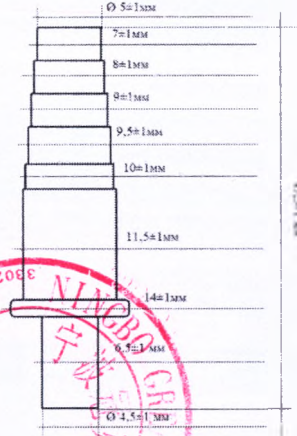
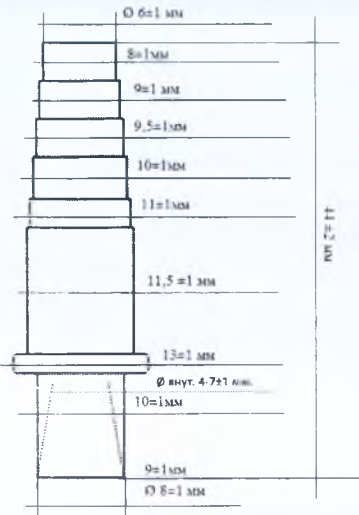
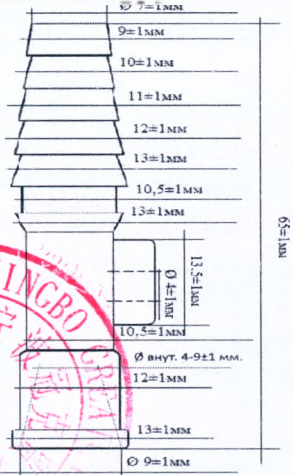
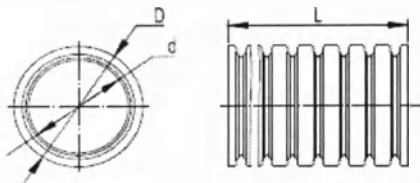
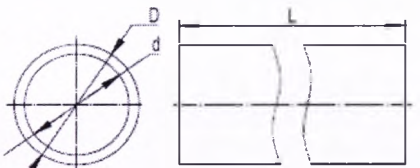


Рис.354

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.355			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.356	2.2	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	2.3	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005,	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис

 Рис.357		Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA		По согласованию с заказчиком
 Рис.358	2.4 Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1 См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в смкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.359	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.360	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

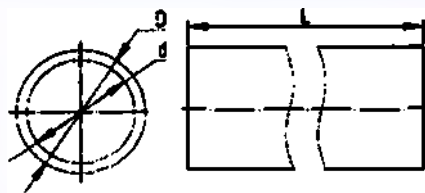


Рис.361

Масса не более 50 гр.

4.

Емкость

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC clear film BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

Толщина от 0,2 мм.
Масса изделия не более 100 гр.
Масса изделия в упаковке не более 150 гр.
Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.

1

См. Рис
500 мл. / 1500
мл.
Камера – 500
мл.
Емкость –
1500 мл

5.

Трубка
сливная

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай

L=Не более 150 мм
(с учетом части в емкости).
Ø наруж. 9±2 мм.
Ø наруж. 9,5±2 мм.
Масса не более 20 гр.

1

См. Рис



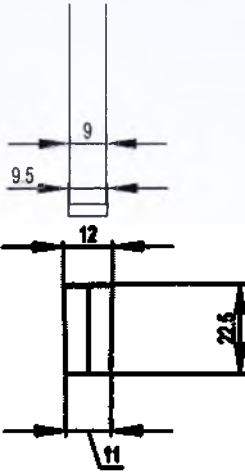
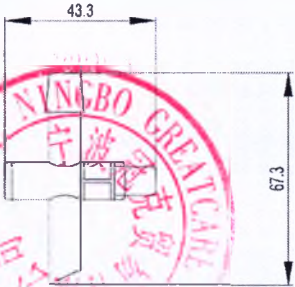
Рис.362

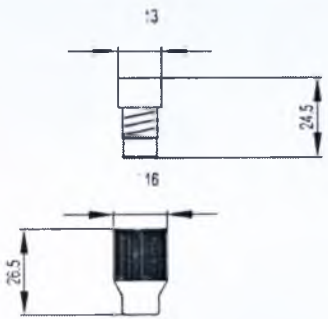
6.

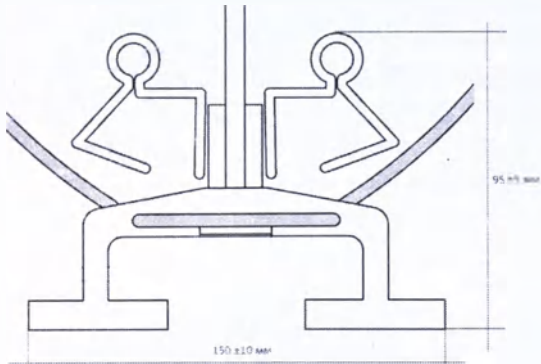
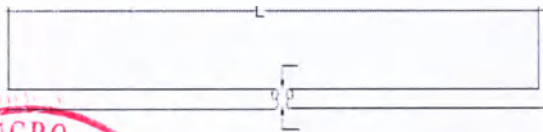
Кран
(сдвижной,
Т-образный,

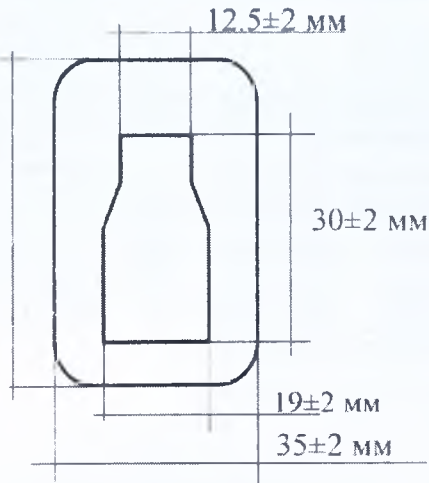
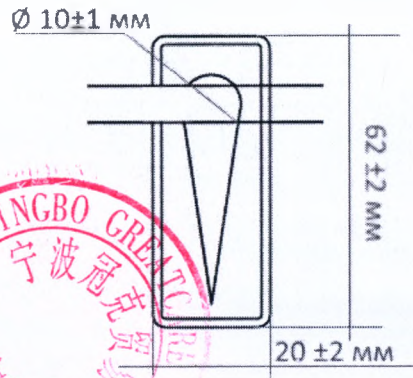
Стандартное изделие

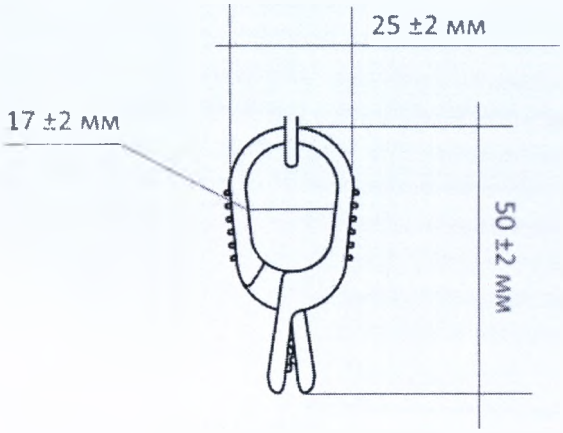
См. Рис
Кран выпускается 3 типов

		поворот- ный)				Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис.363	6.1	Кран сдви- жной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис.364	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие 43,3 $\pm$ 2 мм. 67,3 $\pm$ 2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

			Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			
 Рис.365	6.3	Кран поворотный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изделие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис. 366	7.	Слив дренажный	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	Находится внутри моче-приемника

	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	500 мл. / 1500 мл.		
 Рис.367	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис
 Рис.368	10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.369						
 Рис.370	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.371	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.372	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
 Рис.373	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	АхБ 140x95 ±5 мм Масса не более 30 гр.	1	См. Рис



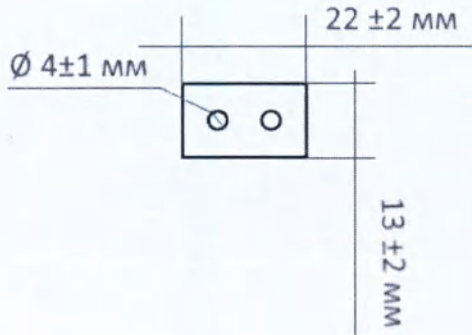
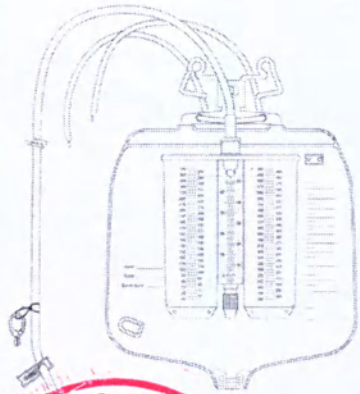
Б

А

Рис. 373



	16.	Микро- фильтр для компенса- ции давле- ния	Полиамид РА РА 40J01-20.5 Zhejiang, China (Mainland), Китай	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 5 гр.	1	См. Рис

 Рис.374				Динамическая (абсолютная) вязкость 5 Па•с		
 Рис.375	17.	Камера измерительная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Объем камеры 500 мл.	1	См. Рис

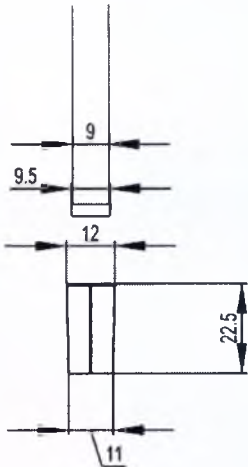
	18.	Кран (сдвижной, Т-образный, поворот- ный)		Стандартное изде- лие		См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя-

Рис.376

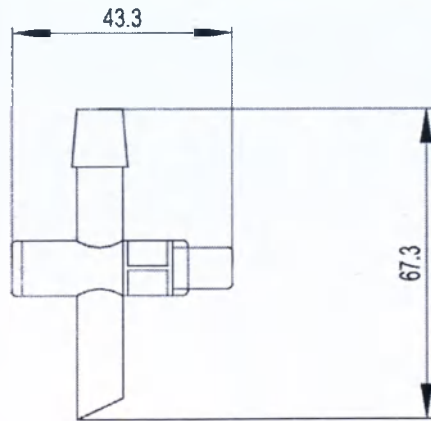


Рис.377

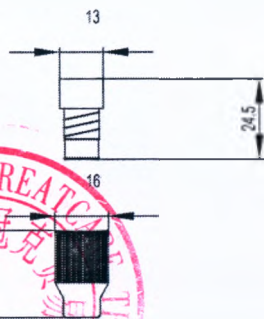


Рис.378

PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропилен PP
Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA

ется по согласованию с заказчиком

18.
3

Кран поворотный

LDPE
 Полиэтилен высокого давления
SABIC LDPE 2022TN00
 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.

Стандартное изделие
 13±2 мм.
 24,5±2 мм.
 16±2 мм.
 26,5±2 мм.
 Масса не более 40 гр.

1

См. Рис
 Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

Общий вид (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Трехкамерный 400 мл. / 2600 мл.)

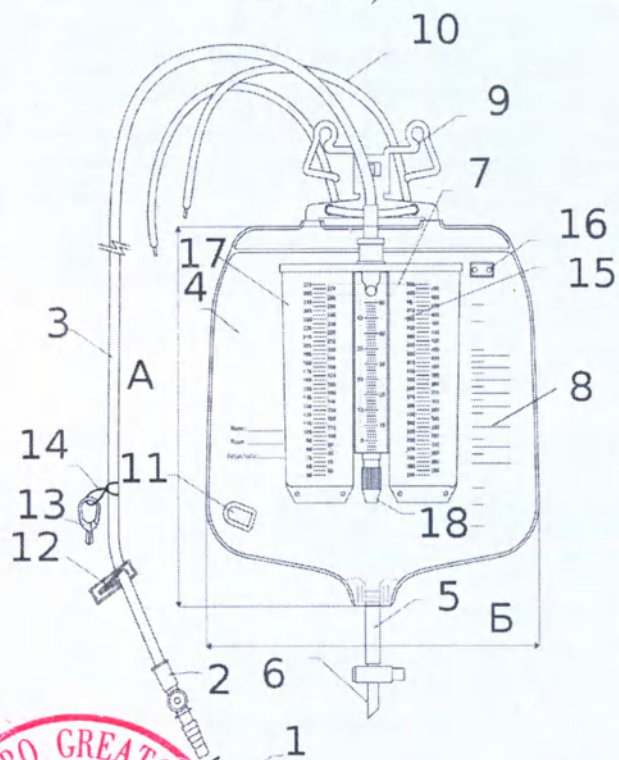


Рис.379

№	Спецификация	Материал	Раз-р	Кол-во	Прим.
1.	Колпачок защитный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	L длина не более 46 мм. Ø внут. 9-15±1 мм. Ø наруж. 12-18±1 мм. Масса не более 7 гр. Конической формы	1	См. Рис
2.	Коннектор		Масса не более 8 гр. Конической формы. Размеры представлены в пп.: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4	1	См. Рис Коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора по согласованию с заказчиком
2.1	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

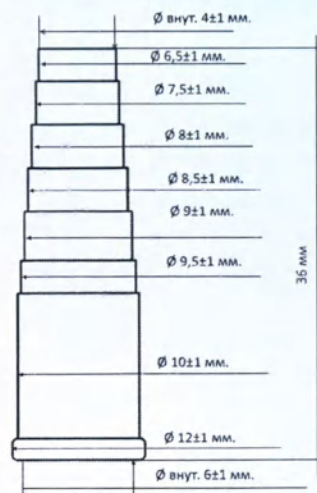


Рис.380

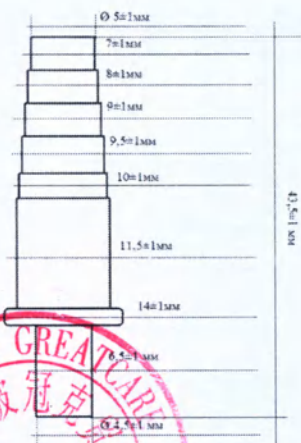


Рис.381

Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T
Formosa Polypropyl-
ene (Ningbo) Co.,
LTD., CHINA

2.2 Коннектор

Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC BC005,
Jiangsu Dahai Plastic
Co., Ltd., Китай / Поли-
пропилен PP
Yungsox PP Copoly-
mer, 5250T
Formosa Polypropyl-
ene (Ningbo) Co.,
LTD., CHINA

Размеры представ-
лены на рисунке

1

См. Рис
По согласо-
ванию с заказчи-
ком

2.3 Коннектор

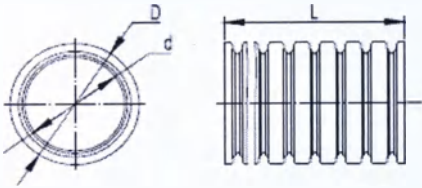
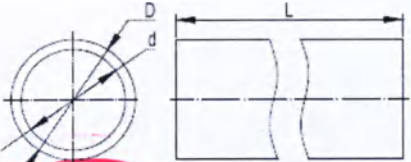
Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC BC005,

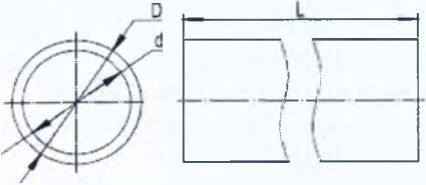
Размеры представ-
лены на рисунке

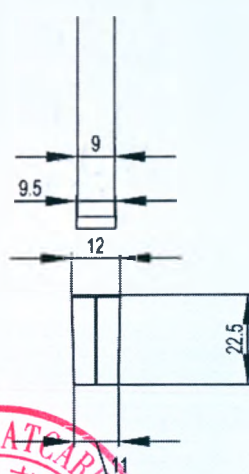
1

См. Рис

Рис.382			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA			По согласованию с заказчиком
Рис.383	2.4	Коннектор	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай / Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA / Силикон RTV-2 Shenzhen Hong Ye Jie Technology Co., Ltd., Китай	Размеры представлены на рисунке	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

	3.	Трубка соединительная (гофрированная, гладкая, стандартная)	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай. В пунктах 3,1; 3,2; 3,3 представлено подробное описание трубок соединительных	L длина не более 1200 мм. (с учетом части в емкости)	1	См. Рис Трубка соединительная выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком
 Рис.384	3.1	Трубка соединительная гофрированная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
 Рис.385	3.2	Трубка соединительная гладкая	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком

 Рис.386	3.3	Трубка соединительная гладкая стандартная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L= не более 1200 мм. D=6-10±1 мм. d=4-8± 1 мм. Масса не более 50 гр.	1	См. Рис По согласованию с заказчиком
	4.	Емкость	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC clear film BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Толщина от 0,2 мм. Масса изделия не более 100 гр. Масса изделия в упаковке не более 150 гр. Высота х ширина мешка/емкости (АхБ) 285 мм. х 275 мм. ±15 мм.	1	См. Рис 400 мл. / 2600 мл. Камера – 400 мл. Емкость – 2600 мл.
 Рис.387	5.	Трубка сливная	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	L=Не более 150 мм (с учетом части в емкости). Ø наруж. 9±2 мм. Ø наруж. 9,5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
	6.	Кран (сдвижной, Т-образный,		Стандартное изделие		См. Рис Кран выпускается 3 типов.

		поворот- ный)				Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.1	Кран сдвиж- ной	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Стандартное изде- лие Ø наруж. 9 ± 1 мм. Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм. Ø наруж. 12 ± 1 мм. Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
	6.2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP	Стандартное изде- лие 43,3 $\pm$ 2 мм. 67,3 $\pm$ 2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

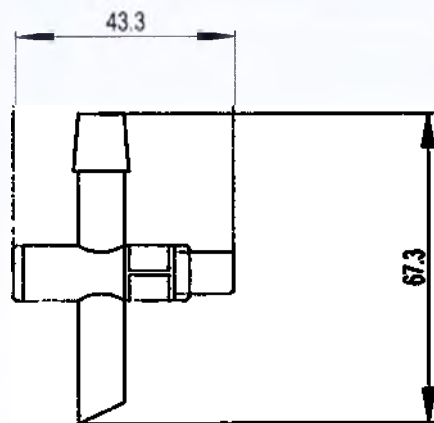


Рис.389

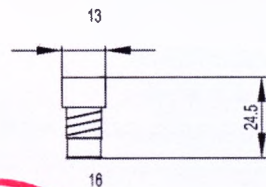


Рис.390

Yungsox PP Copolymer, 5250T
Formosa Polypropylene
 (Ningbo) Co., LTD.,
 CHINA

6.3 Кран поворотный

LDPE
 Полиэтилен высокого давления
SABIC LDPE
2022TN00
 CHINA - HANGZHOU
 - SABIC INNOVATIVE
 PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI)
 CO., LTD.

Стандартное изделие
 13±2 мм.
 24,5±2 мм.
 16±2 мм.
 26,5±2 мм.
 Масса не более 40 гр.

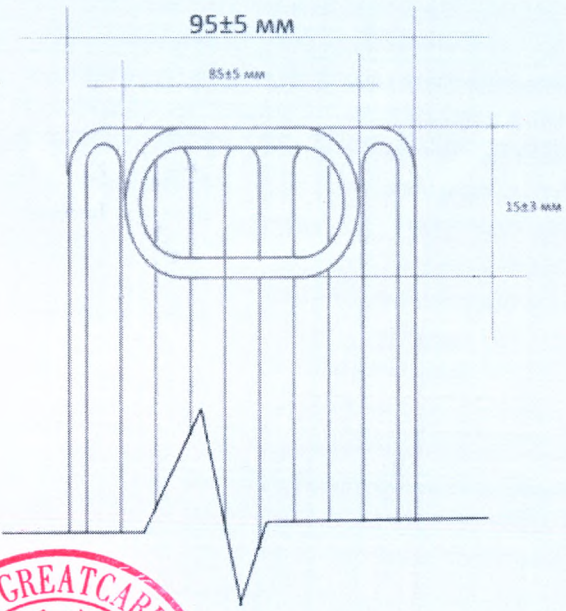
1
 См. Рис
 Кран выпускается 3 типов.
 Тип определяется по согласованию с заказчиком

7. Слив дренажный

Поливинилхлорид медицинский (PVC)
PVC clear film BC005,

Размеры представлены на рисунке

1
 Находится внутри моче-приемника

 95±5 mm 85±5 mm 15±3 mm Рис. 391			Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай			
	8.	Шкала	Чернила GC02 , Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай	400 мл. / 2600 мл.		
	9.	Встроенная система крепления	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке См. рис Масса не более 50 гр.	1	См. Рис

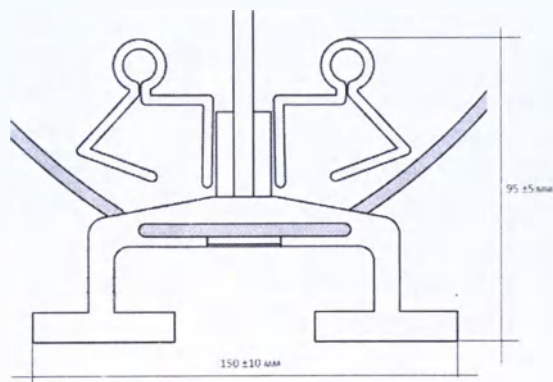


Рис.392

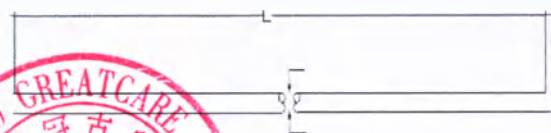
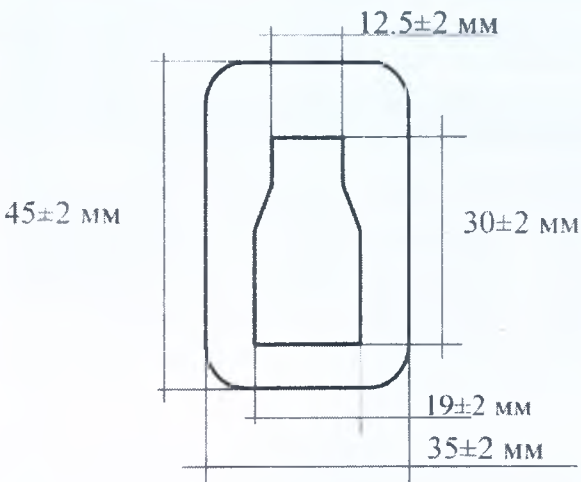
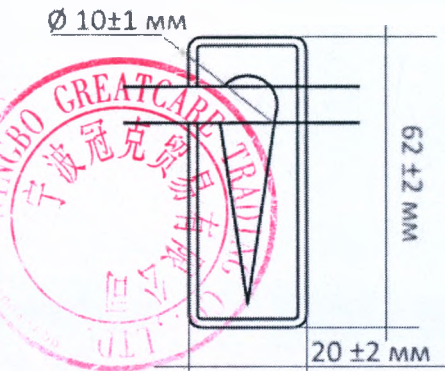
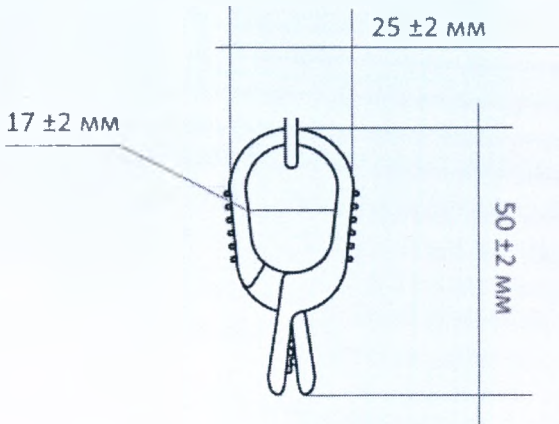


Рис.393

10.	Шнур для подвешивания	Термопластичный эластомер – терилен Thermoplastic Elastomer (TPE) Compound Cixi jiahua plastic factory Ltd., CHINA	L 720 ±15 мм. Ø 5±2 мм. Масса не более 20 гр.	1	См. Рис
11.	Карман для укладки крана сливного	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005 , Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.394						
 Рис.395	12.	Зажим скользящий	Полипропилен PP Yungsox PP Copolymer, 5250T Formosa Polypropyl- ene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Габаритные раз- меры представ- лены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

 Рис.396	13.	Клипса белая	ABS - пластик ABS (ABS RESIN) GE-150 Zhonguo Shiyou Jilin shihua, CHINA	Габаритные размеры представлены на рисунке Масса не более 30 гр.	1	См. Рис
 Рис.397	14.	Эластичное крепление клипсы	Термопластичный эластомер TPE RP 3161 Ruipu Yangzhou Zengrui Rubber Co., Ltd.	Представляет собой резиновое крепление овальной формы Длина не в натяжном состоянии, не менее 80 мм	1	См. Рис
	15.	Желоба направляющие для равномерного слива мочи	Поливинилхлорид медицинский (PVC) PVC BC005, Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай	АхБ 140х95 ±5 мм Масса не более 30 гр.	1	См. Рис

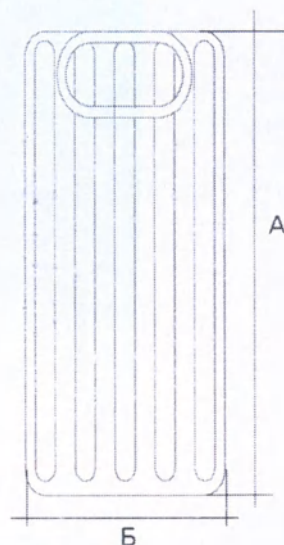


Рис.398

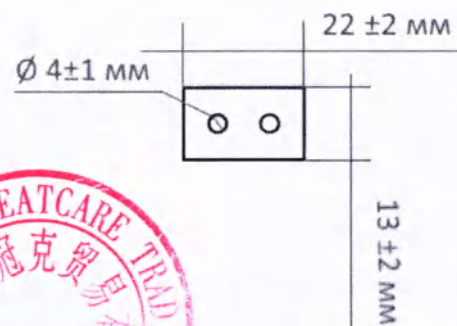


Рис.399

16.

Микро-
фильтр для
компенса-
ции давле-
ния

Полиамид РА
РА 40J01-20.5
Zhejiang, China
(Mainland), Китай

Габаритные размеры представлены на рисунке
Масса не более 5 гр.
Динамическая (абсолютная) вязкость 5 Па·с

1

См. Рис

17.

Камера измерительная

Поливинилхлорид ме-
дицинский (PVC)
PVC BC005,

Объем камеры 500 мл.

1

См. Рис

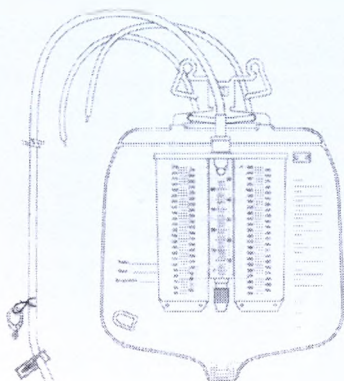


Рис. 400

Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd., Китай

18.

Кран (сдвижной, Т-образный, поворотный)

Стандартное изделие

См. Рис
Кран камеры измерительной выпускается 3 типов. Тип определяется по согласованию с заказчиком

18.
1

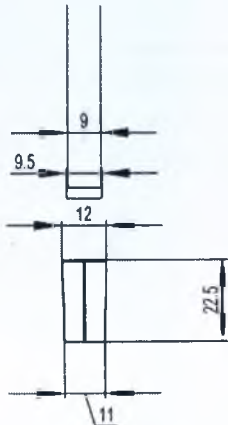
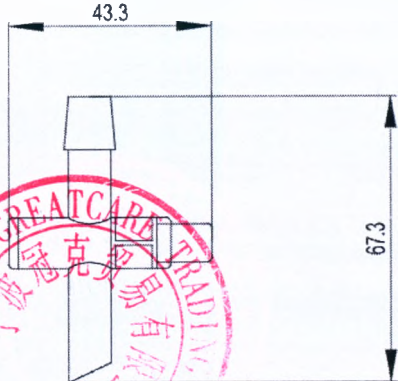
Кран сдвижной

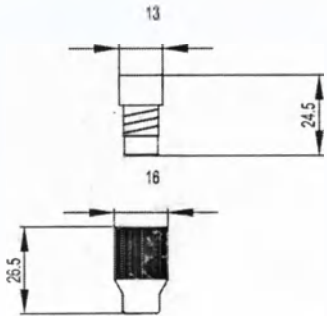
LDPE
Полиэтилен высокого давления
SABIC LDPE
2022TN00

Стандартное изделие
Ø наруж. 9 ± 1 мм.
Ø наруж. $9,5 \pm 1$ мм.
Ø наруж. 12 ± 1 мм.

1

См. Рис
Кран камеры измерительной выпускается 3 типов.

 Рис.401			CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD., Китай	Ø наруж. 11 ± 1 мм. Длина $22,5 \pm 2$ мм. Масса не более 20 гр.		Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
 Рис.402	18. 2	Кран Т-об- разный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD./ Полипропи- лен PP Yungsox PP Copoly- mer, 5250T Formosa Polypropylene (Ningbo) Co., LTD., CHINA	Стандартное изде- лие $43,3 \pm 2$ мм. $67,3 \pm 2$ мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком

 Рис. 403	18. 3	Кран пово- ротный	LDPE Полиэтилен высокого давления SABIC LDPE 2022TN00 CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGE- MENT (SHANGHAI) CO., LTD.	Стандартное изде- лие 13±2 мм. 24,5±2 мм. 16±2 мм. 26,5±2 мм. Масса не более 40 гр.	1	См. Рис Кран камеры измеритель- ной выпуска- ется 3 типов. Тип определя- ется по согла- сованию с за- казчиком
---	----------	----------------------	---	--	---	--

Полимерные поверхности изделий чистые, без посторонних включений, механических повреждений и других дефектов, острые кромки отсутствуют. Трубки не имеют перегибов, сужений, слипшихся участков, препятствующих нормальному току жидкости.

Все емкости имеют шкалу с четкой градуировкой.

Мочеприемники имеют следующие характеристики:

Мочеприемник прикроватный, объем: 1000±10 мл., 1500±10 мл., 2000±10 мл.

Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000±10 мл., 2500±10 мл., 2600±10 мл., 4000±10 мл.

Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой:

Однокамерный 200 мл. / 2000±10 мл., 200 мл. / 2500±10 мл., 200 мл. / 2600±10 мл., 400 мл. / 2000±10 мл., 400 мл. / 2600±10 мл., 500 мл. / 2500±10 мл., 500 мл. / 2600±10 мл. Двухкамерный: 400 мл. / 2500±10 мл., 400 мл. / 2600±10 мл.

Трехкамерный: 500 мл. / 1500±10 мл., 500 мл. / 2000±10 мл., 400 мл. / 2600±10 мл.

- плотность материала резервуара (емкости) для мочи – 0,94-0,97 г/см³;

- толщина стенок резервуара (емкости) для мочи – 0,2-1,0 мм.;

- резервуар (емкость) должен быть изготовлен из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм.

Прочность соединения емкости, трубки соединительной, трубки сливной, коннектора, сливного крана, антивозвратного клапана и других деталей мочеприемника: выдерживает нагрузку в 40 Н.

Прочность крепления мочеприемника: выдерживают 1,5 объема емкости моче-приемника 24 часа.

Прочность шнуров для подвешивания: выдерживают 1,5 объема емкости моче-приемника 24 часа.

Время опорожнения мешка при полностью открытом кране, мин, не более 8.

Шнур для подвешивания не имеет индивидуальную упаковку.

Средняя скорость наполнения емкости – не менее 10 мл/мин.

Сведения о методе и способе стерилизации изложены в п. 15 настоящего доку-мента.

Герметичность мешка и камеры измерительной при полном заполнении: отсут-ствие протечек в швах и местах соединений в течение 48 ч.

Растяжимость шнура для подвешивания: не менее 5 и не более 100 %.

Разрывная нагрузка шнура для подвешивания: не менее 15 кгс.

Материалы компонентов мочеприемников представлены в таблице №1 настоя-щего документа в графе «Материалы». Продолжительность контакта А - кратковре-менный (менее 24 ч). Вид контакта – кожа.

Неуказанные предельные отклонения габаритных и основных размеров, объе-мов мешков – не более 10%.

Материалы упаковки представлены в таблице №2.

Таблица 2.

№ п/п	Описание	Материал
1.	Внутренняя упа-ковка	Полиэтилен (ПНП): LD - LF0250/KJ, Arya Sasol Pet-rochemical Co., Иран и/или Бумага SES 964F, UGL Corporation Ltd., China
2.	Внешняя упаковка	Картон трехслойный гофрированный GC1, Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd. Китай
3.	Чернила для марки-ровки	Чернила GC02, Zhuhai Letong chemical products Co.,Ltd., Китай

Требования к внешнему виду и техническим характеристикам МИ представ-лены в таблице №3.

Таблица 3.

Параметры	Требования нормативных документов
Соответствие изделия ин-дивидуальной упаковке	Мочеприемник должен полностью соответствовать ин-формации, заявленной на индивидуальной упаковке.
Визуальная оценка	Мочеприемник должен быть изготовлен из гладкого, мягкого полиэтилена и/или пластика.
Инородные включения	Материал, из которого изготавливаются мочеприем-ники, не должен содержать видимых посторонних включений.

	Отсутствие посторонних резких запахов.
Механические повреждения	Мочеприемник не должен иметь следов механических повреждений.
Качество маркировки	На емкости и камерах нанесены объем, градуировка и надписи на английском и русском языках. Буквы маркировки должны быть четкими.
Резервуар (емкость) мочеприемника, камеры	Должен быть гладким, без пятен, заусениц и трещин. Швы мешочка должны быть плотно спаяны, отсутствовать излишки материала.
Герметичность упаковки	При погружении изделия в потребительской упаковке в воду на глубину 300 мм в течение 15 с, не должно выделяться пузырьков воздуха; либо в соответствии с EN 11607-1 (проведение теста на герметичность с помощью красителя родамина) – вливание с помощью шприца 3-5 капель родамина В (после ее вскрытия по средней линии и изъятия мочеприемника) в область швов упаковки, экспозиция 15 мин. Затем при разрезании упаковки вдоль сварного шва не должно быть признаков утечки красителя.

Сведения о шкале:

Ширина градуировочных линий, не менее – 0,5 мм

Разномерность длинны одноименных штрихов, а также высота числовых обозначений не должна превышать 2 мм.

Угол отклонения градуировочной линий от горизонтали - не более 0,5°

Погрешность нанесения градуировочных линий - не более 1 мм.

Дополнительные требования ко шкале приведены в таблице 4.

Таблица 4

№	Мочеприемники прикроватные «АРЕХМЕД»	Общая длина шкалы, не менее, мм	Расстояние между градуировочными линиями, мм	Длина градуировочных линий (длинные), не менее, мм	Длина градуировочных линий (короткие), не менее, мм	Высота числовых обозначений, не менее, мм
1.	Мочеприемник прикроватный, объем: 1000 мл.	150	от 100-500мл: 12-20±2мм от 500-1000 мл: 7-15±2мм	15	11	3
2.	Мочеприемник прикроватный, объем: 1500 мл.	150	от 100-500мл: 12-20±2мм от 500-1000 мл: 7-15±2мм от 1000-1500 мл: 5-7±2мм	15	11	3

3.	Мочеприемник прикроватный. объем: 2000 мл.	150	от 100-500мл: 12-20±2мм от 500-1000 мл: 7-15±2мм от 1000-1500 мл: 5-7±2мм от 1500-2000 мл: 4-5±1мм	15	11	3
4.	Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000 мл.	120	13±2мм	22	6	3
5.	Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2500 мл.	120	13±2мм	22	6	3
6.	Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2600 мл.	120	13±2мм	22	6	3
7.	Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 4000 мл.	120	13±2мм	22	6	3
8.	Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2000 мл.	120 -ем-кость; 150-камера измерительная	Емкость: от 200-1000 мл: 5-17± 2 мм от 1000-2000 мл: 5-10±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
9.	Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2500 мл.	120 -ем-кость; 150-камера измерительная	Емкость: от 200-1000 мл: 5-17± 2 мм от 1000-2500 мл: 5-10±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
10.	Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2600 мл.	120 -ем-кость; 150-камера измерительная	Емкость: от 200-1000 мл: 5-17± 2 мм от 1000-2600 мл: 5-10±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
11.	Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой:	120 -ем-кость; 150-	Емкость: от 400-1000 мл: 5-20± 2 мм	25	3	2



	Однокамерный 400 мл. / 2000 мл.	камера из- меритель- ная	от 1000-2000 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм			
12.	Мочеприемник прикроватный с измеритель- ной камерой: Однокамерный 400 мл. / 2600 мл.	120 -ем- кость; 150- камера из- меритель- ная	Емкость: от 400-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2600 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
13.	Мочеприемник прикроватный с измеритель- ной камерой: Однокамерный 500 мл. / 2500 мл.	120 -ем- кость; 150- камера из- меритель- ная	Емкость: от 500-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2500 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
14.	Мочеприемник прикроватный с измеритель- ной камерой: Однокамерный 500 мл. / 2600 мл.	120 -ем- кость; 150- камера из- меритель- ная	Емкость: от 500-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2600 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
15.	Мочеприемник прикроватный с измеритель- ной камерой: Двухкамер- ный: 400 мл. / 2500 мл.	150 -ем- кость; 110- камера из- меритель- ная	Емкость: от 400-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2500 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
16.	Мочеприемник прикроватный с измеритель- ной камерой: Двухкамер- ный: 400 мл. / 2600 мл.	150 -ем- кость; 80- камера из- меритель- ная	Емкость: от 400-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2600 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-10 ±0,5 мм	25	3	2
17.	Мочеприемник прикроватный с измеритель- ной камерой: Трехкамерный: 500 мл. / 1500 мл.	155 -ем- кость; 80- камера из- меритель- ная	Емкость: от 500-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-1500 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-15 ±0,5 мм	25	3	1



18.	Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Трехкамерный: 500 мл. / 2000 мл.	155 -ем-кость; 80-камера измерительная	Емкость: от 500-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2000 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-15 ±0,5 мм	25	3	1
19.	Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Трехкамерный: 400 мл. / 2600 мл.	155 -ем-кость; 80-камера измерительная	Емкость: от 400-1000 мл: 5-20± 2 мм от 1000-2600 мл: 5-15±2мм Камера: от 1-15 ±0,5 мм	25	3	1

14. КОНСТРУКЦИЯ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Изделия предназначены для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных и домашних условиях, квалифицированным медицинским персоналом. Порцию собранной мочи можно при необходимости предоставить для проведения анализа. Предназначены для облегчения мобильности больных.

Мочеприемник снабжен фильтром для предотвращения инфицирования, кроме исполнения мочеприемник «прикроватный».

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия: Мочеприемники применяются в гериатрии квалифицированным медицинским персоналом для ухода за больными в условиях лечебных учреждений, и в домашних условиях.

Мешок для сбора мочи, произведённый из мягкого материала медицинского назначения, дополнительно укрепляется двойными швами. Отличная визуализация камер измерительных достигается благодаря изготовлению изделия из прозрачного материала.

Конструкция изделий исключает обратный ток мочи.

Прямоточный слив прост и комфортен в использовании, что даёт возможность эксплуатировать мочесборник продолжительное время.

Пластичная, мягкая, стойкая к перегибам и перекручиваниям трубка соединительная (Трубка соединительная выпускается трех типов (гофрированная, гладкая, стандартная). Тип определяется по согласованию с заказчиком), оснащённая коннектором конического типа (коннектор выпускается 4 типов. Тип коннектора определяется по согласованию с заказчиком), обеспечивающим надёжное и стабильное соединение со всеми катетерами урологического типа. Мочеприемник прикроватный снабжен антивозвратным клапаном и сливным краном (выпускаются 3-х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный, тип крана сливного определяется по согласованию с заказчиком) надёжно соединённым с трубкой сливной.

Для крепления мочеприемника предусмотрен одинарный держатель-подвес в количестве 2 шт. на 10 мочеприемников (исполнение прикроватный) и встроенная

система крепления (исполнение Люкс и с измерительной камерой).

Мочеприемник прикроватные APXMED имеет следующие варианты исполнения:

- мочеприемник прикроватный;
- мочеприемник прикроватный Люкс;
- мочеприемник прикроватный с измерительной камерой (однокамерный, двухкамерный, трехкамерный)

Изделие поставляется стерильным, одноразового использования. Однократного применения. Повторно не использовать.

Ниже представлены схематические изображения вариантов исполнения и особенности конструкции.



Рис. 404

Схематическое изображение - Мочеприемник прикроватный, объем: 1000 мл., 2000 мл.

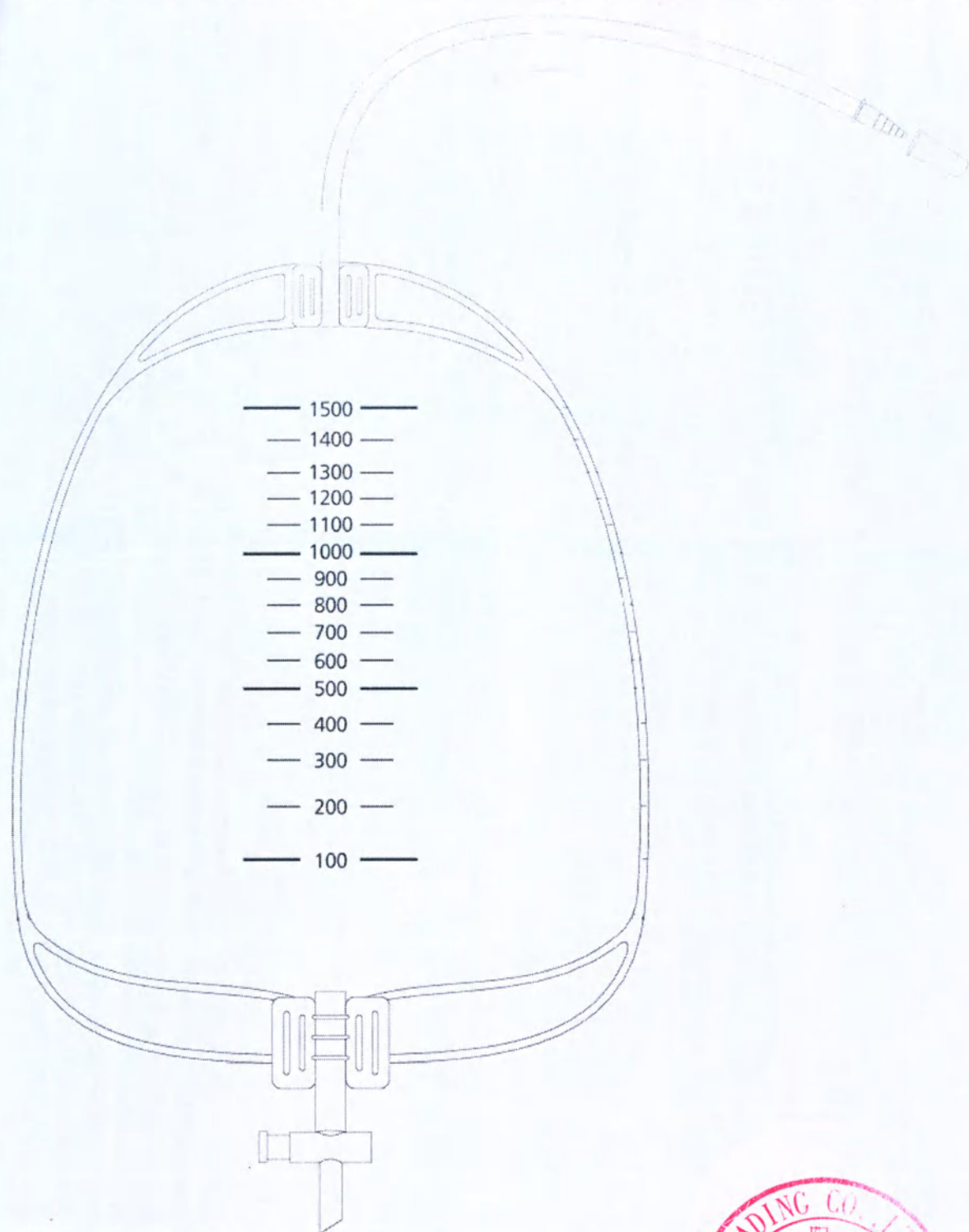


Рис. 405

Схематическое изображение - Мочеприемник прикроватный, объем: 1500 мл.



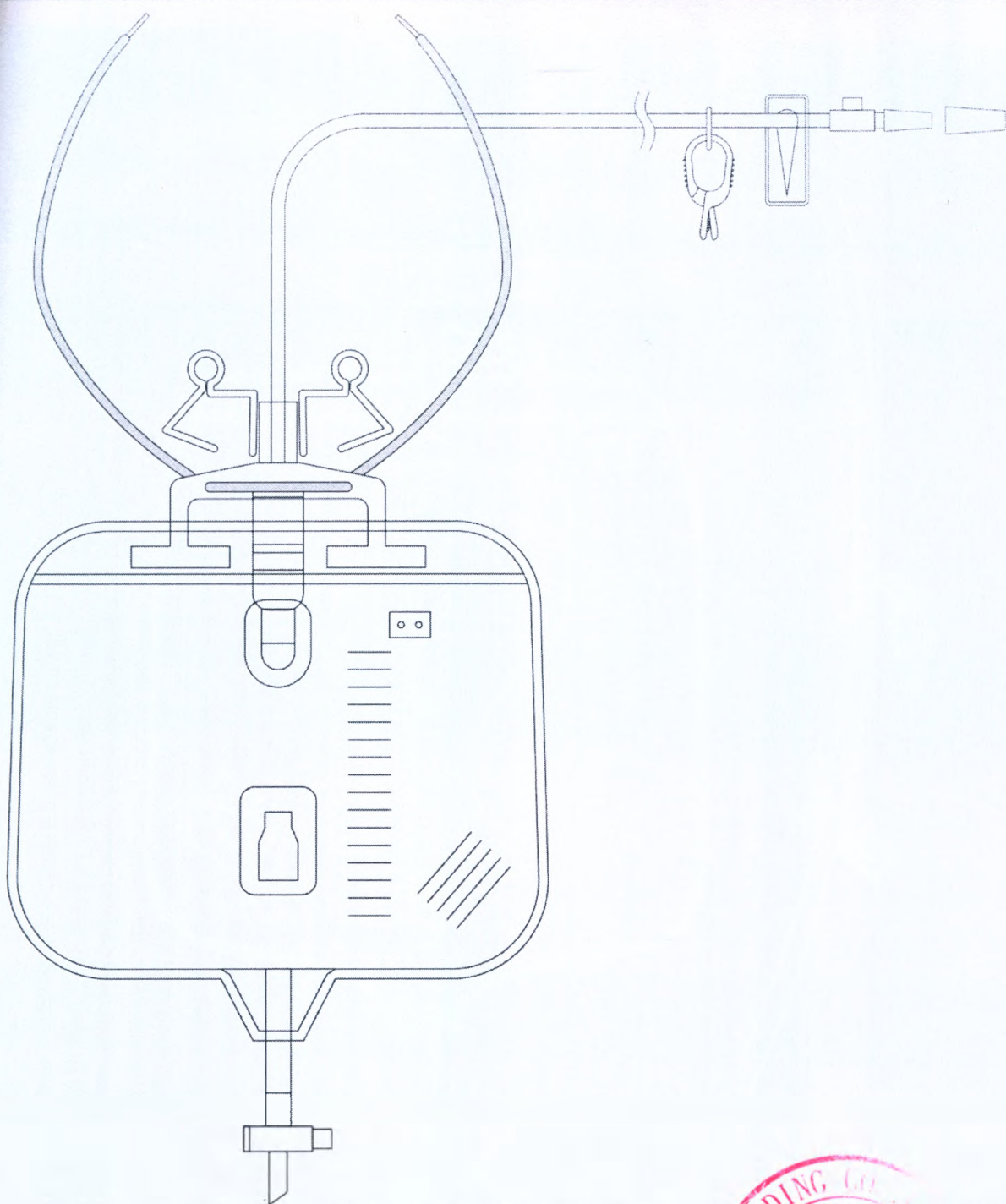


Рис. 406

Схематическое изображение - Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000 мл., 2500 мл., 2600 мл., 4000 мл.

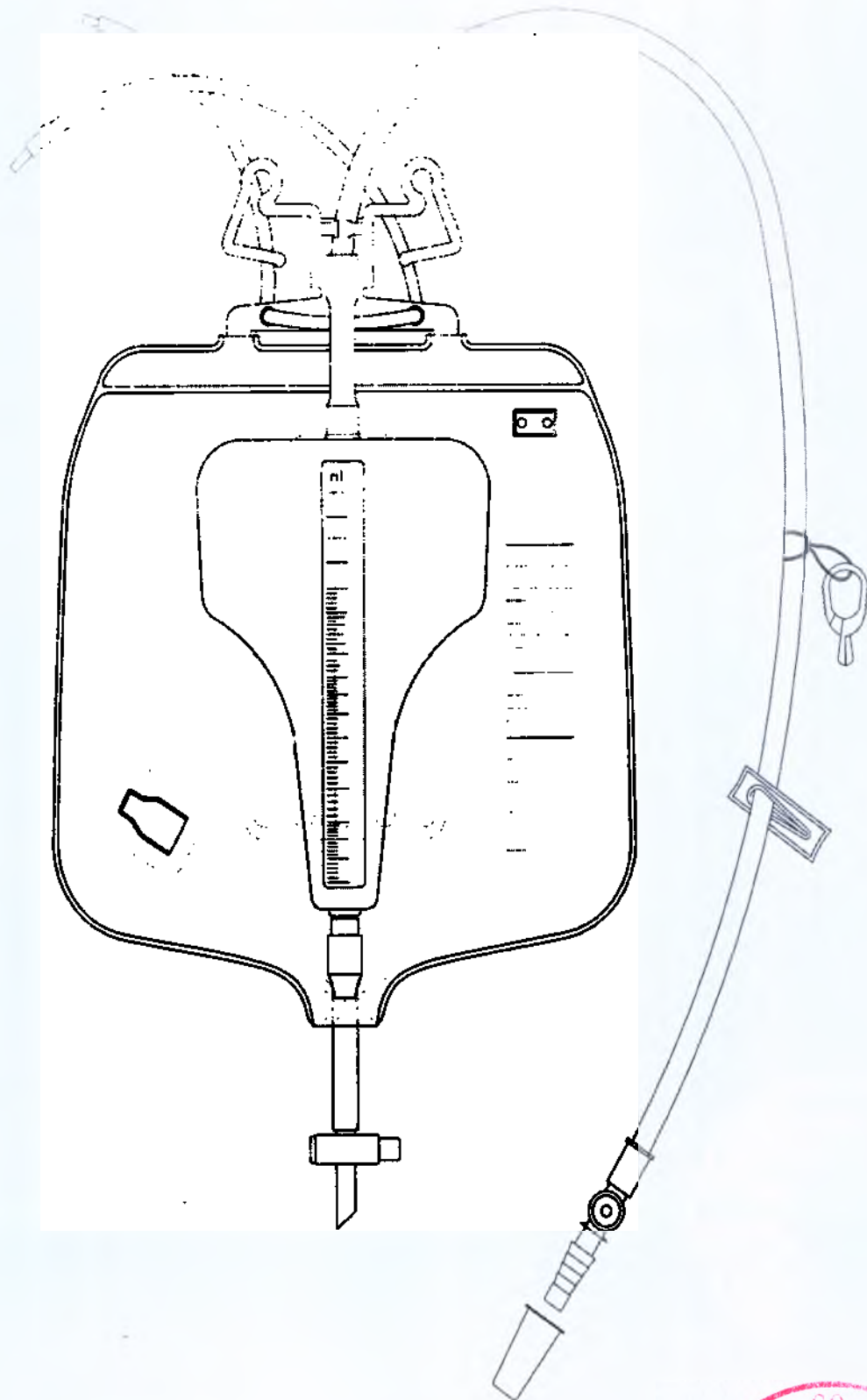
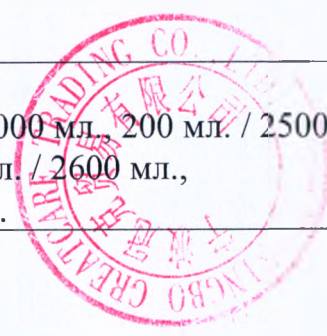


Рис. 407

Схематическое изображение - Однокамерный 200 мл. / 2000 мл., 200 мл. / 2500 мл., 200 мл. / 2600 мл., 400 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл., 500 мл. / 2500 мл., 500 мл. / 2600 мл.



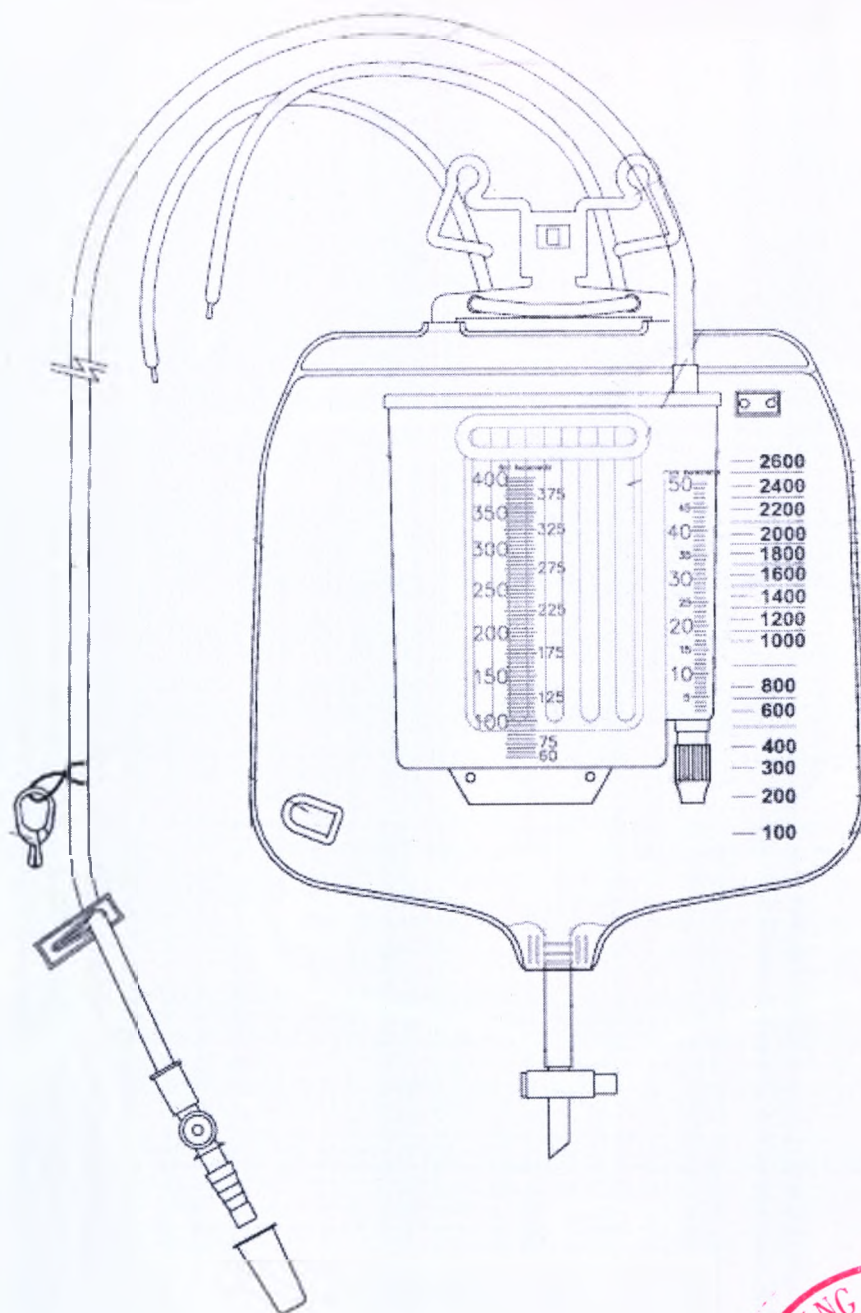


Рис. 408

Схематическое изображение - Двухкамерный: 400 мл. / 2500 мл., 400 мл. / 2600 мл.

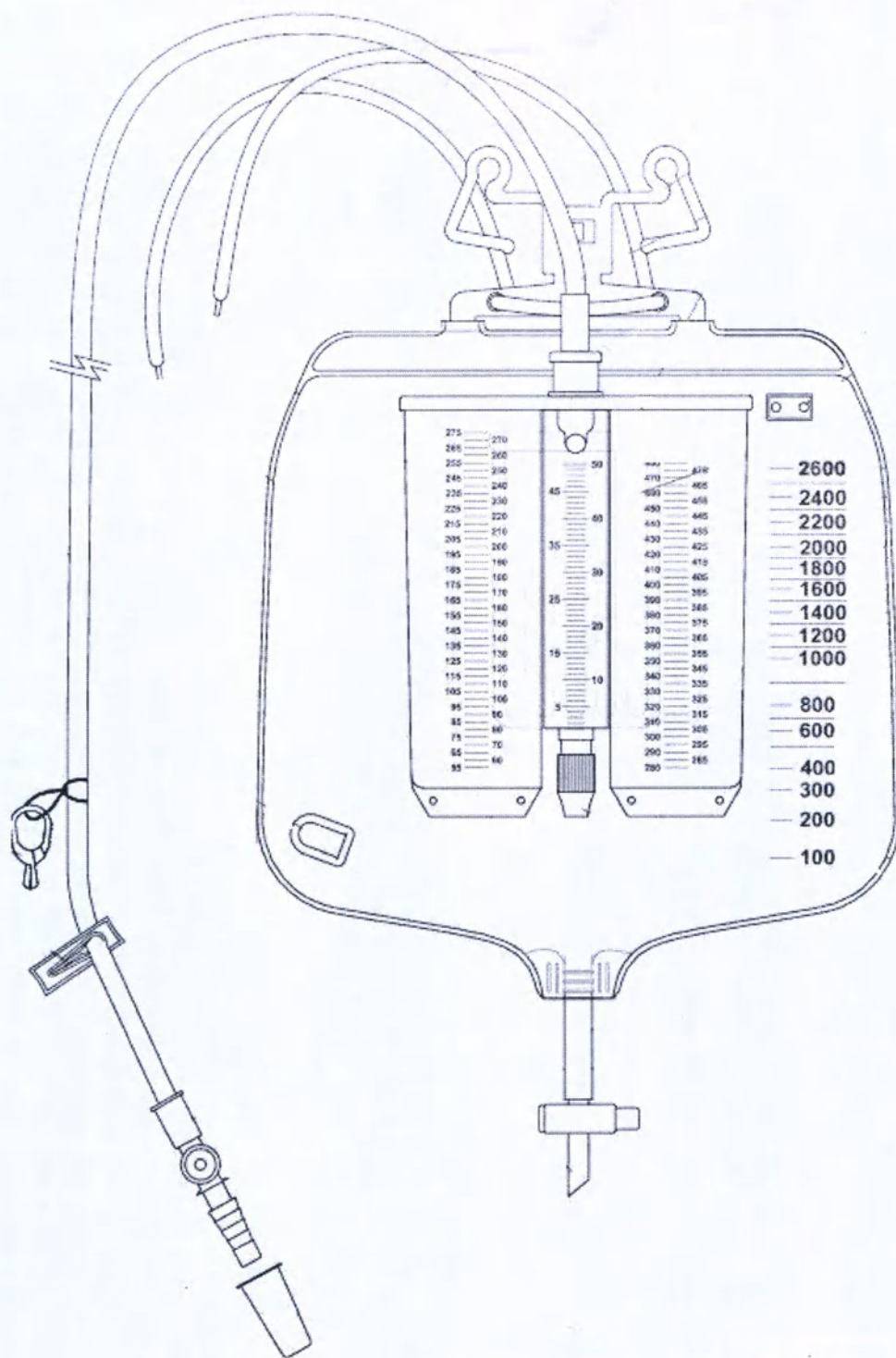


Рис. 409

Схематическое изображение - Трехкамерный: 500 мл. / 1500 мл., 500 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл.

Мочеприемники прикроватные состоят из емкости для сбора мочи, соединительной трубки (трубка соединительная выпускается трех типов (гофрированная, гладкая, стандартная)) с коннектором (коннектор выпускается четырех типов, тип коннектора определяется по согласованию с заказчиком) для присоединения к катетеру, коннектор защищен колпачком. Мочеприемник прикроватный снабжен антивозвратным клапаном (клапан против обратного тока) и сливным краном (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран) надежно соединенным с

лист111

трубкой сливной.

Для крепления мочеприемника предусмотрен одинарный держатель-подвес в количестве 2 шт. на 10 мочеприемников и встроенная система крепления.

Ниже представлены основные элементы конструкции мочеприемников.

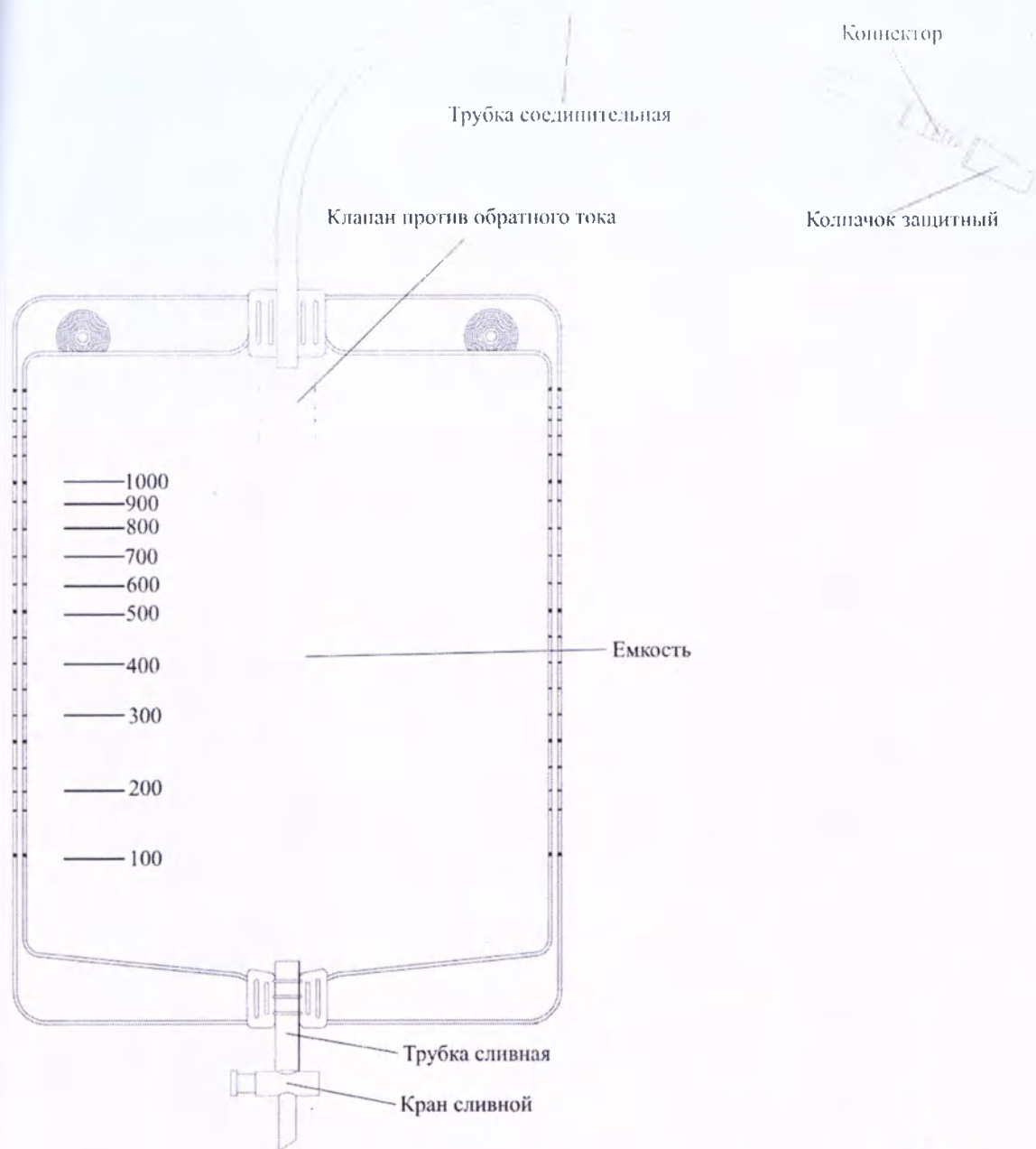


Рис. 410.

Основные элементы конструкции мочеприемников (элементы конструкции могут отличаться по согласованию с заказчиком)
(Мочеприемник прикроватный, объем: 1000 мл., 2000 мл.)



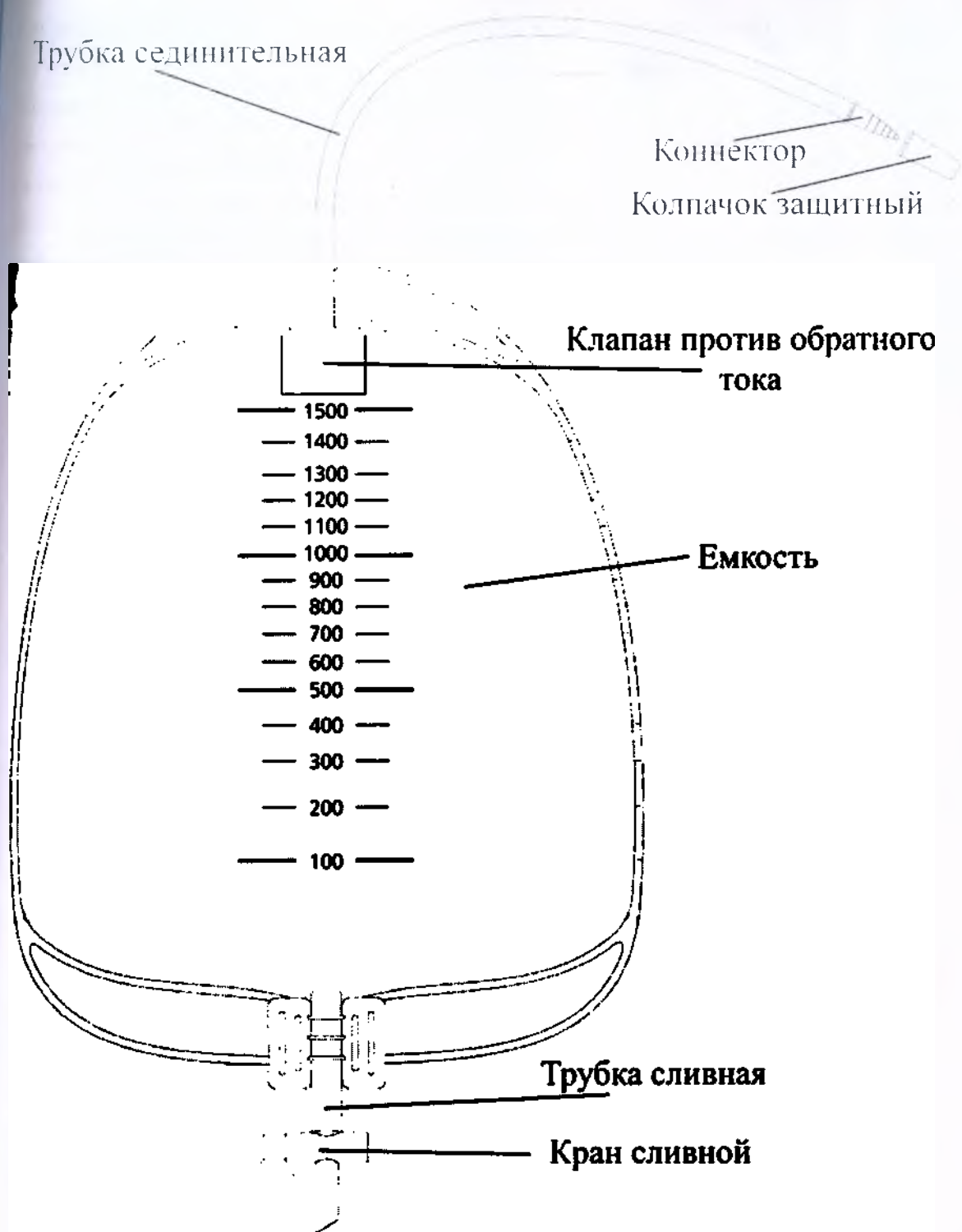


Рис. 411.

Основные элементы конструкции мочеприемников (элементы конструкции могут отличаться по согласованию с заказчиком)

(Мочеприемник прикроватный, объем: 1500 мл.)

Мочеприемники прикроватные Люкс состоят из емкости для сбора мочи, соединительной трубки (трубка соединительная выпускается 3 типов: гофрированная, гладкая, стандартная) с коннектором (коннектор выпускается четырех типов, тип коннектора определяется по согласованию с заказчиком) для присоединения к катетеру, коннектор защищен колпачком. С обратной стороны трубка соединительная встроена в камеру капельную прикрепленную к емкости мочеприемника. Емкость оснащена

микрофильтром для компенсации давления. В верхнюю часть емкости встроена система крепления изделия в которую через отверстия продет шнур для подвешивания. Мочеприемник прикроватный снабжен сливным краном (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран) надежно соединенным с трубкой сливной. Для удобства мочеприемник оснащен карманом для укладки крана сливного, зажимом скользящим и клипсой бельевой прикрепленной к трубке соединительной эластичным креплением. Ниже представлены основные элементы конструкции мочеприемников.

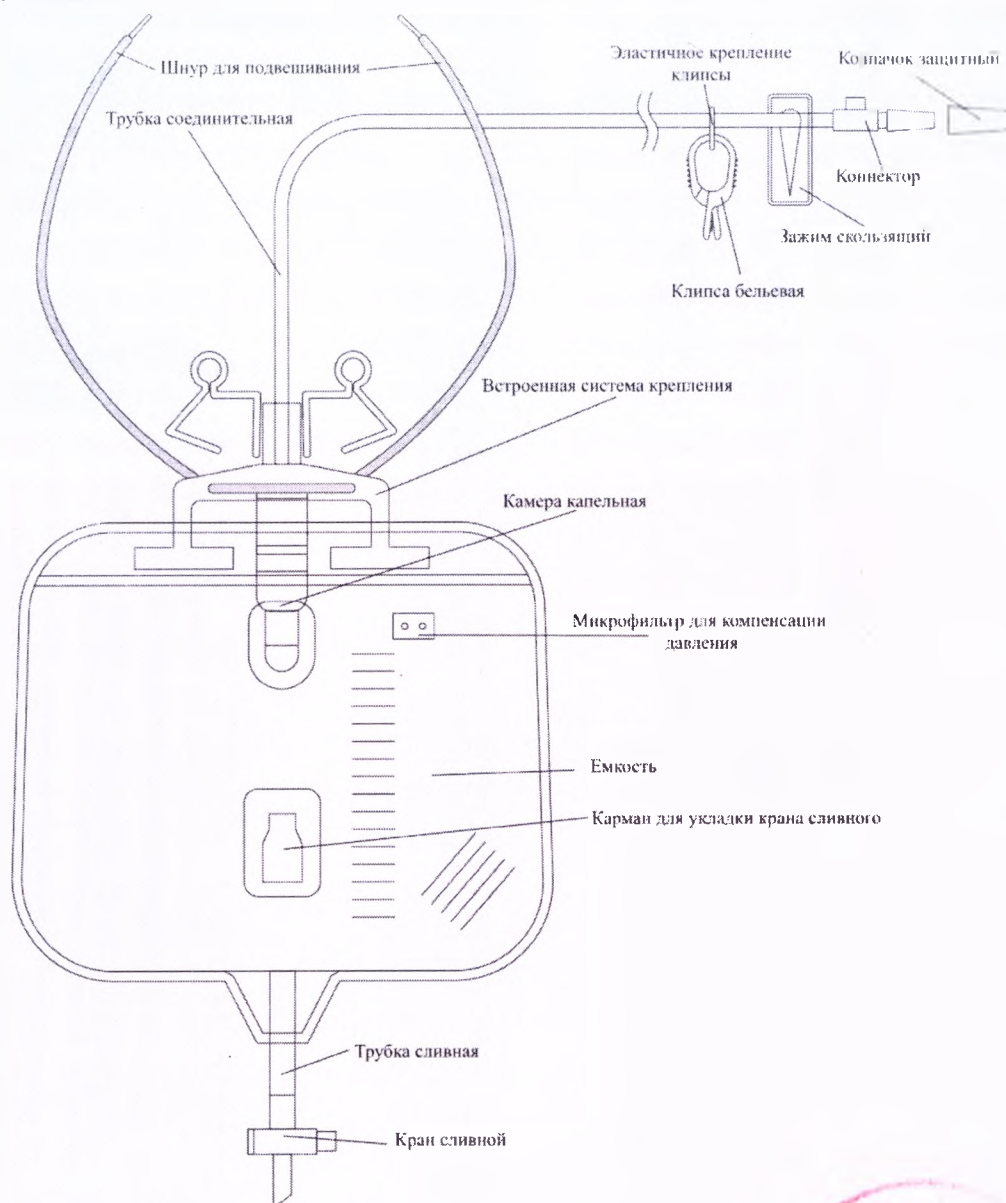
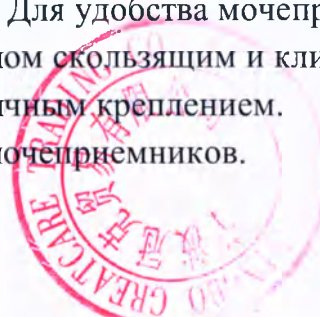


Рис. 412.

Основные элементы конструкции мочеприемников (элементы конструкции могут отличаться по согласованию с заказчиком)
(Мочеприемник прикроватный Люкс, объем: 2000 мл., 2500 мл., 2600 мл., 4000 мл.)

Мочеприемники прикроватные с измерительной камерой: однокамерные состоят из емкости для сбора мочи и камеры измерительной, соединительной трубки (трубка соединительная выпускается 3 типов: гофрированная, гладкая, стандартная) с коннектором (коннектор выпускается четырех типов, тип коннектора определяется по согласованию с заказчиком) для присоединения к катетеру, коннектор защищен колпачком. С обратной стороны трубка соединительная встроена в камеру измерительную, прикрепленную к емкости мочеприемника. Между емкостью и камерой измерительной имеется слив дренажный, позволяющий моче переливаться в емкость по желобам направляющим для равномерного слива. Емкость оснащена микрофильтром для компенсации давления. В верхнюю часть емкости встроена система крепления изделия в которую через отверстия пройдет шнур для подвешивания. Емкость мочеприемника прикроватного снабжена сливным краном (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран) надежно соединенным с трубкой сливной. Камера измерительная также оснащена краном сливным краном (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран). Для удобства мочеприемник оснащен карманом для укладки крана сливного, зажимом скользящим и клипсой бельевой прикрепленной к трубке соединительной эластичным креплением.

Ниже представлены основные элементы конструкции мочеприемников.



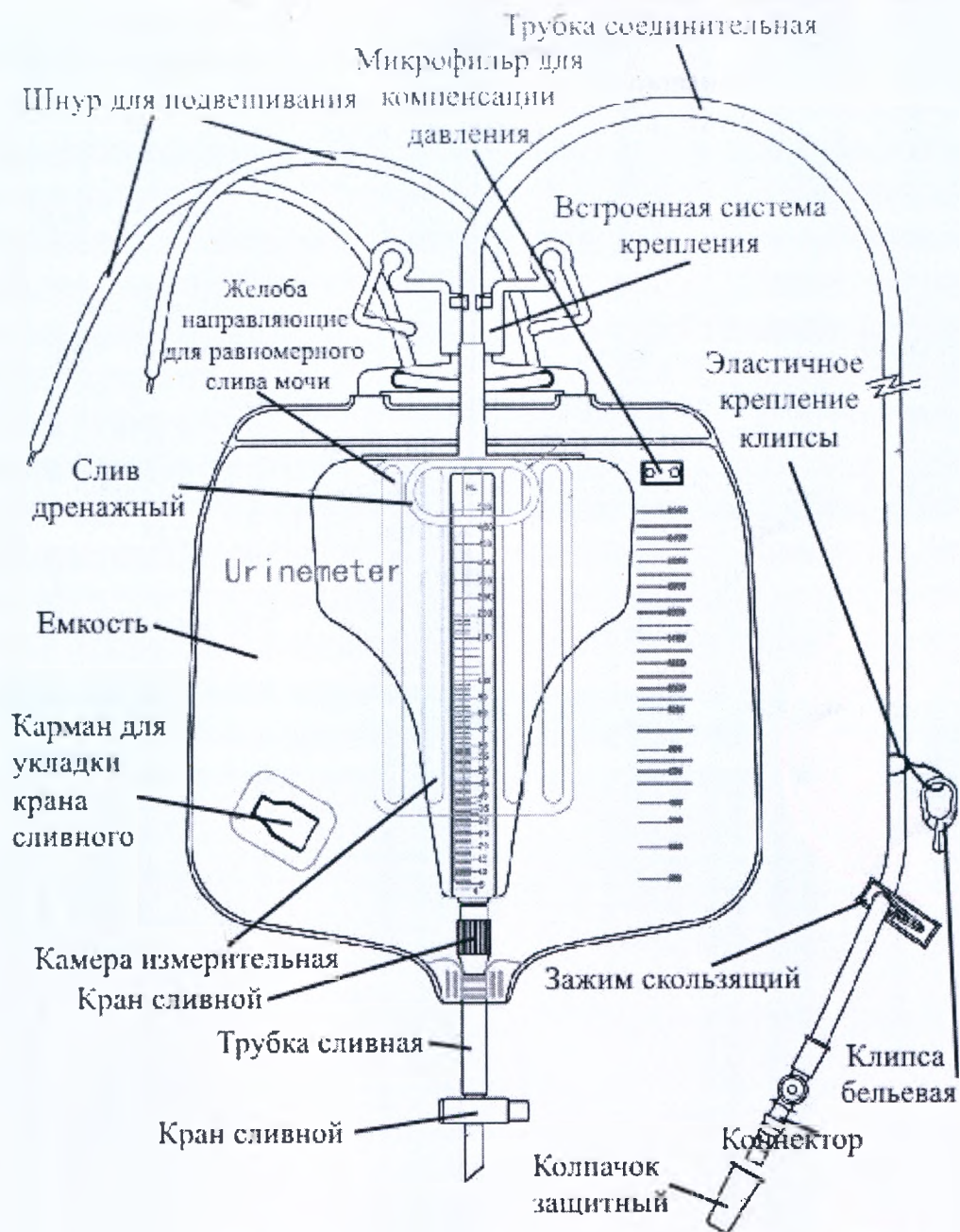
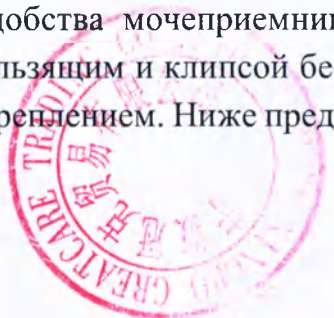


Рис. 413.

Основные элементы конструкции мочеприемников (элементы конструкции могут отличаться по согласованию с заказчиком).

(Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Однокамерный 200 мл. / 2000 мл., 200 мл. / 2500 мл., 200 мл. / 2600 мл., 400 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл., 500 мл. / 2500 мл., 500 мл. / 2600 мл.)

Мочеприемники прикроватные с измерительной камерой: двухкамерные состоят из емкости для сбора мочи и камеры измерительной, соединительной трубки (трубка соединительная выпускается 3 типов: гофрированная, гладкая, стандартная) с коннектором (коннектор выпускается четырех типов, тип коннектора определяется по согласованию с заказчиком) для присоединения к катетеру, коннектор защищен колпачком. С обратной стороны трубка соединительная встроена в камеру измерительную, прикрепленную к емкости мочеприемника. Между емкостью и камерой измерительной имеется слив дренажный, позволяющий моче переливаться в емкость по желобам направляющим для равномерного слива. Емкость оснащена микрофильтром для компенсации давления. В верхнюю часть емкости встроена система крепления изделия в которую через отверстия продет шнур для подвешивания. Емкость мочеприемника прикроватного снабжена сливным краном (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран) надежно соединенным с трубкой сливной. Камера измерительная также оснащена краном сливным (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран). Для удобства мочеприемник оснащен карманом для укладки крана сливного, зажимом скользящим и клипсой белой прикрепленной к трубке соединительной эластичным креплением. Ниже представлены основные элементы конструкции мочеприемников.



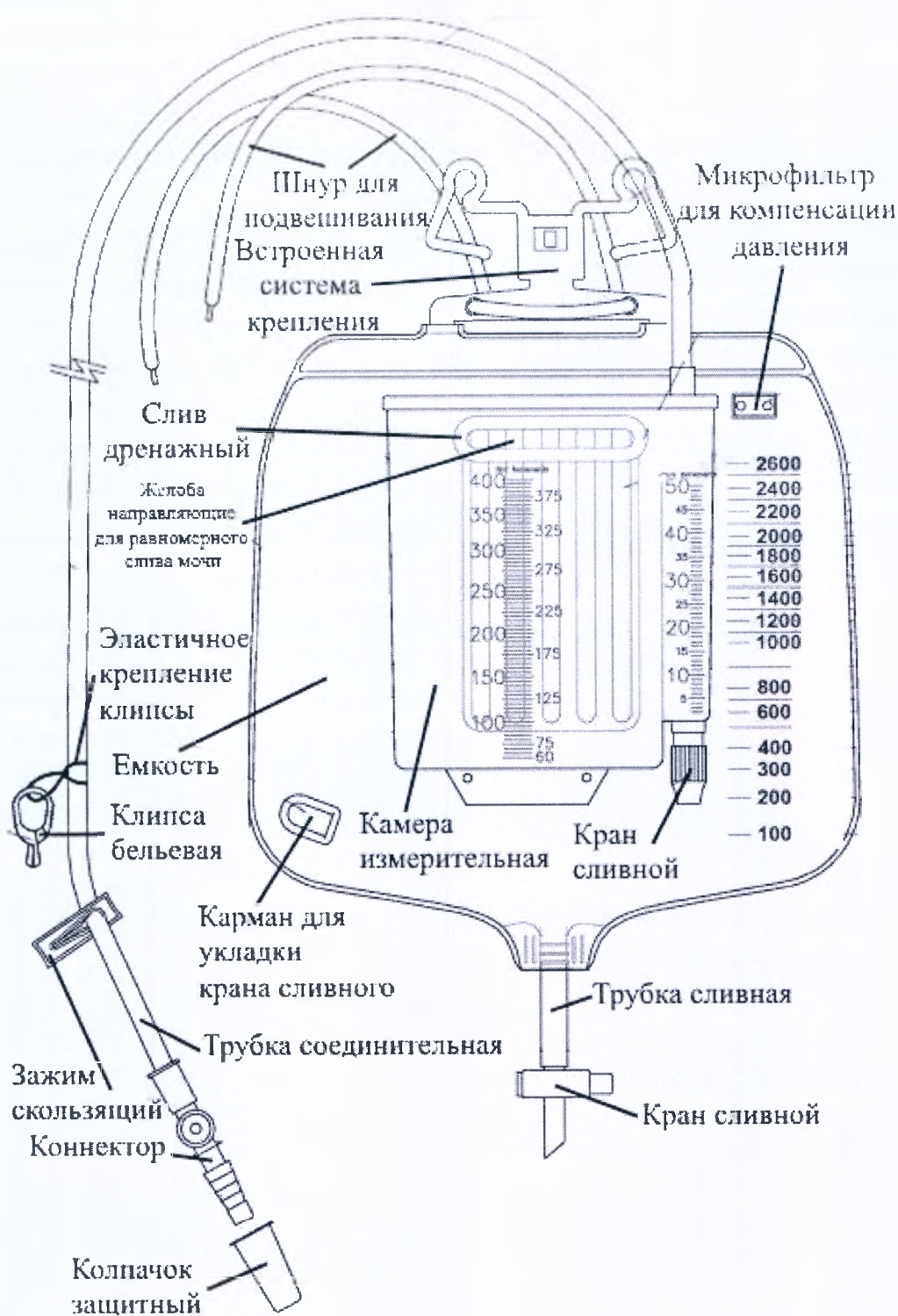


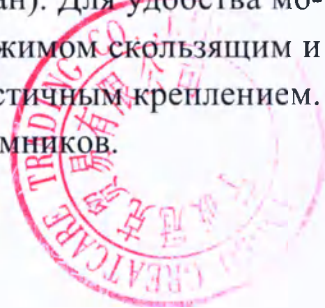
Рис. 414.

Основные элементы конструкции мочеприемников (элементы конструкции могут отличаться по согласованию с заказчиком)

(Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: Двухкамерный: 400 мл. / 2500 мл., 400 мл. / 2600 мл.)



Мочеприемники прикроватные с измерительной камерой: трехкамерные состоят из емкости для сбора мочи и камеры измерительной, соединительной трубки (трубка соединительная выпускается 3 типов: гофрированная, гладкая, стандартная) с коннектором (коннектор выпускается четырех типов, тип коннектора определяется по согласованию с заказчиком) для присоединения к катетеру, коннектор защищен колпачком. С обратной стороны трубка соединительная встроена в камеру капельную встроенную в камеру измерительную, в свою очередь камера измерительная прикреплена к емкости мочеприемника. Между емкостью и камерой измерительной имеется слив дренажный, позволяющий моче переливаться из одного отсека камеры в другой и емкость, по желобам направляющим для равномерного слива. Емкость оснащена микрофильтром для компенсации давления. В верхнюю часть емкости встроена система крепления изделия в которую через отверстия продет шнур для подвешивания. Емкость мочеприемника прикроватного снабжена сливным краном (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран) надежно соединенным с трубкой сливной. Камера измерительная также оснащена краном сливным (выпускаются 3х типов: поворотный, сдвижной, Т-образный сливной кран). Для удобства мочеприемник оснащен карманом для укладки крана сливного, зажимом скользящим и клипсой бельевой прикрепленной к трубке соединительной эластичным креплением. Ниже представлены основные элементы конструкции мочеприемников.



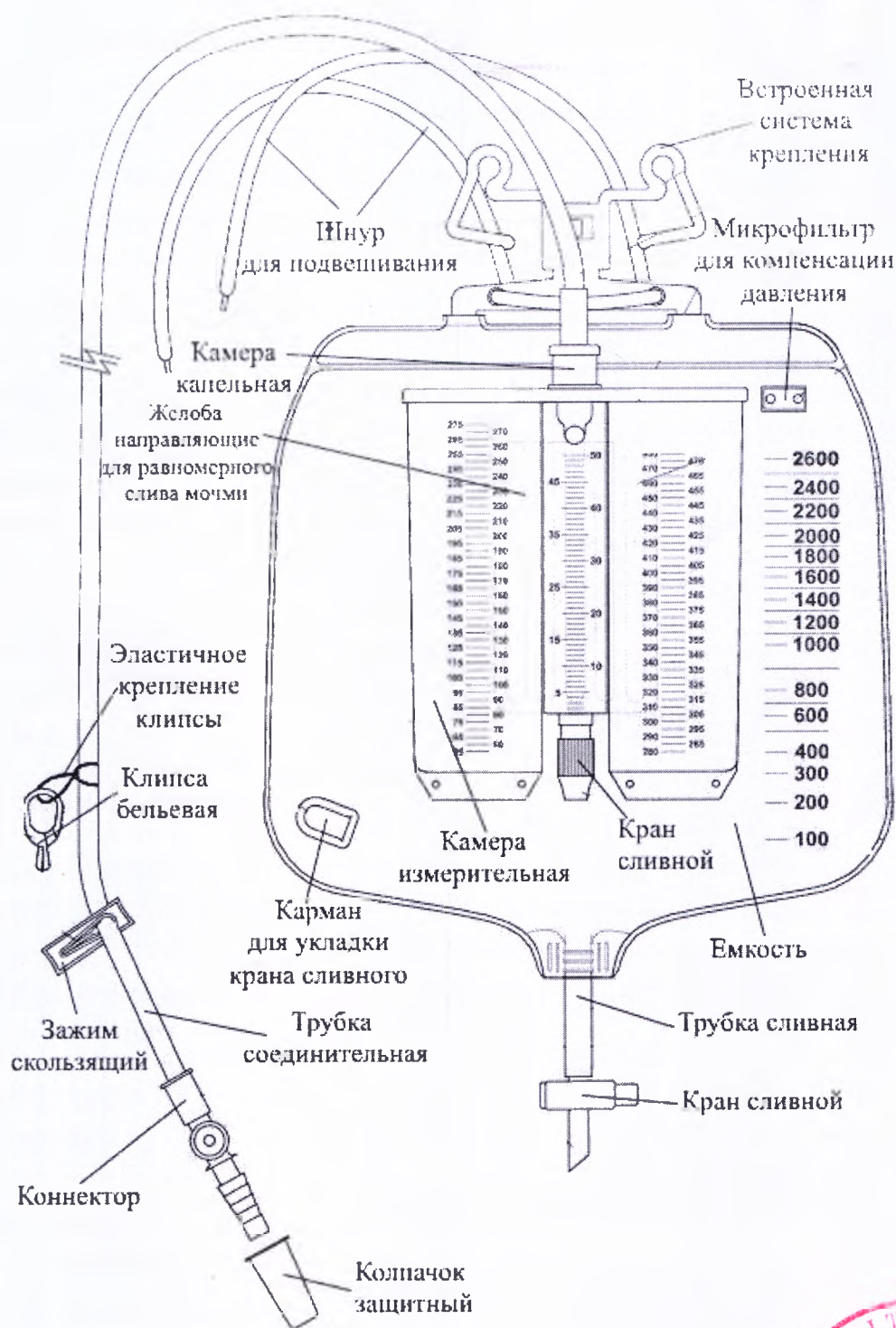
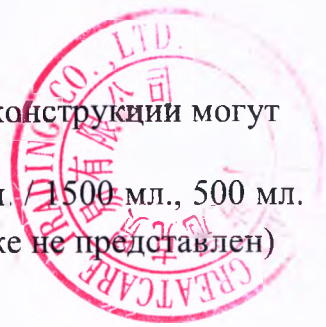


Рис. 415.

Основные элементы конструкции мочеприемников (элементы конструкции могут отличаться по согласованию с заказчиком)
 (Мочеприемник прикроватный с измерительной камерой: 500 мл / 1500 мл., 500 мл. / 2000 мл., 400 мл. / 2600 мл.) (слив дренажный на данном рисунке не представлен)



15. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Мочеприемники «АРЕХМЕД» – это изделие одноразового использования, которое поставляются стерильным (стерилизация этиленоксидом).

Мочеприемники – изделия однократного применения стерилизуются газовым методом с применением этиленоксида (0.82 г/л), повторной стерилизации не подлежат. Уровень гарантированной стерильности SAL 10⁻⁶ для соответствующих продуктов. Циклы стерилизации валидируются посредством проверки физических параметров и биологических испытаний.

Остаточное содержание оксида этилена - в соответствии с EN ISO 11135:2007

Во время валидации процесса стерилизации производится контроль полных загрузок в целях верификации приемлемых значений критических параметров, то есть: температура, относительная влажность, давление и вакуум (концентрация газа).

Все стандартные рабочие процедуры, тестирование, а также аттестации выполнены в соответствии со следующими стандартами:

- EN ISO 11135-1 - Стерилизация окисью этилена изделий, применяемых в здравоохранении; Часть 1: Требования по совершенствованию, аттестации и текущему контролю процессов стерилизации медицинских аппаратов.

EN 556: 1: 2001 Стерилизация медицинских аппаратов - Требования к медицинским аппаратам, помеченным маркировкой «Стерильно».

Данные по Валидации процесса стерилизации приведены в «Отчет о валидации стерилизации».

16. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки мочеприемника прикроватного включает:

1. Мочеприемник одного исполнения в индивидуальной упаковке – 1 шт.
2. Одинарный держатель-подвес – 2 шт. в комплекте на 10 мочеприемников.
3. Эксплуатационная документация – 1 шт.
4. Индивидуальная упаковка.

Комплект поставки мочеприемников прикроватных Люкс:

1. Мочеприемник одного исполнения – 1 шт.
2. Встроенная система крепления – 1 шт.
3. Шнур для подвешивания – 1 шт.
4. Зажим скользящий – 1 шт.
5. Клипса бельевая – 1 шт.
6. Эластичное крепление клипсы – 1 шт.
7. Эксплуатационная документация – 1 шт.
8. Индивидуальная упаковка.

Комплект поставки мочеприемников прикроватных с измерительной камерой:

1. Мочеприемник одного исполнения – 1 шт.



2. Встроенная система крепления – 1 шт.
3. Шнур для подвешивания – 1 шт.
4. Зажим скользящий – 1 шт.
5. Клипса бельевая – 1 шт.
6. Эластичное крепление клипсы – 1 шт.
7. Эксплуатационная документация – 1 шт.
8. Индивидуальная упаковка.

17. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Вымойте руки с мылом.
- Извлеките мочеприемник из упаковки. Предварительно проверьте целостность упаковки и срок годности. Не использовать при механическом, химическом, физическом или биологическом повреждении изделия.

- Проверьте, закрыт ли кран на дне мочеприёмника. Если нет, то закройте.

- Разместите мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента.

*Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря.

- Зафиксируйте мочеприемник в вертикальном положении (кровать, стойка, штатив), используя встроенную систему крепления или одинарный держатель-подвес на соответствующей высоте, чтобы обеспечить свободный поток мочи. Либо зафиксировать мочеприемник другим способом.

- Снимите защитный колпачок и соедините мочевой катетер или уропрезерватив с коннектором прикрепленным к соединительной трубки мочеприемника.

Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника мочой.

- Когда объем жидкости в мочеприемнике достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мочеприёмника и/или камеры измерительной, откройте клапан на дне, чтобы слить содержимое, после чего закройте клапан.

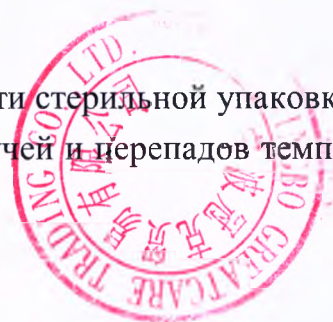
- Производите своевременную замену мочеприемника (не рекомендуется использовать более 2 суток).

- Использованный мочеприемник утилизируйте в соответствии с п. 10 настоящего документа.

Предупреждение: не используйте мочеприемник для сбора анализа мочи в течение 24 часов.

17.1 Меры предосторожности при применении

- Для одноразового использования.
- Не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки.
- Беречь от попадания прямых солнечных лучей и перепадов температур или высокой влажности.



17.2 Требования безопасности

- Не используйте изделие при повреждении стерильности или при любом повреждении упаковки.

Мочеприемник APREXMED – стерильное изделие однократного применения, не использовать повторно. «Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.», China («Нинбо Грейткаэ Трейдинг Ко., Лтд.»), Китай не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного или неправильного использования изделия.

- Не используйте изделие после истечения срока годности.

Придерживайтесь национальных стандартов при утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

17.3 Информация об обстоятельствах, при которых потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником

Перед применением проконсультироваться с врачом.

18. МАРКИРОВКА

Маркировка индивидуальной упаковки

На индивидуальную упаковку наносится информация:

- наименование изделия
- объем мешка мочеприемника
- адрес и наименование производителя
- номер партии
- дата изготовления
- дата истечения срока годности
- сведения о стерильности и методе стерилизации
- отсутствии токсичности
- символы «запрет на повторное применение»
- «не стерилизовать повторно»
- «не содержит латекс»
- «не использовать при повреждении упаковки»
- «утилизация по установленным правилам»
- «беречь от влаги»
- «не допускать воздействия солнечного света»
- «апирогенно»
- «обратитесь к инструкции по применению»
- обозначение места вскрытия упаковки
- знак «СЕ» с номером органа сертификации
- знак РСТ
- номер и дата регистрационного удостоверения.

Ниже представлен пример маркировки.



Urine bedside bag • with XXX cm tube
Мочеприемник прикроватный • с трубкой XXX см

Volume/Объем XXX ml/мл

Manufactured Ningbo Jiangdong Greatcare
International Trade Co., Ltd., China (Китай)



Организация, уполномоченная на принятие
и удовлетворение требований от потребителей
в отношении товара ненадлежащего качества:
ООО "Апексмед Рус", XXX



Символы, встречающиеся на этикетке (упаковке) МИ:

LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	Дата изготовления
	Использовать до
	Не содержит латекс
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Утилизация по установленным правилам
NON TOXIC	Не токсично
	Апирогенно
STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света



	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Производитель

На мешке нанесено:

- наименование изделия;
- объем (мл);
- шкала (маркировка с одной стороны).

Маркировка транспортной упаковки

Стикер транспортной упаковки содержит информацию, нанесенную на индивидуальную упаковку, за исключением: символов «не использовать при повреждении упаковки», «утилизация по установленным правилам». Логистические знаки «температурный диапазон», «беречь от влаги», «не допускать воздействия солнечного света», «верх», «хрупкое» также не указываются на стикере, так как они напечатаны на самой транспортной таре.

19. УПАКОВКА

Упаковка Мочеприёмников производится согласно стандарту EN ISO 11607-1:2009+A1:2014. Мочеприёмники упаковываются в индивидуальную и транспортную упаковки.

Индивидуальная.

Мочеприемники прикроватные упакованы в упаковки из полиэтилена (ПНП), марки, LD - LF 0250/KJ, Arya Sasol Petrochemical Co., Иран.

Мочеприемники прикроватные Люкс и с измерительной камерой (однокамерные, двухкамерные, трехкамерные) упакованы в упаковки из полиэтилена (ПНП), марки, LD - LF 0250/KJ, Arya Sasol Petrochemical Co., Иран, и бумаги марки SES 964F (блистер), UGL Corporation Ltd., China.

Индивидуальная упаковка мочеприёмников должна обеспечивать стерильное состояние в течение 5 лет при соблюдении технологии термозапаивания и процесса стерилизации.

Мочеприемники поштучно укладываются в индивидуальную упаковку, которую герметично заваривают.

Сведения об упаковке изделия (основные характеристики упаковочного материала), подвергаемого финишной стерилизации, представлены в таблице ниже.

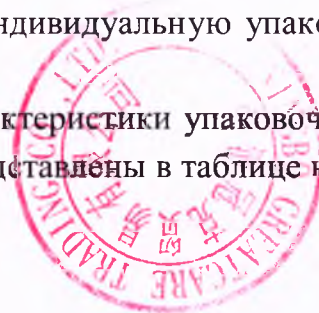


Таблица 5. Сведения об упаковке

Характеристики	Значения
Плотность материала упаковки	$0,92 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$
Прочность блистер упаковки	$\geq 1,5 \text{ Н/ 15 мм}$
Прочность упаковки ПЭ	$\geq 7 \text{ Н/ 15 мм}$
Прочность на разрыв в продольном (машинном) направлении	$\geq 1,2 \text{ кН/см}^2$
Прочность на разрыв в поперечном направлении	$\geq 1,4 \text{ кН/см}^2$
Прочность на продавливание упаковки	$\geq 650 \text{ кПа}$
Прочность адгезивного слоя на разрыв	$\geq 4,45 \text{ Н}$
Ширина клеевого слоя	$9,8 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$

Транспортная.

Герметично упакованные мочеприемники в индивидуальных упаковках, в количестве не более 300 штук мочеприемников помещают в транспортную тару, выполненную из материала - картон трехслойный гофрированный (толщиной 0,4 – 1,0 мм. производитель NingbochengdapackagingCo., Ltd., China). Коробка обклеена лентой так, чтобы исключить нарушение целостности упаковки при транспортировании и хранении.

Масса транспортной тары с изделием не более 20 кг. Размеры коробки, не более, мм: 800 x 800 x 800.

20. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Производственный процесс

Мочеприемники изготавливаются в рамках сертифицированной Системы Менеджмента Качества в соответствии с EN ISO 13485 Медицинские изделия - Система менеджмента Качества - Требования к процессу регулирования, а также в соответствии с приложением II, секцией 3 («Абсолютная гарантия качества») Директивы ЕС об изделиях медицинского применения 93/42/ЕЕС с поправками.

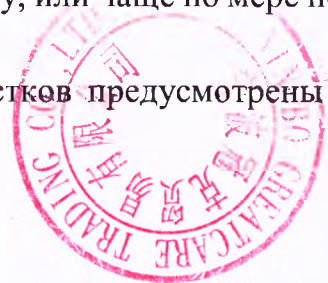
Офисные и производственные помещения здания и каждый сотрудник содержит свою рабочую зону в чистоте, а также обеспечивает благоприятную рабочую среду.

Требования к персоналу

Весь персонал, занятый в производстве, и персонал отдела качества, обязаны проходить медицинское освидетельствование раз в году, или чаще по мере необходимости.

Для стерильного помещения и контролируемых участков предусмотрены правила личной гигиены.

Мониторинг и запись температуры и влажности



В стерильных помещениях постоянно проводится мониторинг температуры и относительной влажности. Во время смены производится замер максимальных и минимальных значений по температуре и влажности.

Мониторинг и запись перепадов давления воздуха

Внутри стерильных помещений регулярно проводится мониторинг перепадов давления воздуха, по крайней мере, раз в смену.

Контроль загрязнения воздуха мелкими частицами и контроль заражения микробами

Раз в две недели проводятся проверки на загрязнение мелкими частицами и заражение микробами; принимаются соответствующие меры для поддержания условий в помещениях в пределах установленных лимитов.



Основные этапы производства (Производственная схема)

Оборудование

Схема процесса

Ответственный

Ссылка
Инструкции по
планированию
производства

Не принято

Принят

Не принято

Принят

Машина для
закрывания
упаковок

Принтер штрих-
кодов

Автоклав для
стерилизации ЭО

Принтер штрих-
кодов

ЗАКАЗ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО

ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ НА
СКЛАДЕ

Контроль процесса

Расположение изде-
лий

Контроль про-

КОМПЛЕКТАЦИЯ И
УПАКОВКА

Маркировка

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

УПАКОВКА И МАРКИ-
РОВКА

ХРАНЕНИЕ

КР-8.3 Управление
несоответствующей
продукцией

Кладовщик

Контролер
процесса

Начальник
производства

Контролер
процесса

Начальник
производства

Начальник
производства

Начальник отдела
стерилизации

Начальник
производства

Начальник склада

Инструкции по
управлению
процессом

Инструкция по
эксплуатации
аппарата для
упаковывания в
мягкий блистер

Инструкции по
управлению
процессом

Инструкции по
управлению
процессом

Руководство по
упаковке и
маркировке

Инструкция по
эксплуатации
стерилизатора
оксидом этилена

Руководство по
упаковке и
маркировке

21. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Изделие однократно применения, техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

22. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия – 5 лет с даты изготовления. Изделие сохраняет стерильность в течение всего срока годности.

23. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные мочеприемники должны быть утилизированы в соответствии с требованиями к утилизации медицинских отходов. Класс опасности медицинских отходов исходя из характеристик морфологического состава – класс Б (эпидемиологически опасные отходы).

Мочеприемники с истекшим сроком годности могут быть утилизированы в соответствии с требованиями к утилизации медицинских отходов.

В условиях стационара, склада и т.п., при необходимости, медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, регламентируемые СанПин 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

При утилизации мочеприемников в домашних условиях, необходимо воспользоваться услугами специализированных компаний по переработке и утилизации медицинских отходов, в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

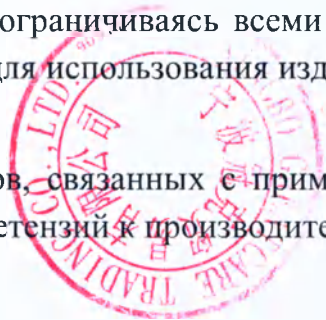
24. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мочеприемник имеет гарантию со дня продажи на предмет дефектов и качества изготовления. Гарантия действует при условии, что дефекты не связаны с неправильным применением по вине покупателя. Неправильное обращение или любое неправильное использование не в соответствии с инструкцией по применению.

В случае неисправности изделия, договорной ответственностью компании ООО «Апексмед Рус» является устранений таких случаев и дефектов путем замены. Решение о замене осуществляется по усмотрению компании ООО «Апексмед Рус». Гарантийный срок хранения, установлен на 5 лет, дается вместо всех других гарантий, прямых и косвенных, включая, но не ограничиваясь всеми косвенные гарантиями товарного состояния или пригодности для использования изделия по назначению.

25. РЕКЛАМАЦИИ

В случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, в также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:



Уполномоченная организация по вопросам качества:
Общество с ограниченной ответственностью «Апексмед Рус»
ООО «Апексмед Рус»
Тел.: +7(495)108-03-64, www.apexmed.ru,
info@apexmed.ru
ИНН 7717777072

Адрес для обращения потребителей:

ООО «Апексмед Рус»
107392, г. Москва, ул. Просторная 7 стр. 3
Тел. +7(495)108-03-64
info@apexmed.ru



26. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ		
1	93/42/ЕЕС:1993	Директива по медицинским устройствам
2	2007/47/ЕС:2007	Директива, дополняющая Директиву Совета Европы 90/385/ЕЕС по сближению законов стран-членов, касающихся активных имплантируемых медицинских устройств, Директиву Совета Европы 93/42/ЕЕС, касающуюся медицинских устройств, и Директиву 98/8/ЕС, касающуюся выпуска на рынок биоцидной продукции
3	EN ISO 13485:2012	Медицинские устройства – Системы управления качеством – Требования в целях соблюдения нормативов
4	EN ISO 11135-1:2007	Стерилизация изделий медицинского назначения - Этиленоксид - Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских устройств
5	EN 556-1:2001/AC:2006	Стерилизация медицинских устройств - Требования к медицинским устройствам, обозначаемым словом «СТЕРИЛЬНО» - Часть 1 : Требования к окончательно стерилизованным медицинским устройствам
6	EN ISO 11138-1:2006	Стерилизация изделий медицинского назначения - биологические индикаторы - Часть 1: общие требования
7	EN ISO 11138-2:2009	Стерилизация продукции медицинского назначения - биологические индикаторы - Часть 2: Биологический индикатор для процесса стерилизации оксидом этилена
8	EN ISO 11607-1:2009	Упаковка окончательно стерилизованных медицинских устройств - Часть 1: Требования к материалам. Системы стерильных барьеров и упаковочные системы
9	EN ISO 11607-2:2006	Упаковка окончательно стерилизованных медицинских устройств – Часть 2 : Валидационные требования к формованию. Процессы герметизации и сборки
10	EN 980:2008	Значки, предназначенные для использования в маркировке медицинских устройств
11	EN 1041:2008	Информация, предоставляемая изготовителем медицинских устройств
12	EN ISO 11737-1:2006/AC:2009	Стерилизация медицинских устройств – Микробиологические методы - Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на продукции
13	EN ISO 11737-2:2009	Стерилизация медицинских устройств – Микробиологические методы - Часть 2: Испытания на стерильность, выполняемые в ходе определения, валидации и проведения процесса стерилизации

14	EN 15986:2011	Значок для использования в маркировке медицинских устройств – Требования к маркировке медицинских устройств, содержащих фталаты
15	EN ISO14971:2012	Медицинские устройства – Применение управления рисками к медицинским устройствам
116	EN ISO 8669-1:1988	Мочеприемники - Часть 1: Словарь
117	EN ISO 8669-2:1997	Мочеприемники - Часть 2: Требования и методы испытаний

«Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.» ~~China~~
 («Нинбо Грейткэа Трэйдинг Ко., Лтд.»), ~~Китай~~



Подпись _____

Анализ рисков

Версия: A/01

1.0 Цель анализа рисков

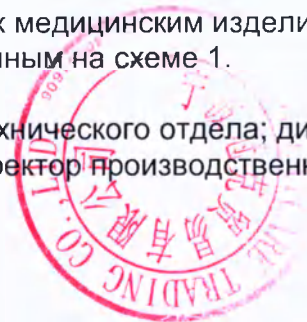
Мочеприемники одноразовые, произведенные нашей компанией, широко известны в кругу медицинских специалистов, как качественное изделие по своей конструкции и структуре. Метод применения – применяется в ежедневной практике медицинскими сестрами. Безопасность применения и надежность подтверждена. Тем не менее, существует низкая вероятность потенциального риска. Принятие эффективных предупреждающих мер, предотвращающих опасность и обеспечивающих корректное применение изделия, является целью и ответственностью производителя.

2.0 Основа для анализа рисков

Анализ рисков проводится на основании стандарта EN ISO 14971-1:2012 Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям. Анализ проведен в соответствии с процессом, описанным на схеме 1.

3.0 Участники группы анализа рисков

Руководитель отдела маркетинга; Руководитель технического отдела; дизайнеры, Руководитель отдела контроля качества; Директор производственного цеха.



3.0 Количественное и качественное определение характеристик заявленного медицинского изделия

Даются ответы на следующие вопросы в соответствии с п. 4.2 стандарта ISO 14971 – 1. Для каждого заявленного изделия определены характеристики, влияющие на его безопасность.

3.2 Мочеприемник прикроватный

3.2.1 Количественное и качественное определение характеристик мочеприемника

Таблица 1

Наименование изделия: **Мочеприемник прикроватный**

Классификация: **Is**

Пункт	Характеристики, влияющие на безопасность	Описание
1	Каково предназначение МИ и как его использовать? Необходимо учесть следующие факторы: предполагаемые пользователи, эргономические аспекты, окружающая среда, в которой используется МИ, кем МИ устанавливается, может ли пациент контролировать или влиять на применение. Особое внимание уделяется пользователям с особыми потребностями, пожилым и детям. Могут ли их особые потребности включать помощь других лиц в применении данного изделия для поддержания жизненных функций? Нужно специальное вмешательство в случае, если МИ не работает? Существуют ли специальные аспекты, касающиеся особенностей дизайна интерфейса, которые могут повлиять на неизбежную ошибку в работе МИ?	1 Предназначение: Изделие предназначено для сбора мочи. 2 Мочеприемник прикроватный состоит из ПВХ мешка и/или измерительной камеры, коннектора конической формы с защитным колпачком, трубки соединительной, сливного крана и встроенного крепления (исполнение Люкс, камерные). 3 Изделие может использоваться как в мед. учреждениях так и в домашних условиях.
2	Предполагается ли контакт МИ с пациентом или другими лицами? Необходимо учесть следующие факторы: природа предполагаемого контакта, т.е. поверхностный контакт, инвазивный контакт, и/или имплантация и для каждого случая – период и частота контакта.	Мочеприемник является внешним изделием.
3	Какие материалы и/или компоненты входят в состав медицинского изделия или использованы совместно либо в контакте с ним? Рассматривают следующие характеристики: - совместимость с другими существенными веществами; - совместимость с тканями и жидкостями организма; - имеются ли характеристики, относящиеся к безопасности; - содержит ли МИ материалы животного происхождения?	МИ полностью произведено из нетоксичных материалов.
4	Энергия поставляется или выделяется из пациента? Необходимо принимать во внимание: тип передаваемой энергии; контроль, количество и качество выделяемой энергии.	Не применяется



5	Есть ли вещества, поставляемые или выделяемые из пациента? Необходимо принимать во внимание: Вещества остаются или выделяются Это только одно вещество или их несколько Максимальная скорость, минимальная скорость и способ контроля	Производится сбор мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных и домашних условиях.
6	Обрабатываются ли биологические материалы медицинским устройством для последующего повторного использования, переливания или трансплантации? Необходимо принимать во внимание: Тип вещества и повторное использование (диализ, автотрансфузия препаратов крови или терапия роста клеток)	Не применяется
7	Стерильно ли поставляемое медицинское изделие или оно предназначено для стерилизации пользователем, или применяют другие виды микробиологической обработки? Необходимо учесть следующие факторы: предназначено ли медицинское изделие для одноразового или многоразового применения; данные об упаковке, сроках хранения, любых ограничениях числа повторных применений или предполагаемых видах стерилизации.	МИ поставляется в стерильном состоянии и предназначено для однократного применения.
8	Предназначено ли медицинское изделие для рутинной очистки и дезинфекции, выполняемых пользователем? Рассматривают виды применяемых чистящих и дезинфицирующих средств и любые ограничения числа циклов очистки. Кроме того, на эффективность рутинной очистки и дезинфекции может влиять конструкция медицинского изделия.	Не применяется
9	Предназначено ли медицинское изделие для изменения среды, окружающей пациента? Рассматривают: температуру, влажность, состав газов воздуха, давление и освещенность.	МИ предназначено только для сбора мочи и не изменяет окружающую среду.
10	Могут ли быть проведены измерения? Рассматривают: измеряемые переменные, правильность и точность результатов измерения.	Не применяется
11	Является ли медицинское изделие интерпретирующим? Рассматривают: сведения о том, выдает ли медицинское изделие заключения на основе входных или накопленных данных; информацию о применяемых алгоритмах и доверительных пределах.	Не применяется
12	Предусмотрено ли применение медицинского изделия в сочетании с медикаментами или другими медицинскими средствами и технологиями? Рассматривают: идентификацию любых применяемых медикаментов или других медицинских средств, возможных проблем, связанных с их взаимодействием; реакцию пациента на получаемое лечение.	Не применяется



13	Могут ли произойти нежелательные выделения энергии или веществ? Рассматривают в связи с возможным выделением энергии: шум и вибрацию, теплоту, излучение (включая ионизирующее, неионизирующее и ультрафиолетовое/видимое/инфракрасное излучения), температуру на контактных поверхностях, токи утечки, электрические и/или магнитные поля. Рассматривают в связи с возможным выделением веществ: выведение химических веществ, продуктов жизнедеятельности и воды, содержащейся в организме.	Не применяется
14	Чувствительно ли медицинское изделие к воздействию окружающей среды? Рассматривают: производственную среду, транспортные средства, условия хранения. К ним относят освещенность, температуру, вибрации, утечки, чувствительность к изменениям энергоснабжения и охлаждения, электромагнитные помехи.	Изделие может применяться в обычных условиях. Требования к условиям хранения следующие: хранить в сухом месте, избегать воздействия экстремальных температур.
15	Воздействует ли медицинское изделие на окружающую среду? Рассматривают: воздействие средств энергоснабжения и охлаждения, выделение токсичных веществ, генерирование электромагнитных помех.	Не применяется
16	Имеются ли необходимые расходные материалы или принадлежности, связанные с медицинским изделием? Рассматривают спецификации на расходные материалы или принадлежности, связанные с медицинским изделием, и любые ограничения в их выборе для пользователя.	Не применяется
17	Необходимы ли техническое обслуживание и/или калибровка? Рассматривают: сведения о том, должны ли техническое обслуживание и/или калибровка быть выполнены оператором, пользователем или специалистом; необходимы ли специальные вещества или оборудование для надлежащего технического обслуживания и/или калибровки.	Не применяется
18	Входит ли в состав медицинского изделия программное обеспечение? Рассматривают сведения о том, должно ли программное обеспечение быть установлено, верифицировано, модифицировано или заменено пользователем и/или оператором.	Не применяется
19	Имеет ли медицинское изделие ограниченный срок хранения? Рассматривают соответствующие маркировку или индикацию, утилизацию медицинского изделия.	Срок годности МИ составляет 5 лет, что указано на маркировке. Обращение с МИ с истекшим сроком годности осуществляется в соответствии с государственным законодательством и положениями.
20	Существуют ли отсроченные и/или длительные последствия эксплуатации? Рассматривают эргономические и кумулятивные эффекты.	Не применяется

21	Какие механические силы могут воздействовать на медицинское изделие? Рассматривают данные о том, управляет ли механическими силами, которые могут воздействовать на медицинское изделие, только пользователь или пользователь совместно с другими лицами	Стенки мешка должны выдерживать давление установленного объема мочи и исключать утечки или разрыв.
22	Что определяет срок службы медицинского изделия? Рассматривают старение изделия, истощение элементов питания.	Срок службы МИ определяется старением материала.
23	Предназначено ли медицинское изделие для одноразового применения? Рассматривают самоликвидируется ли изделие после использования, есть ли явные признаки того, что изделие уже использовалось.	Только для одноразового использования.
24	Необходимы ли безопасный демонтаж или утилизация медицинского изделия? Рассматривают проблему отходов, возникающих при утилизации медицинского изделия. Например, следует ответить, содержит ли изделие токсичные или опасные вещества либо вещества, пригодные для переработки.	Использованное изделие должно утилизироваться в соответствии с государственным и региональным законодательством. Если пользователи намереваются дезинфицировать МИ или использовать его в качестве вторичного сырья, необходимо обратиться к соответствующим государственным положениям.
25	Необходимо ли специальное обучение или специальные навыки пользователя для монтажа или эксплуатации медицинского изделия? Рассматривают установку (монтаж) и передачу изделия пользователю, вероятность/возможность установки (монтажа) лицами без специальной подготовки.	Не применяется
26	Будут ли необходимы разработка или внедрение новых производственных процессов? Внедрение новых производственных процессов на предприятиях-изготовителях следует рассматривать как возможный источник новых опасностей (опасности) (например внедрение новой технологии, нового уровня развития производства).	Не применяется
27	Является ли успешное применение медицинского изделия критически зависимым от человеческого фактора, такого как интерфейс пользователя? Рассматривают особенности конструкции интерфейса пользователя, которые могут привести к ошибкам эксплуатации. Медицинское изделие следует проектировать так, чтобы оно не могло быть неправильно применено пользователем в условиях действия отвлекающих факторов, например, при управлении изделием, что обеспечивается применением символов, разработкой эргономических характеристик, проекта конструкции и схемы расположения элементов, иерархии действий, меню для изделий с микропроцессор-	Мочеприемник должен быть надежно прикреплен при помощи систем крепления

	ным управлением, наглядностью предупреждений, слышимостью сигналов тревоги, стандартной цветовой кодировкой. Имеет ли медицинское изделие соединительные части или принадлежности? Рассматривают: наличие возможности неправильных соединений, отличие от соединений в других изделиях и сходство с ними, усилия, необходимые для соединения, обратную связь при повреждении соединения, а также чрезмерно или недостаточно туго затянутое соединение Имеет ли медицинское изделие управляющий интерфейс? Рассматривают: пространственное распределение, кодирование, группировку, схему пространственного распределения, режимы обратной связи, грубые ошибки, незначительные промахи, дифференциацию управления, видимость изображений, направление активирования или изменения, дискретность или непрерывность функционирования элементов управления, обратимость установок или действий. Имеет ли медицинское изделие функцию отображения информации? Рассматривают: видимость изображения в различных условиях, ориентацию, заполнение и перспективы, четкость представления информации, единицы отображения информации, цветное кодирование и доступность критической информации. Имеет ли медицинское изделие меню управления? Рассматривают: сложность и число уровней, осведомленность о состоянии, расположение установок, способ передвижения между объектами, число этапов в одном действии, проблемы четкой последовательности действий и запоминания, соотношение важности и доступности функции управления и влияние отклонений от конкретных действий	
28	Является ли медицинское изделие мобильным или портативным? Рассматривают: зажимы, рукоятки, колеса, тормоза, механическую устойчивость и прочность.	Не применяется

3.2.2-3.2.3 Потенциальные опасности при применении мочеприемника

Потенциальные опасности описаны ниже на основании качественного анализа характеристик изделия, в соответствии с EN ISO 14971 Приложение D:

Тип опасности	Потенциальная опасность	Да	Нет	Норма	Отказ	Если да (известные, предвидимые, не подтвержденные), опишите потенциальную опасность
D1 Энергетические опасности	1. Давление (повреждение и протечка контейнера) 2. Способность выдерживать вес жидкости (степень прочности подвесного устройства)	✓ ✓			✓ ✓	1. Емкость может порваться или протечь, если мочеприемник содержит максимальный объем мочи. В результате произойдет разлив мочи. 2. Функция вентилирования дышащей пленки не выполняется в полной мере и это приводит к росту давления, что препятствует или затрудняет отведение мочи. 3. Происходит утечка мочи через сливной клапан. 4. Крепление также должен выдерживать максимальный вес мочи. В случае его повреждения происходит падение мочеприемника, его разрыв и разлив мочи.
D2 Биологические опасности	Био загрязнение	✓ ✓		✓	✓ ✓	1. При использовании в условиях операционной пациент может быть инфицирован при наличии бактерий в МИ. 2 Функция пленки отлива состоит в предотвращении обратного потока. Если эта характеристика теряет свою эффективность, пациент может быть инфицирован при опрокидывании мочеприемника и обратном токе мочи.
D3 Опасности, касающиеся окружающей среды	1. Несовместимость с другим оборудованием. 2. Загрязнение отходами, полученными в результате утилизации мусора или медицинских изделий.	✓ ✓		✓	✓	Приемный кончик входной трубки не подходит катетеру, что вызывает утечку мочи из мешка. Утилизация изделий и отработанных жидкостей должна проводиться в соответствии с государственным и региональным законодательством.
D4 Опасности, связанные с применением МИ	Несоответствующие предупреждения об опасностях, связанных с повторным применением МИ, предназначенного для однократного применения. Острые углы или острые края	✓ ✓		✓	✓ ✓	При повторном применении МИ возможно перекрестное заражение. Каждый уплотнитель мочеприемника имеет острые края или выступы, которые могут проткнуть мешок или индивидуальную упаковку в процессе укладки в коробки.
D5 Опасности, связанные с отсутствием	1. Недостаточные инструкции, касающиеся окончания срока службы МИ					Мочеприемник имеет истекший срок годности, что вызывает его старение. Таким образом, продукт не может быть использован.

казом МИ, не- правильной эксплуатацией или старением	2. Некачественная упаковка (загрязне- ние или изменение медицинского оборудо- вания)	✓ ✓			✓ ✓	1. Индивидуальная упаковка выпол- няет свою функцию по сохранению стерильности МИ в течение заявлен- ных 5 лет, что может привести к инфи- цированию при использовании МИ в условиях операционной. 2. Внешняя упаковка не соответствует требованиям по весовой нагрузке. Та- ким образом, индивидуальная упа- ковка может быть повреждена или за- грязнена из-за нарушения целостности внешней тары.

3.2.4 Схема анализа рисков

3.2.4.1 Анализ вероятности и тяжести

Выделяют 4 степени тяжести опасностей:

- 1 = незначительный (опасность, которая может вызвать незначительный вред или вовсе не нанесет вреда)
- 2 = минимальный (опасность, которая может нанести вред или повреждение)
- 3 = критический (опасность, которая может повлечь смерть, серьезный вред или повреждение)
- 4 = катастрофический (опасность, которая может вызвать смерть нескольких лиц или нанести серьезный вред)

3.2.4.2 Вероятность возникновения опасностей делится на 6 степеней в зависимости от ча-
стоты проявлений в год:

- 6 = частый (>1)
- 5 = возможный (10^{-1} - 10^{-2})
- 4 = случайный (1 - 10^{-1})
- 3 = удаленный (10^{-4} - 10^{-6})
- 2 = маловероятный (10^{-2} - 10^{-4})
- 1 = невероятный ($<10^{-6}$)

3.2.4.3 Метод определения уровня риска с помощью сочетания тяжести и вероятности.

Уровень риска = Тяжесть × Вероятность

3.2.5 Критерии допустимости риска

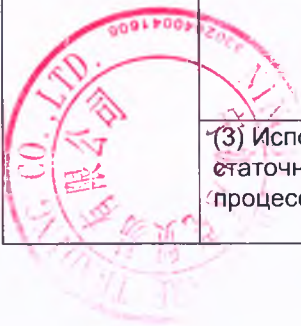
Результат	Допустимость
0~6	Допустимый (белая область)
7~11	Предупреждение, тревога (желтая область)
12~24	Не допустимый (красная область)

3.2.6 Все опасности проанализированы на основании ежегодного статистического анализа качественного уровня изделия, предоставленного отделом контроля качества.

Потенциальная опасность	Вероятная причина	Тяжесть	Вероятность(До/после)	Уровень риска (До/после)	Меры	Ссылка
А. Мочеприемник протекает, что вызывает разлив мочи.	А1. Мочеприемник протекает при полном заполнении емкости					
	(1) Причина в чрезмерном или недостаточном нагреве элемента при запаивании мешка.	1	4 2	4 2= допустимый	1. Подтверждение соответствия процесса термосклеивания мешка.	1 Отчет по верификации качества запаивания при проведении теста на герметичность (slv-044to058)
	(2) Причина в некачественном приклеивании входного элемента к мешку.	1	4 2	4 2= допустимый	2. Подтверждение соответствия процесса термосклеивания входного элемента и мешка.	2 Отчет по верификации качества прикрепления слива и входного элемента (slv001)
	(3) Причина в некачественном приклеивании сливной трубки к мешку.	1	4 2	4 2= допустимый	3. Подтверждение соответствия процесса термосклеивания сливной трубки и мешка.	3 Отчет по верификации качества прикрепления входной трубки (slv003)
	(4) Причина в некачественном приклеивании воздухопроницаемой пленки к мешку.	1	4 2	4 2= допустимый	4. Подтверждение соответствия процесса термосклеивания воздухопроницаемой пленки и мешка.	4 Отчет по верификации прикрепления воздухопроницаемой пленки (slv093)
					5. Внешний вид термосварного шва должен проверяться и утверждаться оператором.	5 Руководство для оператора
А2. Надрыв подвесной ленты, который вызывает падение и повреждение мочеприемника.						6 Руководство по проверке (W-ZK-07-02, 04)
	(3) Вызвано эффектом давления вливания, который ведет к разрыву в точке присоединения подвесного кольца и фиксирующего приспособления.	1	4 2	4 2= допустимый	Расправить подвесное приспособление после начала процесса вливания.	Карта процесса.

Потенциальная опасность	Вероятная причина	Тяжесть	Вероятность (До/после)	Уровень риска (До/после)	Меры	Ссылка
А. Мочеприемник протекает, что вызывает разлив мочи.	(2) Вызвано повышенной температурой при обработке сырья, что делает подвесное приспособление хрупким и ведет к его разрыву.	1	3 2	3 2= допустимый	Сырье должно соответствовать стандарту и необходимо придерживаться выбранной марки сырья.	Документы по закупке (технические требования к сырью, проверка образцов, список сертифицированных поставщиков).
	А3. Для удобства отведения мочи, выходное отверстие слива имеет шиловидную форму. Таким образом, оно может легко проткнуть мешок в процессе упаковки.	1	3 2	3 2= допустимый	1. Упаковывание продукции должно осуществляться в соответствии с принятым методом. Соедините мешок и сливное приспособление и присоедините краник к сливному приспособлению.	Руководство по упаковке.
В. Протечка катетера в точке соединения между всасывающим кончиком входной трубки и катетером.	В1. Вызвана неподходящим размером.	1	3 2	3 2= допустимый	1. Убедитесь в соответствии размеров стандарту. 2. Подтверждение корректного процесса прессования. 3. 3. Контроль процессных параметров, а также всасывающего наконечника.	1.Чертеж всасывающего наконечника. 2. Отчет о подтверждении процесса прессования. 3.Руководство по контролю процесса прессования W-ZK-07-15
	В2. Вызвана некорректным процессом прессования.	1	2	2= допустимый	Подтверждение изначального процесса прессования. Проверка образцов.	Руководство по контролю процесса прессования W-ZK-07-15

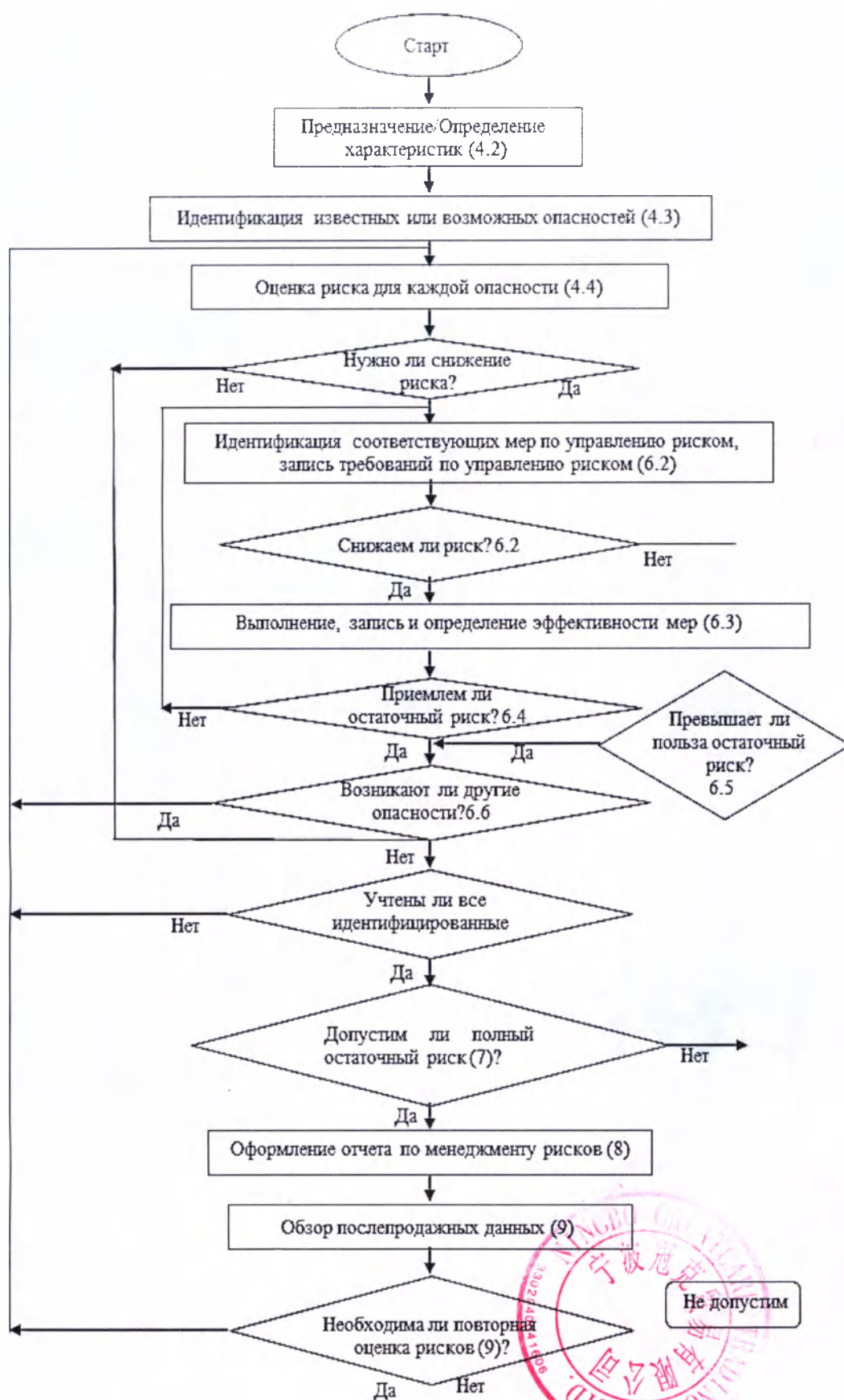
Потенциальная опасность	Вероятная причина	Тяжесть	Вероятность (До/после)	Уровень риска (До/после)	Меры	Ссылка
Е. Инфицирование пациента при использовании МИ в обычных условиях или в условиях операционной.	Е1. Вызвано обратным током мочи					
	(1) Недостаточная функция вентиляции воздухопроницаемой пленки.	2	3 2	6 4= допустимо	Выбранная марка сырья должна соответствовать стандарту и следует придерживаться выбранной марки. Поставщик сырья должен предоставлять сертификаты качества на каждую поставленную партию.	1. Закупочные документы. 2. Документы, подтверждающие качество воздухопроницаемой пленки.
	(2) Протечка в месте анти-возвратного клапана.	2	3 2	6 4= допустимо	100% испытание на герметичность.	
	Е2. Дефект стерилизации					
	(1) Некорректный процесс стерилизации	2	3 2	6 4= допустимо	Валидация процедуры стерилизации. Проверка записей по стерилизации. Проверка конечного биологического статуса.	Отчет о подтверждении стерилизации Отчет о проверке биологического статуса function
	(2) Изначальное количество бактерий превышает стандарт.	2	3 2	6 4= допустимо	1. Производство в чистых помещениях по стандарту GMP 2. Процедура контроля условий окружающей среды и гигиены процесса. 3. Регулярный контроль проверки начального уровня загрязненности продукции.	Отчет по проверке условий окружающей среды (см. отчет 200350232). Записи о регулярных проверках условий окружающей среды и гигиены. Отчет о проверке первоначального бактериального загрязнения.
	(3) Использование не достаточно чистой воды для процесса.	2	3 2	6 4= допустимо	Регулярная проверка качества воды.	Отчет о проверке воды. Отчет по качеству воды, используемой в процессе.



Потенциальная опасность	Вероятная причина	Тяжесть	Вероятность (До/после)	Уровень риска (До/после)	Меры	Ссылка
Ф. Защитный колпачок входной трубки отсоединился и упал в индивидуальную упаковку, что затрудняет применение.	Причина в несовпадении размеров защитного колпачка и входной трубки.	1	3 2	6 4= допустимо	Испытание соединений. Процедура контроля размеров.	Отчет об испытании соединений. Руководство по проверке пресования W-ZK-07-15
Г. Защитный колпачок входной трубки слишком туго прикреплен, что затрудняет применение.	Причина в несовпадении размеров защитного колпачка и входной трубки.	1	3 2	3 2= допустимо	Испытание соединений. Процедура контроля размеров.	Отчет об испытании соединений. Руководство по проверке пресования W-ZK-07-15
Н. Изделие стареет ранее заявленного срока годности.	Не корректно определен срок годности	2	3 2	6 4= допустимо	Проведение исследований изделия на старение и подтверждение срока годности.	1 Отчет об исследовании старения. 2 Верификация упаковки.

3.7 Общее заключение о допустимости:

Наша компания провела оценки рисков при проектировании и разработке. За исключением п. Н (желтая область) остальные потенциальные опасности попали в допустимую область до мер по снижению риска. После принятия соответствующих мер все опасности попали в допустимую зону. С целью улучшения качества нашей продукции и повышения ее конкурентоспособности на рынке, мы предприняли все необходимые и возможные меры для минимизации возможных опасностей. Многолетний опыт и отзывы, полученные от потребителей, свидетельствуют о стабильности качества нашей продукции. По статистике мы продали более 2 миллиардов мочеприемников с 2003 г. Таким образом, положительные качества продукции превосходят какие-либо недостатки.



公 证 书

(2017)浙甬天证外字第 4412 号

申请人：宁波冠克贸易有限公司，统一社会信用代码：
91330212796017931M，住所：宁波市鄞州区启明路 818 号 12 幢 93
号。

法定代表人：胡永祥，男，一九七七年十一月三十日出生，
公民身份号码：330205197711304213。

公证事项：签名、印鉴

兹证明宁波冠克贸易有限公司的法定代表人胡永祥于二〇一
七年八月二十二日来到我处，在本公证员的面前，在前面的俄文
本上签名并加盖“宁波冠克贸易有限公司”的印章。

中华人民共和国浙江省宁波市天一公证处

公 证 员

林宁霄

二〇一七年八月二十二日

公证处

1191847023

НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ

(2017) Чжэ Юн Тянь Чжэн Вай Цзы № 4412

Заявительница: Нинбо Грейткеа Трэйдинг Ко Лтд .

Единый общественный кредитный код: 91330212796017931М

Местонахождение: г. Нинбо, р.Иньчжоу, ул.Цимин, д.818, корпус 12, № 93.

Представитель юридического лица: Ху Юн Сян, муж., дата рождения: 30.11.1977г., номер удостоверения личности: 330205197711304213.

Нотариальный предмет: подпись и печать

Настоящим удостоверяю, что представитель юридического лица Нинбо Грейткеа Трэйдинг Ко Лтд Ху Юн Сян 22 августа 2017 года прибыл в нашу контору и подписал вышеуказанный документ на русском языке и поставил печать “Нинбо Грейткеа Трэйдинг Ко Лтд” на нем в моем присутствии.

Нотариальная контора «ТЯНЬИ» г. Нинбо пров. Чжэцзян КНР

Нотариус: Линь Нинцзи (подпись)

Нотариальная контора «ТЯНЬИ» г. Нинбо пров. Чжэцзян (печать)

22 августа 2017 г.

1191847024

公 证 书

(2017)浙甬天证外字第 4413 号

申请人：宁波冠克贸易有限公司，统一社会信用代码：
91330212796017931M，住所：宁波市鄞州区启明路 818 号 12 幢 93
号。

法定代表人：胡永祥，男，一九七七年十一月三十日出生，
公民身份号码：330205197711304213。

公证事项：译本与原本相符

兹证明前面的 (2017) 浙甬天证外字第 4412 号《公证书》的
俄文译本内容与该公证书中文原本相符。

中华人民共和国浙江省宁波市天一公证处

公 证 员

林宇霖

二〇一七年八月二十二日



1191847025

НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ

(2017) Чжэ Юн Тянь Чжэн Вай Цзы № 4413

Заявительница: Нинбо Грейткеа Трэйдинг Ко Лтд

Единый общественный кредитный код: 91330212796017931M

Местонахождение: г. Нинбо, р.Иньчжоу, ул.Цимин, д.818, корпус 12, № 93.

Представитель юридического лица: Ху Юн Сян, муж., дата рождения: 30.11.1977г., номер удостоверения личности: 330205197711304213.

Нотариальный предмет: соответствие русского перевода тексту на китайском языке

Данный нотариальный акт настоящим удостоверяет, что содержание русского перевода предыдущего «Нотариального акта» за номером (2017)Чжэ.Юн.Тянь.Чжэн.Вай.Цзы. № 4412 соответствует содержанию подлинника документа на китайском языке.

Нотариальная контора «ТЯНЬИ» г. Нинбо пров. Чжэцзян КНР

Нотариус: Линь Нинцзи (подпись)

Нотариальная контора «ТЯНЬИ» г. Нинбо пров. Чжэцзян (печать)

22 августа 2017 г.

191847026

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нотариальная контора «Тяньи» г. Нинбо провинции Чжэцзян КНР

Должность: Генеральный директор

Имя:

Подпись: Ху Юн Сян

Дата: 22 августа 2017

Печать: «Нинбо Грейткэа Трэйдинг Ко., Лтд.
3302040041606

Перевод с китайского и английского языков на русский выполнил переводчик Чечеткин Сергей Владимирович.

 Чечеткин Сергей Владимирович

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 206 листов
Нотариус _____



Российская Федерация

Город Москва

Тридцать первого августа две тысячи семнадцатого года

Я, Романова Мария Вячеславовна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чечеткина Сергея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № **3-3695**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб 700 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб 800 коп.

М.В. Романова

