

3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

3.1. Конструктивное оформление прибора показано на рисунке 2.



Рис.2. Внешний вид прибора.

3.2. На передней панели расположены:

- гнездо для измерительной кюветы;
- индикатор включения прибора;
- индикатор состояния термостата;
- индикатор готовности прибора.

3.3. На задней панели расположены:

- разъем для подключения соединительного кабеля;
- разъем для подключения сетевого кабеля;
- два гнезда для предохранителей.

3.4. На правой боковой поверхности прибора расположен сетевой выключатель прибора. Электропитание осуществляется от сети напряжением $220\text{В} \pm 22\text{В}$, 50 Гц.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Спермоанализатор (далее прибор) модели АФС-500 может поставляться как в комплекте с ПЭВМ и принтером, так и без них. Комплект поставки прибора без ПЭВМ:

- измерительный блок - 1
- кювета плоская фигурная – 2
- покровное стекло – 4