


директора филиала НТЦ А

« 02 »

2024 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1

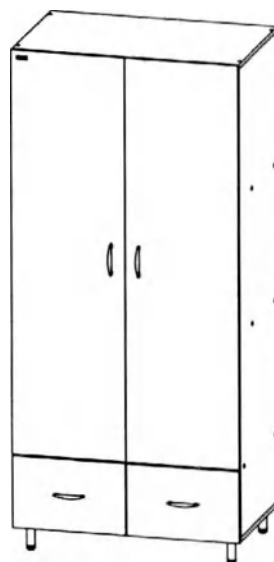

Условные обозначения:

1. А-Ч : детали

2. 1 - 27 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 24 : этапы сборки

Код 510

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Полка малая	5
Г	Перегородка ящиков	1
Д	Полка межъярусная	1
Е	Крышка	1
Ж	Основание	1
З	Полка основная	2
И	Дверь левая	1
К	Дверь правая	1
Л	Фасад левой выдвижного ящика	1
М	Фасад правой выдвижного ящика	1
Н	Стенка левая выдвижного ящика	2
О	Стенка правая выдвижного ящика	2
П	Стенка задняя выдвижного ящика	2
Р	Дно выдвижного ящика	2
С	Стенка задняя	2
Т	Основание поворотной полки	6
У	Основание накладной полки	6
Ф	Полка навесная	54
Х	Планка	54
Ц	Стенка задняя малая	1
Ч	Логотип компании	1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1



1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	24	Саморез 3,5x13	
2	32	Конфирмат 6,4x50	
3	68	Саморез 4x16	
4	9	Саморез с прессшайбой 4,2x14	
5	36	Саморез с прессшайбой 4,2x19	
6	24	Винт М4x35	
7	16	Винт М4x25	
8	40	Гайка М4	
9	48	Шайба 4 мм	
10*	1	Ключ шестигранный Z=4	
11	1	Брус соединительный	
12	20	Полко - держатель	
13	18	Заглушка для конфирмата	


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1

2

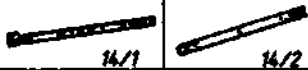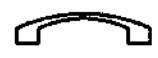Арт.	Кол - во	Обозначение	
14	2 комплекта	Направляющая роликовая	
15	37	Гвоздь 1,6x25	
16	8	Петля Slide-on специальная (90/175) накладная	
17	4	Ножка мебельная	
18	32	Шкант мебельный 6x30	
19	12	Петля Г-образная	
20	12	Кронштейн петли Г-образной	
21	12	Ось	
22	8	Винт полусфера с прессшайбой М4х20	
23	8	Эксцентрик 16мм	
24	8	Шток эксцентрика	
25	8	Заглушка эксцентрика	
26	4	Ручка мебельная	
27	16	Шайба 4 мм	

* Конфирматы [2] закручивать ключом шестигранником [10] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.


Схема сборки изделия

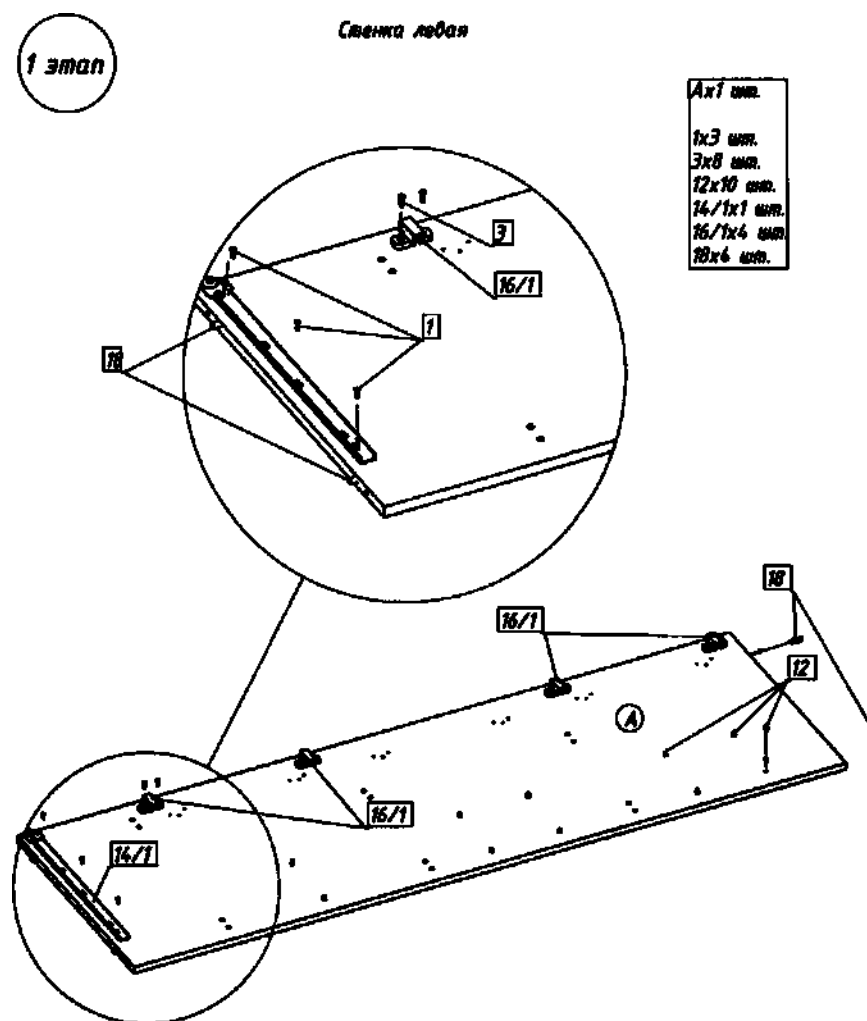


2 этап

Стенка правая

6x1 шт.
1x3 шт.
3x8 шт.
12x10 шт.
14/1x1 шт.
16/1x4 шт.
18x4 шт.

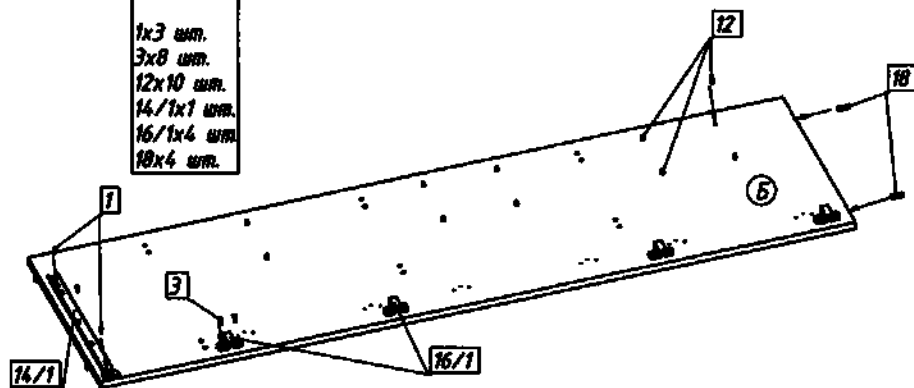


3 этап

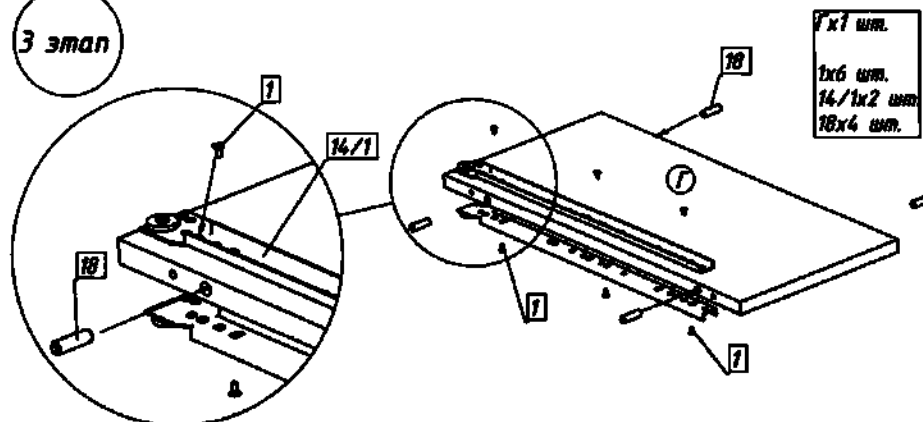

1x1 шт.
1x6 шт.
14/1x2 шт.
18x4 шт.

4 этап


Произведите сборку
полки междурусной и
полок основных

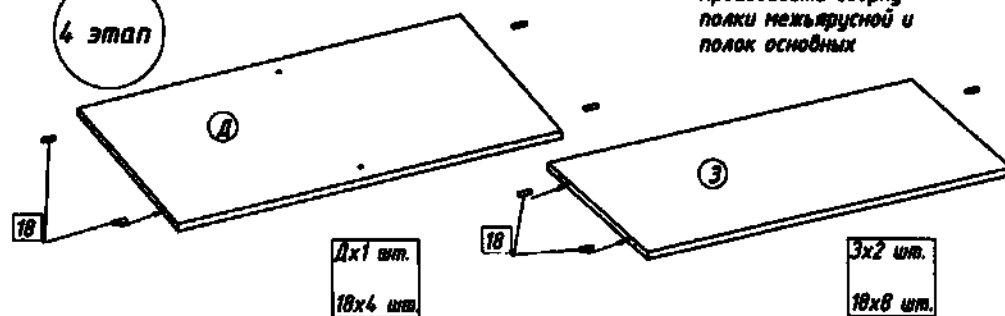

4x1 шт.
18x4 шт.


3x2 шт.
18x8 шт.

5 этап

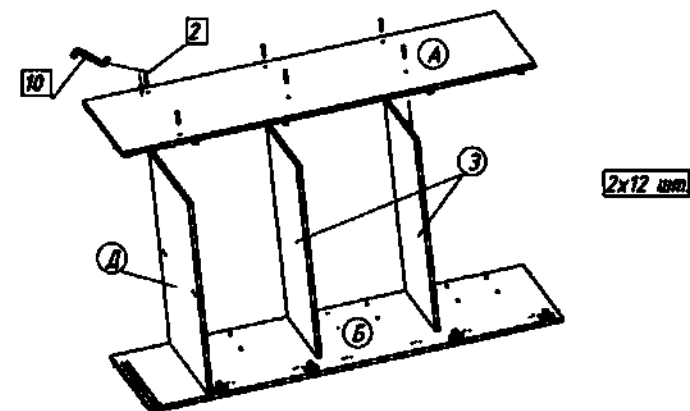


2x12 шт.

6 этап

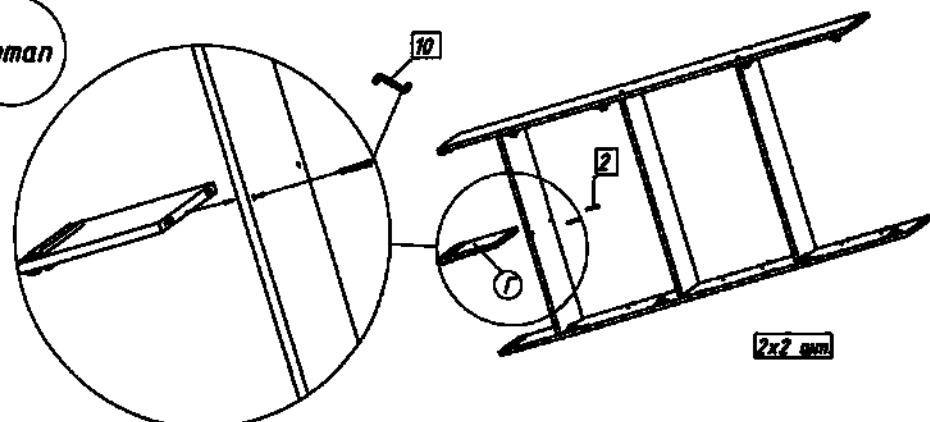

2x2 шт.


7 этап

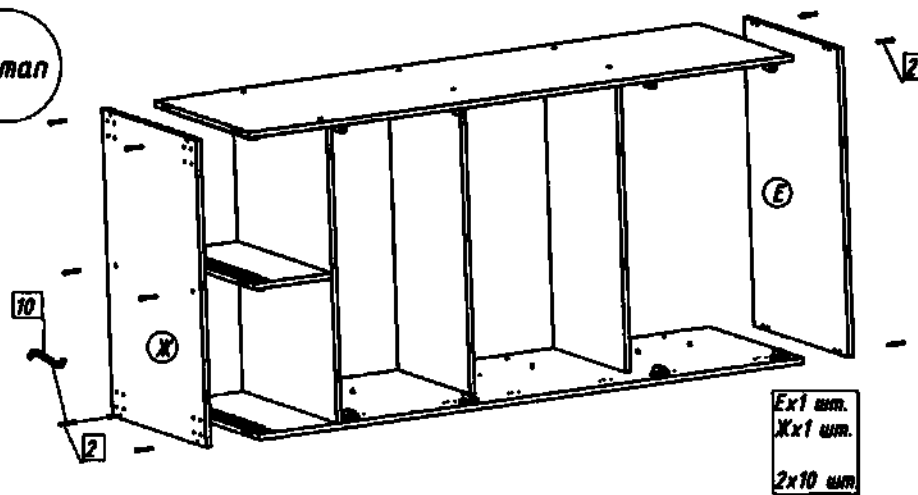

6x1 шт.
1x1 шт.
2x10 шт.


ОМ № 29.483.03

8 этап


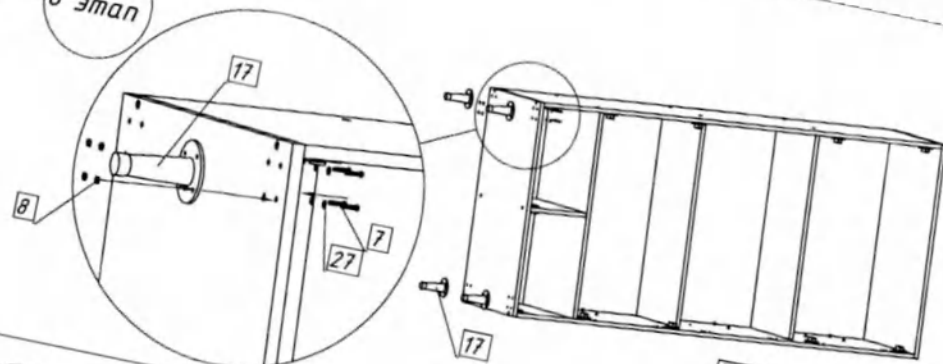


7x16 шт.
8x16 шт.
17x4 шт.
27x16 шт.

9 этап

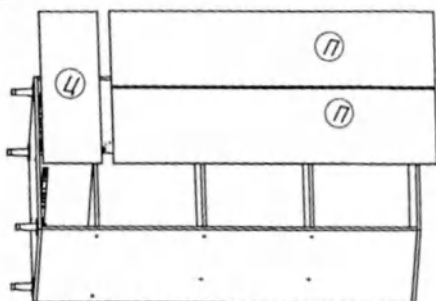

17x2 шт.
17x2 шт.
4x9 шт.
11x1 шт.
15x37 шт.

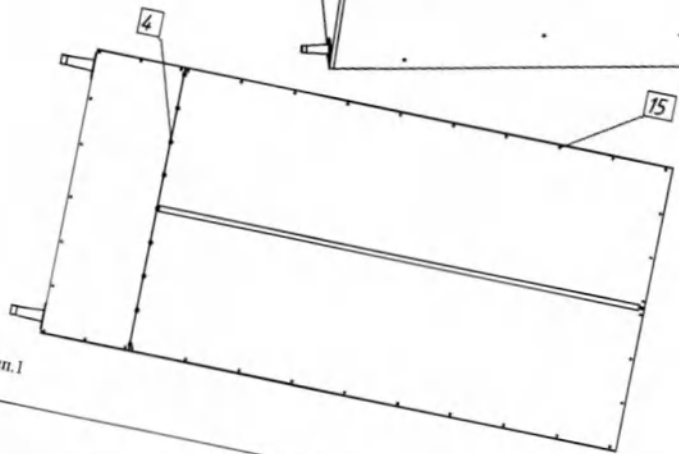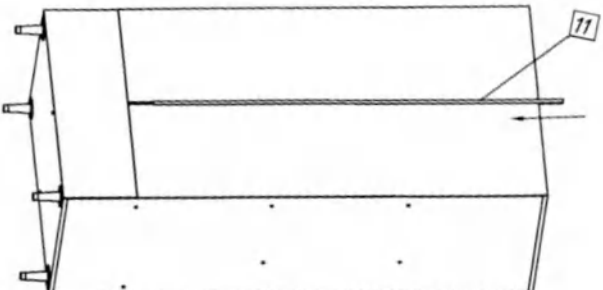


ШМФ-02-"ЕЛІАТ" исп. I

ОМ № 29.483.03

10 этап


Левая дверь шкафа

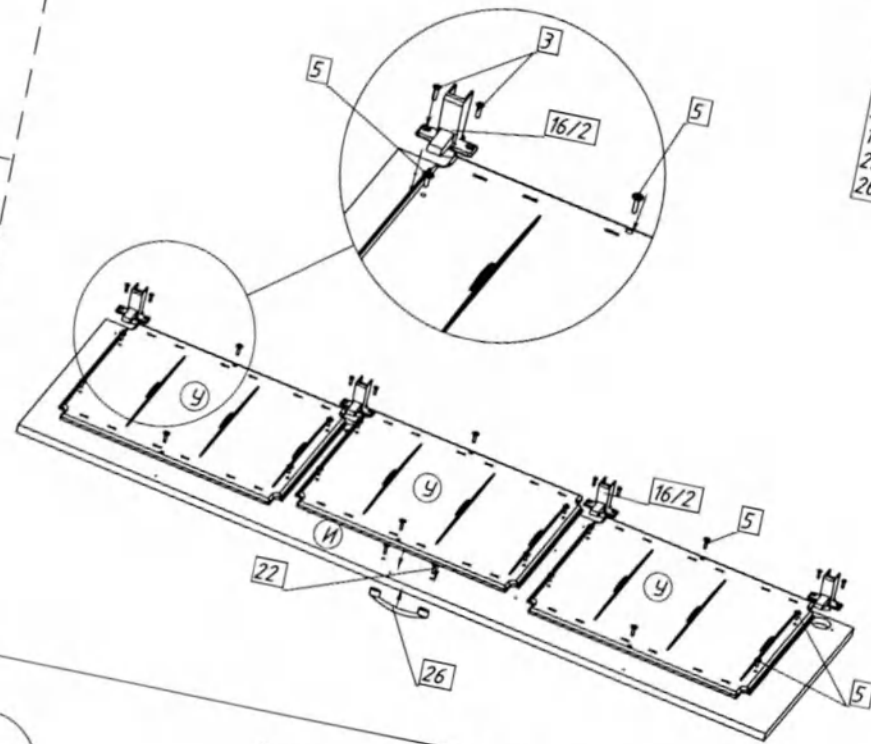

11x1 шт.
4x3 шт.
3x8 шт.
5x18 шт.
16/2x4 шт.
22x2 шт.
26x1 шт.

11 этап

Правая дверь шкафа

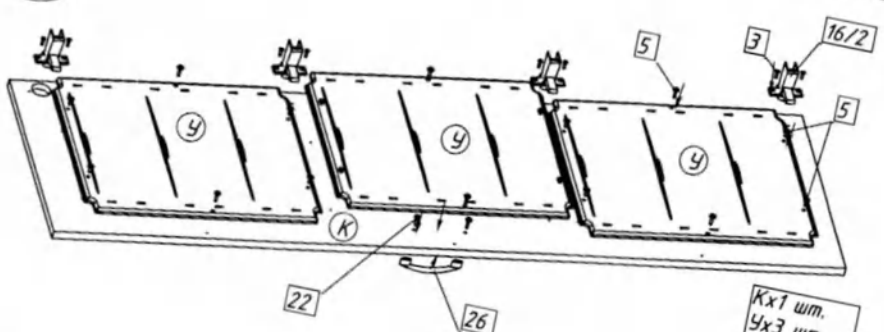

11x1 шт.
4x3 шт.
3x8 шт.
5x18 шт.
16/2x4 шт.
22x2 шт.
26x1 шт.


7

ШМФ-02-"ЕЛІАТ" исп. I

8

12 этап


Полка поворотная

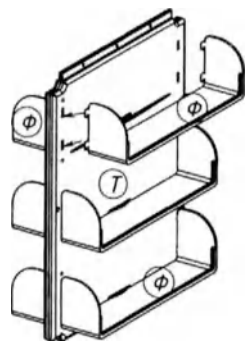

1х6 шт.
Фх36 шт.


Соберите 6 полок.

13 этап

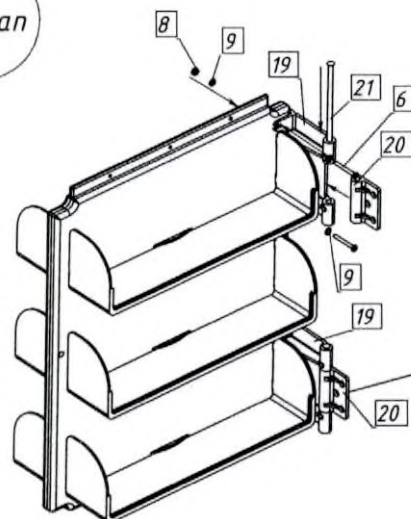

Установите петли на
три поворотные полки.


Вид сзади

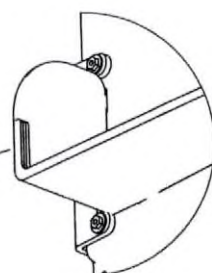

6х12 шт.
8х12 шт.
9х24 шт.
19х6 шт.
20х6 шт.
21х6 шт.

14 этап

Полка поворотная левая

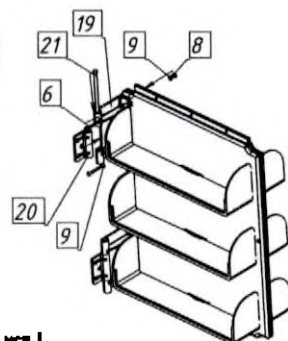


6х12 шт.
8х12 шт.
9х24 шт.
19х6 шт.
20х6 шт.
21х6 шт.

Установите петли на
три поворотные полки.


15 этап

Установите 5 полок.

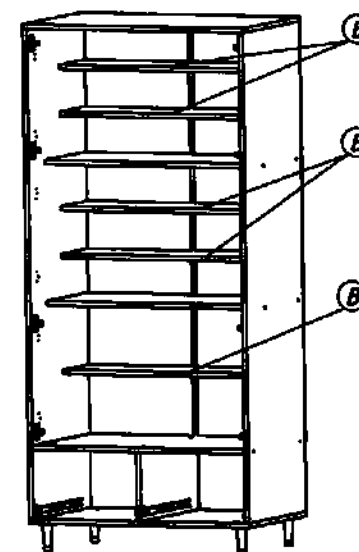

8х5 шт.

16 этап

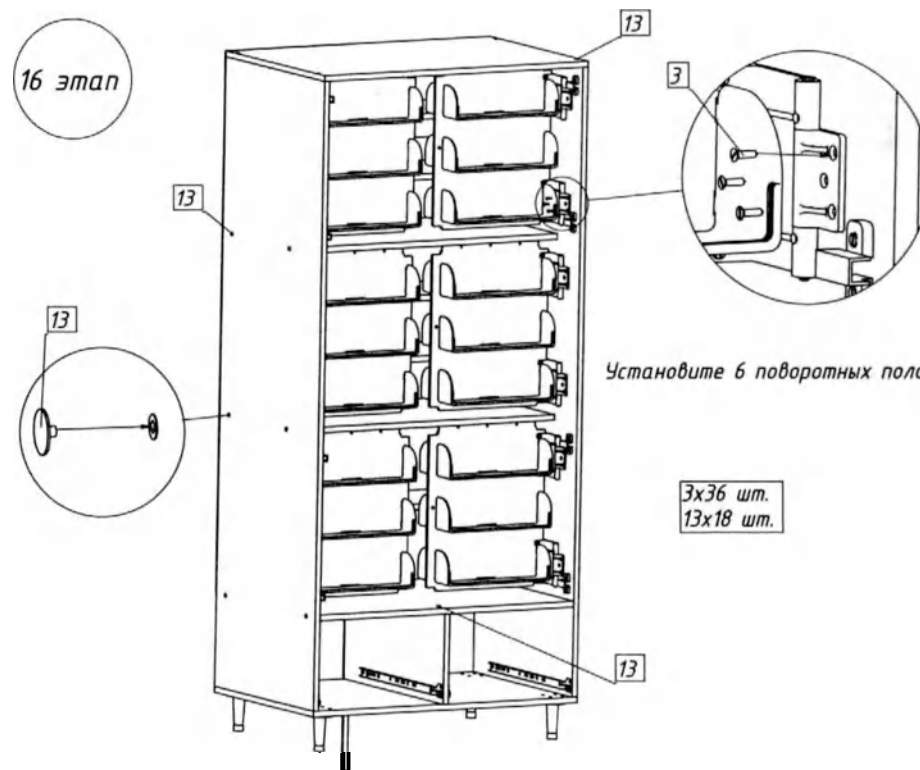


Установите 6 поворотных полок.

3х36 шт.
13х18 шт.


ОМ № 29.483.03

17 этап

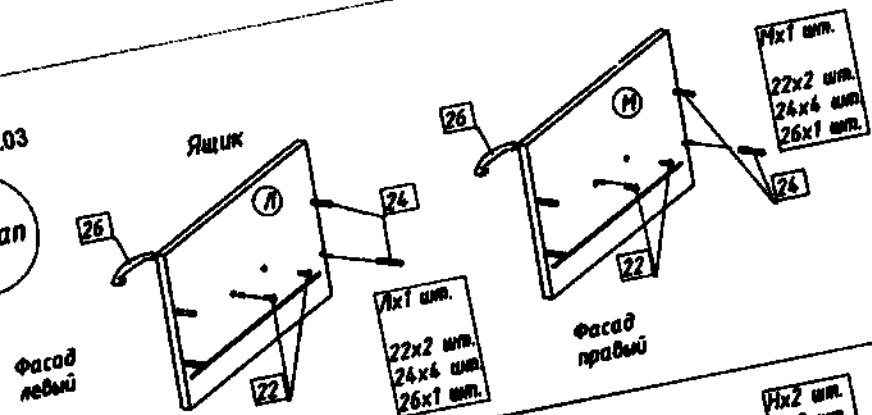


ОМ № 29.483.03

20 этап

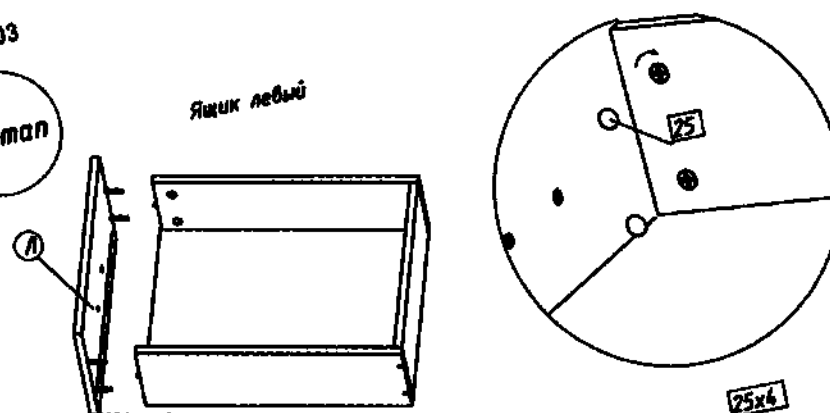


18 этап

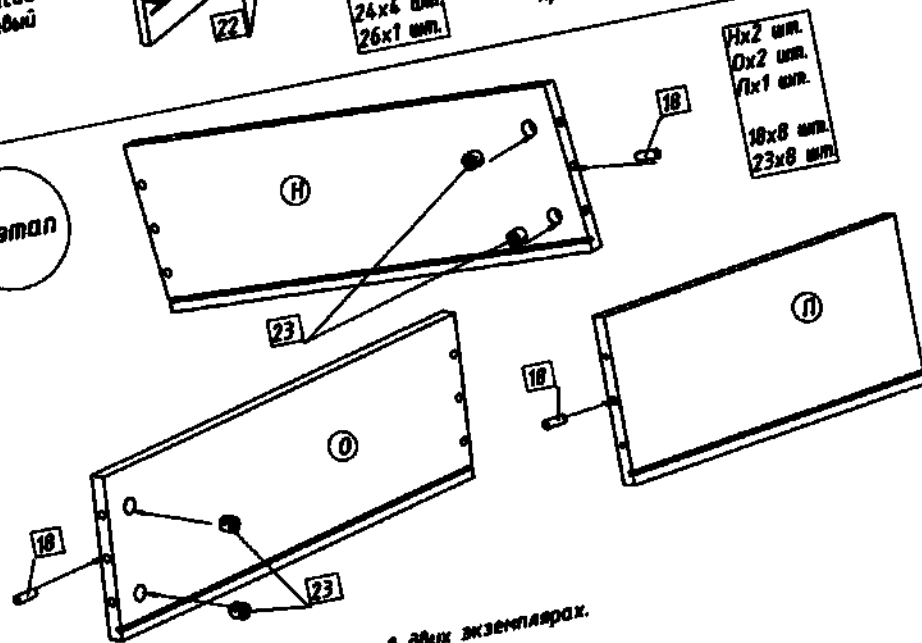

Соберите каждую стенку в двух экземплярах.

19 этап

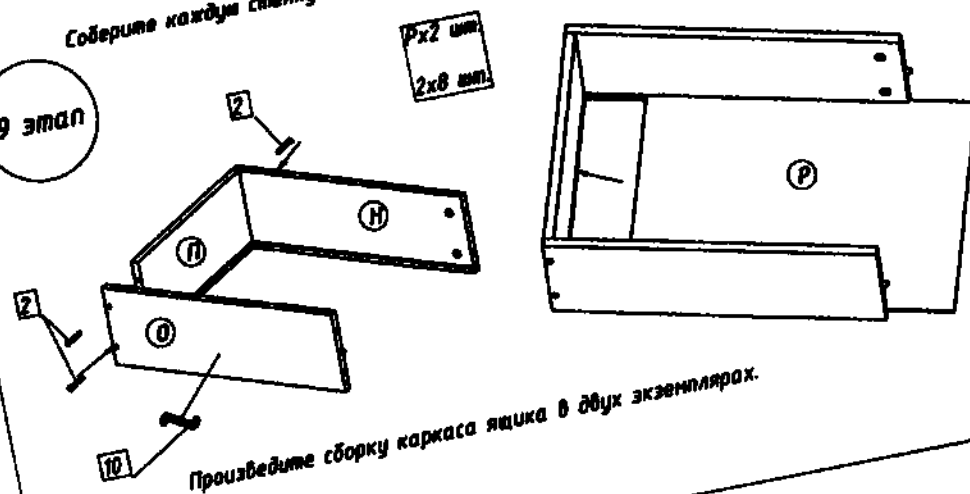


Произведите сборку каркаса ящика в двух экземплярах.

ШМФ-02-“ЕЛАТ” исп.1

21 этап

Соберите два ящика

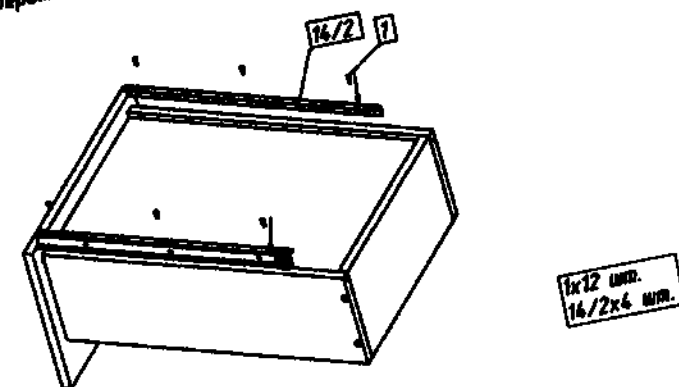


ШМФ-02-“ЕЛАТ” исп.1

11


12

22 этап

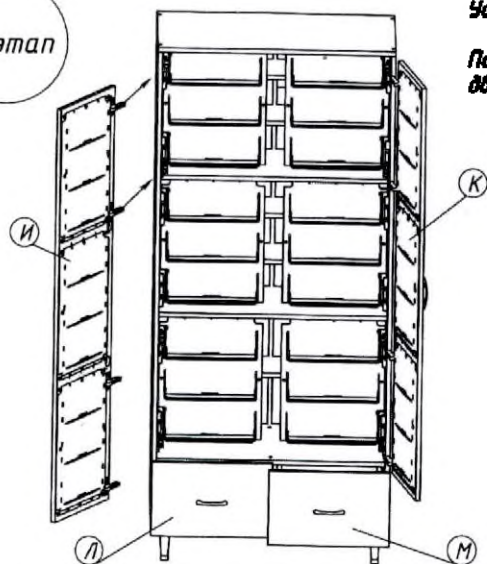


Установите двери и ящики.

После установки дверей произведите регулировку петель.

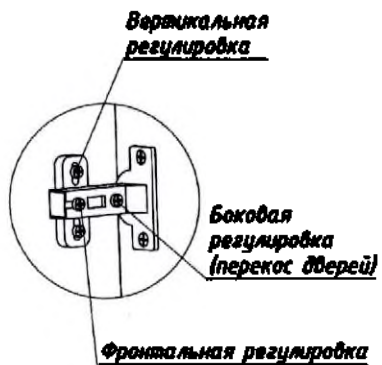

23 этап

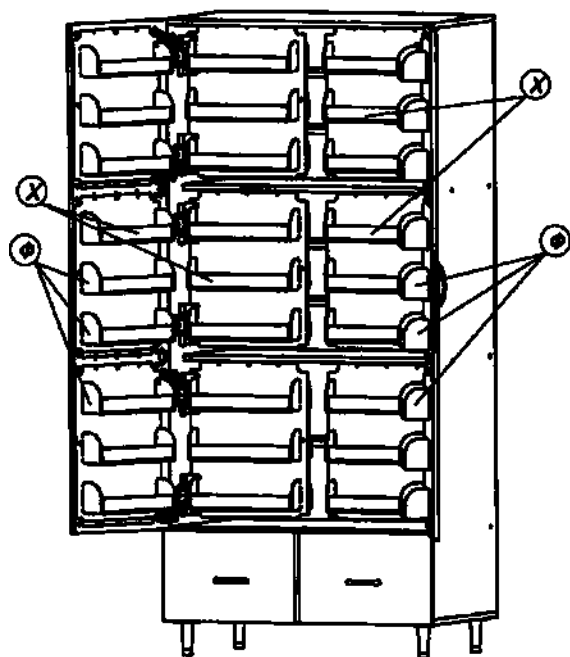

Фх18 шт.
Хх54 шт.




ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1

13

24 этап

После сборки и установки, произведите установку логотипа компании ④


④х1 шт.

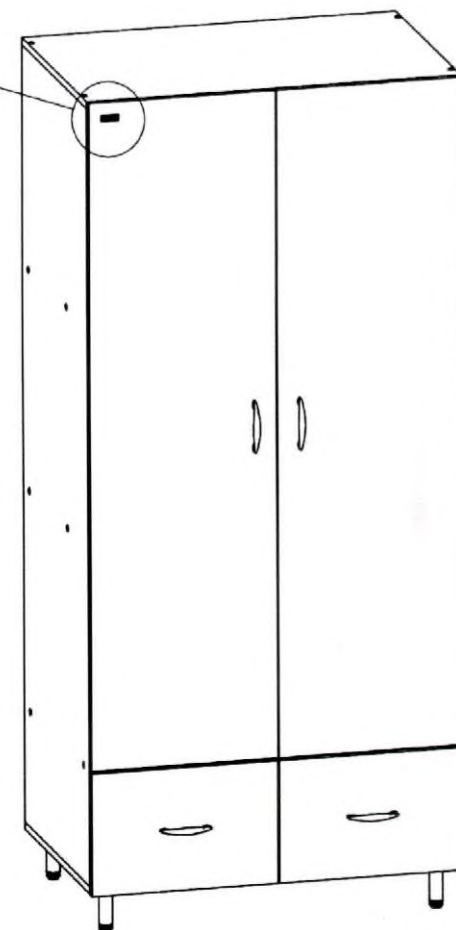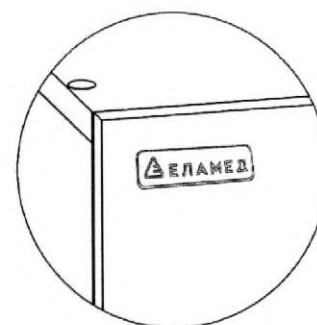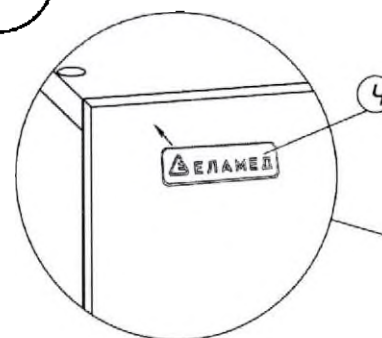

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1

14

Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.2

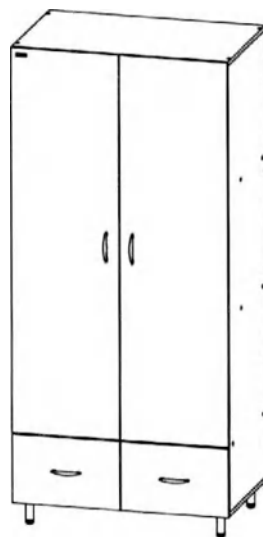

Условные обозначения:

1 А-Я : детали

2 1 - 33 : крепёж и фурнитура

3 1 - 29 : этапы сборки

Код 514

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Полка малая	3
Г	Перегородка ящиков	1
Д	Перегородка межъярцкая	1
Е	Корышка	1
Ж	Основание	1
З	Полка встроенного ящика	2
И	Дверь левая	1
К	Дверь правая	1
Л	Фасад выдвижного ящика левой	1
М	Фасад выдвижного ящика правой	1
Н	Боковина выд. ящика левая	2
О	Боковина выд. ящика правая	2
П	Стенка задняя выдвижного ящика	2
Р	Дно выдвижного ящика	2
С	Стенка задняя встроенного ящика	1
Т	Основание поворотной полки	4
У	Основание накладной полки	6
Ф	Навесная полка	42
Х	Планка	42
Ц	Полка	1
Ч	Дверь левая встроенного ящика	1
Ш	Дверь правая встроенного ящика	1
Щ	Перегородка встроенного ящика	1
Э	Стенка шкафа задняя	2
Ю	Стенка шкафа задняя	1
Я	Логотип компании	1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.2




1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	24	Саморез 3,5x13	
2	40	Конфирмат 6,4x50	
3	80	Саморез 4x16	
4	9	Саморез с прессшайбой 4,2x14	
5	36	Саморез с прессшайбой 4,2x19	
6	16	Винт М4х35	
7	16	Винт М4х25	
8	32	Гайка М4	
9	32	Шайба 4	
10	4	Петля Slide-on стандартная (90x110) вкладная	33/1 33/2
11	16	Шайба 4 (увеличенная)	
12	20	Полкодержатель	
13	26	Заглушка для конфирмата	


ШМФ - 02- «ЕЛАТ» исп.2

2

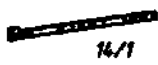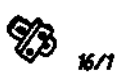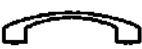Арт.	Кол - во	Обозначение	
14	2 комплект	Направляющая роликовая	 14/1  14/2
15	49	Гвоздь 1,6x25	
16	8	Петля Slide-on специальная (90/175) накладная	 16/1  16/2
17	4	Ножка мебельная	
18	32	Шкант мебельный 8x30	
19	8	Петля Г-образная	
20	8	Кронштейн петли Г-образной	
21	8	Ось	
22	10	Винт полусфера с прессшайбой М4х20	
23	8	Эксцентрик 16мм	
24	8	Шток эксцентрика	
25	8	Заглушка эксцентрика	
26	4	Ручка мебельная	
27	1	Брус соединительный	

Арт.	Кол - во	Обозначение	
28	2	Замок	
29 *	1	Ключ шестигранный Z=4	
30	8	Саморез 3x20	
31	2	Ручка C0760	
32	4	Саморез 3x12	
33	2	Ответная планка замка	

* Конфирматы 28 закручивать ключом шестигранным 29 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.

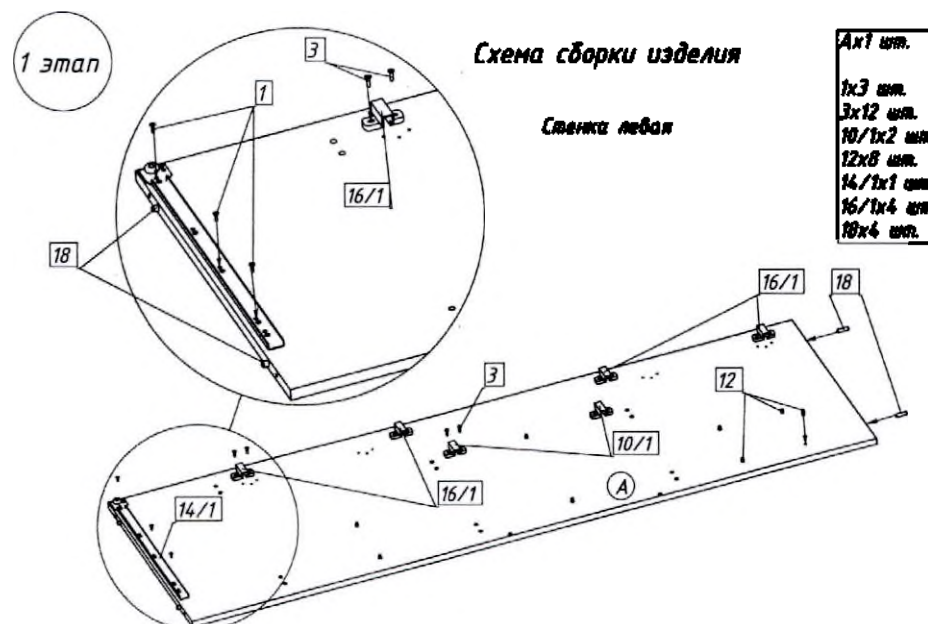


ОМ № 29.485.03


2 этап

5x1 шт.
1x3 шт.
3x12 шт.
10/1x2 шт.
12x8 шт.
14/1x1 шт.
16/1x4 шт.
18x4 шт.

Стенка правая

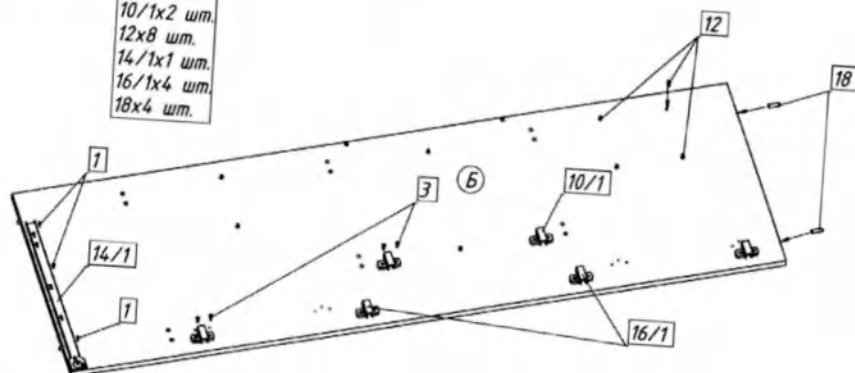


3 этап

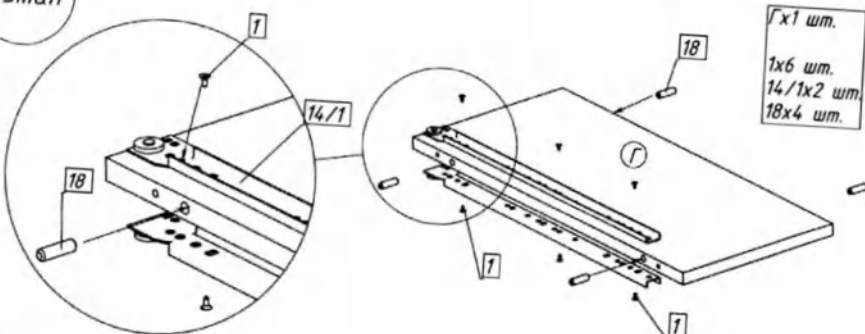

4 этап


Произведите сборку полок.

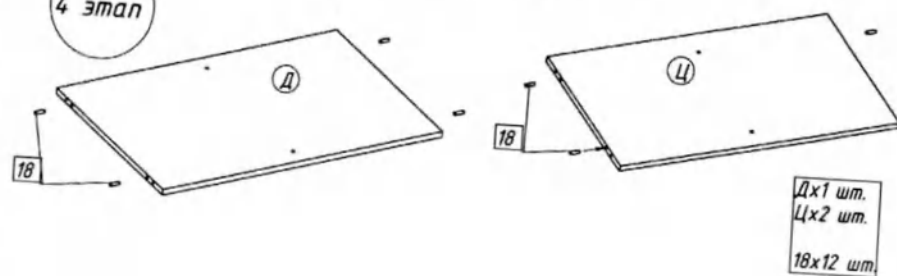


ШМФ - 02- "ЕЛАТ" уч.2

ОМ № 29.485.03


5 этап

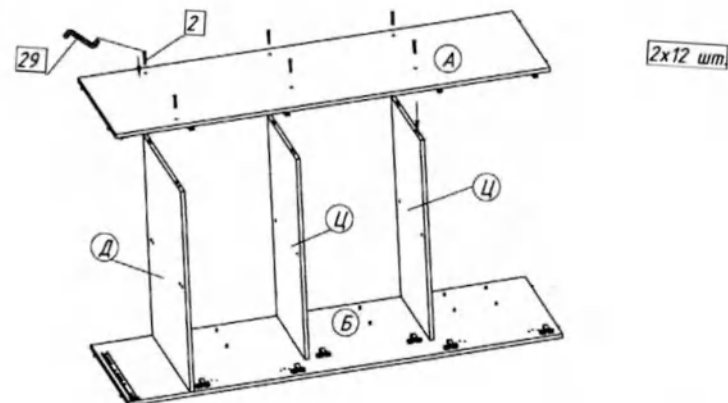

6 этап

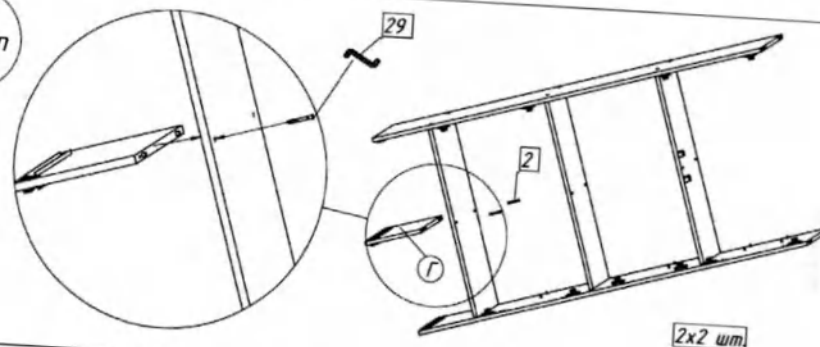

7 этап

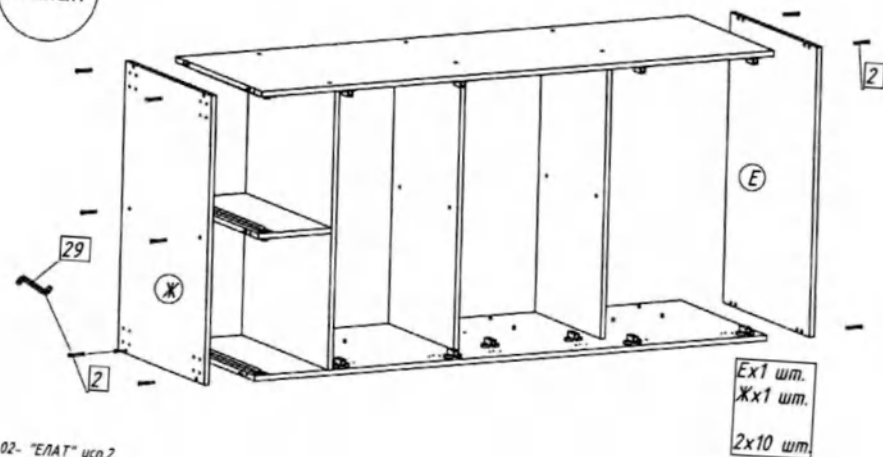


5


ШМФ - 02- "ЕЛАТ" уч.2

6

8 этап

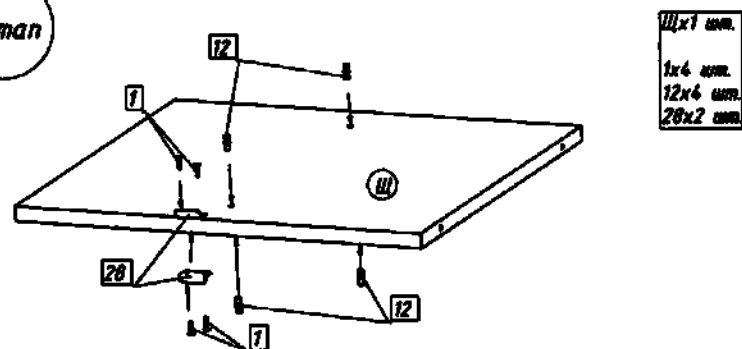


11 этап

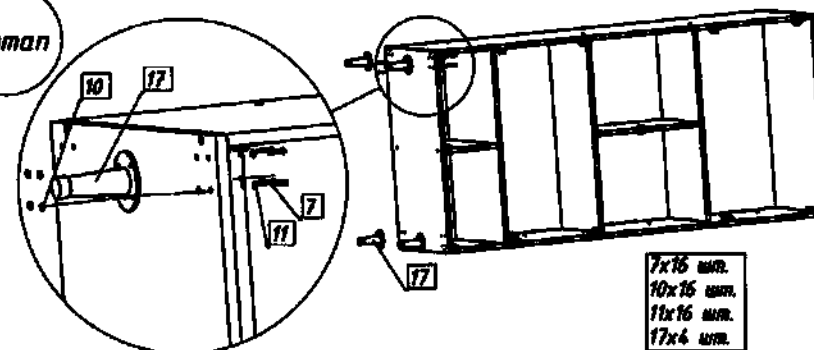


9 этап

2x4 мм

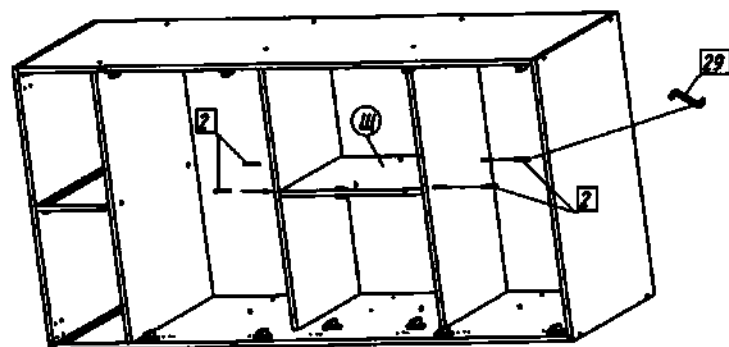


12 этап

3x2 мм.
10x2 мм.
4x9 мм.
15x49 мм.
27x1 мм.
28x1 мм.

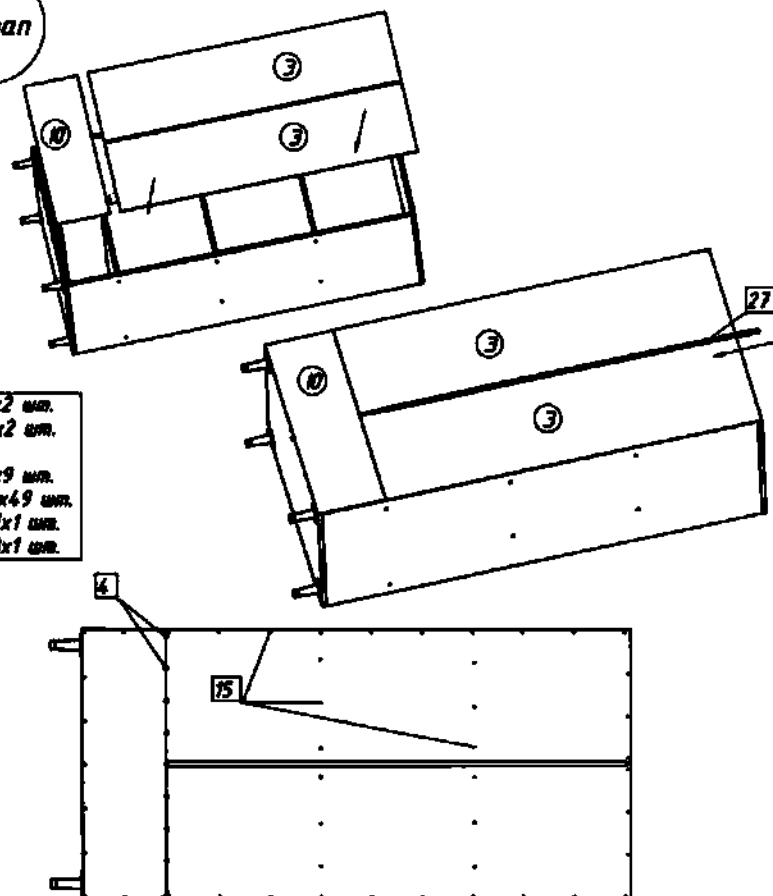


10 этап

2x4 мм

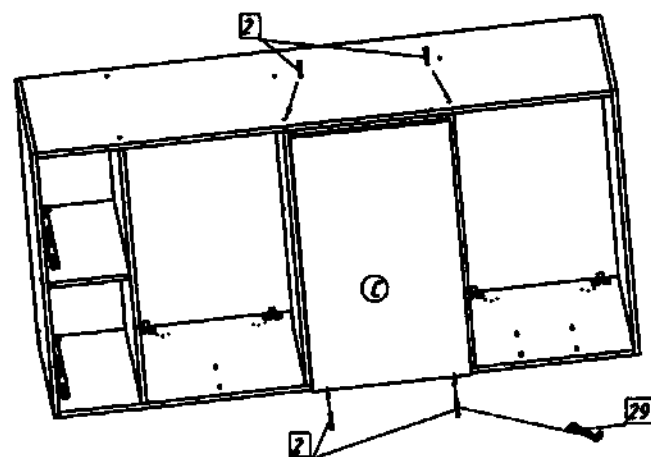

Левая дверь шкафа


13 этап

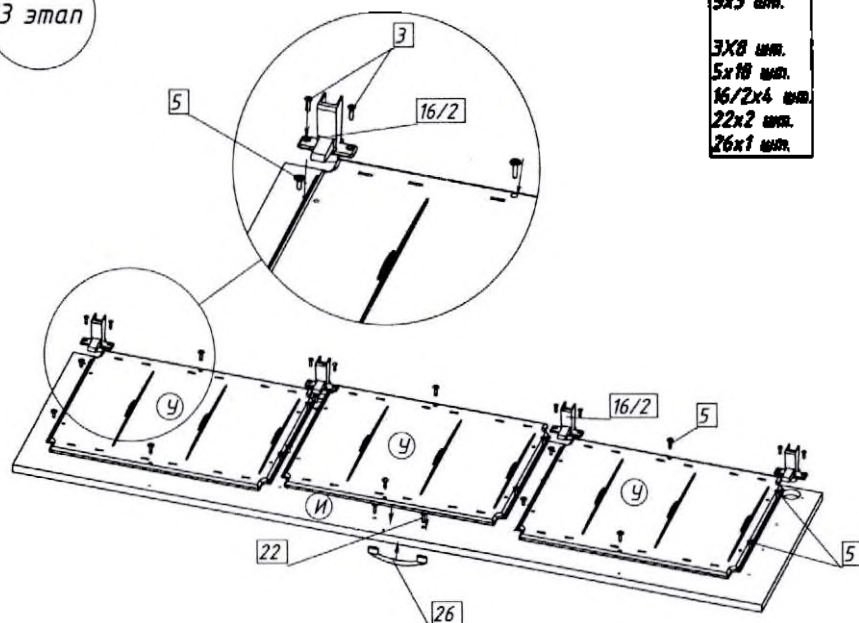

4x1 шт.
4x3 шт.
3x8 шт.
5x18 шт.
16/2x4 шт.
22x2 шт.
26x1 шт.

14 этап

Правая дверь шкафа

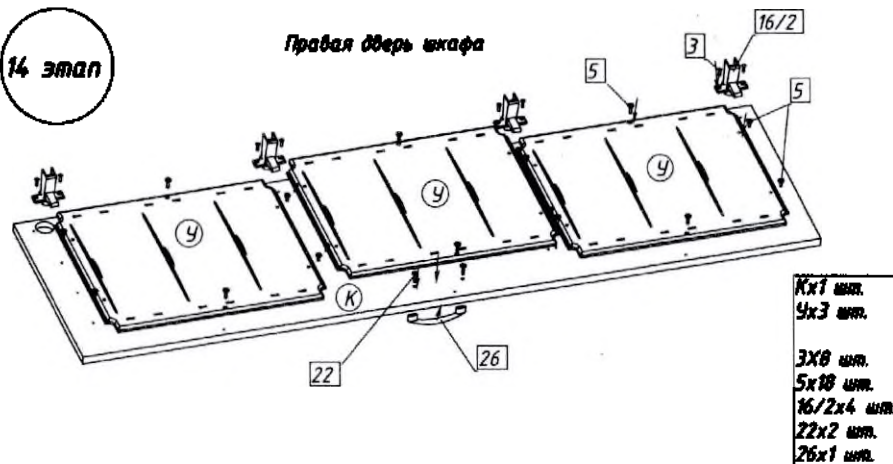


4x1 шт.
4x3 шт.
3x8 шт.
5x18 шт.
16/2x4 шт.
22x2 шт.
26x1 шт.

ШЧФ - 02- "САЛ" ил.2

15 этап

Полка поворотная

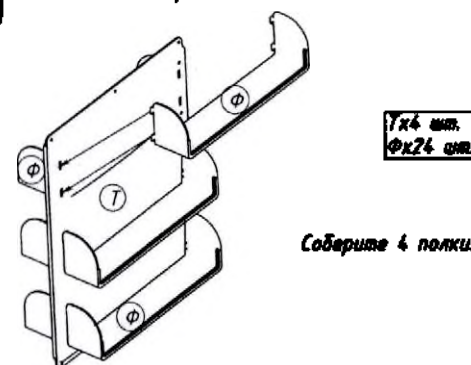


7x4 шт.
Фх24 шт.

Соберите 4 полки.

16 этап

Полка поворотная правая

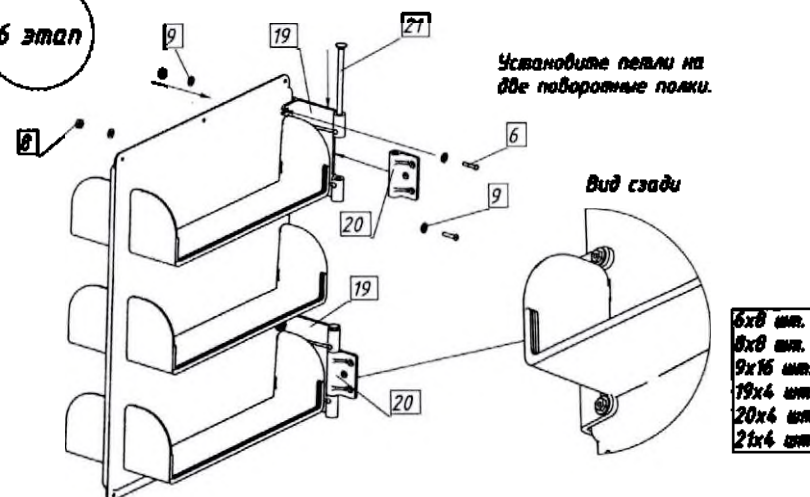


Установите петли на две поворотные полки.

Вид сзади

6x8 шт.
8x8 шт.
9x16 шт.
19x4 шт.
20x4 шт.
21x4 шт.

17 этап

Полка поворотная левая

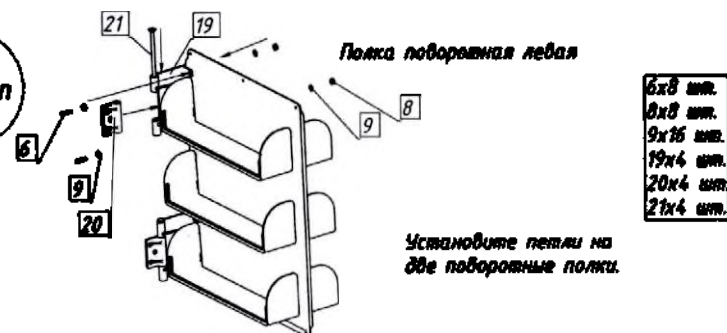


Установите петли на две поворотные полки.

6x8 шт.
8x8 шт.
9x16 шт.
19x4 шт.
20x4 шт.
21x4 шт.

ШЧФ - 02- "САЛ" ил.2

18 этап


Соберите левую дверь встроенного ящика.

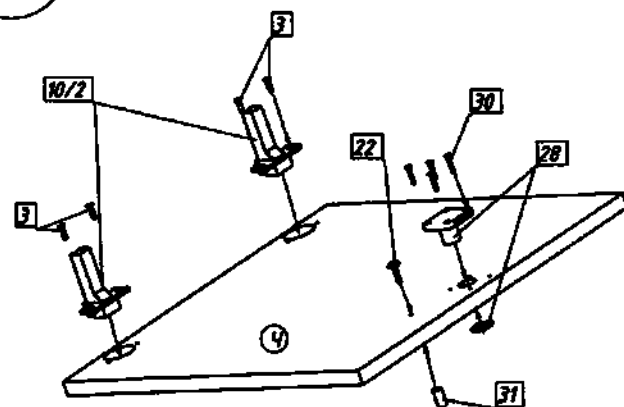

4x1 шт.
3x4 шт.
10/2x2 шт.
22x1 шт.
28x1 шт.
30x4 шт.
31x1 шт.

19 этап


Соберите правую дверь встроенного ящика.

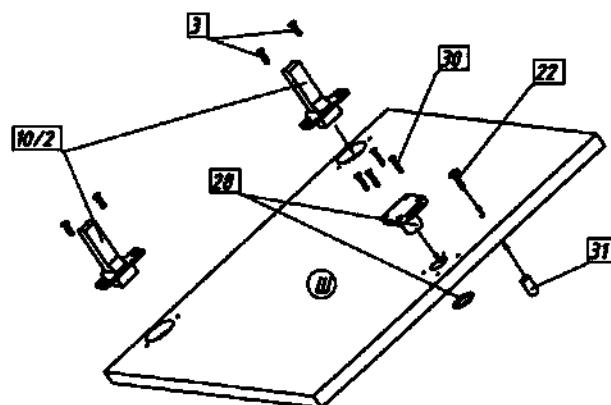

4x1 шт.
3x4 шт.
10/2x2 шт.
22x1 шт.
28x1 шт.
30x4 шт.
31x1 шт.


20 этап

Установите 5 полок.

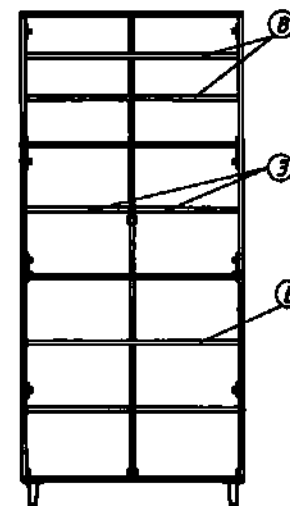

8x3 шт.
3x2 шт.

21 этап

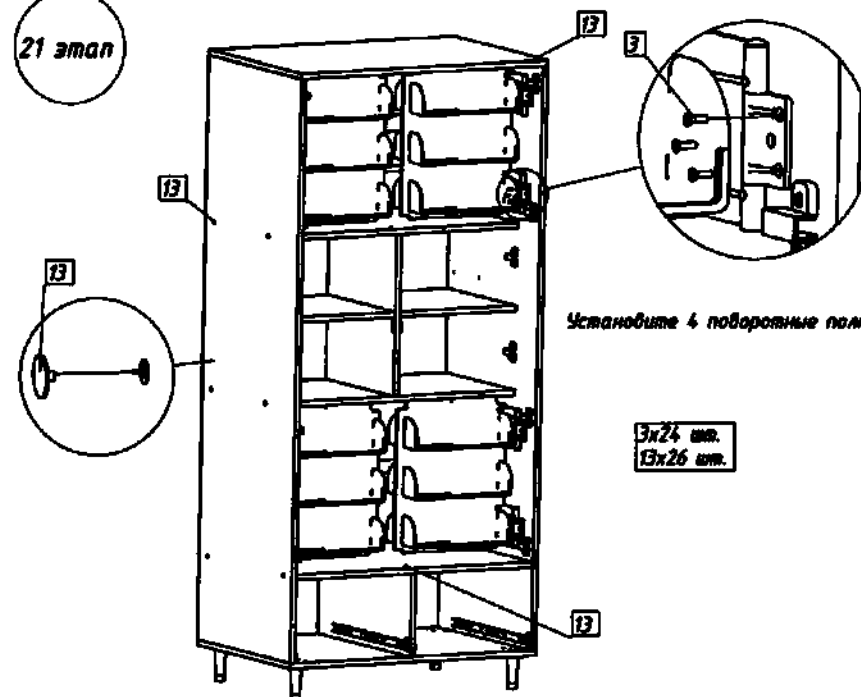


Установите 4 поворотные полки.


3x24 шт.
13x26 шт.

Установите двери встроенного ящика

27 этап

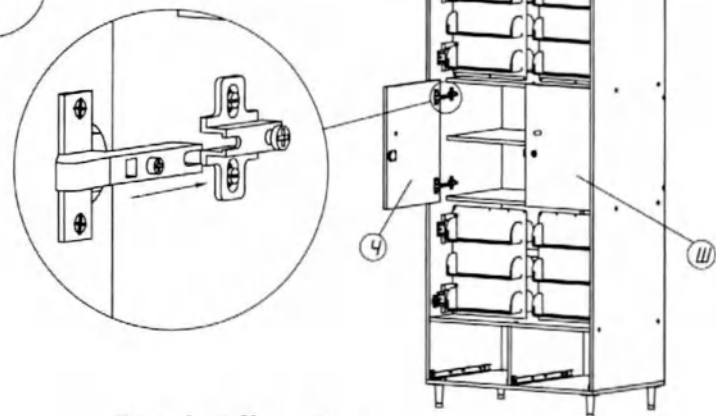


Установите двери и ящики.

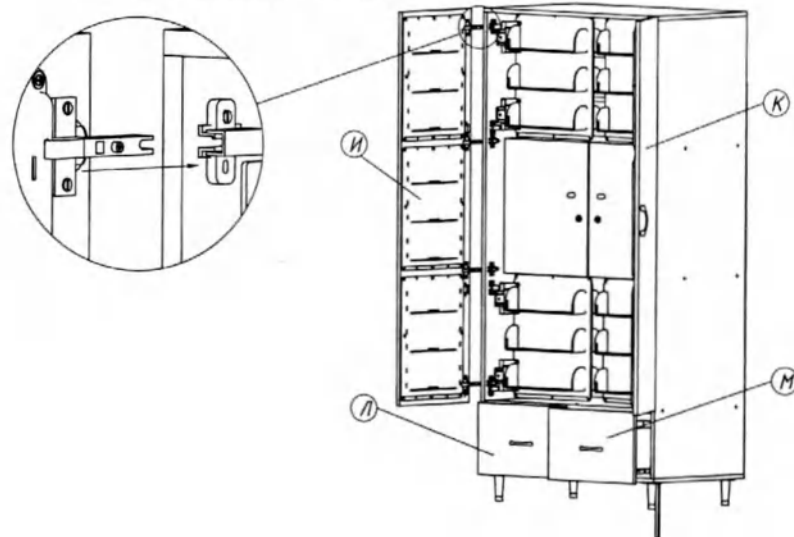

После установки
дверей произведите регулировку петель


Фронтальная регулировка

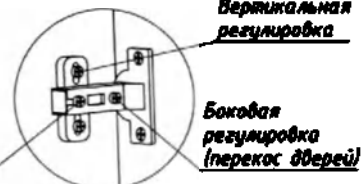

Шифр - 02- "ЕЛАН" ил.2


28 этап

ФхШ мм.
Хх42 мм

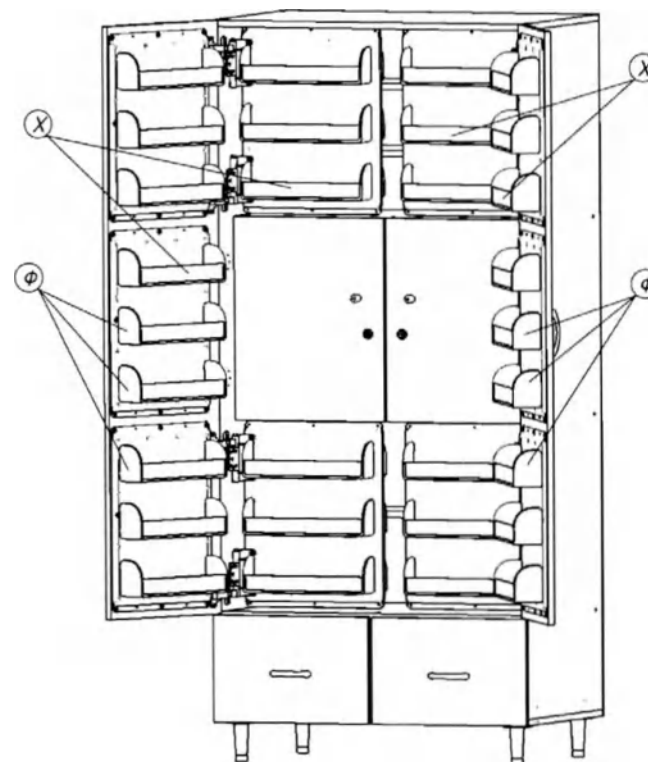

Шифр - 02- "ЕЛАН" ил.2


29 этап

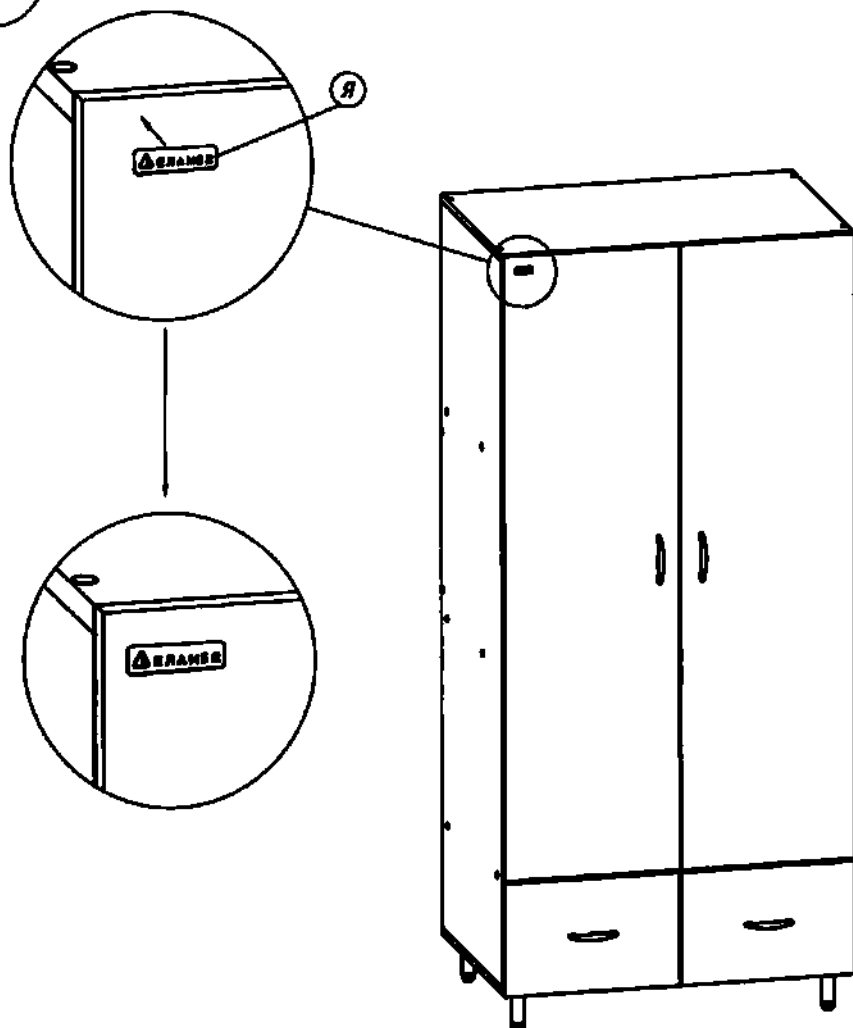

Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-"ЕЛАТ" исп.3



Условные обозначения:



1. А-Э : детали
2. 1 - 35 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 21 : этапы сборки

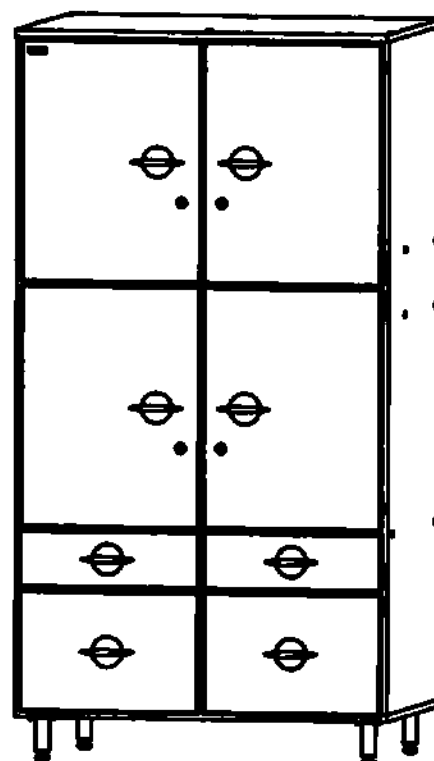Детали


№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Стенка задняя	2
Г	Перегородка	1
Д	Крышка	1
Е	Основание	1
Ж	Стенка средняя	1
З	Крышка встроенного ящика	1
И	Дверка встроенного ящика	1
К	Дверь правая	2
Л	Дверь левая	2
М	Ящик малый	2
Н	Ящик большой	2
О	Фасад ящика малого	2
П	Фасад ящика большого	2
Р	Полка навесная	30
С	Планка	30
Т	Перегородка межъярусная левая	1
У	Перегородка межъярусная правая	1
Ф	Полка основная правая верхняя	1
Х	Полка основная правая нижняя	1
Ц	Основание поворотной полки	3
Ч	Стенка задняя встроенного ящика	1
Ш	Основание встроенного ящика	1
Щ	Полка малая	7
Э	Логотип компании	1

Крепёж и фурнитура

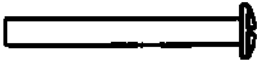
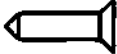
Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	40	Саморез 3,5x13	
2	32	Конфирмат 6,4x50	
3	42	Шкант мебельный 8x30	
4	28	Гайка М4	
5	16	Шайба 4 мм (увеличенная)	
6	26	Заглушка для конфирмата	
7	28	Полкодержатель	
8	16	Винт М4х25	
9	26	Саморез 4x16	
10	8	Скоба петли	
11	4	Ножка мебельная	
12	4 комплекта	Направляющая роликовая	 12/1  12/2
13	8	Ось петли	
14	1	Замок	

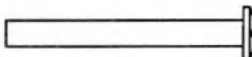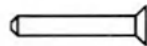Арт.	Кол - во	Обозначение	
15.	2	Петля Slide-on стандартная (90/110) вкладная	 15/1  15/2
16.	1	Ручка C0760	
17.*	1	Ключ шестигранный Z=4	
18.	4	Ручка мебельная	
19.	5	Ответная планка замка	
20.	16	Саморез 4,5x16	
21.	24	Заглушка самоклеющаяся	
22.	12	Винт М4х35	
23.	4	Саморез 3x20	
24.	10	Саморез 3x12	
25.	12	Шток эксцентрика	
26.	12	Эксцентрик 16мм	
27.	8	Заглушка эксцентрика	
28.	16	Саморез с прессшайбой 4,2x14	
29.	48	Гвоздь	
30.	6	Петля Г-образная	
31.	6	Кронштейн петли Г-образной	
32.	6	Ось	

ОМ 29.487.02

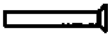Арт.	Кол - во	Обозначение	
33	24	Шайба 4 мм	
34	8	Винт М4х30	
35	1	Винт полусфера с прессшайбой М4х20	


* Конфирматы **2** закручивать ключом шестигранником **17** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.

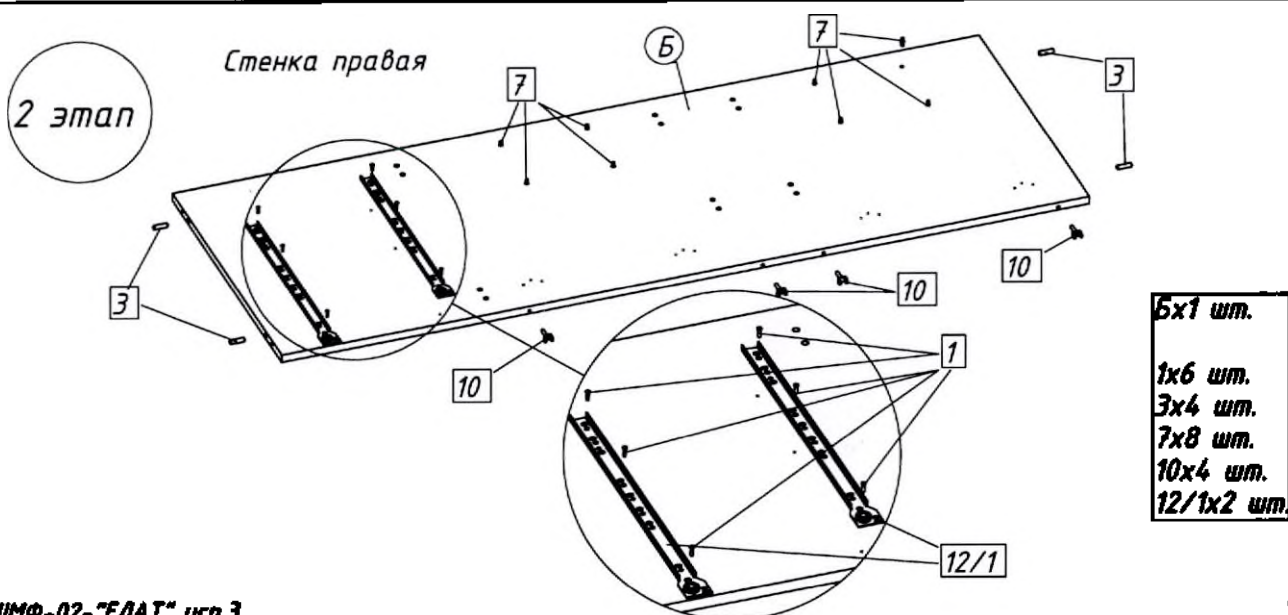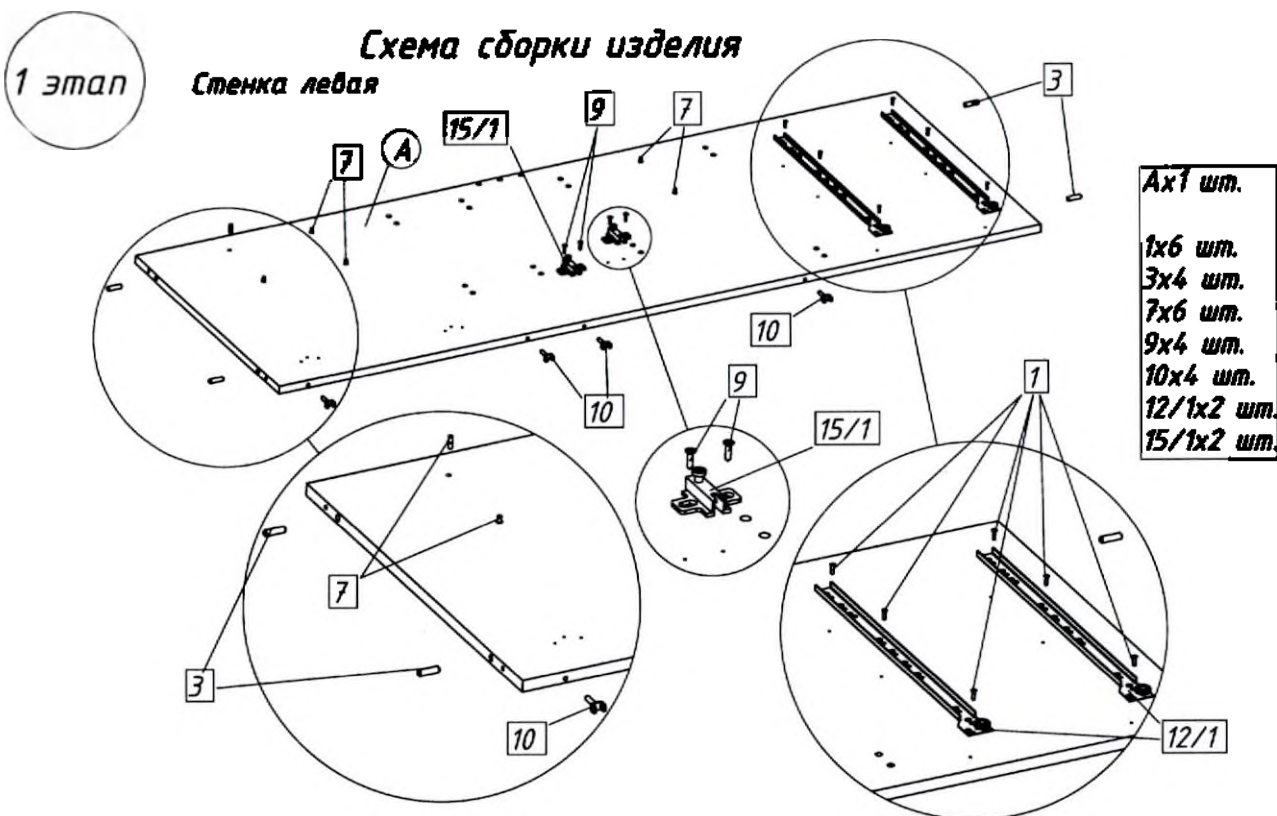

ШМФ-02-“ЕЛАТ” исп.3

3 этап


Перегородка

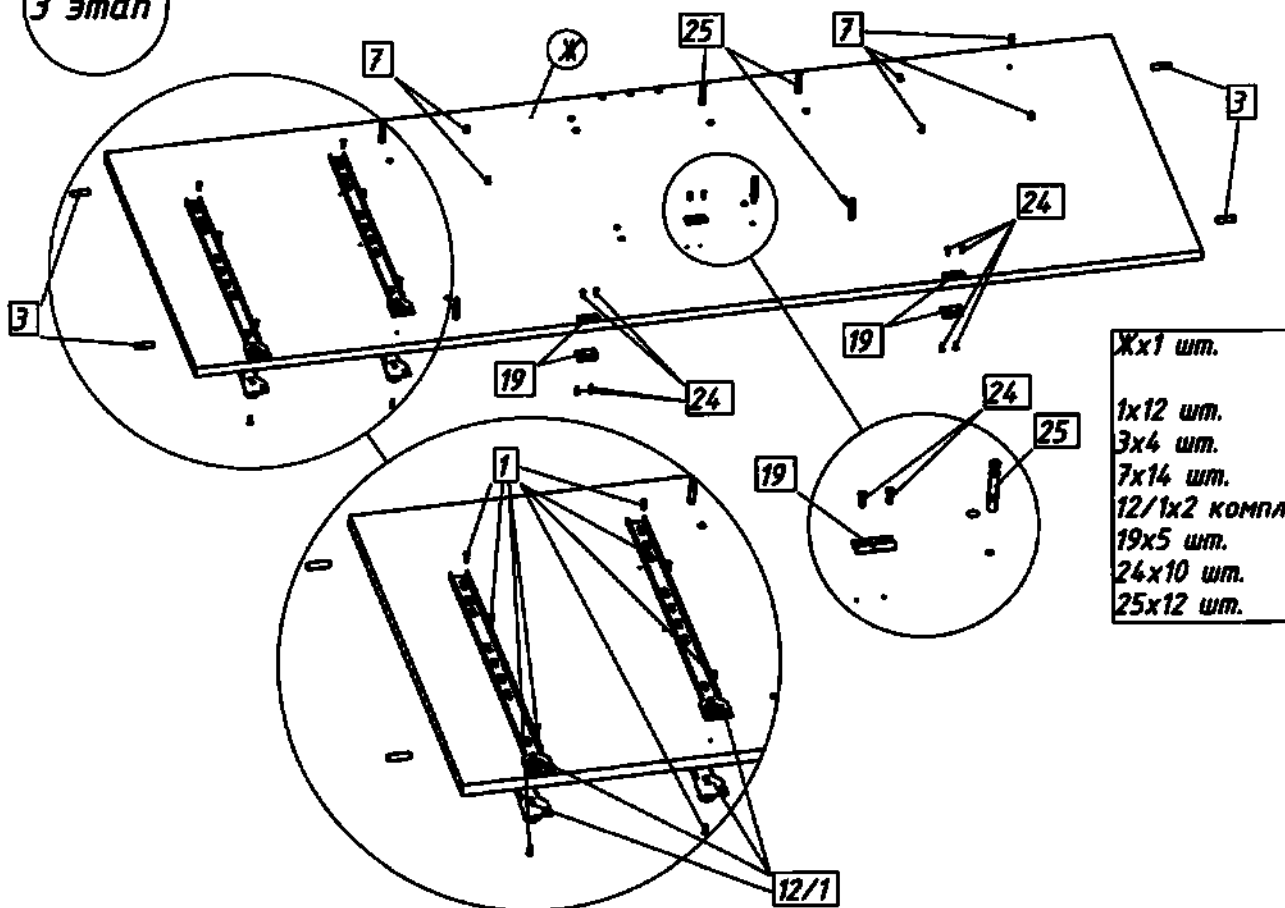

4 этап

Dimensions listed in the diagram:


- Гx1 мм.
- 3x1 мм.
- Гx1 мм.
- Уx1 мм.
- Фx1 мм.
- Хx1 мм.
- 4x1 мм.
- Шx1 мм.
- 3x30 мм.
- 26x12 мм.

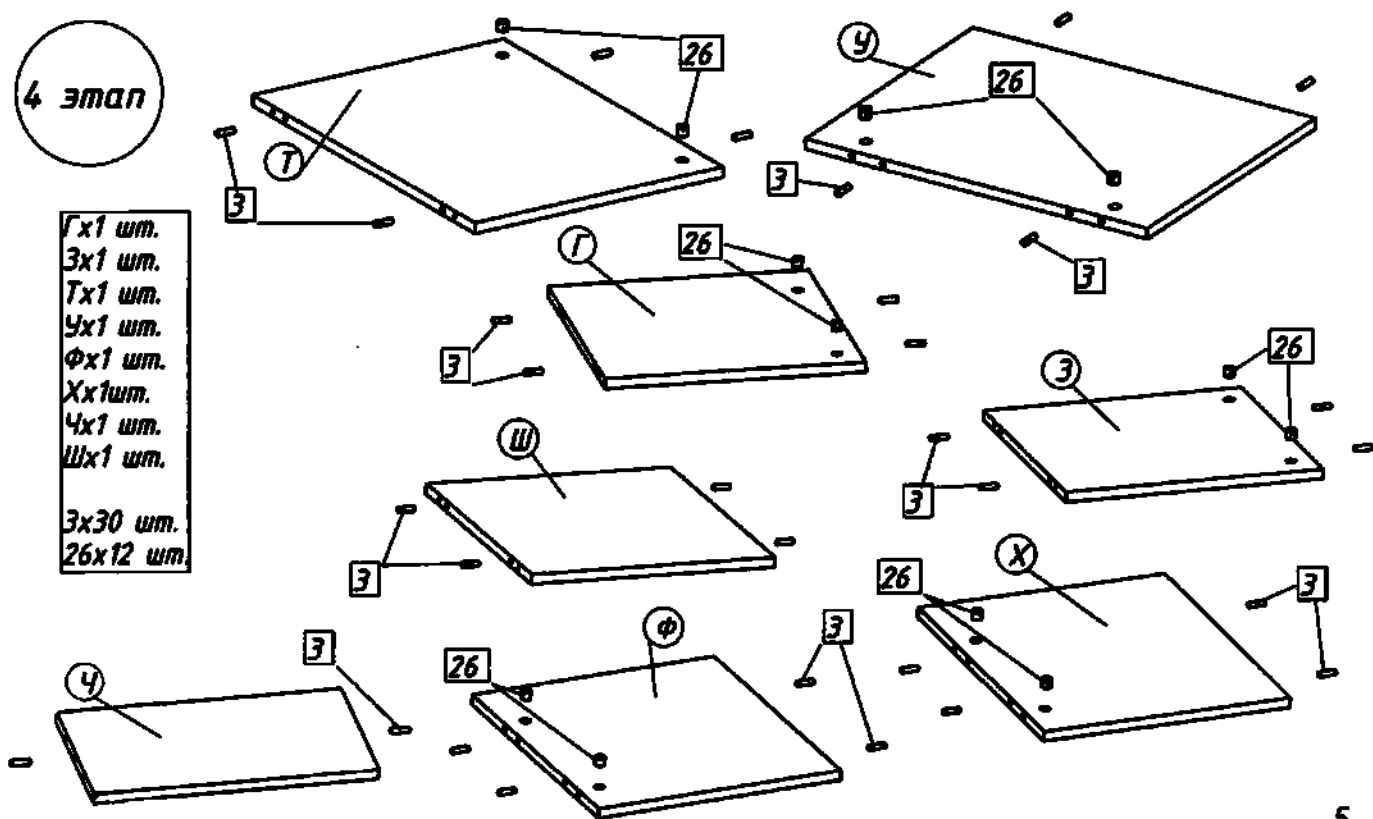

ШМФ-02-"ЕЛАТ" исп.3


OM 29.487.02

5 эман

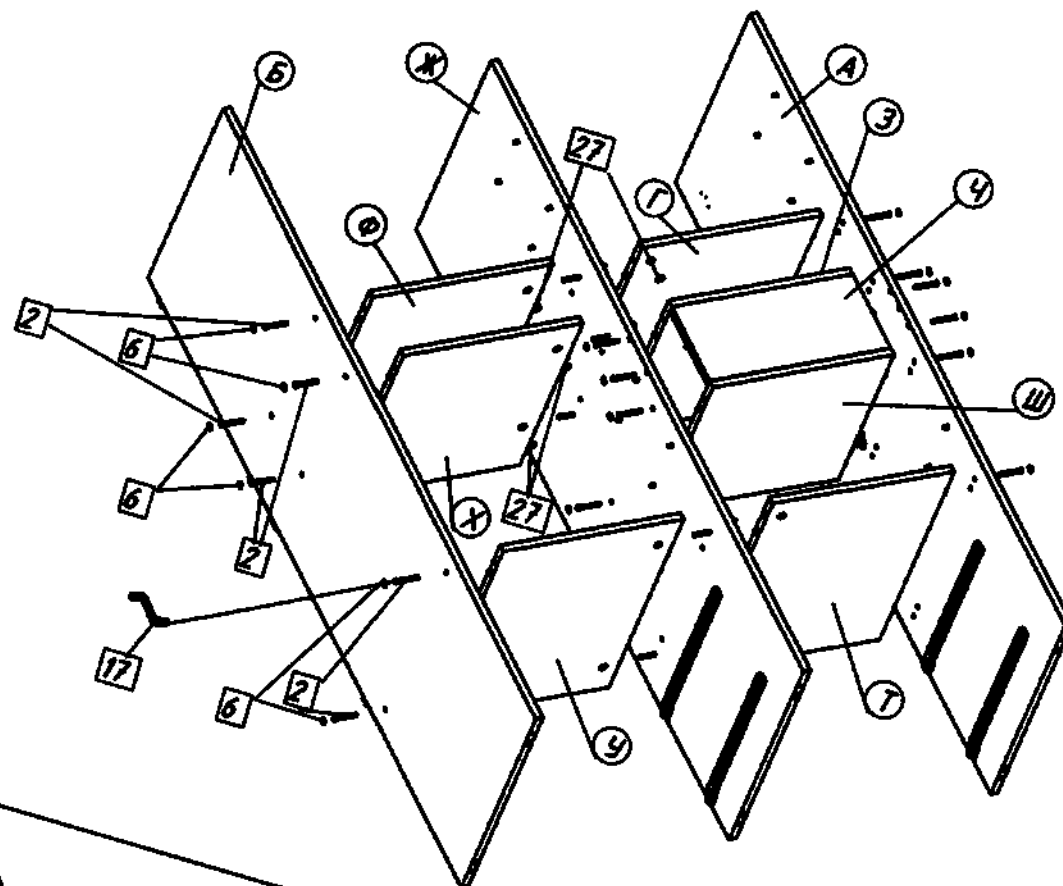

1x1 мм.
3x1 мм.
7x1 мм.
5x1 мм.
φx1 мм.
Xx1 мм.
4x1 мм.
Шx1 мм.
2x20 мм.
6x20 мм.
27x8 мм.


6 эман

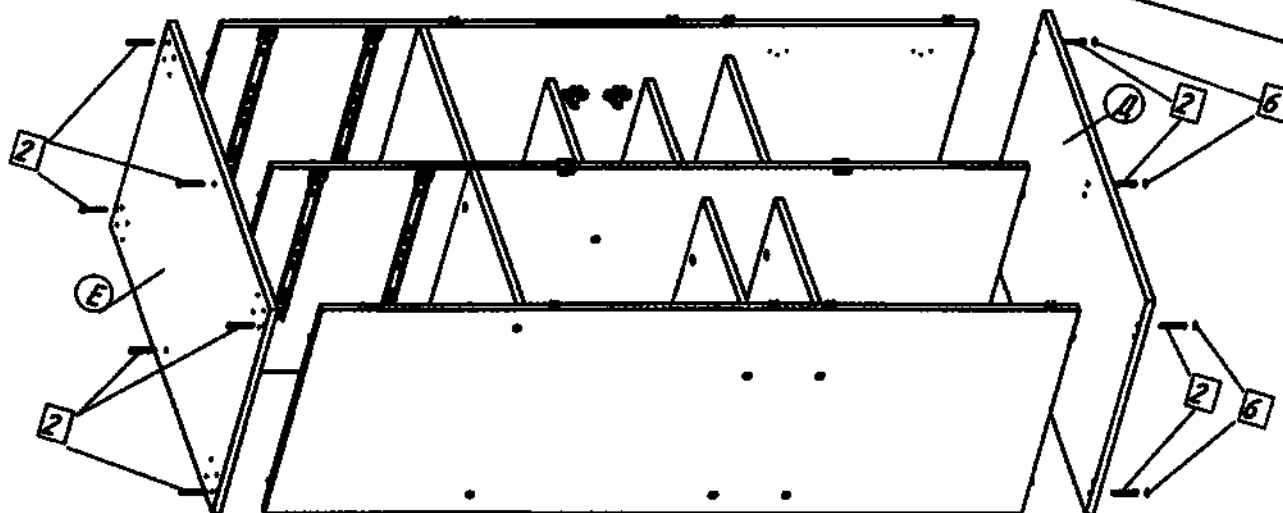

ШМФ-02-“ЕЛАТ” исп.3

4x1 мм.
Еx1 мм.
2x12 мм.
6x6 мм.

7 этап

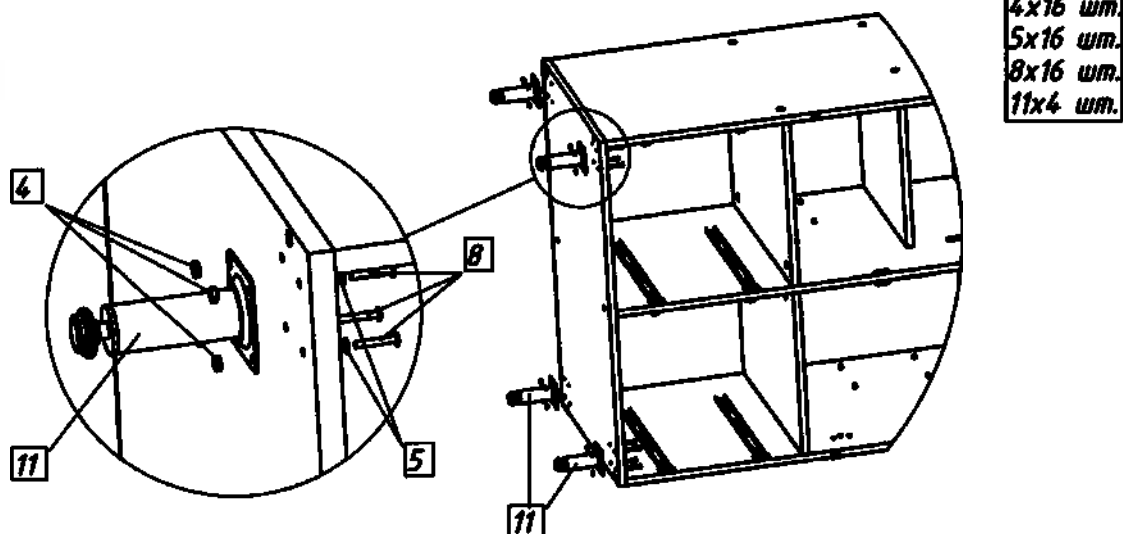

8 этап

Произведите установку и крепёж стенок задних гвоздями.

Вх2 шт.
29x48 шт.


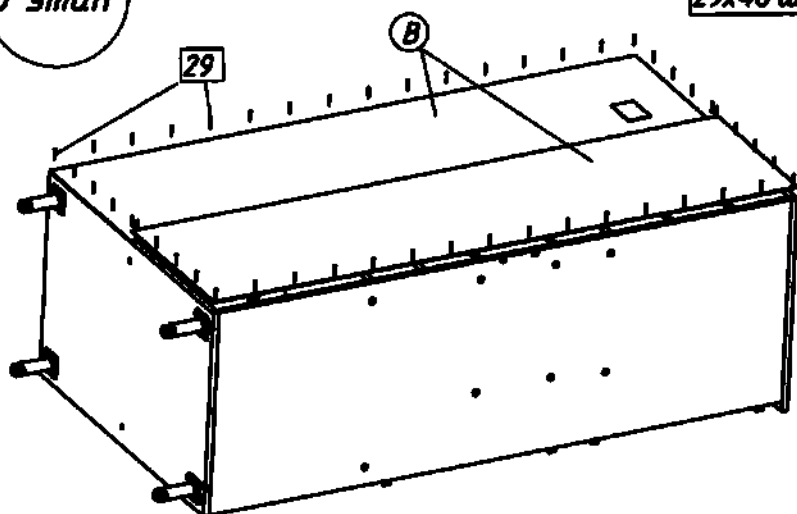



Схема расположения гвоздей и саморезов.

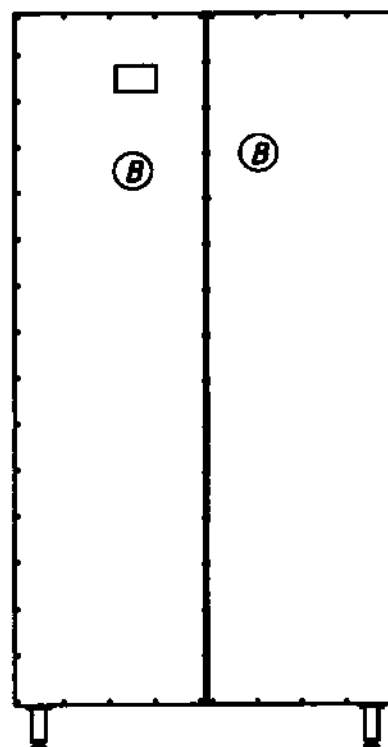

9 этап

Произведите крепёж стенок задних с перегородкой саморезами.


28x16 шт.

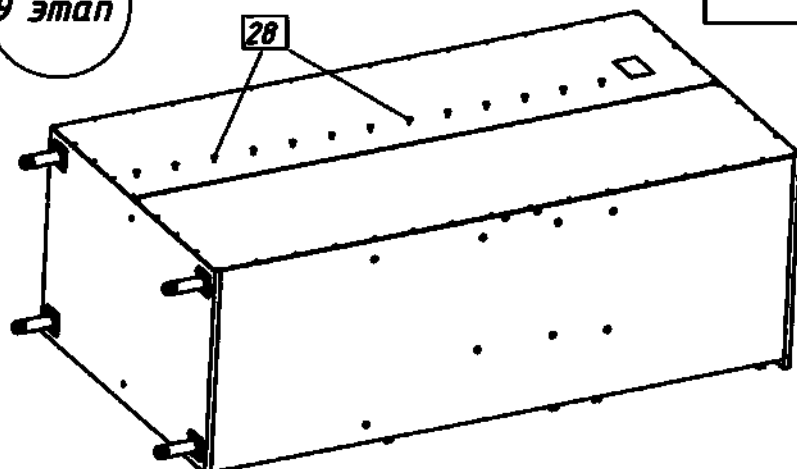

ОМ 29.487.02

10 этап

Дверь встроеного ящика

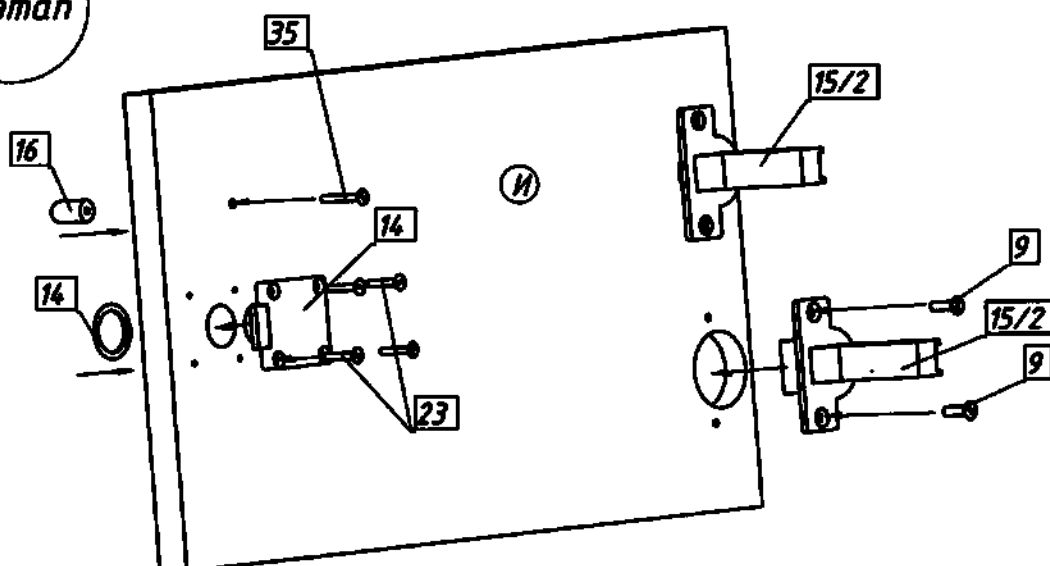

Их1 шт.

9x4 шт.

14x1 шт.


15/2x2 шт.

16x1 шт.

23x4 шт.

35x1 шт.


11 этап

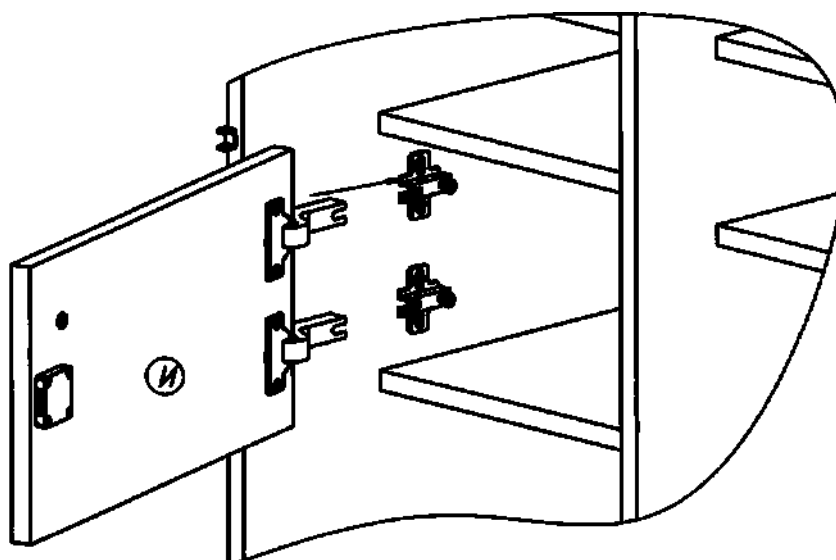

Вертикальная
регулировка

Фронтальная
регулировка

После установки двери произведите
регулировку петель.

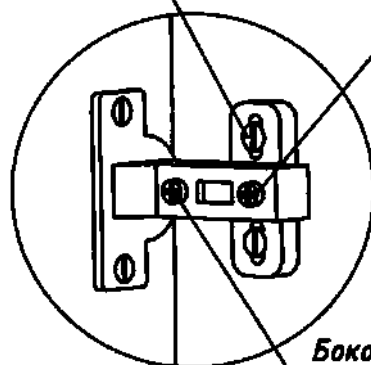


Боковая регулировка
(перекос дверей)

ШМФ-02-"ЕЛТ" исп.3


12 этап

Щх7 шт.

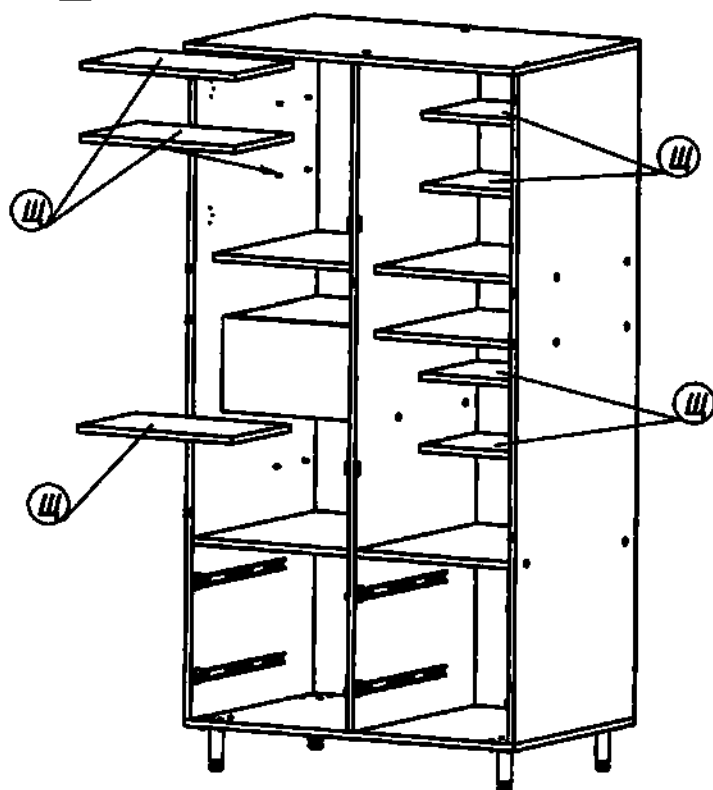

13 этап

Рх18 шт.
Цх3 шт.


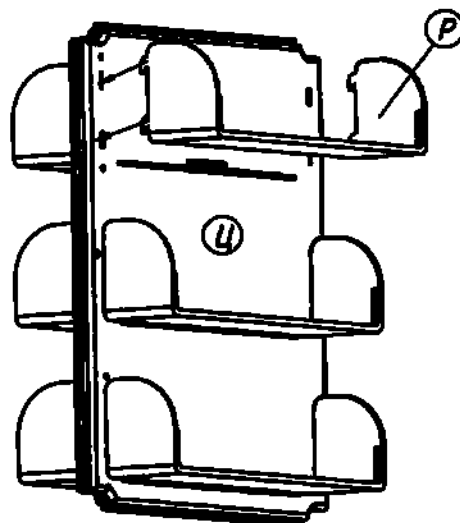


Соберите три полки.

14 этап


Собрать одну поворотную полку для крепления на левую
и две - на правую стенку

4х12 шт.
22х12 шт.
30х6 шт.
31х6 шт.
32х6 шт.
33х24 шт.

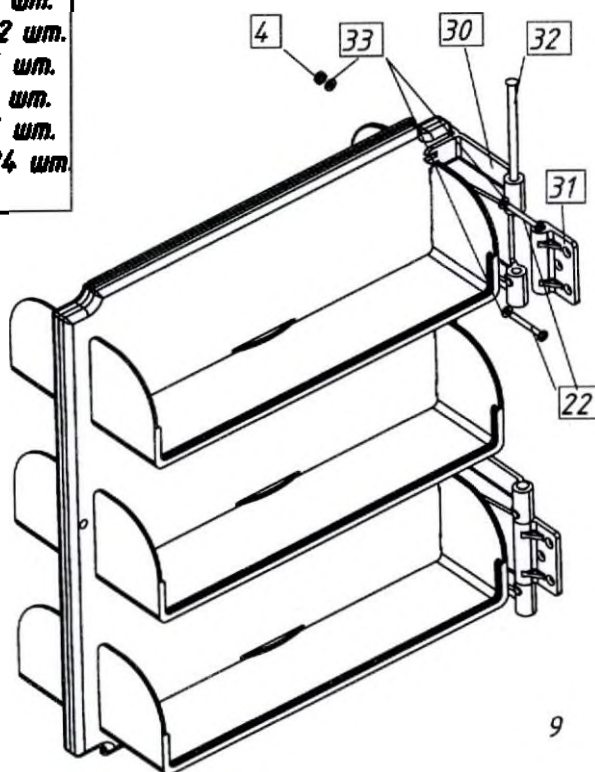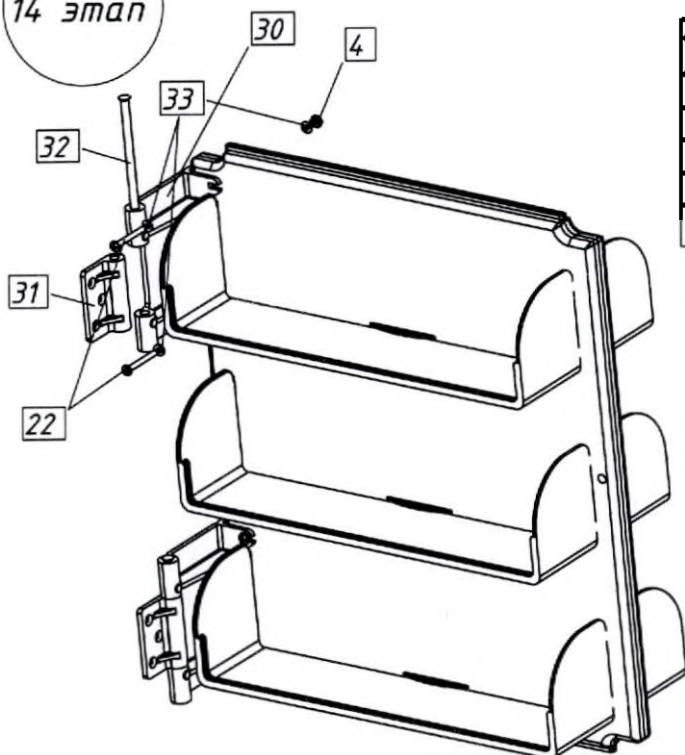

ШМФ-02-"ЕЛЛТ" уч.3


15 этап

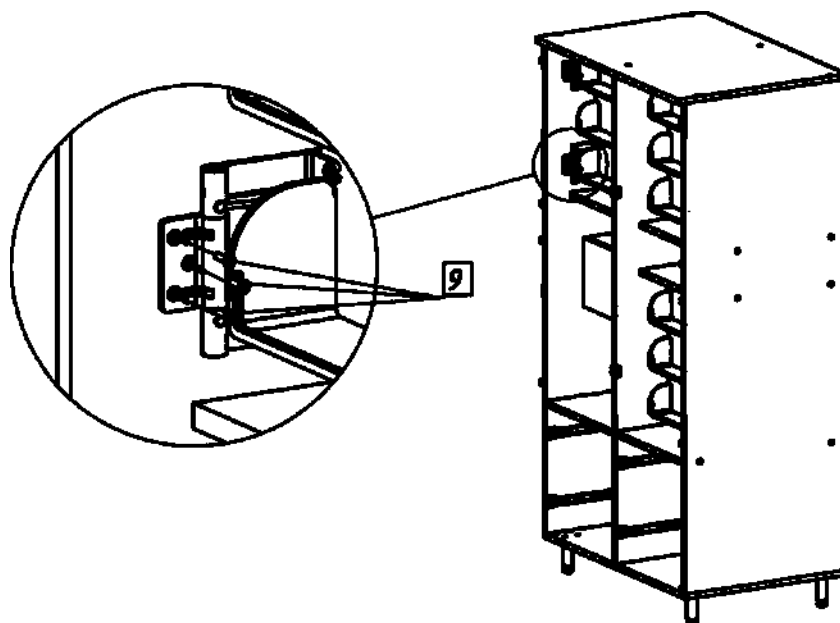


9x18 шт.

16 этап


Соберите 2 малых ящика

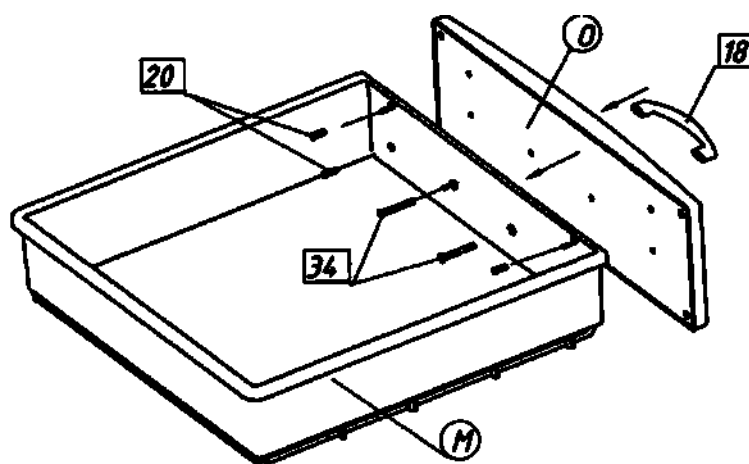

4x2 шт.
0x2 шт.
18x2 шт.
20x8 шт.
34x4 шт.

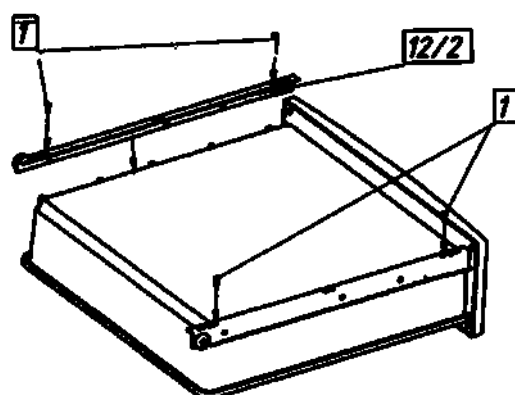

1x8 шт.
12/2x2 компл.

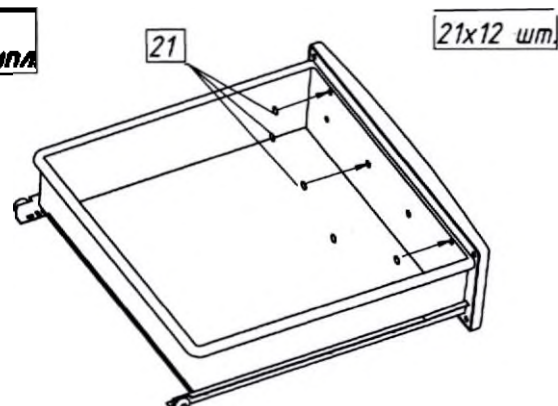


21x12 шт.

ОМ 29.487.02


17 этап

Соберите 2 ящика больших

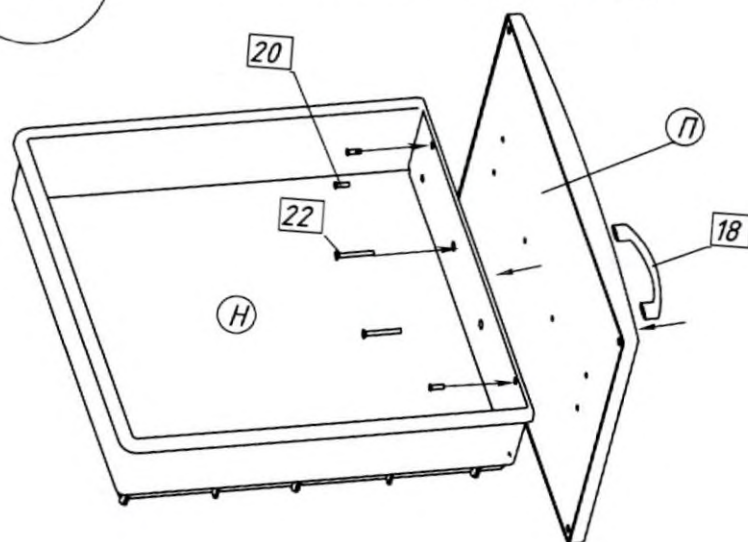


Пх2 шт.
Нх2 шт.

18х2 шт.
20х8 шт.
34х4 шт.

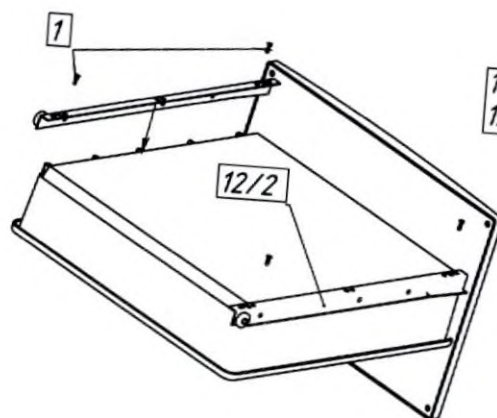


1х8 шт.
12/2х2 компл.

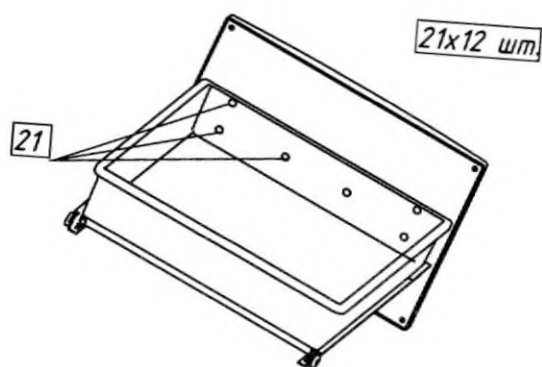


21х12 шт.

18 этап

Соберите 2 правых и 2 левых двери.

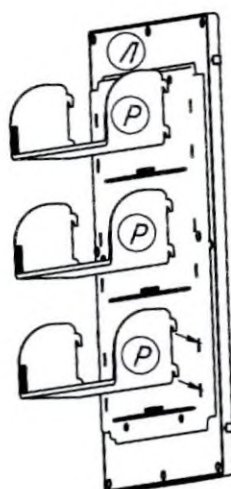

Кх2 шт.
Лх2 шт.
Рх12 шт.

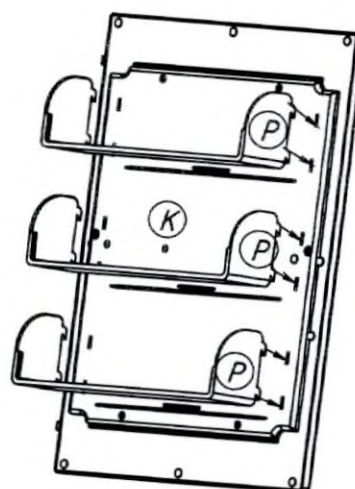


ШМФ-02-“ЕЛТА” усн.З

ОМ 29.487.02

19 этап


Установите двери и ящики.
Забить оси петель лёгкими ударами молотка.

13x8 шт.

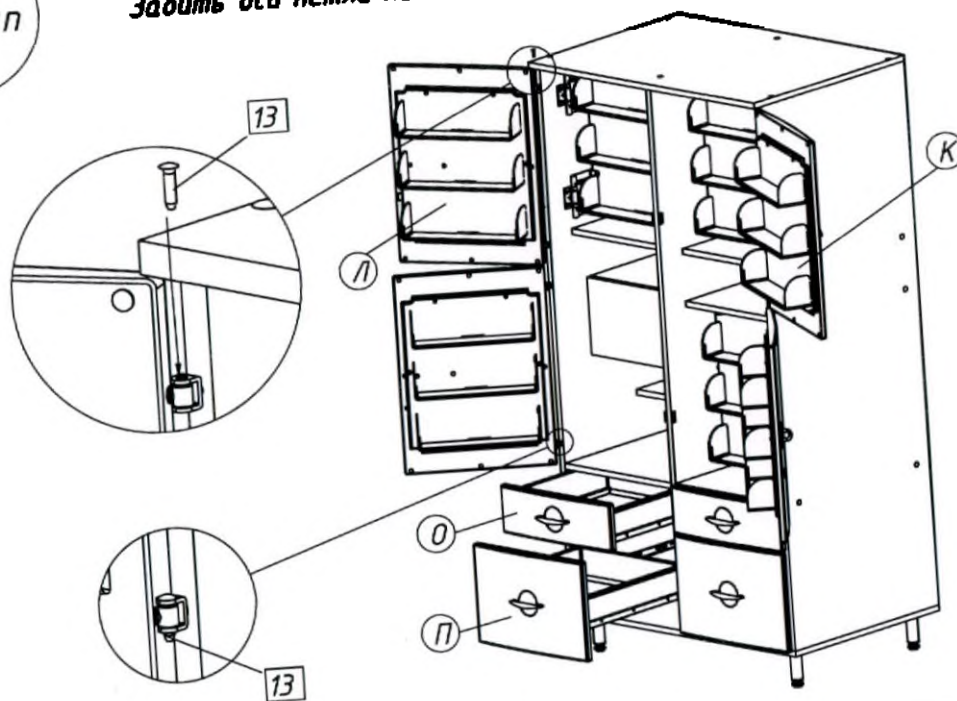

20 этап

1x30 шт.

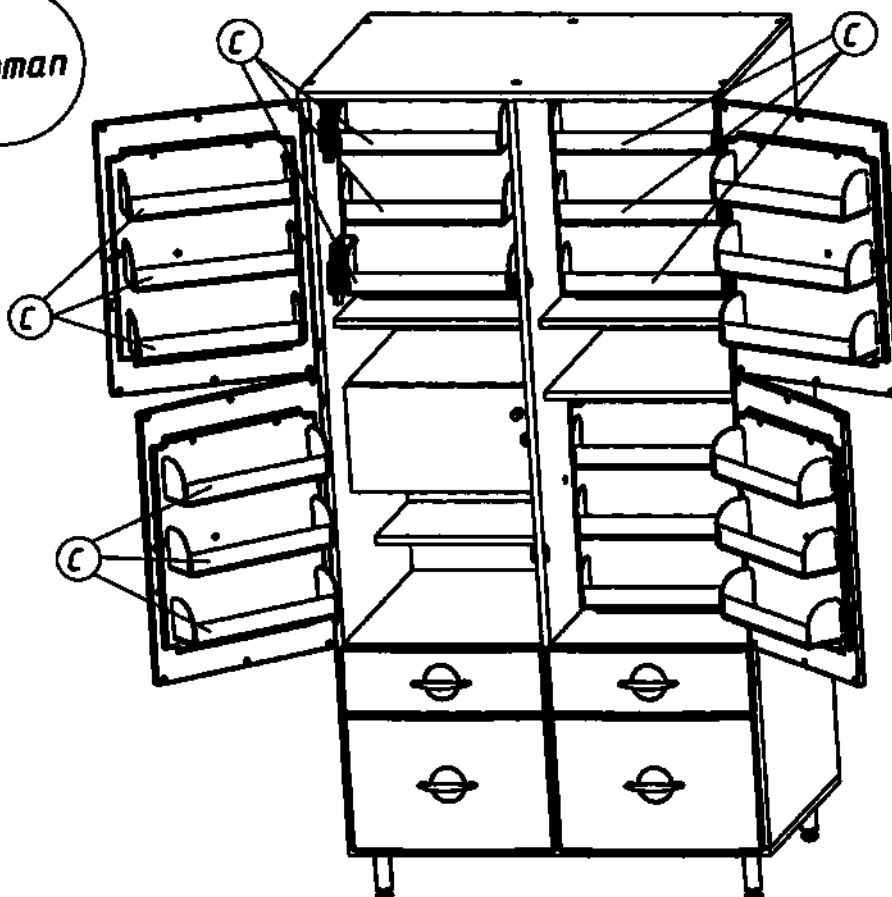


ШМФ-02-“ЕЛАТ” исп.3

ОМ 29.487.02

21 этап


После сборки изделия произведите установку
логотипа компании

3x1 шт.

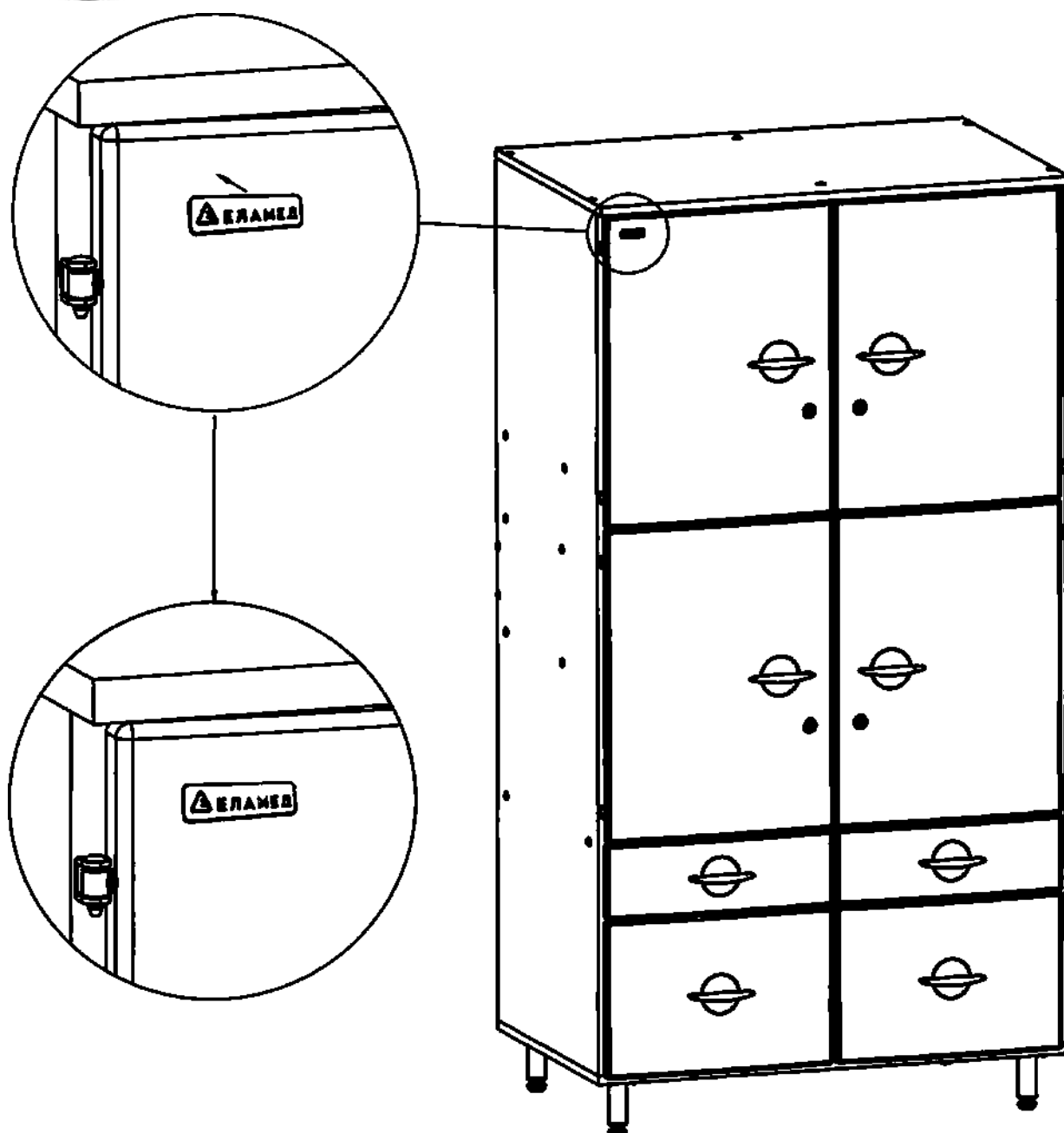

ШМФ-02- "ЕЛАТ" учп.З

Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

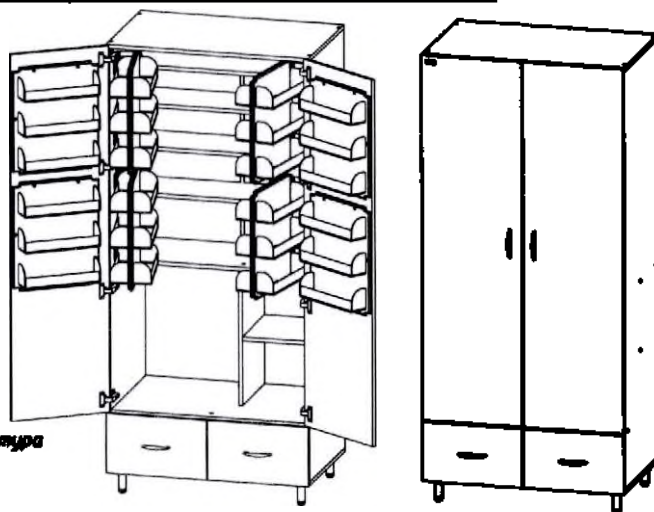

Условные обозначения:

1. А-Я : детали

2. 1 - 26 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 33 : этапы сборки

Код 527

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Полка малая	4
Г	Перегородка ящика	1
Д	Перегородка межъярочная	1
Е	Крышка	1
Ж	Основание	1
З	Полка средняя	1
И	Дверь левая	1
К	Дверь правая	1
Л	Фасад левый выдвижного ящика	1
М	Фасад правый выдвижного ящика	1
Н	Стенка левая выдвижного ящика	2
О	Стенка правая выдвижного ящика	2
П	Стенка задняя выдвижного ящика	2
Р	Дно выдвижного ящика	2
С	Основание поворотной полки	4
Т	Основание накладной полки	4
У	Полка надресная	36
Ф	Планка	36
Х	Перегородка сейфа	1
Ц	Полка сейфа	1
Ч	Стенка задняя верхняя левая	1
Ш	Стенка задняя верхняя правая	1
Щ	Стенка задняя средняя левая	1
Э	Стенка задняя средняя правая	1
Ю	Стенка задняя нижняя	1
Я	Логотип компании	1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	36	Конфирмат	
2	20	Заглушка конфирмата	
3	28	Шкант мебельный	
4	4	Опора	
5	16	Винт М4х25	
6	32	Гайка М4	
7	16	Шайба 4 мм	
8	110	Гвоздь 1,6х25	
9	8	Петля специальная (90/175), накладная	
10	56	Саморез 4х16	
11	16	Полкодержатель	
12	4	Ручка мебельная	
13	8	Винт полусфера с прессшайбой М4х20	
14	24	Саморез с прессшайбой 4,2х19	
15	32	Шайба 4 мм	

1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

2



Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
16	2 комплекта	Направляющие роликовые	
17	24	Саморез 3x12	
18	16	Винт М4х35	
19	1	Брус соединительный	
20	8	Эксцентрик	
21	8	Шток эксцентрика	
22	8	Заглушка эксцентрика	
23	8	Петля Г-образная	
24	8	Кронштейн петли Г-образной	
25	8	Ось петли Г-образной	
26*	1	Ключ шестигранный 4мм	



Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 3 закручивать ключом шестигранным 26 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Схема сборки изделия

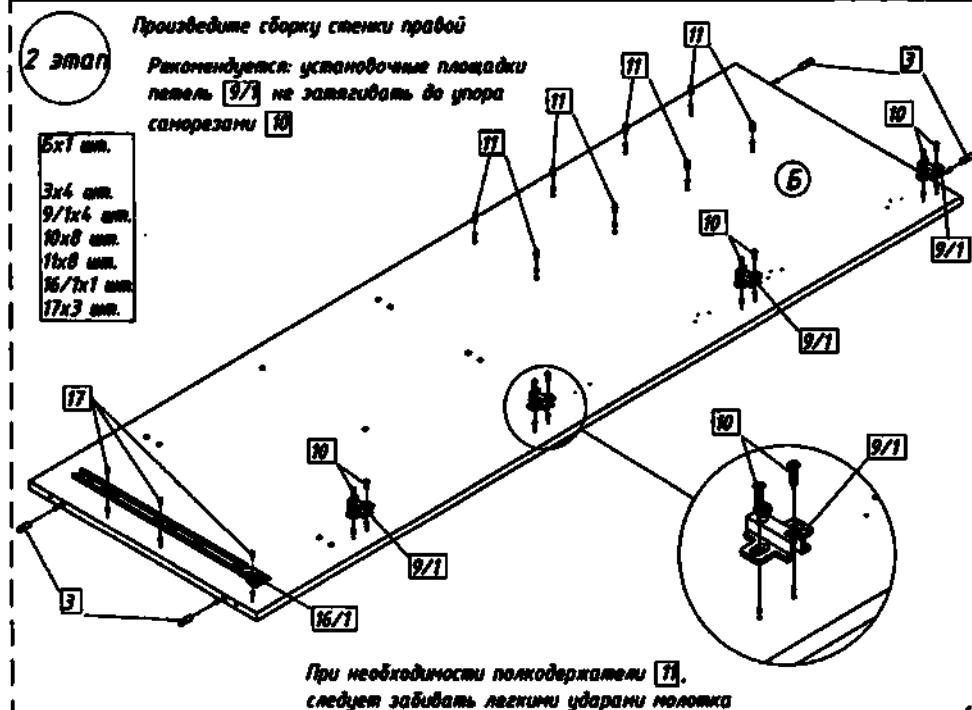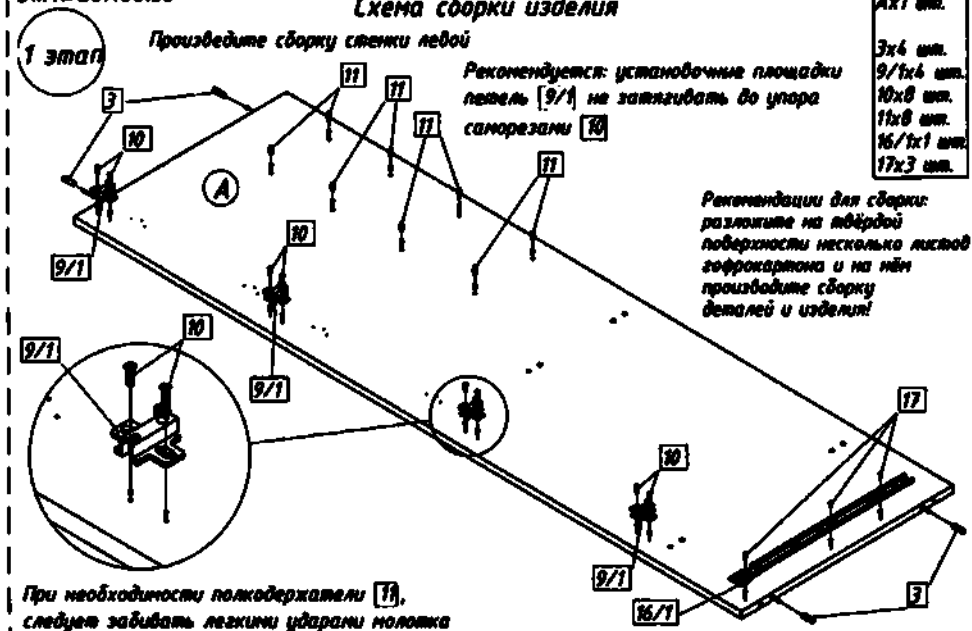


ОМ № 29.489.03
3 этап
Произведите сборку перегородки лицевой

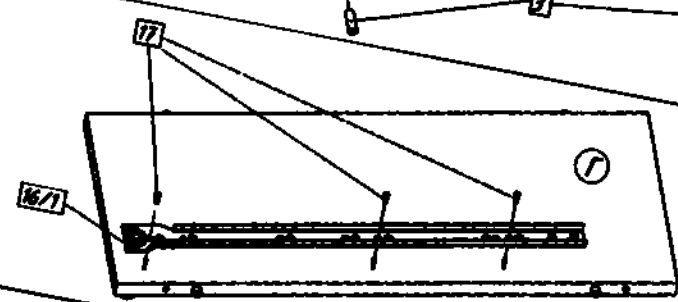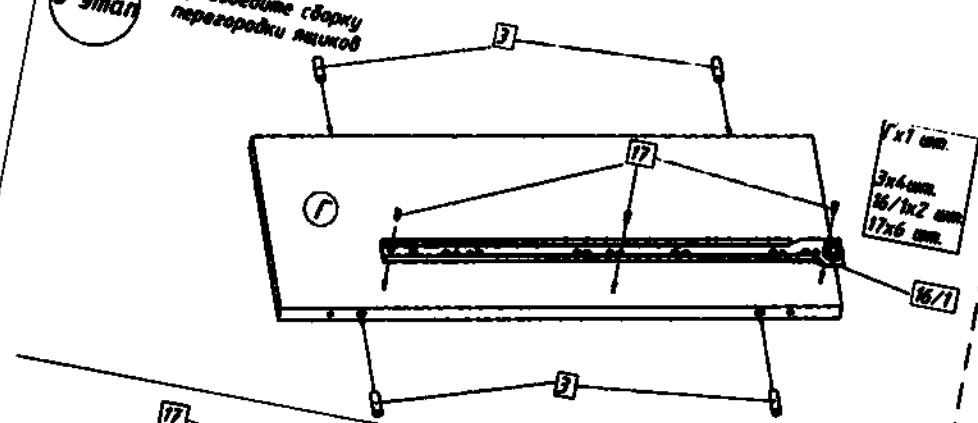


4 этап
Произведите сборку перегородки межъярусной

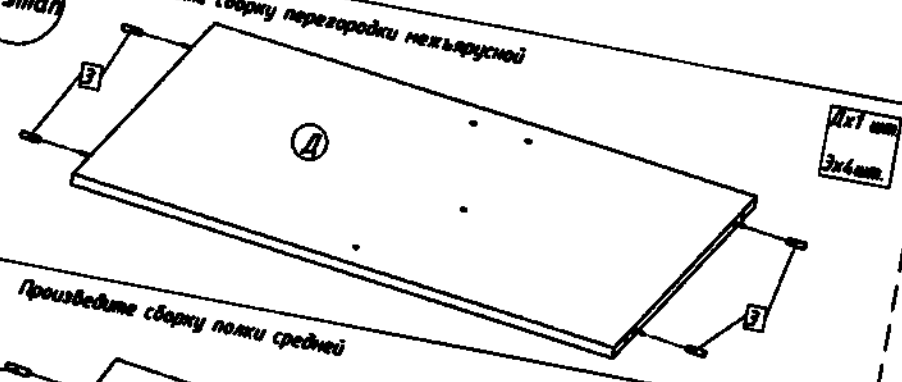


5 этап
Произведите сборку полки средней

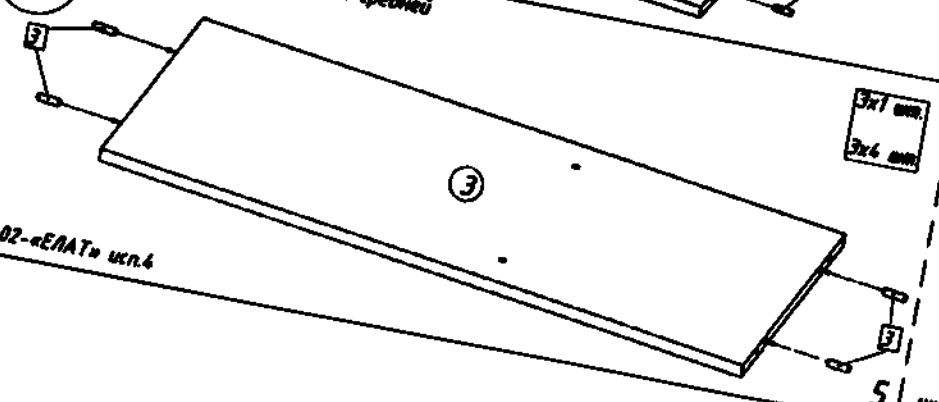

ОМ № 29.489.03
6 этап
Произведите сборку двери левой

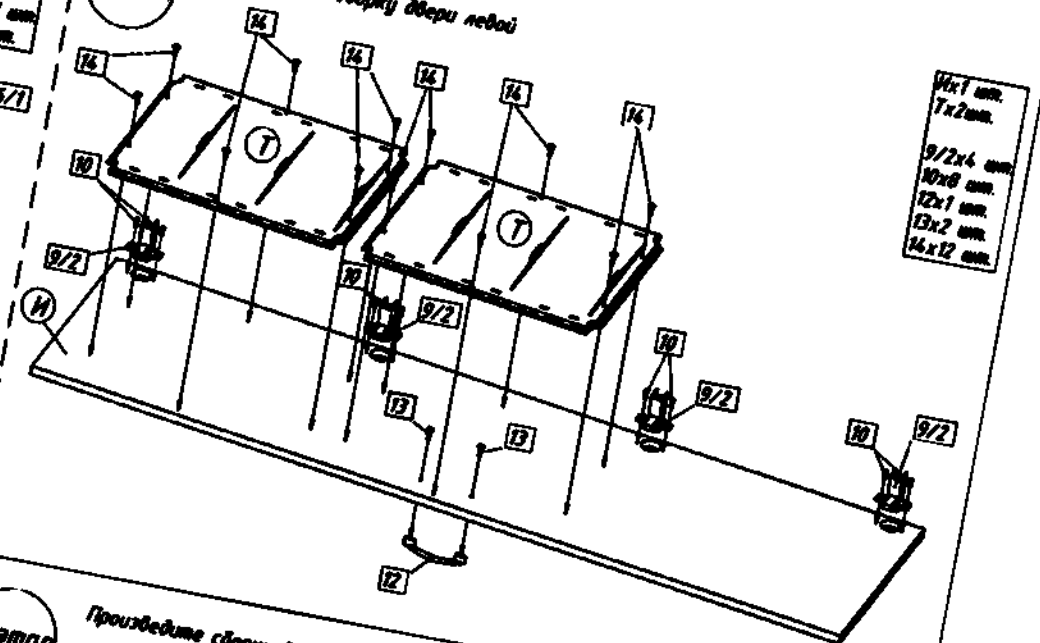

7 этап
Произведите сборку двери правой

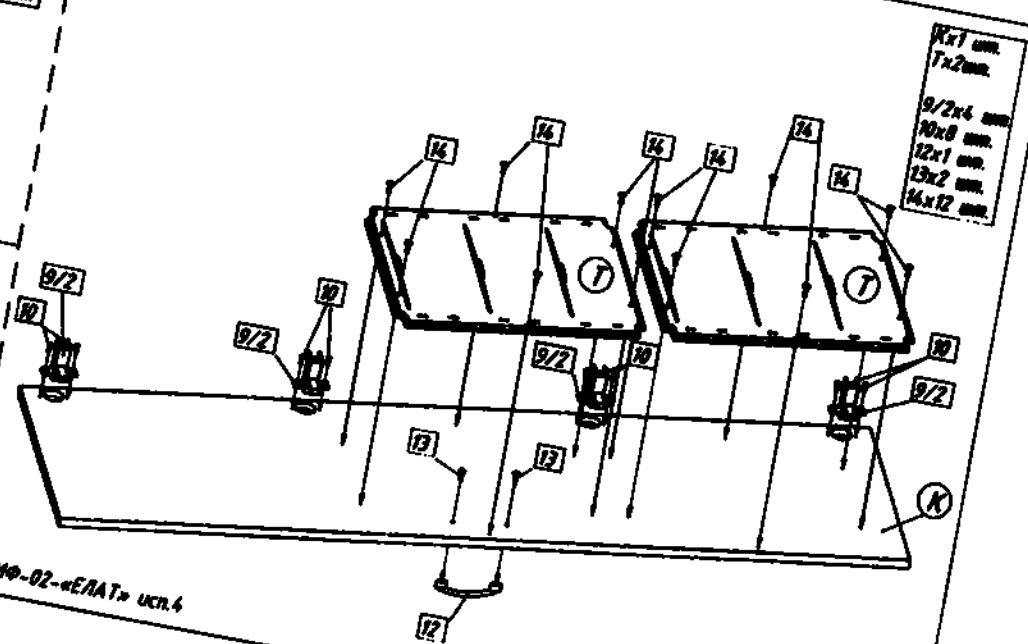


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

ОМ № 29.489.03

Произведите сборку 2-х левых и 2-х правых поворотных полок

8 этап

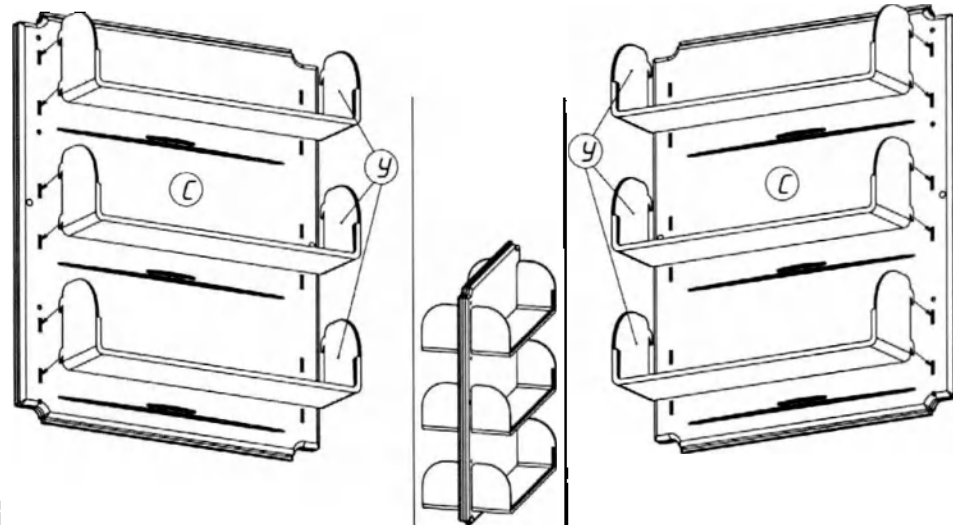


Сх 6 шт.
Ух 24 шт.

ОМ № 29.489.03


Схема установленных петель на левых и правых поворотных полках

10 этап

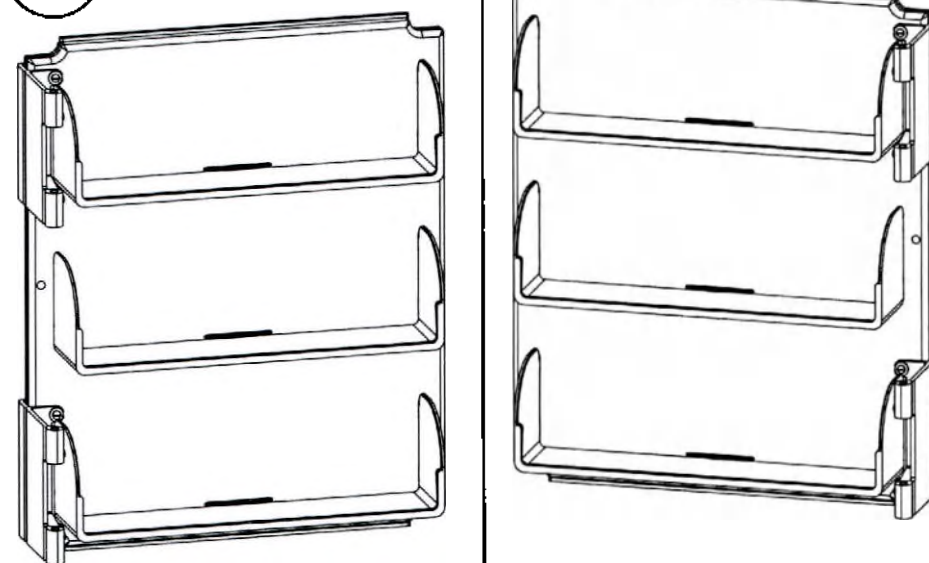

Произведите установку верхней петли на левую поворотную полку

9 этап

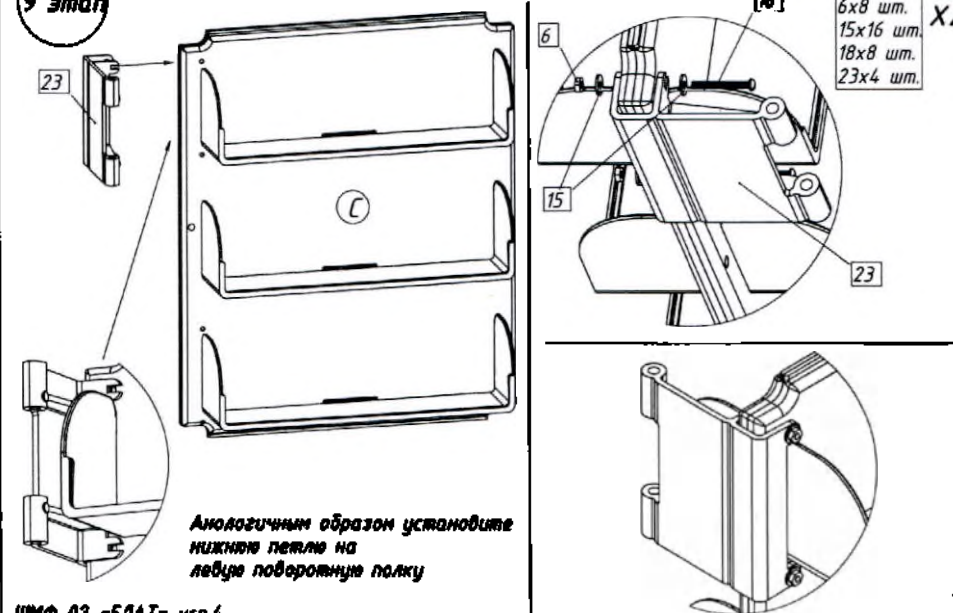

Сх 2 шт.
6х8 шт.
15х16 шт.
18х8 шт.
23х4 шт.


х 2

Аналогичным образом установите нижнюю петлю на левую поворотную полку

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп. 4

Произведите установку кронштейна петель

11 этап

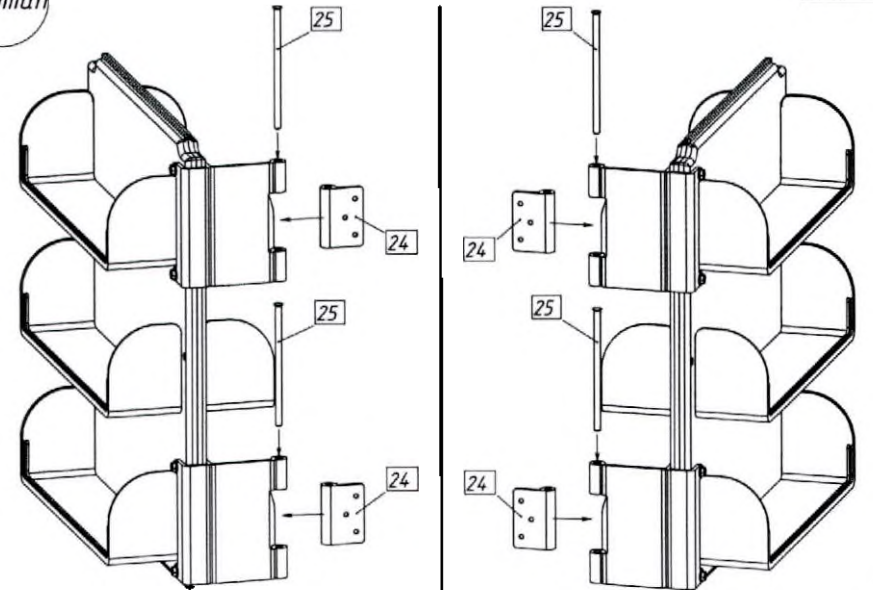

24х8 шт.
25х8 шт.

7


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп. 4

8

ОМ № 29.489.03


Произведите сборку 2-х фасадов ящиков выдвижных

12 этап

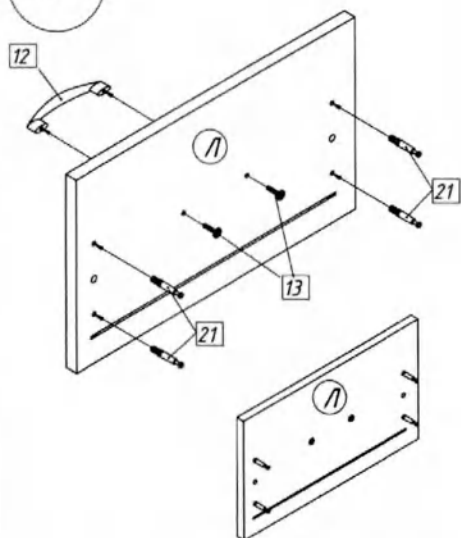

Лх1 шт.
Мх1 шт.


12х2 шт.
13х4 шт.
21х8 шт.

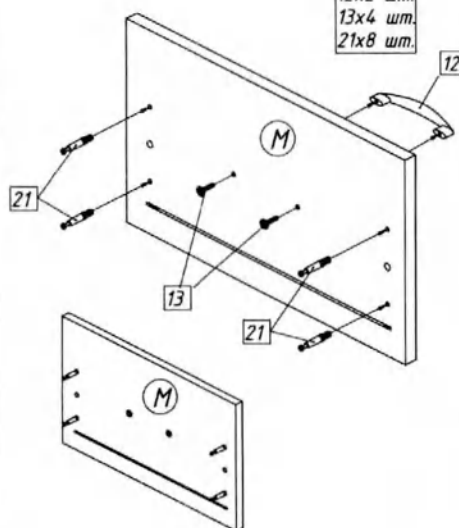

ОМ № 29.489.03

Произведите сборку 2-х каркасов ящиков выдвижных

14 этап

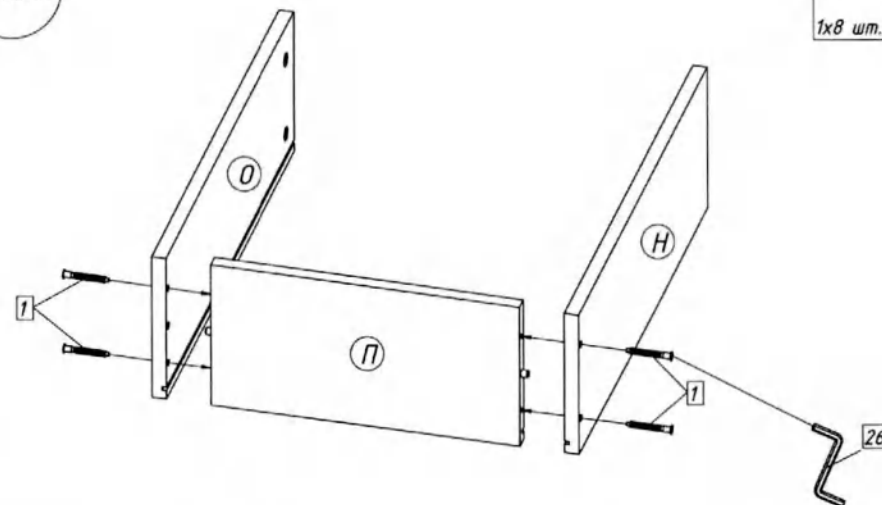

Нх2 шт.
Ох2 шт.
Пх2 шт.
1х8 шт.


13 этап

Произведите сборку деталей для каркасов ящиков выдвижных

Соберите каждые стенки (Н), (О), (П) в 2-х экземплярах!

Нх2 шт.
Ох2 шт.
Пх2 шт.

3х8 шт.
20х8 шт.


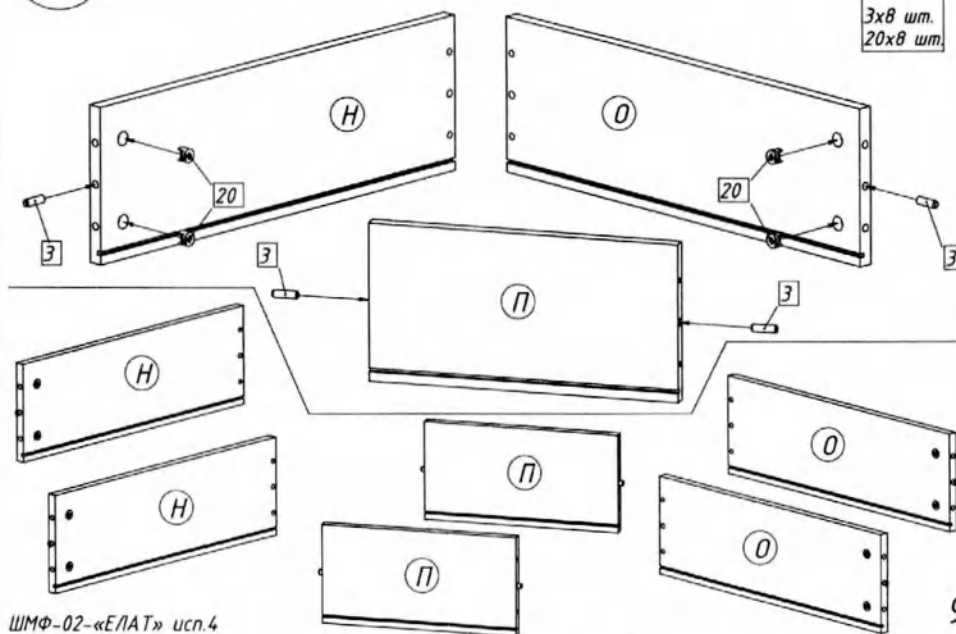


ШМФ-02-«ЕЛ/АТ» исп.4

15 этап

Произведите установку дна для 2-х каркасов ящиков выдвижных

Рх2 шт.

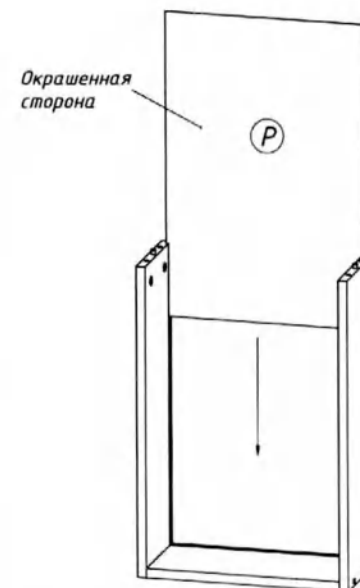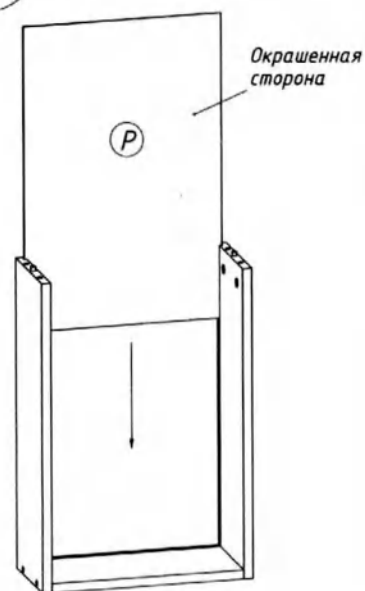


9


ШМФ-02-«ЕЛ/АТ» исп.4

10


ОМ № 29.489.03 Произведите установку 2-х фасадов ящиков выдвижных

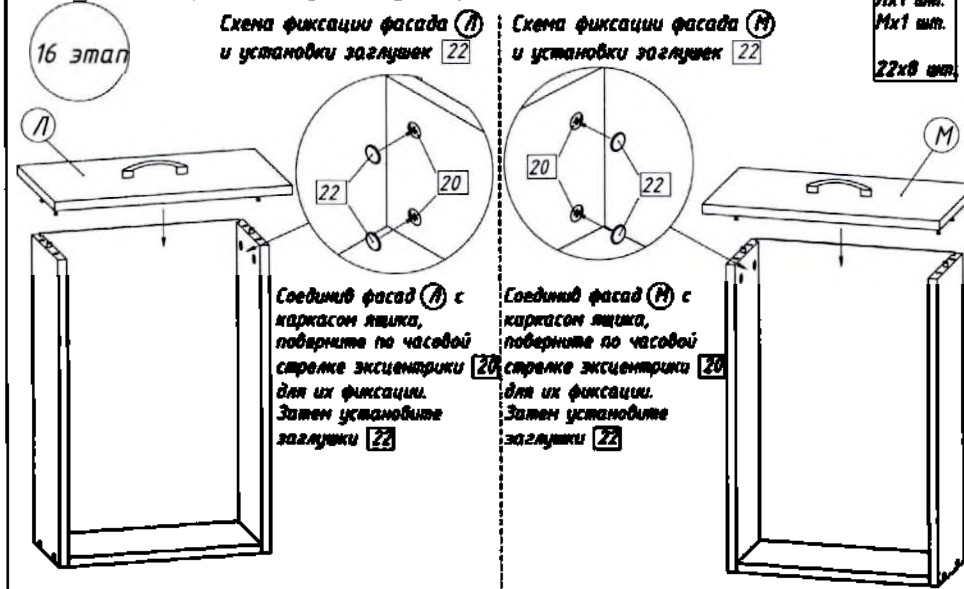

ОМ № 29.489.03 Произведите установку опор

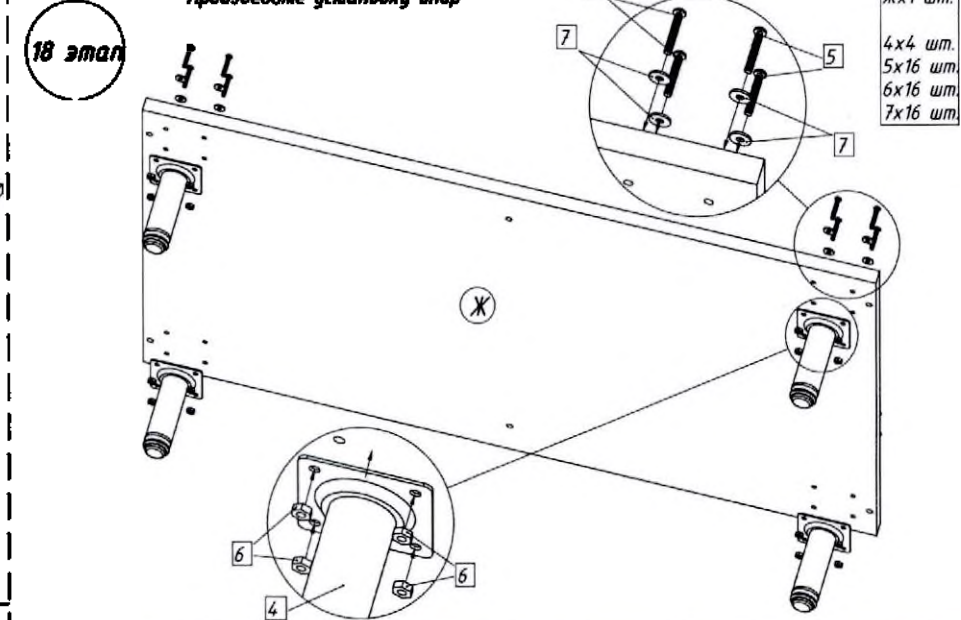


17 этап Произведите установку направляющих на 2 ящика выдвижных

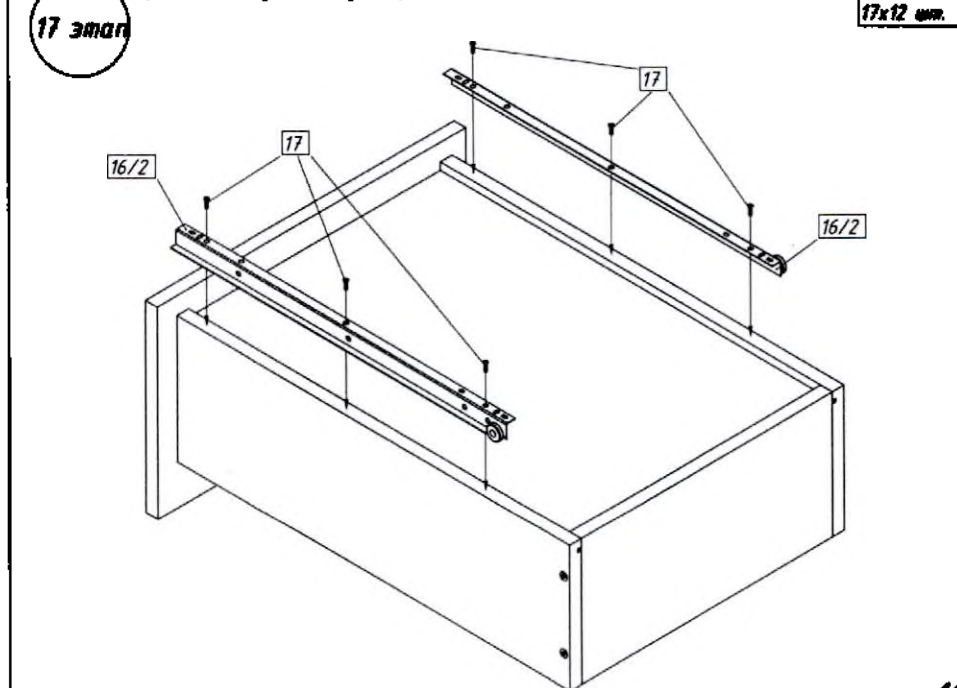

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

11

19 этап Произведите сборку каркаса

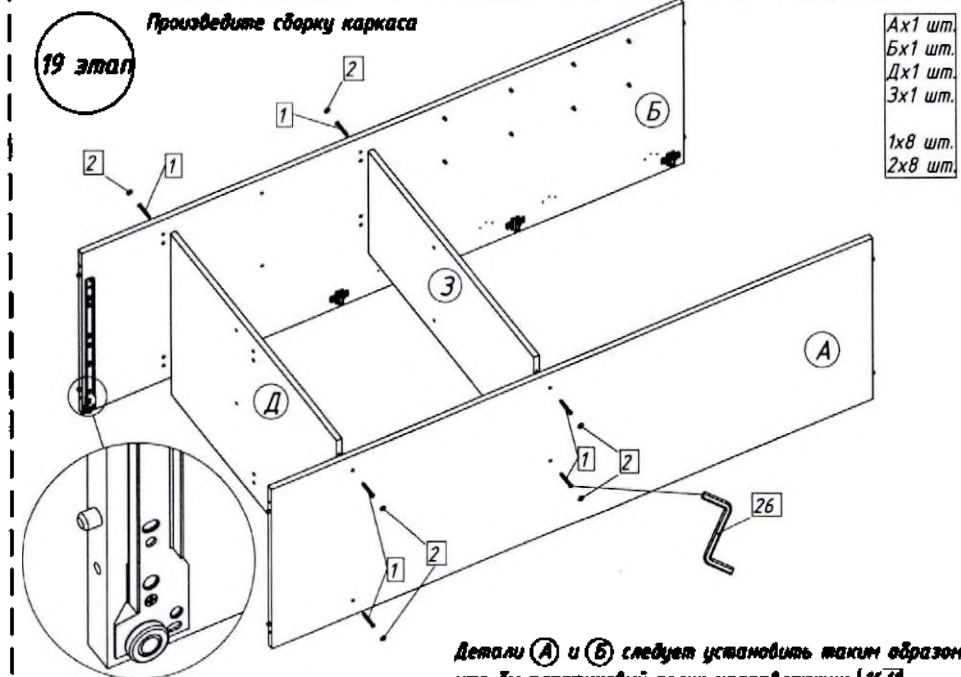


Детали (А) и (Б) следует установить таким образом, что бы пластиковый ролик направляющих (16/1), был возле разложенного гофрокартона.

12

ОМ № 29.489.03

Произведите установку перегородки сейфа


20 этап

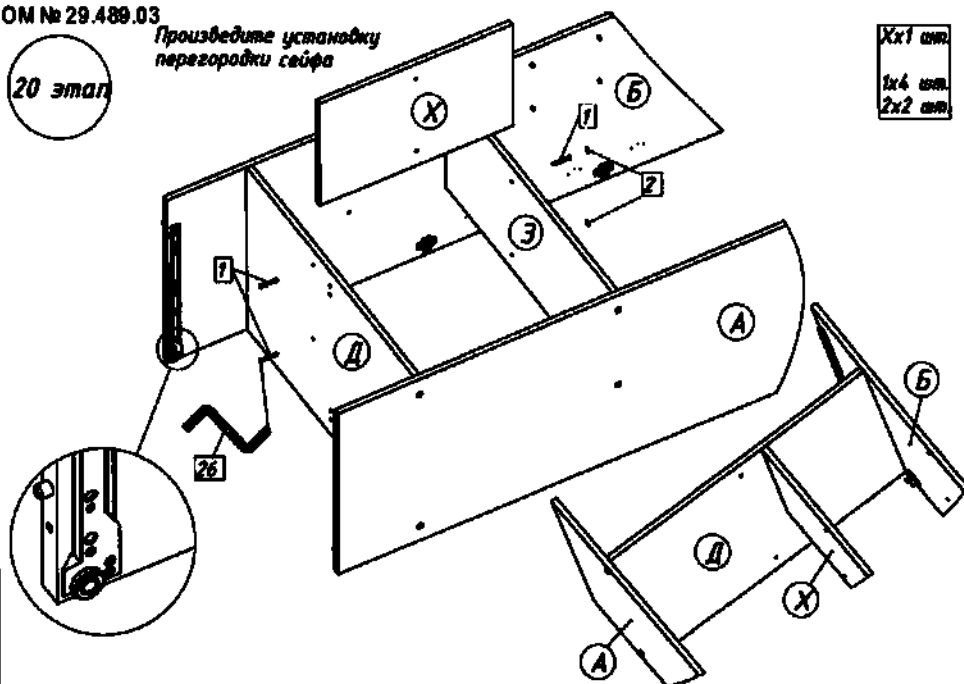

ОМ № 29.489.03

Произведите установку перегородки ящиков


22 этап

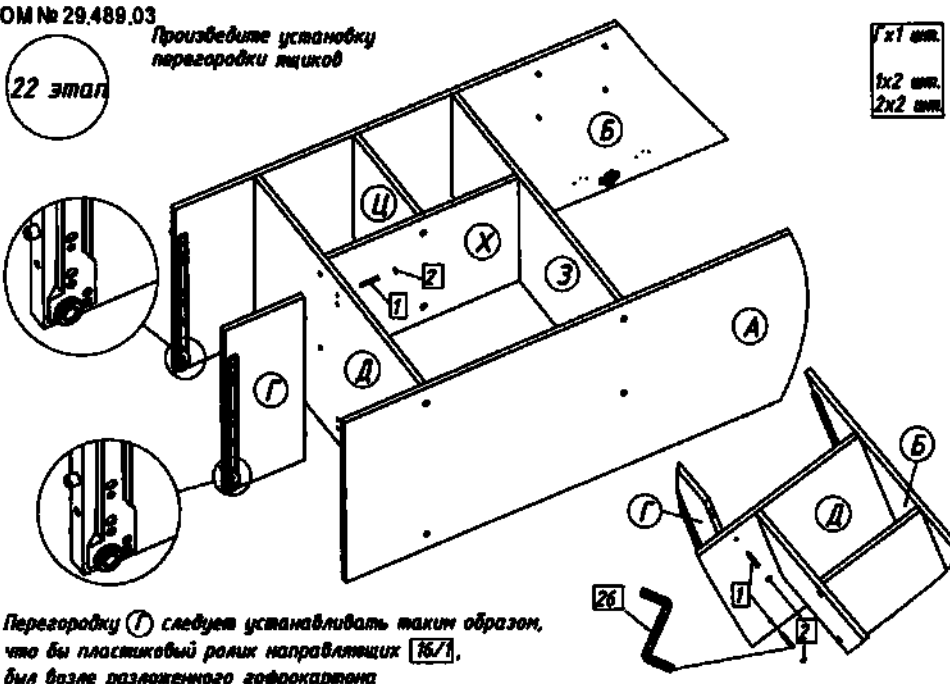

Перегородку (1) следует устанавливать таким образом, что бы пластиковый ролик направляющих (16/1), был возле разложенного гофрокартона

Произведите установку полки сейфа

21 этап

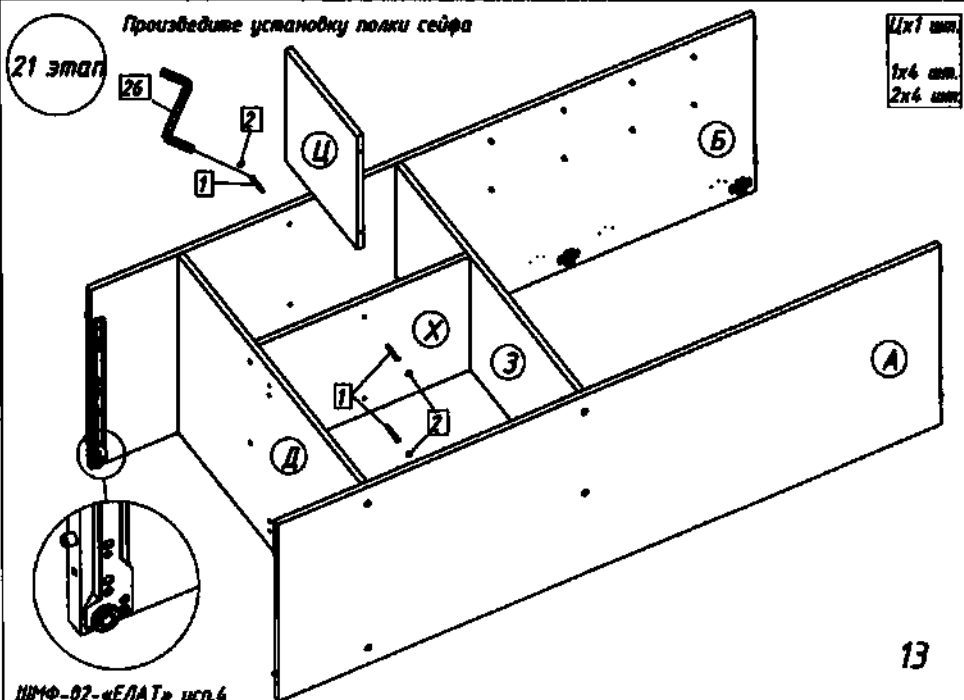


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

13

Произведите установку оснований и крышки

23 этап

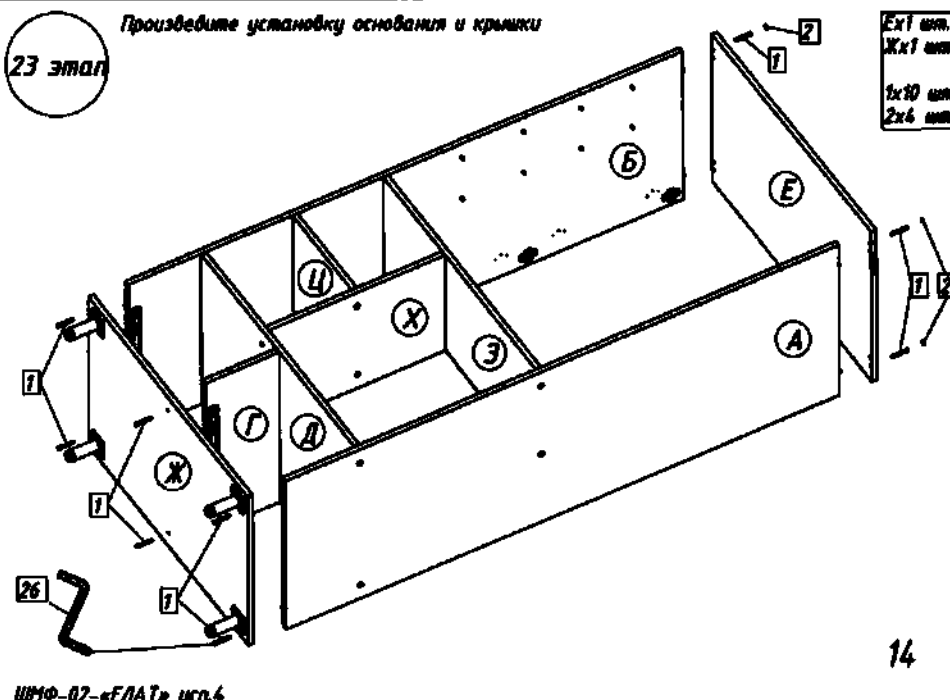

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

14



ОМ № 29.489.03

Произведите установку стенок задних, предварительно установив

24 этап


4х1 шт.
10х1 шт.
11х1 шт.
3х1 шт.
10х1 шт.
19х1 шт.

ВНИМАНИЕ:
При использовании
в комплекте поставки
Миникомодуля,
стенку заднюю ③
в изделии не применять

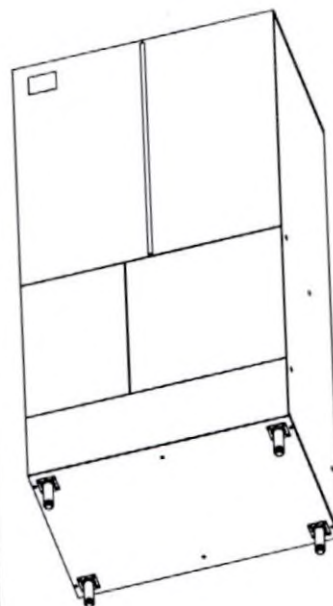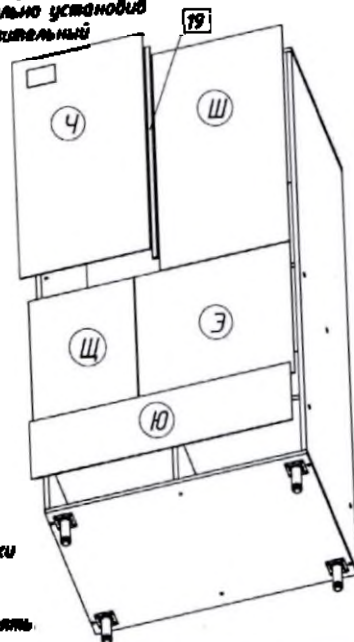


25 этап Произведите крепёж стенок задних гвоздями, с шагом 100-150мм и отступом от края на 8мм

8х110 шт.

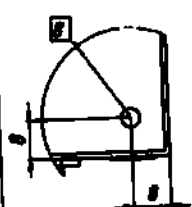

После фиксации стенок задних ④, ⑤, ⑥, ③ и ⑦, установите изделие в вертикальное положение

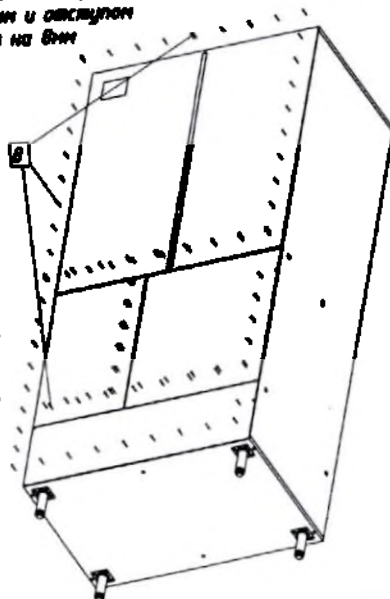

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

Схема расположения гвоздей и саморезов





15

ОМ № 29.489.03

Произведите установку 4-х полок

26 этап



Вх4 шт.

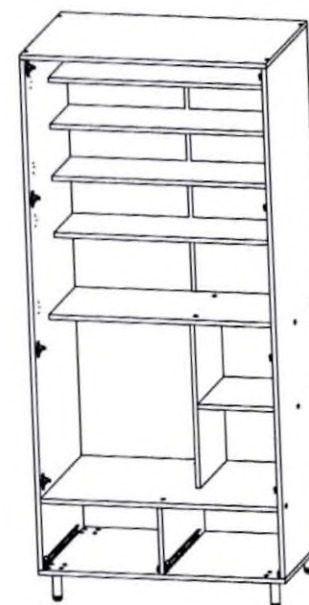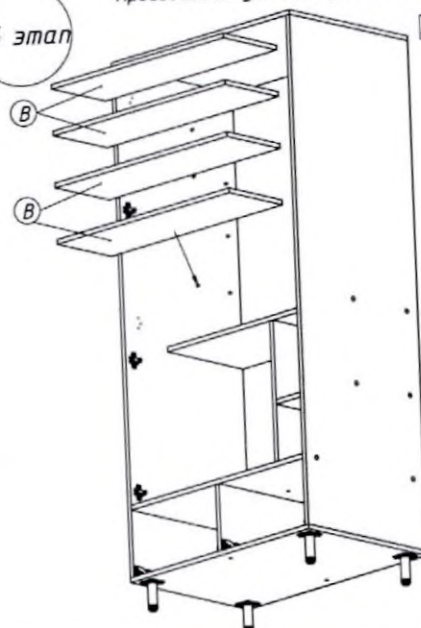

Произведите установку левой поворотной полки

27 этап

10х6 шт.

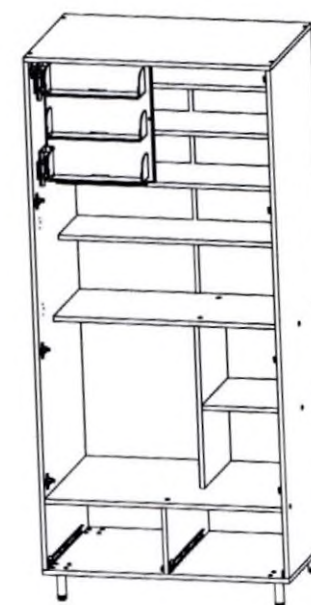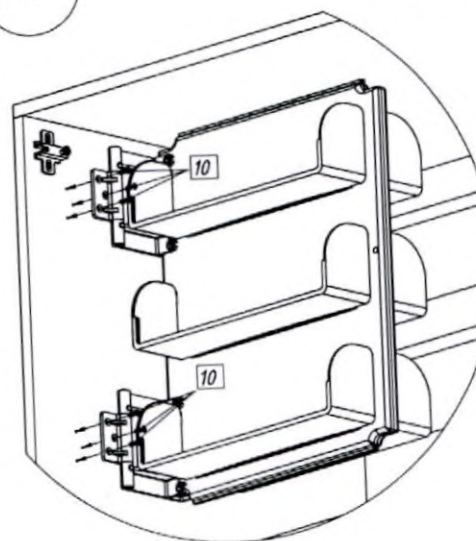

16



ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

ОМ № 29.489.03

Произведите установку остальных 3-х поворотных полок

28 этап


10x10 шт.

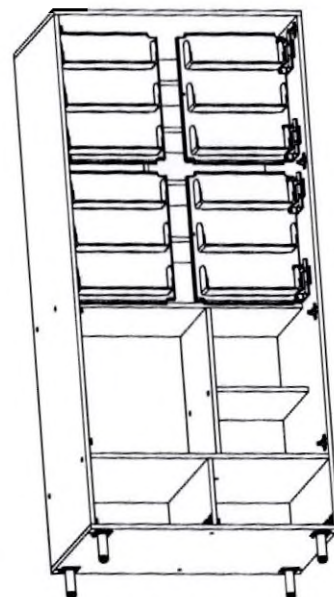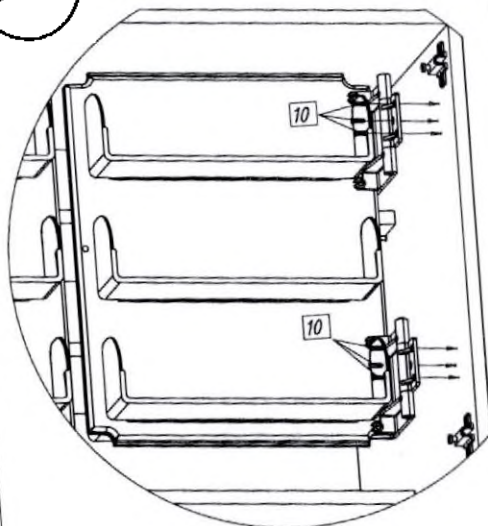


29 этап

Произведите установку 2-х ящиков

Лх1 шт.
Мх1 шт.

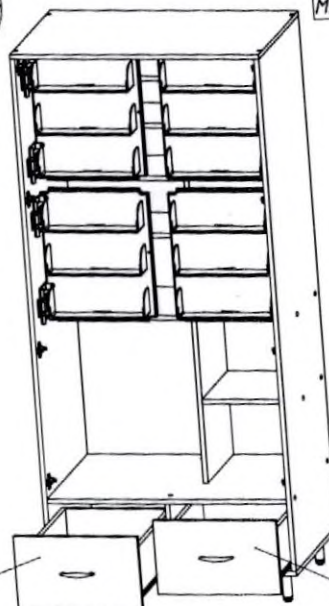

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

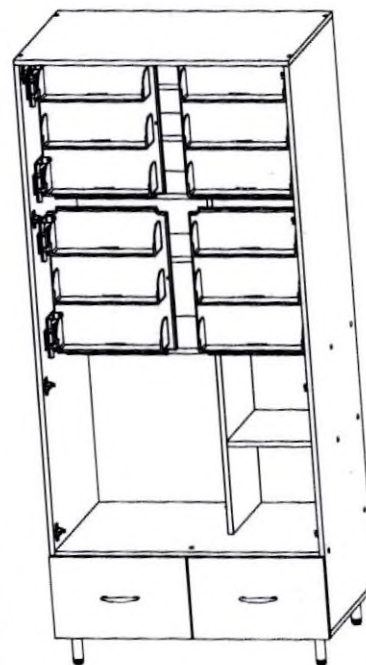



17

ОМ № 29.489.03

Произведите установку дверей

30 этап

Их1 шт.
Кх1 шт.

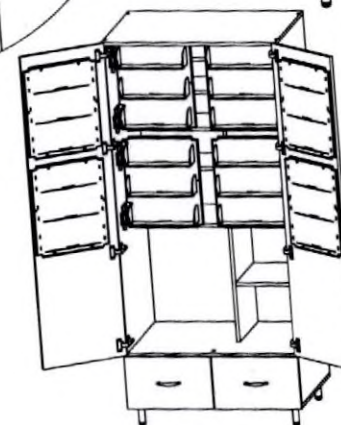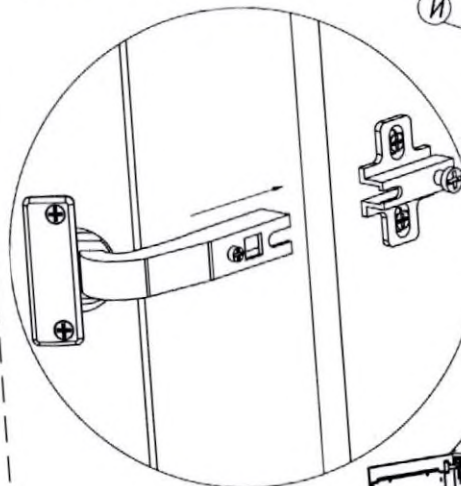

После установки дверей,
произведите регулировку
петель, с затяжкой всех
винтов и саморезов

Боковая регулировка
(перекос дверей)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

18


ОМ № 29.489.03

Произведите установку навесных полок и пластиковых панелей

31 этап

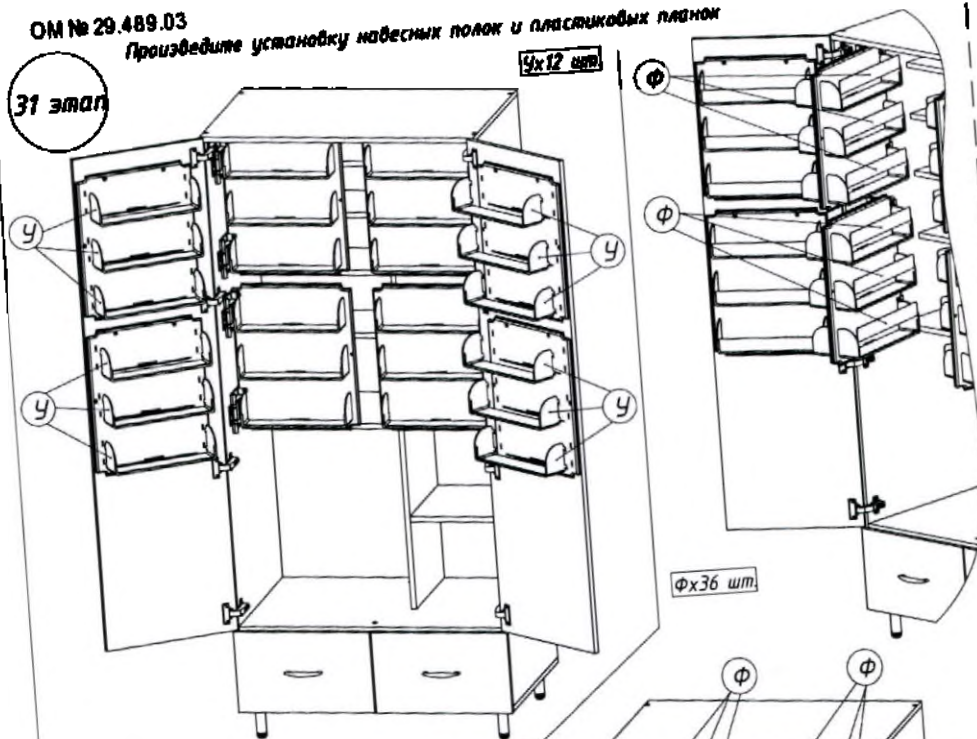

Шаф ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

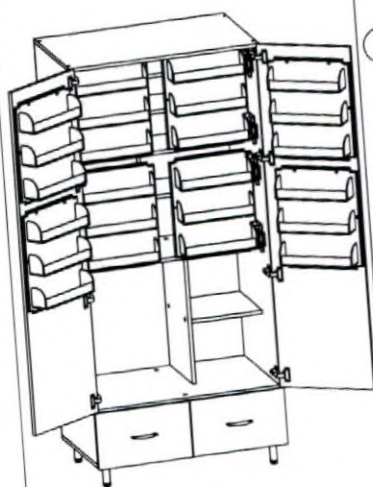


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

ОМ № 29.489.03

Общий вид изделия спереди ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4 с установленным Сейфом или Минихолодильником (поставляется по требованию заказчика)

32 этап

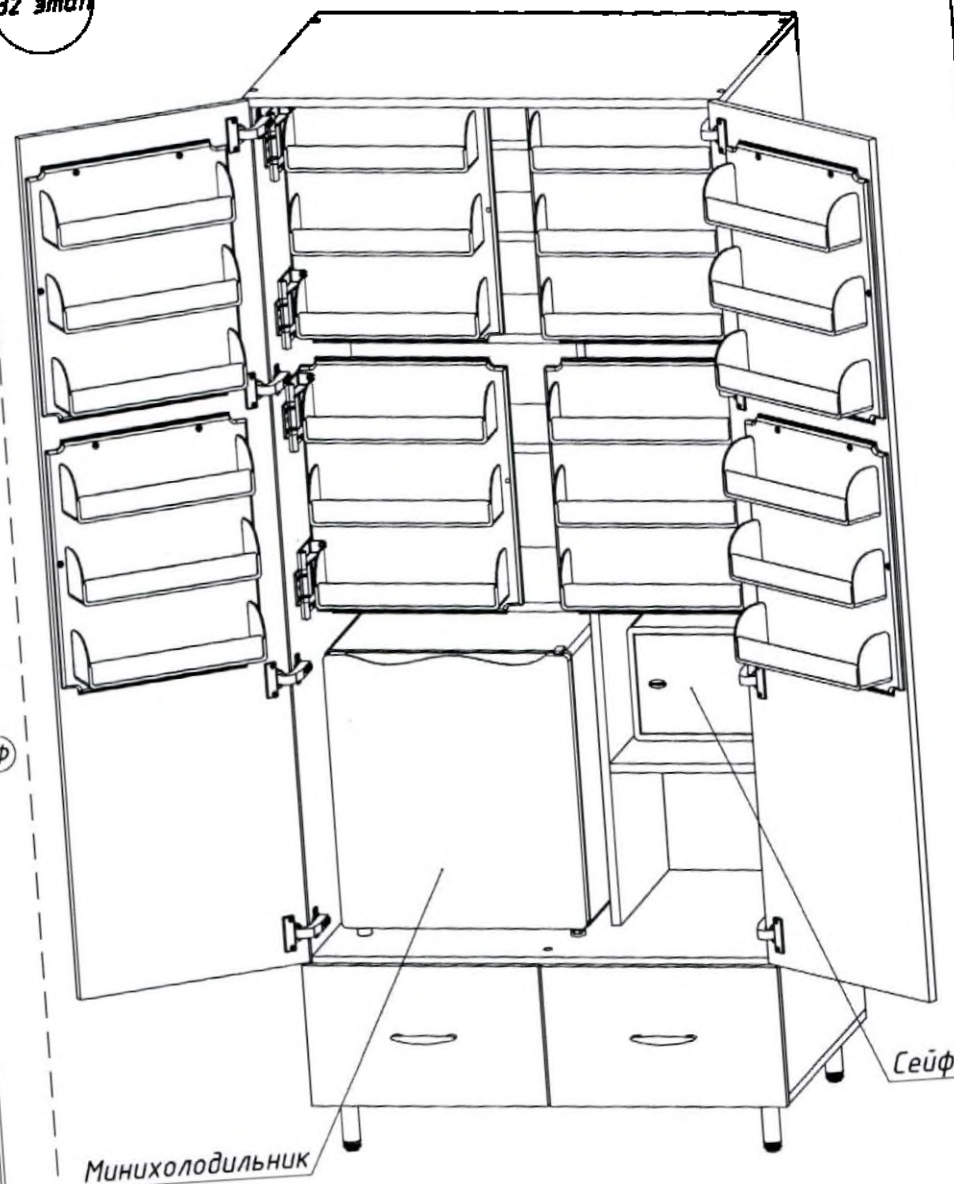

Минихолодильник


Сейф

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4

19

20

33 этап

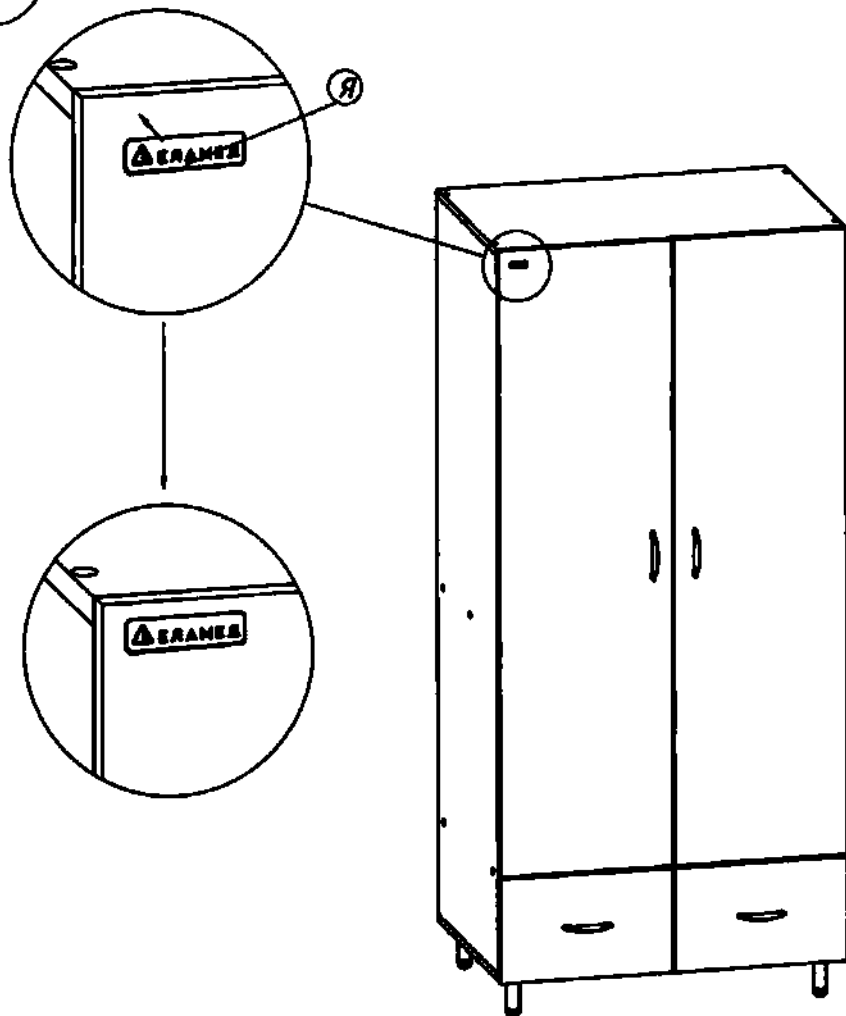

Инструкция по сборке изделия ШМФ - 02 - "ЕЛАТ" исп.5



Условные обозначения:

1. А-Ч: детали
 2. 1 - 33: крепёж и фурнитура
 3. 1 - 20: этапы сборки

Код 528

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Полка	3
Г	Стенка задняя	1
Д	Перегородка межъярочная	1
Е	Крышка	1
Ж	Основание	1
З	Стенка задняя 1	1
И	Стенка задняя 2	1
К	Полка малая	3
Л	Полка островного ящика	1
М	Дверь островного ящика	1
Н	Дверь	1
О	Основание накладной полки	3
П	Основание поворотной полки	2
Р	Полка выдвигаемая	1
С	Фасад ящика	1
Т	Стенка правая ящика	1
У	Стенка левая ящика	1
Ф	Стенка задняя ящика	1
Х	Дно ящика	1
Ц	Полка навесная	21
Ч	Панель	21
Ш	Логотип компании	1

ШМФ-02-"ЕЛАТ" исп.5




1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	16	Саморез 3,5x13	
2	18	Саморез с прессшайбой 4,2x19	
3	2	Ответная планка замка	
4	32	Конфирмат 6,4x50	
5	28	Шкант мебельный 8x30	
6	24	Заглушка для конфирмата	
7	16	Полкодержатель	
8	16	Винт М4x25	
9	24	Гайка М4	
10	16	Шайба 4	
11	38	Гвоздь 1,6x25	
12	8	Саморез 3x20	
13	36	Саморез 4x16	

ШМФ-02-"ЕЛАТ" исп.5

2

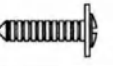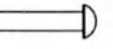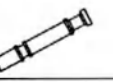Арт.	Кол - во	Обозначение	
14.	2	Замок	
15.	2	Петля Slide-on стандартная (90/110) вкладная	 15/1  15/2
16.	1	Ручка C0760	
17.	4	Петля Slide-on специальная (90/175) накладная	 17/1  17/2
18.	2	Ручка мебельная	
19.	5	Винт полусфера с прессшайбой M4x20	
20.	4	Кронштейн петли Г-образной	
21.	8	Винт M4x35	
22.	16	Шайба 4	
23.	4	Ось	
24.	4	Шток эксцентрика	
25.	4	Эксцентрик 16 мм	
26.	4	Заглушка эксцентрика	
27. *	1	Ключ шестигранный Z=4	
28.	4	Саморез 3x12	


Арт.	Кол - во	Обозначение	
29.	1 комплект	Направляющая шариковая	
30.	1 комплект	Направляющая роликовая	 30/1  30/2
31.	4	Нажка мебельная	
32.	4	Петля Г-образная	
33.	4	Саморез с прессшайбой 4,2x14	

* Конфирматы  закручивать ключом шестигранником  заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.

ОМ № 29.491.04

1 этап


Схема сборки изделия
Стенка левая

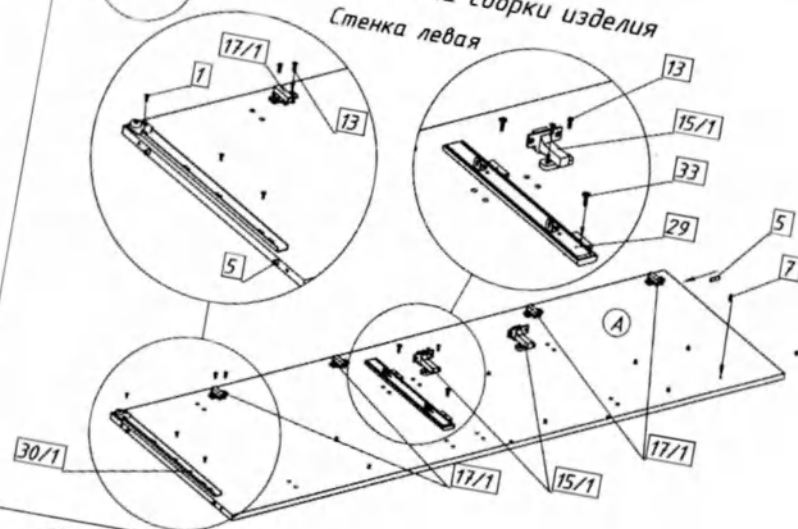

4x1 шт.
1x3 шт.
33x2 шт.
5x4 шт.
7x8 шт.
13x12 шт.
15/1x2 шт.
17/1x4 шт.
29x1 шт.
30/1x1 шт.

2 этап

Стенка правая

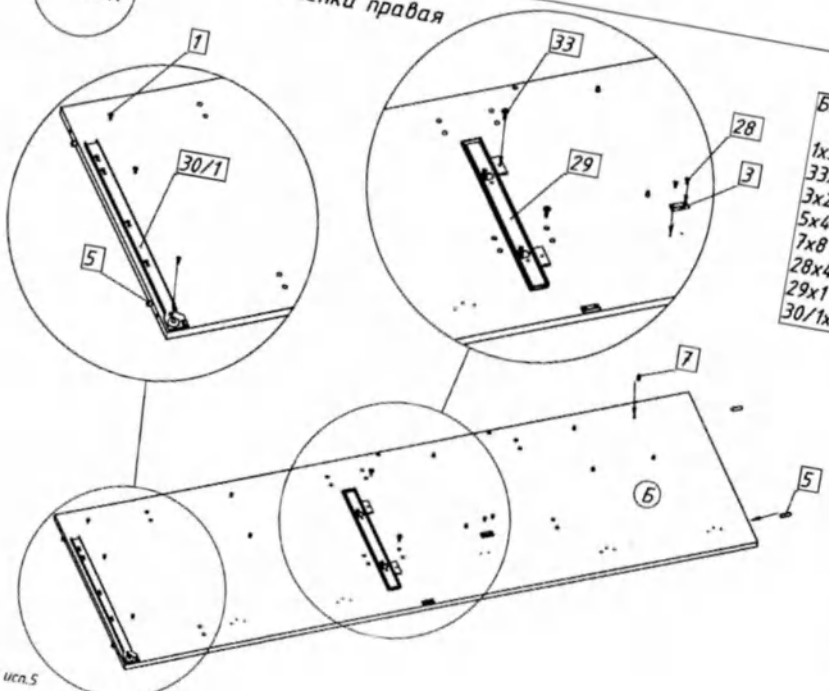

6x1 шт.
1x3 шт.
33x2 шт.
3x2 шт.
5x4 шт.
7x8 шт.
28x4 шт.
29x1 шт.
30/1x1 шт.


ШМФ-02-“ЕЛЛ”-исп.5

5

ШМФ-02-“ЕЛЛ”-исп.5

ОМ № 29.491.04

3 этап

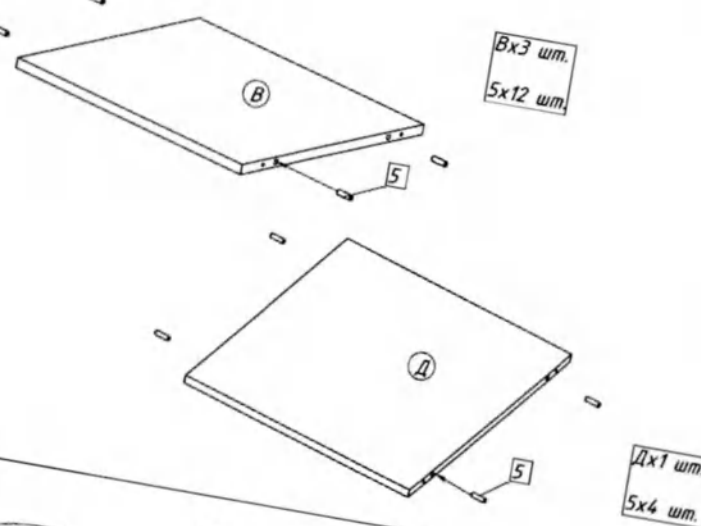


Bx3 шт.
5x12 шт.

4x1 шт.
5x4 шт.

4 этап

Каркас

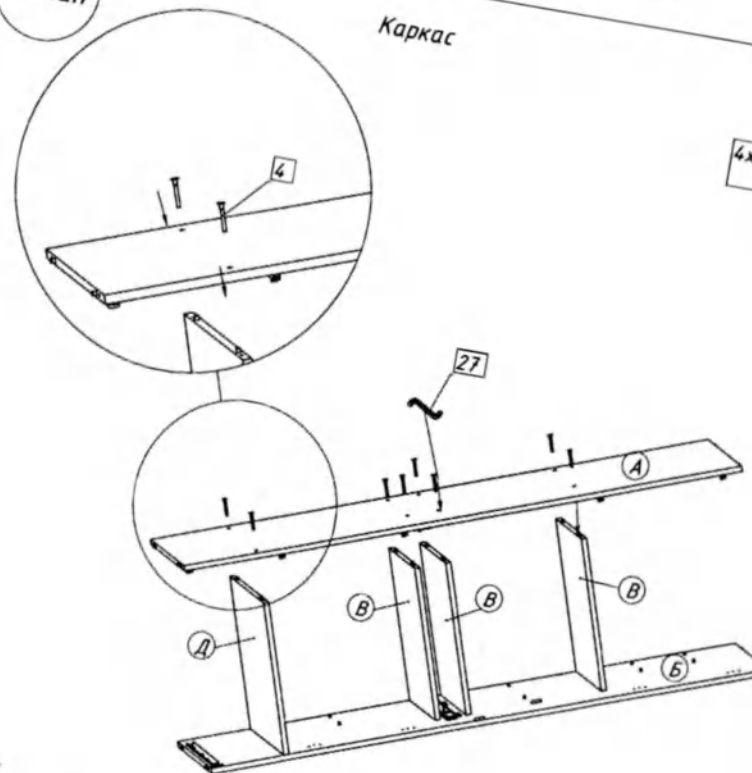


4x16 шт.

6


5 этап

1. Установите ножки [31] на основание шкафа (Ж).
2. Установите основание (Ж).

4x1 шт.
8x1 шт.
Жх1 шт.
4x12 шт.
8x16 шт.
9x16 шт.
22x16 шт.
31x4 шт.

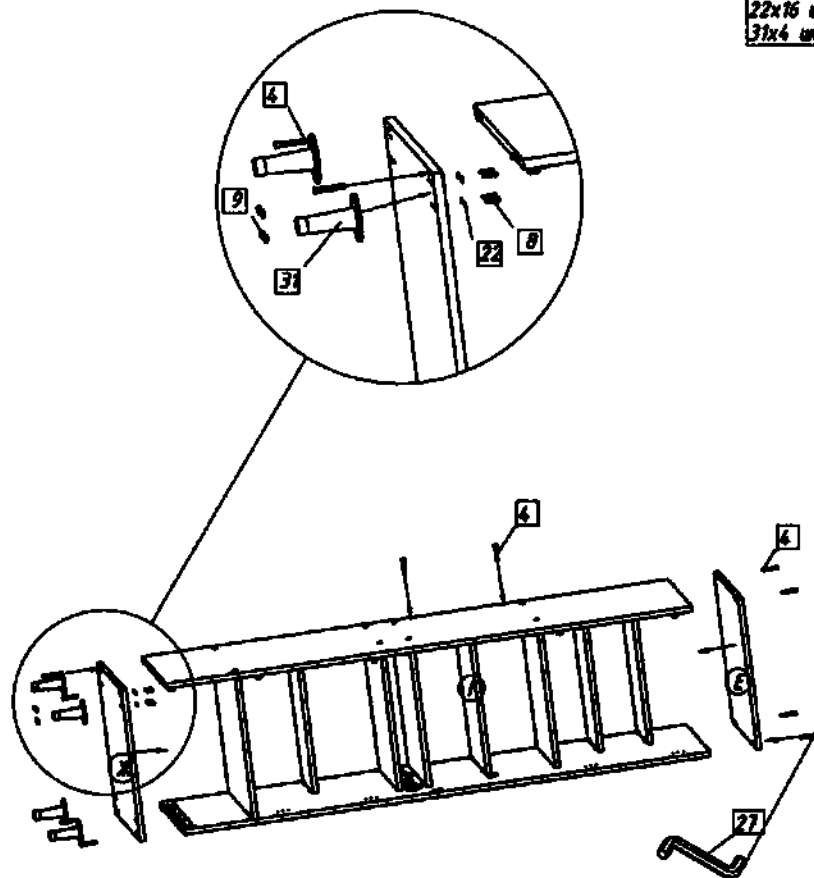

6 этап


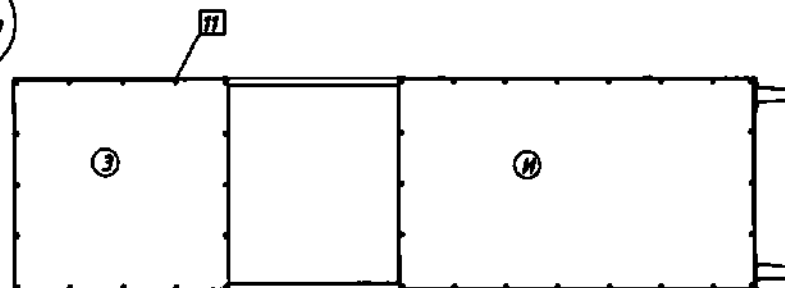


3x1 шт.
Их1 шт.
Кх3 шт.
Лх1 шт.
11x38 шт.

7 этап


Дверь встроенного ящика

Их1 шт.
12x4 шт.
13x4 шт.
14x1 шт.
15/2x2 шт.
16x1 шт.
19x1 шт.

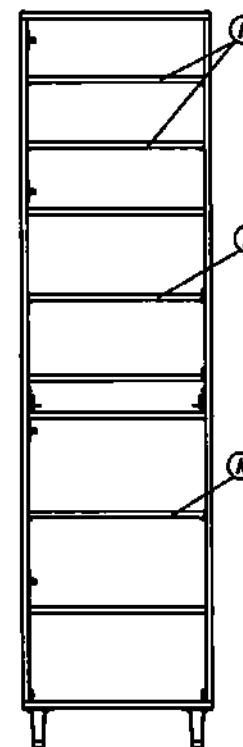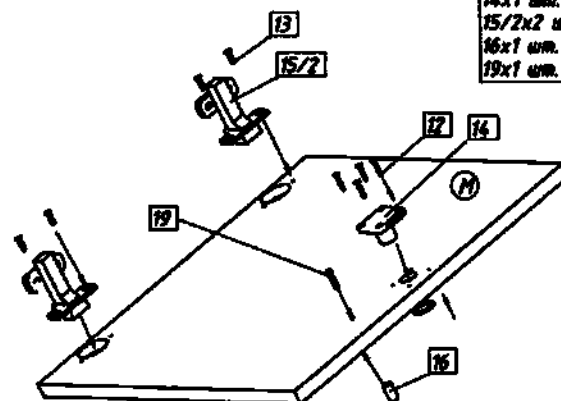


8 этап

Дверь шкафа

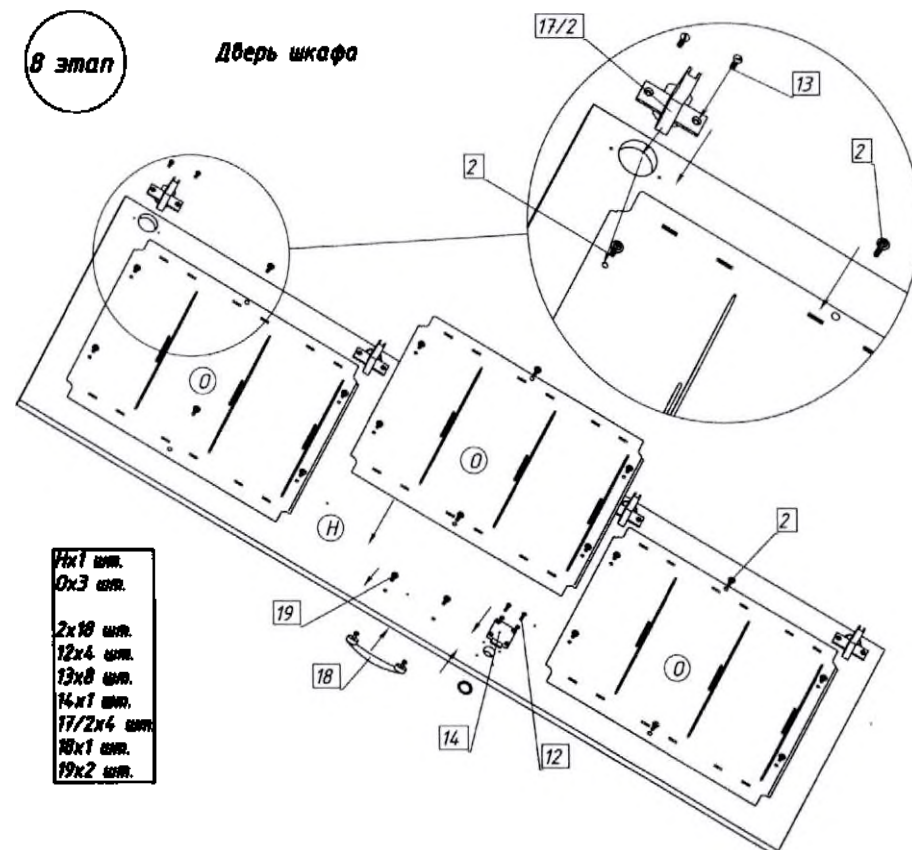

9 этап

Полка поворотная

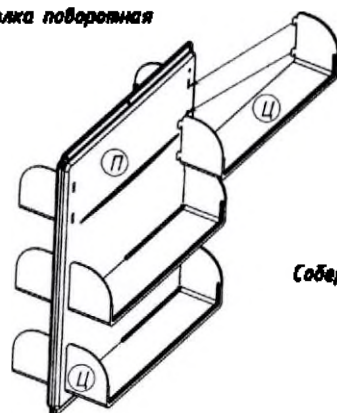

1x2 шт.
4x12

Соберите две полки.


УМФ-02-“ЕААТ” уч.5

10 этап


Вид сзади

9x8 шт.
10x16 шт.
21x8 шт.
23x4 шт.
32x4 шт.
20x4 шт.


Произведите сборку двух поворотных полок.

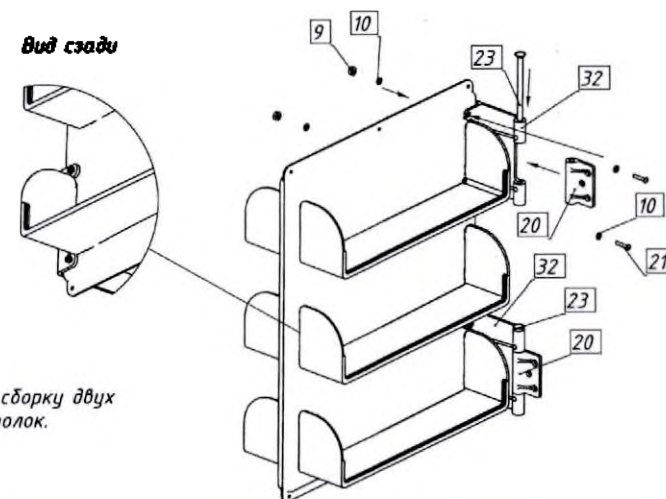

11 этап

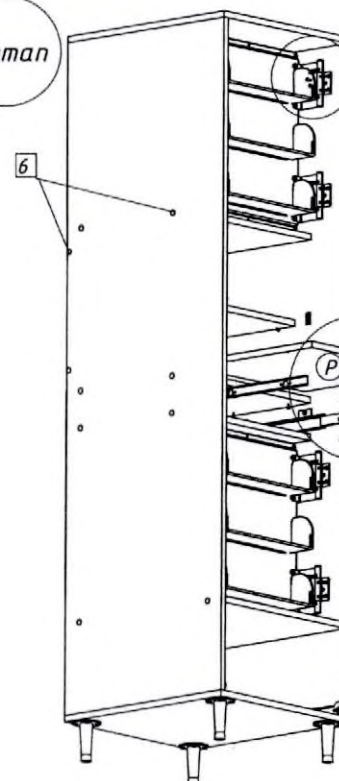

Px1 шт.
1x4 шт.
6x20 шт.
13x12 шт.

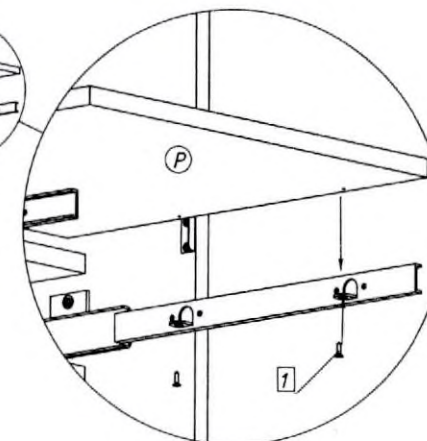


УМФ-02-“ЕААТ” уч.5


10

OM № 29.491.04


12 этап

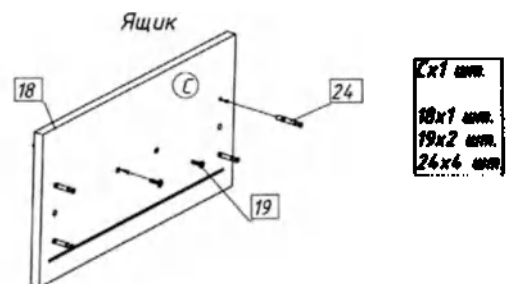

13 этап

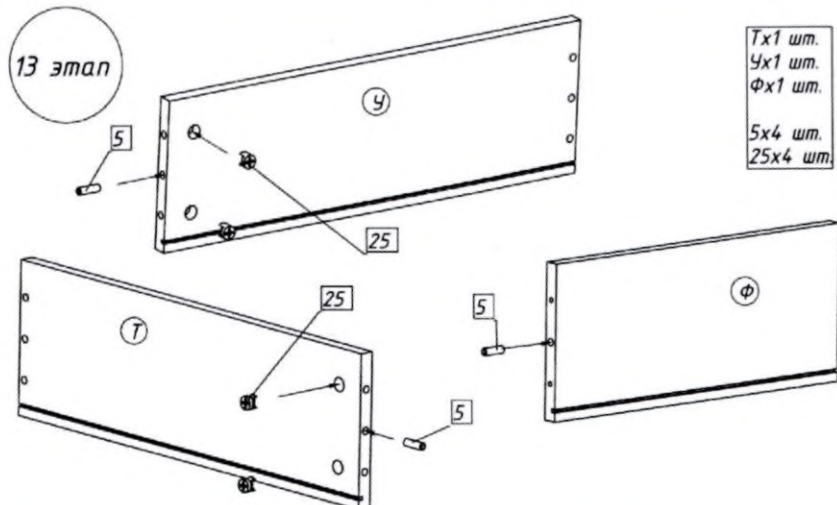

14 этап

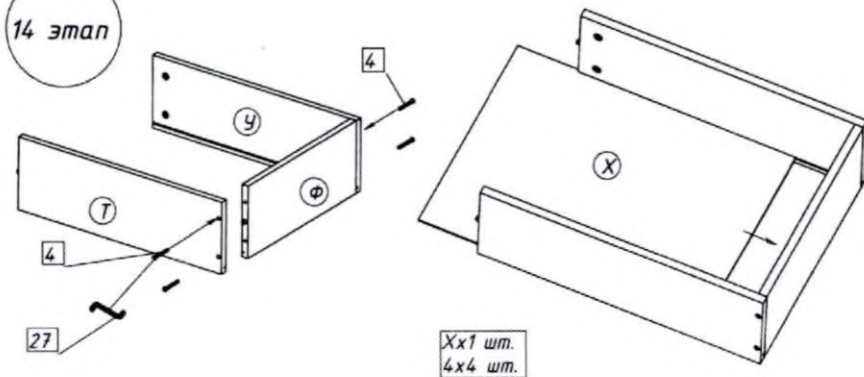


ШМП-02-“Е/АТ” uch.5


11

OM № 29.491.04

15 этап

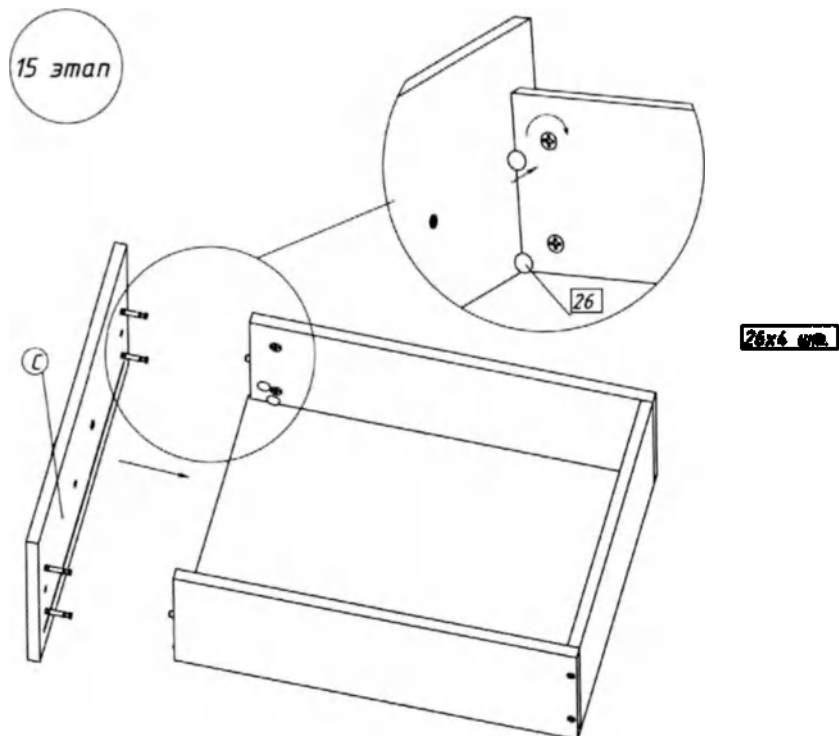

16 этап

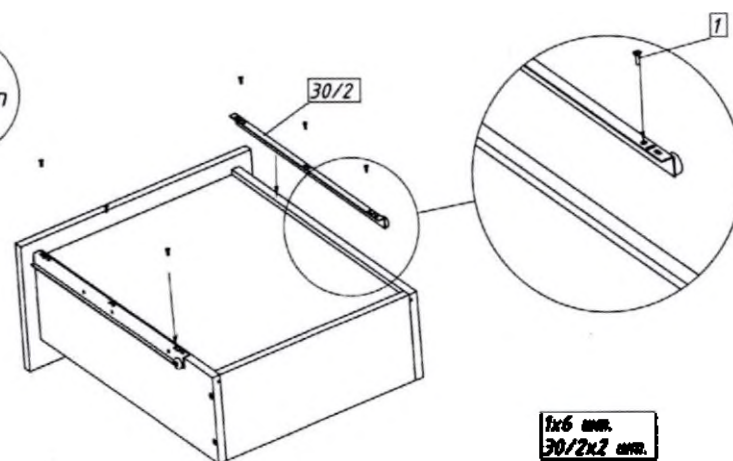


ШМП-02-“Е/АТ” uch.5


12

17 этап

Установите внутреннюю дверь.

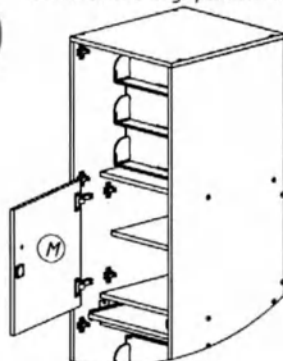


19 этап

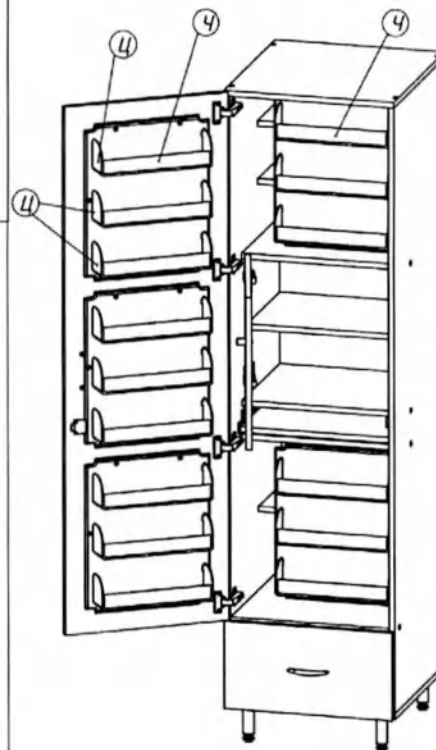Ц1х9 шт.
Чх21 шт.

Установите внешнюю дверь.

18 этап

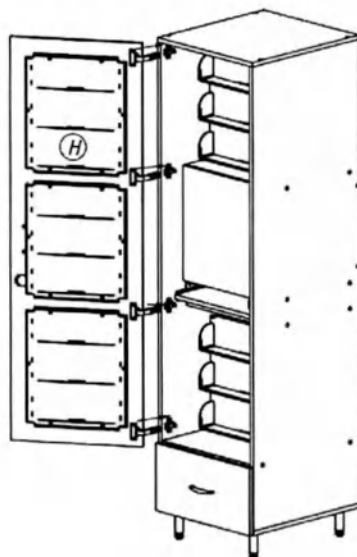После установки дверей
произведите регулировку
петель

Вертикальная регулировка

Боковая регулировка
(перекос дверей)

Фронтальная регулировка




13

ШМФ-02-«Е/АТ» исп.5

20 этап

После сборки изделия,
произведите установку логотипа компании Ш


Шх1 шт.

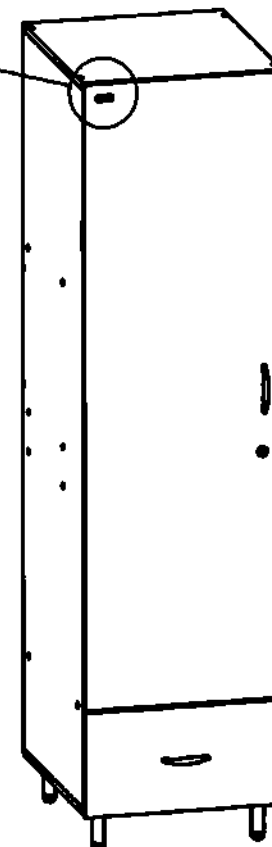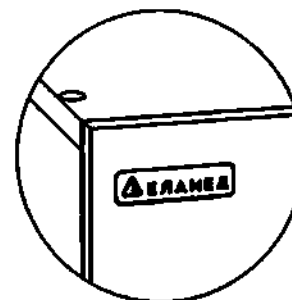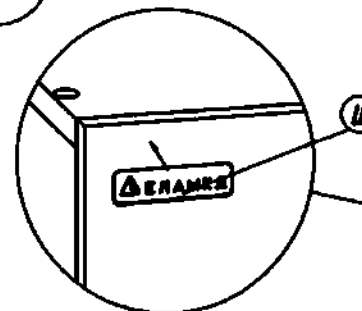

14

ШМФ-02-«Е/АТ» исп.5

Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.6

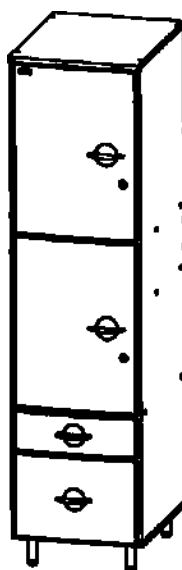

Условные обозначения:

1. А-У : детали

2. 1 - 31 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 23 : этапы сборки

Код 529

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Стенка шкафа задняя	1
Г	Перезарядка нежелезусная	1
Д	Крышка	1
Е	Основание	1
Ж	Стенка задняя	1
З	Планка	12
И	Полка малая	3
К	Дверь встроенного ящика	1
Л	Крышка встроенного ящика	2
М	Дверь	2
Н	Основание поворотной полки	1
О	Ящик малый	1
П	Ящик большой	1
Р	Фасад ящика малого	1
С	Фасад ящика большого	1
Т	Полка навесная	12
У	Логотип компании	1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.6



1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	6	Саморез 3x12	
2	24	Конфирмат 6,4x50	
3	22	Шкант мебельный 8x30	
4	28	Гайка М4	
5	16	Шайба 4 увеличенная	
6	20	Заглушка для конфирмата	
7	12	Полкодержатель	
8	16	Винт М4x25	
9	16	Саморез 4x16	
10	4	Саморез 3x20	
11	26	Гвоздь 1,6x25	
12	20	Саморез 3,5x13	
13	1	Винт полусфера с прессшайбой М4x20	


ШМФ - 02- «ЕЛАТ» исп.6

2

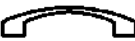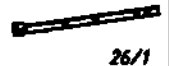Арт.	Кол - во	Обозначение	
14	1	Замок	
15	2	Петля Slide-on стандартная (90/110) вкладная	 15/1  15/2
16	1	Ручка C0760	
17	4	Винт М4х35	
18	2	Ручка мебельная	
19	3	Ответная планка замка	
20	4	Винт М4х30	
21	12	Заглушка самоклеящаяся	
22 *	1	Ключ шестигранный Z=6	
23	8	Саморез 4,5х16	
24	4	Скоба петли	
25	4	Ось петли	
26	2 комплекта	Направляющая роликовая	 26/1  26/2
27	4	Ножка мебельная	

Арт.	Кол - во	Обозначение	
28	2	Петля Г-образная	
29	2	Кронштейн петли Г-образной	
30	2	Ось	
31	8	Шайба 4	


* Конфирматы 22 закручивать ключом шестигранным 22 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.

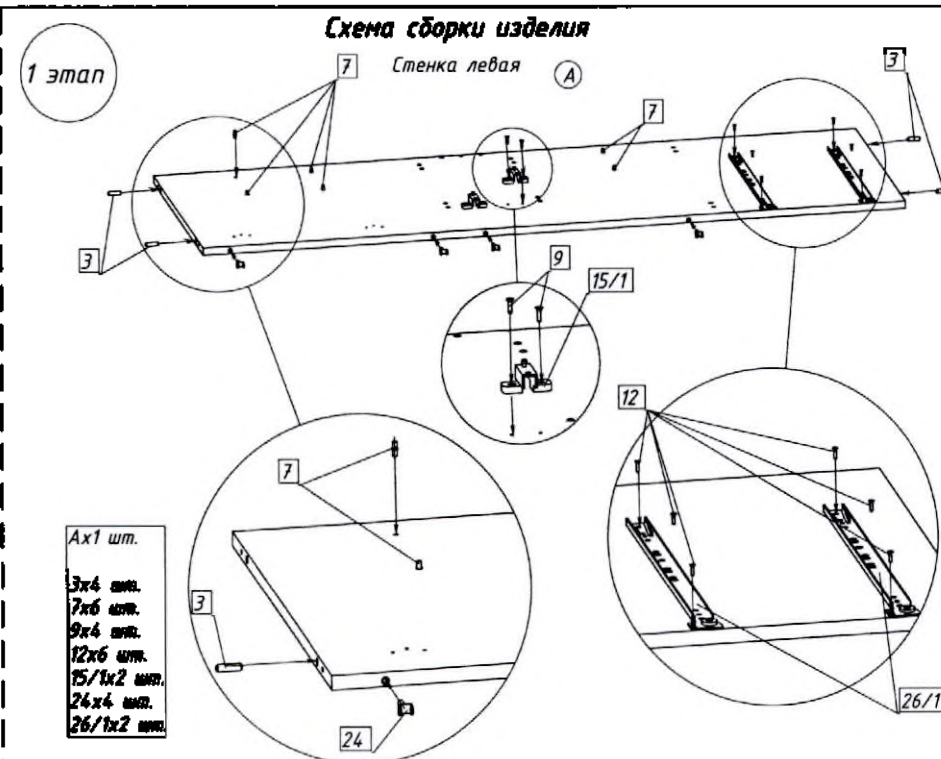


ОМ № 29.493.03

2 этап

Стенка правая

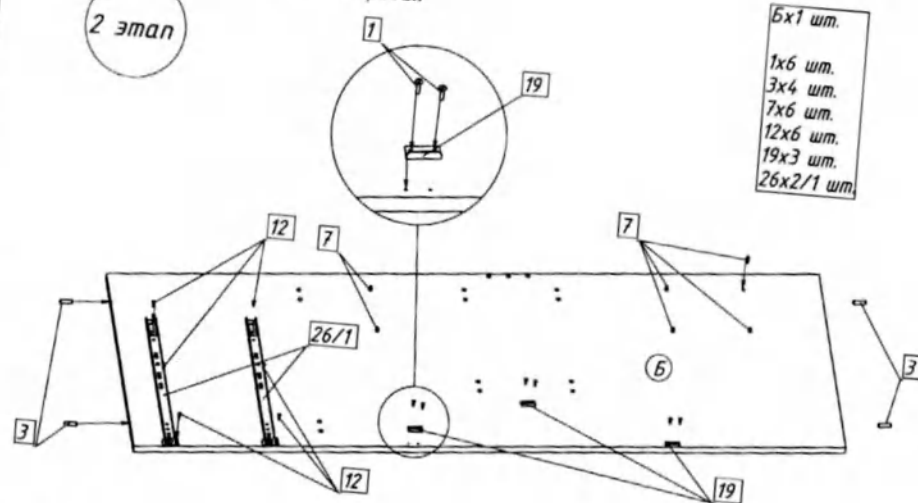


3 этап

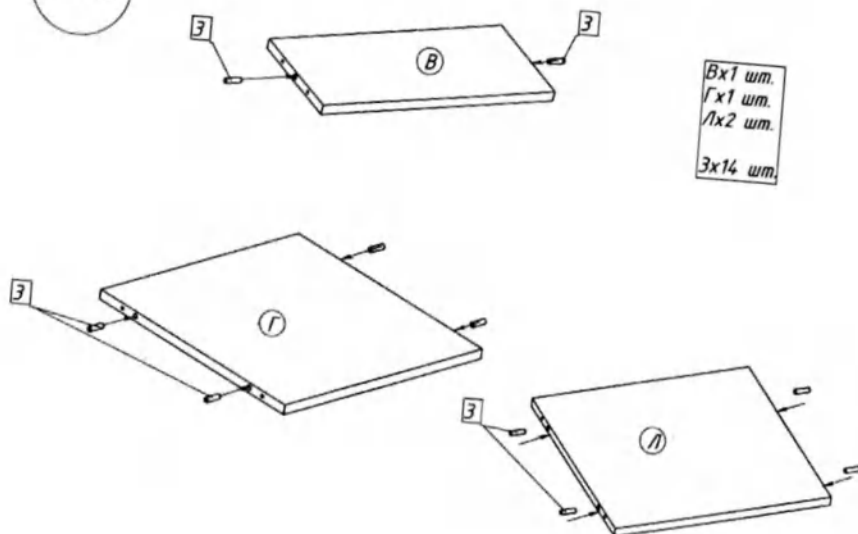


ШМФ - 02- "ЕЛЛТ" уч.6

ОМ № 29.493.03

4 этап

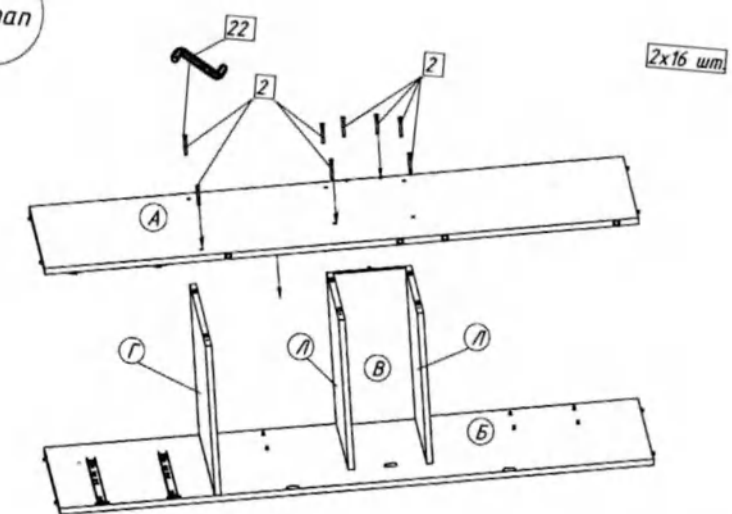


5 этап

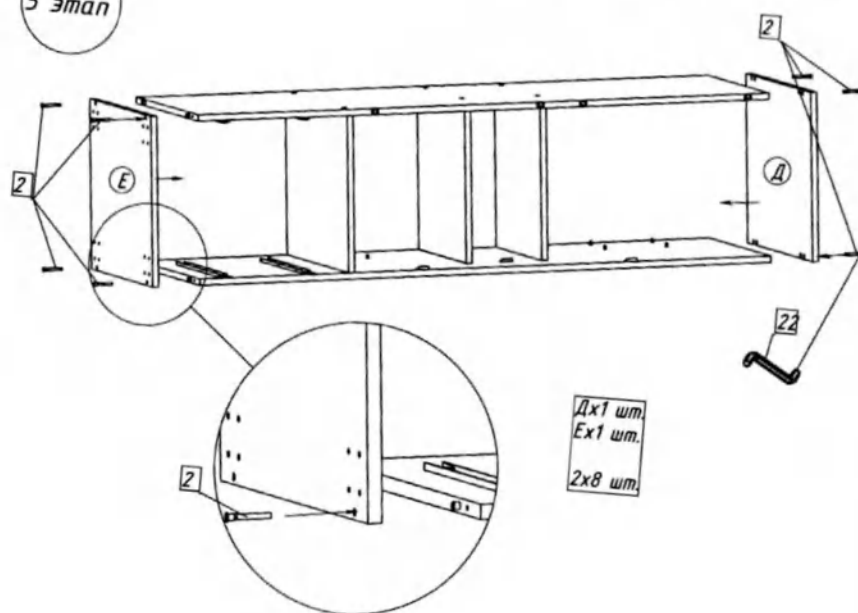


ШМФ - 02- "ЕЛЛТ" уч.6

6


6 этап

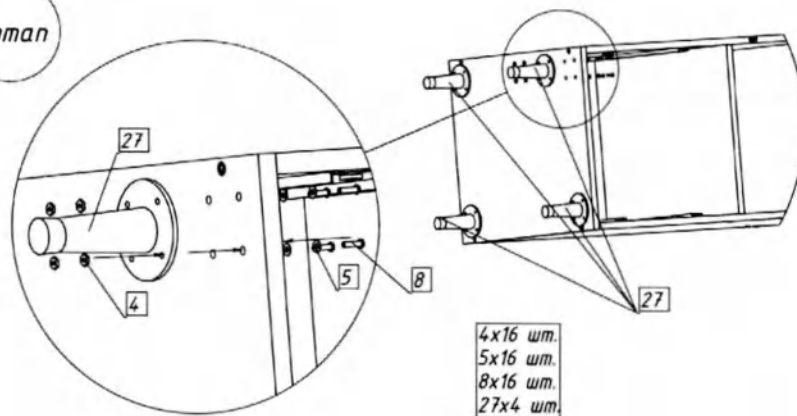

7 этап

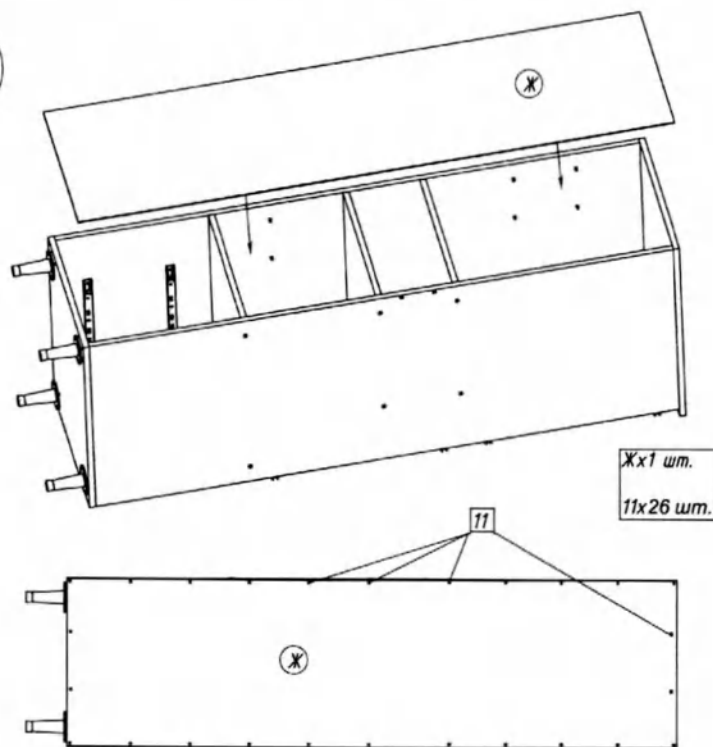


8 этап

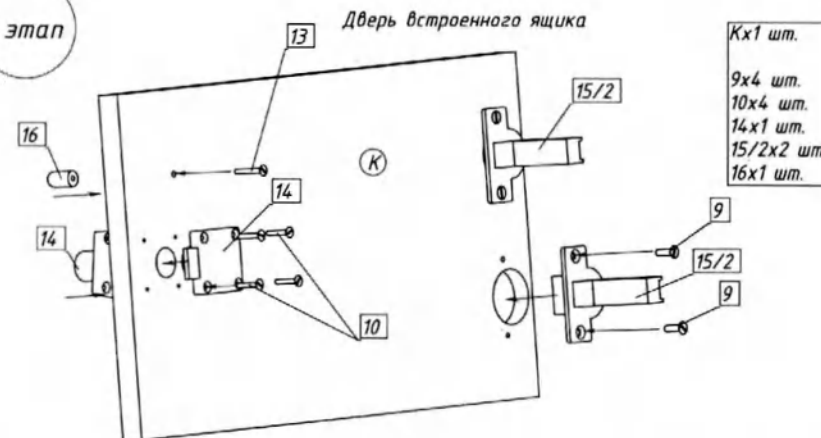

9 этап

Установите дверь встроенного ящика

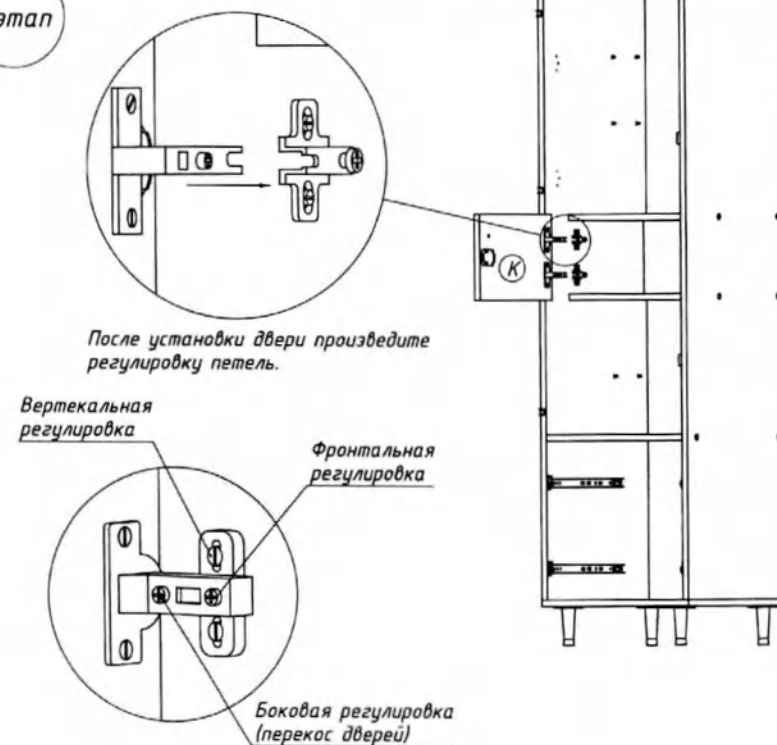

После установки двери произведите регулировку петель.

Вертикальная регулировка


Фронтальная регулировка

Боковая регулировка (перекос дверей)

10 этап


Установите три полки

Их 3 шт.

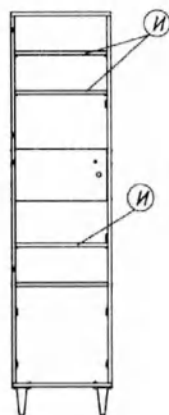

11 этап

Поворотная полка

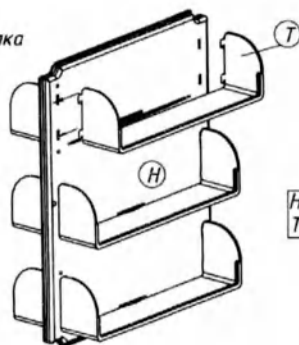


Нх1 шт.
Тх6 шт.

12 этап


Установите петли на поворотную полку

4х4 шт.
17х4 шт.
28х2 шт.
29х2 шт.
30х2 шт.
31х8 шт.

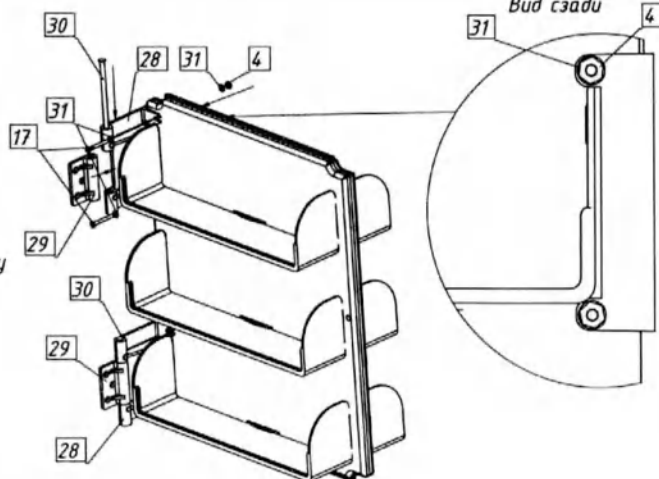

13 этап

Установите поворотную полку

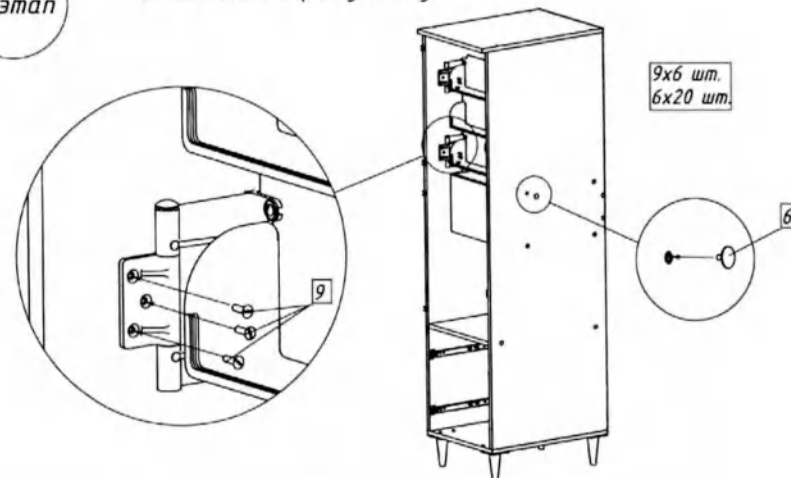


9х6 шт.
6х20 шт.

6

14 этап


Соберите ящик малый

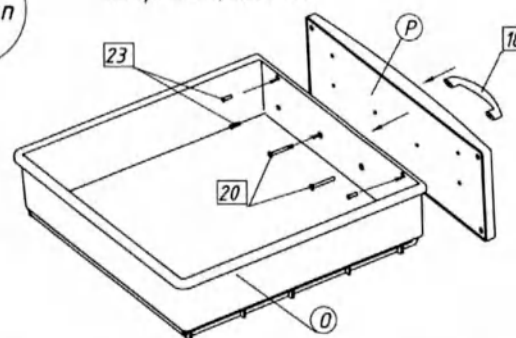

0х1 шт.
Рх1 шт.
18х1 шт.
20х2 шт.
23х4 шт.


15 этап

12х4 шт.
26/2х2 шт.

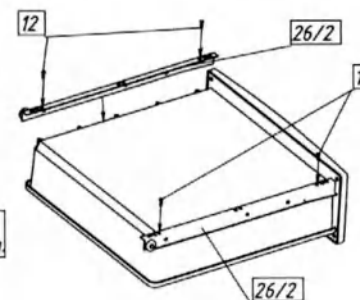


16 этап

21х6 шт.

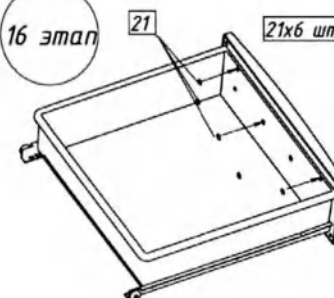

17 этап


Соберите ящик большой

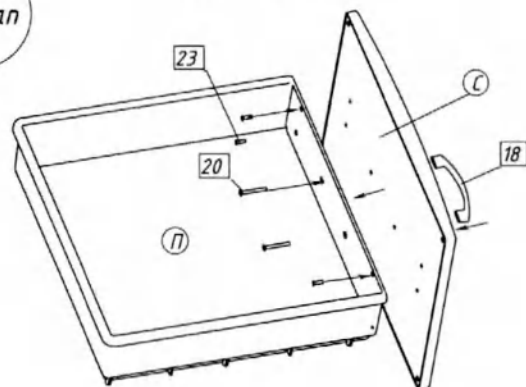

Лх1 шт.
Сх1 шт.
18х1 шт.
20х2 шт.
23х4 шт.


18 этап

12х4 шт.
26/2х2 шт.

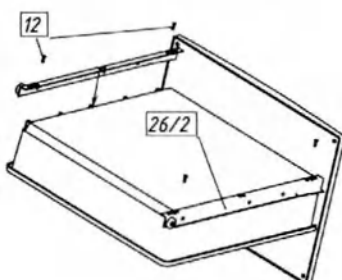


19 этап

21х6 шт.

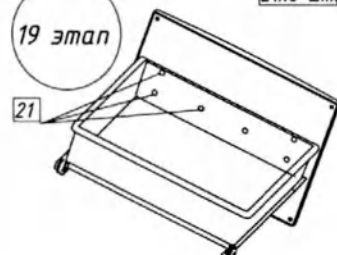


20 этап

Мх2 шт.
Тх6 шт.

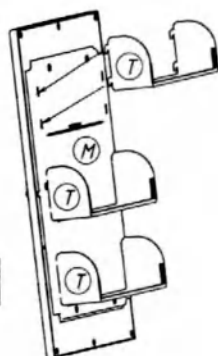

Соберите 2 двери.


21 этап

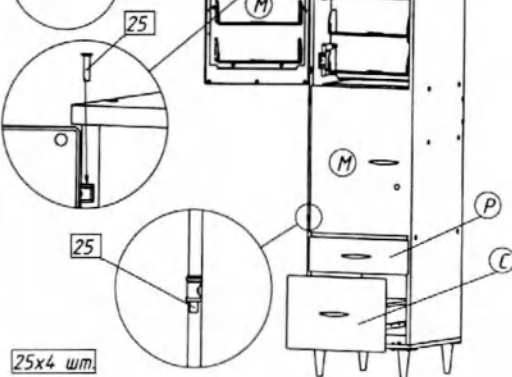

25х4 шт.

Установить ящики и двери. Забить
оси петель лёгкими ударами молотка.


22 этап

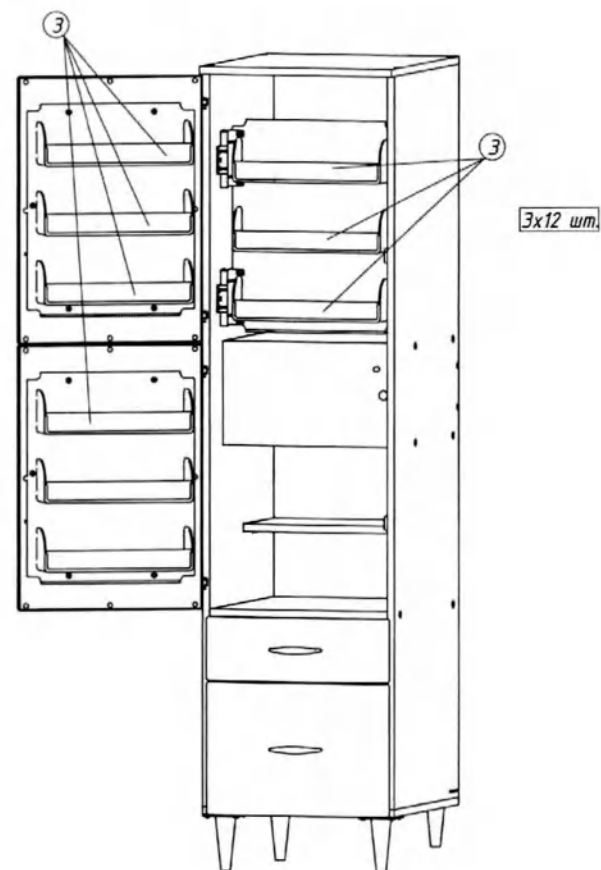

После сборки изделия,
произведите установку логотипа компании ④

23 этап


5x1 мм

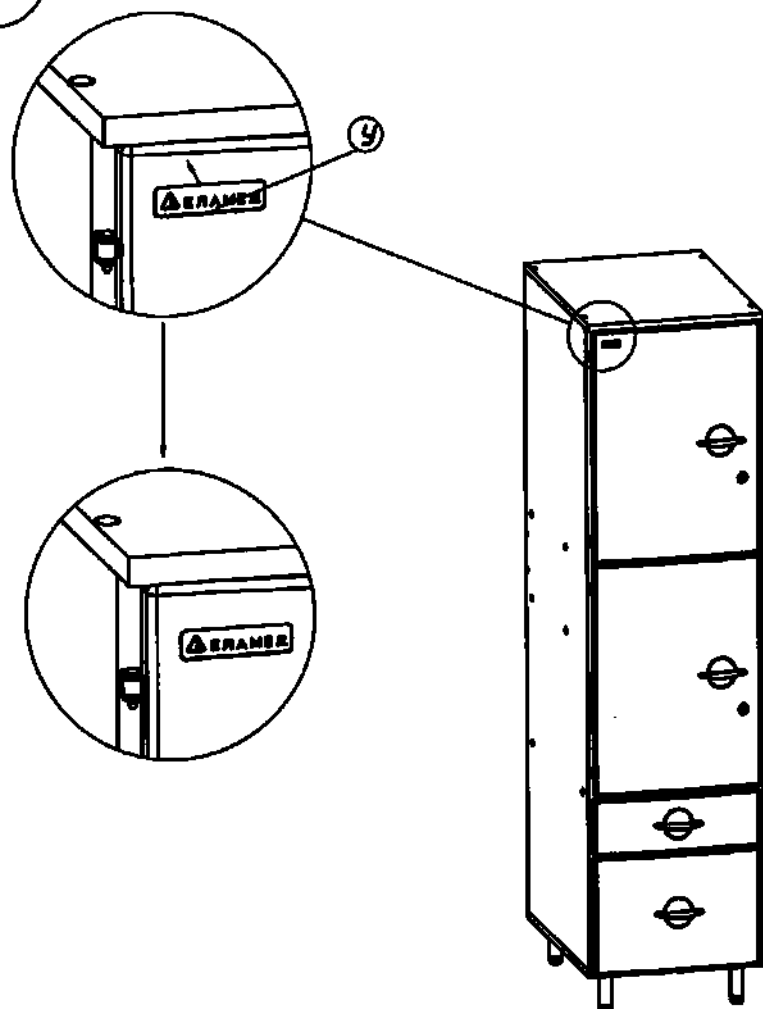

Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-"ЕЛАТ" исп.7





Условные обозначения:

1. А-Т : детали
2. [1] - [26] : крепёж и фурнитура
3. (1) - (23) : этапы сборки

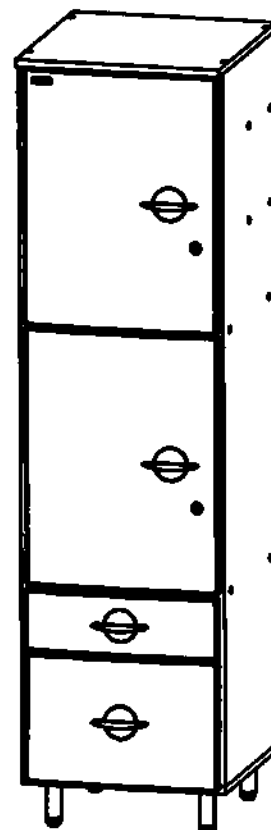**Детали**

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Стенка задняя	1
Г	Полка основная	2
Д	Крышка	1
Е	Основание	1
Ж	Полка малая	2
З	Дверь встроенного ящика	1
И	Крышка встроенного ящика	2
К	Дверь	2
Л	Ящик малый	1
М	Ящик большой	1
Н	Фасад ящика малого	1
О	Фасад ящика большого	1
П	Полка навесная	6
Р	Планка	6
С	Логотип компании	1
Т	Стенка задняя встроенного ящика	1

Крепёж и фурнитура

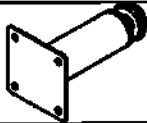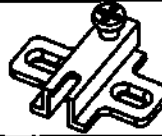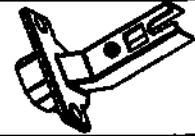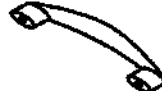Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	28	Конфирмат 6,4x50	
2	24	Заглушка конфирмата	
3	26	Шкант мебельный 8x30	
4	4	Ножка мебельная	
5	16	Винт М4х25	
6	16	Гайка М4	
7	16	Шайба 4	
8	8	Саморез 4x16	
9	2	Петля Slide-on стандартная (90/110) вкладная	 9/1  9/2
10	2	Ручка мебельная	
11	4	Винт М4х30	
12	8	Полкодержатель	
13	1	Ручка C0760	
14	1	Винт полусфера с прессшайбой М4х20	
15	1	Замок	 0
16	3	Ответная планка замка	

Крепёж и фурнитура




Арт.	Кол - во	Обозначение	
17	6	Саморез 3x12	
18	20	Саморез 3,5x13	
19	2 комплекта	Направляющая роликовая	 19/1  19/2
20	4	Саморез 3x20	
21	8	Саморез 4,5x16	
22	12	Заглушка самоклеющаяся	
23	4	Скоба петли	
24	4	Ось петли	
25	1	Ключ шестигранный Z=4	
26	40	Гвоздь 1,6x25	

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой


Ах1 шт.
3х4 шт.
8х4 шт.
12х4 шт.
19/1х2 шт.
18х6 шт.
23х4 шт.

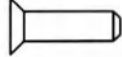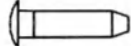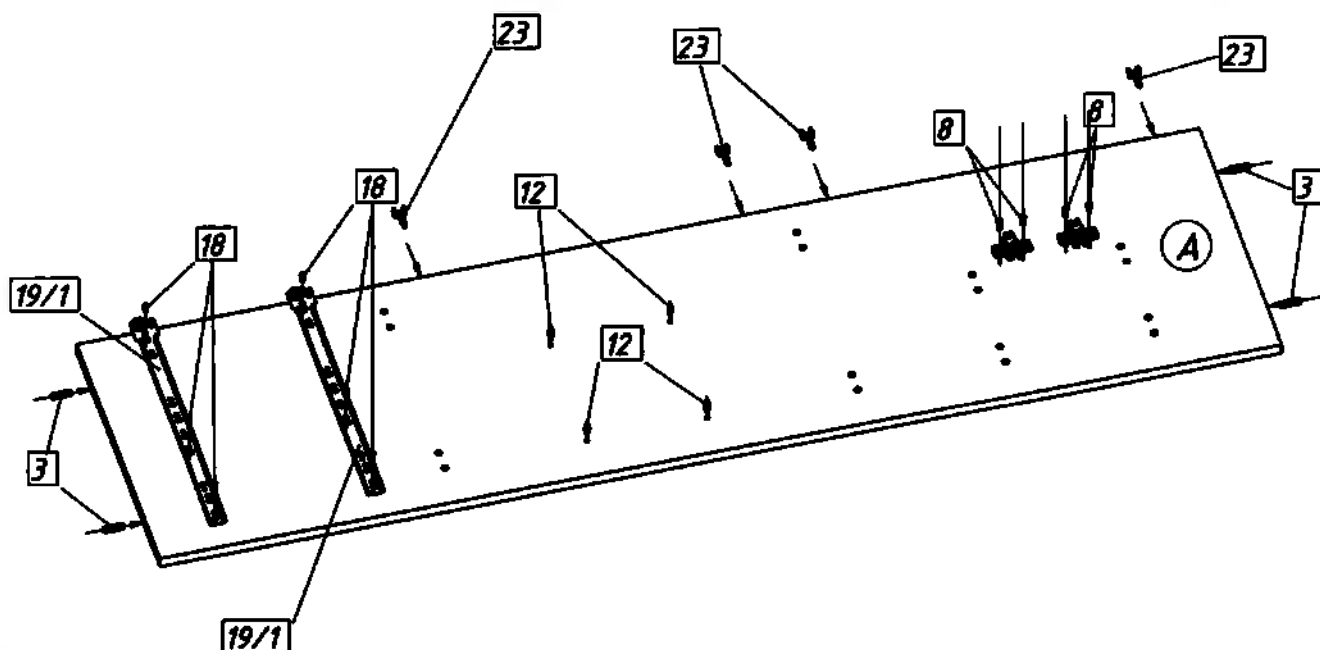


2 этап

Произведите сборку стенки правой

Бх1 шт.
3х4 шт.
12х4 шт.
16х3 шт.
17х6 шт.
19/1х2 шт.
18х6 шт.


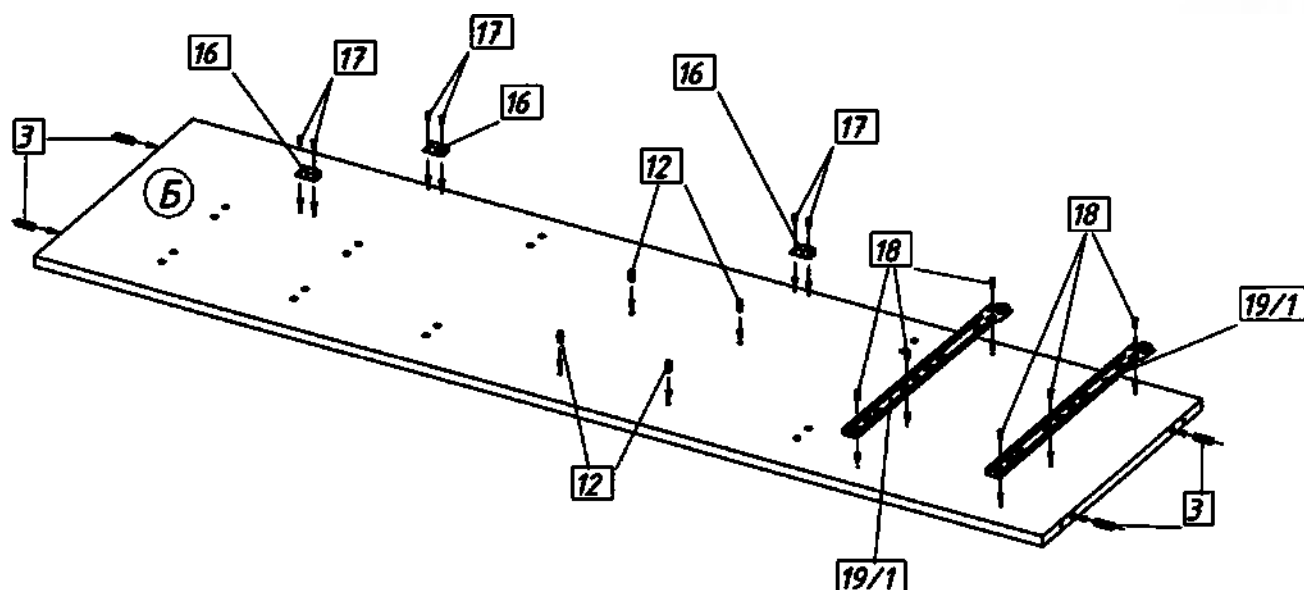


3 этап

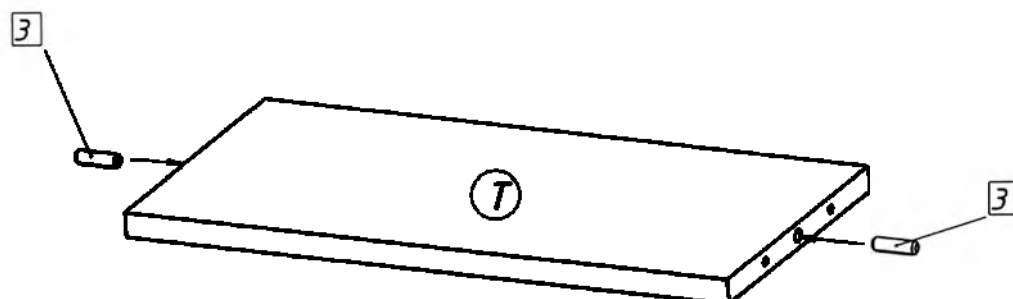

4 этап

Произведите сборку 2-х полок основных

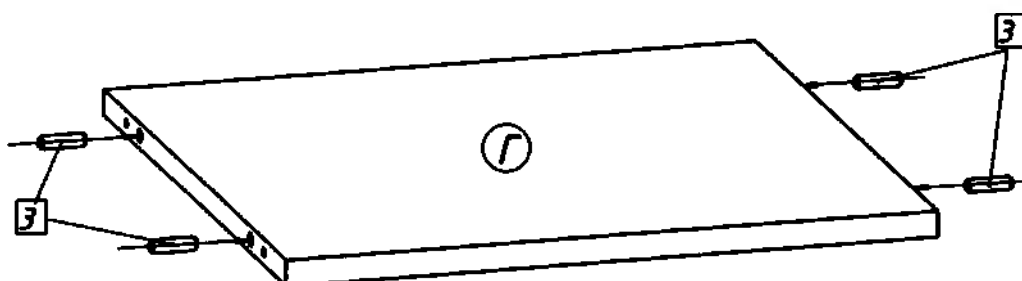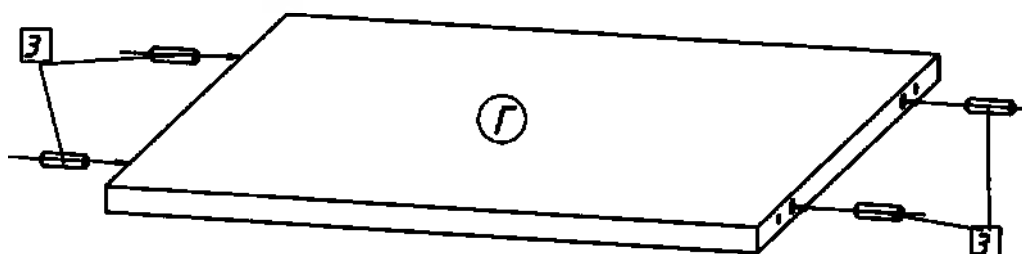


ОМ 29.495.05

Произведите сборку 2-х крышек встроенного ящика

Их2 шт.
3х8 шт.


5 этап

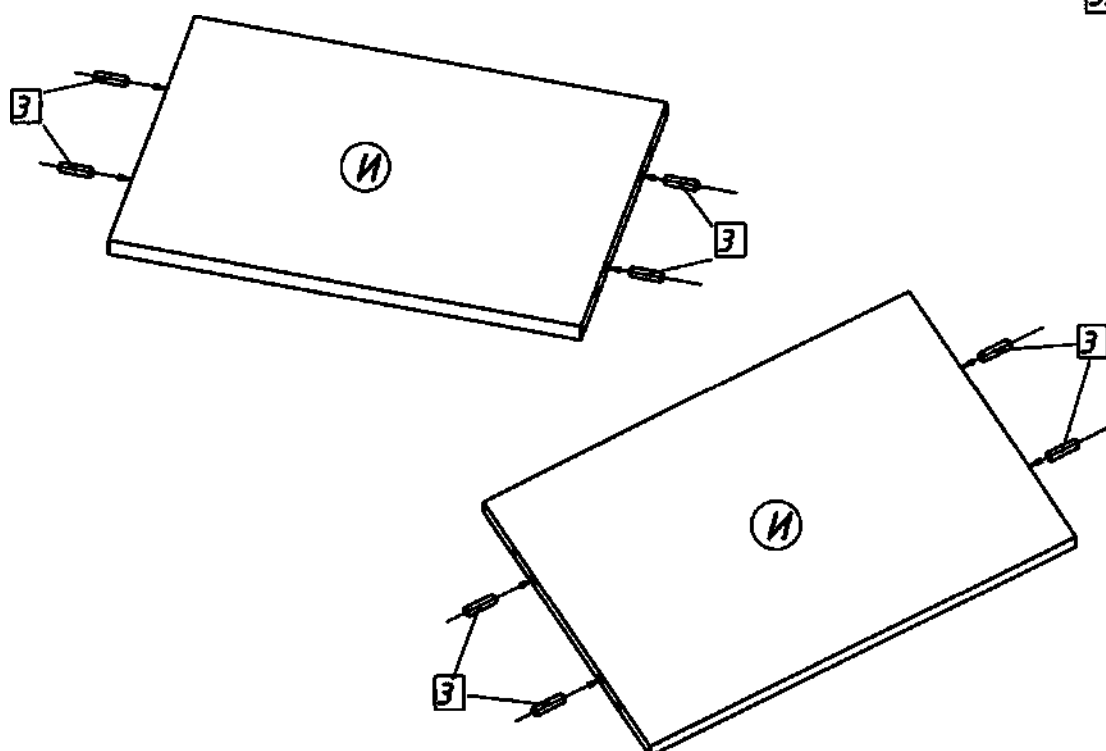

6 этап

Произведите сборку двери встроенного ящика

3х1 шт.
9/2х2 шт.
8х4 шт.
13х1 шт.
14х1 шт.
15х1 шт.
20х4 шт.

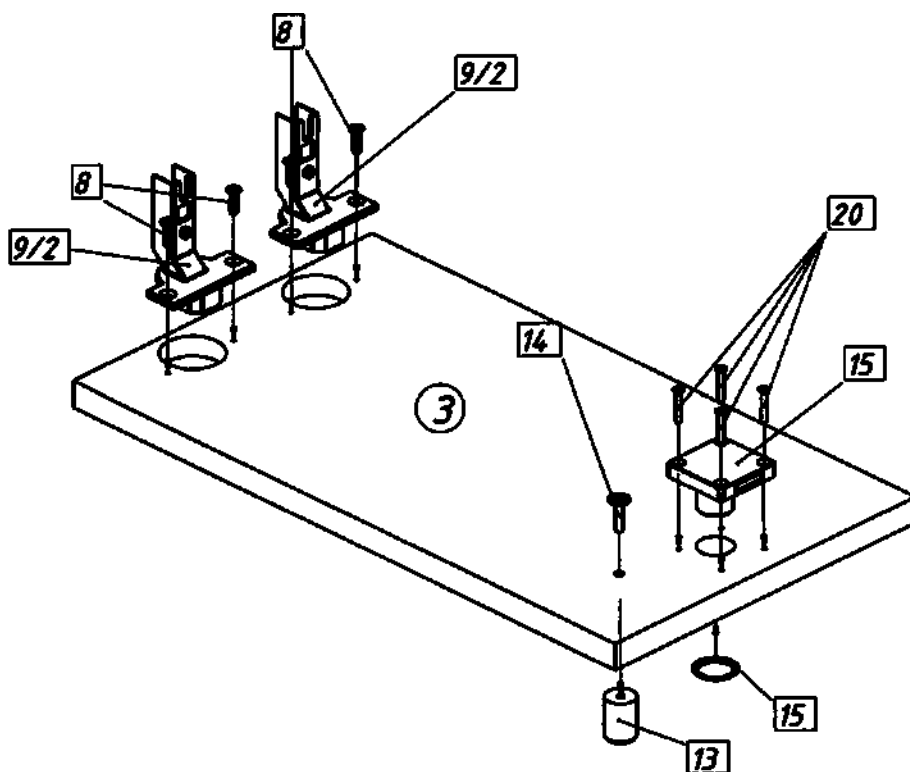


ОМ 29.495.05

Произведите сборку двери

7 этап


Kx1 шт.
Пх3 шт.

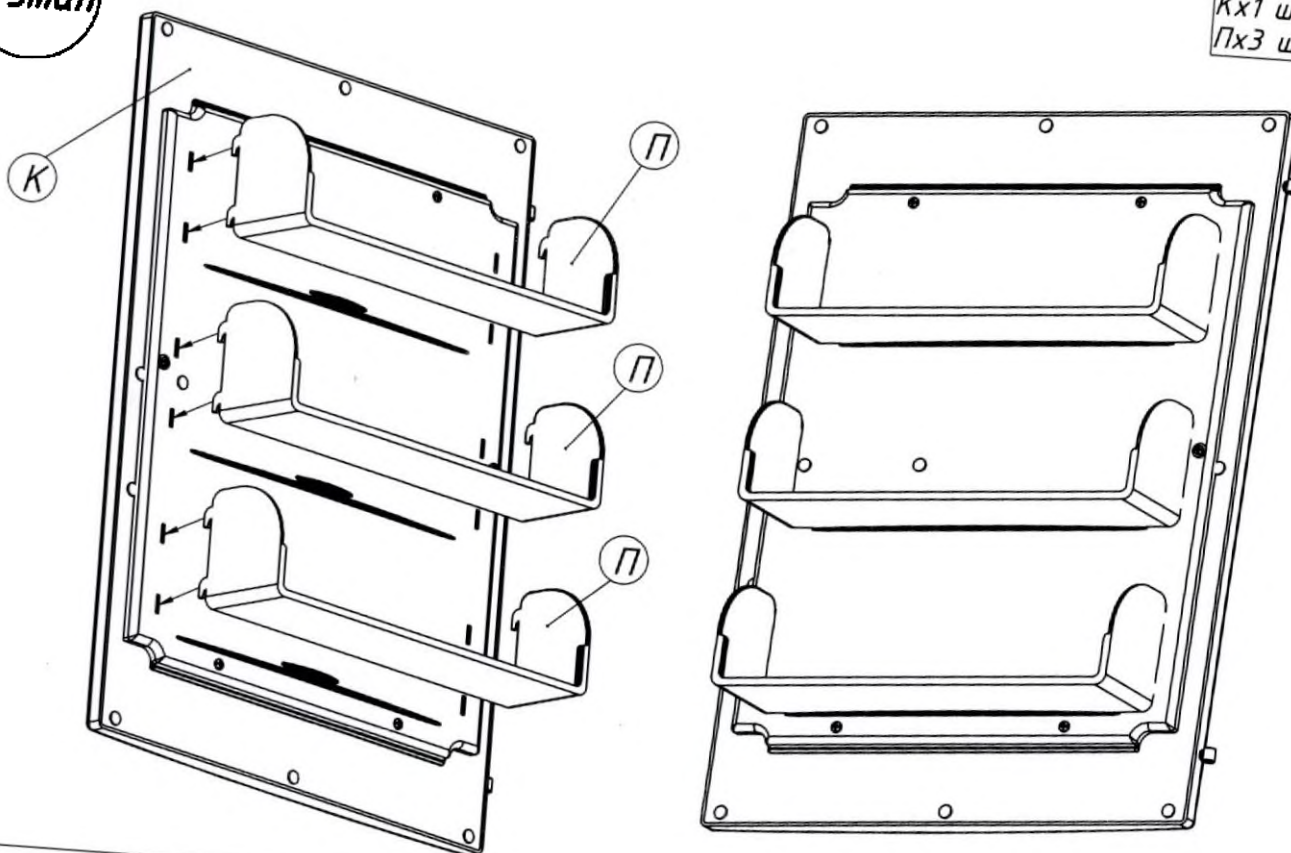

8 этап


Произведите сборку двери

Kx1 шт.
Пх3 шт.

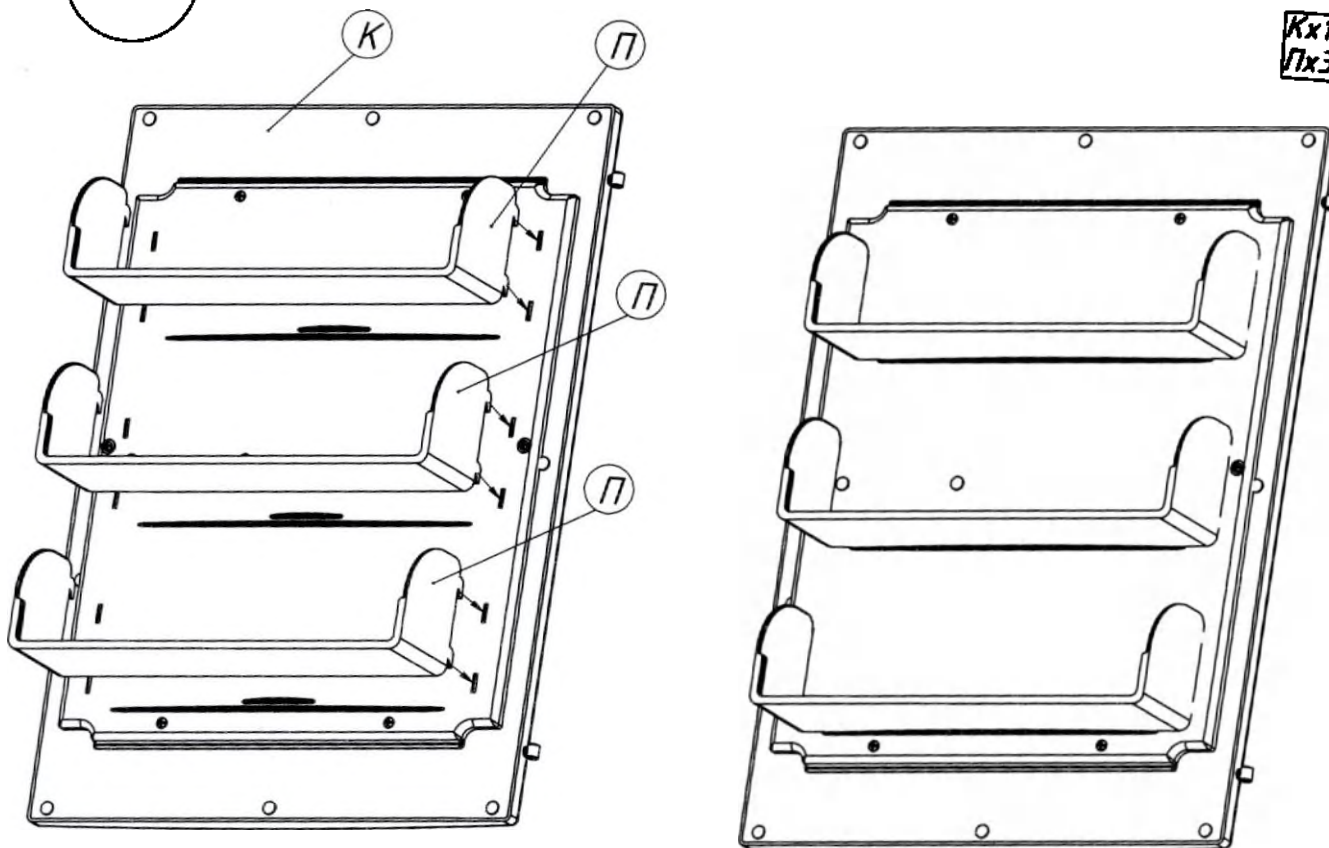

ИМФ-02-“ЕЛЛ” учт.7


9 этап

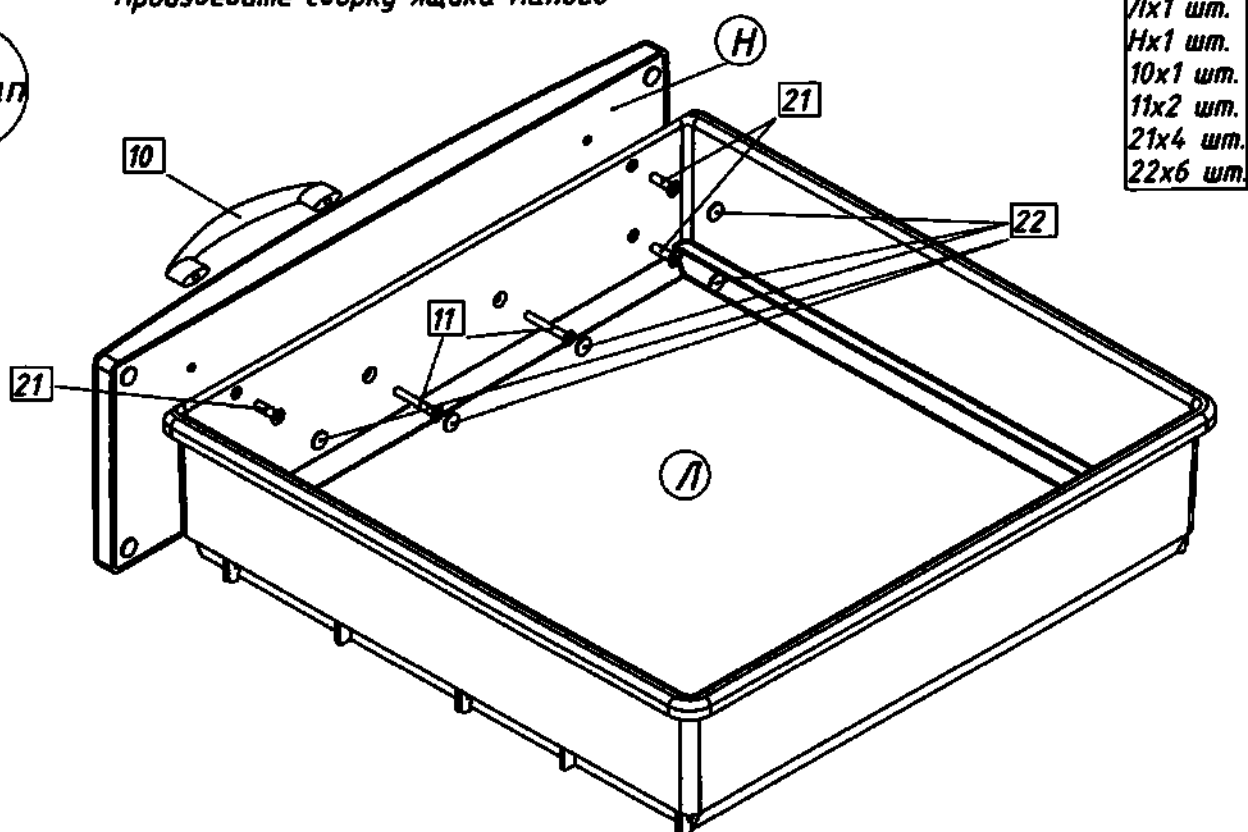

10 этап

Произведите установку направляющих ящика малого


1x1 шт.
19/2x2 шт.
18x4 шт.

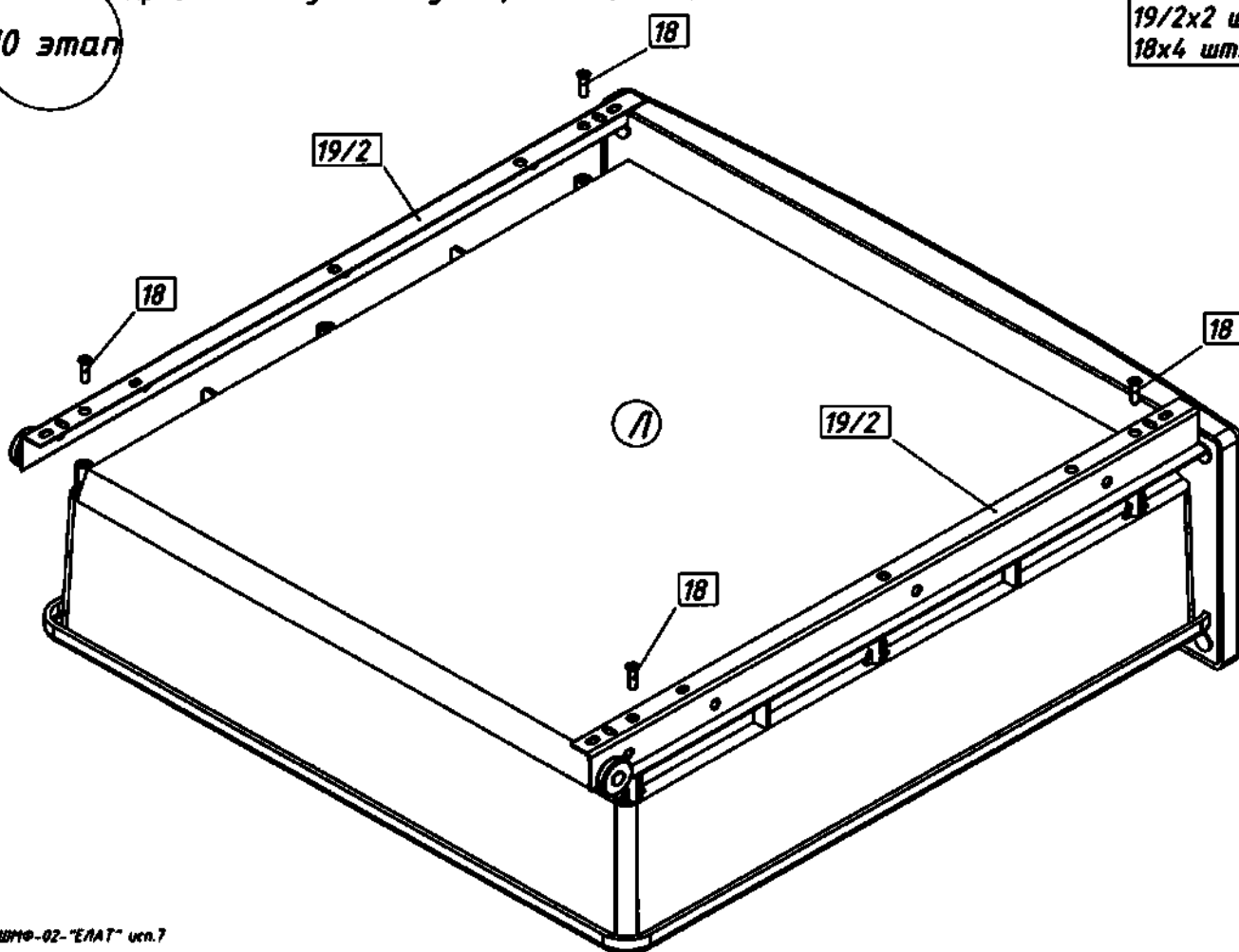

ОМ 29.495.05

Произведите сборку ящика большого


11 этап

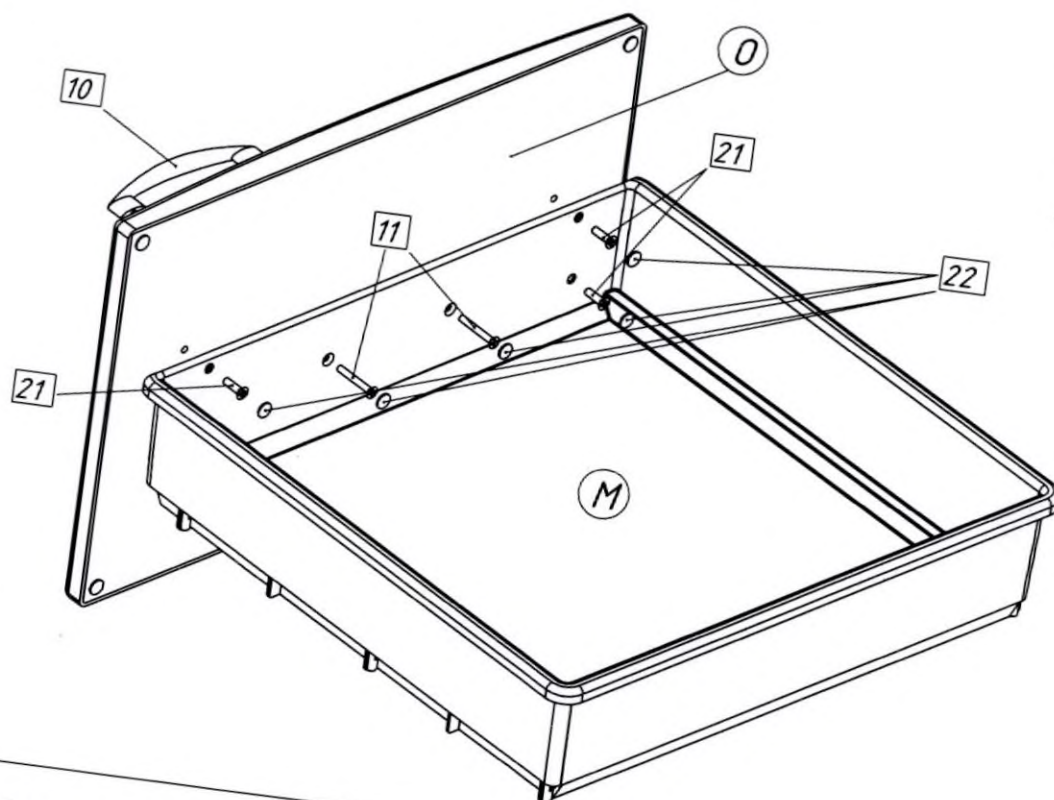

Mx1 шт.
Ox1 шт.
10x1 шт.
11x2 шт.
21x4 шт.
22x6 шт.

12 этап

Произведите установку направляющих ящика большого

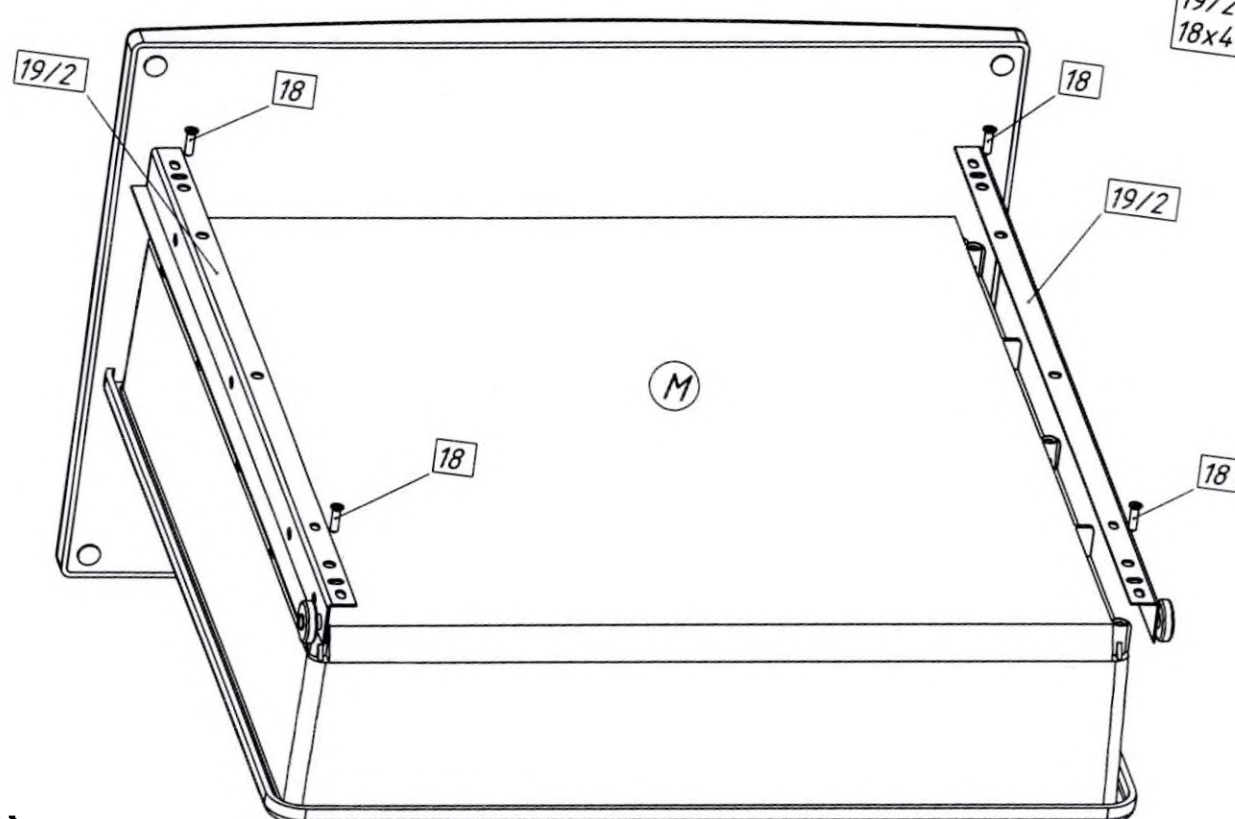


Mx1 шт.
19/2x2 шт.
18x4 шт.

ИИЧ-02-“ЕРАТ” уч. 7

Произведите сборку каркаса


13 этап

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Гх2 шт.
Их2 шт.
Тх1 шт.
1х20 шт.
2х20 шт.

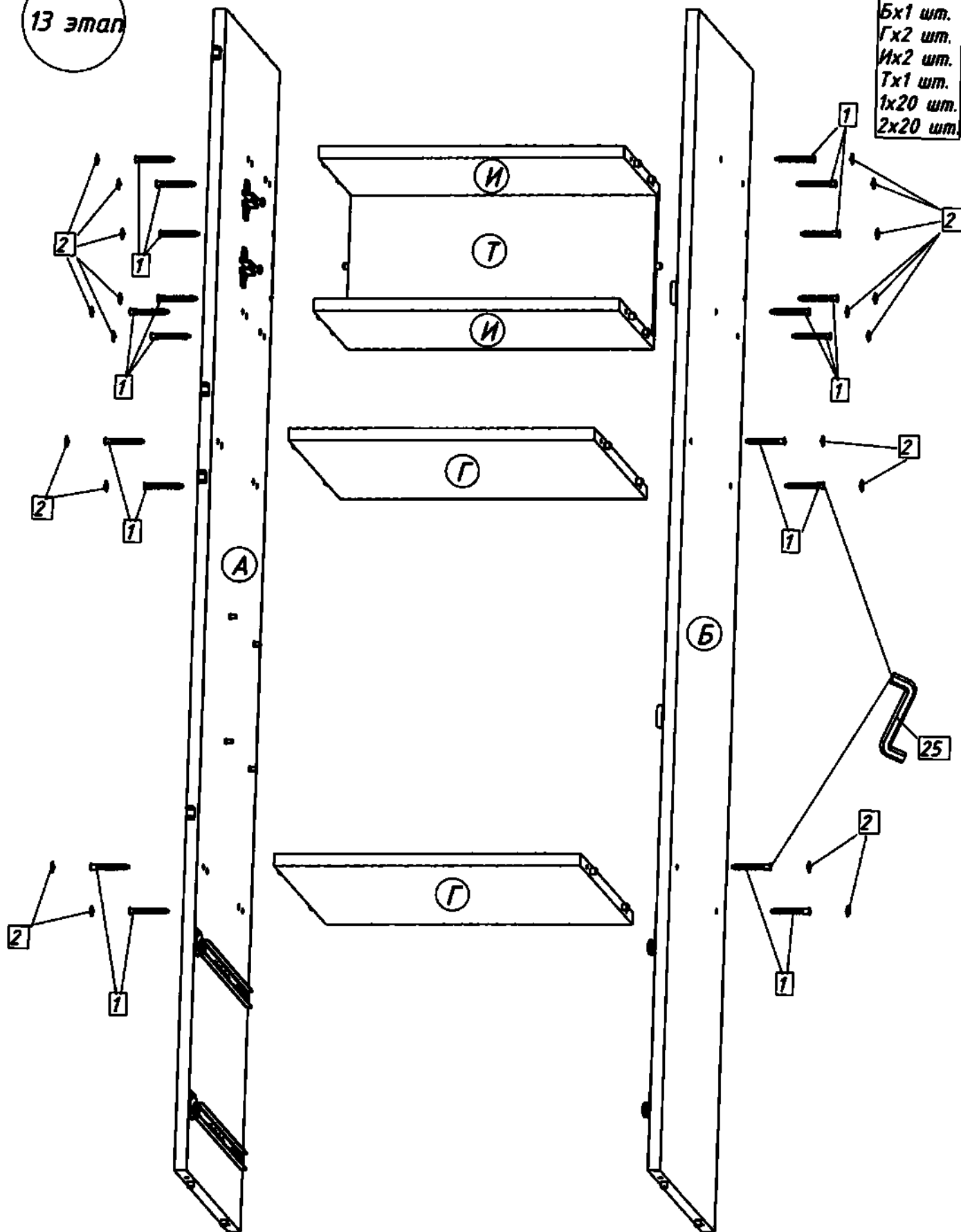

Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранником 25 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

14 этап

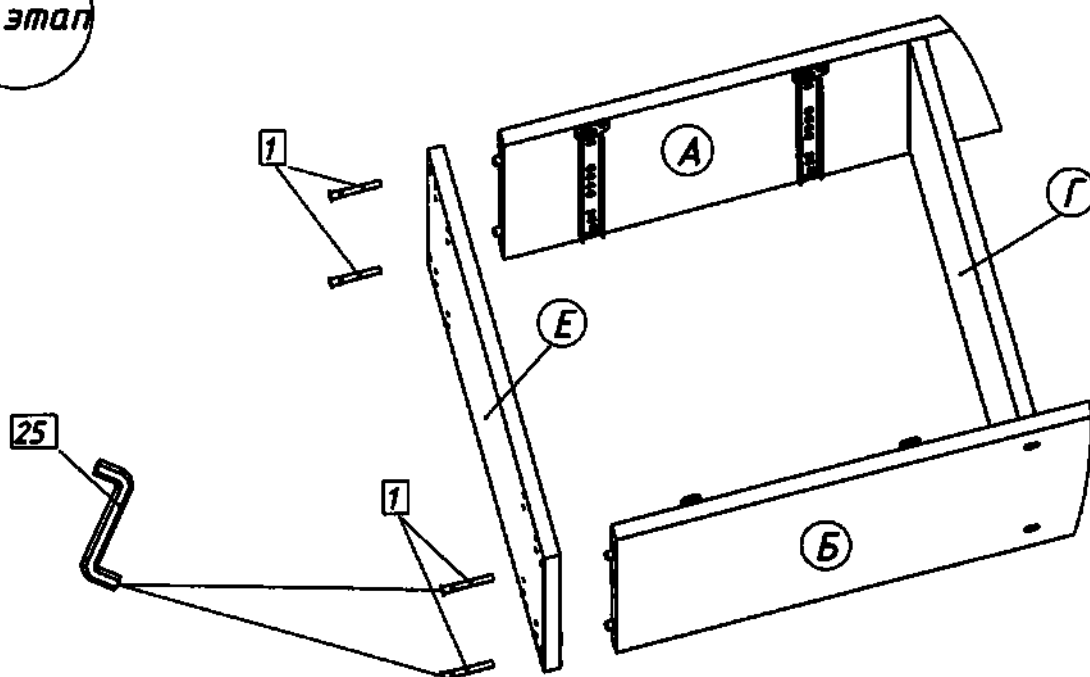


Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранником 25 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

15 этап


Произведите установку опор

4x4 шт.
5x16 шт.
6x16 шт.
7x16 шт.

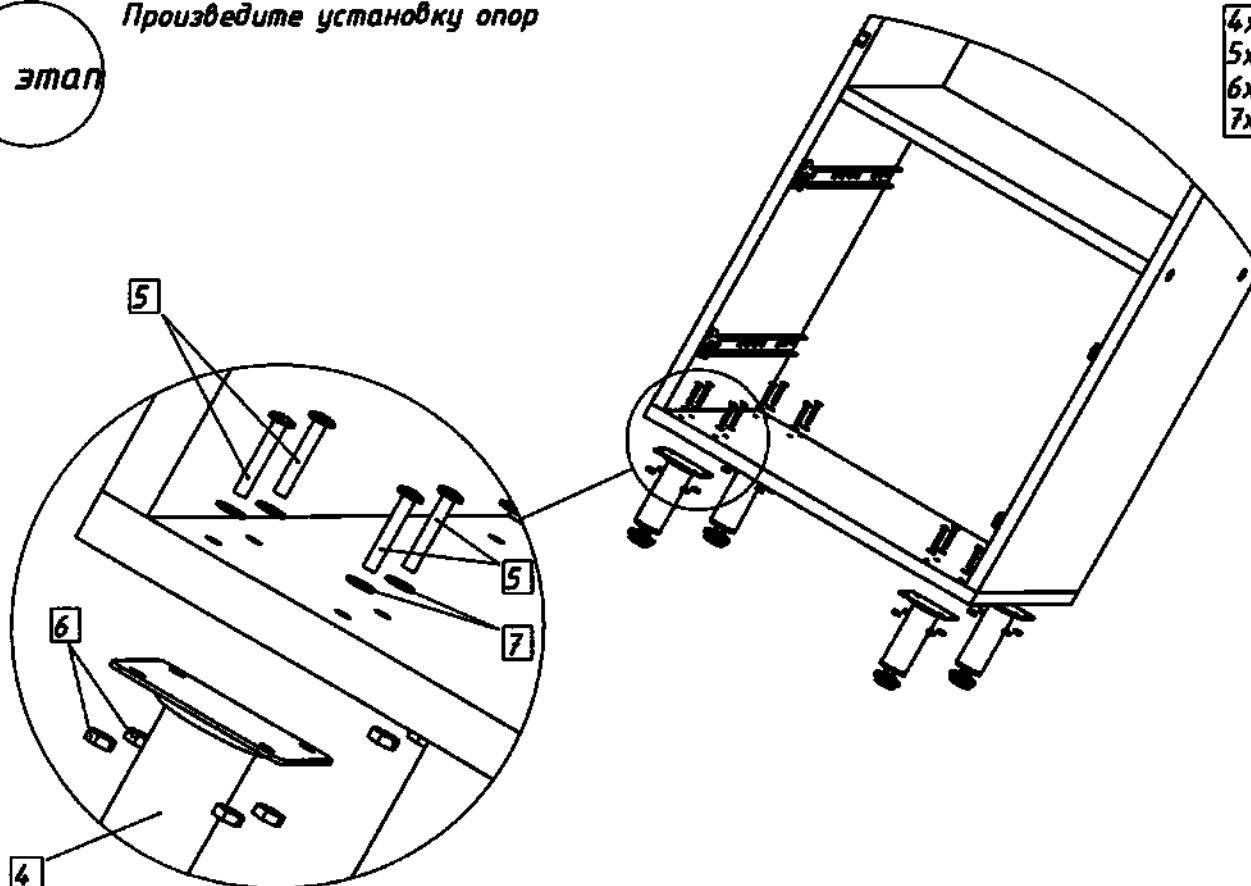

16 этап


Дх1 шт.
1х4 шт.
2х4 шт.

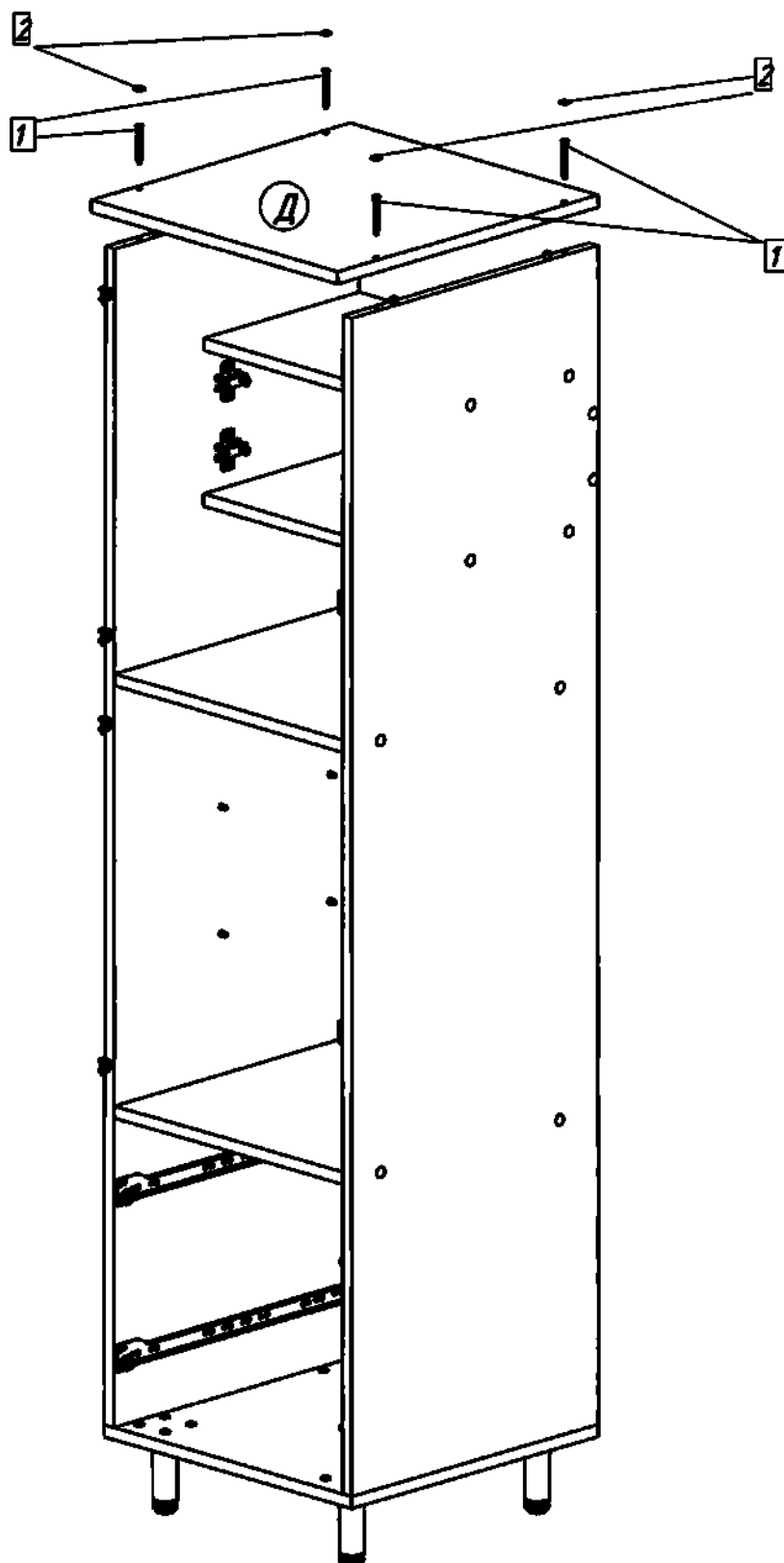

Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранником **25** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


ШМФ-02-“ЕЛАТ” исп.7

17 этап

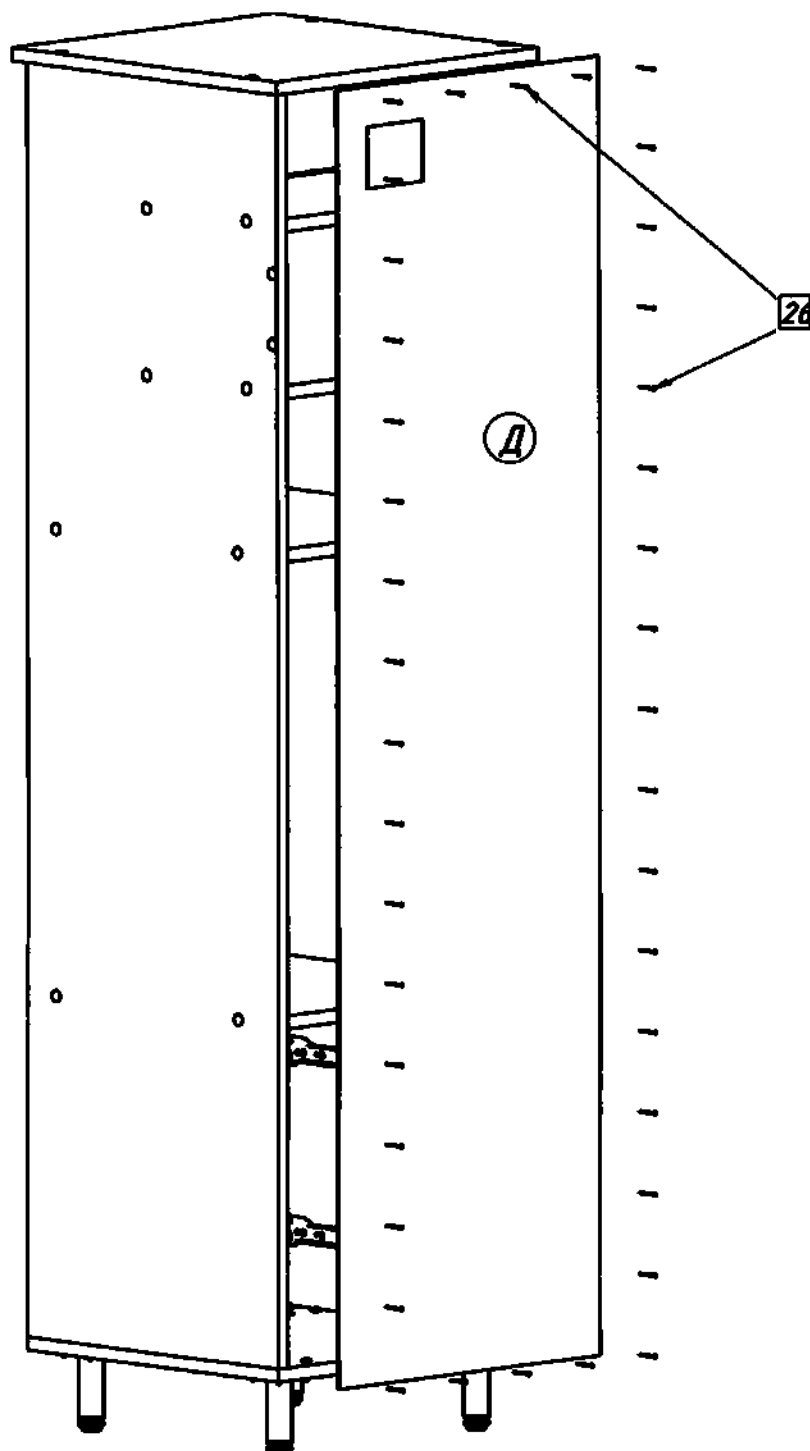

Произведите крепеж стенки задней гвоздями [26] с шагом 100-130 мм и отступом от края 8 мм.

18 этап

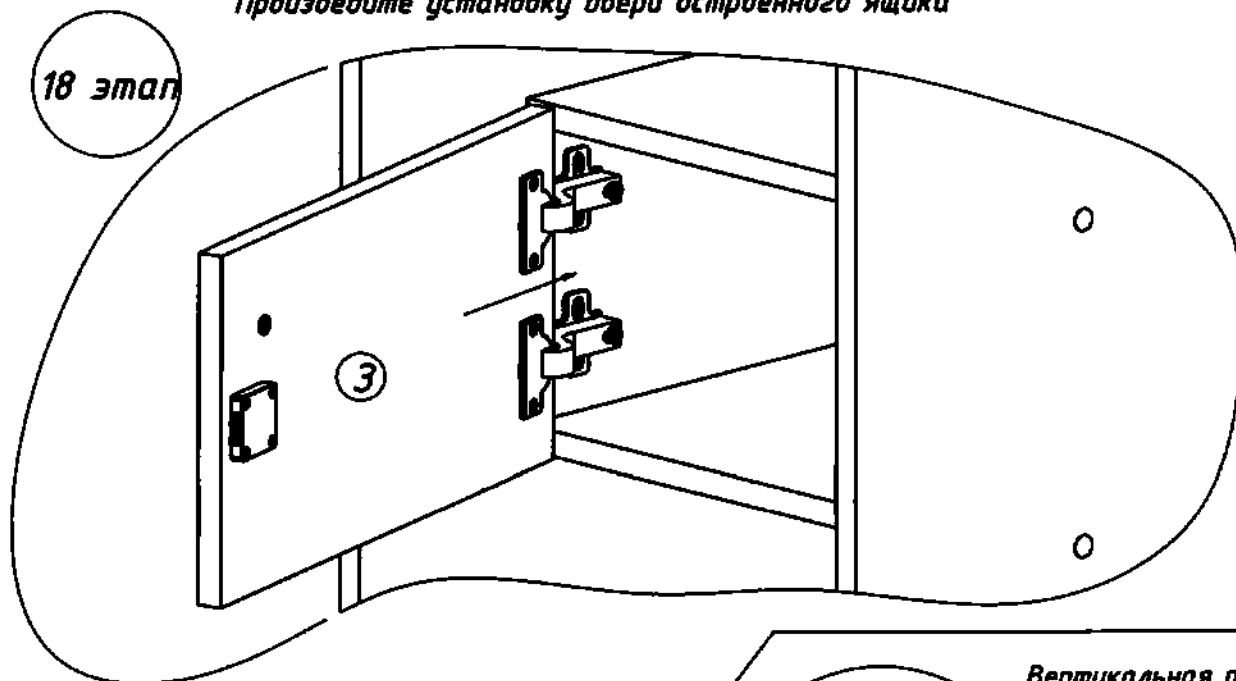

Вертикальная регулировка

После установки двери
произведите регулировку
петель



Боковая регулировка
(перекос двери)

Фронтальная регулировка

19 этап

Произведите установку полок малых



Жх2 шт.

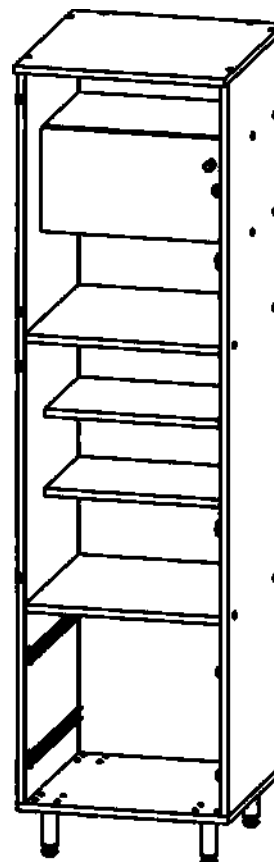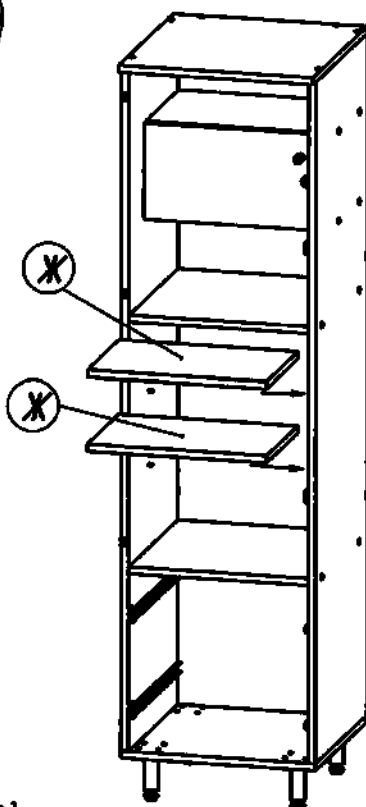

ОМ 29.495.05



Произведите установку выдвижных ящиков

20 этап

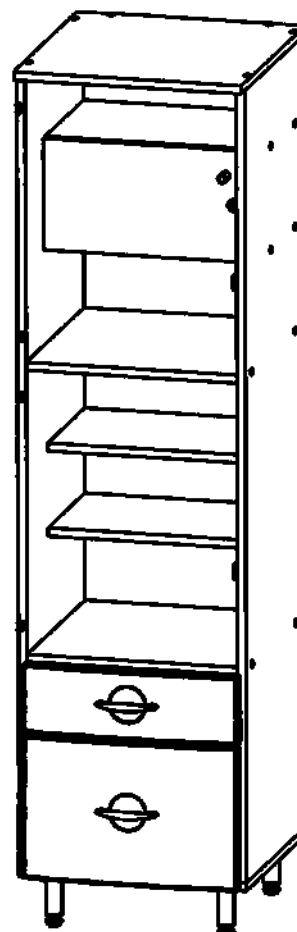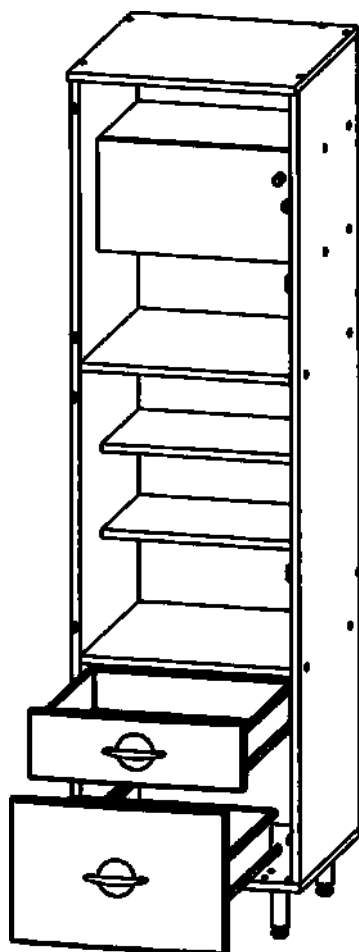

21 этап

Произведите установку дверей

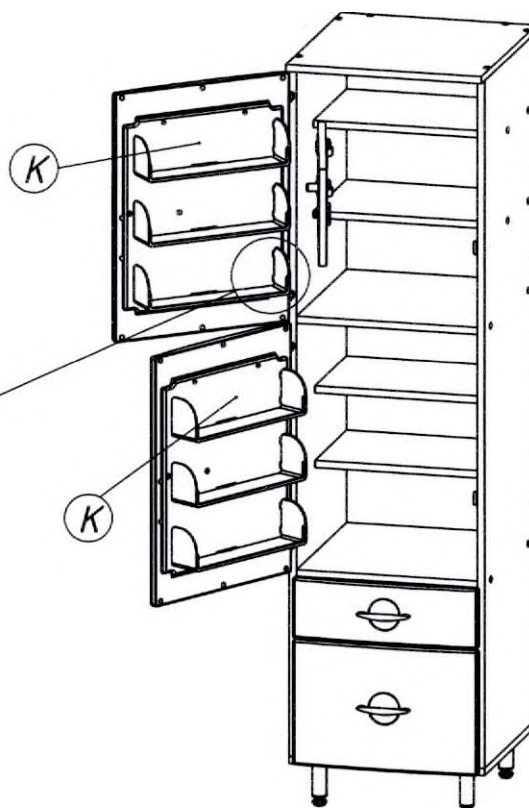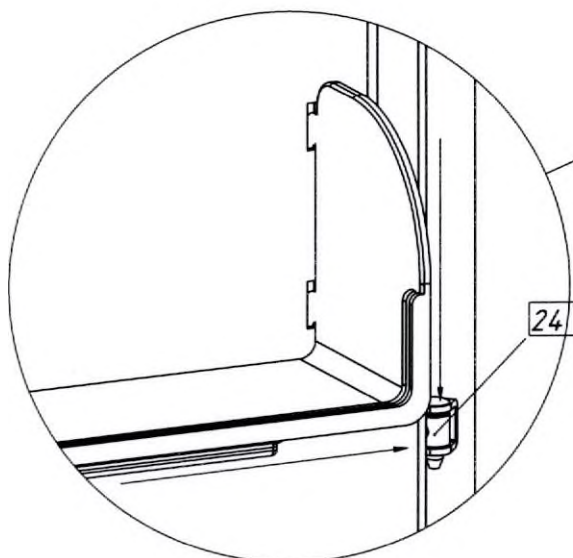

Kx2 шт.
24x4 шт.


Забить штифты петель [24],
легкими ударами молотка. 15

ИМФ-02-“ЕЛАТ” уч.7

Рх6 шт

ОМ 29.495.05 Произведите установку в каждую дверь, планок




22 этап

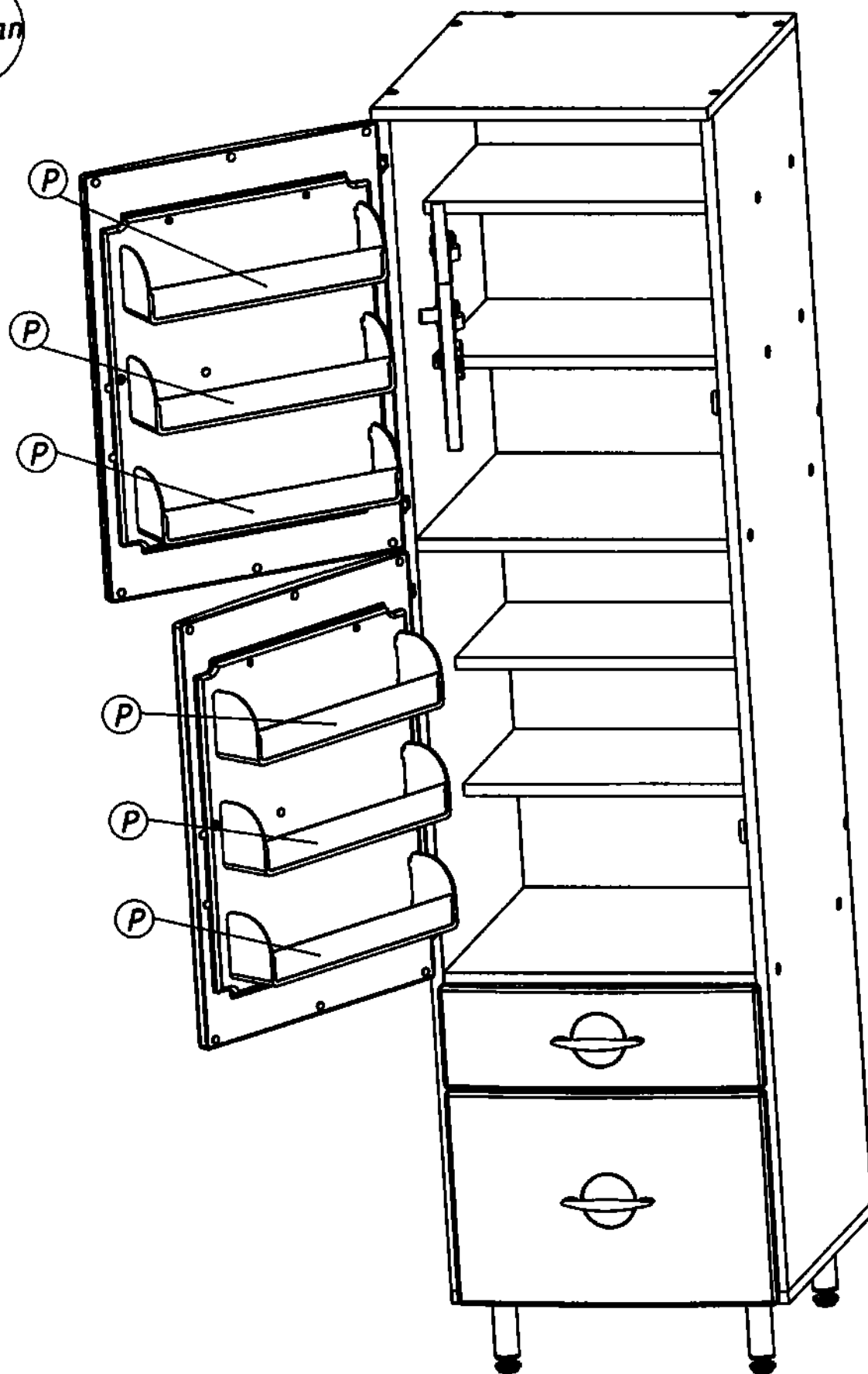

ЦМФ-02-"ЕРАТ" ил.7

23 этап

После сборки изделия,
произведите установку логотипа компании С

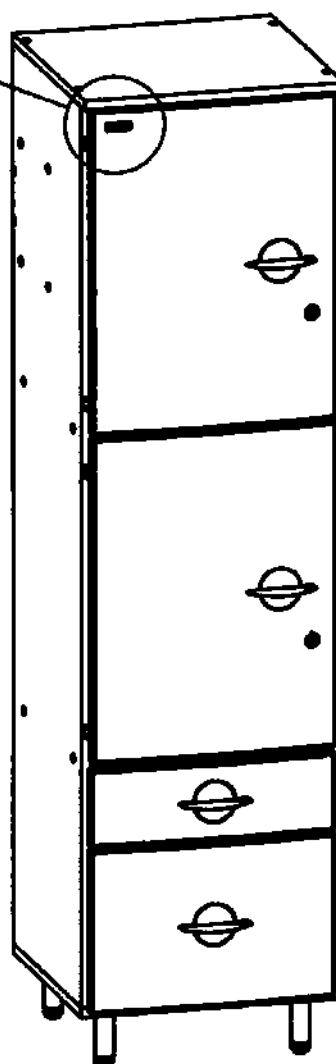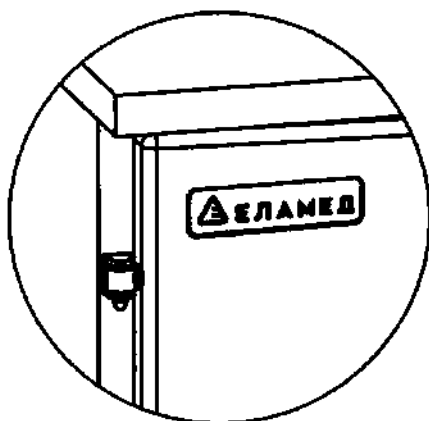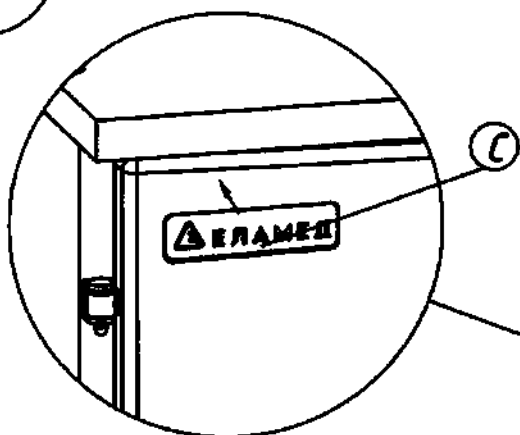


Инструкция по сборке изделия ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.В

Условные обозначения:

1. А-4 : детали

2. 1 - 32 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 30 : этапы сборки

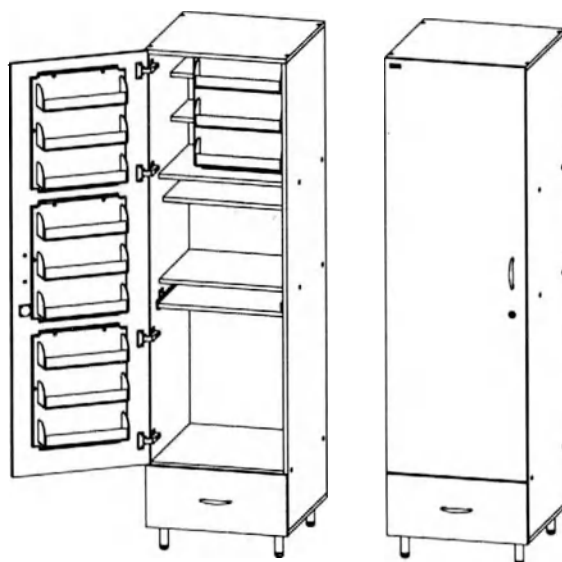

Код 532

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Крышка	1
Д	Стенка шкафа задняя	1
Е	Стенка шкафа задняя	1
Ж	Стенка шкафа задняя	1
З	Полка	1
И	Полка основная верхняя	2
К	Перегорodka межъярусная	1
Л	Полка выдвижная	1
М	Полка малая	2
Н	Фасад выдвижного ящика	1
О	Дно выдвижного ящика	1
П	Бакофина выдвижного ящика левая	1
Р	Бакофина выдвижного ящика правая	1
С	Стенка задняя выдвижного ящика	1
Т	Основание поворотной полки	1
У	Основание накладной полки	3
Ф	Навесная полка	15
Х	Планка	15
Ц	Дверь	1
Ч	Логотип компании	1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.В

Крепёж и фурнитура





Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	24	Конфирмат	
2	16	Заглушка конфирмата	
3	24	Шкант мебельный	
4	4	Опора	
5	16	Винт М4х25	
6	20	Гайка М4	
7	16	Шайба 4 мм	
8	56	Гвоздь 1,6х25	
9	4	Петля специальная (90/175), накладная	
10	22	Саморез 4х16	
11	12	Полкодержатель	
12	2	Ручка мебельная	
13	4	Винт полусфера с прессшайбой М4х20	
14	4	Саморез с прессшайбой 4,2х14	
15	18	Саморез с прессшайбой 4,2х19	
16	8	Шайба 4 мм	

1

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.В

2

Крепёж и фурнитура

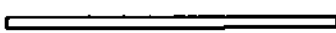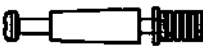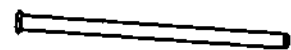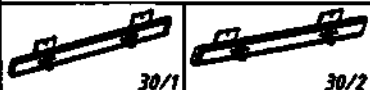Арт.	Кол - во	Обозначение	
17	1 комплект	Направляющие роликовые	
18	14	Саморез 3x12	
19	4	Винт М4х35	
20	2	Брус соединительный	
21	4	Эксцентрик	
22	4	Шток эксцентрика	
23	4	Заглушка эксцентрика	
24	2	Петля Г-образная	
25	2	Кронштейн петли Г-образной	
26	2	Ось петли Г-образной	
27	1	Замок	
28	4	Саморез 3x20	
29	1	Ответная планка замка	
30	1 комплект	Направляющие шариковые	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
31	4	Саморез 3,5x13	
32*	1	Ключ шестигранный 4мм	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 31 закручивать ключом шестигранным 32 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

ОМ № 29.497.03


Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

Рекомендуется: установочные площадки петель [9/1] не затягивать до упора саморезами [10]

4х1 шт.
3х4 шт.
9/1х4 шт.
10х8 шт.
11х6 шт.
14х2 шт.
17/1х1 шт.
18х3 шт.
30/1х1 шт.

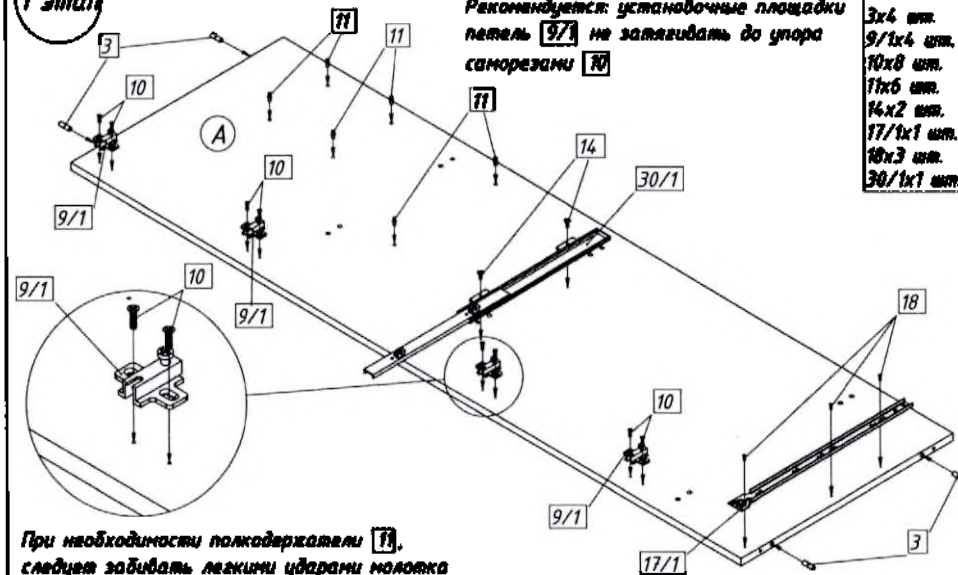


При необходимости полкодержатели [11], следует забивать легкими ударами молотка

2 этап

Произведите сборку стенки правой

5х1 шт.
3х4 шт.
11х6 шт.
14х2 шт.
17/1х1 шт.
18х5 шт.
29х1 шт.
30/2х1 шт.

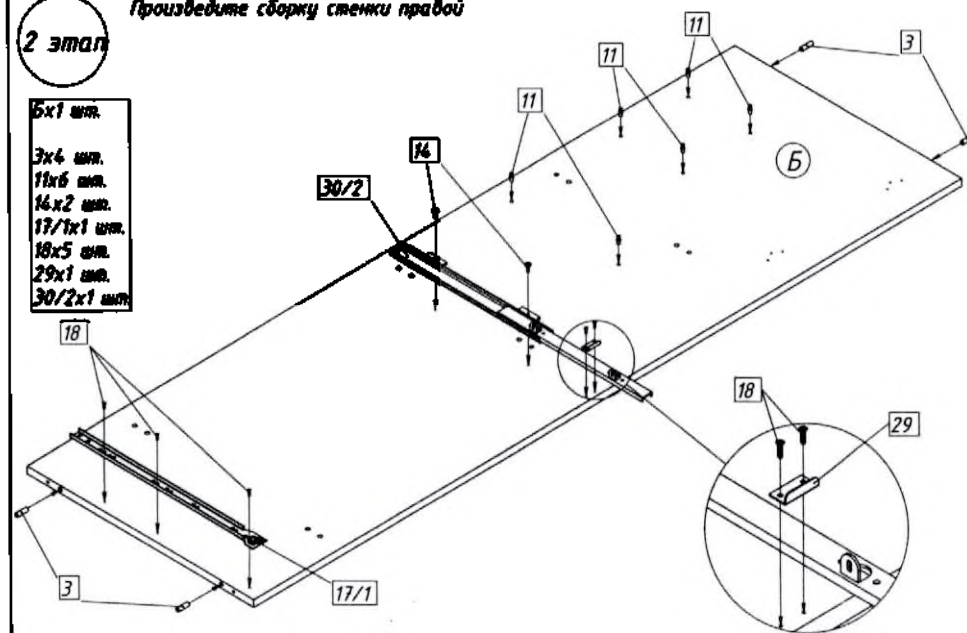

При необходимости полкодержатели [11], следует забивать легкими ударами молотка


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.В

ОМ № 29.497.03

3 этап

Произведите сборку 2-х полок основных верхних


11х2 шт.
3х8 шт.

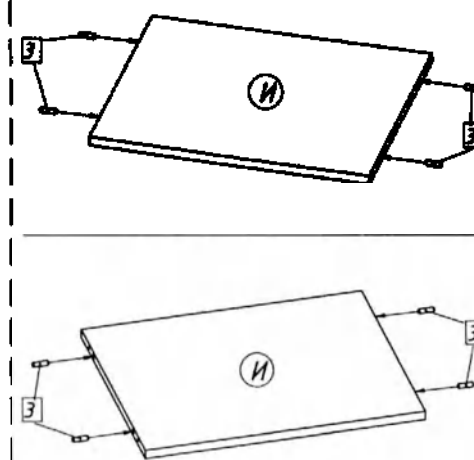

4 этап

Произведите сборку фасада ящика выдвижного

11х1 шт.
12х1 шт.
13х2 шт.
22х4 шт.

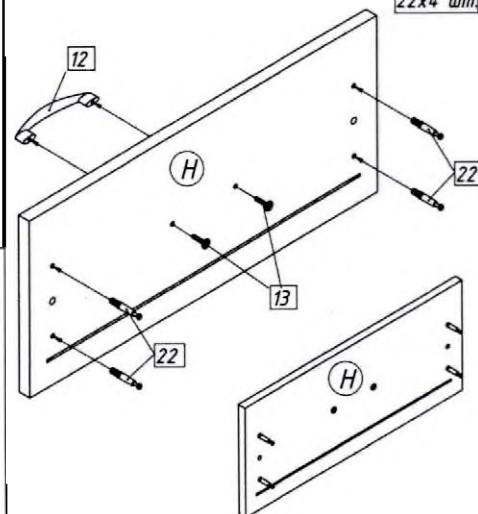


5 этап

Произведите сборку деталей для каркаса ящика выдвижного

Соберите стенки [П], [Р], [С]

11х1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
3х4 шт.
27х4 шт.

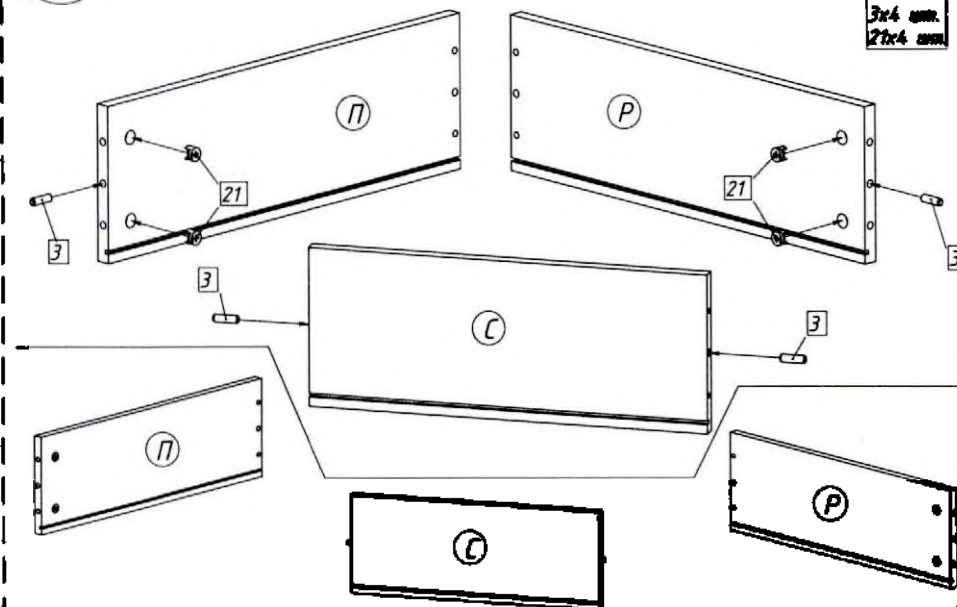

5 ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.В


6

ОМ № 29.497.03

Произведите сборку каркаса ящика выдвижного

6 этап

Гх1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
1х4 шт.

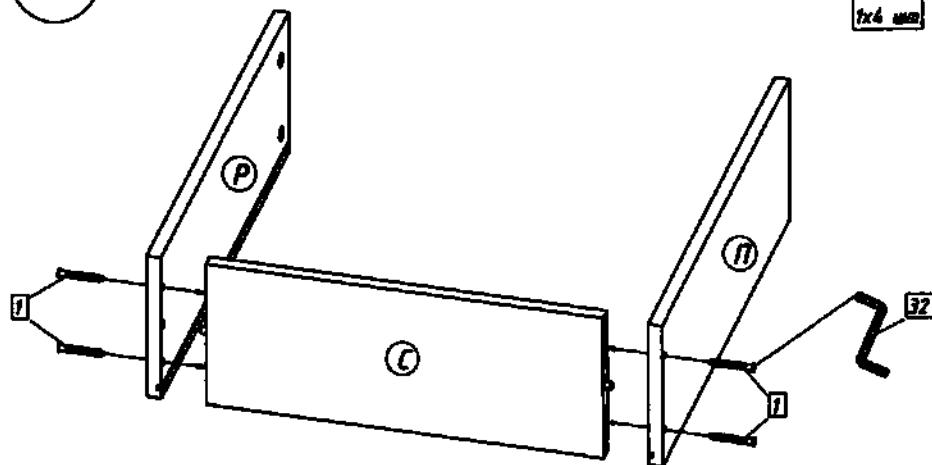



ОМ № 29.497.03

Произведите установку фасада ящика выдвижного

8 этап

Нх1 шт.
23х4 шт.



Схема фиксации фасада (Н) и установки заглушек (23)

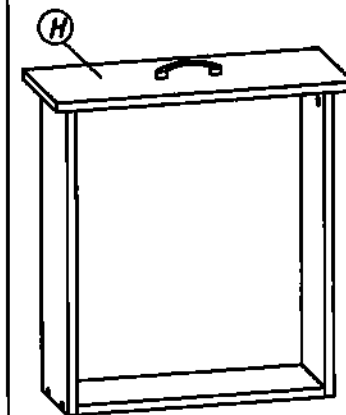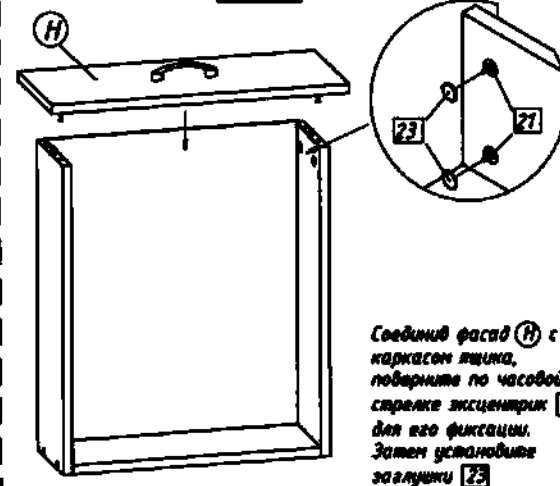

Произведите установку дна для каркаса ящика выдвижного

7 этап


Ох1 шт.

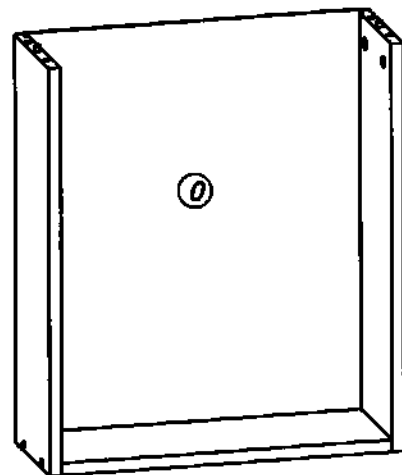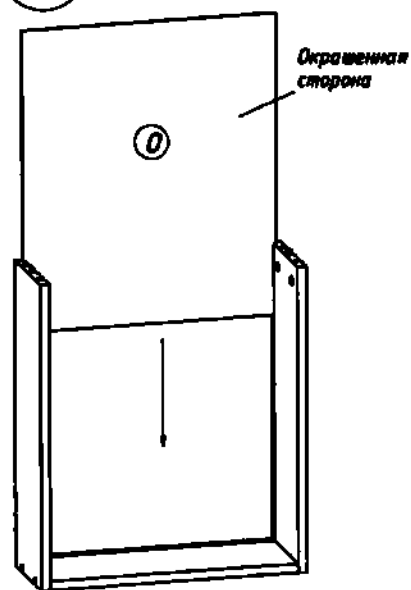

9 этап

Произведите установку направляющих на ящик выдвижной


17/2х2 шт.
18х6 шт.

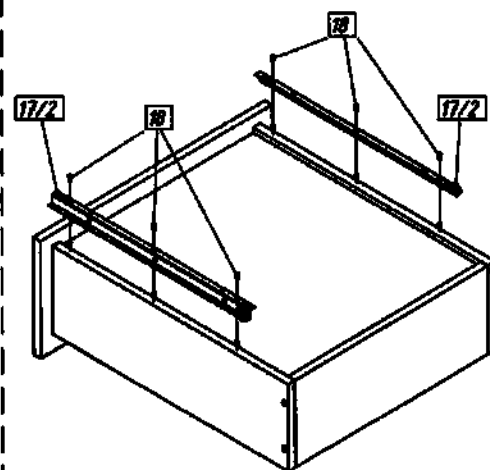

10 этап

Произведите сборку перегородки межъярусной

Кх1 шт.
3х4 шт.

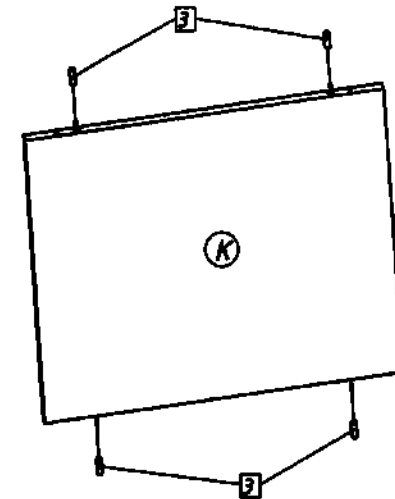

ОМ № 29.497.03

11 этап

Произведите сборку двери

Установите кольцо замка

ВНИМАНИЕ: Обёртка не входит в комплект поставки изделия

4x1 шт.
27/2x1 шт.


С обратной стороны двери Ц, с помощью плоской обёртки прижмите к ЛДСП лепестки металлического кольца

4x1 шт.
27/1x1 шт.
28x4 шт.

12 этап

Произведите сборку двери

4x1 шт.
4x3 шт.
9/2x4 шт.
10x8 шт.
12x1 шт.
13x2 шт.
15x18 шт.

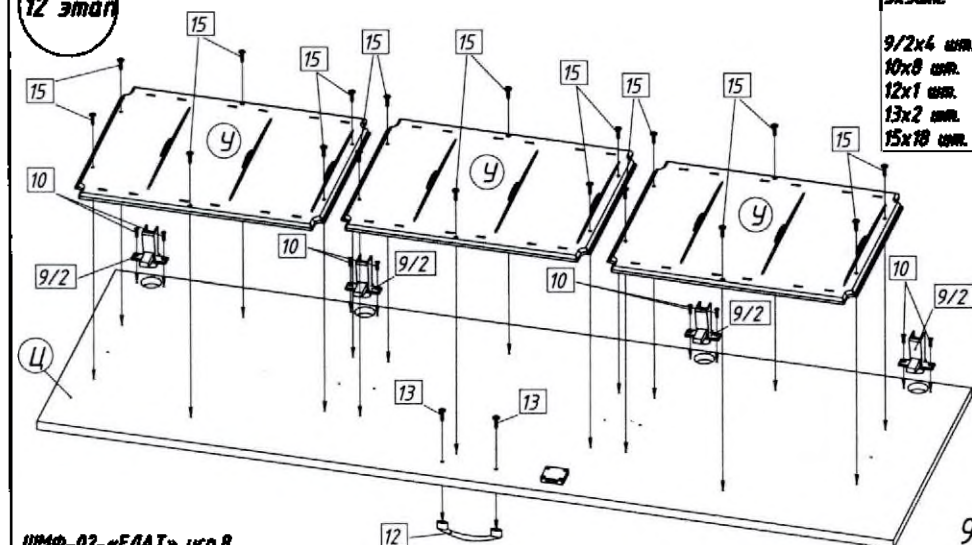

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8



9

ОМ № 29.497.03

13 этап

Произведите сборку поворотной полки




7x1 шт.
Фх6 шт.

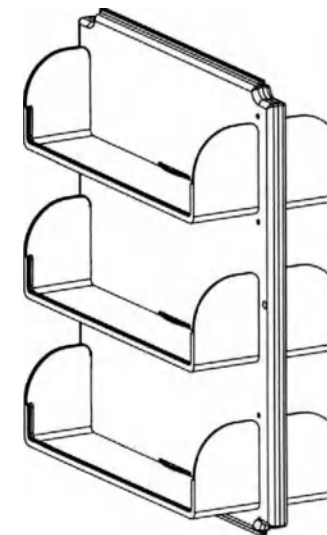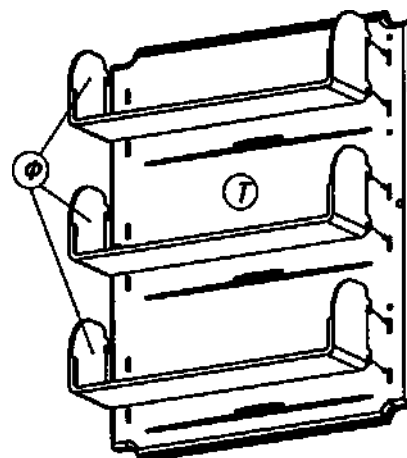

14 этап

Произведите установку верхней петли на поворотную полку

Тх1 шт.
6x4 шт.
16x8 шт.
19x4 шт.
24x2 шт.

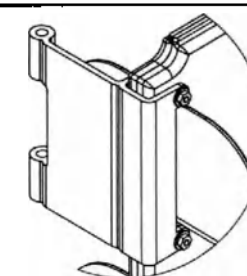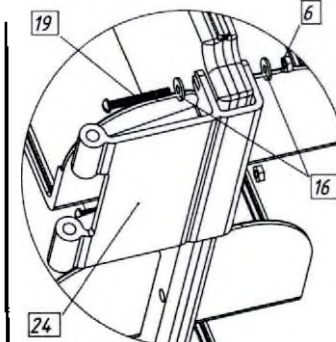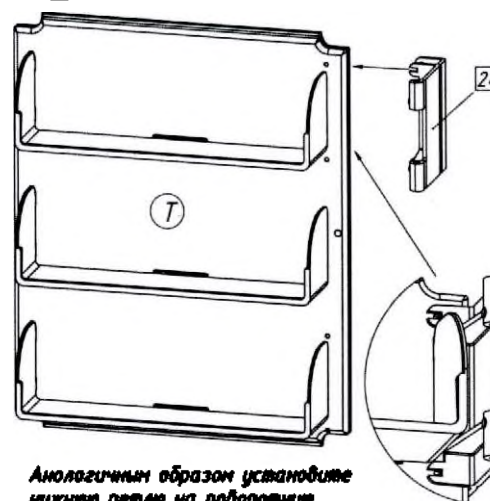

Аналогичным образом установите нижнюю петлю на поворотную полку



ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

10

ОМ № 29.497.03

Схема установленных петель на поворотной полке



15 этап

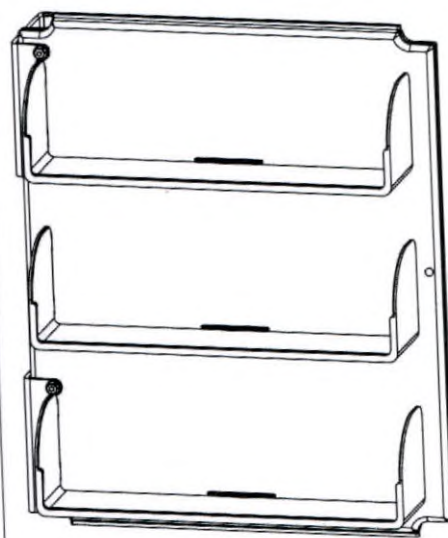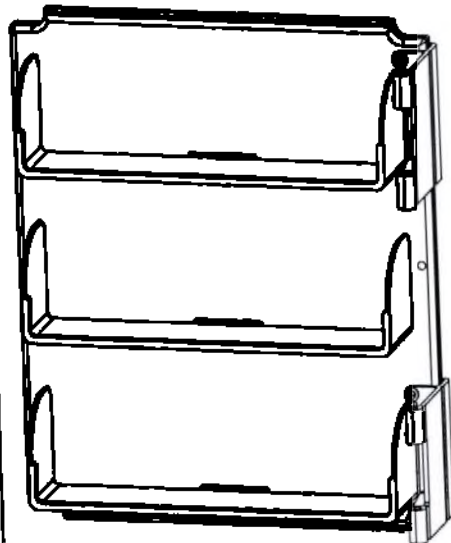

25x2 шт.
26x2 шт.

Произведите установку кронштейна петель

16 этап

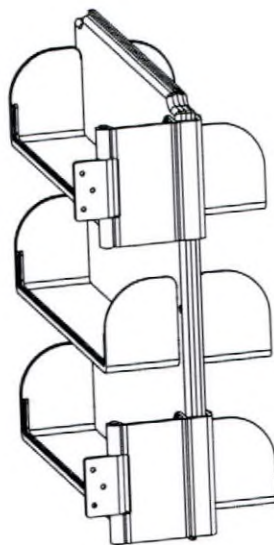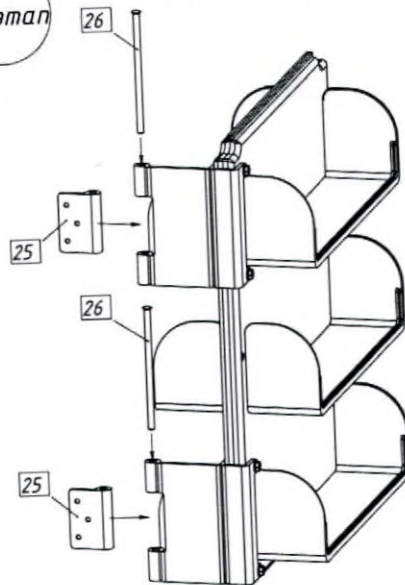


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

ОМ № 29.497.03

Произведите установку опор


17 этап

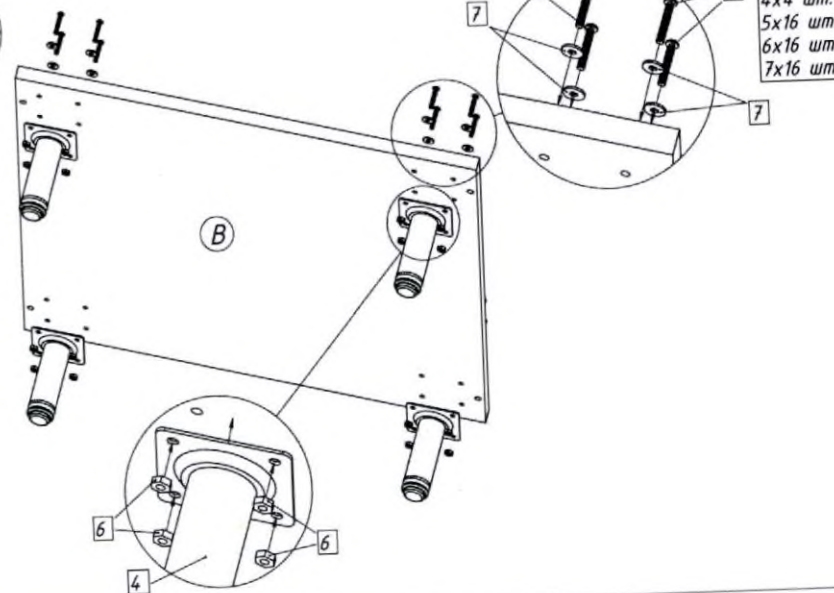

8x1 шт.
4x4 шт.
5x16 шт.
6x16 шт.
7x16 шт.

Произведите сборку каркаса

18 этап

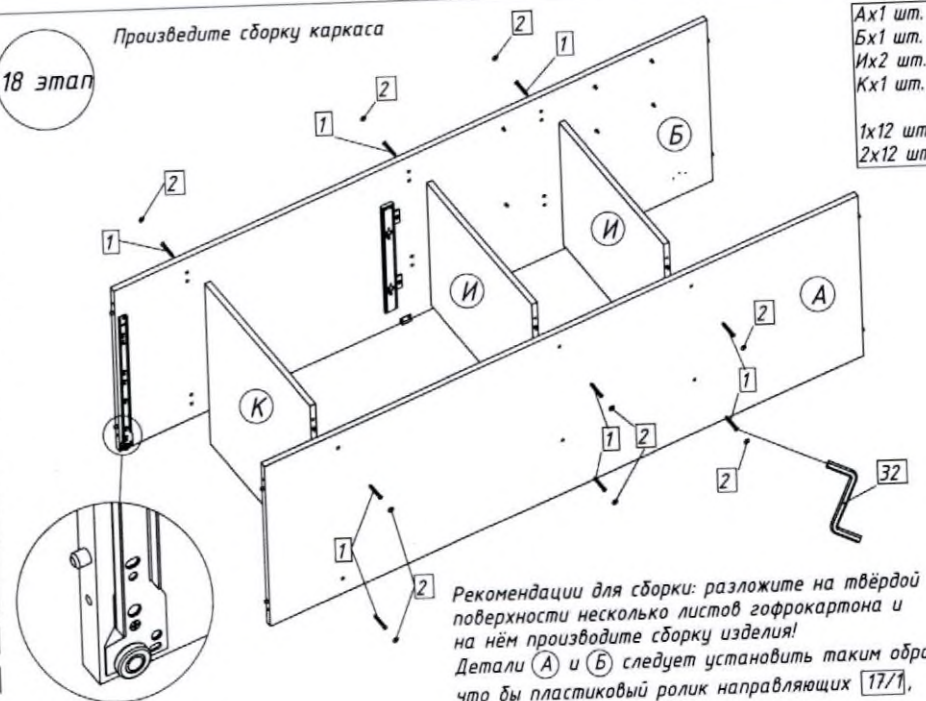

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Их2 шт.
Кх1 шт.
1х12 шт.
2х12 шт.

Рекомендации для сборки: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия! Детали А и Б следует установить таким образом, что бы пластиковый ролик направляющих 17/1, 12 был возле разложенного гофрокартона.

11 ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

Произведите установку основания и крышки


19 этап

Произведите установку основания и крышки

Вх1 шт.
Гх1 шт.
1х8 шт.
2х4 шт.


(22 3000)

3. Схема расположения звезд и саморезов

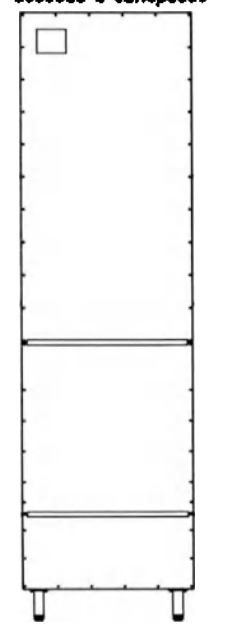


(23 3700)

Произведите установку полки выдвижной

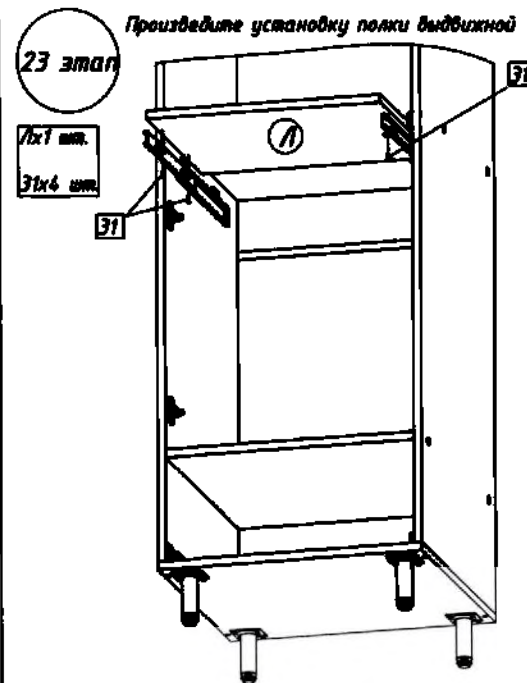

Произведите установку стенок задних, предварительно установив
брус соединительный

Dx1 ☐
 Ex1 ☐
 Kx1 ☐
 20x2 ☐

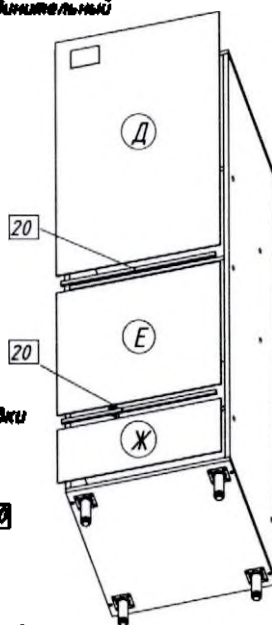


ВНИМАНИЕ:
При использовании
в комплекте поставки
Миниоподъемника,
стенку заднюю (Е)
и бруса
соединительного (Ж)
в изделии
не применять.

ЦМФ-02-«ЕЛАТ» уст.в



21 жмап

Произведите крепёж стенок задних сиденьями, с шагом 100-150мм и отступом от края на 6мм

8x56 mm

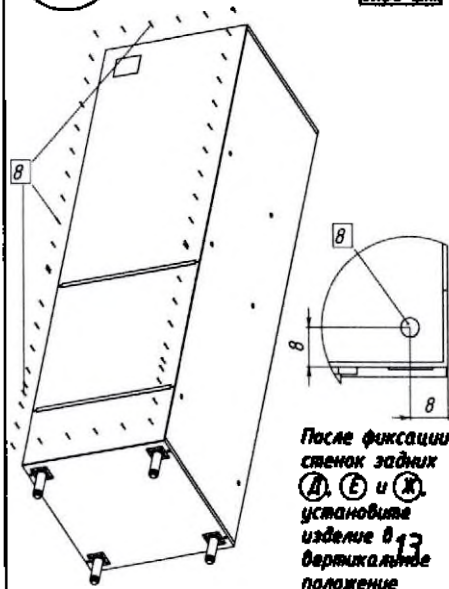

После фиксации стенок задних **(Д, Е и Ж)** установите изделие в **13** вертикальное положение

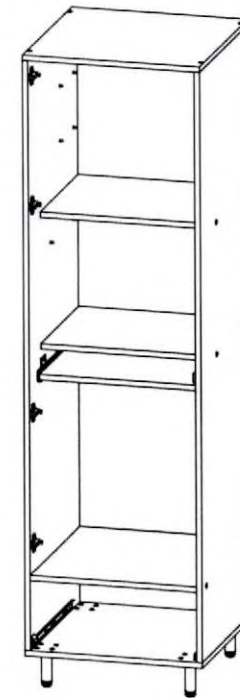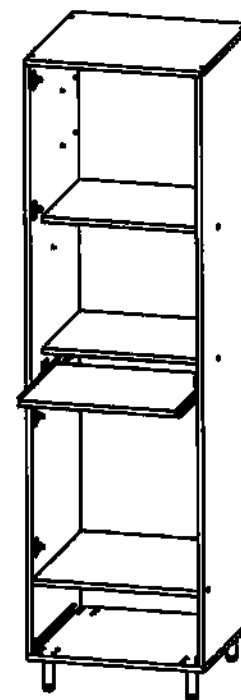


ИМФ-02-«ЕЛАТ» учр.б

14


ОМ № 29.497.03

24 этап

Произведите установку 3-х полок

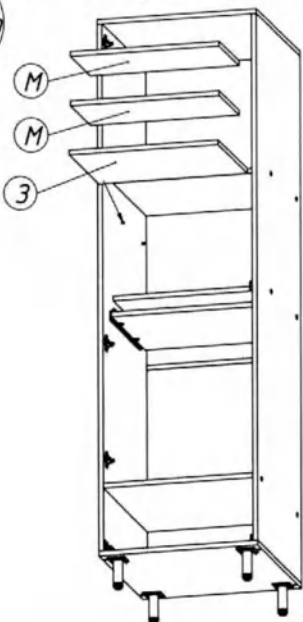


3x1 шт.
Мx2 шт.

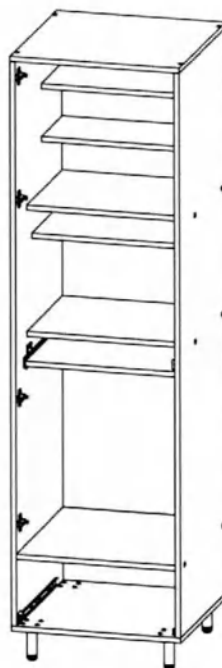


25 этап

Произведите установку правой поворотной полки

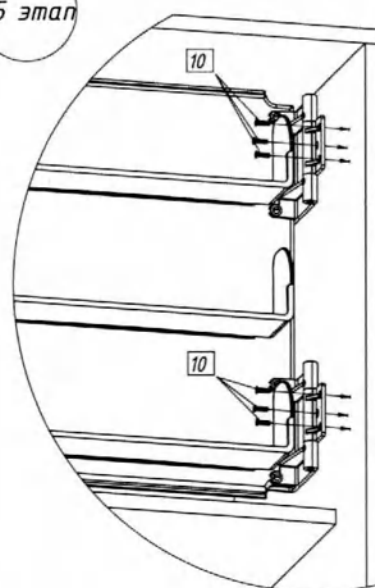

10x6 шт.

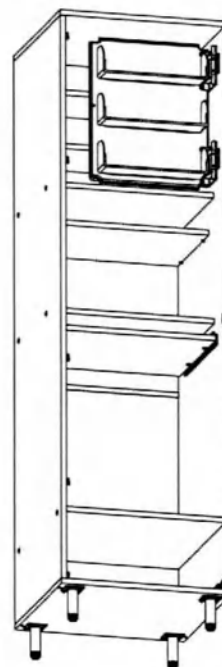


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

ОМ № 29.497.03

26 этап

Произведите установку ящика


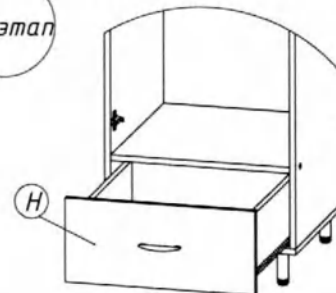


Нx1 шт.



27 этап


Произведите установку двери

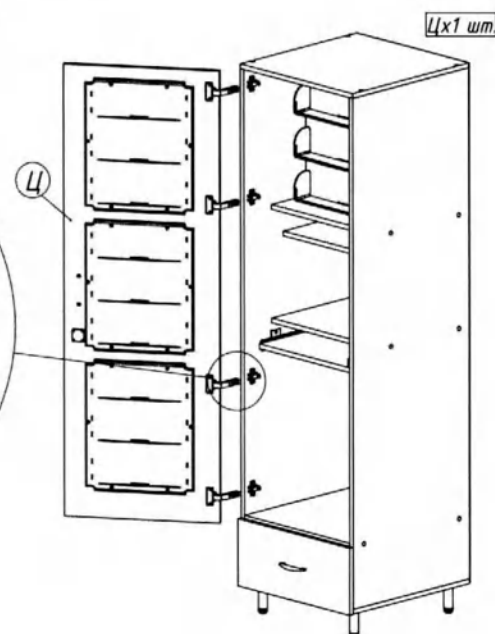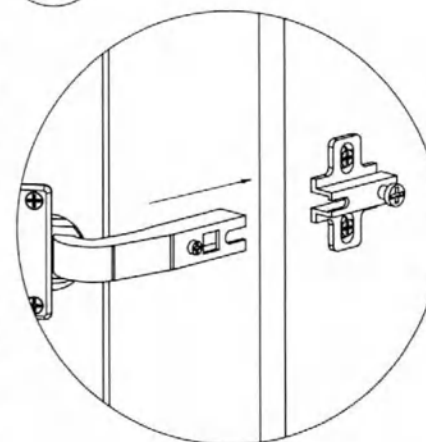

Цx1 шт.

После установки двери,
произведите регулировку
петель, с затяжкой всех
винтов и саморезов

Боковая регулировка
(перекос дверей)

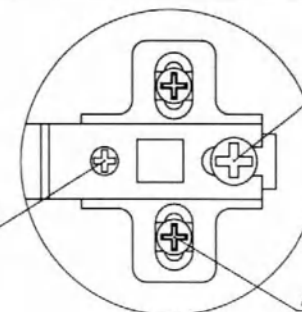

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

15


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

16


ОМ № 29.497.03

Произведите установку навесных полок и пластиковых планок

28 этап

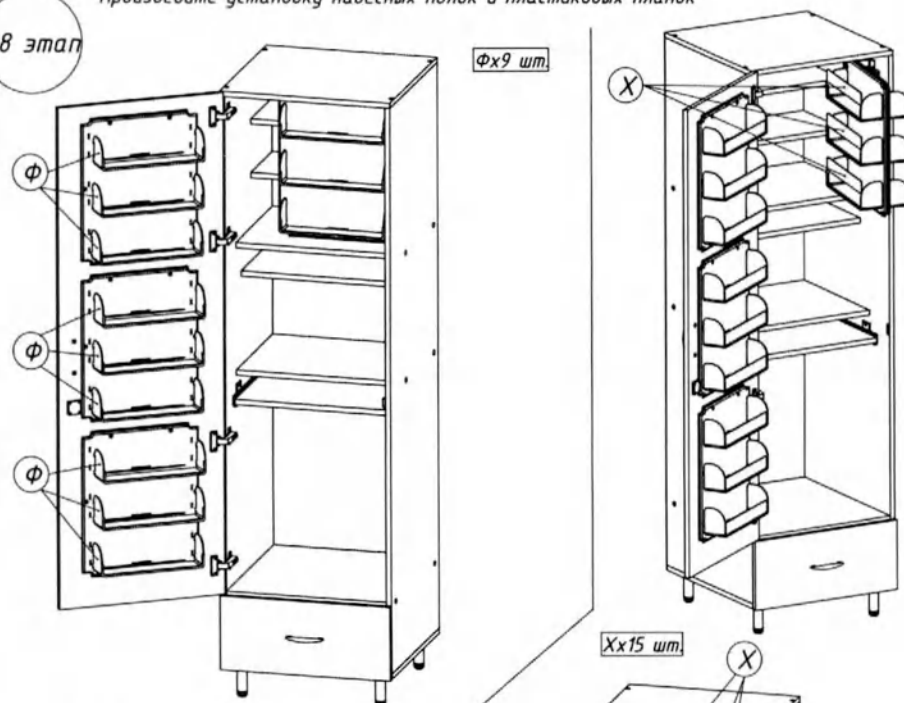

Шкаф ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

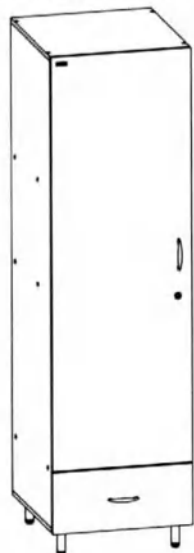


ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

17

ОМ № 29.497.03

Общий вид изделия спереди ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8 с установленным Сейфом или Минихолодильником (поставляются по требованию заказчика)


29 этап

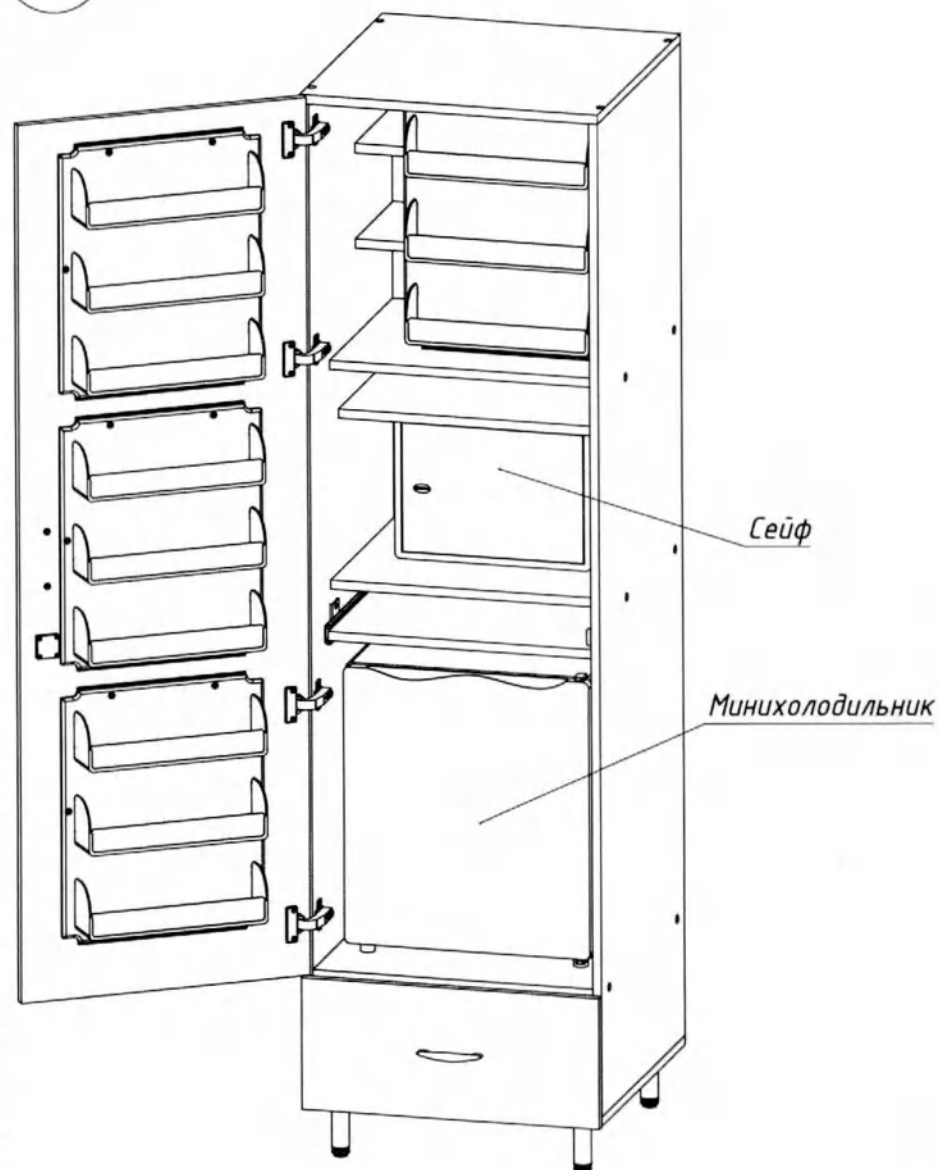

ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8

18

30 этап

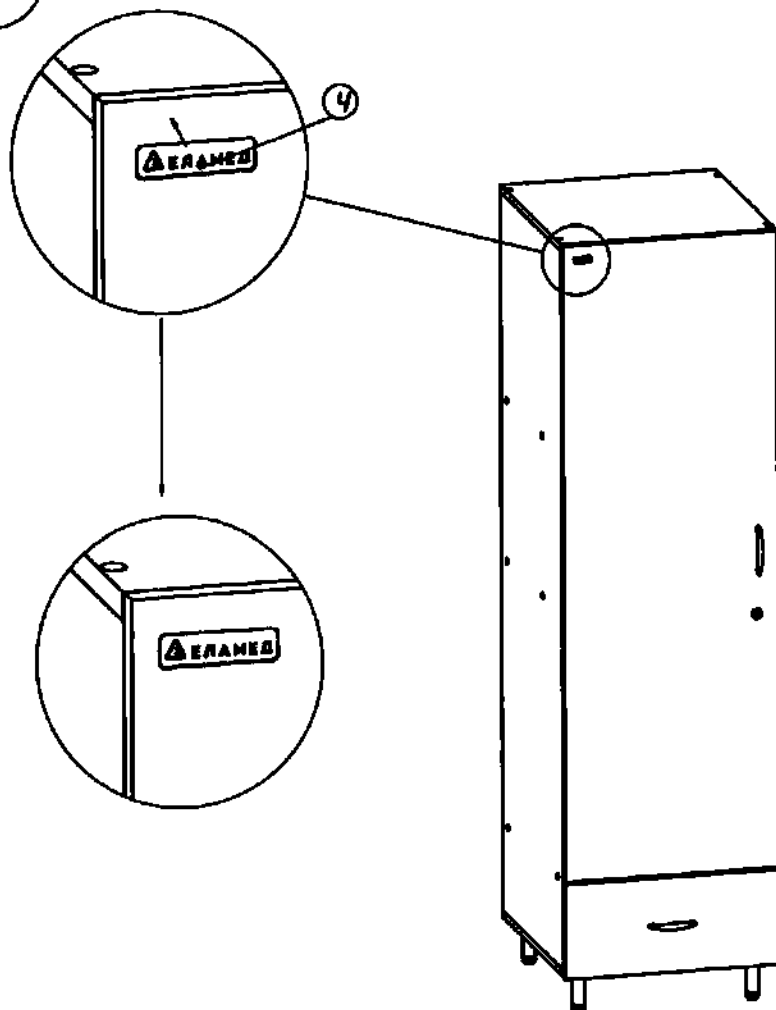

КОПИЯ
ВЕРНА

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 46 листа(ов).

Заместитель директора филиала НТЦ


АО «ЕПЗ»

Кузин М.Н.

2024



ЕЛАТОМ

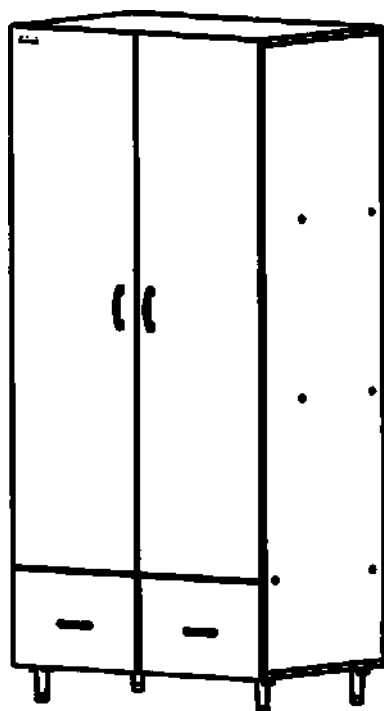

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.1**

ГИКС.942818.154 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 96,4±9,6 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 850±4, ширина 595±4, высота 1880±4.

Размер рабочей поверхности свободнoleжащих полок (длина x ширина), мм – (817x250) ±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа - не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина x ширина x высота), мм – 344±5 x 520±5 x 157±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина x ширина), мм – 323±5 x 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (10±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей не более 3дН.

2.4 Усилие выдвигания ящика не более 5дН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальном значении относительной влажности до 80% при +25°С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.1 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов дверей и ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

-поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;

в) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

г) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;

-очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

-дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.1 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.

КОПИЯ
ВЕРНА

Заместитель директора
фирмы АО «ЕПЗ»

Кузнец М.Н.

02.10.2024



Код ____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29


E-mail: lpi@elamed.com

lpi.elamed.com

 **ЕЛАМЕД**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13

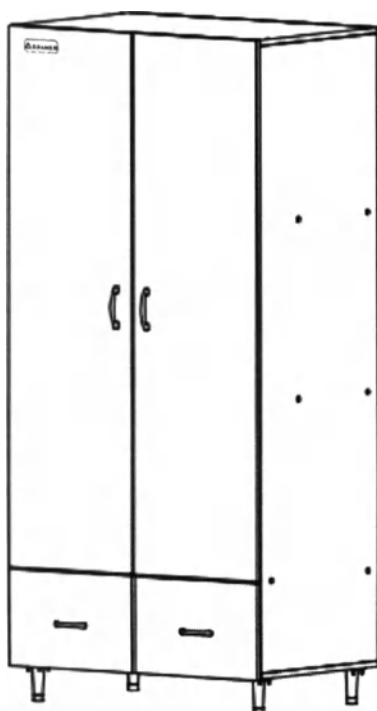

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.2**

ГИКС.942818.154-01 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.2 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках. Шкаф дополнительно оборудован запирающимся ящиком для хранения фармпрепаратов класса В.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 100±10 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 850±4, ширина 595±4, высота 1880±4.

Размер рабочей поверхности свободнолежащих полок (длина х ширина), мм – (817х250) ±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа – не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина х ширина х высота), мм – 344±5 х 520±5 х 157±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина х ширина), мм – 323±5 х 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (10±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей шкафа и трейзеров не более 3 даН.

2.4 Усилие выдвижения ящика не более 5 даН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальном значении относительной влажности до 80% при +25 °С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.2 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов дверей и ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

-поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;

в) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

г) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;

-очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

-дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.2 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.



Заместитель директора
Филиала НТЦ АО «ЕПЗ»
Кузнец М.Н.

02.10.2024



Код ____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29


E-mail: lpu@elamed.com

lpu.elamed.com

 **ЕЛАМЕД**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей
линии 8 800 350-06-13

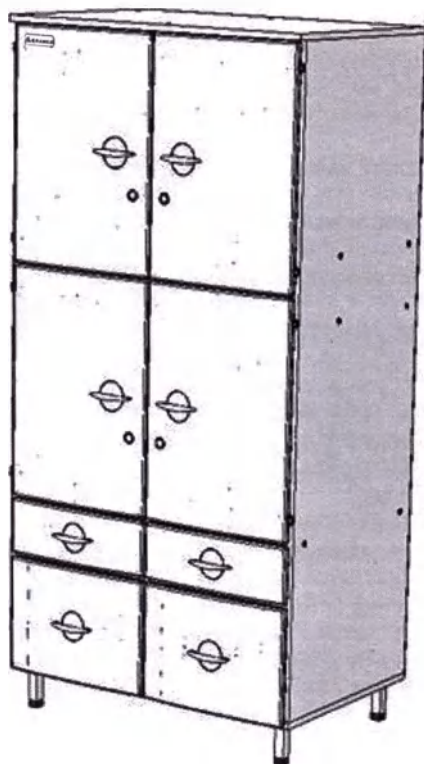

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.3**

ГИКС.942818.154-02 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.3 (в дальнейшем шкафа), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках. Шкаф дополнительно оборудован запирающимся ящиком для хранения фармпрепаратов класса В.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 93,2±9,3 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 845±4, ширина 600±4, высота 1700±4.

Размер рабочей поверхности свободных полок (длина х ширина), мм – (396х250) ±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа:

- не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина х ширина х высота), мм – 370±5 х 371±5 х 92±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина х ширина), мм – 323±5 х 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (7±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей шкафа и трейзера не более 3 даН.

2.4 Усилие выдвижения ящика не более 5 даН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальном значении относительной влажности до 80% при +25 °С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.3 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов дверей и ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

-поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;

в) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

г) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;

-очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

-дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.3 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.

КОПИЯ
ВЕРНА

Заместителю директора
органу НХУ АО «ЕЛМЕД»
Кузнец М. Н.
02.10.2024



Код _____
№ партии _____
Штамп ОТК _____
Дата упаковки _____


Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

 **ЕЛАМЕД**

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29
E-mail: ipu@elamed.com
ipu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13

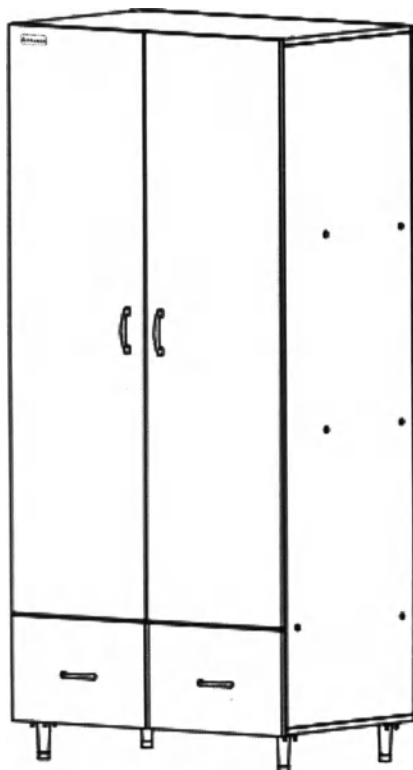

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.4**

ГИКС.942818.154-03 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.4 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 120±12 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 850±4, ширина 595±4, высота 1880±4.

Размер рабочей поверхности свободнолежащих полок (длина x ширина), мм – (817x250)±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа – не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина x ширина x высота), мм – 344±5 x 520±5 x 157±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина x ширина), мм – 323±5 x 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5.

Размеры рабочего объема секций (длина x ширина x высота), мм для размещения:

- холодильника – не менее 455 x 470 x 525.

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;
- на дно ящика – (10±0,5) кг;
- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей не более 3дН.

2.4 Усилие выдвижения ящика и выдвижной полки не более 5дН.

2.5 При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальном значении относительной влажности до 80% при +25 °С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.4 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамин по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей под действием неровности пола и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- подвешивать на поверхности шкафа воздействием предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;
- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:
 - а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;
 - г) контроля функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;
- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функций устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Сертификат о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.4 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.



Заместитель директора
приглашена ЮТУ АО «ЕПЗ»

Кудрик М.Н.
02.10.2024



Код ____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29


E-mail: lpri@elamed.com

lpri.elamed.com



Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13

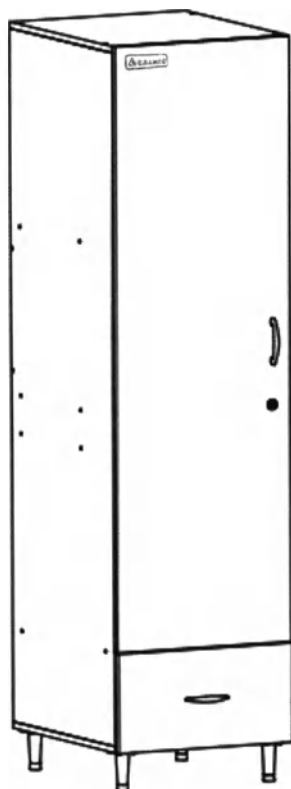

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.5**

ГИКС.942818.154-04 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.5 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках. Шкаф дополнительно оборудован запирающимся ящиком для хранения фармпрепаратов класса В.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 53±5,3 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 490±4, ширина 595±4, высота 1880±4.

Размер рабочей поверхности свободнолежащих полок (длина x ширина), мм – (457x250) ±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа - не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижного ящика (длина x ширина x высота), мм – 402±5 x 520±5 x 157±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина x ширина), мм – 323±5 x 66±5.

Расстояние между лотками полки полимерной, мм – 147±5

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (10±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей шкафа и трейзера не более 3дН.

2.4 Усилие выдвижения ящика и выдвижной полки не более 5дН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальным значением относительной влажности до 80% при +25°С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.5 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание двери, выдвижение ящика и выдвижной полки обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие выпадение ящика и выдвижной полки из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

-поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;

в) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

г) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;

-очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

-дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.5 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.



Заместитель директора
Филиала НТЦ АО «ЕПЗ»

Кузнец М. Н.

от 10.2024



Код ____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29


E-mail: ipu@elamed.com

ipu.elamed.com

 **ЕЛАМЕД**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13

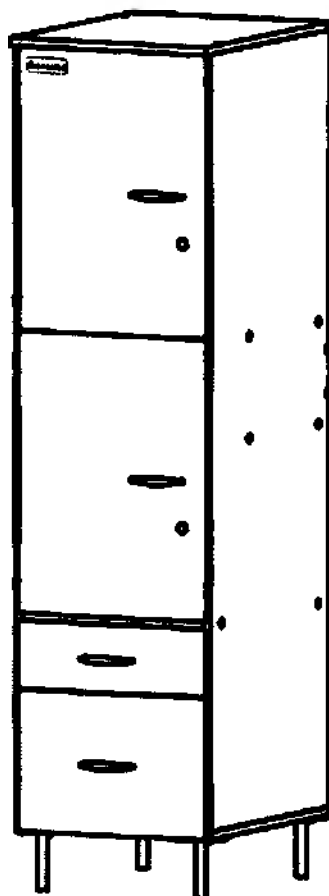

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.6**

ГИКС.942818.154-05 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.6 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках. Шкаф дополнительно оборудован запирающимся ящиком для хранения фармпрепаратов класса В.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 52,6±5,2 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 430±4, ширина 600±4, высота 1700±4.

Размер рабочей поверхности свободных полок (длина х ширина), мм – (457х250)±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа – не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина х ширина х высота), мм – 370±5 х 371±5 х 92±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина х ширина), мм – 323±5 х 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (10±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей шкафа и трейзера не более 3 даН.

2.4 Усилие выдвижения ящика не более 5 даН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальным значением относительной влажности до 80% при +25 °С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.6 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов дверей и ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей и выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям

ГОСТ 16371-2014

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

в) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2 мм, не реже одного раза в месяц;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2 мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.6 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.

КОПИЯ
ВЕРНА

Заместитель директора
принимает НТС АО «ЕПЗ»

Кузнец М.Н.

02.10.2024



Код _____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29


E-mail: lpu@elamed.com

lpu.elamed.com

 **ЕЛАМЕД**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13

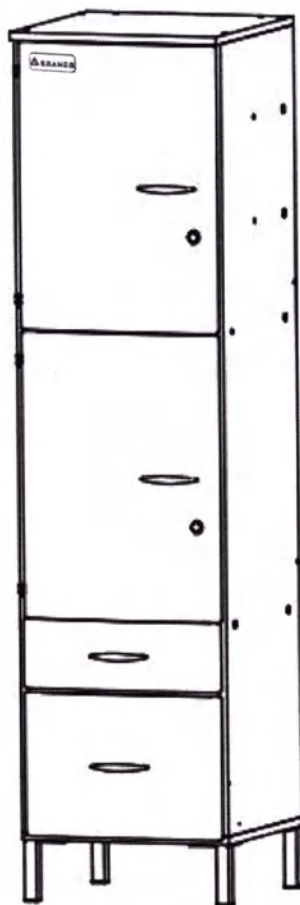

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.7**

ГИКС.942818.154-06 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.7 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках. Шкаф дополнительно оборудован запирающимся ящиком для хранения фармпрепаратов класса В.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 42,4±4,2 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 430±4, ширина 475±4, высота 1700±4.

Размер рабочей поверхности свободных полок (длина х ширина), мм – (457х250) ±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа – не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков (длина х ширина х высота), мм – 370±5 х 371±5 х 92±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина х ширина), мм – 323±5 х 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (10±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания дверей шкафа и трейзера не более 3дН.

2.4 Усилие выдвигания ящика не более 5дН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категорий 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальным значением относительной влажности до 80% при +25°С.

3 Комплект поставки:

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.7 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей, выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий, отсутствие перекосов относительно стенок шкафа;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа:

- 6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается: - нагружать рабочую поверхность выше норм, установленных в п. 2.2;
- скапливания жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде: а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;
- б) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;
- в) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;
- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.7 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.



Заместитель директора
приглашен НТЦ АО "ЕЛЗ"
Кузнец М. Н.
от 10.2024



Код ____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

 **ЕЛАМЕД**


Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: lpu@elamed.com

lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13

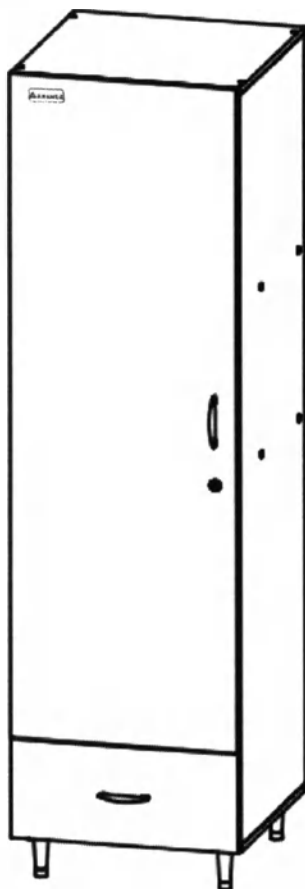

**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ,
в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.8**

ГИКС.942818.154-07 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8 (в дальнейшем шкаф), предназначен для хранения фармпрепаратов в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках.

Противопоказания к применению: хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ, медицинских газов, медицинских пиявок.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 66,3±6,6 кг.

1.2 Габаритные размеры, мм: длина 530±4, ширина 595±4, высота 1880±4.

Размер рабочей поверхности свободнолежащих полок (длина х ширина), мм – (457х250) ±5.

Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа – не менее 130 мм.

Размер рабочей поверхности выдвижного ящика (длина х ширина х высота), мм – 442±5 х 520±5 х 157±5.

Размер рабочей поверхности лотка полки пластиковой (длина х ширина), мм – 323±5 х 66±5.

Расстояние между лотками полки пластиковой, мм – 147±5

Размеры рабочего объема секции (длина х ширина х высота), мм для размещения холодильника – не менее 455 х 470 х 525.

2 Характеристики

2.1 Календарный срок службы должен быть не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из ЛДСП – (15±0,5) кг;

- на дно ящика – (10±0,5) кг;

- на лоток полимерный – (0,5±0,05) кг.

2.3 Усилие открывания и закрывания двери не более 3 даН.

2.4 Усилие выдвижения ящика и выдвижных полок не более 5 даН.

2.5 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С), номинальным значением относительной влажности до 80% при +25 °С.

3 Комплект поставки

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» ГИКС.942818.154ТУ», в варианте исполнения ШМФ-02-«ЕЛАТ», исп.8 – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5 Дезинфекция

5.1 Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6 Правила эксплуатации

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание двери, выдвижение ящика и выдвижных полок осуществляется без дополнительных усилий, отсутствие перекосов относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие выпадение ящика и выдвижных полок из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1 Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

- оставлять поворотные полки в открытом состоянии на длительное время.

6.3. По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.

7 Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) регулировки петель дверей шкафа путём протяжки их винтов не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов дверных ручек не реже одного раза в месяц;

в) контроль функционирования петель как устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм, не реже одного раза в месяц;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции внешних и внутренних поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9 Ремонт

9.1 Ремонт шкафа включает в себя замену петель, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающего зазор дверей в проёмах на сторону не более 2мм.

10 Утилизация

10.1 Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «Б».

11 Сертификат о приемке

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«ЕЛАТ» исп.8 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.154ТУ и признан годным для эксплуатации.

КОПИЯ
ВЕРНА

Заместитель директора
ИТЦ АОО «ЕПЗ»
Кузнецов В.В.
02.10.2024



Код ____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: ipu@elamed.com

ipu.elamed.com

 ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750 от 19.01.2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
горячей линии 8 800 350-06-13