


ООО "Эс.Ти.Ай.дент"  
"S.T.I. dent" 119421, г.Москва, ул. Новаторов, д.40, к.16  
ИНН 7728545556 р/с 40702810200000002081 БИК 044579031  
Телефон: (495) 725 40 06, факс: (495) 959 44 95


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗУБЫ ИСКУСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ: Premium 6, Premium 8

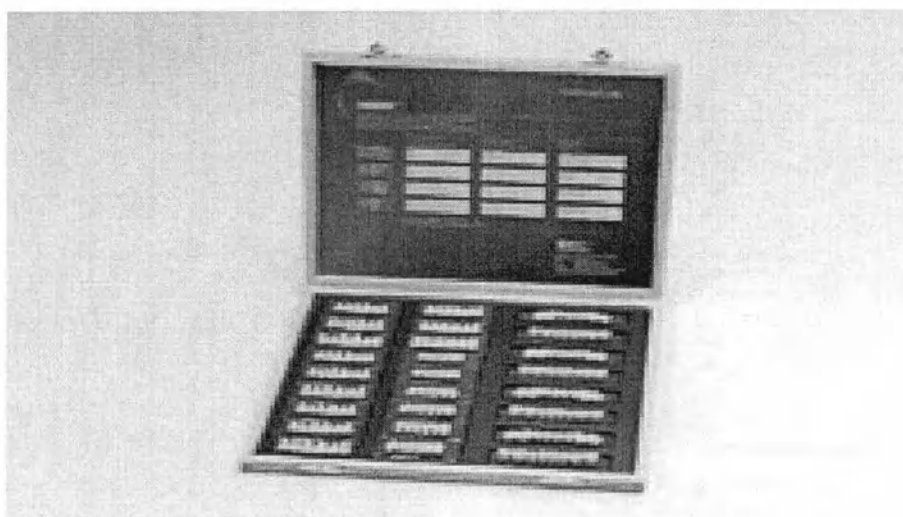




Подбор цветовой интенсивности  
на пришеечном участке

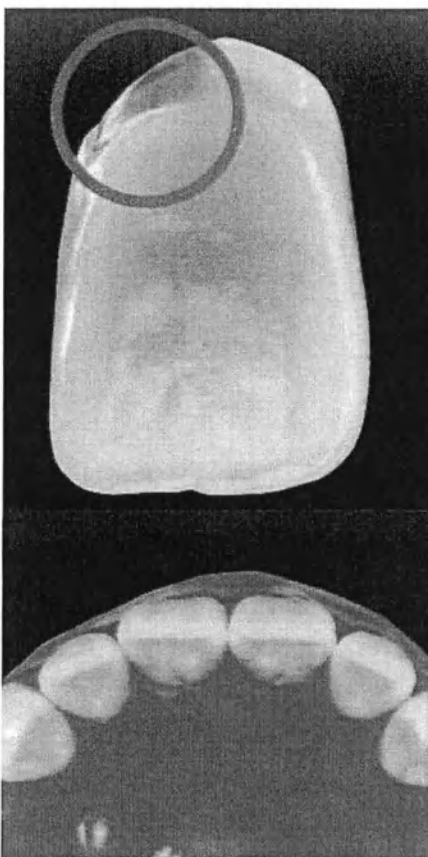

Натуральность анатомической формы  
с небной стороны («Твист»)

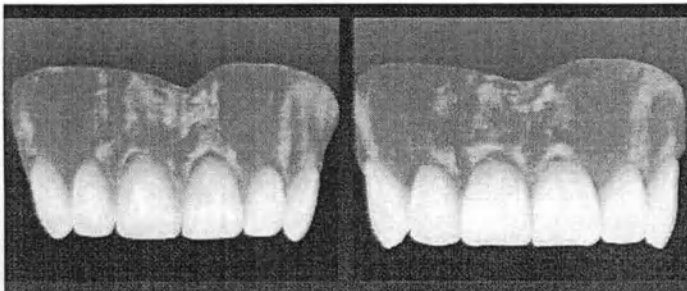

Анатомически неправильно расположенные сосочки в акриловых зубах,  
изготовленных прежними методами

## premium 6 – концепция

Если речь идет об акриловых зубах, то решающими факторами оказываются эстетика и функция. Именно на фронтальных участках акриловый зуб должен быть выполнен натуральным.

Параллельно с индивидуально выполненной облицовкой для пациента акриловый зуб должен стать всемогущим: независимо от возраста пациента, независимо от ситуации в полости рта, с облицовкой сохранились ли натуральные зубы, акриловый зуб обязан всегда хорошо выглядеть. В этом и заключается неповторимое, единственное в своем роде свойство фронтальных акриловых зубов **premium 6**. Их концепция составлена так, что они гармонично вписываются в любой вид протезирования.

## Эстетика – новый взгляд через спектр акриловых фронтальных зубов premium 6

Эстетическое впечатление от искусственного зуба складывается в первую очередь от послойности поверхности. Фирма Хереус Кульцер, используя опыт и знания именитых зубных техников, пошла новым путем.

## Цель: разработка послойности в новых масштабах

Применяя абсолютно новый метод так называемой трехразмерной мультипослойности (мультилэйеринг), слои наносились не как прежде друг на друга, а вкрапливались друг в друга по трем размерам. Благодаря этому наложение слоев происходит на прозрачном фоне, повторяя ситуацию с натуральными зубами. Результат просматривается в каждом акриловом зубе **premium 6** и является точной копией природы.


## premium 6 – функциональный фронтальный


Имея **premium 6**, пользователь держит в руках универсальный зуб который быстро и просто ставится на постановку. Цвет в пришеечной области легко подобрать индивидуально каждому пациенту независимо от возраста благодаря возможности снятия фрезой определенного слоя с пришеечной области.

Комфортное, идентичное натуральному зубу, исполнение акрилового зуба облегчает эстетическую постановку. Увеличенный объем базиса зубов дает возможность также и при индивидуальной постановке фронтальных зубов анатомически правильное расположение сосочков – признак, который прежде отсутствовал в акриловых зубах.

Широкие, апроксимальные поверхности придают в любой позиции гармоничный, трехразмерный вид.

**premium 6** является первым акриловым зубом, имеющий полную анатомическую форму с небной стороны («Твист») – свойство, присущее только натуральным зубам.

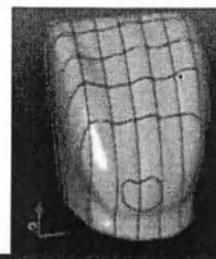


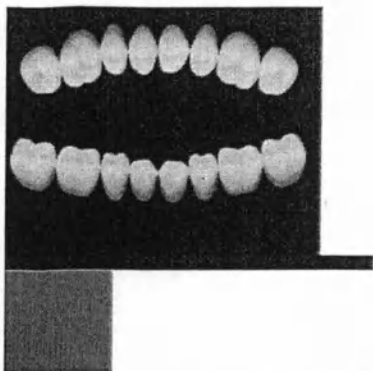

## **premium 8 – логическое завершение для комбинированного протезирования**

Морфология акрилового бокового зуба **premium 8** полностью совпадает окклюзионными постулатами натуральных зубов. Впервые на вооружение техники предоставляются акриловые зубы, которые показаны к постановке в зависимости от ситуации как один зуб к двум зубам, так и один зуб к одному зубу. Угол наклона бугра соответствует углу наклона нижнечелюстного сустава и равен  $30^\circ$ . При этом резерв для обработки поверхности находится чисто в физиологической области.

Объем акриловых боковых зубов **premium 8** объясняется в первую очередь требованиями, предъявляемыми к комбинированному протезированию. Имеет точный размер по вертикали. В связи с тем, что формы зубов по своей ширине как сагитально, так и трансверсально соответствуют натуральному зубу, то нет никаких проблем с комбинированием акриловых зубов с аттачменами.

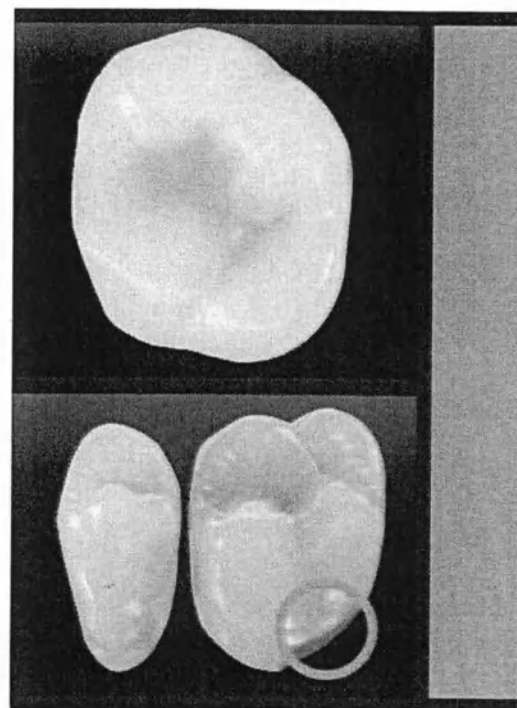

Боковые зубы **Премиум 8** изготавливаются из трех слоев. Благодаря снятию материала с пришеечной области процесс цветовой интенсивности с цервикальной стороны управляем, что облегчает работу с пациентом любого возраста.

## **Форма зуба заслуживает «премию»**


Фирма Хереус Кульцер обратилась при реализации линии акриловых зубов «Премиум» как за известным мастерством, так и за современной технологией. Благодаря этому нам удалось разработать такой зуб и суметь произвести его промышленным способом. Зуб удовлетворяет высочайшим требованиям.








При разработке дизайна мы ориентировались исключительно на функциональность натурального образца. Имитация жевательных движений в «виртуальном артикуляторе» в университете в г. Трайфсвальде подтвердила эту концепцию.











При помощи трехразмерной анимации были тестированы зубы на их функциональные свойства. Испытания прошли успешно. Эти хорошие результаты подтвердились и в клинических испытаниях.



## **Естественность и натуральность благодаря цифровой точности**

При реализации дизайна в производственные формы и при изготовлении продукции фирма Хереус Кульцер целенаправленно использует технологию CAD/CAM. Только эта технология позволяет впервые изготовить абсолютные зубы – двойники (парные зубы).

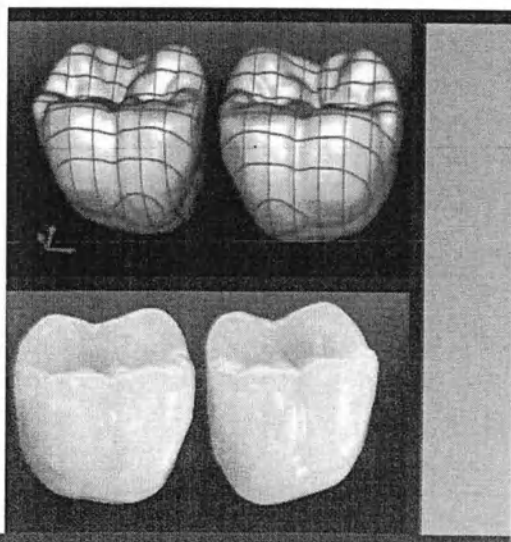

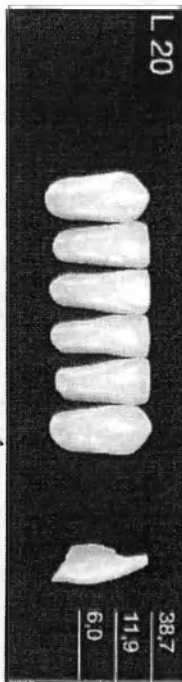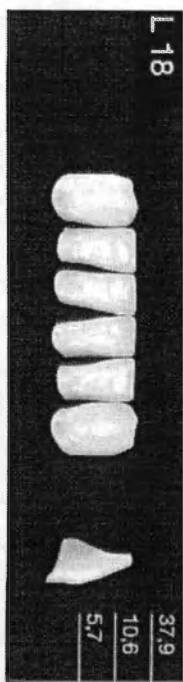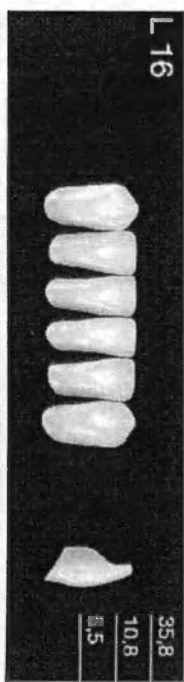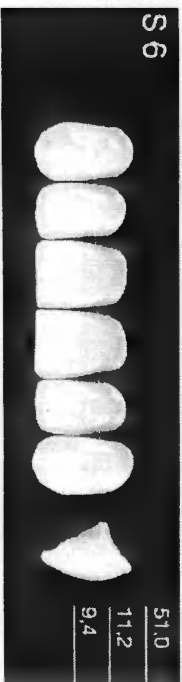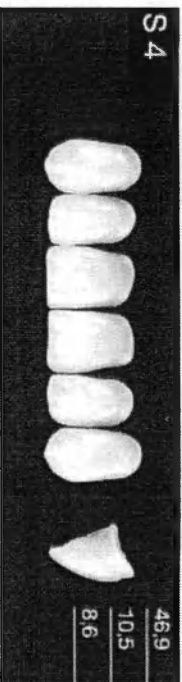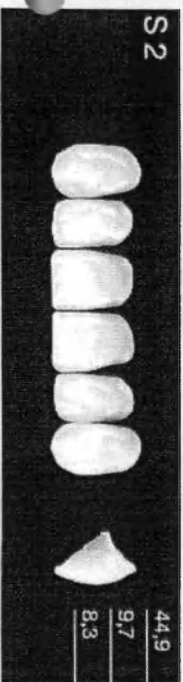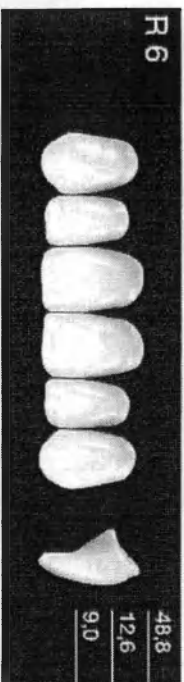

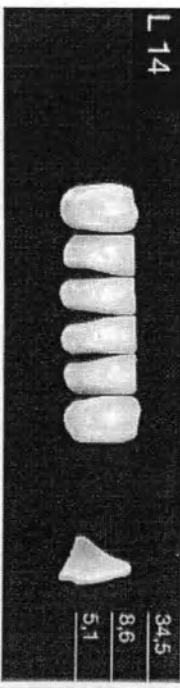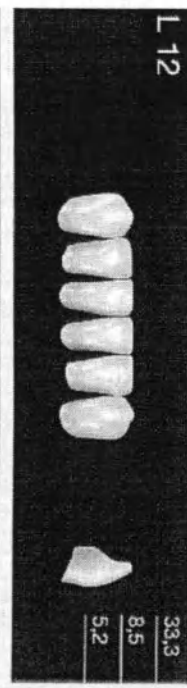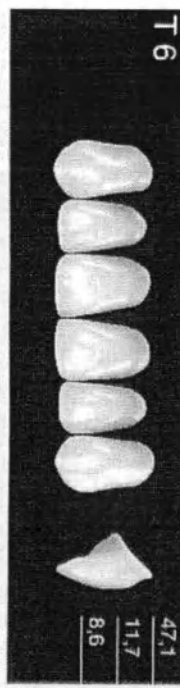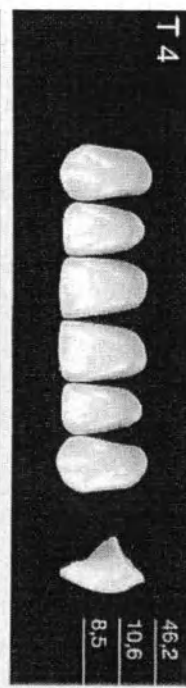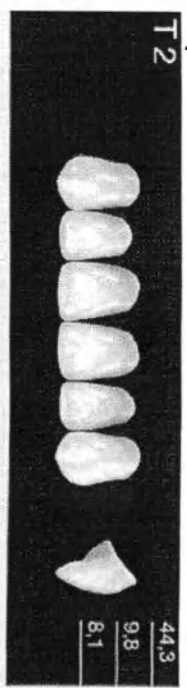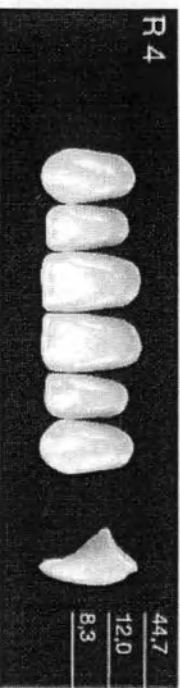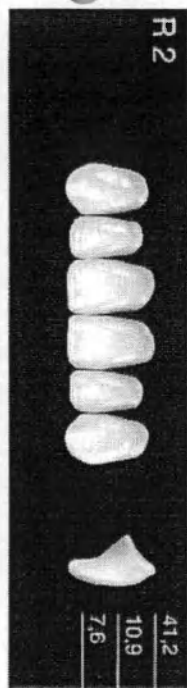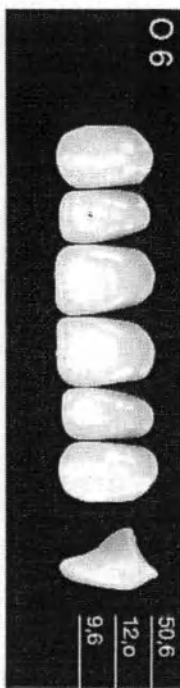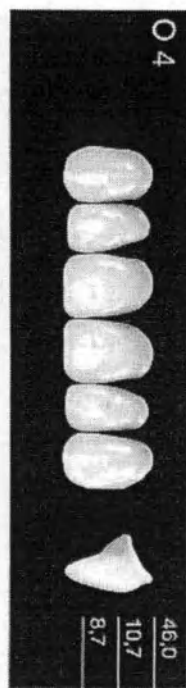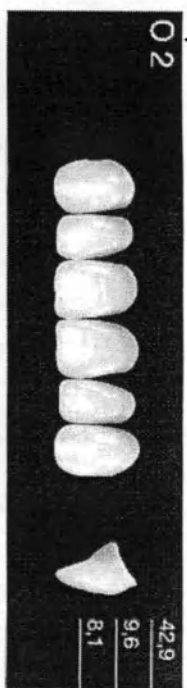


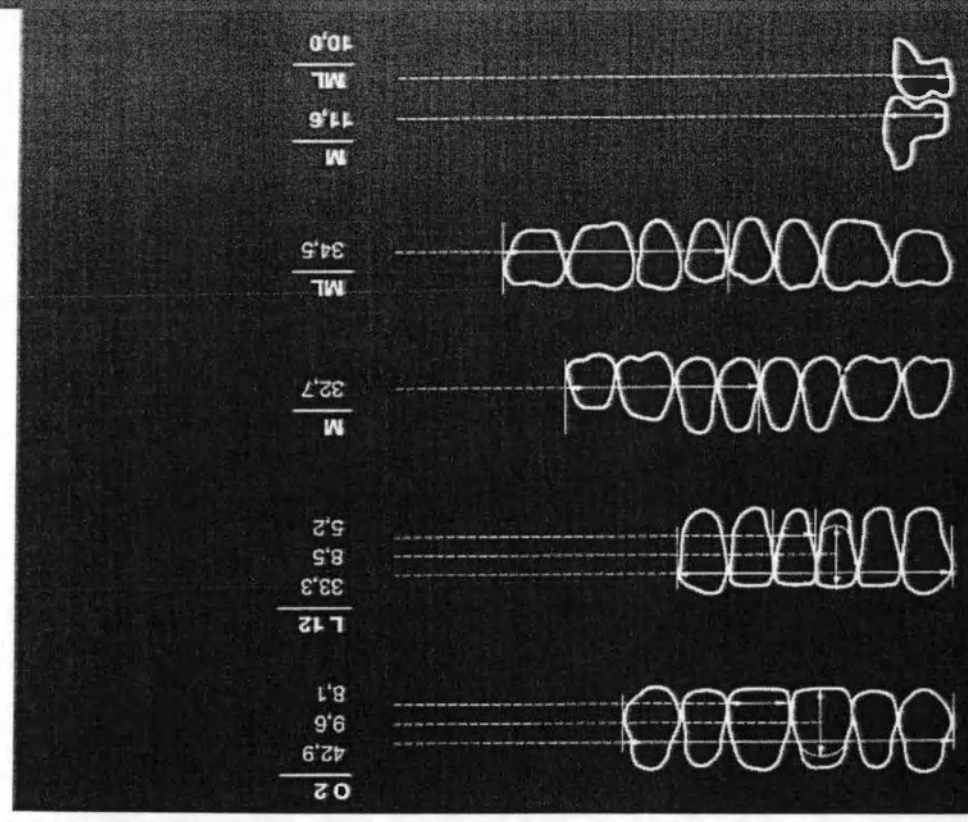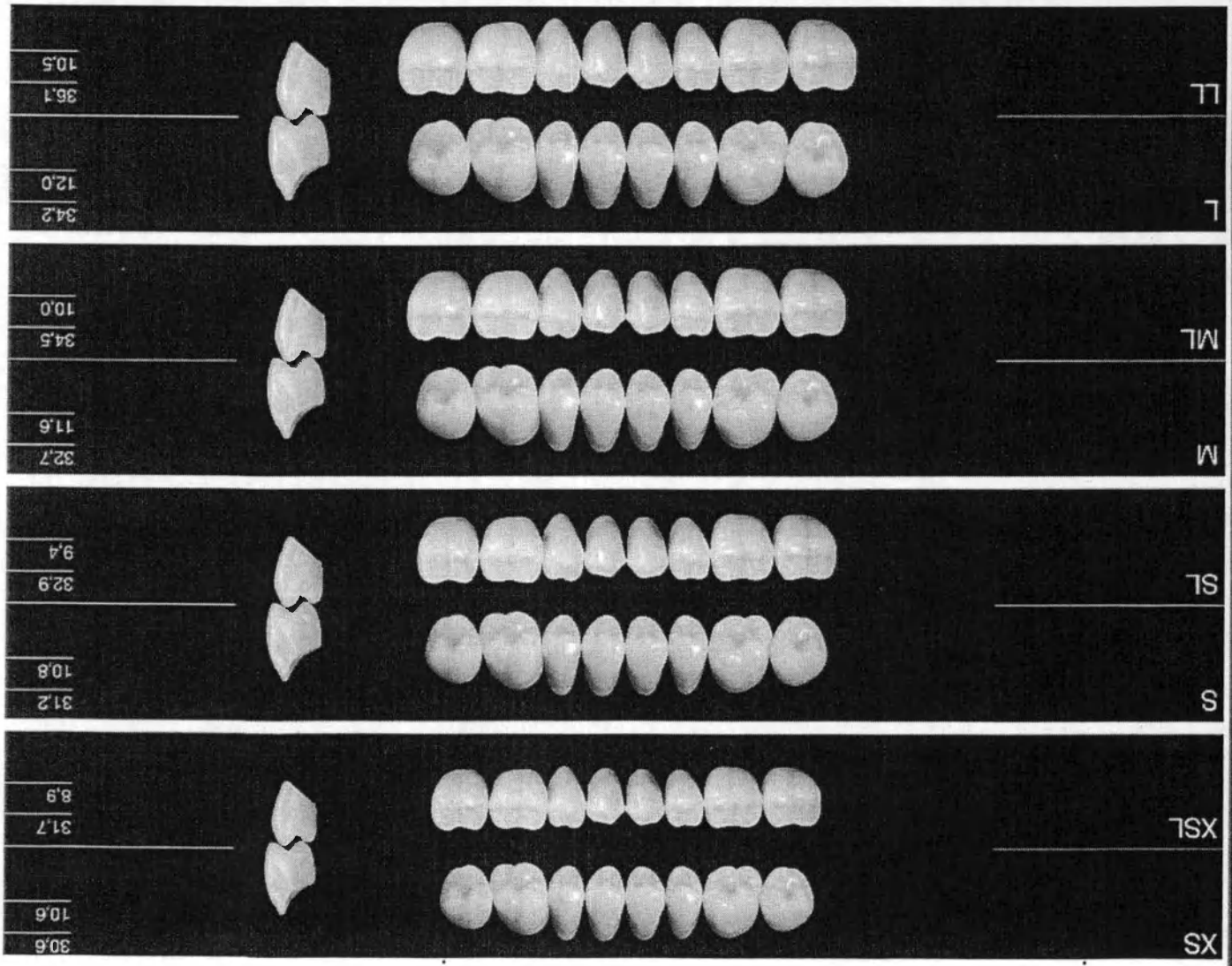

## Таблица комбинирования зубов PREMIUM

| ТИПОФОРМЫ                                                                                              | Верх, фронтальные | Низ, фронтальные | Боковые вверх/низ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  <b>Прямоугольная</b> | R 2               | L12              | XS/XSL+S/SL       |
|                                                                                                        | R 4               | L14/L16          | S/SL+M/ML         |
|                                                                                                        | R 6               | L18              | M/ML+L/LL         |
|  <b>Квадратная</b>    | S 2               | L14/L16          | XS/XSL+S/SL       |
|                                                                                                        | S 4               | L18              | M/ML              |
|                                                                                                        | S 6               | L20/L22          | L/LL              |
|  <b>Треугольная</b>   | T 2               | L14              | XS/XSL+S/SL       |
|                                                                                                        | T 4               | L16              | S/SL+M/ML         |
|                                                                                                        | T 6               | L18              | L/LL              |
|  <b>Овальная</b>      | O 2               | L12/L14          | XS/XSL+S/SL       |
|                                                                                                        | O 4               | L16/L18          | S/SL+M/ML         |
|                                                                                                        | O 6               | L20/L22          | L/LL              |

premium 6

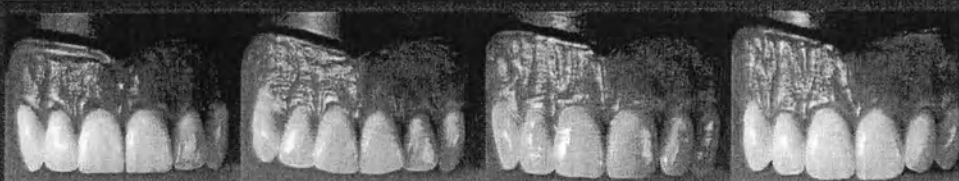


premium 8

Основные формы

Оттенки: от A1 до D4

Типоформы: 4 типоформы

| Верхние | Нижние |
|---------|--------|
| XS      | XSL    |
| S       | SL     |
| M       | ML     |
| L       | LL     |

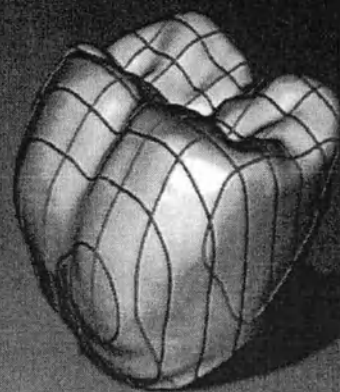

# Бланк заказа зубов Premium 6, Premium 8

# Heraeus

Шкала расцветок VITA

| PREMIUM                          | 6 | A1 | A2 | A3 | A <sub>3,5</sub> | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | Кол-во комплектов |
|----------------------------------|---|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|
| Фронтальные ( комплект 6 зубов ) |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |
| O 2                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | O 2               |
| O 4                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | O 4               |
| O 6                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | O 6               |
| R 2                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R 2               |
| R 4                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R 4               |
| R 6                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R 6               |
| S 2                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | S 2               |
| S 4                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | S 4               |
| S 6                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | S 6               |
| T 2                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | T 2               |
| T 4                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | T 4               |
| T 6                              |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | T 6               |
| L 12                             |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L 12              |
| L 14                             |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L 14              |
| L 16                             |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L 16              |
| L 18                             |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L 18              |
| L 20                             |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L 20              |
| T 22                             |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | T 22              |
| количество                       |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |

Шкала расцветок VITA

| PREMIUM                      | 8 | A1 | A2 | A3 | A <sub>3,5</sub> | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | Кол-во комплектов |
|------------------------------|---|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|
| Боковые ( комплект 8 зубов ) |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |
| XS                           |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | XS                |
| XSL                          |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | XSL               |
| S                            |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | S                 |
| SL                           |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SL                |
| M                            |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M                 |
| ML                           |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ML                |
| L                            |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                 |
| LL                           |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | LL                |
| количество                   |   |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |

