



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Прайм»
В.И. Ступников

« 26 » 07 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ шприцев инъекционных однократного применения стерильных трёхдетальных с иглами

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные трёхдетальные с иглами (далее по тексту – шприцы, иглы, изделия) производства «Jiangyin Nanguan Macromolecule Product Co., Ltd», Китай, предназначены для инъекций лекарственных препаратов, промывания полостей и отсасывания жидкостей в условиях лечебных учреждений и домашних условиях.

Шприцы объемом 1,0 мл поставляются с иглой 27 G (0,4x23 мм), шприцы объемом 2,0 мл поставляются с иглой 23G (0,6x25 мм); шприцы объемом 5,0 мл поставляются с иглой 22G (0,7x32 мм), шприцы объемом 10,0 и 20,0 мл поставляются с иглой 21G (0,8x40 мм), шприцы объемом 50/60 мл поставляются с иглой 18G (1,2x40 мм).

Тип наконечника шприца: Luer.

Метод стерилизации – газовый этиленоксидом.

Расположение наконечника – эксцентрическое (шприцы объемом 20 мл и объемом 50/60 мл), расположение наконечников остальных шприцев – коаксиальное.

Шприцы трехкомпонентные состоят из цилиндра, поршня и уплотнительной манжеты. Наличие уплотнительной манжеты обеспечивает более плавное, без рывков, движение поршня.

Материалы, из которых изготовлен шприц: полипропилен медицинского назначения, трубка иглы – нержавеющая сталь канюля иглы - полимерная.

Комплект поставки:

- шприц – 1 шт.;
- игла с защитным колпачком – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

Подготовка к работе и проведение процедуры

Вымойте руки или обработайте их антисептической салфеткой.

Осмотрите упаковку со шприцем и убедитесь в ее целостности.

Обработайте место инъекции антисептическим средством, например, этиловым спиртом 70 %.

Осторожно вскройте упаковку и извлеките шприц с иглой, на которую надет защитный колпачок.

Удалите защитный колпачок с иглы.

Заполните шприц через иглу лекарственным препаратом, погрузив ее полностью в раствор. Для того, чтобы удалить воздух из шприца, осторожно встряхните шприц и переместите поршень до появления капли лекарственного препарата на острие иглы.

Произведите инъекцию.

Прижмите к месту инъекции салфетку или ватный тампон, смоченные дезинфицирующим средством.

Наденьте на иглу защитный колпачок и утилизируйте изделия в соответствии с инструкциями, действующими в лечебном учреждении. В домашних условиях шприц и иглу необходимо упаковать в непромокаемый контейнер для медицинских отходов.

Меры предосторожности

Не проводите инъекцию при поражении кожи и подкожной клетчатки в предполагаемом месте инъекции.

Не используйте шприц с иглой при нарушении целостности упаковки и истечении срока годности.

Шприц не предназначен для хранения в нем лекарственных препаратов, поэтому набранная доза должна быть введена сразу после заполнения шприца лекарственным средством.

Условия хранения

Шприцы с иглами в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться при относительной влажности воздуха не более 70 %, при температуре воздуха не выше 35 °С в местах, недоступных для детей.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель «Jiangyin Nanguan Macromolecule Product Co., Ltd», Китай, гарантирует соответствие шприцев и игл требованиям стандартов при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в нормативном документе.

Срок годности – 5 лет.

Промыш, проинформировано
и скреплено печатью 31.12.15
места.

генеральный директор

В.И. Ступинков

