

**В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития**

Инструкция по применению изделия медицинского назначения для потребителей

**Консоль медицинская для подводки медицинских газов и подключения
медицинской аппаратуры TRILUX
Trilux GmbH & Co. KG (Германия)**

1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании консолей медицинских для газоснабжения и подключения аппаратуры производства Trilux GmbH & Co. KG (далее «консоли Trilux GmbH & Co. KG» или «устройство») необходимо следовать инструкциям по соблюдению правил использования товаров данного класса, а также соблюдению медицинских требований чистоты и асептики согласно национальным стандартам и/или международным нормам;
- Настоящая инструкция по применению является неотъемлемой частью консоли Trilux GmbH & Co. KG. Тщательное изучение инструкции является залогом правильного обращения с устройством, что очень важно для безопасности, как пациентов, так оперирующих хирургов и прочего медицинского персонала;
- Установка и запуск устройства осуществляются только специалистами центров сервисного обслуживания, аттестованными предприятием-изготовителем консоли Trilux GmbH & Co. KG, в соответствии с соответствующими стандартами, инструкциями по установке и технике безопасности;
- Установка осуществляется в зависимости от типа исполнения консоли Trilux GmbH & Co. KG: настенные консоли, консоли на опорах, реанимационные стойки с креплением «пол-потолок», подвесные потолочные консоли типа "Мост" и "Колонна" палатные консоли;
- Устройство должно эксплуатироваться только в безаварийных условиях;
- Неисправности, влияющие на безопасность работы устройства, должны быть немедленно устранены;
- Все работы по ремонту и техническому обслуживанию консолей Trilux GmbH & Co. KG осуществляются квалифицированным персоналом в соответствии с графиком проведения ремонтных работ;
- Операторы установки несут ответственность за то, что все работники, вовлеченные в монтаж и техобслуживание устройства, строго соблюдают требования безопасности и указания, изложенные в соответствующей документации.

