

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**Цемент стоматологического кальцийфосфатного антисептического**  
**«ФОСФАДЕНТ»**  
**ТУ 9391-038-45814830-99**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Пломбирование корневых каналов как с использованием штифтов (так и без них) под все типы постоянных пломбировочных материалов, в том числе композиционных.

**ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

Стоматологический материал «Фосфадент» обладает низкой растворимостью, образует пробку в области верхушечного отверстия при тщательном наполнении верхней части канала на расстоянии 0,5-0,7 мм от апекса.

В состав стоматологического материала «Фосфадент» входят:

- гидроокись кальция,
- фосфаты кальция,
- фторид кальция и рентгеноконтрастные добавки.

В результате химических реакций, протекающих при смешивании порошка с жидкостью, образуется гидроксиапатит кальция, стимулирующий образование связочной ткани на уровне апекса.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Перед началом работы баночку с порошком необходимо хорошо встряхнуть.

На стеклянной пластине в течение 1 минуты смешать 1 мерник порошка (0.1 г) с 3 каплями жидкости (0.05-0.07г), растирая до получения густой пластичной пасты. При потере пластичности в процессе работы в пасту можно прибавить незначительное количество жидкости «Фосфадент» до получения первоначальной консистенции. Полученную пасту можно использовать в течение 20-30 минут.

После проведения медикаментозной обработки канала с использованием жидкостей для расширения, дезинфекции и сушки приготовленную пасту при помощи каналонаполнителя вносят в канал, тщательно конденсируя каждую порцию. При необходимости избыток жидкости, образующейся в процессе конденсации, удаляют из канала адсорбирующими бумажными штифтами.

Для запечатывания апекса необходимо сконденсировать 1-2 мм пасты на расстоянии 0,5-0,7 мм от внешней стороны верхушечного отверстия. Канал просушить адсорбирующими штифтами и запломбировать с использованием гуттаперчевых штифтов и других пломбировочных материалов («Виздент», «Стиодент»).

Паста в канале затвердевает в течение 72 часов.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Порошок (банка)       | 15,0 г  |
| Жидкость (капельница) | 12,0 мл |

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Разработчик Е.А. Кузьмина 2007 г.



КОПИЯ ВЕРНА