

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
" 06 " 04 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-герметика двухкомпонентного
химического отверждения для закрытия фиссур
и других анатомических углублений зубов
«ФИССХИМ»
ТУ 9391-095-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметик для фиссур «Фиссхим» является материалом экзогенной профилактики окклюзионного кариеса временных и постоянных зубов и предназначен для запечатывания фиссур и других анатомических углублений интактных зубов, а также изоляции участков, чувствительных к поражению кариесом.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Герметик химического отверждения «Фиссхим» представляет собой композит на основе органического связующего и силанизированного тонкодисперсного кварцевого наполнителя, соответствует требованиям ГОСТ Р 51202-98.

«Фиссхим» состоит из двух паст (каталитической и основной). Входящие в состав композита фторсодержащие компоненты обеспечивают кариеспротективный эффект.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1). Тщательно очистить окклюзионную поверхность зуба, удалить мягкий зубной налет с помощью циркулярных щеток полировочной пастой, не содержащей фтора («Полидент № 2»). Промыть очищенные поверхности зуба водой. Рекомендуется использовать водно-воздушную струю.

2). Необходимое количество геля для травления эмали нанести на обрабатываемую поверхность зуба, выдержать в течение 50-60 секунд. Затем гель для травления тщательно смыть водой и высушить поверхность зуба сжатым воздухом. Правильно протравленная поверхность должна иметь меловой оттенок. Зуб, подлежащий герметизации, изолировать от попадания слюны, используя коффердам или ватные валики.

В случае попадания слюны травление повторить в течение 10 сек, после чего промыть и просушить поверхность.

3). Выдавить на блокнот для смешивания равные количества основной и каталитической паст. Смешать пасты в течение 30 сек. пластмассовым шпателем. При температуре $+23^{\circ}\text{C}$ рабочее время материала составляет около 2 мин. Аппликатором нанести полученный герметик на подготовленную поверхность зуба. Следить, чтобы герметик попадал во все углубления.

4). После отверждения герметика (через 4-5 минут) необходимо протереть окклюзионную поверхность ватным тампоном. Качество герметизации фиссуры проверить зондом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста каталитическая (шприц)	- 3 мл
Паста основная (шприц)	- 3 мл
Гель для травления (шприц)	- 5 мл
Блокнот для замешивания	- 1 шт.
Игла	- 5 шт.
Пластмассовый шпатель	- 10 шт.
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$. Перед использованием выдержать материал при комнатной температуре в течение 30 минут.

Срок годности – 18 месяцев.

При транспортировании в зимнее время (t ниже 0°C) материал необходимо выдержать при $t +18^{\circ}\text{C} \dots +23^{\circ}\text{C}$ в течение суток.

Несоблюдение условий хранения может привести к сокращению срока годности материала и к изменению его рабочих характеристик.

ФИССХИМ®

Материал-герметик
двухкомпонентный
химического отверждения
для закрытия фиссур и
других анатомических
углублений зубов

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

жидкость каталитическая (№1)	3 мл
паста основная (№2)	4 мл
гель для травления эмали	5 мл

Хранить в сухом темном месте
при температуре
от +5°C до +8°C.
Срок годности - 18 месяцев.



ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа"
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19
Тел. (0722) 34-56-85, факс (0722) 31-59-03, www.vladmiva.ru

VladMivA

PROPHYLACTIC
DENTAL MATERIALS

FISSHIM

Hermetizing
2-component
chemically cured
material
for sealing fissures

Store in a dark and cool place
at t +5°C...+8°C.
18 months shelf-life

liquid-catalyst (№1)	3 ml
basic dough (№2)	4 ml
gel for enamel etching	5 ml



ТУ 9391-095-45814830-2004

Packer	Batch	Production date
--------	-------	-----------------

12

1204



