




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»
Семёнов А.В.

«20» июля 2012 г.

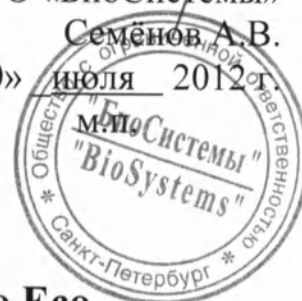

Руководство по эксплуатации Тумбочка медицинская прикроватная Soreno Eco



ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр. Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

Оглавление

1. Введение;
2. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие;
3. Описание и работа;
4. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения);
5. Техническое обслуживание и текущий ремонт (порядок действий при возникновении неисправностей для изделий медицинской техники);
6. Условия хранения;
7. Условия транспортирования;
8. Порядок утилизации.

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

1. Введение

Медицинские прикроватные тумбочки производства фирмы Joh. Stieglmeyer GmbH&Co. предназначены для ухода за пациентом, повышения комфорта и создания нужного позиционирования в условиях медицинских стационаров. Общий дизайн тумбочек выдержан в стиле функциональных кроватей Stieglmeyer.

2. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие

Определение лиц и групп:

Пользователь

Пользователи (врачи, средний медицинский персонал) должны ознакомиться с данной инструкцией.

Пациент

В данном Руководстве Пациентом названы недееспособные или нуждающиеся в уходе больные.

Данное Руководство содержит полную информацию для пользователей о правилах безопасности, которым необходимо неукоснительно следовать.

Правила безопасности пользователей:

- Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с тумбочкой, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы перед использованием прикроватной медицинской тумбочки.

- Каждый раз перед использованием тумбочки необходимо проверять ее полную работоспособность: движения колес, тормоз, ход выдвижных полок, движения откидного столика.

- Если подозреваются какие-либо неисправности нужно незамедлительно сообщить ответственному за оборудование человеку.


ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

3. Описание и работа

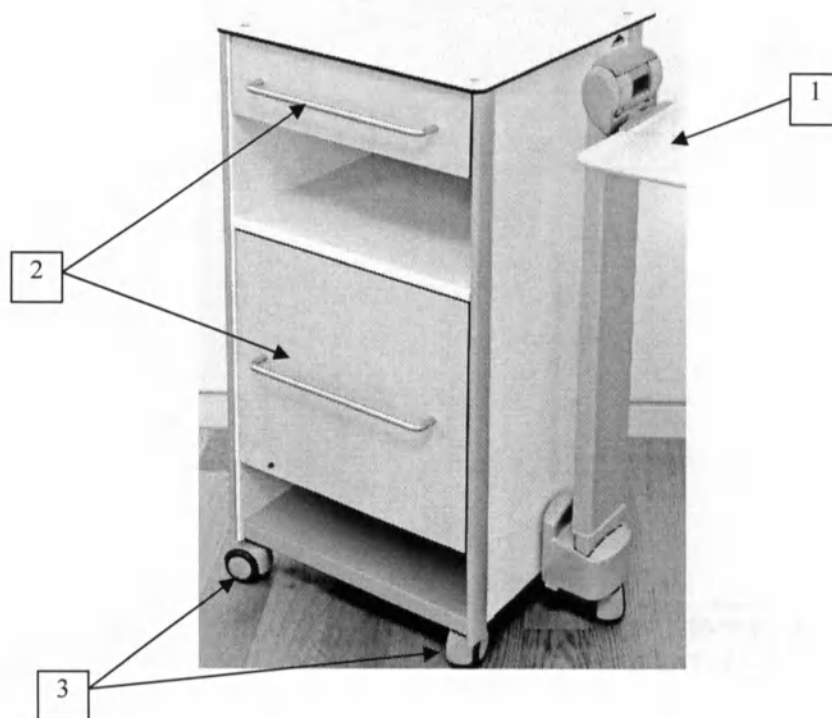

1	Откидной столик для приема пищи и чтения
2	Выдвижные ящики
3	Двойные колеса

Основные технические характеристики

Габариты: 555x444x876 мм (откидной столик опущен)

Вес ок. 34 кг

Колеса двойные, диаметр 52 мм

Габариты откидного столика: 370x550 мм

Регулировка по высоте в диапазоне: 760-1110 мм

Список принадлежностей

1. Столик обеденный, ABS-пластик (Eating table ABS).
2. Колеса с тормозами, 4 штуки (Braked castors, 4 pieces).

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85


ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

4. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

Столик для приема пищи и чтения пневматически регулируется по высоте.




Нажмите рычаг, для того, чтобы откинуть столик

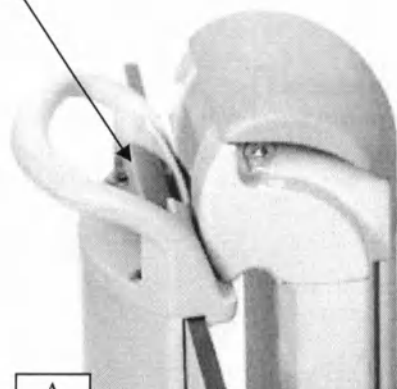

А

Держась за ручку столика, поднимите его вверх

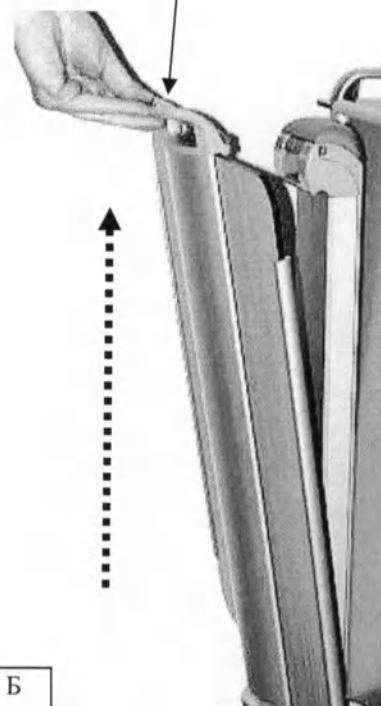


Б

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

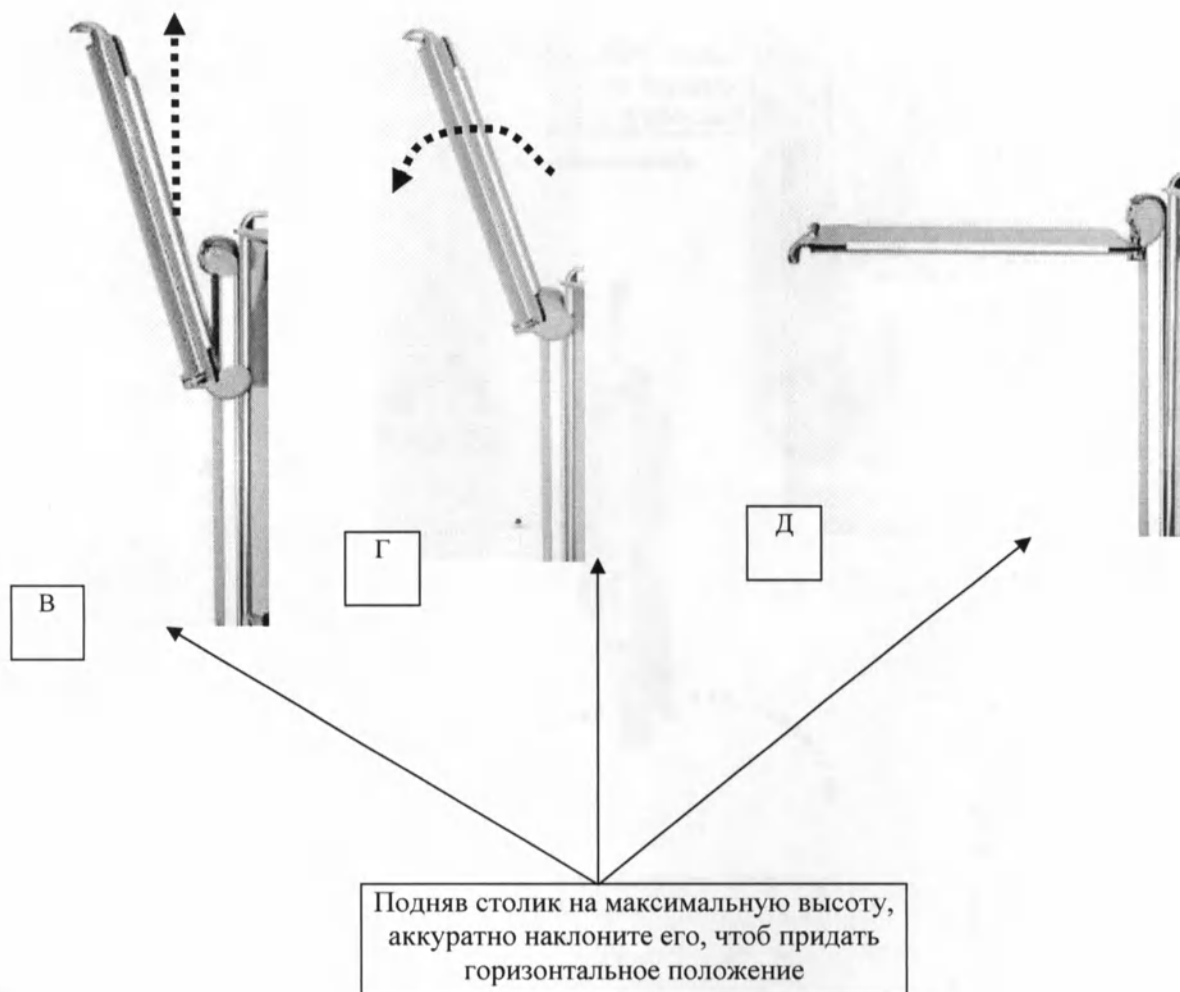


ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

Откидной столик легко отсоединяется и присоединяется к другой стороне тумбочки.

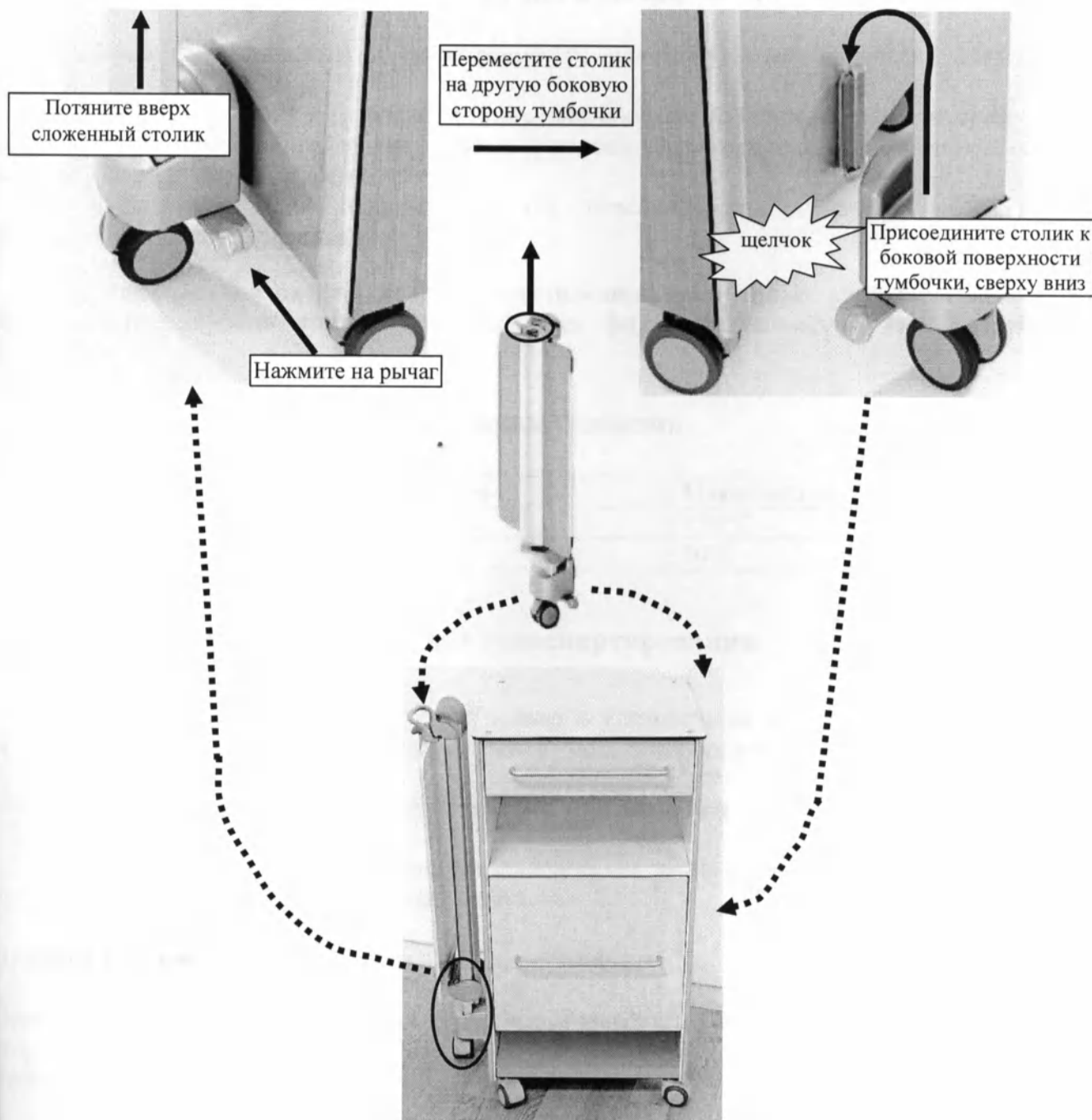

ООО «БиоСистемы»

центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
т.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт (порядок действий при возникновении неисправностей для изделий медицинской техники)

Тумбочка спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени.

Многократные сборки и разборки, а также неправильное использование могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

В случае выявления повреждений или неисправностей тумбочка должна быть незамедлительно выведена из эксплуатации.

Для поддержания работы и для осуществления гарантийных обязательств должны использоваться только оригинальные изделия фирмы-изготовителя Joh. Stieglmeier GmbH & Co.

6. Условия хранения

	Минимальная	Максимальная
Температура хранения	+5°C	+50°C
Относительная влажность	50%	70%

7. Условия транспортирования

Транспортироваться тумбочки могут только в упаковочном материале, который должен полностью защищать все компоненты тумбочки от механических и физических повреждений.

8. Порядок утилизации

В случае утилизации пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга и утилизированы соответствующим образом.

Продажа и сервисное обслуживание:

ООО "БиоСистемы", 197101 г. Санкт-Петербург,

Петроградская набережная, дом 36, литер А, Бизнес-центр «Линкор»

тел.: (812)3204949, факс: (812)3204940

Бесплатный номер сервисной службы для всех регионов: 8 800 333 00 49

Генеральный директор

ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.

«20» июля 2012

ООО «БиоСистемы»

Центральный офис:
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А, б/ц «Линкор»
тел.: +7 (812) 320 49 49
факс: +7 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 380 23 48
Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 276 61 47
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 268 99 32
Казань, тел.: +7 (843) 570 66 88
Владивосток, тел.: +7 (924) 739 11 85

ДП «БиоЛайн Украина»
03062, Украина, Киев
пр.Перемоги, 67, корп. D, офис 102
тел.: +38 (044) 200 89 37
факс: +38 (044) 200 89 20
e-mail: info@bioline.kiev.ua

В настоящем документе прошито и
пронумеровано _____ листов
Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.

