

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г.Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

ИНСТРУКЦИЯ

по применению презервативов

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются как барьерное средство контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергические реакции.

3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
- При вскрытии упаковок не применяйте острые предметы.
- Надевайте презерватив до начала полового контакта.
- Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.
- Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.
- Расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена.
- Сразу после эякуляции извлеките пенис, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул.
- Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания.
- Сверните использованный презерватив и выбросьте его. Никогда не бросайте презервативы в унитаз.
- Только для одноразового применения
- Не применяйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, а также лосьоны и вазелин. Если это необходимо, используйте гель-смазки на водной основе.
- Не используйте презерватив, если срок годности истек или целостность упаковки (фольги) нарушена.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Презервативы следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕДКОМ-МП**

5, Московская область, Люберецкий район,
электроника, микрорайон Белая Дача,
зона Технопром
телефон (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001


р/сч 407028100000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Генеральный директор «Общество с ограниченной ответственностью «Медком-МП»

« » 2009 г.



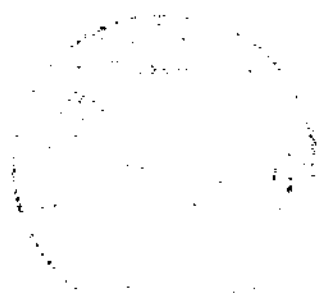

Генеральный директор
Юнчев С. В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г.Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

ИНСТРУКЦИЯ

по применению презервативов

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются как барьерное средство контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергические реакции.

3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
- При вскрытии упаковок не применяйте острые предметы.
- Надевайте презерватив до начала полового контакта.
- Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.
- Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.
- Расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена.
- Сразу после эякуляции извлеките пенис, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул.
- Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания.
- Сверните использованный презерватив и выбросьте его. Никогда не бросайте презервативы в унитаз.
- Только для одноразового применения
- Не применяйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, а также лосьоны и вазелин. Если это необходимо, используйте гель-смазки на водной основе.
- Не используйте презерватив, если срок годности истек или целостность упаковки (фольги) нарушена.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Презервативы следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕДКОМ-МП**

5, Московская область, Люберецкий район,
электронный микрорайон Белая Дача,
зона Технопром
телефон (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 407028100000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 301018101000000000162
БИК 044579162

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

« 12 » марта 2009 г.

Руководитель департамента ВЭД
и сертификации ООО «Медком-МП»

Терехов М.В.
(по доверенности № 870 от 09.12.2008.)



Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 2 листов
Руководитель департамента ВЭД и
сертификации ООО «Медком-МП»
Терехов М.В. (по доверенности № 870 от
09.12.2008.)

