

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Медиформ-Инновации»

Макарова О.Е.

20__ г

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

**Изделия медицинские для не инвазивного пережатия артерий
(турникеты) с принадлежностями**

производства

«Мерит Медикал Систэмз, Инк.», США

1. Название и юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения

- Merit Medical Systems, Inc.», 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA.
- Merit Medical Ireland, Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.

2. Наименование изделия медицинского назначения:

Изделия медицинские для не инвазивного пережатия артерий (турникеты) с принадлежностями

3. Назначение изделия медицинского назначения

Изделия медицинские для не инвазивного пережатия артерий (турникеты) с принадлежностями позволяют регулировать артериальный кровяной поток в конечностях до полной его остановки

4. Сфера применения изделия медицинского назначения

Сосудистая хирургия и травматология.

5. Состав изделия медицинского назначения, включая основные комплектующие и принадлежности

I. Изделия медицинские для не инвазивного пережатия артерий (турникеты):


- Приспособление для пережатия лучевой артерии «Финал» (Finale Radial Artery Compression Device);
- Приспособление для пережатия лучевой артерии «РадСтат» (RadStat Radial Artery Compression Device);

II. Принадлежности:


- Диск компрессионный «Облонг» (Oblong Compression disc);
- Диск компрессионный «Скуэр» (Square compression disc);
- Мешок нагнетающий (Pressure Infusor Bag).

6. Использование изделия

Шаг 1. Для подготовки диска к использованию сожмите края и поверните диск против часовой стрелки до упора.

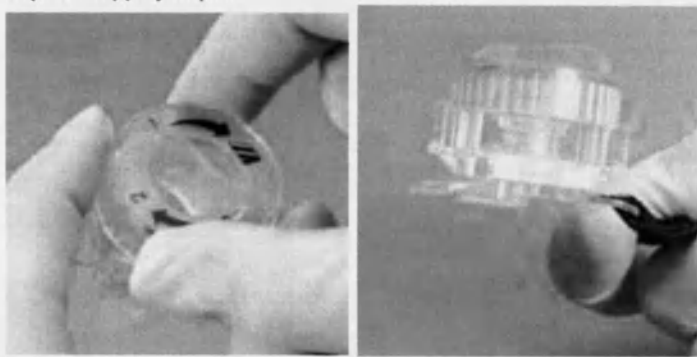


Шаг 2. Поместите устройство на руку пациента. Компрессионная поверхность должна находиться прямо над артериальным участком. Затяните ремень.

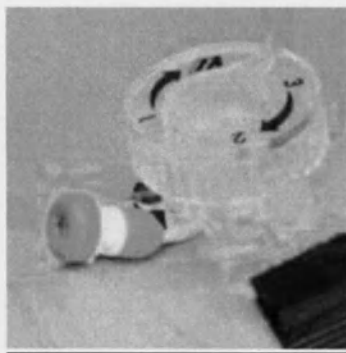


Шаг 3. Удалите оболочку пока вращаете диск по часовой стрелке для достижения гемостаза. Первичное сдавление должно быть применено в течении хотя бы 30 минут.



Шаг 4. Для уменьшения давления освободите фиксатор и вращайте диск против часовой стрелки. Давление должно быть снижено каждые 15-30 минут.

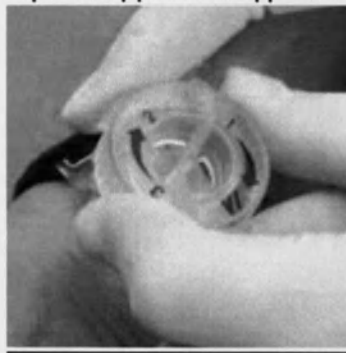

Шаг 6. После того, как достигнут гемостаз, удалите диск и направьте его на переработку.

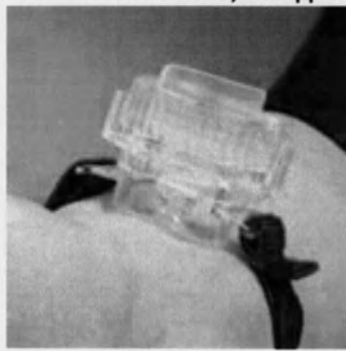

Срок хранения изделий – 2 года. Срок годности указан на упаковке.

Прошито и
пронумеровано 3

