



ТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ЗАО «ДЕ-5»  
Бродецкий И.И.

Ирина 2011 г.

М.п.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **Искусственных зубов акриловых NT Optima, NT Proxima, NT Unay**

производства фирмы «Торос Дентал ИТХ.ИХР.САН.ТИДЖ.ЛТД.ШТИ.» (Турция) «Toros Dental İTH.İHR.İNS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.»

## 1. Назначение

Искусственные зубы акриловые NT Optima, NT Proxima, NT Unau предназначены для изготовления стоматологических протезов. Протез может быть: полностью съемный, частично съемный. Применяются в стоматологии.

## 2. Основные характеристики

Искусственные зубы акриловые NT Optima, NT Proxima, NT Unau обладают цветовой гаммой естественных зубов. Цветовая гамма полностью соответствует европейской цветовой шкале "Vita" (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.). Искусственные зубы NT Unau являются двухслойными, NT Optima трехслойными, NT Proxima пятислойными.

Достоинством искусственных зубов NT Optima, NT Proxima, NT Unau является легкость в применении, эстетичность, высокая износостойкость и разновидность форм и размеров, что дает возможность индивидуального подбора для пациента. Благодаря отличному соединению с акриловыми и композитными базами, возможно использование искусственных акриловых зубов NT Optima, NT Proxima, NT Unau во всех видах современных конструкций съемных протезов.

Искусственные акриловые зубы также обладают характеристиками:

- безупречная техника покрытий;
- устойчивость цвета, сохранение его при флуоресцентном освещении;
- индивидуальная морфология;
- определение точного центра соотношения челюстей;
- применение технологии CAD/CAM для идеального соответствия.

## 3. Противопоказания к применению

Противопоказаний не выявлено.

## 4. Порядок работы

Метилметакрилат и полиметилметакрилат представляют собой тестообразную пластмассу, которая помещается в формочку для прессования и затем прессуется. Она готова к использованию после завершения всех этапов производственного процесса для применения в качестве полностью съемных или частично съемных зубных протезов. Зубной техник выбирает подходящую форму для зубов в соответствии со снятыми зубными оттисками пациента и в соответствии с прикусом. Цвет зуба подбирается исходя из общих правил. Выбранные зубы должны быть смонтированы в формы и должным образом

размещены в ковете. Розовый акриловый зубной протез должен быть установлен. и в дальнейшем он должен затвердеть. Необходимо провести выравнивание и шлифовку. Пустые упаковки и неиспользованные остатки материала должны быть утилизировать вместе с обычными материалами отходов, образующихся на рабочем месте.

### **5. Правила хранения и использования**

Запрещено курение в местах хранения. Беречь от электростатических источников и источников тепла. Хранить при температуре от 5°C до 25°C без воздействия прямых солнечных лучей. По возможности хранить в прохладном месте.