



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГК Пальма»

Ю.В. Якубович

28 » 2015 г.

Инструкция по применению калоприемника однокомпонентного самофиксирующегося для ухода за стомой «Пальма»®

1. Наименование изделия

Калоприемник Абуцел – С однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – С однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – СМ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – СМ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – К однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – К однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – КМ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – КМ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – В однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма»®, ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – В однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма[®]», ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – ВМ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма[®]», ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – ВМ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма[®]», ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – ВТ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма[®]», ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – ВТ однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма[®]», ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – Д однокомпонентный самофиксирующийся ухода за стомой «Пальма[®]», ТУ 9398-010-83228278-2015

2. Область применения

Калоприемник может применяться в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.

3. Показания для применения.

Изделие предназначено для сбора и отвода выделений у пациентов с коло - и илеостомами. Изделие одноразового использования в течение 2-5 дней без снятия со стомы.

4. Противопоказания для применения

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых при изготовлении изделия. Побочные эффекты при использовании калоприемников не выявлены.

5. Меры предосторожности при применении

Изделие не требует применения особых мер предосторожности при использовании.

6. Условия хранения и транспортирования

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Условия транспортирования изделий - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 в интервале температур от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150 в интервале температур от плюс 5°C до плюс 30°C .

7. Срок годности изделия

Срок годности изделия – 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования, указанных в п.6

8. Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Пальма» (ООО «ГК Пальма»).

Юридический адрес: Россия, 121471, г. Москва, Можайское ш., 29/2, стр.1 .

Телефон: (495) 921-37-19, E-mail - palma@palma-med.ru

Адрес места производства: Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12-2, стр. 4.

9. Состав изделия. Варианты комплектации

9.1. Калоприемник состоит из емкости, снабженной подкладкой из нетканого материала или полимерной сетки с внутренней стороны или с обеих сторон емкости, и фланцевого элемента с герметизирующим кольцом

из материала Абуцел или Триоцел, с помощью которого осуществляется крепление к телу человека. Изделие комплектуется зажимом.

9.2. Калоприемник исполнений Абуцел – С, К, В и Триоцел – С, К, В имеет емкость, прозрачную с наружной стороны и снабженную подкладкой из нетканого материала с внутренней стороны.

Калоприемник исполнений Абуцел – СМ, КМ, ВМ и Триоцел – СМ, КМ ВМ снабжен подкладкой из нетканого материала с обеих сторон емкости.

Калоприемник исполнений Абуцел – ВТ и Триоцел – ВТ, имеет емкость, непрозрачную с наружной стороны и снабженную подкладкой из полимерной сетки с внутренней стороны.

Калоприемник исполнения Триоцел – Д, имеет емкость, прозрачную с наружной стороны и снабженную подкладкой из полимерной сетки с внутренней стороны.

9.3. Калоприемник исполнений Абуцел – С, К, В, СМ, КМ, ВМ, ВТ имеет фланцевый элемент с герметизирующим кольцом из адгезивного материала Абуцел.

Калоприемник исполнений Триоцел – С, К, В, СМ, КМ, ВМ, ВТ, Д имеет фланцевый элемент с герметизирующим кольцом из адгезивного материала Триоцел.

9.4. В комплект поставки калоприемника исполнений Абуцел – С, К, СМ, КМ, Триоцел – С, К, СМ, КМ входят:

- калоприемник одного исполнения в количестве 1, 2, 3 или кратном 5;
- пластиковый зажим в количестве 1 шт. на 5шт. емкостей, но не менее 1 шт. на комплект;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- потребительская упаковка с нанесенной на нее этикеткой – 1 шт.

9.5. В комплект поставки калоприемника исполнений Абуцел – В, ВМ, ВТ, Триоцел – В, ВМ, ВТ входят:

- калоприемник одного исполнения в количестве 1, 2, 3 или кратном 5;

- блистер в количестве 1 шт. на комплект (но не менее 1 шт. на 5 изделий);

- пластиковый зажим в количестве 1 шт. на 5 шт. емкостей, но не менее 1 шт. на комплект;

- инструкция по применению – 1 шт.;

- потребительская упаковка с нанесенной на нее этикеткой – 1 шт.

9.6. В комплект поставки калоприемника исполнения Триоцел – Д входят:

- калоприемник одного исполнения в количестве 1, 2, 3 или кратном 5;

- гибкий зажим в количестве 1 шт. на 1 изделие;

- инструкция по применению – 1 шт.;

- потребительская упаковка с нанесенной на нее этикеткой – 1 шт.

10. Технические характеристики

10.1. Калоприемник исполнений Абуцел – С, СМ и Триоцел – С, СМ выпускается для стомы с максимальным размером 60мм.

Калоприемники исполнений Абуцел – К, КМ и Триоцел – К, КМ выпускается для стомы с максимальным размером 70мм.

Калоприемники исполнений Абуцел – В, ВМ, ВТ и Триоцел – В, ВМ, ВТ, выпускается для стомы с максимальным размером 80мм.

Калоприемник исполнения Триоцел– Д выпускается для стомы с максимальным размером 50мм.

10.2. Соединение фланцевого элемента с емкостью калоприемника должно быть прочным и выдерживать приложенную к нему нагрузку 20Н.

10.3. Калоприемник в сборе с зажимом, будучи заполненным водой на 65 – 75% объема, должен выдерживать сжатие силой 200Н.

10.4. Калоприемник в сборе с зажимом, заполненный водой в горизонтальном положении, должен быть герметичным: не должен пропускать содержимое в течение 17 часов.

10.5. Перемычка пластикового зажима должна быть прочной при многократном раскрытии и смыкании створок зажима в течение 3 часов со скоростью 60 циклов смыкания – размыкания/мин.

10.6. Величина адгезионной характеристики герметизирующего кольца калоприемника должна быть не менее 70 Н/м.

11. Подготовка изделия к работе.

11.1 Подготовить кожу вокруг стомы. Кожа должна быть чистой, без мазей, кремов и т.п. и сухой.

11.2. Слегка надуть калоприемник для разъединения его стенок. Вырезать в фланцевом элементе, покрытом защитной бумагой с концентрическими окружностями, отверстие для стомы. Отверстие должно на 1-2 мм больше внешнего контура стомы

11.3 Прогреть фланцевый элемент на каком-либо закрытом источнике тепла или на своем теле.

11.4. Снять защитную бумагу с герметизирующего (внутреннего липкого) кольца фланцевого элемента и наклеить его на тело. Затем удалить защитную бумагу с наружного кольца и приложить клеящий слой к коже.

Для лучшего приклеивания прижать калоприемник к телу и удерживать ее не менее 1 мин.

Во избежание образования складок разгладить калоприемник от стомы к краям.

11.5. При использовании пластикового зажима:

Раскрыть пластиковый зажим, положить его одинарную часть на расстоянии 2-3см от края выпускного отверстия, перегнуть край калоприемника и расправить его от складок, после чего сжать зажим до щелчка.

11.6. При использовании гибкого зажима:

Снять защитную бумагу, приклеить полоску зажима на край выпускного отверстия.

Завернуть край с приклеенным зажимом не менее 3 раз, избегая образования складок, после чего загнуть концы зажима внутрь.

12. Порядок работы изделия.

12.1. Опорожнять калоприемник следует при заполнении его приблизительно наполовину.

Для опорожнения калоприемника открыть зажим и удалить содержимое через выпускное отверстие, не снимая калоприемника со стомы.

Протереть выпускное отверстие туалетной бумагой или салфеткой и снова закрыть зажим.

12.2. Для удаления скопившихся газов использовать выпускное отверстие без снятия изделия со стомы.

12.3. Калоприемник следует заменять по мере необходимости - при начале подтекания жидкости в месте крепления, пропускании запаха, а также при ощущении каких-либо неудобств.

Снимать калоприемник медленно, отслаивая клеящий слой от кожи и придерживая кожу рукой.

При замене калоприемника допускается наклеивание нового изделия на оставшиеся на коже фрагменты клеящего слоя.

13. Требования к применению и эксплуатации

13.1. Для хорошей фиксации калоприемника на теле, кожа вокруг стомы должна быть чистой, без кремов, мазей и пр. и сухой.

13.2. Не следует класть калоприемник липкой стороной на какие-либо поверхности и без необходимости касаться липкого слоя руками.

13.3. Следует избегать частой, не оправданной необходимостью смены калоприемника, т.к. в первые дни липкость клеящего слоя самая большая, и процедура отсоединения может быть болезненной.

13.4. Не следует допускать заполнения калоприемника более, чем наполовину.

13.5. Не допускать скопления большого количества газов и сильного раздувания калоприемника.

14. Порядок осуществления утилизации и уничтожения
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. № 163)

Изделие после использования уничтожается вместе с бытовыми отходами. Запрещается выбрасывать изделие или его составные части в канализацию.

Сшито и заверено печатью _____
(8) лист of

Генеральный директор
Якубович О.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГК Пальма»

 О.В. Якубович

« 08 »  2015 г.

ЭТИКЕТКА

Калоприемник однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» по ТУ 9398-010-83228278-2015 с принадлежностями в следующих исполнениях:

- Абуцел – С или Триоцел – С или Абуцел – К или Триоцел – К или Абуцел – В или Триоцел – В или Абуцел – СМ или Триоцел – СМ или Абуцел – КМ или Триоцел – КМ или Абуцел – ВМ или Триоцел – ВМ или Триоцел – Д или Абуцел – ВТ или Триоцел – ВТ.

Принадлежности: Зажим пластиковый или Зажим гибкий.

- номер регистрационного удостоверения и дата регистрации;
- количество изделий;
- штриховой код;
- знак соответствия;
- номер партии;
- обозначение диаметра отверстия для стомы в мм.
- условия хранения и транспортирования:

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Условия транспортирования изделий - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 в интервале температур от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150 в интервале температур от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

- условия утилизации:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №163)

Изделие после использования уничтожается вместе с бытовыми отходами. Запрещается спускать изделие или его составные части в канализацию.

- дата изготовления (месяц и две последние цифры года);
- надпись: «Годен до..... (месяц и две последние цифры года);
- сведения рекламного и информационного характера.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ГК Пальма»

Юридический адрес: Россия, 121471, г. Москва, Можайское ш., 29/2, стр.1

Тел: (495)921-37-19, E-mail - palma@palma-med.ru

Адрес места производства: Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12-2, стр. 4.

ООО «ГК ПАЛЬМА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГК Пальма»



О.В. Якубович
О.В. Якубович

» *июль* 2015г.

**КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
ДЛЯ УХОДА ЗА СТОМОЙ «ПАЛЬМА®»**

ЭТИКЕТКА

2015

Ин. № подл. Подпись и дата. Взам инв. №. Инв. №. Подпись и дата.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Калоприемник однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» выпускается следующих исполнений в зависимости от вариантов комплектации:

Калоприемник Абуцел – С однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – С однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – СМ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – СМ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – К однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – К однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – КМ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – КМ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – В однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – В однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – ВМ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

ЭТИКЕТКА

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Саликова Т.М.		
Провер.		Выдриша Т.К.		

“Калоприемник однокомпонентный
самофиксирующийся для ухода
за стомой “Пальма®””

Лит	Лист	Листов
А	2	7

ООО “ГК Пальма”

Калоприемник Триоцел – ВМ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Абуцел – ВТ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – ВТ однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник Триоцел – Д однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» ТУ 9398-010-83228278-2015

Калоприемник однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой «Пальма®» предназначен для сбора и отвода выделений у пациентов с коло- и илеостомами и применяется в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Калоприемник состоит из емкости, снабженной подкладкой из нетканого материала или полимерной сетки с внутренней стороны или с обеих сторон емкости, и фланцевого элемента с герметизирующим кольцом из материала Абуцел или Триоцел, с помощью которого осуществляется крепление к телу человека. Изделие комплектуется зажимом.

Изделие предназначено для сбора и отвода выделений у пациентов с коло - и илеостомами. Изделие одноразового использования в течение 2-5 дней без снятия со стомы.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Код ОКП 93 9800

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Калоприемник исполнений Абуцел – С, СМ, и Триоцел – С, СМ выпускается для стомы с максимальным размером 60мм.

Калоприемник исполнений Абуцел – К, КМ и Триоцел – К, КМ выпускается для стомы с максимальным размером 70мм.

Калоприемник исполнений Абуцел – В, ВМ, ВТ и Триоцел – В, ВМ, ВТ, выпускается для стомы с максимальным размером 80мм.

Калоприемник исполнения Триоцел– Д выпускается для стомы с максимальным размером 50мм.

3.2. Соединение фланцевого элемента с емкостью калоприемника должно быть прочным и выдерживать приложенную к нему нагрузку 20Н.

3.3. Калоприемник в сборе с зажимом, будучи заполненным водой на 65 – 75% объема, должен выдерживать сжатие силой 200Н.

3.4 Калоприемник в сборе с зажимом, заполненный водой в горизонтальном положении, должен быть герметичным: не должен пропускать содержимое в течение 17 часов.

3.5. Перемычка пластикового зажима должна быть прочной при многократном раскрытии и смыкании створок зажима в течение 3 часов со скоростью 60 циклов смыкания – размыкания/мин.

3.6. Величина адгезионной характеристики герметизирующего кольца калоприемника должна быть не менее 70 Н/м.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Подготовить кожу вокруг стомы. Кожа должна быть чистой, без мазей, кремов и т.п. и сухой для хорошей фиксации калоприемника на теле.

4.2. Слегка надуть калоприемник для разъединения его стенок. Вырезать в фланцевом элементе, покрытом защитной бумагой с концентрическими окружностями отверстие для стомы. Отверстие должно на 1-2 мм больше внешнего контура стомы.

4.3. Прогреть фланцевый элемент на каком-либо закрытом источнике тепла или на своем теле.

4.4. Снять защитную бумагу с герметизирующего (внутреннего липкого) кольца фланцевого элемента и наклеить его на тело. Затем удалить защитную бумагу с наружного кольца и приложить клеящий слой к коже.

Для лучшего приклеивания прижать калоприемник к телу и удерживать ее не менее 1 мин.

Во избежание образования складок разгладить калоприемник от стомы к краям.

Не следует класть калоприемник липкой стороной на какие-либо поверхности и без необходимости касаться липкого слоя руками.

4.5. При использовании пластикового зажима:

Раскрыть пластиковый зажим, положить его одинарную часть на расстоянии 2-3см от края выпускного отверстия, перегнуть край калоприемника и расправить его от складок, после чего сжать зажим до щелчка.

4.6. При использовании гибкого зажима:

Снять защитную бумагу, приклеить полоску зажима на край выпускного отверстия.

Завернуть край с приклеенным зажимом не менее 3 раз, избегая образования складок, после чего загнуть концы зажима внутрь.

4.7. Опорожнять калоприемник следует при заполнении его приблизительно наполовину. Не следует допускать чрезмерного заполнения калоприемника.

Для опорожнения калоприемника открыть зажим и удалить содержимое через выпускное отверстие, не снимая калоприемника со стомы.

Протереть выпускное отверстие туалетной бумагой или салфеткой и снова закрыть зажим.

4.8. Для удаления скопившихся газов использовать выпускное отверстие без снятия изделия со стомы.

Не следует допускать скопления большого количества газов и сильного раздувания калоприемника.

4.9. Калоприемник следует заменять по мере необходимости - при начале подтекания жидкости в месте крепления, пропускании запаха, а также при ощущении каких-либо неудобств.

Снимать калоприемник медленно, отслаивая клеящий слой от кожи и придерживая кожу рукой.

При замене калоприемника допускается наклеивание нового изделия на оставшиеся на коже фрагменты клеящего слоя.

Следует избегать частой, не оправданной необходимостью смены калоприемника, т.к. в первые дни липкость клеящего слоя самая большая, и процедура отсоединения может быть болезненной.

5. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения калоприемника должны соответствовать группе хранения 1(Л) по ГОСТ 15150 в интервале температур от плюс 5 °С до плюс 30°С.

6. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЙ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ

6.1. В комплект поставки калоприемника исполнений Абуцел – С, К, СМ, КМ, Триоцел – С, К, СМ, КМ входят:

- калоприемник одного исполнения в количестве 2, 3, 4 или кратном 5;
- пластиковый зажим в количестве 1 шт. на 5шт. емкостей, но не менее 1 шт. на комплект;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- потребительская упаковка с нанесенной на нее этикеткой – 1 шт.

6.2. В комплект поставки калоприемника исполнений Абуцел – В, ВМ, ВТ, Триоцел – В, ВМ, ВТ входят:

- калоприемник одного исполнения в количестве 2, 3, 4 или кратном 5;
- блистер в количестве 1шт. на комплект (но не менее 1шт. на 5 изделий);

- пластиковый зажим в количестве 1 шт. на 5шт. емкостей, но не менее 1 шт. на комплект;

- инструкция по применению – 1 шт.;

- потребительская упаковка с нанесенной на нее этикеткой – 1 шт.

6.3. В комплект поставки калоприемника исполнения Триоцел – Д входят:

- калоприемник одного исполнения в количестве 2, 3, 4 или кратном 5;

- гибкий зажим в количестве 1 шт. на 1 изделие;

- инструкция по применению – 1 шт.;

- потребительская упаковка с нанесенной на нее этикеткой – 1 шт.;

7. ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ТУ 9398-010-83228278-2015.

8. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЯ

Калоприемник соответствует техническим условиям ТУ 9398-010-83228278-2015 и признан годным к эксплуатации.

Ставится знак, указывающий о соответствии, номер регистрационного удостоверения МЗ РФ и дата регистрации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие калоприемника всем требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение указанного срока годности.

Гарантийный срок годности изделия – 3 года с даты изготовления.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ ОТК

Ставится штамп ОТК

11. ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ

Указывается номер партии, дата выпуска и срок годности.

Сшито и заверено печатью _____
(8) лист of _____



Генеральный директор
Якубович О.В.

