

Утверждаю

Генеральный директор ООО «Целит»

Л.Г. Андреева

«14» июля 2017г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА «ЦЕЛИТ» «ПРОДЕНТ 36»

ТУ 9391-017-10614163-2011

И.Л. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инд. № д/л	Подп. и дата

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА «ЦЕЛИТ»
«ПРОДЕНТ 36»

ТУ 9391-017-10614163-2011

Рег. уд № ФСР 2011/12587 от 12/02/2014г

Для профессионального использования врачами стоматологами

НАЗНАЧЕНИЕ

Гель для травления предназначен для применения в стоматологической практике для протравливания эмали и дентина в процессе подготовки зуба к пломбированию.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав геля входит ортофосфорная кислота $36 \pm 2\%$, гелеобразователь, краситель. Гель обладает оптимальной консистенцией и после нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, полностью смывается водой.

Обработка препарируемой поверхности гелем позволяет значительно увеличить адгезию пломбировочного материала к твёрдым тканям зуба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Снять колпачок со шприца, насадить на его место насадку на шприц (иглу).

Нанести необходимое количество геля на сухую подготовленную поверхность зуба: сначала на эмаль, через 15-20 секунд на дентин и выдержать ещё 15 секунд. По истечении времени обработки, гель смыть водой и просушить поверхность зуба сжатым воздухом.

Правильно протравленная поверхность должна иметь матовый меловой оттенок. При повышенной резистентности эмали травление необходимо повторить (не более 30 секунд).

ВНИМАНИЕ: гель содержит ортофосфорную кислоту, избегать попадания геля на слизистую поверхность. В случае попадания геля на слизистую, необходимо обильно промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

Шприц с гелем объёмом 5 мл (массой 7,5г) закрытый колпачком;

Насадка на шприц (игла) в полиэтиленовом пакете - 5 шт.;

Рекомендация по применению - 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить при температуре от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей.

Гель для травления в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие геля для травления требованиям настоящим техническим условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изделие однократного применения, не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

СРОК ГОДНОСТИ 2,5 года

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы после использования геля для травления эмали и дентина «Целит» «Продент 36» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класс А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и
тел. (473) 279-76-82, 279-78-87, факс (473) 237-61-06
WWW.CELIT.RU

Подготовил:
инженер-технолог



_____/Е.В. Попова/

Генеральный директор Андреева Л.Г.

