

Общество с ограниченной ответственностью «Фамильный текстиль»

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ООО " Фамильный текстиль "



Загуляев С.Г.

2017 г.

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Инструкция по применению

ФМТК.942519 ИП

г. Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	21
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	33
4. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	37
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	38
6. ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38
7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	39
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	39
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	40
10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	41
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	42
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	43

Настоящая инструкция распространяется на подушки ортопедические (далее – подушки) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках подушек, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения подушек отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования подушек, необходимо обращаться к изготовителю:

Юридический адрес: Россия, 630034, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок 1-й Крашенинникова, д.7

Фактический адрес: Россия, 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира 63А, корпус 6А, офис 6

(383) 216-45-44, (383) 214-15-49, familytex@list.ru

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение и условия применения

Подушки ортопедические (далее – подушки), предназначены для поддержания и обеспечения правильного и комфортного положения тела человека во время лечения и/или профилактических целях.

Подушки используются для обеспечения создания физиологического правильного положения тела у человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии, применение подушек предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Подушки используются для комфортной поддержки шеи пользователя во время лечения и/или для предотвращения скелетно-мышечных нарушений или травм, для снижения давления на шею и спину, в то время, когда пользователь сидит или лежит.

Так же подушки, используются для снижения давления на каудальную оконечность позвоночного столба (копчик) и/или перинеальную область при сидении, чтобы уменьшить боль от геморроев или в процессе восстановления после хирургии, беременности, или раны.

Подушки, используются для обеспечения поддержки, комфорта или выполнения своих функции в соответствии с требованиями пользователя.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения и домашние условия.

Подушки состоят из наперника определенной формы и наполнителя. Так же могут прилагаться наволочки.

В зависимости от потенциального риска применения подушки относятся к классу 1 (согласно приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 4н от 6 июня 2012).

По виду медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией (согласно приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации №4н от 6 июня 2012) подушки относятся к виду 185030.

Вид климатического исполнения– УХЛ4.2 по ГОСТ Р 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации подушки относятся к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации подушки относятся к классу Г по ГОСТ Р 50444.

1.2. Показания

- Дискомфорт и мышечное напряжение во время сна или дневного отдыха.
- Профилактика возникновения головных болей при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.
- Профилактика развития остеохондроза шейного отдела позвоночника.
- Комплексная терапия остеохондроза шейного отдела позвоночника.
- Устранение мышечного дисбаланса в области шеи и надплечий.
- Улучшение кровоснабжения.
- Комплексная реабилитация травм.
- Снижение болей при геморрое (только для подушек: Кольцо d10, Кольцо d20, Кольцо d25, Кольцо d30, Кольцо d35, Кольцо d40, Кольцо d60, ПОК-кольцо, ПОК (38x40), ПОК (36x38)).
- Восстановление после хирургии, беременности, или раны.

1.3. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала;
- воспалительные заболевания кожи.

1.4. Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции, показаний.

1.5. Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте подушки только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за изделием осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не использовать изделие при нарушении целостности наперника.

1.6. Общий вид подушек

1.6.1. Валики

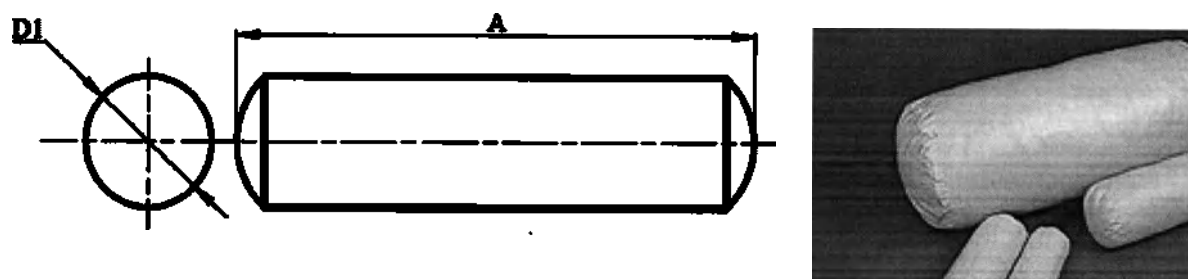


Рисунок 1 Валики

Таблица 1 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Диаметр D1, мм	Масса под- ушки не более, г	Масса наволочки из искусственной кожи не более, г	Масса наволочки из клеенки под- кладочной с ПВХ покрытием не более, г	Масса наволочки из трикотажного полотна с ПВХ покрытием не более, г
Валик 70xd10	700	100	500	135	90	110
Валик 70xd15	700	150	1300	210	130	170
Валик 70xd18	700	180	1400	250	160	200
Валик 70xd20	700	200	1800	270	170	220
Валик 70xd25	700	250	2200	350	225	285
Валик 70xd35	700	350	3000	400	250	310
Валик 50xd18	500	180	770	135	90	110
Валик 50xd25	500	250	1570	175	110	140
Валик 45xd15	450	150	580	90	60	70
Валик 40xd10	400	100	345	90	65	70
Валик 40xd15	400	150	520	130	90	110
Валик 40xd20	400	200	690	140	95	115
Валик 35xd15	350	150	470	130	100	120
Валик 35xd20	350	200	625	135	40	60
Валик 30xd10	300	100	260	50	45	70
Валик 30xd12	300	120	280	60	60	80
Валик 30xd16	300	160	375	90	90	110
Валик 30xd18	300	180	420	130	95	120
Валик 30xd20	300	200	470	140	100	125
Валик 25xd10	250	100	215	90	60	70
Валик 25xd12	250	120	260	140	90	110

1.6.2. Кольца

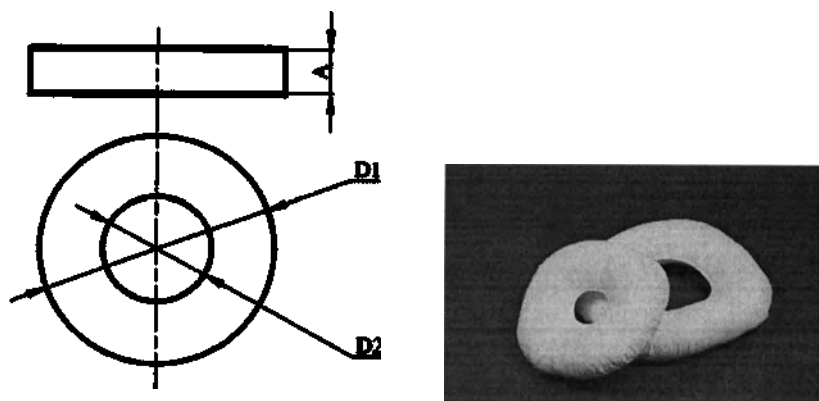


Рисунок 2 Кольца

Таблица 2 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Диаметр D1, мм	Диаметр D2, мм	Масса не более, г
Кольцо d10	45	100	40	70
Кольцо d20	50	200	80	125
Кольцо d25	55	250	100	195
Кольцо d30	60	300	120	275
Кольцо d35	70	350	140	415
Кольцо d40	85	400	160	505
Кольцо d60	95	600	240	655

1.6.3. ПСОУ- универсальная

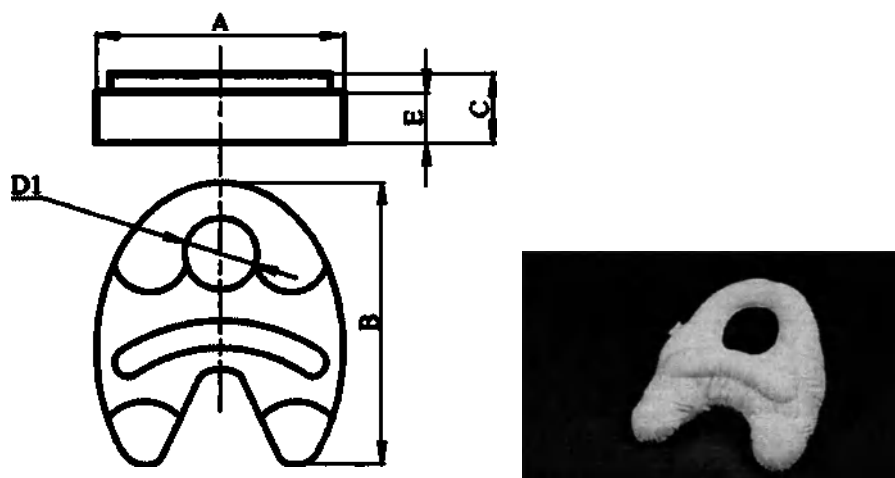


Рисунок 3 ПСОУ- универсальная

Таблица 3 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер Е, мм	Диаметр D1, мм	Масса подушки не более, г	Масса наволочки из клеенки под- кладочной с ПВХ покрытием не бо- лее, г	Масса наволочки из трикотажного полотна с ПВХ покрытием не бо- лее, г	Масса наволочки из хлопчатобу- мажной ткани не более, г
ПСОУ- уни- версальная	360	400	80	70	110	312	100	80	70

1.6.4. ПСОС-спрут

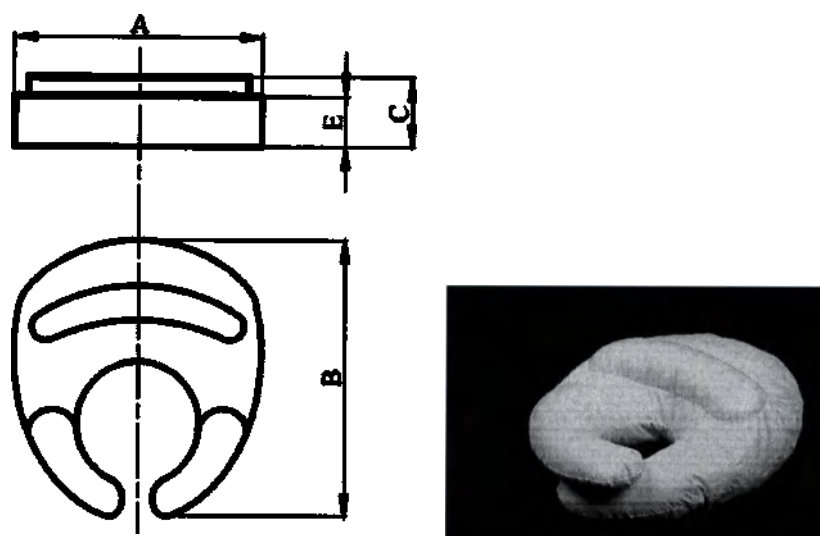


Рисунок 4 ПСОС-спрут

Таблица 4 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер Е, мм	Масса подушки не более, г	Масса наволочки из хлопчатобу- мажной ткани не более, г
ПСОС-спрут	360	400	120	100	385	70

1.6.5. ПСОВ – воротник

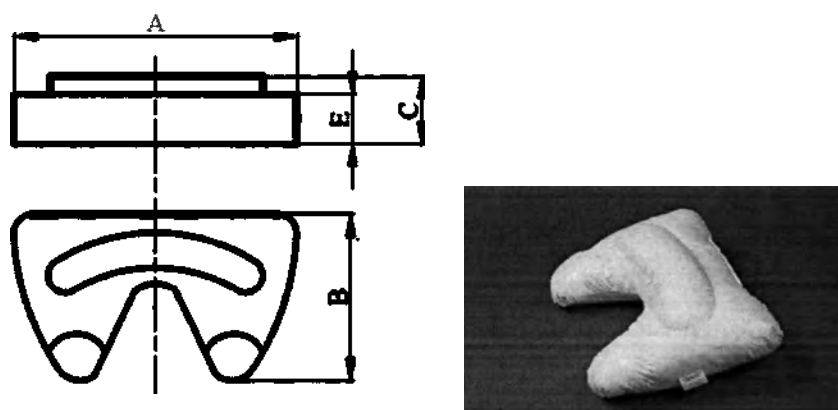


Рисунок 5 ПСОВ – воротник

Таблица 5 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер Е, мм	Масса подушки не более, г	Масса наволочки из хлопчатобумажной ткани не более, г
ПСОВ – воротник	400	280	120	90	285	50

1.6.6. ПСОП- подкова

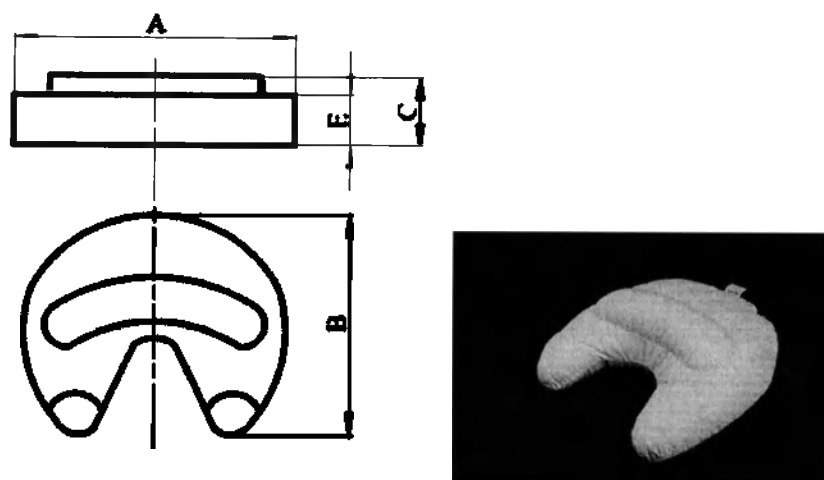


Рисунок 6 ПСОП- подкова

Таблица 6 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер Е мм	Масса подушки не более, г	Масса наволочки из хлопчатобу- мажной ткани не более, г
ПСОП- подкова	360	320	130	110	305	50

1.6.7. ПОК- кольцо

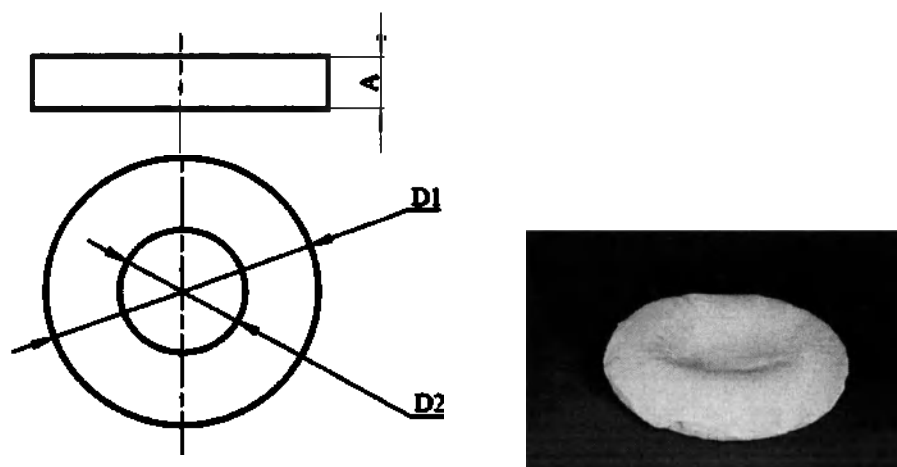


Рисунок 7 ПОК- кольцо

Таблица 7 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Диаметр D1, мм	Диаметр D2, мм	Масса подушки не бо- лее, г	Масса наволочки из смешанной тка- ни не более, г
ПОК- кольцо	95	390	180	590	100

1.6.8. ПСО1 (50х70)

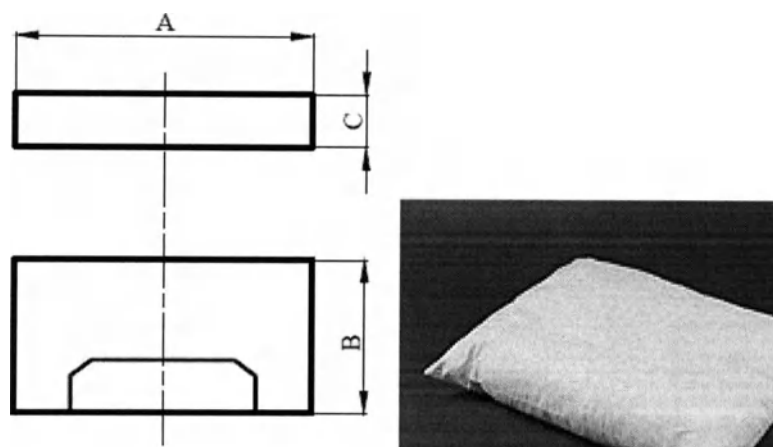


Рисунок 8 ПСО1 (50х70)

Таблица 8 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСО1 (50х70)	700	500	140	875

1.6.9. ПСО1 (50х70) Б

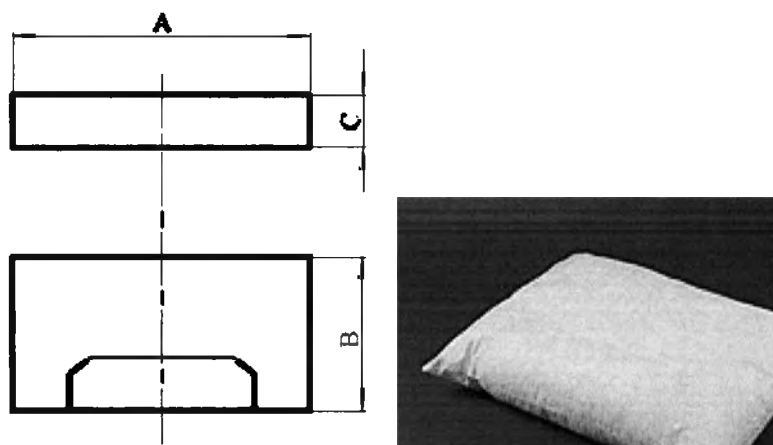


Рисунок 9 ПСО1 (50х70) Б

Таблица 9 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСО1 (50х70) Б	700	500	140	915

1.6.10. ПСО2 (45х65)

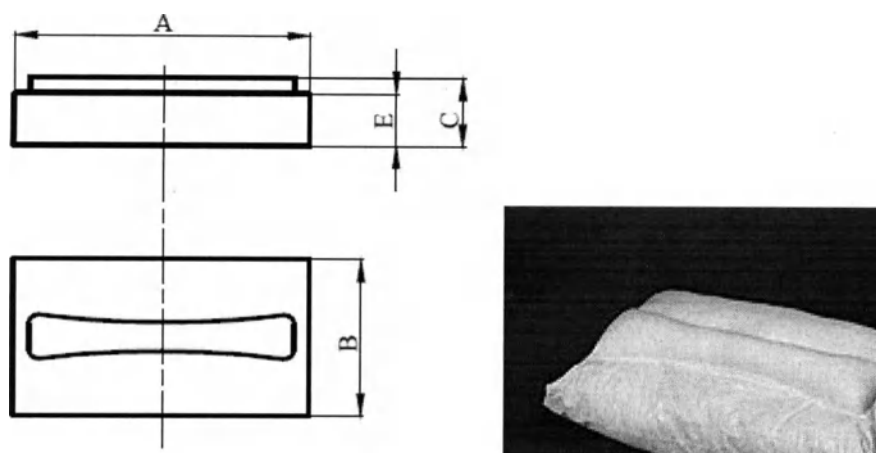


Рисунок 10 ПСО2 (45х65)

Таблица 10 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер Е, мм	Масса не более, г
ПСО2 (45х65)	650	450	170	130	880

1.6.11. ПСО4 (50х70)

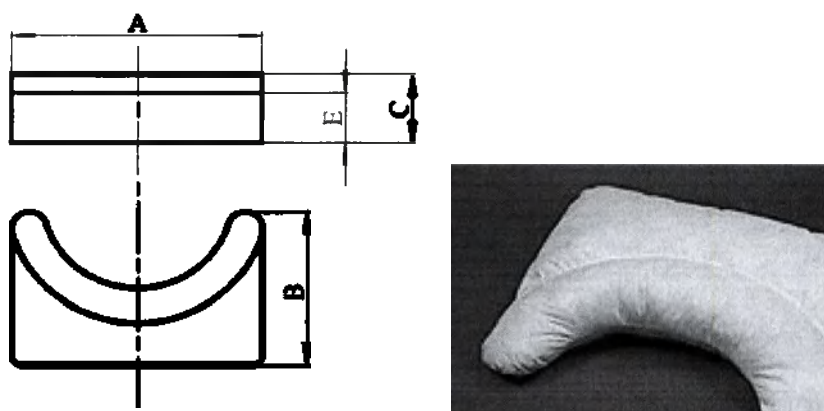


Рисунок 11 ПСО4 (50х70)

Таблица 11 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер Е, мм	Масса не более, г
ПСО4 (50х70)	700	500	120	110	790

1.6.12. ПСО5 (45х65)

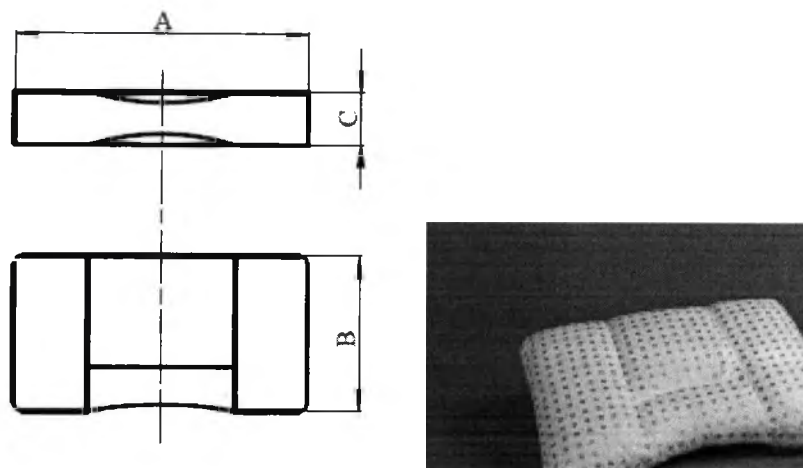


Рисунок 12 ПСО5 (45х65)

Таблица 12 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСО5 (45х65)	650	450	120	900

1.6.13. ПСУ1(45х65)

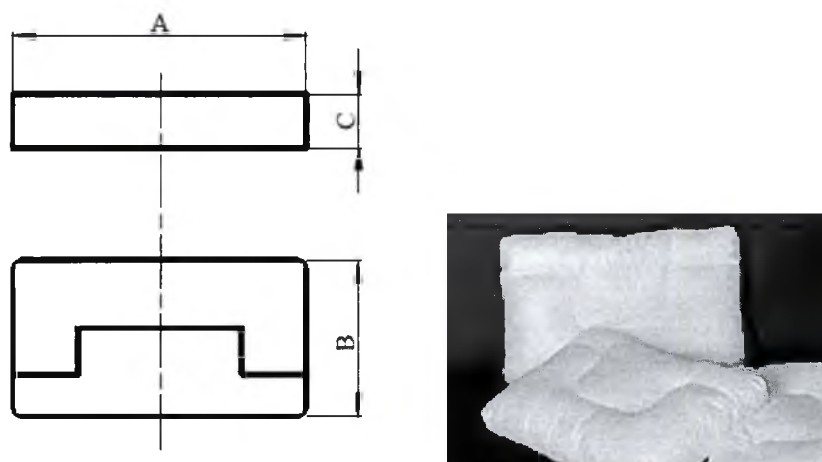


Рисунок 13 ПСУ1(45х65)

Таблица 13 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ1(45х65)	650	450	130	905

1.6.14. ПСУ1(45х65) Б

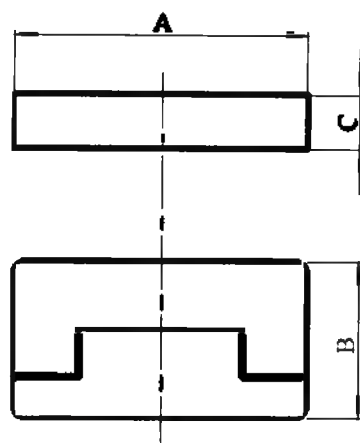


Рисунок 14 ПСУ1(45х65) Б

Таблица 14 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ1(45х65) Б	650	450	130	1100

1.6.15. ПСУ2 (45х65)

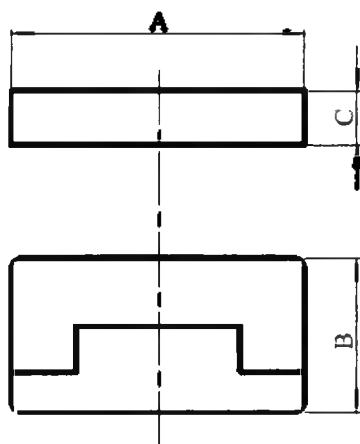


Рисунок 15 ПСУ2 (45х65)

Таблица 15 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ2 (45х65)	650	450	120	860

1.6.16. ПСУ2 (45х65) Б

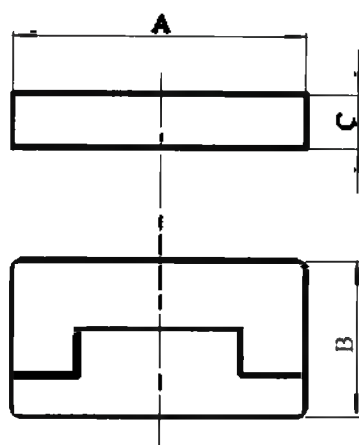


Рисунок 16 ПСУ2 (45х65) Б

Таблица 16 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ2 (45х65) Б	650	450	120	1025

1.6.17. ПСУ3 (45х65)

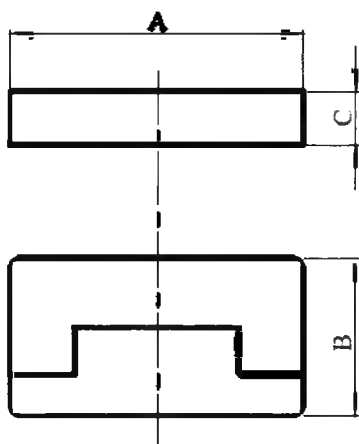


Рисунок 17 ПСУ3 (45х65)

Таблица 17 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ3 (45х65)	650	450	110	780

1.6.18. ПСУЗ (45х65) Б

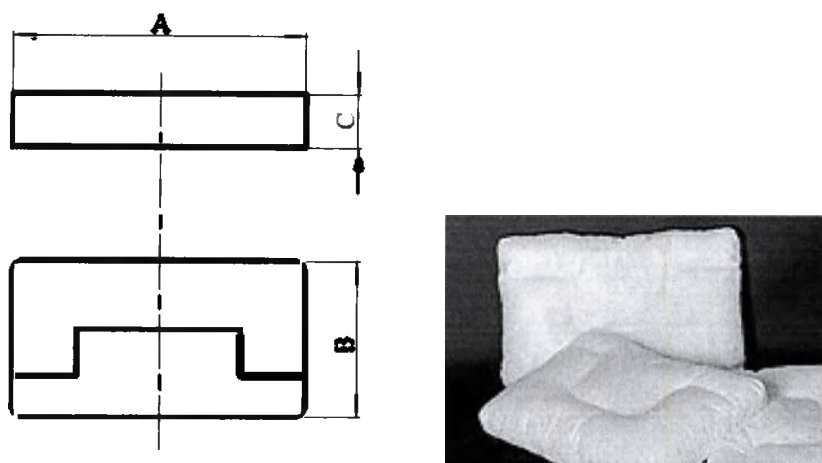


Рисунок 18 ПСУЗ (45х65) Б

Таблица В.18 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУЗ (45х65) Б	650	450	110	925

1.6.19. ПСУ4(40х60)

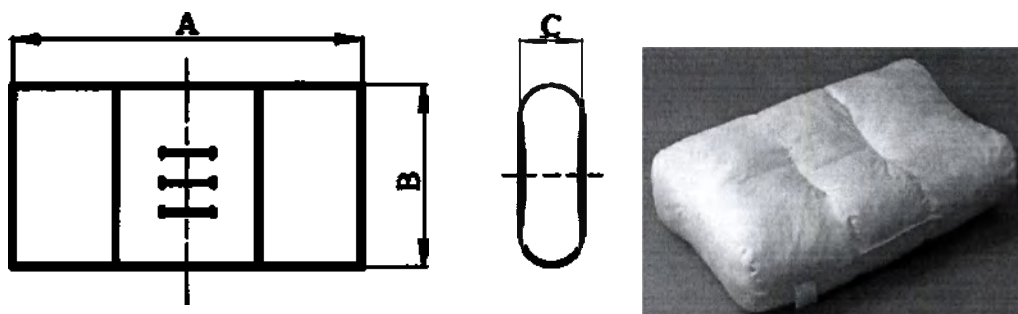


Рисунок 19 ПСУ4(40х60)

Таблица В.19 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ4(40х60)	600	400	160	1000

1.6.20. ПСУ4(40х60) Б

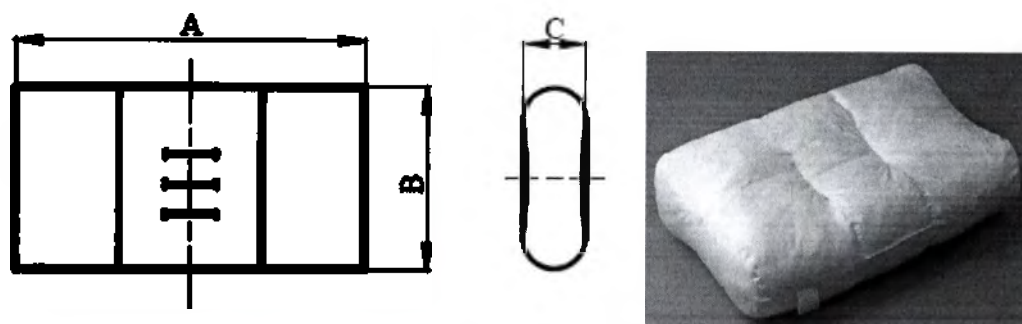


Рисунок 20 ПСУ4(40х60) Б

Таблица В.20 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ4(40х60) Б	600	400	160	1205

1.6.21. ПСУ4(40х60) М

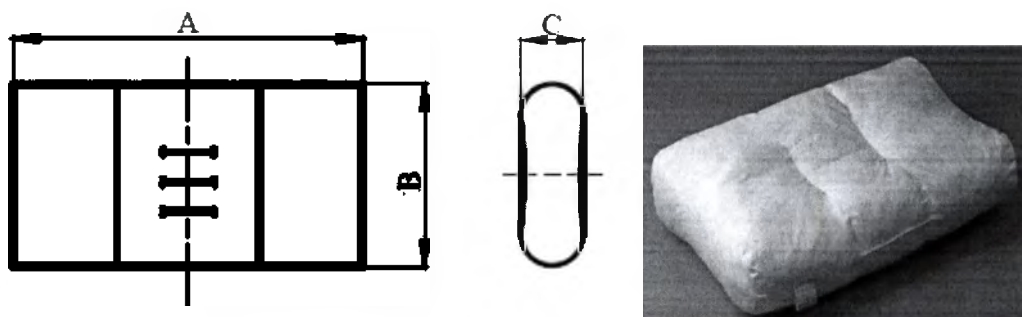


Рисунок 21 ПСУ4(40х60) М

Таблица В.21 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ4(40х60) М	600	400	160	1090

1.6.22. ПСУ5(45х65)

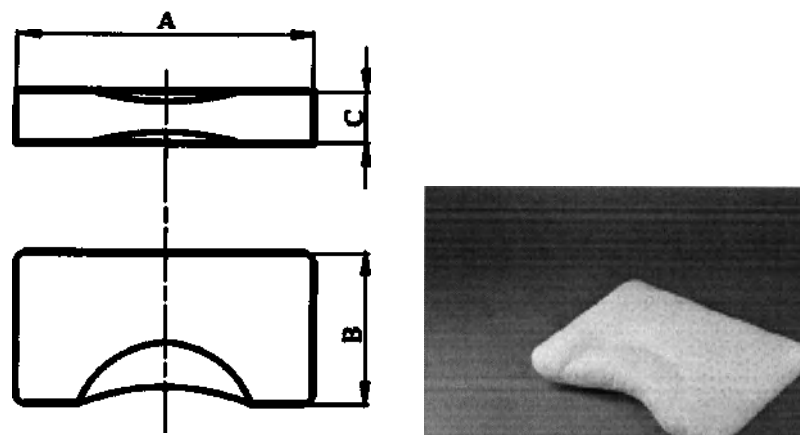


Рисунок 22 ПСУ5(45х65)

Таблица В.22 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ5(45х65)	650	450	160	1110

1.6.23. ПСУ6 (40х60х14/16)

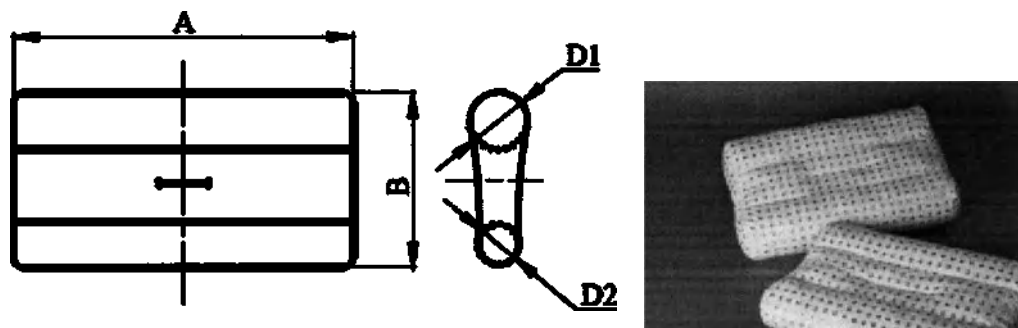


Рисунок 23 ПСУ6 (40х60х14/16)

Таблица В.23 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Диаметр D1, мм	Диаметр D2, мм	Масса не более, г
ПСУ6 (40х60х14/16)	600	400	160	140	1025

1.6.24. ПСУ7 (40х60х12/14)

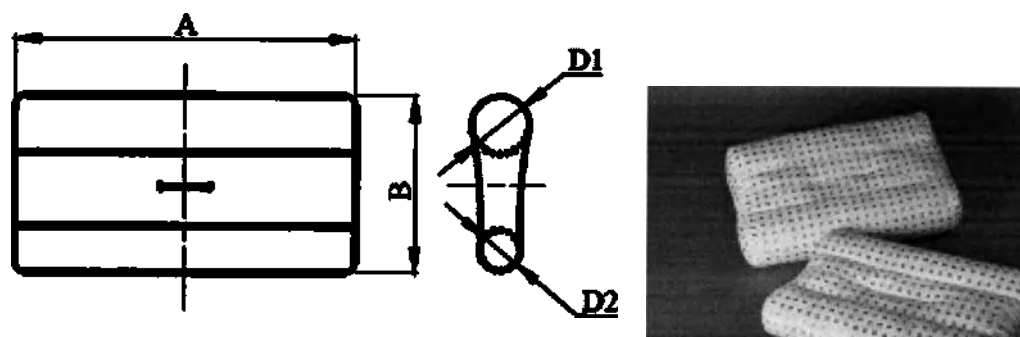


Рисунок 24 ПСУ7 (40х60х12/14)

Таблица В.24 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Диаметр D1, мм	Диаметр D2, мм	Масса не более, г
ПСУ7 (40х60х12/14)	600	400	140	120	885

1.6.25. ПСУ8 (45х65)

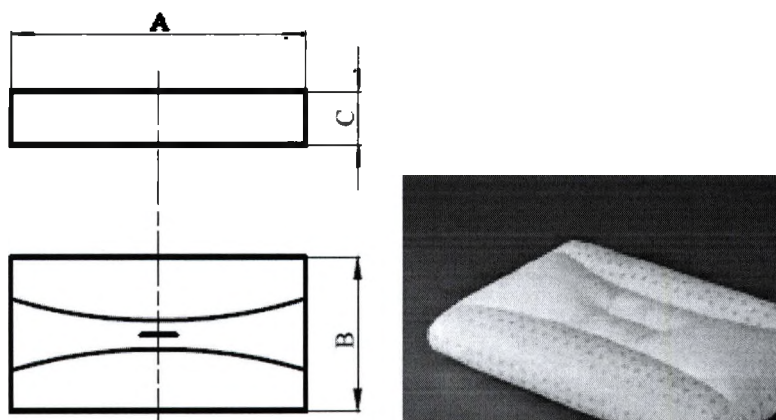


Рисунок 25 ПСУ8 (45х65)

Таблица В.25 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса не более, г
ПСУ8 (45х65)	650	450	120	995

1.6.26. ПСС (45х65)

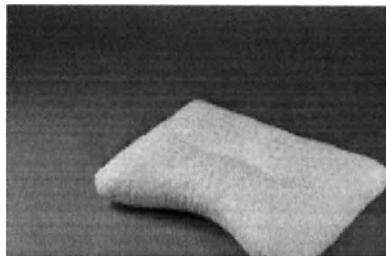
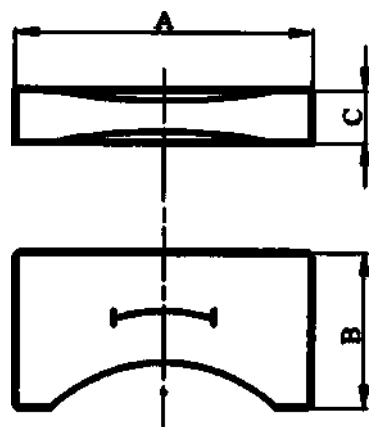


Рисунок 26 ПСС (45х65)

Таблица В.26 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса подуш- ки не более, г
ПСС (45х65)	650	450	140	910

1.6.27. ПОК (38х40)

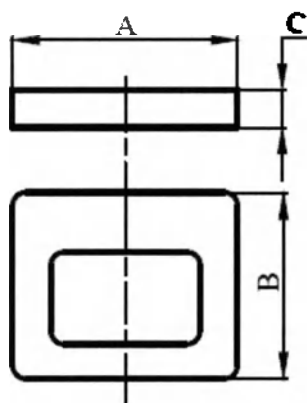


Рисунок 27 ПОК (38х40)

Таблица В.27 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса подуш- ки не более, г	Масса наволоч- ки из смешан- ной ткани не более, г
ПОК (38х40)	380	400	100	500	150

1.6.28. ПОК (36x38)

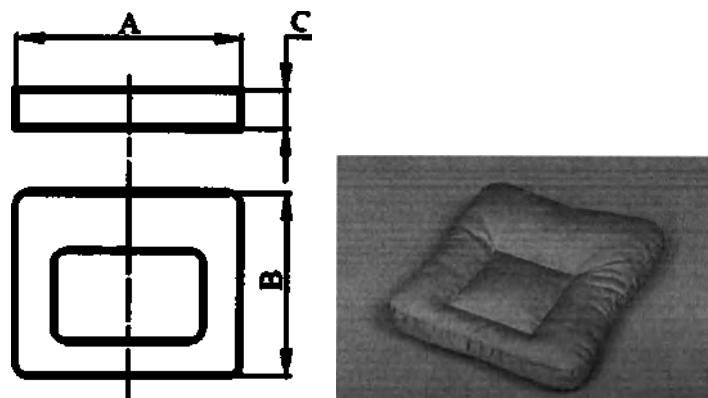


Рисунок 28 ПОК (36x38)

Таблица 28 Массо-габаритные параметры

Наименование (Артикул)	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Масса подуш- ки не более, г	Масса наволоч- ки из смешан- ной ткани не более, г
ПОК (36x38)	360	380	90	500	125

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и характеристики

2.1.1. Подушки соответствуют ГОСТ Р 50444, и изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 9396-001-94894593-2016, образца-эталона и технического описания, утверждённого в установленном порядке.

Таблица 2.1. Состав подушки ортопедические

№	Наименование (Артикул)	Обозначение техниче- ского описания	№ чертежа (Раздел 1.6)
1.	Валик 70xd10	ТО 57-2009	Рис.1.
2.	Валик 70xd15		
3.	Валик 70xd18		
4.	Валик 70xd20		
5.	Валик 70xd25		
6.	Валик 70xd35		
7.	Валик 50xd18		
8.	Валик 50xd25		
9.	Валик 45xd15		
10.	Валик 40xd10		
11.	Валик 40xd15		
12.	Валик 40xd20		
13.	Валик 35xd15		
14.	Валик 35xd20		
15.	Валик 30xd10		
16.	Валик 30xd12		
17.	Валик 30xd16		
18.	Валик 30xd18		
19.	Валик 30xd20		
20.	Валик 25xd10		
21.	Валик 25xd12		
22.	Кольцо d10	ТО 58-2009	Рис.2.
23.	Кольцо d20		
24.	Кольцо d25		
25.	Кольцо d30		
26.	Кольцо d35		
27.	Кольцо d40		
28.	Кольцо d60		
29.	ПСОУ-универсальная	ТО 52-2002	Рис.3.
30.	ПСОС-спрут	ТО 52-2002	Рис.4.
31.	ПСОВ – воротник	ТО 52-2002	Рис.5.
32.	ПСОП- подкова	ТО 52-2002	Рис.6.
33.	ПОК- кольцо	ТО 101-2009	Рис.7.
34.	ПСО1 (50x70)	ТО 14-2010	Рис.8.
35.	ПСО1 (50x70) Б	ТО 14-2010	Рис.9.

Продолжение Таблицы 2.1.

36.	ПСО2 (45х65)	ТО 63-2002	Рис.10.
37.	ПСО4 (50х70)	ТО 15-2010	Рис.11.
38.	ПСО5 (45х65)	ТО 27-2010	Рис.12.
39.	ПСУ1(45х65)	ТО 15-2009	Рис.13.
40.	ПСУ1(45х65) Б	ТО 15-2009	Рис.14.
41.	ПСУ2 (45х65)	ТО 15-2009	Рис.15.
42.	ПСУ2 (45х65) Б	ТО 15-2009	Рис.16.
43.	ПСУ3(45х65)	ТО 15-2009	Рис.17.
44.	ПСУ3 (45х65) Б	ТО 15-2009	Рис.18.
45.	ПСУ4(40х60)	ТО 36-2010	Рис.19.
46.	ПСУ4 (40х60) Б	ТО 36-2010	Рис.20.
47.	ПСУ4 (40х60) М	ТО 36-2010	Рис.21.
48.	ПСУ5(45х65)	ТО 16-2010	Рис.22.
49.	ПСУ6 (40х60х14/16)	ТО 30-2010	Рис.23.
50.	ПСУ7 (40х60х12/14)	ТО 30-2010	Рис.24.
51.	ПСУ8 (45х65)	ТО 26-2010	Рис.25.
52.	ПСС (45х65)	ТО 12-2010	Рис.26.
53.	ПОК (38х40)	ТО 100-2009	Рис.27.
54.	ПОК (36х38)	ТО 100-2009	Рис.28.

2.1.2. К подушкам могут прилагаться наволочки.

2.1.2.1. К валикам могут прилагаться наволочки из искусственной кожи, клеенки подкладочной с ПВХ покрытием, трикотажного полотна с ПВХ покрытием.

2.1.2.2. К подушке ПСОУ-универсальная могут прилагаться наволочки из клеенки подкладочной с ПВХ покрытием, трикотажного полотна с ПВХ покрытием и хлопчатобумажной ткани.

2.1.2.3. К подушкам ПСОС-спрут, ПСОВ-воротник, ПСОП-подкова могут прилагаться наволочки из хлопчатобумажной ткани.

2.1.2.4. К подушкам ПОК-кольцо, ПОК (36х38), ПОК (38х40) может прилагаться наволочка из смешанной ткани.

2.1.3. Основные массогабаритные параметры соответствуют требованиям чертежей Раздела 1.6. Допускаемое отклонение размеров ± 10 мм.

2.1.4. Количество стежков на 5 см машинной строчки при пошиве не менее 18, при выстегивании изделий (8 ± 1) .

2.1.5. Наполнитель подушек равномерно распределен.

2.1.6. Строчка на подушках без искривлений, влияющих на внешний вид и прочность изделий, нить строчки хорошо натянута.

2.1.7. Нитки для стачивания и настрачивания в цвет или тон ткани.

2.1.8. Концы ниток в строчках закреплены и отрезаны.

2.1.9. Подушки не имеют складок и сборок глубиной более 10 мм.

2.1.10. Части наперника подушек соединены сточным швом шириной 15 ± 2 мм.

- 2.1.11. На поверхностях частей подушки не допускаются инородные включения, надрывы, порезы, вздутия, дыры, проколы, прорубание машинной иглой, обрывы нитей в отделочных строчках и другие пороки.
- 2.1.12. Гигроскопичность на поверхности изделия не менее 6 %.
- 2.1.13. Воздухопроницаемость на поверхности изделия не менее 100 дм³/м²с.
- 2.1.14. Наружные поверхности подушек и наволочек устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 (3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина ТУ 6-01-4689387- 16-89).
- 2.1.15. Подушки и наволочки устойчивы к многократной стирке машинным способом с применением порошков без отбеливателя при максимальной температуре 60 °С. Режимы полоскания и отжима обычные. Изменение линейных размеров после стирки не более 5 %.
- 2.1.16. Подушки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
- 2.1.17. Подушки обладают устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 2 по ГОСТ Р 50444.
- 2.1.18. Подушки в транспортной упаковке обладают устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.
- 2.1.19. Подушки в транспортной упаковке обладают устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании соответствующим ГОСТ Р 50444.
- 2.1.20. Средний срок службы подушек не менее 5 лет.
- 2.2. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям
- 2.2.1. При изготовлении допускается применение сырья, материалов и покупных изделий отечественного и иностранного производства соответствующих нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством и иметь сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.
- 2.2.2. Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве, должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.
- 2.2.3. Для изготовления основных элементов используются сырье и материалы согласно таблице 2.2. Допускается применение иного сырья и материалов других изготовителей.
- 2.2.4. Наполнитель чистый, без постороннего запаха.

Таблица 2.2 Сырье и материалы

НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА МАТЕРИАЛА	СОСТАВ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
Валик 70xd10 Валик 70xd15 Валик 70xd18 Валик 70xd20 Валик 70xd25 Валик 70xd35 Валик 50xd18 Валик 50xd25 Валик 45xd15 Валик 40xd10 Валик 40xd15 Валик 40xd20 Валик 35xd15 Валик 35xd20 Валик 30xd10 Валик 30xd12 Валик 30xd16 Валик 30xd18 Валик 30xd20 Валик 25xd10 Валик 25xd12	Наперник хлопчатобумажный Наперник смешанная ткань Наполнитель – волокна полиэфирные Наволочка Искусственная кожа Наволочка Клеенка подкладочная с ПВХ покрытием Наволочка Трикотажное полотно с ПВХ покрытием	Ткань ТИК Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130» Сибирский Синтепон, арт. ТИК Huvis(Корея), арт. PL15d/64 Искусственная кожа марки “Чезима” арт. Sappo Клеенка подкладочная с ПВХ покрытием марки “Виталфарм”, арт. 25x1.40 Трикотажное полотно с ПВХ покрытием марки EASY WIPE (Турция), арт. Elastic	Хлопок 100% Хлопок 50%, ПЭ 50% ПЭ 100% Ткань основы ПЭ 100%, внешний слой контактирующий с человеком ПВХ 100% Ткань основы хлопок 100%, внешний слой контактирующий с человеком ПВХ 100% Ткань основы ПЭ 100%, внешний слой контактирующий с человеком ПВХ 100%	Прямой, продолжительный Прямой, продолжительный Опосредованный, продолжительный Прямой, продолжительный Прямой, продолжительный Прямой, продолжительный
Кольцо d10 Кольцо d20 Кольцо d25 Кольцо d30 Кольцо d35 Кольцо d40 Кольцо d60	Наперник хлопчатобумажный Наперник смешанная ткань Наполнитель – волокна полиэфира	Ткань ТИК Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130» Сибирский Синтепон, арт. ТИК Huvis(Корея), арт. PL15d/64	Хлопок 100% Хлопок 50%, ПЭ 50% ПЭ 100%	Прямой, продолжительный Прямой, продолжительный Опосредованный, продолжительный
ПСОУ-универсальная	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
	Наволочка Клеенка подкладочная с ПВХ покрытием	Клеенка подкладочная с ПВХ покрытием марки “Виталфарм”, арт. 25x1.40	Ткань основы хлопок 100%, внешний слой контактирующий с человеком ПВХ 100%	Прямой, продолжительный
	Наволочка трикотажное полотно с ПВХ покрытием	Трикотажное полотно с ПВХ покрытием марки EASY WIPE, арт. Elastic	Ткань основы ПЭ 100%, внешний слой контактирующий с человеком ПВХ 100%	Прямой, продолжительный
	Наволочка хлопчатобумажная ткань	Ткань хлопчатобумажная марки “Прогресс”, арт. Бязь	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
ПСОС-спрут	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
	Наволочка хлопчатобумажная ткань	Ткань хлопчатобумажная марки “Прогресс” арт. бязь	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
ПСОВ – воротник	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный

НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА МАТЕРИАЛА	СОСТАВ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный продолжительный
	Наволочка хлопчатобумажная ткань	Ткань хлопчатобумажная марки “Прогресс” арт. бязь	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
ПСОП-подкова	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
	Наволочка хлопчатобумажная ткань	Ткань хлопчатобумажная марки “Прогресс” арт. Бязь	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
ПОК-кольцо	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
	Наволочка Смешанная ткань	Ткань марки Jiaxing Dongtian flock CO.,ltd арт. flock	Ткань основы хлопок 50%, ПЭ 50%, внешний слой контактирующий с человеком Нейлон 100%	Прямой, продолжительный
ПСО1 (50x70)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/6	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСО1(50x70) Б	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира и вискозы	Комбинированный – состоящий из Наполнителя марки Eslon (Корея), арт.PL3d/51 и HEBEI CHEMICAL FIBERCO LTD (Китай), арт.VI 3d/60	ПЭ50% и ВС50%	Опосредованный, продолжительный
ПСО2 (45x65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСО4 (50x70)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный

НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА МАТЕРИАЛА	СОСТАВ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТ
ПСО5 (45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный продолжительный
ПСУ1(45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира	Наполнитель марки Huvis(Корея), арт.PL15d/64 и марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51	ПЭ 100%	Опосредованный продолжительный
ПСУ1(45х65) Б	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира и вискозы	Комбинированный – состоящий из Наполнителя марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51 и HEBEI CHEMICAL FIBERCO LTD (Китай), арт. VI 3d/60	ПЭ50% и ВС50%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ2 (45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира	Наполнитель марки Huvis(Корея), арт.PL15d/64 и марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ2(45х65) Б	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира и вискозы	Комбинированный – состоящий из Наполнителя марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51 и HEBEI CHEMICAL FIBERCO LTD (Китай), арт. VI 3d/60	ПЭ50% и ВС50%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ3(45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира	Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64 и марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ3(45х65) Б	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продол-

НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА МАТЕРИАЛА	СОСТАВ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТ
	ткань			жильный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира и вискозы	Комбинированный – состоящий из Наполнителя марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51 и HEBEI CHEMICAL FIBERCO LTD (Китай), арт. VI 3d/60	ПЭ50% и ВС50%	Опосредованный продолжительный
ПСУ4(40х60)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный продолжительный
ПСУ4(40х60) М	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира	Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64 и марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ4(40х60) Б	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%.	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира и вискозы	Комбинированный – состоящий из Наполнителя марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51 и HEBEI CHEMICAL FIBERCO LTD (Китай), арт. VI 3d/60	ПЭ50% и ВС50%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ5(45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – комбинированный из волокон полиэфира	Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64 и марки Eslon (Корея), арт. PL3d/51	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ6 (40х60х14/16)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ7 (40х60х12/14)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Для подушки Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПСУ8 (45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный

НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА МАТЕРИАЛА	СОСТАВ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
	Наполнитель – волокна полиэфира	Для подушки Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный продолжительный
ПСС (45х65)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Наполнитель Eslon (Корея), арт. PL3d/51	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
ПОК (36х38)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Для подушки Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
	Наволочка Смешанная ткань	Ткань марки Jiaxing Dongtian flock CO.,Ltd арт. flock	Ткань основы хлопок 50%, ПЭ 50%, внешний слой контактирующий с человеком Нейлон 100%	Прямой, продолжительный
ПОК (38х40)	Наперник хлопчатобумажный	Ткань ТИК марки Nantong Hongye Textile CO., LTD арт. «Tick-130»	Хлопок 100%	Прямой, продолжительный
	Наперник смешанная ткань	Сибирский Синтепон, арт. ТИК	Хлопок 50%, ПЭ 50%	Прямой, продолжительный
	Наполнитель – волокна полиэфира	Для подушки Наполнитель марки Huvis(Корея), арт. PL15d/64	ПЭ 100%	Опосредованный, продолжительный
	Наволочка Смешанная ткань	Ткань марки Jiaxing Dongtian flock CO.,Ltd арт. flock	Ткань основы хлопок 50%, ПЭ 50%, внешний слой контактирующий с человеком Нейлон 100%	Прямой, продолжительный
Индивидуальная упаковка		Марка ПВД 66х45+4/7, ООО"Максима -НСК" г.Новосибирск	Полиэтилен высокого давления 100%	Прямой, продолжительный

Перечень сокращений и условных обозначений:

- ПЭ-полиэфир;
- ВС-вискоза;
- ПВХ-поливинилхлорид

2.3. Комплектность

2.3.1. Комплект поставки подушек соответствует таблице 2.3

Таблица 2.3 Комплектность

№	Наименование (Артикул)	Обозначение документа	Кол- во, шт.
1.	Подушка-валик, варианты исполнения ¹ :	ТО 57-2009	-
	Валик 70xd10		1
	Валик 70xd15		1
	Валик 70xd18		1
	Валик 70xd20		1
	Валик 70xd25		1
	Валик 70xd35		1
	Валик 50xd18		1
	Валик 50xd25		1
	Валик 45xd15		1
	Валик 40xd10		1
	Валик 40xd15		1
	Валик 40xd20		1
	Валик 35xd15		1
	Валик 35xd20		1
	Валик 30xd10		1
	Валик 30xd12		1
	Валик 30xd16		1
	Валик 30xd18		1
	Валик 30xd20		1
	Валик 25xd10		1
	Валик 25xd12		1
-	Принадлежности по размеру валиков:		
	Наволочка из искусственной кожи	ТО 57-2009-НИ	1*
	Наволочка из клеенки подкладочной с ПВХ покрытием	ТО 57-2009-НК	1*
	Наволочка из трикотажного полотна с ПВХ покрытием	ТО 57-2009-НТ	1*
2.	Подушка-кольцо, варианты исполнения ¹ :	ТО 58-2009	
	Кольцо d10		1
	Кольцо d20		1
	Кольцо d25		1
	Кольцо d30		1
	Кольцо d35		1
	Кольцо d40		1
	Кольцо d60		1
3.	ПСОУ-универсальная	ТО 52-2002	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из клеенки подкладочной с ПВХ покрытием	ТО 52-2002-НК	1*
	Наволочка из трикотажного полотна с ПВХ покрытием	ТО 52-2002-НТ	1*
4.	ПСОС-спрут	ТО 52-2002	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ТО 52-2002-ХБ	1*

Продолжение Таблица 2.3

5.	ПСОВ – воротник	ТО 52-2002	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ТО 52-2002-ХБ	1*
6.	ПСОП- подкова	ТО 52-2002	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ТО 52-2002-ХБ	1*
7.	ПОК- кольцо	ТО 101-2009	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из смешанной ткани	ТО 101-2009-СТ	1*
8.	ПСО1 (50х70)	ТО 14-2010	1
9.	ПСО1 (50х70) Б	ТО 14-2010	1
10.	ПСО2 (45х65)	ТО 63-2002	1
11.	ПСО4 (50х70)	ТО 15-2010	1
12.	ПСО5 (45х65)	ТО 27-2010	1
13.	ПСУ1(45х65)	ТО 15-2009	1
14.	ПСУ1(45х65) Б	ТО 15-2009	1
15.	ПСУ2 (45х65)	ТО 15-2009	1
16.	ПСУ2 (45х65) Б	ТО 15-2009	1
17.	ПСУ3(45х65)	ТО 15-2009	1
18.	ПСУ3 (45х65) Б	ТО 15-2009	1
19.	ПСУ4(40х60)	ТО 36-2010	1
20.	ПСУ4 (45х65) Б	ТО 36-2010	1
21.	ПСУ4 (45х65) М	ТО 36-2010	1
22.	ПСУ5(45х65)	ТО 16-2010	1
23.	ПСУ6 (40х60х14/16)	ТО 30-2010	1
24.	ПСУ7 (40х60х12/14)	ТО 30-2010	1
25.	ПСУ8 (45х65)	ТО 26-2010	1
26.	ПСС (45х65)	ТО 12-2010	1
27.	ПОК (38х40)	ТО 100-2009	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из смешанной ткани	ТО 100-2009-СТ	1*
28.	ПОК (36х38)	ТО 100-2009	1
-	Принадлежности:		
	Наволочка из смешанной ткани	ТО 100-2009-СТ	1*
	Эксплуатационная документация		
29.	Инструкция по применению	ФМТК.942519 ИП	1

Примечания:

1 Исполнение подушки определяется при заказе по согласованию с заказчиком

* Данная принадлежность может поставляться по согласованию с заказчи-

ком.

2.4. Маркировка

2.4.1. Маркировка по ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 30332.

2.4.2. Для маркировки изделия применяют товарный ярлык и ленту с нанесением символов по уходу.

2.4.3. Товарный ярлык пришит, навешен на изделие или прикреплен к нему способом, обеспечивающим сохранность ярлыка.

2.4.4. На товарном ярлыке указаны следующие данные:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, артикул;
- размер изделия;
- состав сырья;
- обозначение настоящих технических условий;
- индивидуальный штрих код.

2.4.5. Для маркировки изделий, упакованных в мешки, применяют упаковочный ярлык с указанием следующих реквизитов:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, артикул;
- количество изделий;
- номер мешка;
- год и месяц упаковывания;
- на мешок прикрепляют групповой штрих код.

2.4.6. Реквизиты четко выполнены типографским способом и размещены на лицевой стороне ярлыка.

2.4.7. Реквизиты на ленту нанесены типографским, печатным, жаккардовым способами или методом шелкографии.

2.4.8. На ленте указаны символы по уходу за изделиями:



Изделие не должно подвергаться глажению;



Максимальная температура стирки 60 °С, обычный режим;



Не отбеливать;



Возможна барабанная сушка, обычная температура.

2.4.9. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192, с нанесением дополнительных информационных надписей и манипуляционных знаков: «Беречь от влаги».

2.5. Упаковка

2.5.1. Подушки упакованы в индивидуальную упаковку - пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 либо полиэтиленовую сумку с петлевой ручкой. Пакет может иметь застёжку в виде на ленты "Велькро". Упаковка запаяна, либо иметь ЗИП застёжку.

2.5.2. Групповая упаковка (для транспортировки при перевозке изделий) состоит из полипропиленового мешка по ГОСТ 32522 дублированного полиэтиленовым мешком из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Применяемые упаковочные материалы обеспечивают сохранность качества изделий.

2.5.3. Применяемые упаковочные материалы обеспечивают сохранность качества изделий.

2.5.4. Изделия в мешках плотно уложены и надежно закреплены от перемещения перевязочным материалом.

2.5.5. Масса брутто одного мешка не более 20 кг.

2.5.6. Количество изделий в одной единице транспортной тары указаны в нормативном документе на конкретное изделие.

2.5.7. В мешки может быть вложена потребительская тара для упаковывания каждого изделия при реализации.

2.5.8. Упаковывание изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846. Допускаются иные способы групповой упаковки, обеспечивающие защиту подушек от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Эксплуатационные ограничения

 Каждая подушка проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния подушки, чтобы убедиться в отсутствии различных порезов и повреждений. Если вы обнаружите повреждения, обратитесь в сервисную службу изготовителя.

3.2. Подготовка к эксплуатации

При использовании подушки впервые после её приобретения проверьте соответствие её комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции.

Одевание наволочки на подушку не требует специального обучения и может быть выполнено силами медицинского персонала или пользователя.

3.3. Описание изделий, порядок работы

 **Все** изделия поставляются готовыми к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить стирку в соответствии с требованиями пункта 4.2 и маркировки.

Каждое изделие перед применением необходимо встряхнуть, придав ему естественную форму в соответствии с фотоматериалами Раздела 1.6.

3.3.1. Валики

Изделия многофункциональные. Применяются для придания пациенту необходимого положения тела:

- При проведении медицинских процедур.
- При реабилитации пациента.
- При необходимости зафиксировать пациента.
- Для снятия болевых ощущений.

3.3.2. Кольца, ПОК (38x40), ПОК (36x38), ПОК- кольцо

Подушки могут использоваться для снижения давления на каудальную оконечность позвоночного столба (копчик) и/или перинеальную область при сидении, чтобы уменьшить боль от геморроев или в процессе восстановления после хирургии, беременности, или раны.

Подушки имеют выемку или углубление посередине, за счет чего основная нагрузка при сидении приходится на кости таза и бедра. При этом ягодичцы не сдавливаются, а анус и копчик не соприкасаются с поверхностью стула. Общее давление снижается, а болевые ощущения уменьшаются или проходят полностью.

 Подушки необходимо класть лишь на жесткую поверхность сиденья стула или табурета.

Чтобы усилить профилактическое действие подушек: Кольца, ПОК (38x40), ПОК (36x38), необходимо периодически вставать и прохаживаться хотя бы в течение 5–10 минут.

3.3.3. ПСОУ-универсальная

Эта подушка с отверстием под затылок, валиком под шею, и "ушками" под лопатки. Предназначена для фиксации головы при длительном лежании на спине и уменьшения вероятности образования пролежней на затылке, при этом валик идет под шею, "ушки" под лопатки.

3.3.4. ПСОС-спрут

Рекомендуется для использования людьми с повреждениями шейного отдела позвоночника, обычно находящихся в корсете. Когда корсет снимают, эту подушку кладут под голову, валик под шею, а "ушки" заворачивают вокруг шеи спереди.

3.3.5. ПСОВ – воротник

Используется в положении сидя подушку надевают на шею таким образом, чтобы "ушки" лежали на плечах, либо помещались под лопатками.

3.3.6. ПСОП- подкова

Используется для сна, а также отдыха в положении сидя. При лежании располагается таким образом, чтобы валик лежал под шеей, а "ушки" под лопатками, при лежании на боку плечо располагается между "ушками". При сидении "ушки" подушки могут находиться как на плечах, так и под лопатками.

3.3.7. ПСО1 (50x70), ПСО1 (50x70) Б

Подушки со встроенной камерой, образующей валик под шею - позволяет поддерживать шейный отдел позвоночника без напряженных положений различных его частей.

Исполнения отличаются разными наполнителями (См. Таблицу 2.2).

3.3.8. ПСО2 (45x65)

Подушка с накладным валиком - позволяет поддерживать шейный отдел позвоночника без напряженных положений различных его частей с фиксацией головы в положении лёжа на спине. Накладной валик позволяет учитывать особенности телосложения у разных людей.

3.3.9. ПСО4 (50x70)

Анатомическая подушка с выемкой под плечо. Изогнутая форма валика способствует наиболее комфортному отдыху при лежании на боку.

3.3.10. ПСО5 (45x65)

Трёх камерная - позволяет поддерживать шейный отдел позвоночника в наиболее физиологическом положении, удобно располагая его как в положении лёжа на спине, так и в положении лёжа на боку, поскольку у данной подушки:

- - есть выемка под плечо;
- - есть валик под шею;
- - меньшая высота, необходимая для поддержки затылочно-шейного отдела в положении лёжа на спине, составляет около 8 см, и большая высота, необходимая в положении лёжа на боку, составляющая около 14 см, сопряжены друг с другом.

3.3.11. ПСУ1(45x65), ПСУ1(45x65) Б, ПСУ2 (45x65), ПСУ2 (45x65) Б, ПСУ3(45x65), ПСУ3 (45x65) Б

Подушки имеют одну конструкцию, но разные параметры по высоте и плотности набивки жесткое волокно наполняет пространство под шеей и боковые сегменты, волокно мягкое используется для заполнения пространства под затылок и верхней части изделия. Это позволяет, придав подушке округлые формы, обеспечить максимально комфортное положение головы, лежащего как на спине, так и на боку.

Три варианта высоты (см. Раздел 1.6) позволяет подобрать подушку индивидуально под свои антропометрические данные.

Исполнения отличаются разными наполнителями (См. Таблицу 2.2).

3.3.12. ПСУ4(40x60), ПСУ4 (40x60) Б, ПСУ4 (40x60) М

Подушки при помощи систем перегородок в центральной части воссоздают форму изгиба задней поверхности шеи и головы лежащего на спине человека и при помощи различной плотности набивки четырех центральных камер подушки обеспечивают оптимальную высоту подъема головы от поверхности лежания.

Левая и правая большие камеры подушки конструктивно выполнены так, чтобы повторить контур головы лежащего на боку человека, это достигается путем использования в торцевой части подушки специальной детали в виде овала неправильной формы. Камеры наполнены волокном таким образом, чтобы создать наиболее комфортное положение для головы и шеи лежащего на боку человека.

Исполнения отличаются разными наполнителями (См. Таблицу 2.2).

3.3.13. ПСУ5(45х65)

Подушка имеет выемку под плечо, и дугообразный валик – эта конструктивная особенность помогает подушке максимально прилегать к телу как при лежании на спине, так и при лежании на боку. Подушка создает необходимую комфортность, а боковая деталь изделия, предаёт нужный объём и обеспечивает необходимые физиологические расстояния от головы до поверхности лежания.

3.3.14. ПСУ6 (40х60х14/16), ПСУ7 (40х60х12/14)

Подушки ПСУ6 и ПСУ7 имеют два валика разной высоты, которые расположены вдоль нижней и верхней сторон подушки. У подушки ПСУ6- валики 14 и 16 см, у подушки ПСУ7 валики 12 и 14 см. В центре подушки, находится перегородка создающая углубление под затылок. Подушки предназначены в основном для тех, кто предпочитает лежать на боку и на спине.

3.3.15. ПСУ8 (45х65)

Подушка состоит из двух овальных валиков и разновысокой средней части, в центре которой находится перегородка. Она наиболее удобна для лежания на спине и на боку.

При лежании на спине перегородка фиксирует голову в центре подушки, а валик плотно прилегает к шее. В положении на боку более высокие левая и правая части подушки обеспечивают необходимые физиологические расстояния от поверхности лежания.

3.3.16. ПСС (45х65)

Подушка с выемкой под плечо и дугообразной перегородкой. Подушка максимально прилегает к телу при лежании, так как выемка под плечо повторяет контуры плеч лежащего, а внутренняя перегородка создает искусственное углубление под затылок. Боковая деталь подушки, предаёт нужный объём и обеспечивает необходимые физиологические расстояния от головы до поверхности лежания.

4. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию и стирку подушки и его комплектующих согласно разделу 4.1 настоящей инструкции.

4.1. Уход, дезинфекция и стирка

1) Снять наволочку с подушки (при наличии).

2) Удалить крупные частицы загрязнения.

3) Дезинфекция

Внешние поверхности подушек и наволочек протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-74 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113-98.

4) Стирка

- Наволочки и подушки отдельно друг от друга можно подвергать машинной стирке при максимальной температуре 60 °C (обычный режим).



Наволочки рекомендуется перед стиркой вывернуть наизнанку.



Внимание! Изделия запрещено отбеливать!



Внимание! Изделие запрещено гладить!



Внимание! Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

- Сушку осуществлять барабанным методом, при температуре не более 80 °C

В случае нарушения целостности подушки и наволочки: разрывов, проколов, порезов изделие необходимо утилизировать согласно Разделу 6.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Подушки, упакованные в транспортную тару, транспортируют всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

5.2. Условия транспортирования подушек соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%)

5.3. Условия хранения подушек в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и относительной влажности до 98%)

6. ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. Утилизация осуществляется в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790.

6.2. Согласно СанПиН 2.1.7.2790 подушки относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

6.3. Перед утилизацией подушки подвергают санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

6.4. Подушки подлежат утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

6.5. Утилизации подлежит вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации подвергается отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Использование подушек должно осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией.

7.2. К эксплуатации подушек допускается пользователь, детально изучивший инструкцию.

7.3. После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать подушки в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Подушка ортопедическая производства ООО "Фамильный текстиль"

Исполнение подушки _____ индивидуальный штрих код _____.

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)

.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Подушка ортопедическая,

исполнение подушки _____ индивидуальный штрих код _____

упакована на предприятии-изготовителе ООО «Фамильный текстиль» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

(личная подпись) (расшифровка подписи)

(Дата)

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют в случае невозможности ремонта подушки на ремонтном предприятии, обслуживающем изделие.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и индивидуальный штрих код изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому он получен;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей т.д.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подушек требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

11.3. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие вышло из строя в гарантийный период, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.
- Несовпадения номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Подушка ортопедическая,

исполнение подушки _____ индивидуальный штрих код _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____

(подпись, печать)

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 43 лист(ов)

(закладка при)
Управляющий

ООО «ФАМИЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ»

Загуляев С.Г.

«22» августа 2012

