

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Агропромышленная компания
«СтройИнвест»



Деев О.А.

2018 г.

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
по ТУ 32.50.50-001-81273843-2017

Инструкция по применению

АПКС.942437.001 ИП

г. Тула

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....6

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 11

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 11

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ..... 13

6 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 14

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 15

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ..... 16

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 17

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ..... 18

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА..... 19

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 3 из 19

Настоящая инструкция распространяется на Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-001-81273843-2017 (далее – бахилы) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках бахил, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения бахил, отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования бахил, необходимо обращаться к изготовителю:
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «СтройИнвест»
Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59
Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42
E-mail: apk_sinvest@bk.ru

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 4 из 19

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение и условия применения

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые (далее – бахилы) предназначены для использования в медицинском учреждении в качестве физического барьера на обуви для защиты обуви от загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами с целью предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами, а также для поддержания чистоты и соблюдения гигиенических требований и санитарных норм.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения.

Бахилы относятся к изделиям для однократного применения.

Бахилы изготавливаются в нескольких исполнениях, в зависимости от толщины бахилы (2-х стенок), согласно таблице 1.

В зависимости от потенциального риска применения бахилы относятся к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид бахил в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 269290 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям бахилы относятся к виду УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации бахилы относятся к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации бахилы относятся к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

1.2. Потребители

Бахилы могут использоваться детьми и взрослыми. Рассчитаны на обувь: до 46 размера.

1.3. Показания

- предотвращение перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом;
- поддержание чистоты и соблюдение гигиенических требований и санитарных норм в условиях лечебно-профилактических учреждений.

1.4. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

1.5. Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.6. Меры предосторожности

Внимание!

- Используйте бахилы только в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте бахилы повторно. Бахилы относятся к изделиям для однократного применения.
- Не используйте бахилы при наличии на изделии запрессованных складок (не расправляющихся), порезов, дыр, разрывов, проколов, посторонних включений, выступающих над поверхностью.

1.7. Общий вид бахил

Одноразовые бахилы относятся к наиболее распространенным и быстро расходующимся медицинским изделиям в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Бахилы представляют собой защитные чехлы, которые надеваются поверх обуви.

Бахилы изготавливаются из сложенной вдвое полиэтиленовой пленки низкого давления (ПНД), в которую вставляют эластичную одинарную резинку и пропаивают ее по всей длине изделия (рисунок 1).

Толщина полиэтиленовой пленки составляет от 9 до 22,5 мкм.



Рисунок 1 – Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые

Бахилы изготавливаются в виде штучных изделий, сгруппированных в упаковку из полиэтилена по одной, 5, 25 или 50 пар.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 6 из 19

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и характеристики

2.1.1. Бахилы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92, технических условий ТУ 32.50.50-001-81273843-2017 и комплекту конструкторской документации АПКС.942437.001, утвержденной в установленном порядке.

Полный (номенклатурный) перечень изделий приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

№	Наименование	Отличительные особенности исполнений	
		Толщина пленки, мкм	Толщина бахилы (2-х стенок), мкм
1	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 18 мкм	9	18
2	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 20 мкм	10	20
3	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 24 мкм	12	24
4	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 26 мкм	13	26
5	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 30 мкм	15	30
6	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 45 мкм	22,5	45

2.1.2. Габаритные размеры бахил (Длина x Высота): 390 x 130 мм.

Допускаемое отклонение габаритных размеров: ± 10 мм.

2.1.3. Масса бахил не более значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Масса бахил

№	Наименование	Масса одной бахилы, не более, г	Масса пары бахил (2 шт.), не более, г
1	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 18 мкм	0,9	1,8
2	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 20 мкм	1,0	2,0
3	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 24 мкм	1,2	2,4
4	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 26 мкм	1,3	2,6
5	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 30 мкм	1,5	3,0
6	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 45 мкм	2,25	4,5

Примечание: Масса бахил пропорциональна их толщине.

2.1.4. Цвет бахил синий.

2.1.5. Окраска бахил однотонная по всему изделию, без посторонних пятен и про-
белов.

2.1.6. Удерживание бахил на обуви обеспечивается за счет одинарной резинки
круглого сечения диаметром 1 мм, пропаянной по всей длине изделия.

2.1.7. Уголки бахил пропаяны.

Сварной шов на подошвенной части бахил.

2.1.8. Ширина сварного шва под резинку 2 мм. Допускаемое отклонение: ± 0,5 мм.

2.1.9. Высота подвернутой внутрь под резинку полиэтиленовой пленки 10 мм. До-
пускаемое отклонение: ± 1,0 мм.

2.1.10. Сварные швы в изделии ровные, равномерные по всему контуру, без пробоин
и прожженных мест.

2.1.11. По физико-механическим показателям используемая полиэтиленовая пленка
соответствует требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Физико-механические характеристики пленки

№	Наименование показателя	Значение
1	Прочность при растяжении, Мпа:	-
1.1.	- в продольном направлении, не менее	13,7
1.2	- в поперечном направлении, не менее	11,8
2	Относительное удлинение при разрыве, %:	-
2.1	- в продольном направлении, не менее	100
2.2	- в поперечном направлении, не менее	130

2.1.12. Прочность сварных швов изделия не менее 60% прочности используемой по-
лимерной пленки при растяжении.

2.1.13. Бахилы не имеют слипаний внутренних поверхностей.

2.1.14. Поверхности бахил гладкие, без запрессованных складок (не расправляю-
щихся), порезов, дыр, разрывов, проколов, посторонних включений, выступающих над
поверхностью.

2.1.15. Бахилы при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов
внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по
ГОСТ 15150-69.

2.1.16. Бахилы обладают устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуа-
тации, соответствующим требованиям к изделиям группы 3 по ГОСТ Р 50444-92.

2.1.17. Бахилы в транспортной упаковке обладают устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.

2.1.18. Бахилы в транспортной упаковке обладают устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92.

2.1.19. Показатели поверхностной плотности в зависимости от толщины изделия и водоупорности в зависимости от поверхностной плотности. должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели поверхностной плотности и водоупорности

№	Наименование	Поверхностная плотность, г/м ²	Водоупорность, мм вод. ст., не менее
1	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 18 мкм	17,8	270
2	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 20 мкм	19,7	300
3	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 24 мкм	23,7	360
4	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 26 мкм	25,6	390
5	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 30 мкм	29,6	450
6	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые, толщина 45 мкм	44,4	675

Допускаемое отклонение по поверхностной плотности: $\pm 12\%$.

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении бахил, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве бахил, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления бахил используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 5.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 9 из 19

Таблица 5 – Сырье, материалы и покупные изделия для изготовления бахил

№	Наименование изделия, его частей	Наименование, марка, изготовитель материала
1	Пленка полиэтиленовая низкого давления (ПНД) Цвет: синий	Полиэтилен высокой и средней плотности марки РЕ6 FE-68 по ТУ 6-11-00206368-25-2013, производства ООО «Ставролен» Группы «Лукойл», Россия Концентрат ярко-синий «БАСКО» марки ПФ1507/08-ПЭ по ТУ 2243-001-23124265-2000 (с изм. №1-6), производства ООО НПФ «БАРС-2», Россия
2	Нить латексная оплетенная 42/330	Нить латексная натуральная №42, 40 жил, производства World Flex, Таиланд Оплетение: нить полиэфирная белая №330, производства Vineet Polyfab PVT. LTD, Индия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Срок годности бахил не менее 5 лет с даты их изготовления.

2.4 Комплектность

2.4.1 В комплект поставки входит:

- Бахилы одного из исполнений АПКС.942437.001.
- Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению АПКС.942437.001 ИП.

Примечание: количество и исполнение бахил определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 Маркировка в полном объеме нанесена на одну из сторон упаковки в виде этикетки или в виде бумажного или картонного ярлыка, прикрепляемого к ней, и содержит:

- а) наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, его адрес;
- б) полное наименование изделия;
- в) дату изготовления;
- г) слова «Использовать до...»; а также года и месяца;
- д) слова «Однократного применения»;
- е) количество изделий в упаковке (шт./пар);
- ж) номер партии;
- з) обозначение настоящих технических условий;
- и) отметку ОТК.

2.5.3 Допускается использование соответствующих символов ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014:

Номер партии



(номер)

«Дата изготовления»



(год/месяц)

«Использовать до...»



(год/месяц)

«Однократного применения»



2.5.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации изготовителя.

2.6.2 Бахилы упаковываются в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82: по одной, 5, 25 или 50 пар (по согласованию с заказчиком).

2.6.3 Применяемые упаковочные материалы обеспечивают сохранность качества изделий.

2.6.4 Бахилы в потребительской упаковке количества, определенного заказом, допускается помещать в групповую (транспортную) упаковку - ящики из картона по

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 11 из 19

ГОСТ 9142-2014 или ГОСТ 7933-89 или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики оклеены лентой по ГОСТ 18251-87 или ГОСТ 20477-86.

2.6.5 Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и уложена в ящик.

2.6.6 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту бахил от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

2.6.7 Масса бахил в транспортной таре не более 15 кг.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Бахилы соответствуют требованиям токсикологической, санитарно-химической и биологической безопасности в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993-2011, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждая партия бахил проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния бахил, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

 Запрещается повторное использование бахил.

Рабочие условия окружающей среды:
Температура от плюс 10 до плюс 35°C.
Относительная влажность воздуха: до 80%.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 12 из 19

4.2 Подготовка к эксплуатации

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием бахил рекомендуется удалить загрязнения с обуви с помощью очистителя для обуви, коврика или специального покрытия пола.

4.3 Порядок работы с изделием

- Раскройте упаковочный материал, достаньте бахилы, выбросьте упаковочный материал.
- Аккуратно растяните резинку и наденьте бахилы сверху на обувь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удобства рекомендуется надевать бахилы сидя.

 **Внимание!** Бахилы могут порваться при небрежном растягивании во время надевания.

 **Внимание!** Необходимо правильно зафиксировать бахилы на обуви, чтобы они не упали.

ПРИМЕЧАНИЕ: Резинка, с помощью которой бахилы фиксируются на обуви, не должна сдавливать ногу.

- После использования снимите бахилы с обуви и утилизируйте их.

 **Внимание!** Бахилы являются изделием одноразового применения, после которого они подлежат утилизации.

 **Внимание!** После использования никогда не мойте или повторно не используйте бахилы.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 13 из 19

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование и хранение бахил должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.
- Транспортирование бахил может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.
- Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
- При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.
- 5.2 Условия транспортирования бахил должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 100%).
- 5.3 Условия хранения бахил в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98%).
- 6 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- 6.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790.
- 6.2 Бахилы, не загрязненные биологической жидкостью после использования, относятся к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, согласно СанПиН 2.1.7.2790.
- 6.3 Бахилы, загрязненные биологической жидкостью после использования, относятся к медицинским отходам класса Б – эпидемиологически опасные отходы, согласно СанПиН 2.1.7.2790.
- Примечание: Повторное использование одноразовых бахил запрещено. Они подлежат утилизации.*
- 6.4 Неиспользованные бахилы так же подлежат утилизации как отходы класса А в случаях:
- окончания срока годности;
 - повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.
- 6.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 14 из 19

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1 Использование бахил должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.
- 7.2 Использованные изделия повторному применению не подлежат.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 15 из 19

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые производства ООО «Агропро-
мышленная компания «СтройИнвест»

Исполнение _____

Номер партии _____

приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандар-
тов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 16 из 19

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые

Исполнение _____

Номер партии _____

упакованы на предприятии-изготовителе ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 17 из 19

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и номер партии изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 18 из 19

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие бахил требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции и исчисляется с даты изготовления. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

– Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

– Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

– Несовпадения номера партии изделия с гарантийным талоном.

ООО «Агропромышленная компания «СтройИнвест» Россия, 300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, литера А42, этаж 1, пом. 59 Тел.: +7-953-191-82-48, +7-910-945-07-42 E-mail: apk_sinvest@bk.ru	Документ: АПКС.942437.001 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 19 из 19

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые

Исполнение _____

Номер партии _____

Приобретены _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 19 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «АПК «СТРОЙИНВЕСТ»

Деев О.А.
« 6 » апреля 2018 г.

