

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Бисанс»



Сытов С.В.

201 г.

Инструкция по применению
Наборы процедурные стерильные, варианты исполнения

НП 014.00.ИПП

2014г.

Исполн. и дата

Изм. № 001

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

1. Наименование медицинского изделия

Наборы процедурные стерильные, варианты исполнения.

1.1 Состав изделия

варианты исполнения:

Наборы процедурные стерильные, варианты исполнения:

1. Набор инфузионный № 6:

- салфетки-покрытия 380x400, 380x450, 450x450 мм – 2 шт.
- тампоны круглые марлевые 15x15, 20x19, 30x30 мм – 10 шт.
- повязки пластырные 15x150, 25x150 мм – 10 шт.
- лоток 300, 500 мл – 1 шт.
- перчатки диагностические текстурированные неопудренные S, M, L – 1 пара.
- салфетки марлевые 50x50, 75x75 мм – 10 шт.
- индикатор стерильности – 1 шт.

2. Набор инфузионный № 4:

- салфетка-покрытие 380x400, 380x450, 450x450 мм – 1 шт.
- тампоны круглые марлевые 15x15, 20x19, 30x30 мм – 10 шт.
- повязки пластырные 15x150, 25x150 мм – 10 шт.
- перчатки диагностические текстурированные неопудренные S, M, L – 1 пара.
- индикатор стерильности – 1 шт.

3. Набор инъекционный № 2.1:

- тампоны круглые марлевые 9x9, 12x12, 15x15, 20x19, 30x30, 30x60 мм – 30 шт.
- пинцеты 130 мм – 2 шт.
- индикатор стерильности – 1 шт.

4. Набор инъекционный № 2.2:

- тампоны круглые марлевые 9x9, 12x12, 15x15, 20x19, 30x30, 30x60 мм – 30 шт.
- лотки 60, 100, 120, 300, 500 мл – 2 шт.
- пинцеты 130 мм – 2 шт.
- индикатор стерильности – 1 шт.

5. Набор для катетеризации центральных вен № 6:

- салфетки марлевые 50x50, 75x75, 100x100 мм – 10 шт.
- тампоны круглые марлевые 15x15, 20x19, 30x30 мм – 25 шт.
- маски для лица 3-слойные на резинке 180x90 мм – 3 шт.

НП 014.00.ИПП

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мастеркин А.В.	Мастеркин	01.09.14
Пров.		Бордов К.Г.	Бордов	01.09.14
Нач. отд.		Мочалов Е.А.	Мочалов	01.09.14
Н.контр.				
Утв.		Мочалов Е.А.	Мочалов	01.09.14

Инструкция по применению
Наборы процедурные стерильные,
варианты исполнения.

НП 014.00.ИПП

Лит.	Лист	Листов
	2	12

ООО «Бисанс»

Копировал

Формат А4

- перчатки диагностические текстурированные неопудренные S, M, L – 2 пары.

- салфетка-покрытие с липким краем 500x600, 750x900 мм – 1 шт.

- повязки пластырные 15x150, 25x150 мм – 10 шт.

- индикатор стерильности – 1 шт.

6. Набор для катетеризации центральных вен № 17:

- салфетки-покрытия 500x600, 750x900 мм – 2 шт.

- салфетка-покрытие с отверстием 750x900 мм, отверстие: d = 60x80 мм – 1 шт.

- полотенце для рук 305x340, 420x480 мм – 1 шт.

- салфетки нетканые 50x50, 75x75, 100x100 мм – 10 шт.

- тампоны круглые марлевые 15x15, 20x19, 30x30 мм – 10 шт.

- игла 0,7x40 мм (чёрная) – 1 шт.

- игла 1,2x40 мм (розовая) – 1 шт.

- шприц 10 мл – 1 шт.

- шприц 20 мл – 1 шт.

- пинцет анатомический 125, 150 мм – 1 шт.

- скальпель – 1 шт.:

- лезвие: № 10, № 11, № 12

- ручка: № 3, № 4

- зажим Келли 130 мм – 1 шт.

- ножницы 115 мм – 1 шт.

- зажим Пеана 140 мм – 1 шт.

- салфетки марлевые 50x50, 75x75, 100x100 мм – 10 шт.

- плёночные прозрачные пластыри с рамкой 60x70, 100x120 мм – 4 шт.

- лоток градуированный 500 мл – 1 шт.

- индикатор стерильности – 1 шт.

7. Набор для катетеризации центральных вен № 8:

- салфетки марлевые 50x50, 75x75, 100x100 мм – 10 шт.

- тампоны круглые марлевые 15x15, 20x19, 30x30 мм – 10 шт.

- шприцы 10, 20 мл – 2 шт.

- перчатки диагностические текстурированные неопудренные S, M, L – 2 пары.

- салфетка-покрытие 450x750, 750x900 мм – 1 шт.

- салфетка-покрытие с отверстием 750x900 мм, отверстие: d = 60x80 мм – 1 шт.

- пинцеты 130 мм – 2 шт.

- лотки 500 мл – 2 шт.

- индикатор стерильности – 1 шт.

8. Набор салфеток для внутривенных манипуляций:

- салфетки с Y-образным разрезом 50x50, 75x75, 100x100 мм – 50 шт.

- индикатор стерильности – 1 шт.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НП 014.00.ИПП

Лист

3

Копировал

Формат А4

9. Набор пластырей для внутривенных манипуляций:

- повязки пластырные с U- образным разрезом 60x80 мм – 50 шт.
- индикатор стерильности – 1 шт.

10. Набор для установки периферического катетера № 5:

- салфетки марлевые 50x50, 75x75, 100x100 мм – 10 шт.
- повязки пластырные с U- образным разрезом 60x80 мм – 4 шт.
- бинты 80x4000 мм – 2 шт.
- пинцет 130 мм – 1 шт.
- повязки пластырные 15x150, 25x150 мм – 10 шт.
- индикатор стерильности – 1 шт.

2. Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «Бисанс», 192102, Россия, СПб, Бухарестская ул. 1, оф. 508;
Тел/факс: +7 (812) 449-91-61, 449-91-62

3. Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Настоящая инструкция распространяется на наборы процедурные стерильные, варианты исполнения (в дальнейшем наборы, медицинское изделие) применяются при различных процедурах, манипуляциях и операциях в амбулаториях и стационарах.

Показания:

Специальные показания отсутствуют. Применение данного набора обуславливается процедурой выбранной врачом.

Противопоказания:

Отсутствуют.

Побочные действия:

- аллергическая реакция на материалы входящие в состав компонентов набора;
- возникновение гематомы при проколе вены иглой.

Область применения – общая хирургия.

Наборы применяются в условиях лечебных и лечебно-диагностических учреждений.

4. Способ применения

Наборы инфузионные:

- вскрыть упаковку набора;
- надеть перчатки диагностические текстурированные неопудренные;
- расстелить салфетку-покрытие под локтевую зону;
- тампонами круглыми марлевыми обработать место инъекции;
- зафиксировать инфузионную иглу (не поставляется с набором) повязкой пластырной;

					НП 014.00.ИПП	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- после окончания процедуры на операционное поле наложить салфетку марлевую (набор № 6);
- использованный расходный материал уложить в лоток (набор №6);
- использованный расходный и инструментарий материал утилизировать.

Наборы инъекционные:

- вскрыть упаковку набора;
- пинцетом взять тампон круглый марлевый и обработать место инъекции;
- наложить тампон круглый марлевый на обработанную поверхность;
- использованный расходный материал уложить в лоток (набор №2.2);
- использованный расходный материал и инструментарий утилизировать.

Наборы для катетеризации центральных вен:

- вскрыть упаковку набора;
- расстелить салфетку-покрытие на инструментальный стол (кроме набора № 6);
- надеть маску для лица 3-слойную на резинке (набор № 6), перчатки диагностические текстурированные неопудренные (кроме набора № 17);
- наложить салфетку-покрытие с отверстием (кроме набора № 6) на операционное поле (отверстием – над раневым местом);
- расстелить салфетку-покрытие с липким краем (набор № 6) ниже рабочей поверхности (при катетеризации в области грудинно-ключичного сочленения);
- взять пинцетом (набор № 8) тампон круглый марлевый, салфетку марлевую или салфетку нетканую (набор № 17) и обработать операционное поле;
- с помощью шприца с иглой (набор № 17, набор № 8 игла не поставляется с набором) выполнить поисковую пункцию;
- скальпелем (набором № 17) произвести рассечение мягких тканей в месте введения катетера (не поставляется с набором);
- пинцет анатомический (набор №17) использовать для удержания ткани не травмируя ее;
- зажим Келли, зажим Пеана (набор №17) использовать для пережатия кровеносного сосуда;
- катетер (не поставляется с набором) фиксируется с помощью плёночного прозрачного пластыря с рамкой (набор № 17) или повязками пластырными (набор №6);
- в случае крепления катетера на теле пациента шовным материалом (не поставляется с набором) для удаления лишнего материала использовать ножницы (набор № 17);
- в градуированный лоток (набор № 17) при необходимости заливается дезинфектор (не поставляется с набором);
- после окончания процедуры обработать операционное поле тампонами круглыми марлевыми, салфетками марлевыми или салфетками неткаными

НП 014.00.ИПП

Лист
5

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А4

- (набор № 17), вытереть руки полотенцем для рук (набор №17);
- использованный расходный материал и инструментарий уложить в лоток (набор № 8);
 - использованный расходный материал и инструментарий утилизировать.

Набор салфеток для внутривенных манипуляций:

- вскрыть упаковку набора;
- подложить салфетки с Y - образным разрезом под иглу (не поставляется с набором), вставленную в вену в процессе проведения инъекции;
- использованный расходный материал утилизировать.

Набор пластырей для внутривенных манипуляций:

- вскрыть упаковку набора;
- зафиксировать иглу (не поставляется с набором), вставленную в вену, с помощью повязки пластырной с U - образным разрезом в процессе проведения инъекционной или инфузионной процедур;
- использованный расходный материал утилизировать.

Набор для установки периферического катетера:

- вскрыть упаковку набора;
- взять пинцетом салфетку марлевую и обработать место инъекции;
- локализовать операционное поле в месте вставки катетера (не поставляется с набором) с помощью повязки пластырной с U - образным разрезом;
- закрепить катетер с помощью повязок пластырных;
- наложить салфетку марлевую на место инъекции и зафиксировать с помощью бинта;
- использованный расходный материал и инструментарий утилизировать.

5. Техническое описание медицинского изделия

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

1. Набор инфузионный № 6:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетки-покрытия	380x400, 380x450, 450x450 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.
2	Тампоны круглые марлевые	15x15, 20x19, 30x30 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
3	Повязки пластырные	15x150, 25x150 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	10 шт.
4	Лоток	300, 500 мл	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НП 014.00.ИПП	Лист
						6

Копировал

Формат А4

5	Перчатки диагностические текстурированные неопудренные	S, M, L	Латекс, Н-3579, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	1 пара.
6	Салфетки марлевые	50x50, 75x75 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.

2. Набор инфузионный № 4:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетка-покрытие	380x400, 380x450, 450x450 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
2	Тампоны круглые марлевые	15x15, 20x19, 30x30 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
3	Повязки пластырные	15x150, 25x150 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	10 шт.
4	Перчатки диагностические текстурированные неопудренные	S, M, L	Латекс, Н-3579, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	1 пара.

3. Набор инъекционный № 2.1:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Тампоны круглые марлевые	9x9, 12x12, 15x15, 20x19, 30x30, 30x60 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	30 шт.
2	Пинцеты	130 мм	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.

4. Набор инъекционный № 2.2:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Тампоны круглые марлевые	9x9, 12x12, 15x15, 20x19, 30x30, 30x60 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	30 шт.
2	Лотки	60, 100, 120, 300, 500 мл	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.
3	Пинцеты	130 мм	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.

5. Набор для катетеризации центральных вен № 6:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетки марлевые	50x50, 75x75, 100x100 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
2	Тампоны круглые марлевые	15x15, 20x19, 30x30 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	25 шт.

					НП 014.00.ИПП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

Копировал

Формат А4

3	Маски для лица 3-слойные на резинке	180x90 мм	Нетканый, К-3547, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	3 шт.
4	Перчатки диагностические текстурированные неопудренные	S, M, L	Латекс, Н-3579, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	2 пары.
5	Салфетка-покрытие с липким краем	500x600, 750x900 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
6	Повязки пластырные	15x150, 25x150 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	10 шт.

6. Набор для катетеризации центральных вен № 17:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетки-покрытия	500x600, 750x900 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.
2	Салфетка-покрытие с отверстием	750x900 мм, отверстие: d = 60x80 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
3	Полотенце для рук	305x340, 420x480 мм	Нетканый, К-6452, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	1 шт.
4	Салфетки нетканые	50x50, 75x75, 100x100 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	10 шт.
5	Тампоны круглые марлевые	15x15, 20x19, 30x30 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
6	Игла	0,7x40 мм (чёрная)	Нержавеющая сталь SUS304, производства Wuxi Mingijiali Stainless Steel Co., Ltd, Китай	1 шт.
7	Игла	1,2x40 мм (розовая)	Нержавеющая сталь SUS304, производства Wuxi Mingijiali Stainless Steel Co., Ltd, Китай	1 шт.
8	Шприц	10 мл	Пластик, ВК-6328, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
9	Шприц	20 мл	Пластик, ВК-6328, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
10	Пинцет анатомический	125, 150 мм	Нержавеющая сталь SUS304, производства Wuxi Mingijiali Stainless Steel Co., Ltd, Китай	1 шт.

					ИП 014.00.ИПП	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

Копировал

Формат А4

11	Скальпель:	Лезвие: № 10, № 11, № 12 Длина лезвия: 37, 39, 41 мм Шина режущей кромки 1,5 – 4,0 мм Ручка: № 3, № 4 Длина ручки: 120, 130 мм	Лезвие: нержавеющая сталь SUS304, производства Wuxi Mingijiali Stainless Steel Co., Ltd, Китай Ручка: пластик, ВК-6328, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
12	Зажим Келли	130 мм	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
13	Ножницы	115 мм	Нержавеющая сталь SUS304, производства Wuxi Mingijiali Stainless Steel Co., Ltd, Китай	1 шт.
14	Зажим Пеана	140 мм	Нержавеющая сталь SUS304, производства Wuxi Mingijiali Stainless Steel Co., Ltd, Китай	1 шт.
15	Салфетки марлевые	50x50, 75x75, 100x100 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
16	Плёночные прозрачные пластыри с рамкой	60x70, 100x120 мм	Полиэтилен, МЕ-1266, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	4 шт.
17	Лоток градуированный	500 мл	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.

7. Набор для катетеризации центральных вен № 8:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетки марлевые	50x50, 75x75, 100x100 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
2	Тампоны круглые марлевые	15x15, 20x19, 30x30 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
3	Шприцы	10, 20 мл	Пластик, ВК-6328, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.
4	Перчатки диагностические текстурированные неопудренные	S, M, L	Латекс, Н-3579, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	2 пары.
5	Салфетка-покрытие	450x750, 750x900 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
6	Салфетка-покрытие с отверстием	750x900 мм, отверстие: d = 60x80 мм	Полиэтилен М-2648, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
7	Пинцеты	130 мм	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НП 014.00.ИПП

Лист
9

Копировал

Формат А4

8	Лотки	500 мл	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	2 шт.
---	-------	--------	--	-------

8. Набор салфеток для внутривенных манипуляций:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетки с Y-образным разрезом	50x50, 75x75, 100x100 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	50 шт.

9. Набор пластырей для внутривенных манипуляций:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Повязки пластырные с U-образным разрезом	60x80 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	50 шт.

10. Набор для установки периферического катетера № 5:

№	Наименование	Геометрические размеры	Материал	Кол-во, шт., пар.
1	Салфетки марлевые	50x50, 75x75, 100x100 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	10 шт.
2	Повязки пластырные с U-образным разрезом	60x80 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	4 шт.
3	Бинты	80x4000 мм	Марля х/б (хлопок 100%), производства ЗАО "КПТФ", Россия	2 шт.
4	Пинцет	130 мм	Пластик, ПР-2649, производства ЗАО «Биохимпласт», Россия	1 шт.
5	Повязки пластырные	15x150, 25x150 мм	Нетканый, К-3545, производства ООО Томь – ЛТД, Россия	10 шт.

6. Требования безопасности.

Данное медицинское изделие запрещается использовать после даты окончания срока годности, указанного на упаковке.

Данное медицинское изделие запрещается использовать при поврежденной упаковке.

7. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия

Данное медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НП 014.00.ИПП	Лист
						10

Копировал

Формат А4

8. Методы стерилизации

Данное медицинское изделие поставляется стерильным (стерилизация с применением оксида этилена), в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 11135-2000. Метод валидации и текущего контроля процесса стерилизации проводится так же в соответствии ГОСТ Р ИСО 11135-2000.

9. Маркировка, упаковка, условия транспортирования

На потребительской упаковке наборов указано следующее:

- наименование набора;
- состав набора с указанием количества;
- объём шприца;
- геометрический размер составляющих наборов;
- тип медицинской маски;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер настоящих ТУ;
- условия хранения: хранить в интервале температуры от 5 до 25 °С и символ: «Беречь от влаги», «Не допускать воздействия солнечного света»; «Диапазон влажности»;
- символ «Код партии»;
- обозначение набора по системе нумерации производителя;
- символ стерильно (стерилизация с применением оксида этилена);
- символ «Не использовать повторно»;
- символ «Не стерилизовать повторно»;
- символ «Дата изготовления»;
- символ «Содержит натуральный латекс»;
- символ «Не использовать при поврежденной упаковке»;
- срок годности - слова «Годен до...» или символ;
- адрес предприятия-изготовителя.

Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192-96. На транспортную тару нанесена маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- описание содержимого с указанием количества;
- год и месяц упаковывания.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

«Хрупкое. Осторожно!», «Беречь от влаги».

Манипуляционные знаки наносятся по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

					НП 014.00.ИПП	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

Транспортируют наборы транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Наборы в упаковке предприятия-изготовителя хранятся на складах поставщика в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (диапазон температуры: от 5 до 25°C) в сухих проветриваемых помещениях.

Наборы упакованы согласно ГОСТ ISO 11607-2011, с индикаторами стерильности.

В качестве потребительской и транспортной тары используются полиэтиленовые пакеты с бумажной подложкой по ГОСТ 10354-82, коробки из коробочного картона по ГОСТ Р 52901-2007.

Допускаются другие виды упаковочных средств, обеспечивающие сохранность наборов при транспортировании и хранении.

Потребительскую и транспортную тару оклеивают лентой по ГОСТ 18251-87 и обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88.

Прочность транспортной тары обеспечивает сохранность наборов в условиях многоярусной загрузки (3,3 м).

Масса брутто не более 33 кг.

Наборы, упакованные в транспортную тару, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 24597-81 на поддонах по ГОСТ 9078-84.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Срок годности наборов 24 месяца со дня стерилизации.

11. Порядок осуществления утилизации или уничтожения медицинского изделия.

Утилизация проводится согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

12. Рекламация.

Рекламации высылать на адрес:

ООО «Бисанс», 192102, Россия, СПб, Бухарестская ул. 1, оф. 508;

Тел/факс: +7 (812) 449-91-61, 449-91-62

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НП 014.00.ИПП

Лист

12

Копировал

Формат А4

В документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью -12-
(двенадцать) листа (ов).

Директор ООО «Бисанс»

В. Сытов

