

Правила использования

Маска-респиратор GAGARA® является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть маску-респиратор GAGARA® перед использованием на наличие дефектов. Вывести концы ремней крепления из зацепов и расправить изделие. Начиная с подбородка, надеть маску-респиратор GAGARA®, завести эластичные ремни крепления за голову, зафиксировать их на уровне теменной и затылочной части головы. Обвязать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края маски-респиратора GAGARA® на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтяжки (прилегания). Проверить маску-респиратор GAGARA® на плотность прилегания: не сдвигая маску-респиратор, полностью закрыть ее обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям маски-респиратора, отрегулировать положение крепления. Повторить проверку маски-респиратора на плотность прилегания. Маска-респиратор подлежит замене в случае ее повреждения. Маска-респиратор GAGARA® является одноразовым средством защиты, не подлежит чистке и дезинфекции.



Правила, условия и сроки хранения

Маска-респиратор GAGARA® до использования должна храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30°C до +70°C и относительной влажности до 80%.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончания срока годности смотрите на упаковке.

Требования к транспортированию

Транспортирование масок-респираторов GAGARA® возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При этом маски-респираторы GAGARA® должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Требования по утилизации

Маски-респираторы GAGARA® после их использования по назначению утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. РУ № РЗН 2018/7295 от 21.06.2018

Изготовитель
ООО «Респираторный комплекс»
РФ, 188679, Ленинградская обл.,
Всеголовский р-н, п.г.т. им. Морозова,
ул. Челюслова, д. 3, здание 582
Тел./факс: +7 (812) 703-37-33
zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



Маска-респиратор ГАГАРА защищает от аллергенов, бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.



Указания по эксплуатации
Маска-респиратор
GAGARA®
ТУ 32.50.50-003-65525370-2016



Обозначение маски-респиратора GAGARA®
Маски-респираторы GAGARA® маркируются в соответствии с
ГОСТ 12.4.294-2015.

Показания и противопоказания

Показаниями к применению маски-респиратора GAGARA® являются наличие микроорганизмов, биологических жидкостей и взвешенных частиц во вдыхаемом воздухе.

Противопоказания к применению маски-респиратора GAGARA®: нельзя применять маску-респиратор, имеющую сквозные отверстия, для защиты от высокотоксичных веществ, вредных паров и газов, а также в зоне открытого пламени и в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.).

При применении людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию маски-респиратора GAGARA®, ее эффективность снижается.

Отличия маски-респиратора от медицинской маски

Маска-респиратор Средство защиты	Медицинская маска Средство гигиены
Фильтрует воздух, не допускает попадания микроорганизмов в дыхательные пути	Задерживает капли слюны и мокроты при чихании и кашле

Маска-респиратор GAGARA® представляет собой многослойную фильтрующую полумаску конвертного типа двойного сложения с эластичными ремнями крепления.

Маска-респиратор GAGARA® является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 181830.

Маска-респиратор GAGARA® относится к 1 классу потенциального риска как изделие с низкой степенью риска, так как является незаменимым средством и применяется как механический барьер, препятствующий проникновению всех видов аэрозолей, включая микробиологические, в органы дыхания пользователя. Маска-респиратор GAGARA® относится к нестерильным МИ.

Область применения

Маска-респиратор GAGARA® предназначена для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от микроорганизмов, биологических жидкостей и взвешенных в воздухе частиц во время медицинских, хирургических, стоматологических и лабораторных процедур, а также для профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в качестве защитного барьера.

Маска-респиратор ГАГАРА защищает от аллергенов, бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

МАСКА - РЕСПИРАТОР

МАСКА - РЕСПИРАТОР

Маска-респиратор ГАГАРА защищает от аллергенов, бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.



МАСКА - РЕСПИРАТОР

Маска-респиратор ГАГАРА защищает от аллергенов, бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Маска-респиратор ГАГАРА® ТУ 32.50.50-003-6552379-2016

Область применения
Маска-респиратор ГАГАРА® предназначена для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от микробиологических, биологических возбудителей в воздухе помещений, а также в зоне открытого помещения и в случае содержания источника в воздухе менее 17% от объема (показатель закрытия емкости и т.п.).
При применении людьми с бородой, щетиной, бородками, протектующими плотную прилегающую маску-респиратор ГАГАРА®, не рекомендуется.

Правила использования
Маска-респиратор ГАГАРА® является средством индивидуальной защиты. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть маску-респиратор ГАГАРА® перед использованием на наличие дефектов. Вынуть маску-респиратор ГАГАРА® из упаковки и расправить изделие. Проверить посадку, надеть маску-респиратор ГАГАРА®, завести эластичные ремни крепкими подпоясывающими их на уровне плечевой и запястной части головы. Обхват под подбородком должен быть равномерным, равномерно расправить края маски-респиратора ГАГАРА® на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтюратора (прилегания).
Проверить маску-респиратор ГАГАРА® на плотность прилегания: не сдвинув маску-респиратор, полностью накрыть ее обхватом руками и сделать резкий вдох. Если воздух просачивается по краям маски-респиратора, отрегулировать положение крепления. Проверить прокладку маски-респиратора на плотность прилегания.
Маска-респиратор подлежит замене в случае ее повреждения. Маска-респиратор ГАГАРА® является одноразовым средством защиты, не подлежит чистке и дезинфекции.

Правила, условия и сроки хранения
Маска-респиратор ГАГАРА® до использования должна храниться в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от воздействия атмосферных осадков и прямых лучей солнца, при температуре окружающей среды от -30°C до +10°C и относительной влажности до 80%.

Требования к транспортированию
Транспортирование маски-респиратора ГАГАРА® возможно в виде изделия, транспортируемого в виде транспорта. При этом маски-респираторы ГАГАРА® должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Требования по утилизации
Маски-респираторы ГАГАРА® после их использования по назначению утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/7295 от 21.06.2016



МАСКА - РЕСПИРАТОР

Маска-респиратор ГАГАРА защищает от аллергенов, бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

Изготовитель:
ООО «Респираторный комплекс»
РФ 158679, Ленинградская обл.
Волосовский р-н, п.г.т. Морозово
ул. Чекалова, д. 3, здание 502
Тел./факс: +7(812) 703-37-33
zakaz@rpkzdr.ru, www.rpkzdr.ru



РСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС



Годен до:



Основные маски-респираторы от маркированной упаковки

Маска-респиратор

Средство защиты

Фильтрует воздух, не допускает попадания микроорганизмов в дыхательные пути

Медицинская маска

Средство гигиены

Задерживает капли слюны и мокроты при чихании и кашле

