

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

И.Н. Серебрякова

«19» апреля 2018 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

Маска-респиратор
GAGARA®

ТУ 32.50.50-003-65525370-2016

Маска-респиратор GAGARA® представляет собой многослойную полумаску конвертного типа двойного сложения с эластичными ремнями крепления.

Маска-респиратор GAGARA® является медицинским изделием. Код вида медицинского изделия 181830.

Маска-респиратор GAGARA® относится к 1 классу потенциального риска как изделие с низкой степенью риска, так как является неинвазивным МИ и применяется как механический барьер, препятствующий проникновению всех видов аэрозолей, включая микробиологические, в органы дыхания пользователя.

При применении маски-респиратора GAGARA® в соответствии с указаниями по эксплуатации и эксплуатационной документацией риски отсутствуют.

Маска-респиратор GAGARA® относится к нестерильным изделиям.

Область применения

Маска-респиратор GAGARA® предназначена для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от микроорганизмов, биологических жидкостей и взвешенных в воздухе частиц во время медицинских, хирургических, стоматологических и изоляционных процедур, в том числе для профилактики заболеваний передающихся воздушно-капельным путем, в качестве защитного барьера.

В домашних условиях маска-респиратор GAGARA® применяется населением при проведении медицинских процедур, а также в профилактических целях при уходе за больными.

Обозначение маски-респиратора GAGARA®

Маски-респираторы GAGARA® маркируют в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015.

Показания и противопоказания

Показанием к применению маски – респиратора GAGARA® является наличие микроорганизмов, биологических жидкостей и взвешенных частиц во вдыхаемом воздухе. Противопоказание к применению маски-респиратора GAGARA®: нельзя применять маску-респиратор, имеющую сквозные отверстия, для защиты от высокотоксичных веществ, вредных паров и газов, а также в зоне открытого пламени и в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.).

При применении людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию маски-респиратора GAGARA®, ее эффективность снижается.

Правила использования

Маска-респиратор GAGARA® является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть маску-респиратор GAGARA® на наличие дефектов. Вывести концы ремней крепления из зацепов и расправить изделие. Завести эластичные ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть маску-респиратор GAGARA®. Зафиксировать ремни крепления на уровне теменной и затылочной части головы. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края маски-респиратора GAGARA® на лице для исключения подсоса воздуха по полосе obturation (прилегания).

Проверить маску-респиратор GAGARA® на плотность прилегания: не сдвигая маску-респиратор, полностью накрыть ее обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям маски-респиратора, отрегулировать положение крепления. Повторить проверку маски-респиратора на плотность прилегания.

Маска-респиратор GAGARA® является одноразовым средством защиты, не подлежит чистке и дезинфекции.

Маска-респиратор подлежит замене в случае ее повреждения.

Правила, условия и сроки хранения

Маска-респиратор GAGARA® до использования должна храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от - 30°C до +70°C и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончания срока годности смотрят на упаковке.



Требования утилизации

Маски-респираторы GAGARA® после их использования по назначению утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, городской поселок

им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3, здание 592

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: siz@szpe.ru, www.rkszpe.ru

Прошито и пронумеровано

На 02 листах
Копия верна

Генеральный директор
ООО «Респираторный комплекс»

Астахов В.С.

