

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ


Рулоны и пакеты для паровой и газовой стерилизации Steri-Dual ECO

1. Введение

Компания 3М предлагает рулоны плоские и со складкой Steri-Dual ECO, пакеты плоские и со складкой Steri-Dual ECO предназначенные для использования во время стерилизации в медицинских учреждениях.

2. Описание изделия

Рулоны и пакеты для паровой и газовой стерилизации Steri-Dual ECO представляют собой устойчивую к нагреванию стерилизационную упаковку.

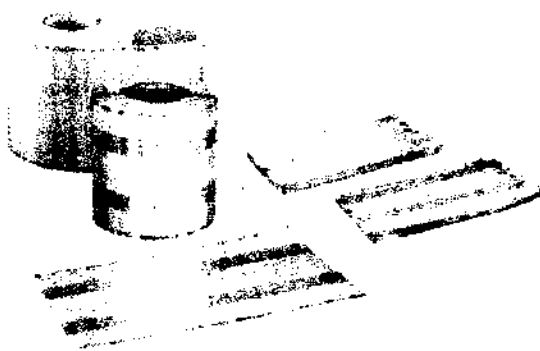

Представлены в следующем ассортименте:

1. Рулон плоский для паровой и газовой стерилизации Steri-Dual ECO,
2. Рулон со складкой для паровой и газовой стерилизации Steri-Dual ECO,
3. Пакет плоский для паровой и газовой стерилизации Steri-Dual ECO,
4. Пакет со складкой для паровой и газовой стерилизации Steri-Dual ECO.



Рулоны и пакеты Steri-Dual ECO используются как упаковочный материал для инструментов при паровой и газовой стерилизации.

Имеют в своем составе:

Медицинская крафт-бумага с одной стороны и пластиковая пленка с другой.

Наличие прозрачной плёнки обеспечивает лёгкость идентификации упакованных изделий.

Рулоны для стерилизации запечатывают с помощью термосварочного аппарата. Таким образом, из рулонов получаются пакеты для стерилизации. С помощью специальных режущих устройств нарезают отрезки, соответствующие длине изделий, подлежащих упаковыванию, с учётом запаса на свободное размещение изделия и ширину швов. Одну сторону запечатывают с помощью термосварочного аппарата. Правильно выполненный термошов должен быть не менее прочным, чем готовые боковые швы, при этом бумага и полимерная плёнка не должны быть прожжены.

3. Использование по назначению

Пакеты Steri-Dual ECO готовы для использования.

Рулоны Steri-Dual ECO следует нарезать на куски и герметично запечатать их с одного конца перед заполнением.

При использовании пакетов необходимо запечатать острые концы инструментов защитным вкладышем, чтобы избежать прокола или разрезание пакета. Затем готовые пакеты укладываются в стерилизационную камеру.

Чтобы открыть пакет, большим и указательным пальцами одной руки держите за его пластиковую сторону, а большим и указательным пальцами другой руки тяните за край бумажной стороны.

Стерилизационные рулоны и пакеты Steri-Dual ECO используют при паровой, этилен оксидной и формальдегидной стерилизации.



На бумажной стороне рулонов и пакетов нанесены индикаторы, которые позволяют различить готовность процесса стерилизации. На каждом пакете и на рулонах нанесены 3 индикаторные полоски: для паровой, этилен-оксидной и формальдегидной стерилизации.

Запрещается заполнять пакеты более чем на 75% от их объема.

Таблица №1 - Изменение цвета химического индикатора.

Вид стерилизации		Реакция
Газовая	Формальдегидная	цвет изменяется с розового на зеленый
	Этилен оксидная	цвет изменяется с голубого/зеленого на желтый
Паровая		цвет изменяется с розового на коричневый

4. Техническое обслуживание и ремонт.

Рулоны и пакеты Steri-Dual ECO не подлежат ремонту и техническому обслуживанию.

5. Хранение

Температура хранения: от 15°C до 30°C. Температура транспортировки: аналогично хранению.

6. Срок годности

Срок годности 5 лет.

7. Транспортирование

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта, упакованные изделия помещаются в транспортную тару – картонные коробки. На транспортной таре должен быть нанесен логотип 3М и название продукта.

8. Утилизация

Соблюдайте местные правила утилизации отходов.

9. Гарантийные обязательства производителя

Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.

Руководитель
технической группы
регистрации/сертификации
ЗАО «3М Россия»
Мазурова Н.В.

«06» _____ 2011

