


УТВЕРЖДАЮ
Ген. директор
ООО «Крафтвэй Медикал»

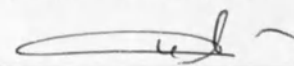

Комолова Е.В.

«20» декабря 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование изделия:

Экраны и очки защитные в наборах:

Экраны защитные Dia-100FS (экран защитный (5 шт.), рамка (1 шт.), упор для носа (1 шт.), упор для ушей (1 шт.))

Очки защитные Dia-100SS (очки защитные (5 шт.), рамка (1 шт.), упор для носа (1 шт.), упор для ушей (1 шт.))

Очки защитные Dia-300i (очки защитные (1 шт.), салфетка (1 шт.), шнурок (1 шт.))

Очки защитные Dia-400D (очки защитные (1 шт.), салфетка (1 шт.), шнурок (1 шт.))

Очки защитные в отдельной упаковке:

Очки защитные Dia-200B

Принадлежности:

Сменный защитный экран (5 шт.)

Сменные пластинки для защитных очков (5 шт.)

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Экран защитный Dia-100FS предназначен для защиты глаз и лица врача от попадания инородных частиц. Защитные очки Dia-100SS, Dia-200B и Dia-300i предназначены для защиты глаз врача во время работы от попадания инородных частиц. Защитные очки Dia-400D являются очками, защищающими глаза врача от излучения ламп для световой полимеризации композита.

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

Экраны защитные Dia-100FS: закрепите на рамке упоры для носа и ушей. После чего закрепите на рамке защитный экран. Наденьте экран. Под экран можно надевать свои оптические очки с диоптриями.

Очки защитные Dia-100SS: перед началом работы наденьте очки.

Очки защитные Dia-300i: перед началом работы наденьте очки. При необходимости перед работой зафиксируйте шнурок на дужках оправы очков.

Очки защитные Dia-400D: перед началом работы наденьте очки. При необходимости перед работой зафиксируйте шнурок на дужках оправы очков.

Очки защитные Dia-200B: перед началом работы наденьте очки. Под очки можно надевать свои оптические очки с диоптриями.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от -10°C до +40°C, влажности от 30 до 85%, атмосферном давлении от 70 до 106 кПа. Не хранить вблизи источников теплового излучения. Не допускать прямого попадания солнечных лучей.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DiaDent Group International.

19-9, Songjung-dong, Heungduk-gu, Cheongju, 361-290 Choongchong Buk-do, South Korea.
626, Yeonje-ri, Gangoe-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheong buk-do, South Korea, 363-951.
P.O Box 35 Cheongju si 360-600 Choongchong Buk-do, Korea.
Tel. / Fax: 82-43-266-2315, 82-43-262-8658

ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 2 ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО КРАФТВЭЙ МЕДИКАЛ

Е.В. Капорова

