


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Крафтвэй Медикал»

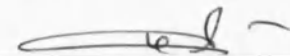

Комолова Е.В.

«20» декабря 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ретракторы стоматологические:

Retractor (Type A)

Cheek Retractor (Type B)

X-RAY FILM HOLDER

Принадлежности:

SILICONE GRIPS

ID-RINGS

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Изделия Retractor (Type A) и Cheek Retractor (Type B) представляют собой стоматологические ретракторы, предназначенный для оттеснения губ и щек во время манипуляций в полости рта. Изделие X-RAY FILM HOLDER предназначено для удержания рентгеновской пленки.

SILICONE GRIPS надеваются на рукоятки инструментов, благодаря чему становится удобнее удерживать инструмент в руке и работать им.

ID-RINGS надеваются на рукоятки инструментов для их цветовой маркировки.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При установке Retractor (Type A) и Cheek Retractor (Type B) в полости рта обращайте внимание на то, что бы губы и щеки не оказались зажатыми ретрактором. В случае сильного дискомфорта попросите пациента самого поправить положение ретрактора таким образом, что бы он ему не мешал.

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:

Две части Retractor (Type A) заводятся за губы и щеки и поддерживают их во время манипуляций врача в полости рта и во время фотографирования. Ретрактор Cheek Retractor (Type B) устанавливается в полости рта, и он также поддерживает губы и щеки во время манипуляций в полости рта и во время фотографирования.

X-RAY FILM HOLDER удерживает рентгеновскую пленку и применяется для осуществления рентгенологических снимков как в переднем, так и в боковом отделе.

SILICONE GRIPS надеваются на рукоятки инструментов, благодаря чему становится удобнее удерживать инструмент в руке и работать им.

ID-RINGS одеваются на рукоятки инструментов для их цветовой маркировки.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Не хранить вблизи источников теплового излучения. Хранить в сухом месте, при температуре 10°C - 30°C. Не допускать прямого попадания солнечных лучей.

Транспортировка осуществляется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Следует избегать повышенной влажности (более 70%).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DiaDent Group International.

19-9, Songjung-dong, Heungduk-gu, Cheongju, 361-290 Choongchong Buk-do, South Korea.
626, Yeonje-ri, Gangoe-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheong buk-do, South Korea, 363-951.
P.O Box 35 Cheongju si 360-600 Choongchong Buk-do, Korea.
Tel. / Fax: 82-43-266-2315, 82-43-262-8658