


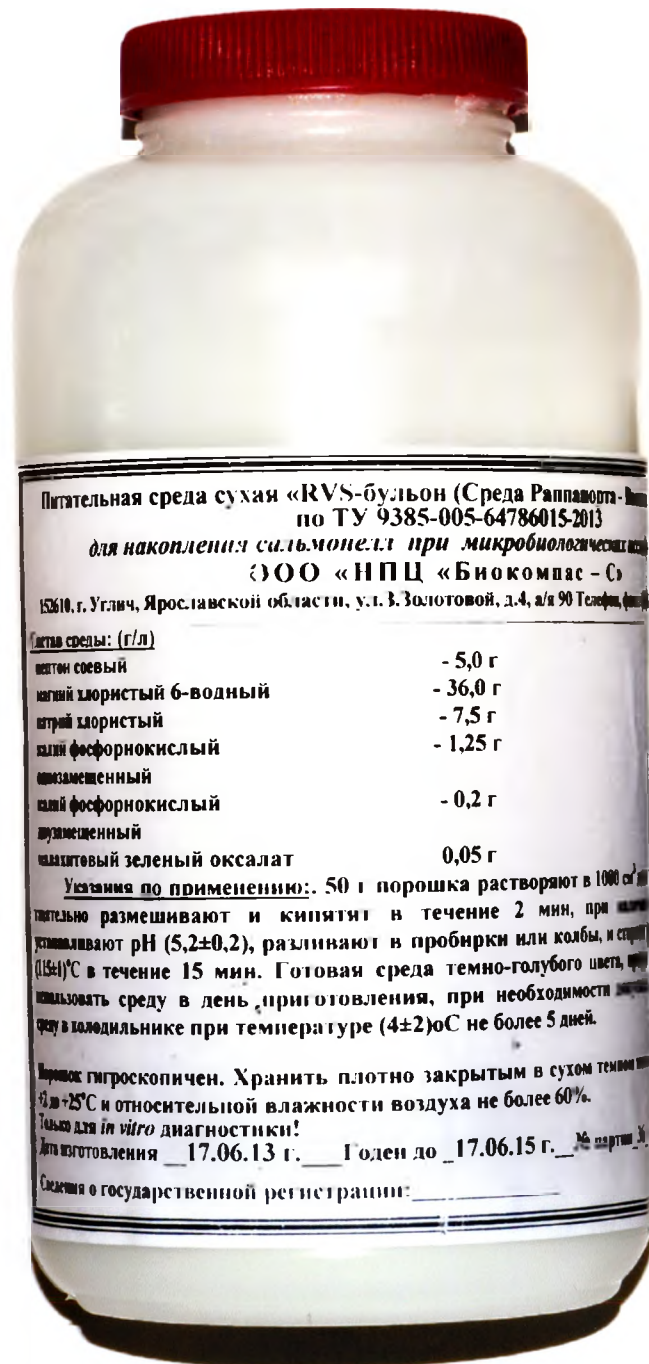


Питательная среда сухая «RVS-бульон (Среда Раппапорта -
по ТУ 9385-005-64786015-2013
для накопления сальмонелл при микробиологическом исследовании
ООО «НПЦ «Биокомпас - С»
153610, г. Углич, Ярославской области, ул. В. Золотовой, д.4, а/я 90 Телефон, факс

Состав среды: (г/л)	
экстракт соевый	- 5,0 г
натрий хлористый 6-водный	- 36,0 г
натрий хлористый	- 7,5 г
калий фосфорнокислый однозамещенный	- 1,25 г
калий фосфорнокислый двухзамещенный	- 0,2 г
калий дихромат	- 0,05 г
калий дихромат	- 0,05 г

Указания по применению: 50 г порошка растворяют в 1000 мл воды, тщательно размешивают и кипятят в течение 2 мин, при этом устанавливают pH ($5,2 \pm 0,2$), разливают в пробирки или колбы, и стерилизуют при температуре $(115 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 15 мин. Готовая среда темно-голубого цвета, при использовании среду в день приготовления, при необходимости хранить среду в холодильнике при температуре $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 5 дней.

Продукт гигроскопичен. Хранить плотно закрытым в сухом темном месте при $(15 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 60%.
Только для *in vitro* диагностики!
Дата изготовления 17.06.13 г. Годен до 17.06.15 г. № партии 2013
Сведения о государственной регистрации:

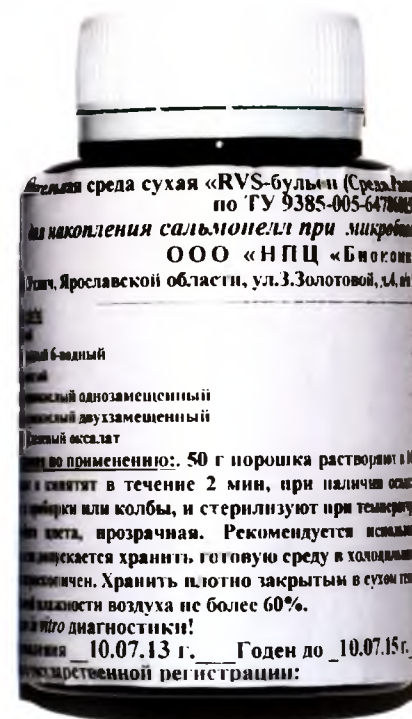

Питательная среда сухая «RVS-бульон (Среда Раппапорта -
по ТУ 9385-005-64786015-2013
для накопления сальмонелл при микробиологическом исследовании
ООО «НПЦ «Биокомпас - С»
153610, г. Углич, Ярославской области, ул. В. Золотовой, д.4, а/я 90 Телефон, факс

Состав среды: (г/л)	
экстракт соевый	- 5,0 г
натрий хлористый 6-водный	- 36,0 г
натрий хлористый	- 7,5 г
калий фосфорнокислый однозамещенный	- 1,25 г
калий фосфорнокислый двухзамещенный	- 0,2 г
калий дихромат	- 0,05 г
калий дихромат	- 0,05 г

Указания по применению: 50 г порошка растворяют в 1000 мл воды, тщательно размешивают и кипятят в течение 2 мин, при этом устанавливают pH ($5,2 \pm 0,2$), разливают в пробирки или колбы, и стерилизуют при температуре $(115 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 15 мин. Готовая среда темно-голубого цвета, при использовании среду в день приготовления, при необходимости хранить среду в холодильнике при температуре $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 5 дней.

Продукт гигроскопичен. Хранить плотно закрытым в сухом темном месте при $(15 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 60%.
Только для *in vitro* диагностики!
Дата изготовления 10.07.13 г. Годен до 10.07.15 г. № партии 2013
Сведения о государственной регистрации: