

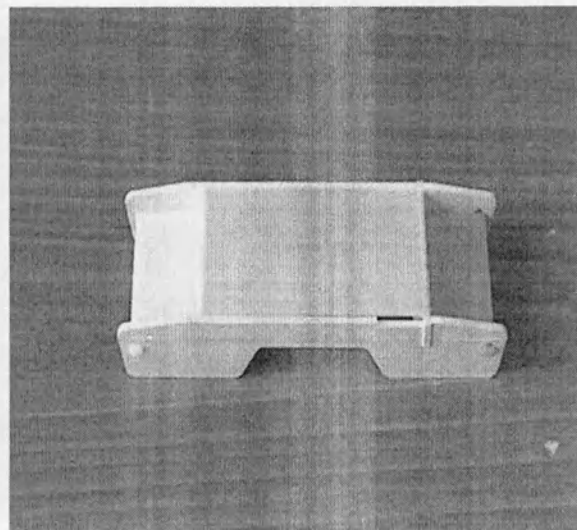


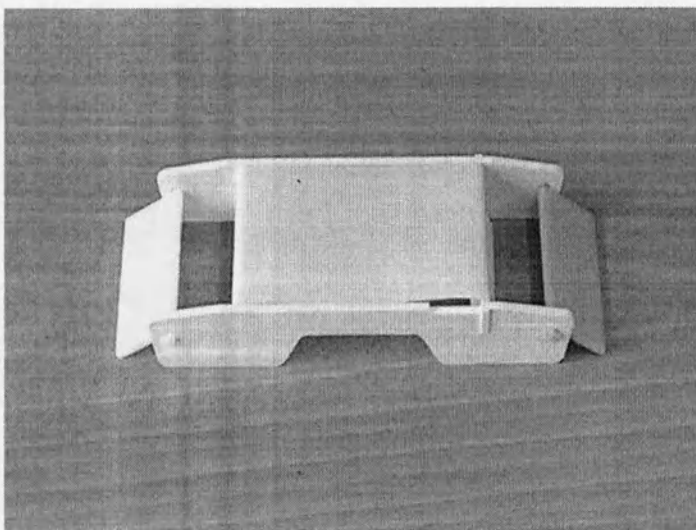

То же проделать еще с двумя пленками и закрепить в мостиках с красным и зеленым замками.

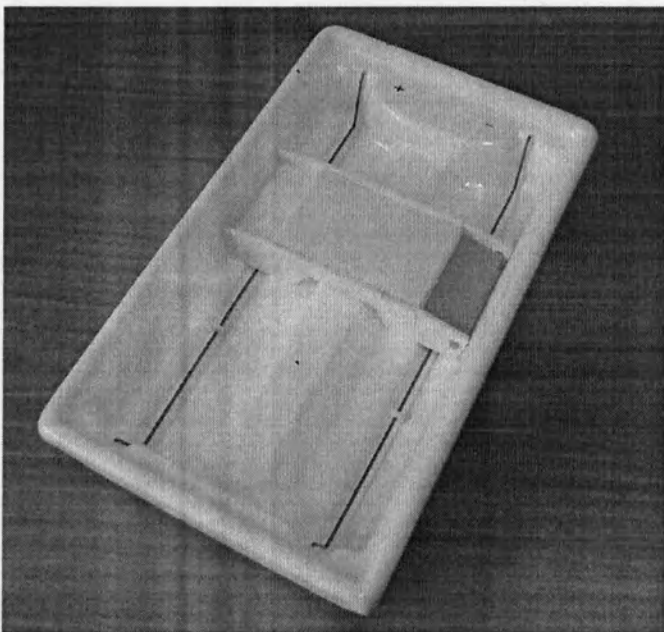

Мостики с закрепленными в них пленками установить в камере деления так, чтобы цветные замки совпадали с меткой «—» камеры.

Включить источник питания согласно пункту 5.1.1.

Закрывать крышку камеры и нажать кнопку ПУСК, начав процедуру *префореза*. Через 10 минут нажать кнопку СТОП. Данная операция позволяет устранить неоднородное пропитывание и недостатки отжимания ацетатцеллюлозной пленки.

