

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Энергия»



Т. В. Раковец

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контейнер полимерный для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г, одноразовый по ТУ 32.50.50-002-13028158-2017

Варианты исполнения:

1. Емкость-контейнер «ЭНЕРГИЯ» для сбора острого инструментария и органических отходов классов А, Б, В, Г, одноразовая, объемом, л: 0,03; 0,06; 0,1; 0,125; 0,18; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,43; 4,45; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11,5; 12; 15; 20; 35; 40; 45; 55; 60; 65; 70; 80; 100; 120; 240; 360; 660; 1100 (вид 123680, 257280);
2. Емкость-контейнер «ЭНЕРГИЯ» для временного хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г, одноразовая, объемом, л: 0,03; 0,06; 0,1; 0,125; 0,18; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,43; 4,45; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11,5; 12; 15; 20; 35; 40; 45; 55; 60; 65; 70; 80; 100; 120; 240; 360; 660; 1100 (вид 123680);
3. Емкость-контейнер «ЭНЕРГИЯ» для сбора острого инструментария и органических отходов классов А, Б, В, Г, одноразовая, с подставкой/ держателем, объемом, л: 0,03; 0,06; 0,1; 0,125; 0,18; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,43; 4,45; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11,5; 12; 15; 20; 35; 40; 45; 55; 60; 65; 70; 80; 100; 120; 240; 360; 660; 1100 (вид 123680, 257280).

Контейнер полимерный для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г, одноразовый**ТУ 32.50.50-002-13028158-2017****Назначение и краткое описание:**

Контейнер предназначен для сбора, временного хранения и транспортирования отходов образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

Контейнеры выпускаются объемом от 0,03 л до 1100 л, желтого, белого, черного и красного цвета. Толщина стенки контейнера не менее 0,6 мм.

Вариант исполнения и объем контейнера указан на этикетке.

Контейнер - изделие одноразового использования.

Контейнер соответствует требованиям: ТУ 32.50.50-002-13028158-2017, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 33756, СанПиН 2.1.7.2790.

Алгоритм сбора острого инструментария:

1. Возьмите контейнер нужного цвета (в зависимости от класса собираемых отходов);
2. Возьмите маркировочную наклейку и заполните ее, в целях соблюдения СанПиН 2.1.7.2790;
3. Наклейте заполненную маркировочную наклейку на контейнер;
4. Контейнер на две трети заполните дезинфицирующим средством;
5. Крышку зафиксируйте на контейнере, закрыв ее плотно до щелчка, отверстие для снятия игл при этом должно быть открытым. Крышка оснащена замком, обеспечивающим герметичность, индикатором вскрытия. Контейнер готов к использованию!
6. В процессе сбора игл крышка должна находиться в верхнем положении фиксатора;
7. Выполните инъекцию, поднесите шприц с иглой к контейнеру;
8. Опустите кончик иглы в отверстие емкость-контейнера, наберите дезраствор в шприц и выпустите его через иглу обратно в контейнер.
9. Зацепите канюлю иглы в наиболее удобной выемке на вставке и не выдергивая вставку, а используя ее поверхность как опору и рычаг, аккуратным движением освободите шприц от иглы. Игла, при этом должна упасть в дезраствор.
10. Заполните контейнер иглами на $\frac{3}{4}$;
11. Прикройте отверстие для игл;
12. Выдержите время экспозиции дезинфицирующего средства, после чего жидкость слейте через отверстие для снятия игл;
13. Отверстие для снятия игл закрыть заглушкой. Проследите за тем, чтобы при закрытии крышки произошел глухой щелчок;
14. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

Алгоритм сбора органических и других отходов:

1. Возьмите контейнер нужного цвета (в зависимости от класса собираемых отходов);
2. Возьмите маркировочную наклейку и заполните ее, в целях соблюдения СанПиН 2.1.7.2790;
3. Наклейте заполненную маркировочную наклейку на контейнер;
4. Заполните контейнер на $\frac{3}{4}$;
5. Закройте крышку плотно до щелчка;
6. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

При сборе медицинских отходов запрещается:

1. Снимать ручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;
2. Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одной емкости в другую;
3. Утрамбовывать отходы;
4. Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

5. Использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;

6. Устанавливать одноразовые контейнеры для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

Противопоказания применения, побочные эффекты: отсутствуют, при условии сбора отходов строгим соблюдении требований СанПиН 2.1.7.2790 и настоящей инструкции.

Условия хранения и транспортирования

Хранение контейнеров должно производиться в упаковке изготовителя в складских помещениях с температурой воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажностью воздуха от 50 до 80 %. Допускается хранение контейнеров в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °С не более 1 месяца.

Контейнеры должны храниться на стеллажах, расположенных от отопительных и нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

При транспортировании: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С, относительная влажность 98 % при 25 °С.

Транспортирование контейнеров должно производиться во всех видах закрытых транспортных средств (кроме неотапливаемых негерметичных отсеков самолётов) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, с защитой от атмосферных осадков и ударов при погрузке и выгрузке.

После транспортирования в условиях отрицательных температур контейнеры, упакованные в транспортную тару, должны быть выдержаны 3 часа в помещении с температурой окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

Комплект поставки

- контейнер (емкость – 1 шт., крышка – 1 шт.) – 1 шт.;
- этикетка (наклейка для заполнения в месте сбора отходов) – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- подставка/держатель (в зависимости от варианта исполнения) – 1 шт.;
- иглосъемник (в зависимости от варианта исполнения) – 1 шт.;
- крышка-заглушка (в зависимости от варианта исполнения) – 1 шт.

Утилизация находящихся в эксплуатации контейнеров должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

При эксплуатации контейнеров необходимо руководствоваться маркировочными данными (нанесённой на контейнер маркировкой) и требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

Гарантийный срок хранения контейнеров: 1 год со дня производства.

Производитель:

ООО «Энергия»,

юридический адрес: 420075, Россия, г. Казань, ул. Липатова, дом 37, корпус 15, офис 803

Место производства: 420075, Россия, г. Казань, ул. Липатова, д.37, строение 2/19,

тел. (843)225-77-89, 290-07-89, 225-87-89. www.energy-16.ru, Email: info@energy-16.ru.

Пронумеровано и прошито

на 3 листах

Директор

ООО «Энергия»

Раковец Т.В.

