



Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова 5, а/я 205 5 Kolontsova St. Mytishchi, Moscow region 141009 PO box 205 Russia

Tel: (495) 583-3495, 586-9097, 586-7093 Fax: (495) 583-3613

http://www.uvicom.com

e-mail: uvicom@ropnet.ru

№ _____

Дата _____

Инструкция
по применению « Салфетки углеродные атравматические поверхностно-активные, стерильные «Легиус»

Салфетки «Легиус» - ТУ 9393-006-18070047-2010

Разрешено к медицинскому применению пр. №5 от 23.08.93 МЗ РФ

Показания к применению

- Ожоги
- Пролежни
- Хронические язвы
- Инфицированные раны
- Повреждения мягких тканей

«Легиус» используется при лечении глубоких повреждений мягких тканей. Используется для быстрого закрытия грануляциями костной ткани при открытых переломах. Снимает болевое ощущение.

Перед тем как салфетку накладывают на рану, ее смачивают раствором антисептика. Салфеткой полностью закрывают рану, перекрывая ее приблизительно на 2 см покрывают трубчатым бинтом для фиксации. Рекомендуемая смена повязки при обильном выделении лимфы или некроза – 6 час, при использовании в стадии заживления 2-3 дня до полной эпителизации. Частота перевязок определяется лечащим врачом. Для ускоренного процесса заживления салфетки «Легиус» можно использовать гели или мази не снимая салфетку с раны – это усиливает эффект лечения. Побочных эффектов не наблюдалось, противопоказаний нет.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Генеральный директор
ООО «НПЦ «УВИКОМ»



 Казаков М.Е.