

Инструкция по применению теста "Амниотест" фирмы "Про-Лаб Диагностика" (Канада)

АмниоТест™ предназначен для определения разрыва плодного пузыря у беременных женщин. Разрыв плодного пузыря как правило приводит к попаданию околоплодных вод в заднюю часть влагалища. Присутствие околоплодных вод приводит к повышению уровня pH. Реагент — индикатор pH, как показал опыт, помогает выявить наличие околоплодных вод во влагалище.

Принцип процедуры тестирования

Тампон, пропитанный реагентом "нитразин желтый", должен соприкоснуться со стенкой влагалища в задней его трети. Тампон впитывает жидкость со слизистой влагалища и меняет свой цвет в зависимости от уровня pH во впитавшейся жидкости в пределах от pH 5,5 до pH 7,5.

Околоплодные воды имеют нейтральный уровень pH, а pH среды задней трети влагалища обычно кислый. Уровень pH в задней трети влагалища, равный или выше pH 6,5, говорит о проникновении околоплодных вод.

Реагенты

АмниоТест™ фирмы "Про-лаб" состоит из одноразовых тампонов, пропитанных реагентом "нитразин желтый", каждый в отдельном пакетике. Тампоны простерилизованы гамма-излучением и сохраняют свою стерильность до вскрытия пакетика.

Предупреждения

1. Амниотест™ фирмы "Про-Лаб" предназначен только для диагностики *in vitro*.
2. Нельзя использовать АмниоТест™ после окончания срока годности, указанного на упаковке.
3. После контакта с влагалищем все тампоны должны рассматриваться как потенциально инфекционные. Следует соблюдать меры предосторожности как при работе с микробиологическими материалами.
4. Не допускается повторное использование тампонов.
5. Для получения достоверного результата необходимо строго придерживаться указанных здесь процедур, условий хранения, предупреждений и ограничений.

Необходимые материалы, не входящие в комплект

Влагалищное зеркало

Процедура тестирования

1. Извлеките тест из пакетика. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к тампону и не допускайте попадания на него какой-либо жидкости или вещества.
2. С помощью влагалищного зеркала раздвиньте влагалищные губы, обнажив шейку матки. осторожно введите тампон во влагалище. При введении тампона не допускайте его соприкосновения со слизистой влагалища.
3. Первый и единственный контакт тампона допускается только в задней трети влагалища.
4. Тампон должен находиться в контакте со слизистой задней трети влагалища в течение не менее 15 секунд.
5. Осторожно извлеките тампон и немедленно рассмотрите, в какой цвет окрасился его кончик.

Ограничения процедуры

1. АмниоТест™ фирмы "Про-лаб" должен использоваться только квалифицированным медперсоналом и предназначен как средство для профессионального диагноза.
2. АмниоТест может только указать изменение уровня pH и должен использоваться в строгом соответствии с указанной здесь процедурой тестирования.
3. Лечение антибиотиками и вагинальные инфекции могут повышать уровень pH влагалища, и таким образом давать ложные указания на присутствие околоплодной жидкости. В случае сомнений для исключения влияния инфекции следует провести стандартные микробиологические тесты.

Хранение

Пакетики должны храниться при комнатной температуре (от 15°C до 30°C). Характеристики тампонов при соблюдении этого режима хранения остаются стабильными до истечения срока годности, маркированного на этикетке.

Упаковка

Каждый АмниоТест™ фирмы "Про-лаб" находится в индивидуальном стерильном пакетике. Амниотест является торговой маркой "Про-Лаб Инкорпорейтед".

Регистрационное удостоверение №ФСЗ2007/00094 от 27 июня 2012 г. КВА *

