


Рефракционный стол

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

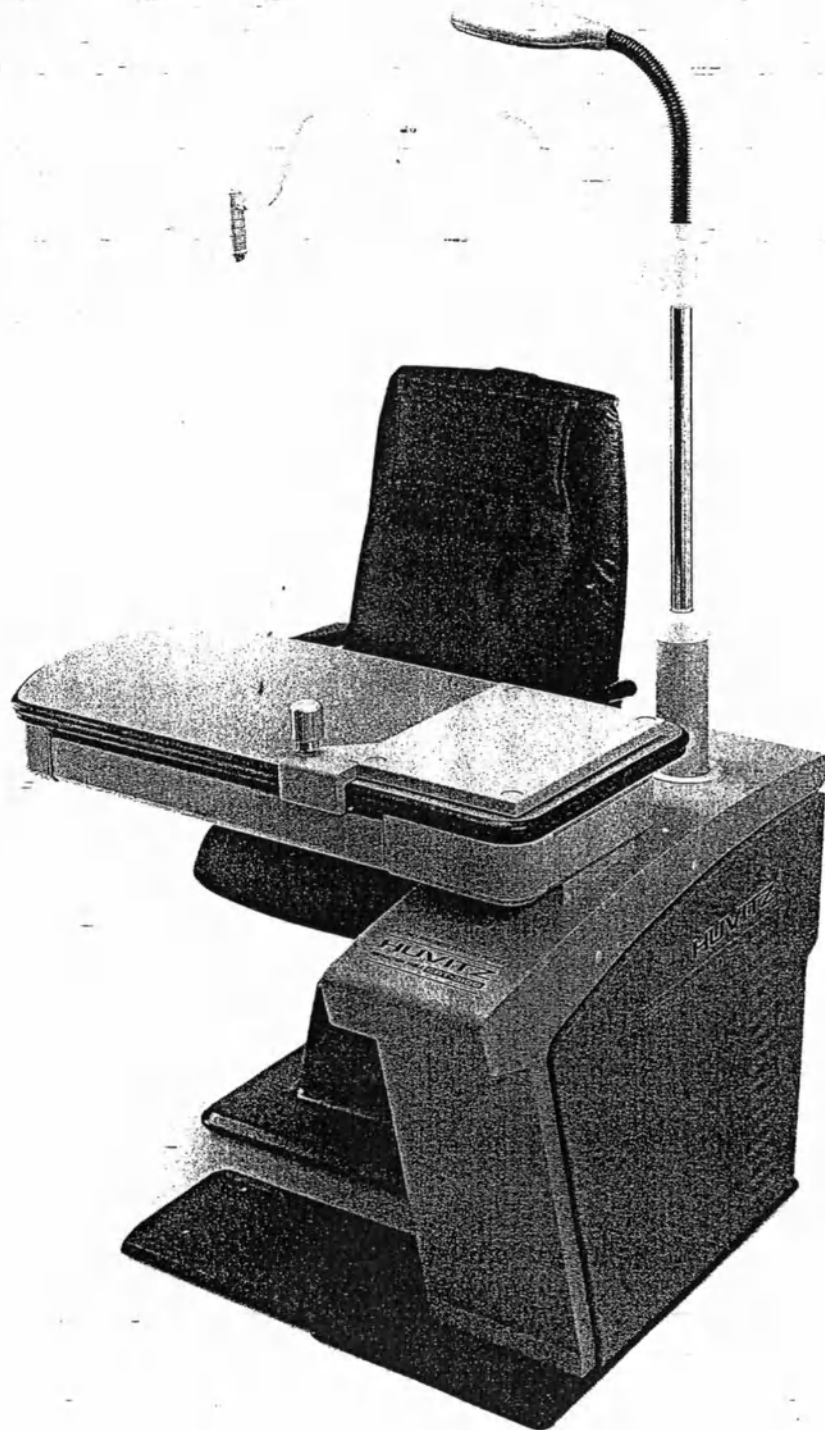


Huvitz




ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


Huvitz

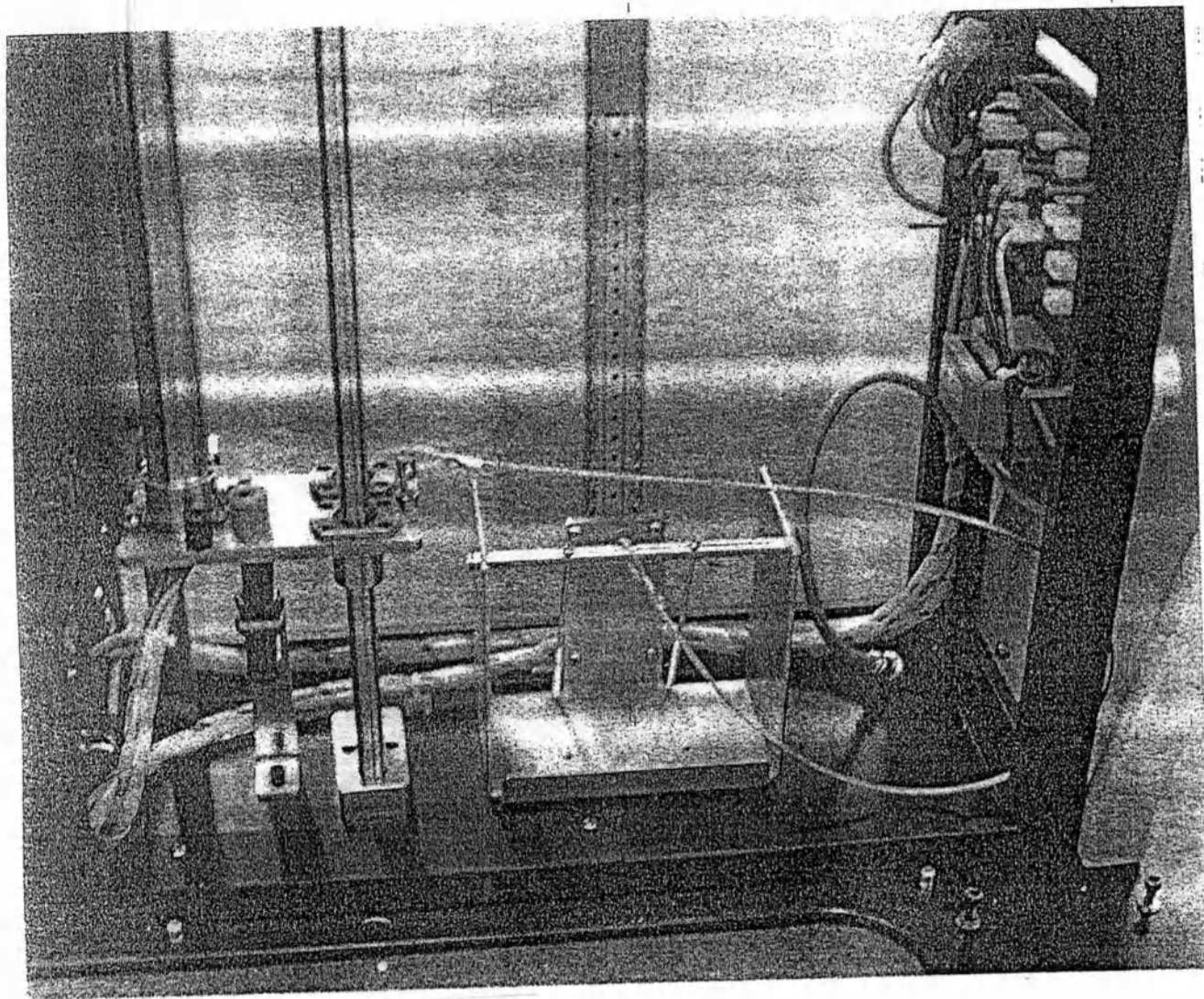

Основная установка

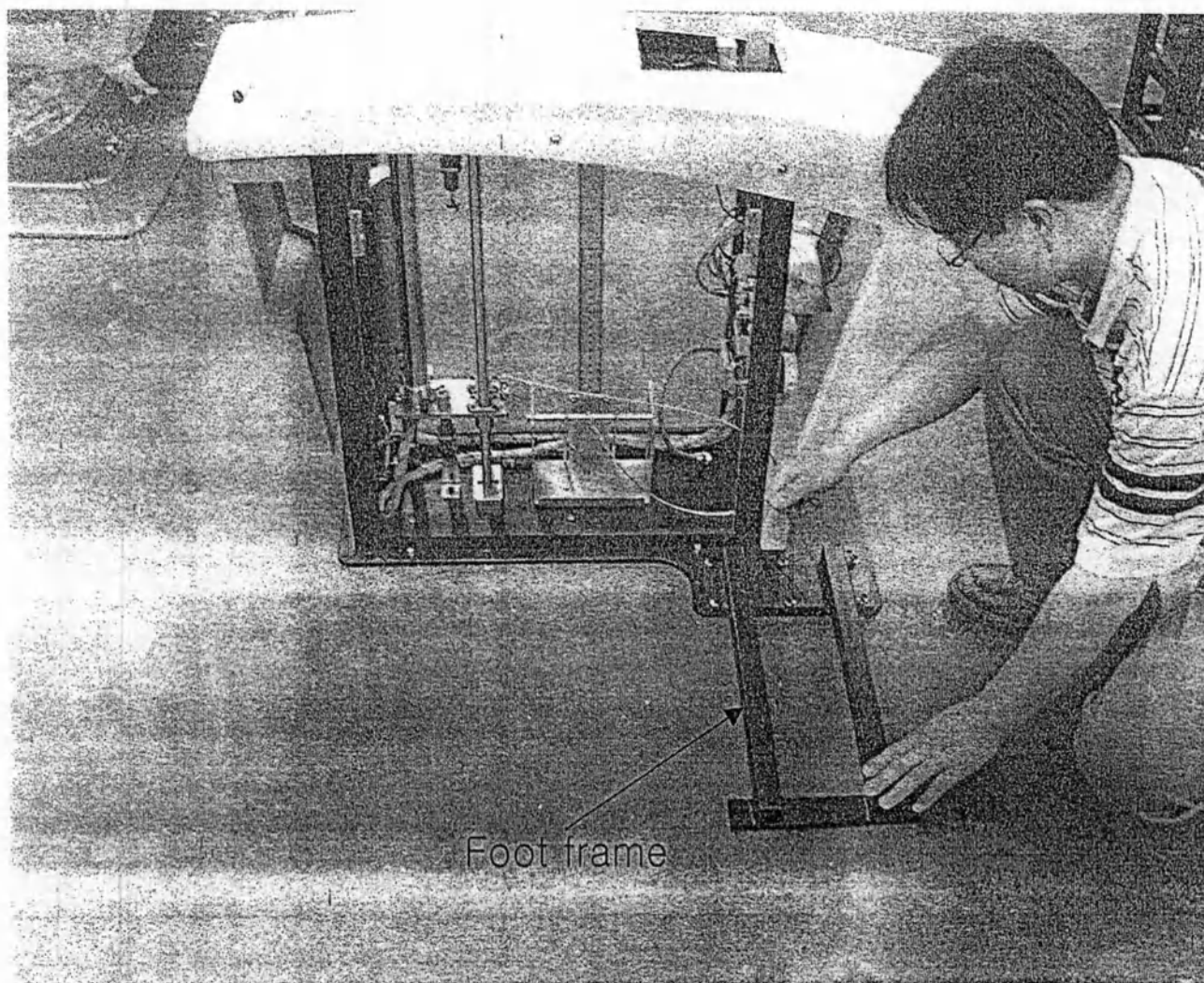


Закрепите ножной каркас, как на фотографии, гаечным ключом М6

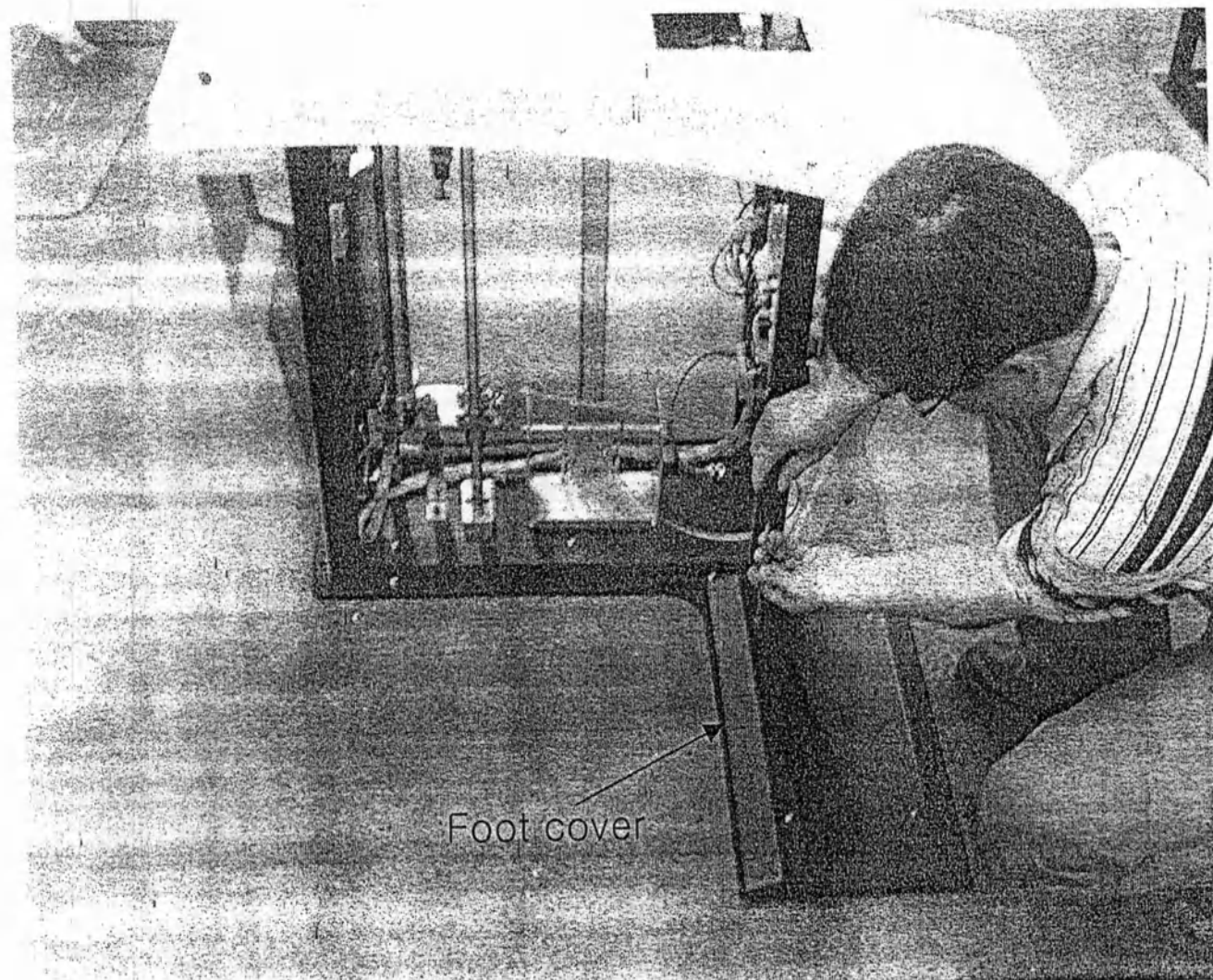

Закройте ножной каркас предназначенной для этого крышкой (Болты М3 включены в комплектацию)




Перекрутите проволоочный канат как показано на рисунке

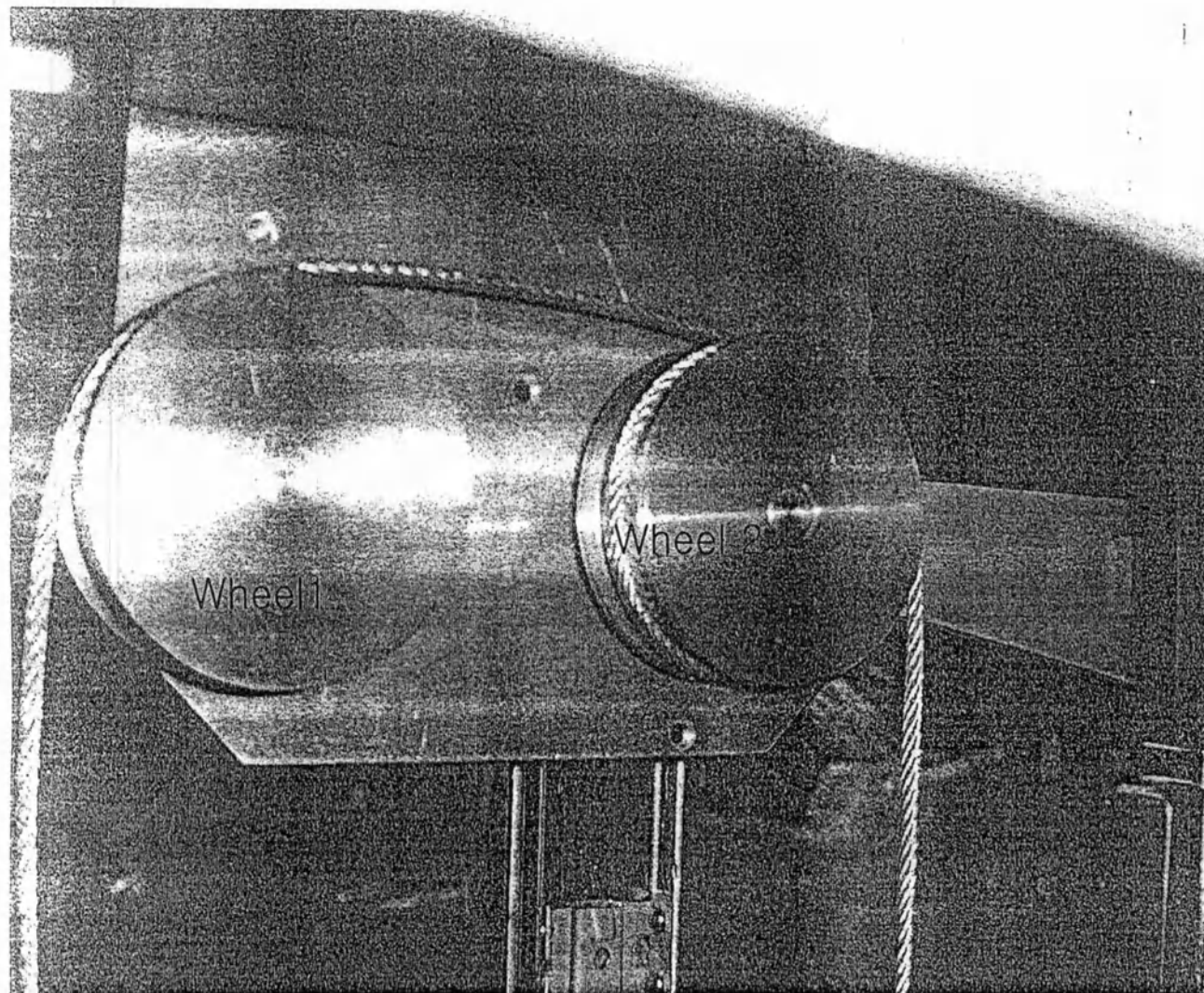

Канат проходит просто сверху Колеса 1, а колесо 2 должно быть обкручено канатом 1 и $\frac{1}{4}$ раза, как на рис. Будьте внимательны в номерах колес. (порядок важен)




Раскройте обкладку кабеля

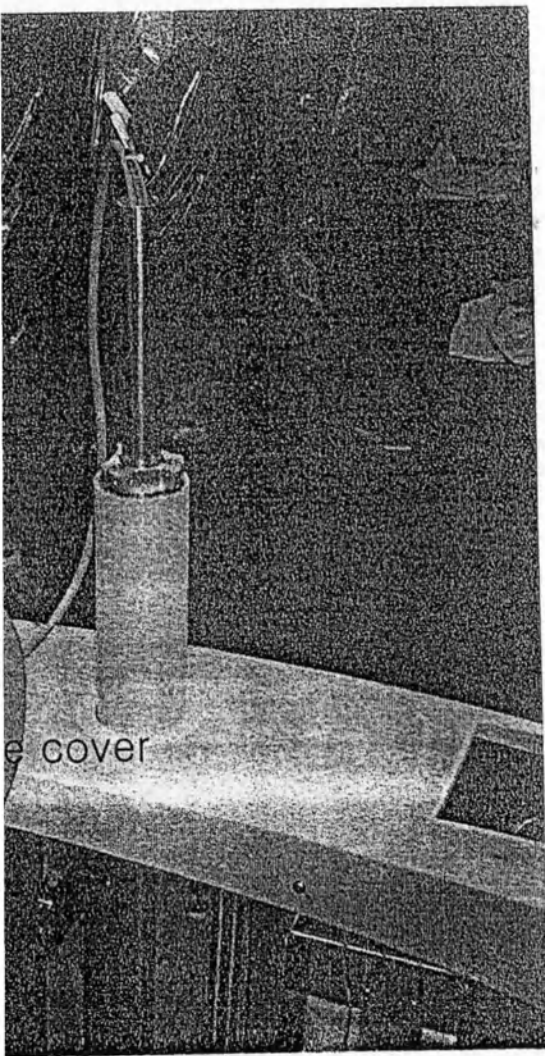


Refractor Arm


Refractor Main Cable(8pin)

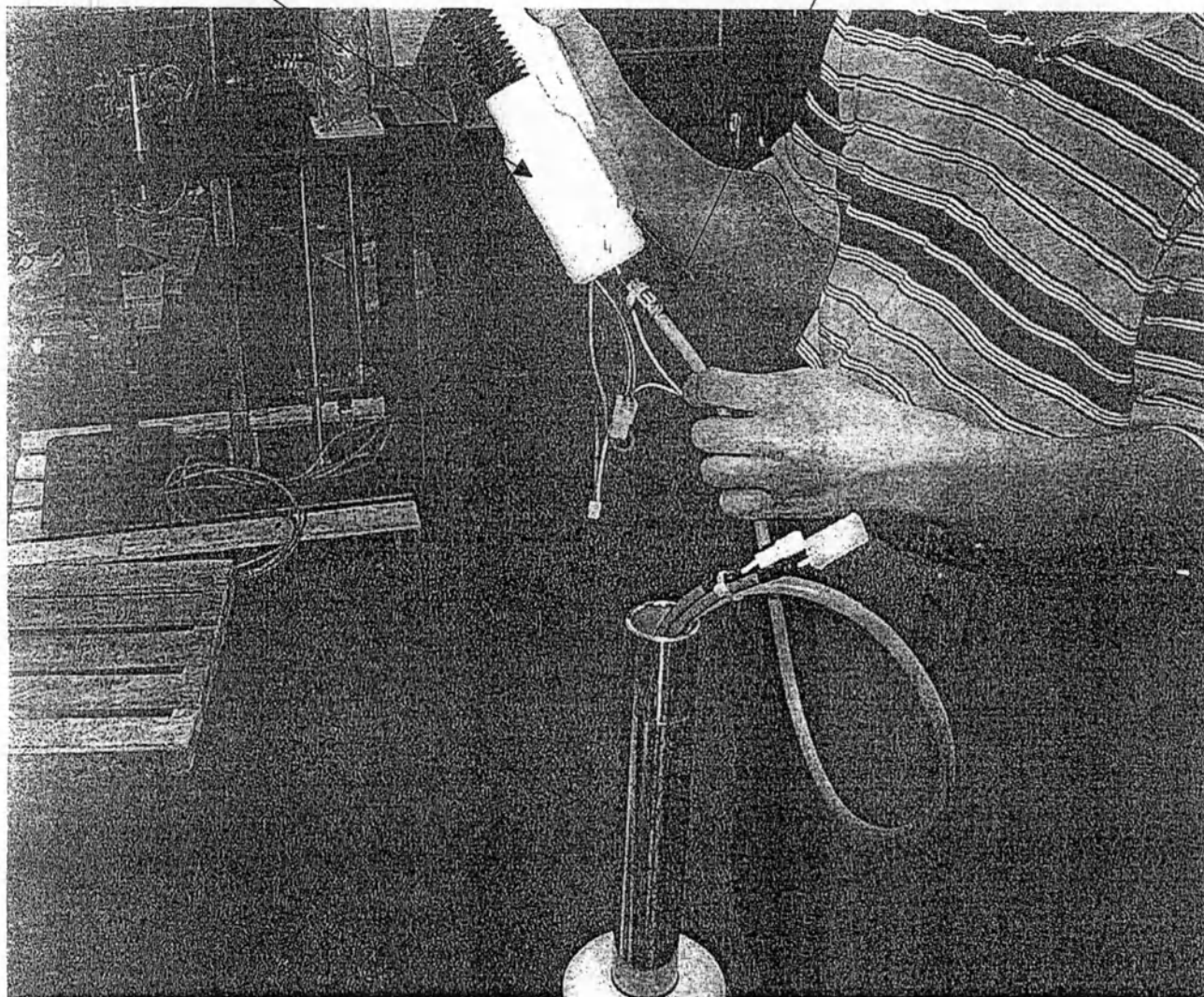


Вставьте Главный кабель рефрактора в рукав рефрактора, как на рис.

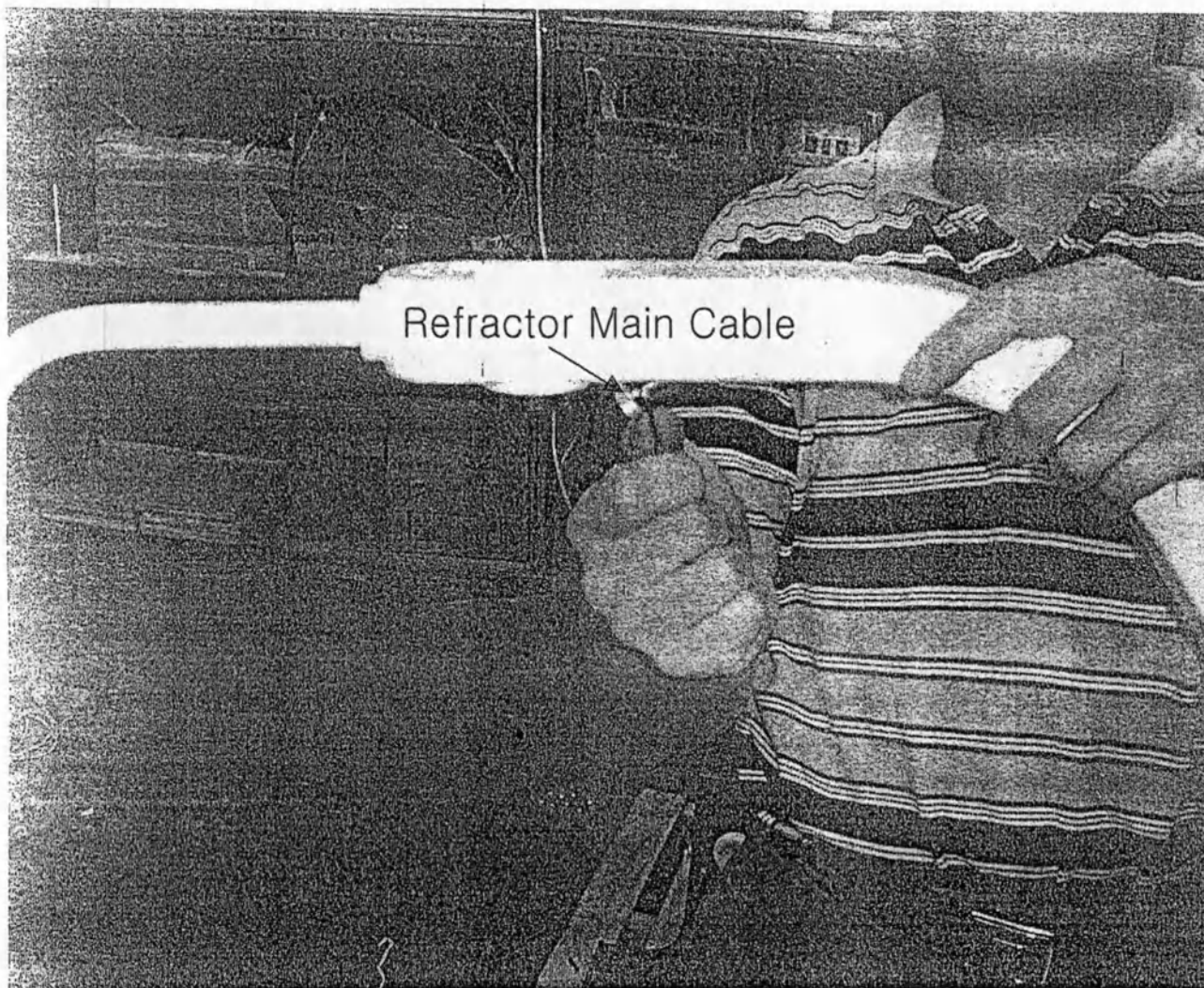


Вытащите Главный кабель рефрактора, как на рис.

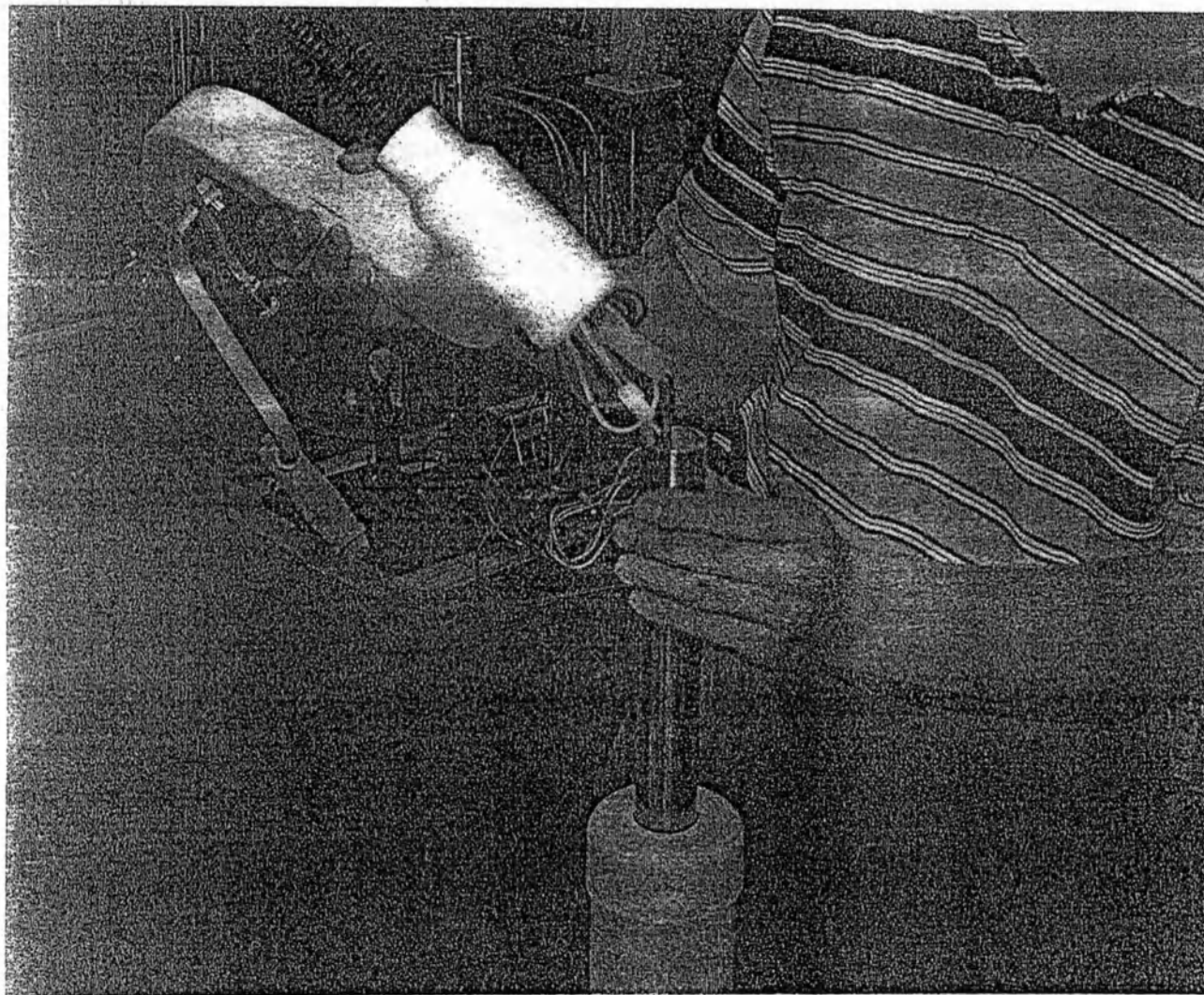

Подключите два соединительных кабеля (Лампа и
Переключатель Вверх-Вниз)

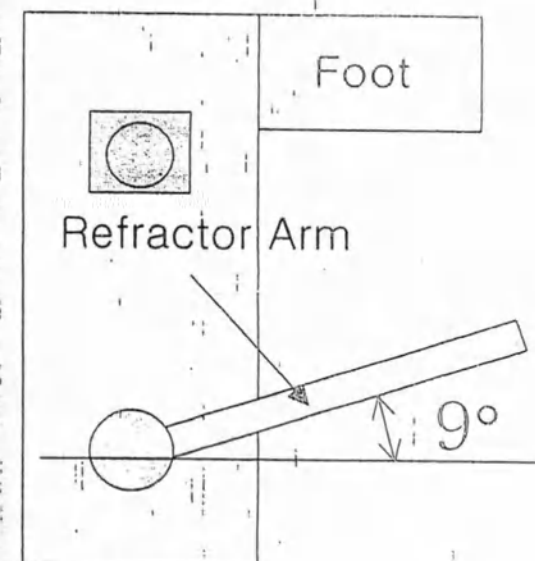


Наденьте рукав на стойку до упора. Затем закрепите установочные винты (4 точки) Следуйте картинке справа. Угол должен быть примерно в 9°

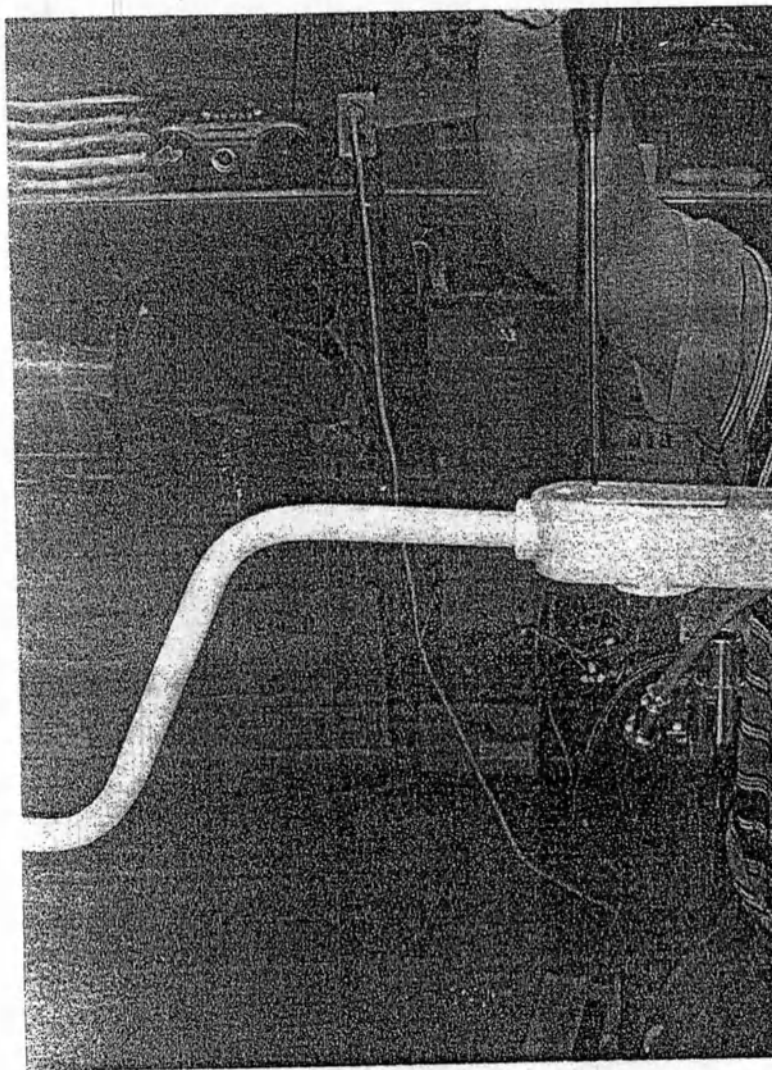


Закрепите крышку кабеля




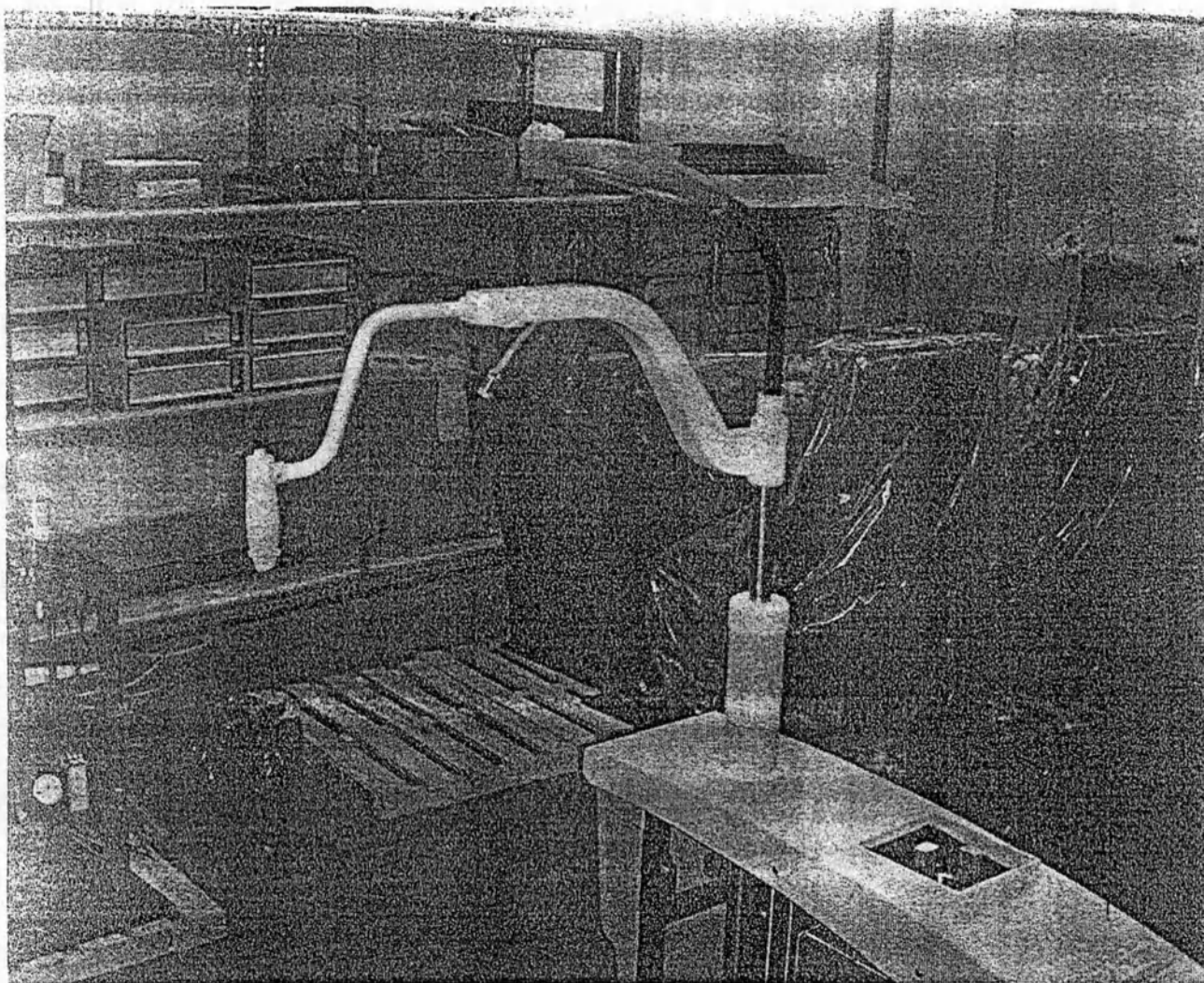


Установленный рукав рефрактора

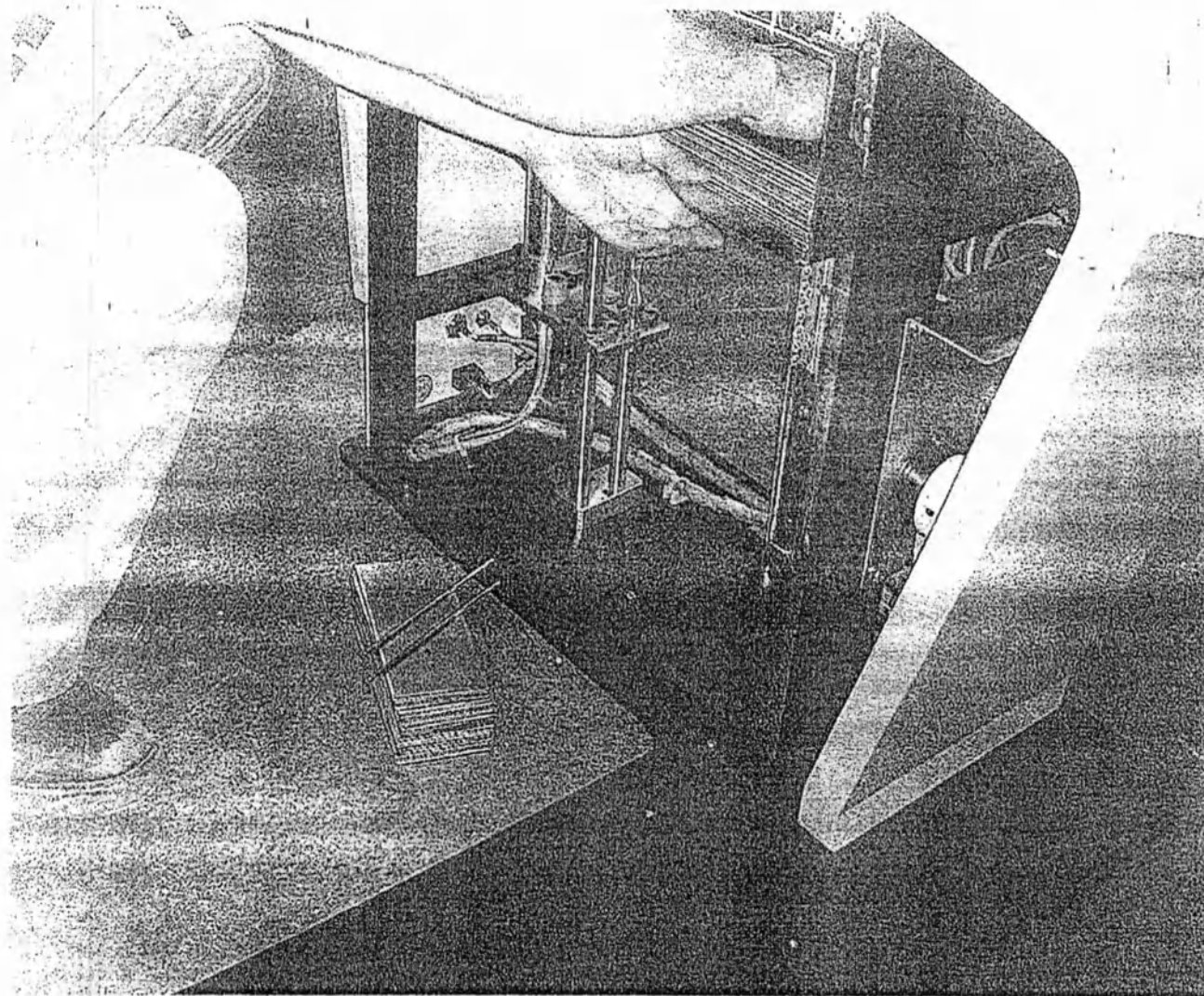


Установите баланс. Поместите листы балансировочные в балансировочный корпус. Обычно используют 37 ~ 39 листов. Зависит от общего состояния сборки. В большинстве случаев инженер устанавливает баланс с уже сделанным рукавом рефрактора.

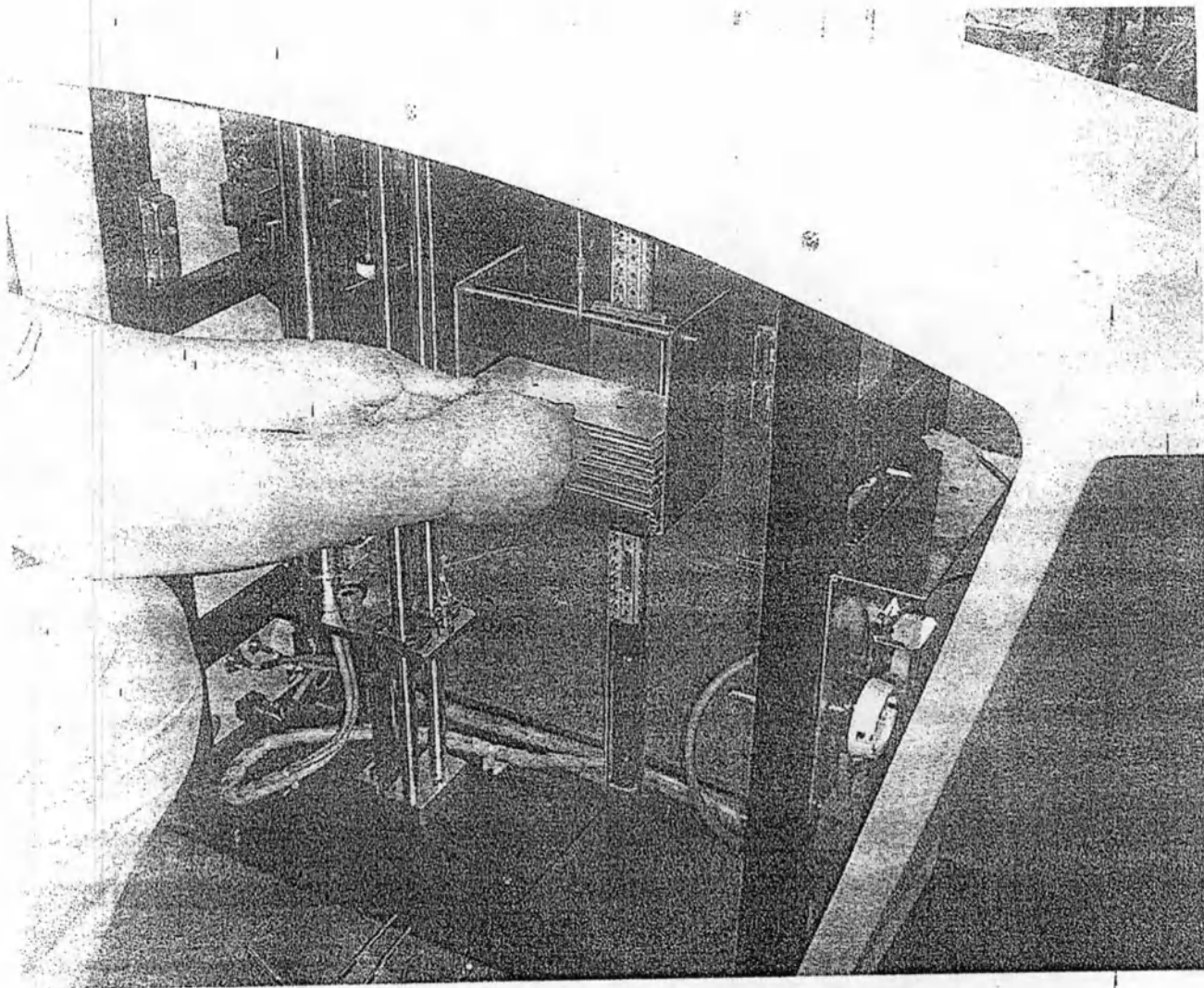


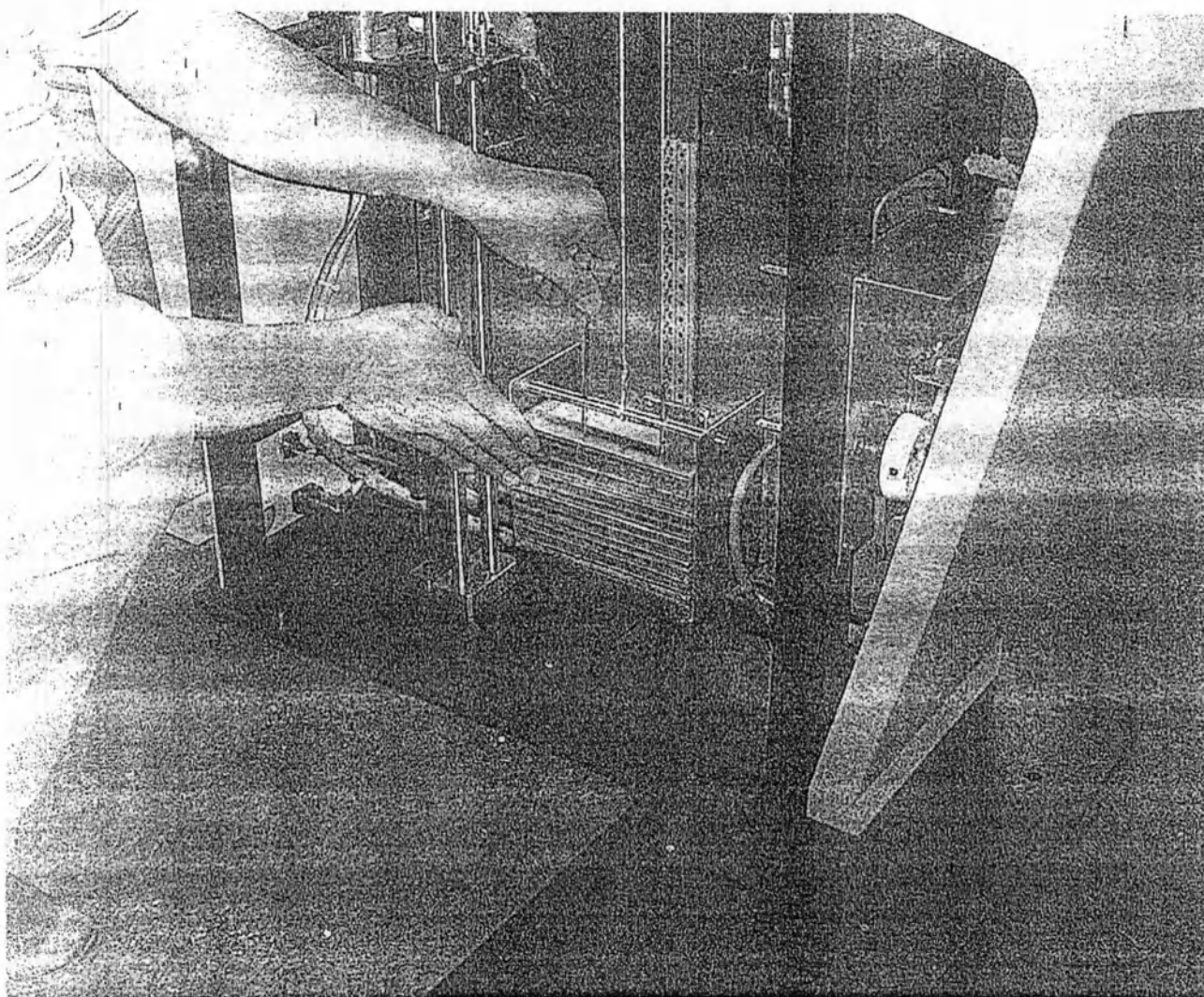



После балансировки вставьте длинные болты в два отверстия

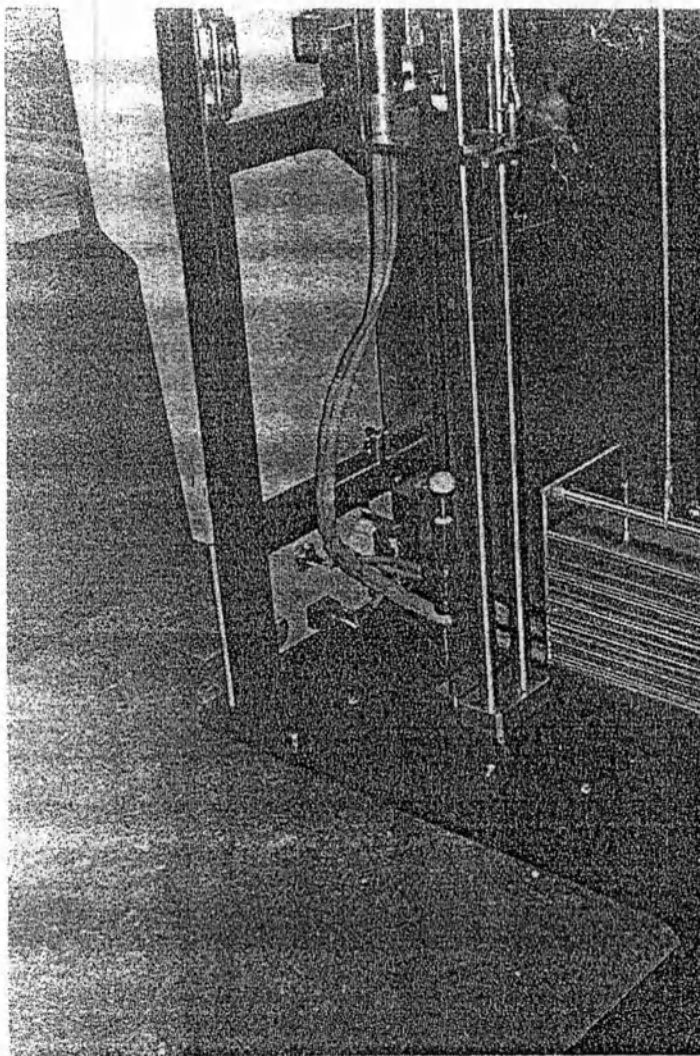


Установленная балансировка


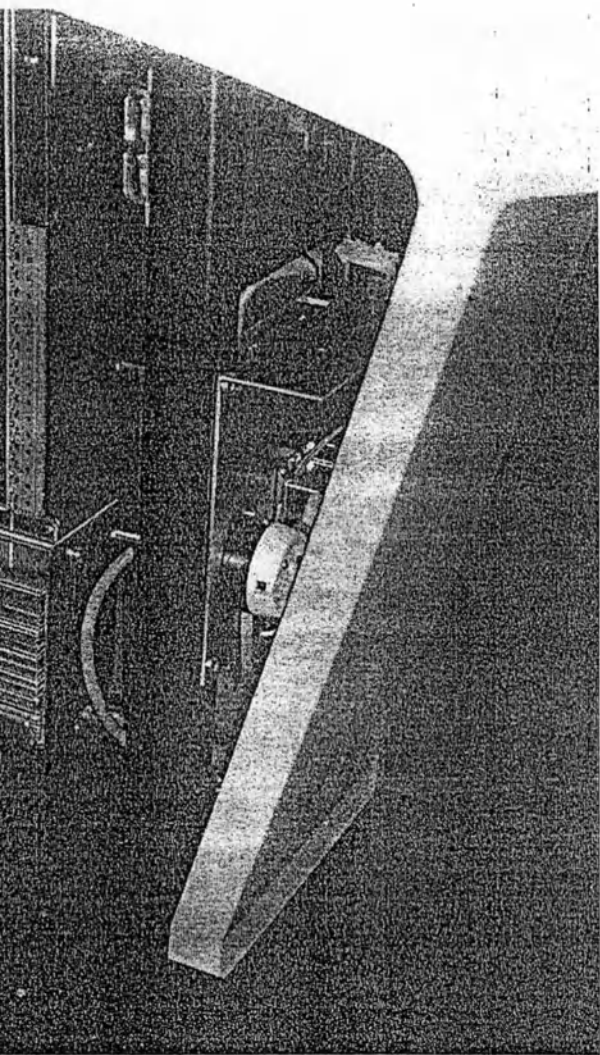


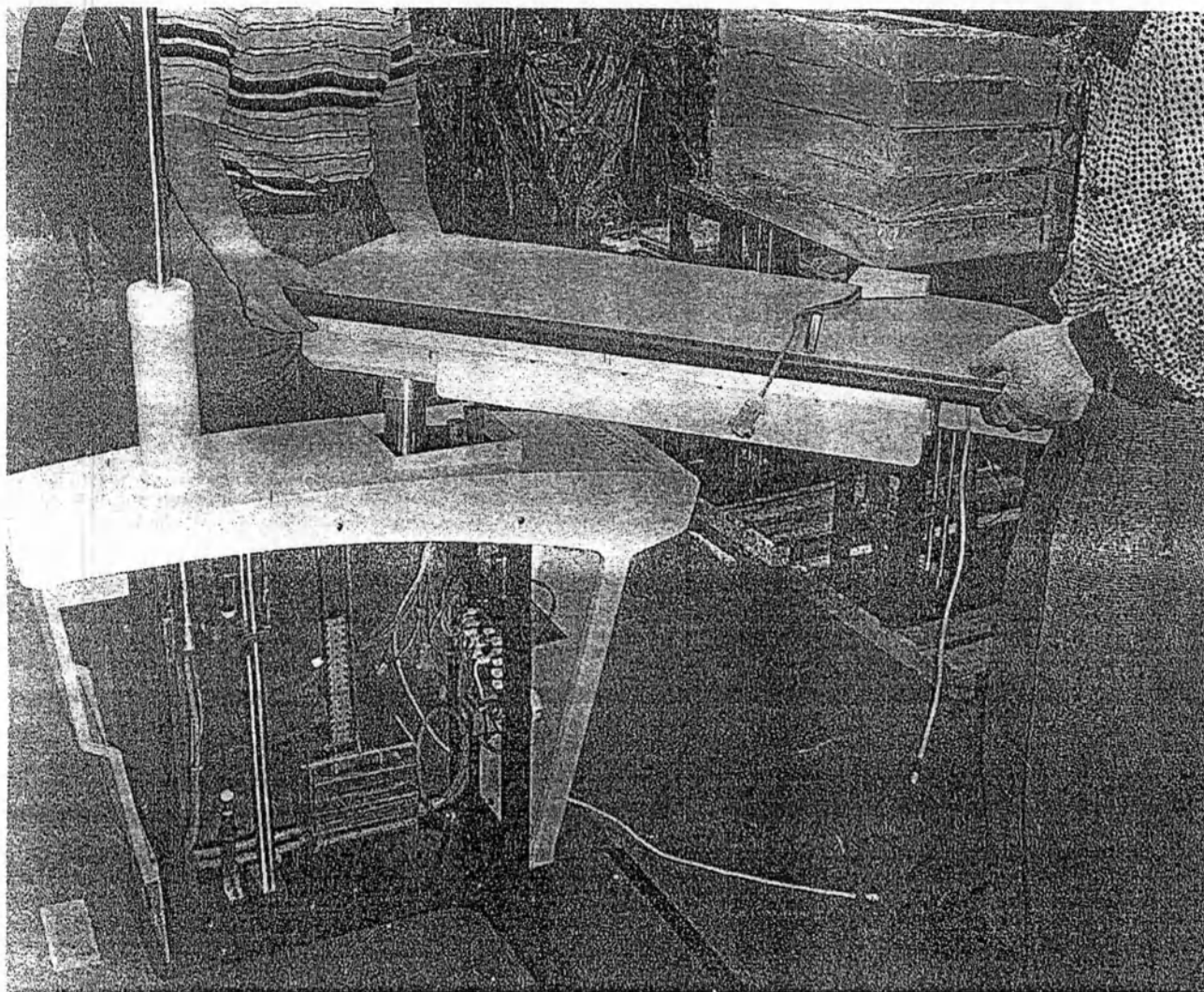

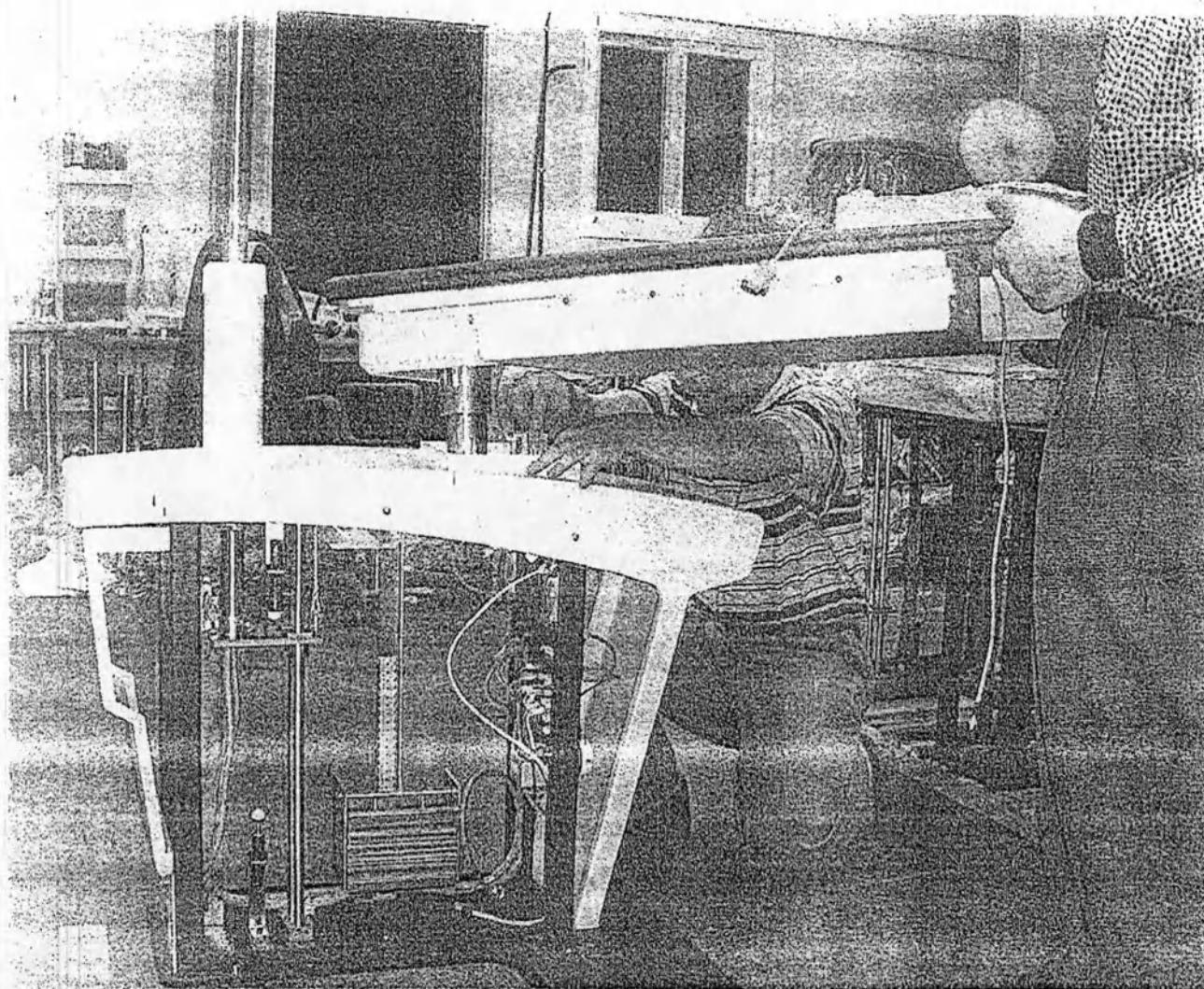


Поместите все кабели в отвод для кабелей

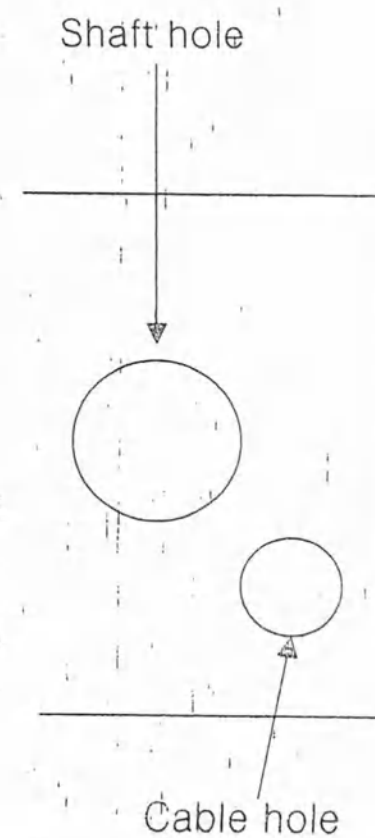


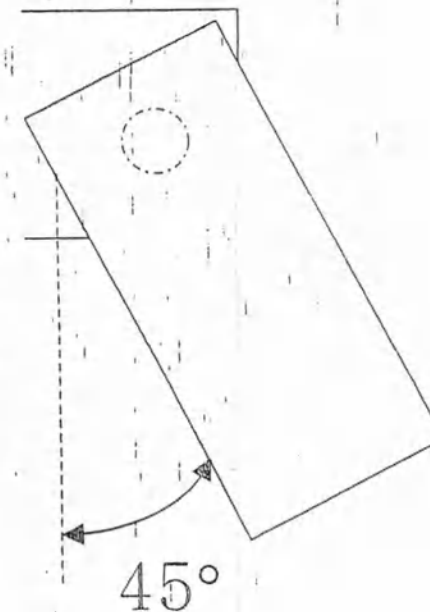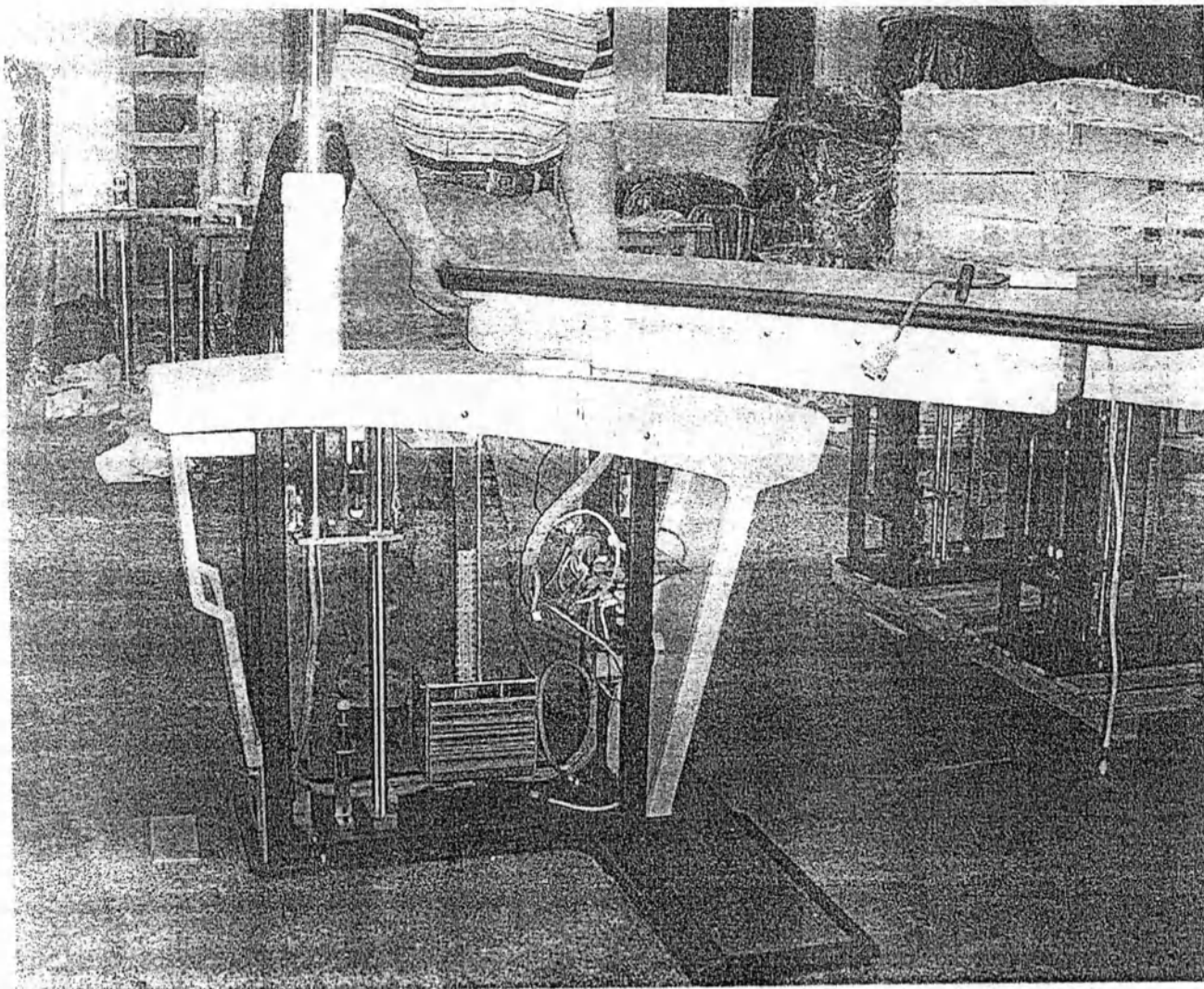


Поместите стержень стола в канал для стержня. Держите угол примерно в 45°

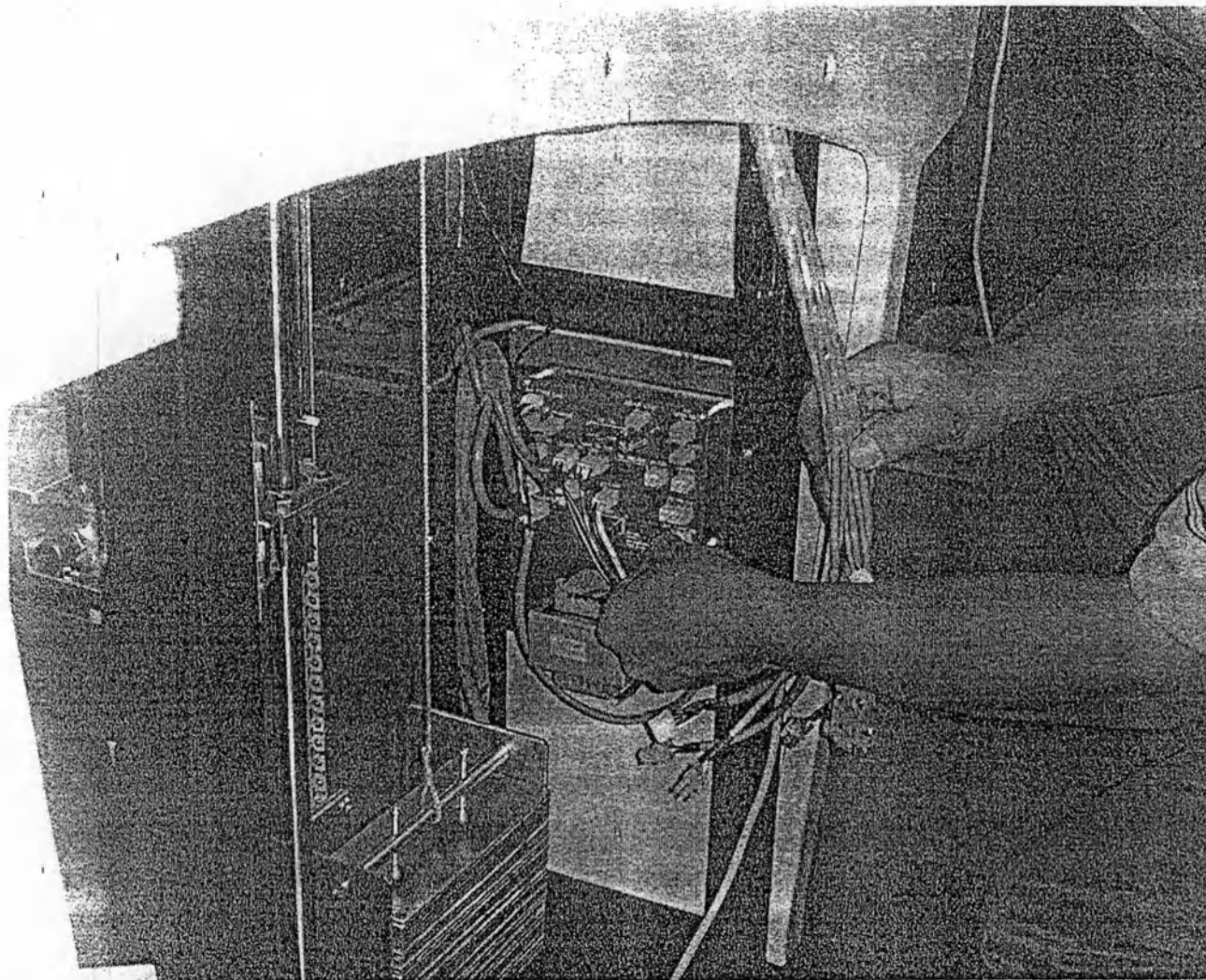


Подсоедините все кабели к нужным отверстиям. Каждый соединительный кабель имеют свою форму, отличную от других

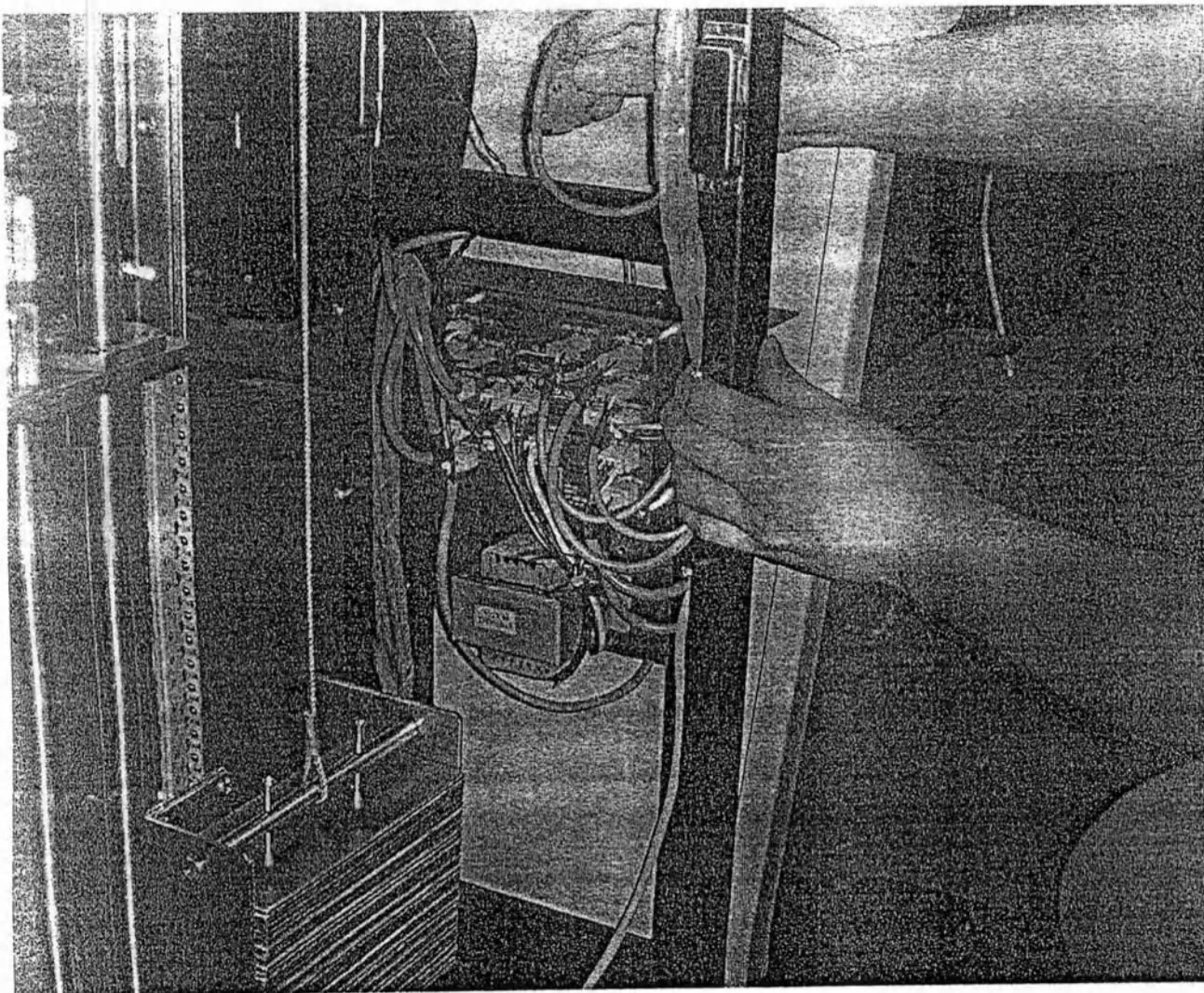


Подсоединенные кабели

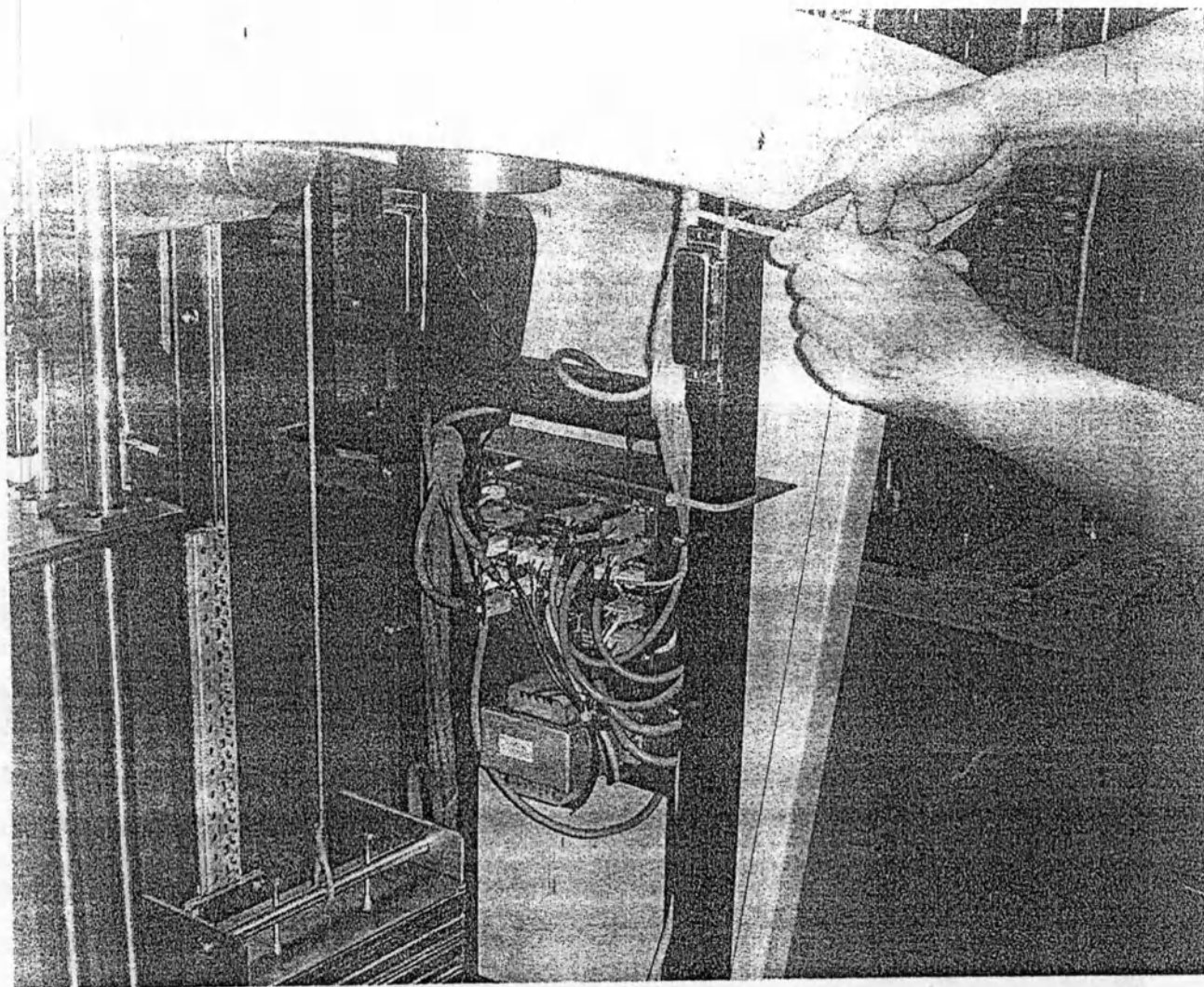


Закрепите кабели, как на рис., с помощью узлов для кабелей
или другим способом

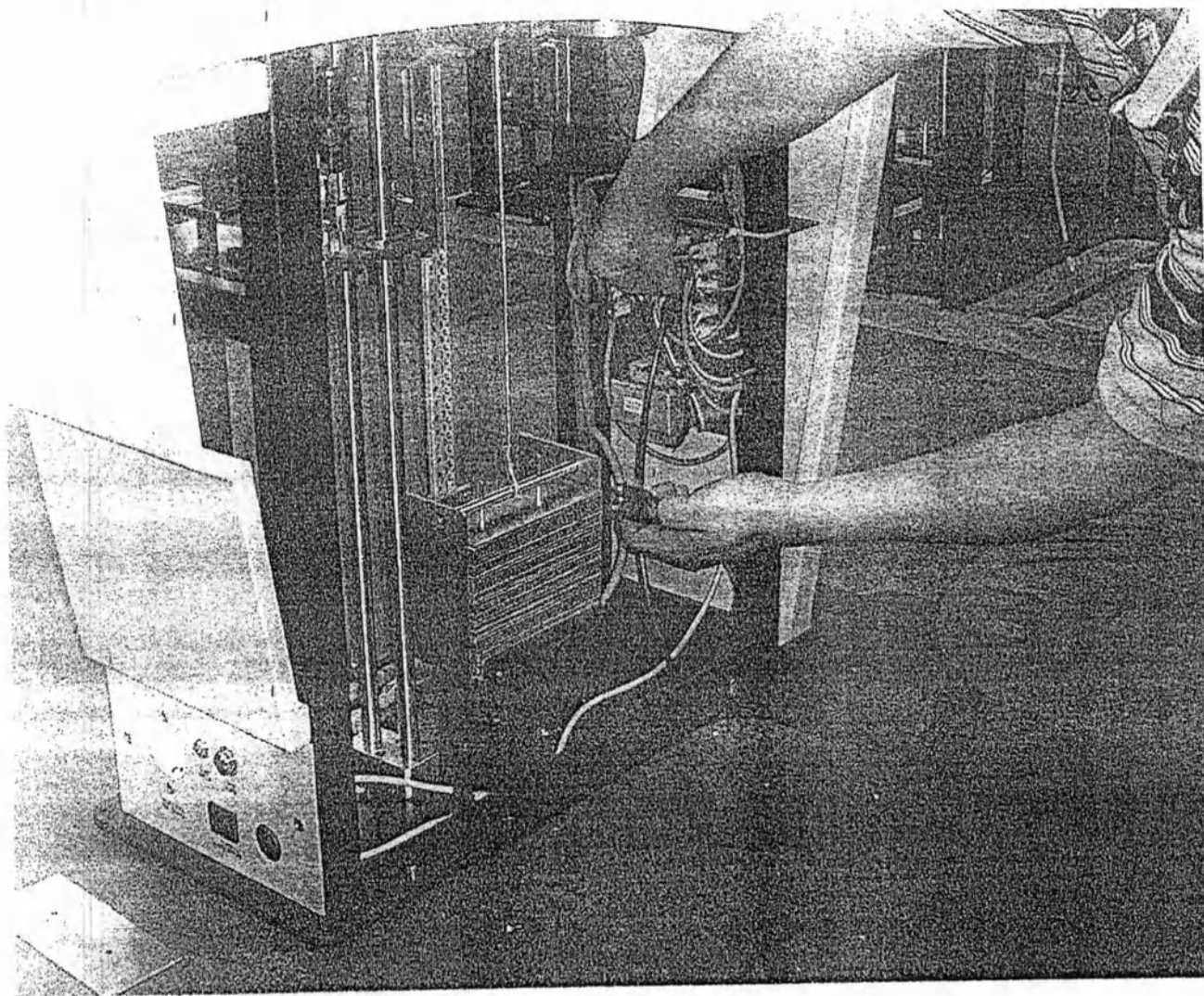


Подсоедините кабель питания от распределительной коробки

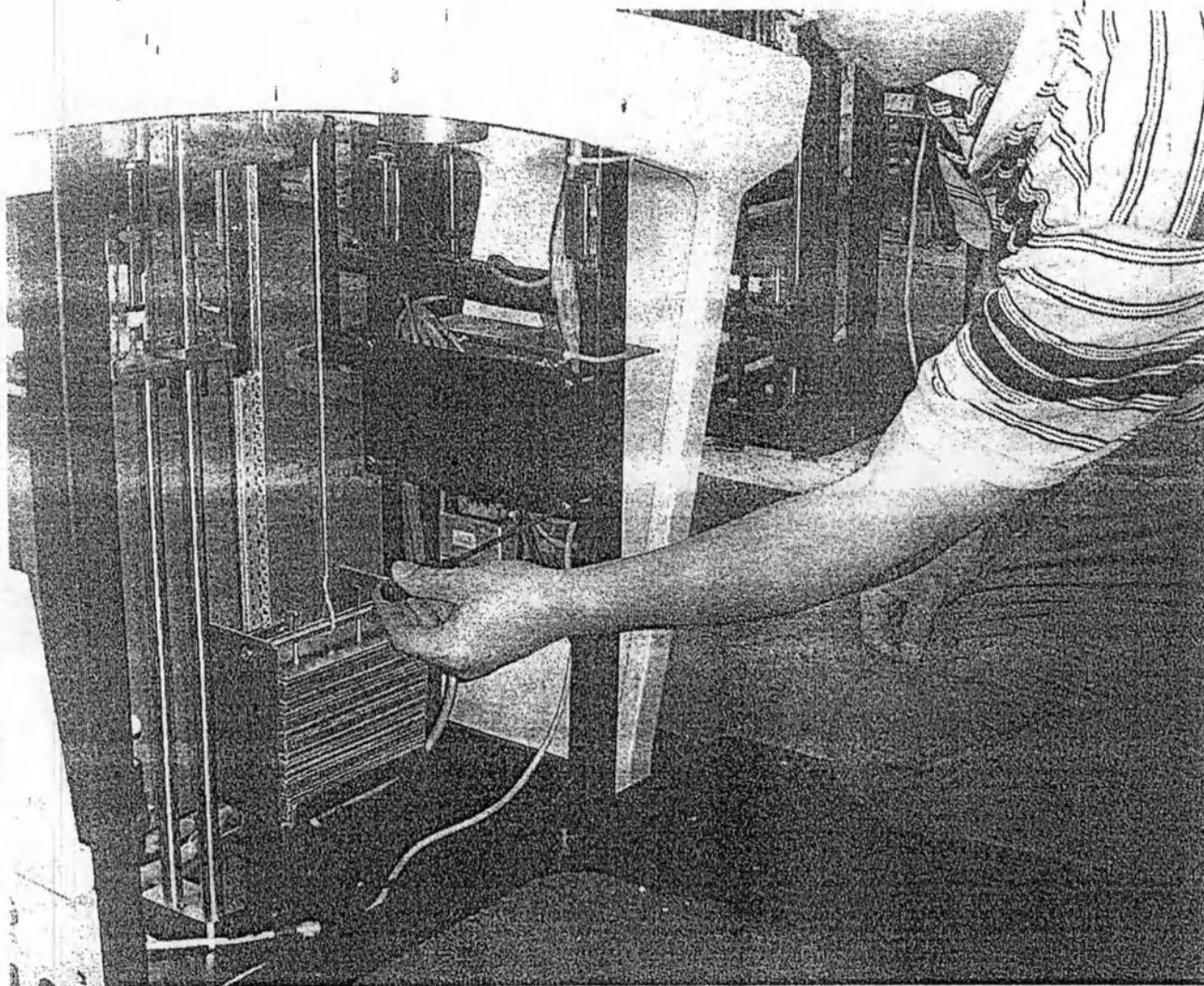


Закройте защитной крышкой силовой блок управления

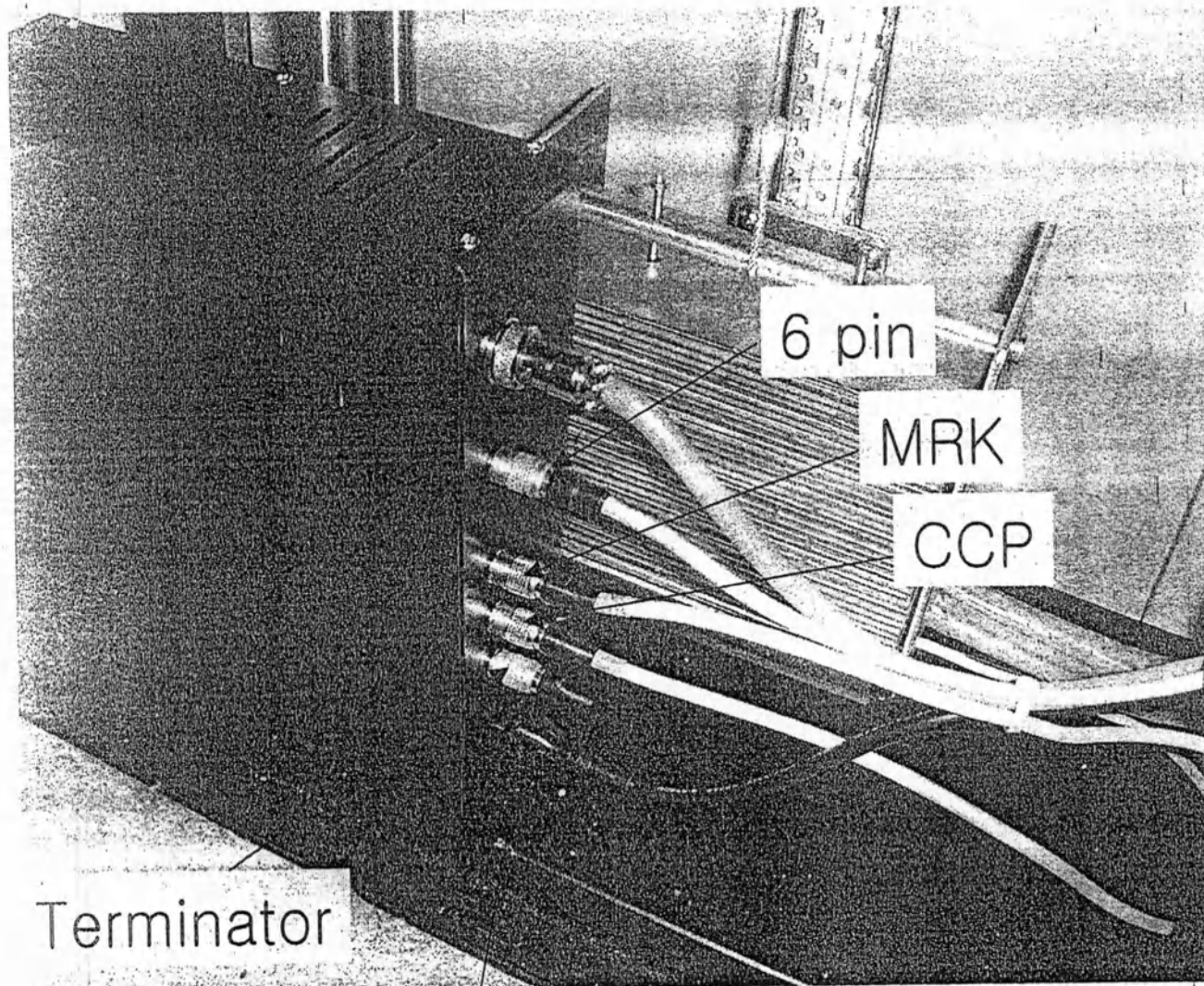


Закрепите здесь – 4 точки – с помощью болтов, включенных
в комплектацию

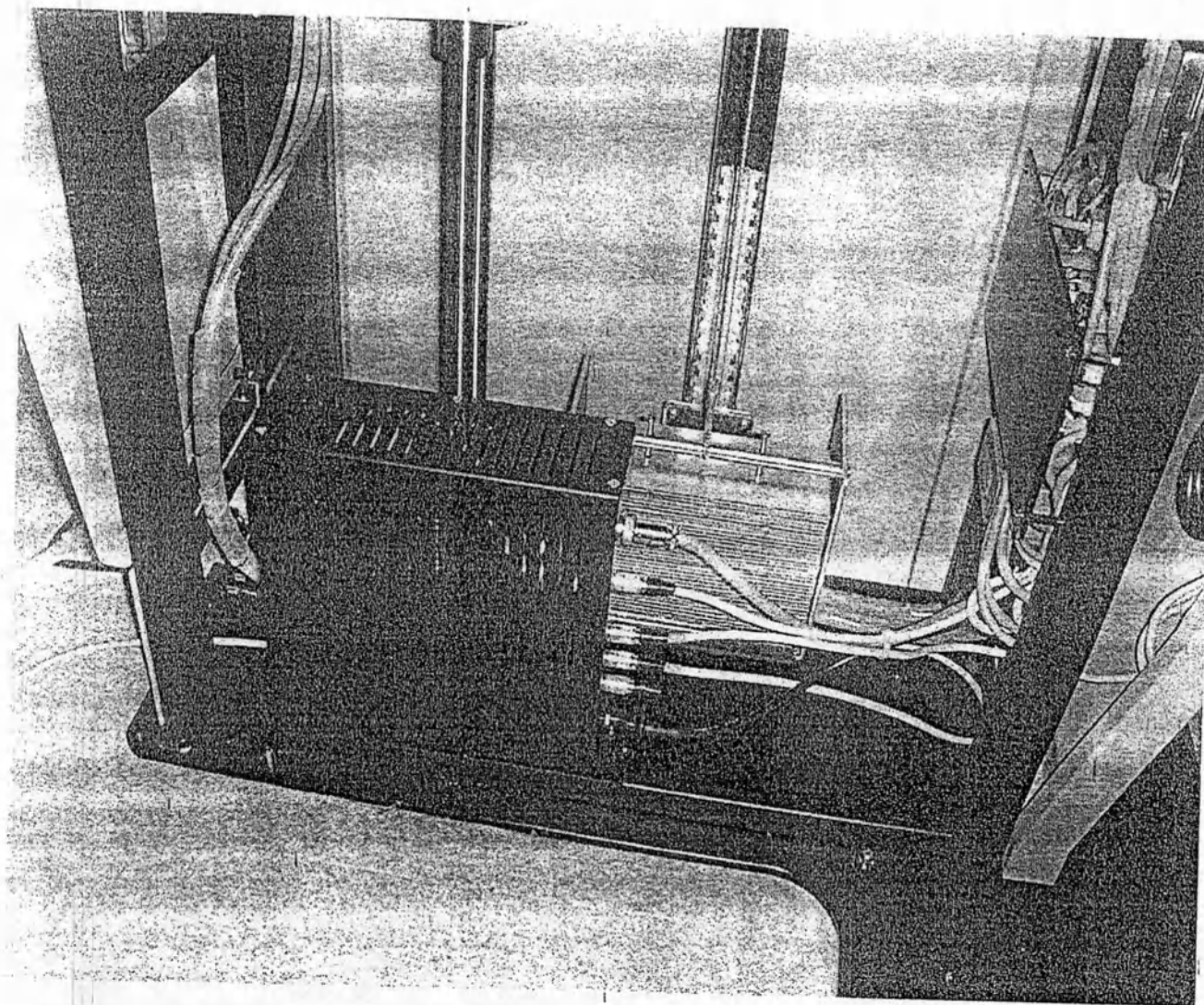

Подсоединенные кабели в установочном виде

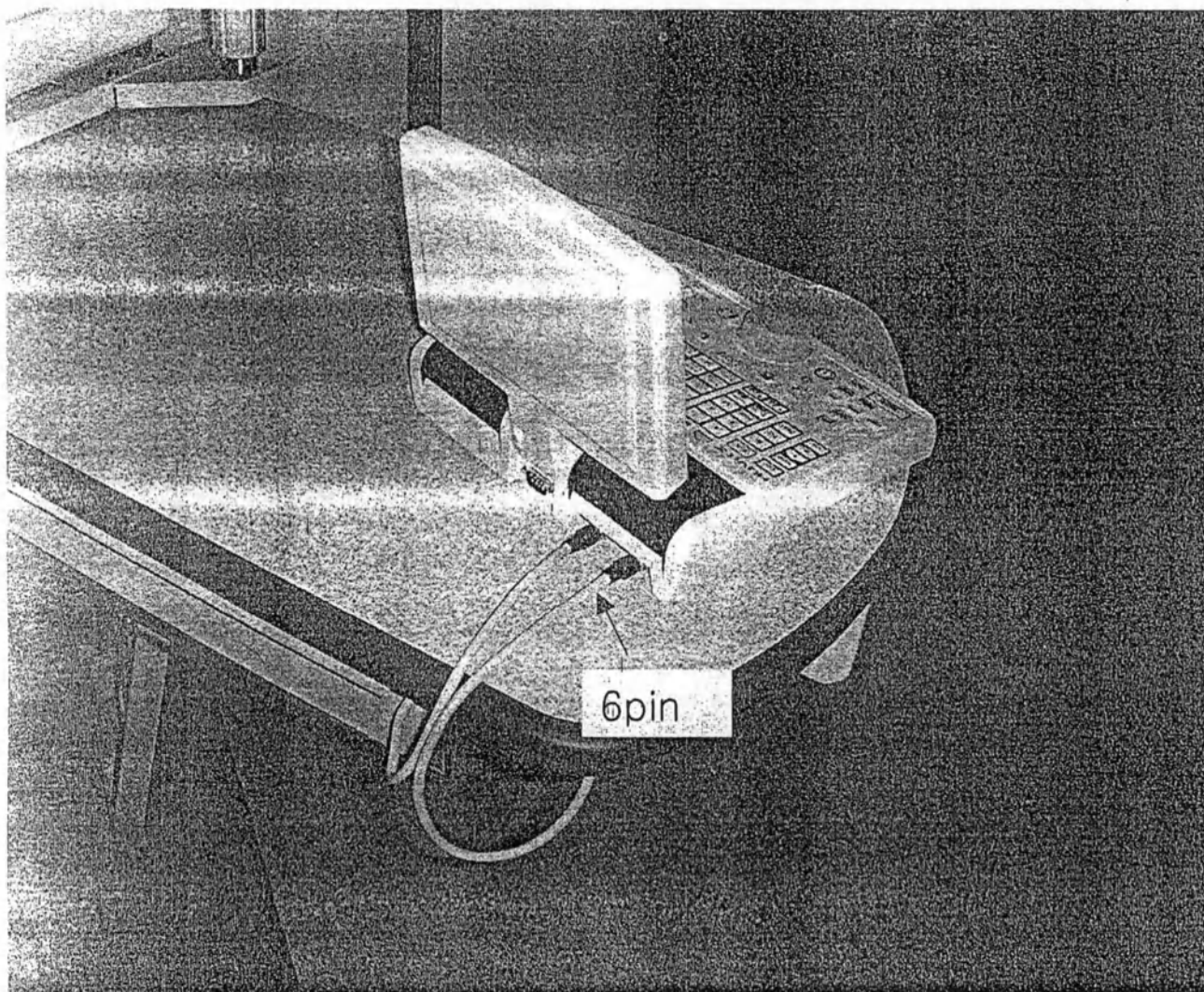

Подсоедините 6pin кабель к операционной панели (OP
включен с CDR)

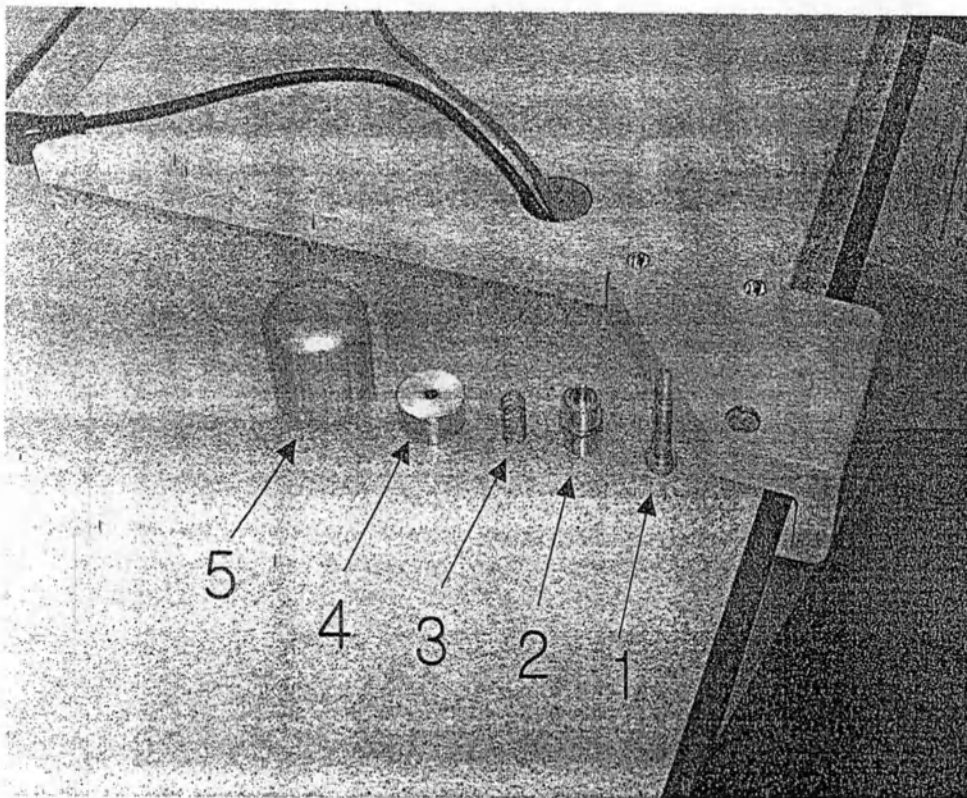

Детальное изображение.
Сборка рукоятки.

Шаг 1

Сначала изучите монтаж ручки. Разместите все детали как на фотографии. Все детали должны быть собраны в таком порядке, как вы видите. И следуйте следующему шагу

реклама

The CRT-3100 delivers a Total refraction system to you


CRT

3100

REFRACTION TABLE


HUVITZ



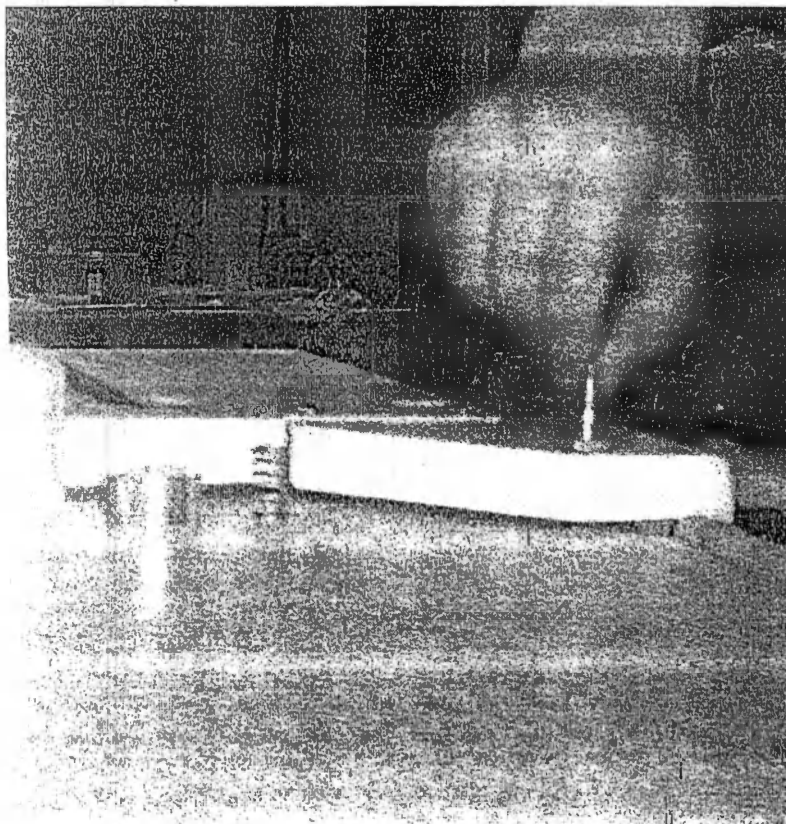




Шаг 2: Вставьте деталь №1 и деталь №2 по порядку.
Соедините деталь №2 к панели из стали. Деталь №2 является болтом, в стальной панели имеется гайка

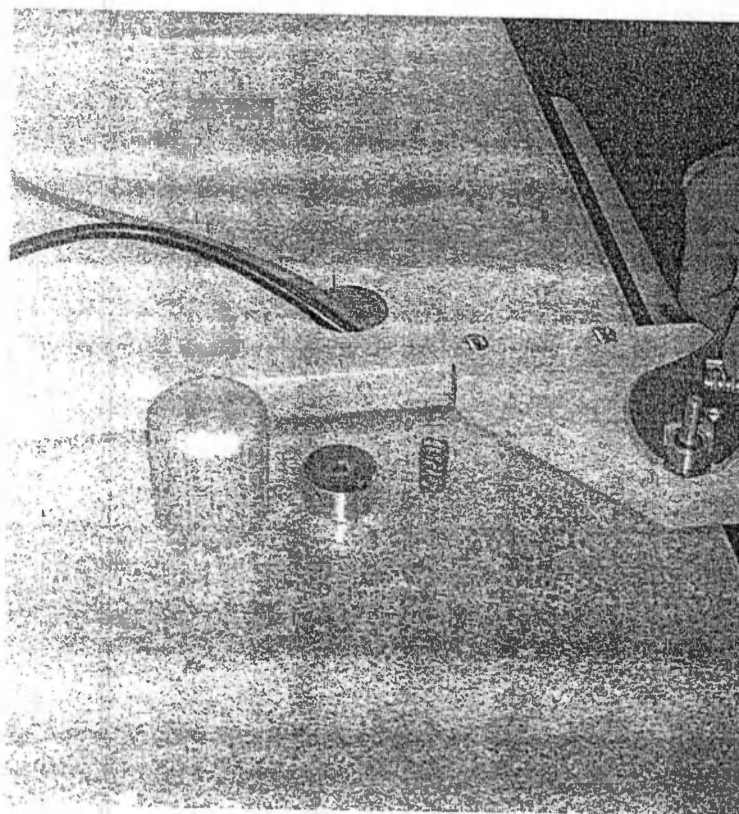





Шаг 3: Закрепите гайку и болт

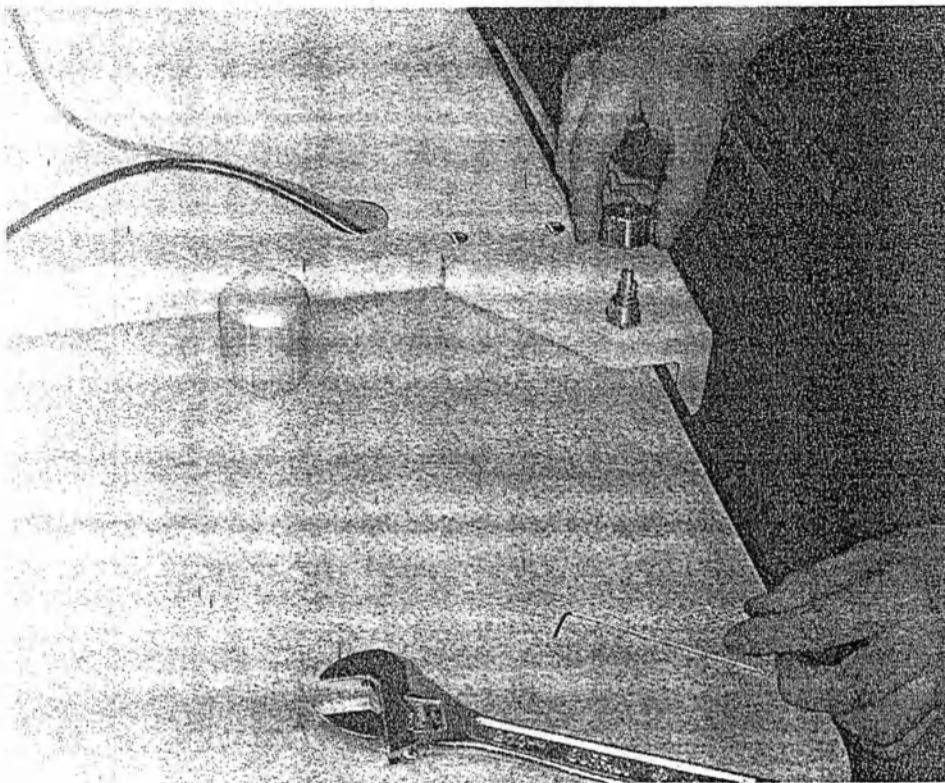


Шаг 4: Вставьте пружину (деталь №3) и
поместите деталь №4

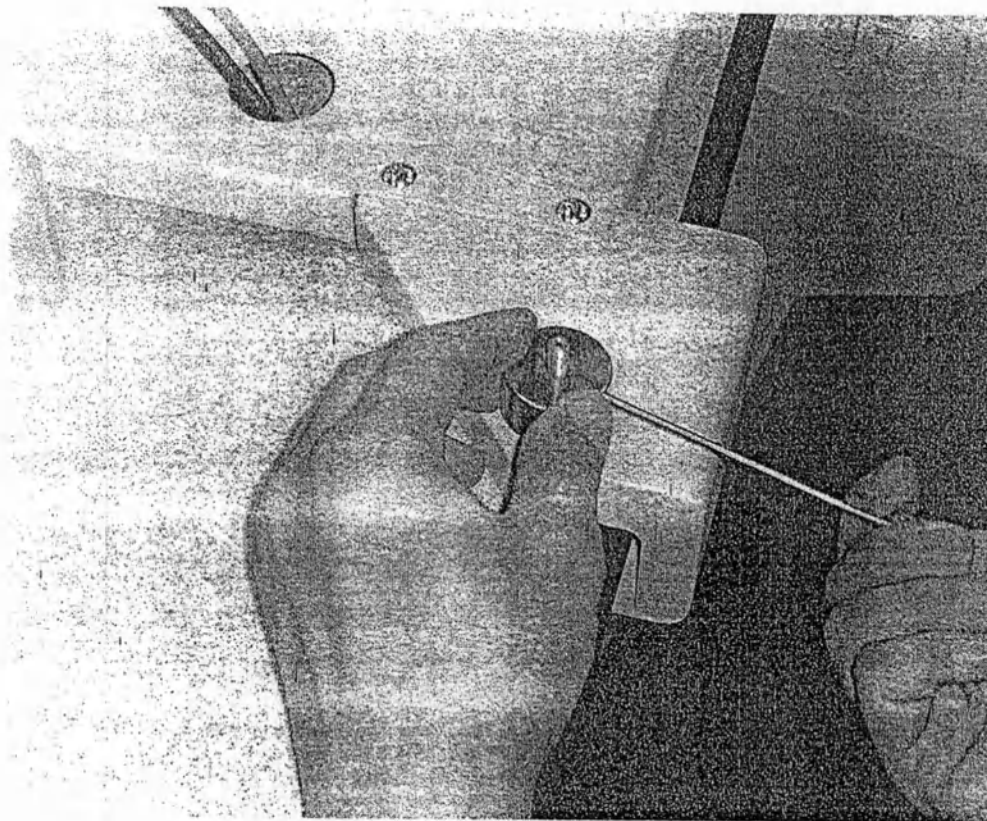


Шаг 5: Закрепите деталь №4 с помощью винта

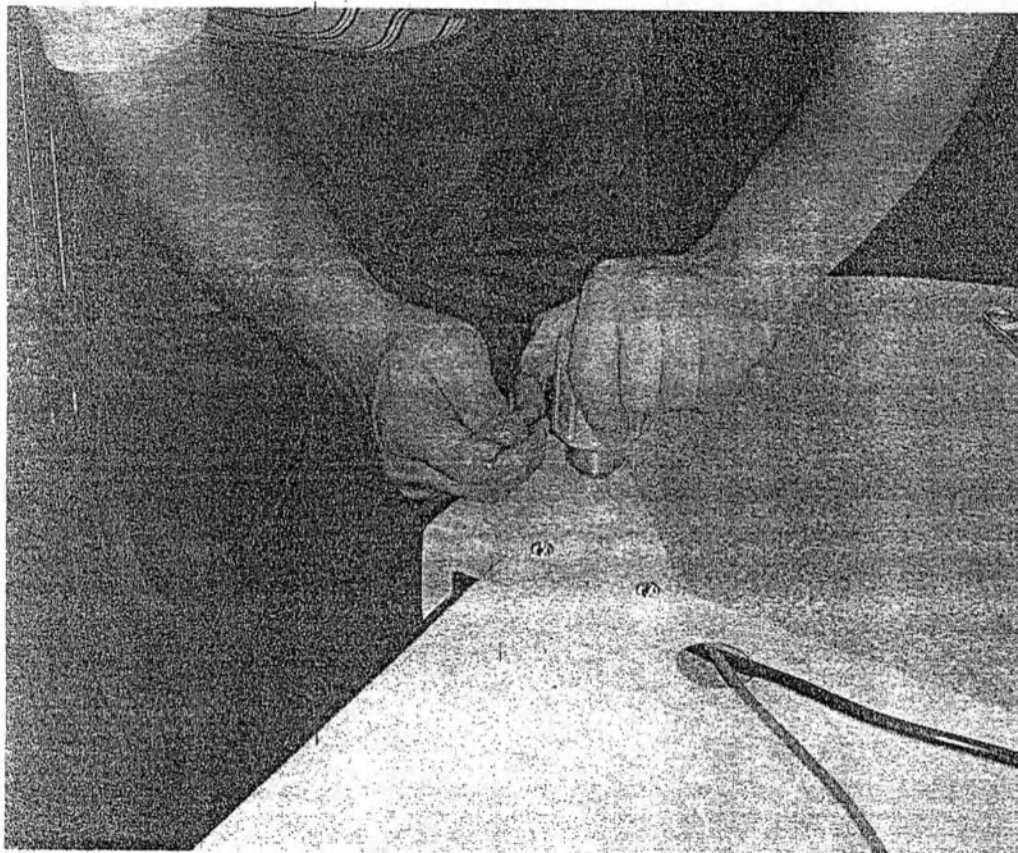

Шаг 6: Закрепите деталь №5 с помощью винта

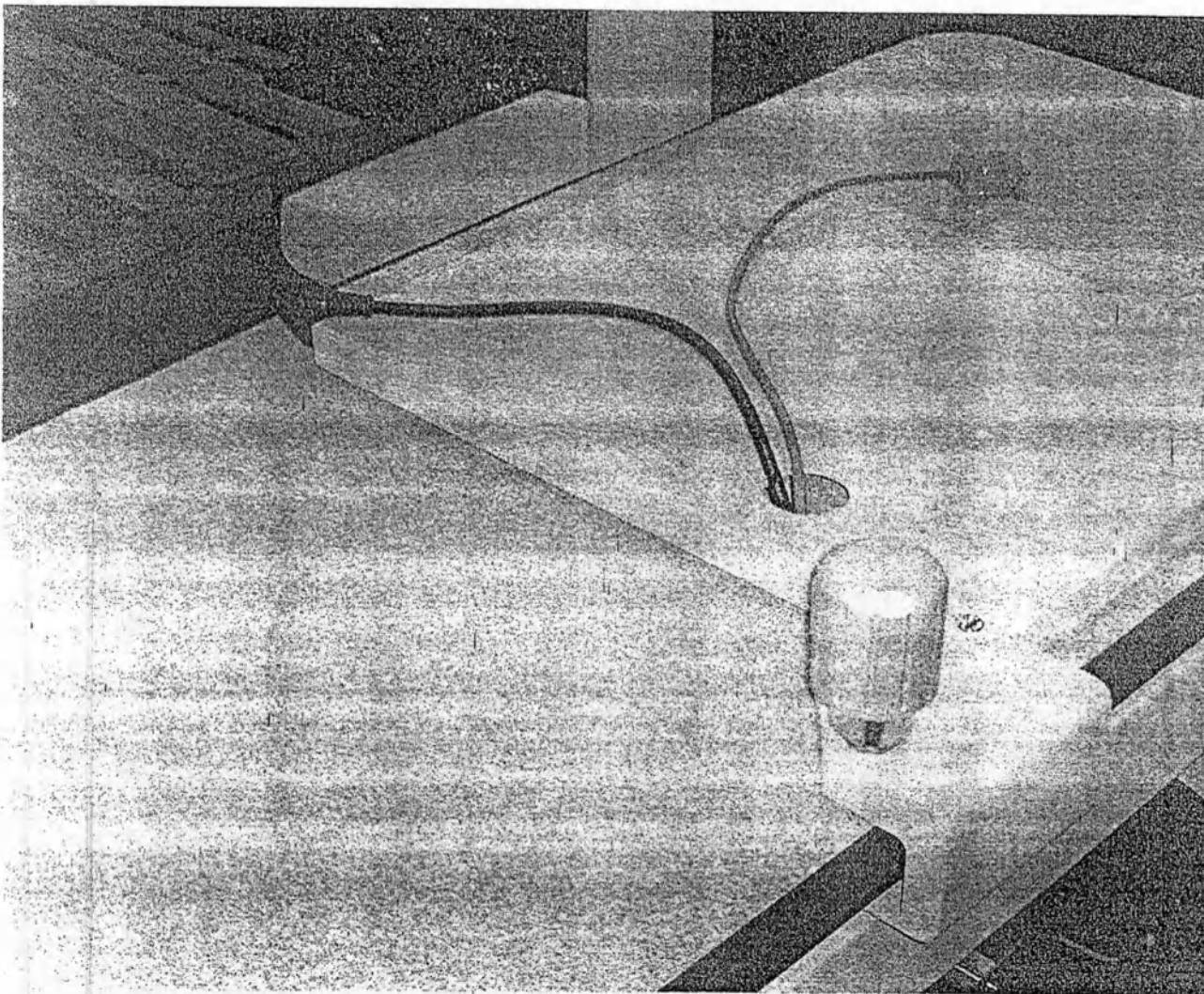


Завершена сборка ручки

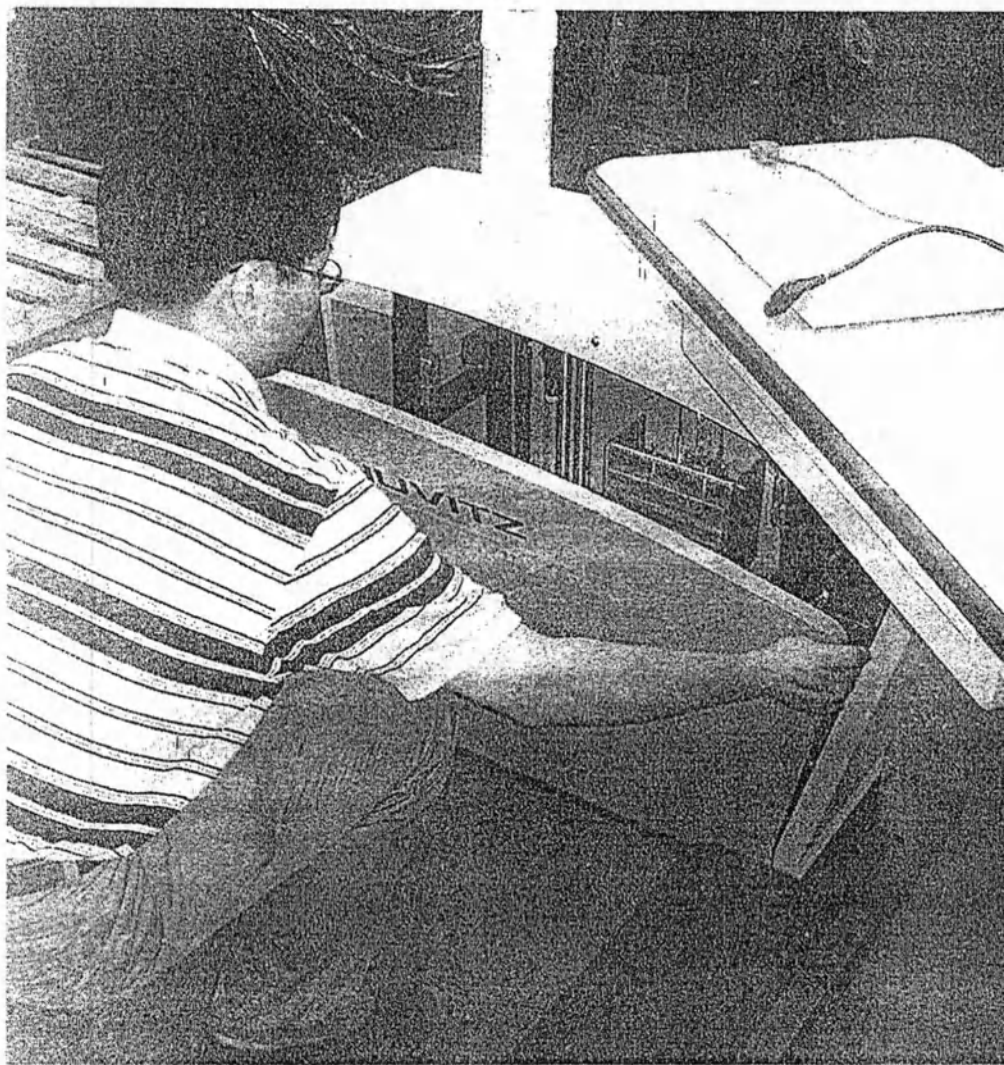


Поместите панели стола




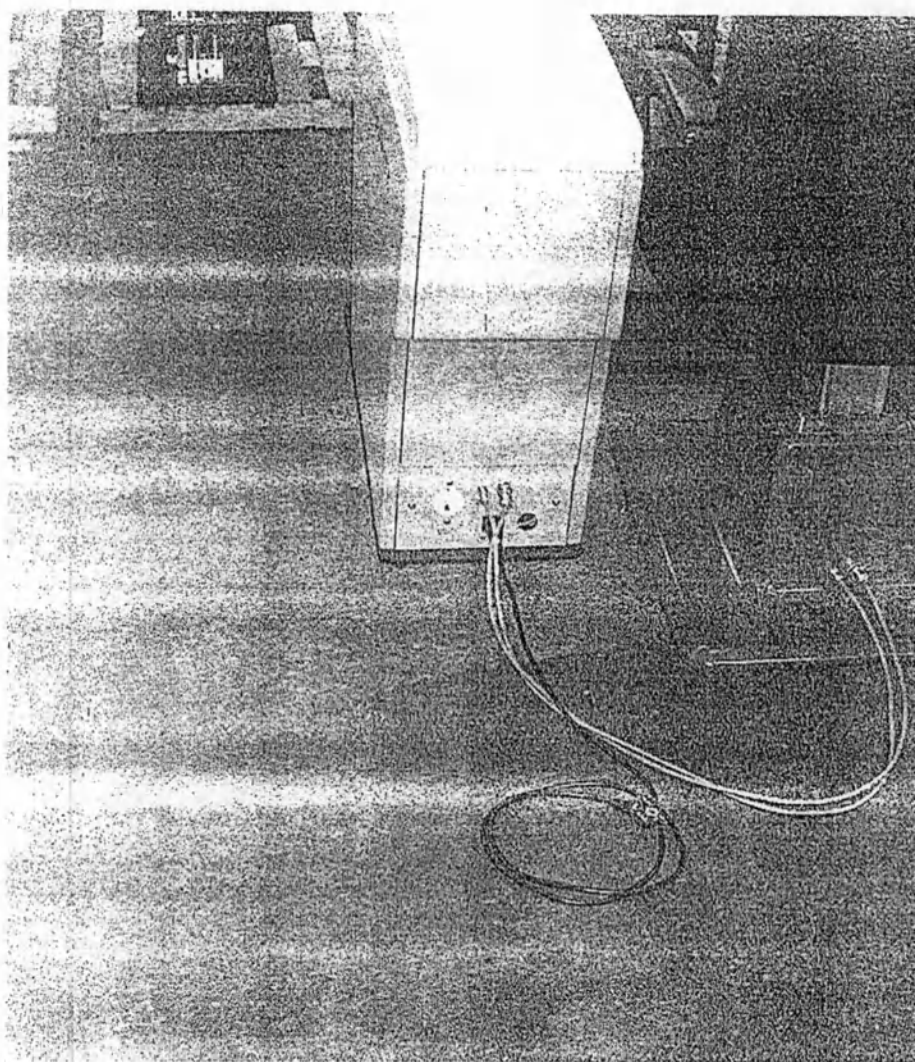


Подсоедините кабели стула

Page 36

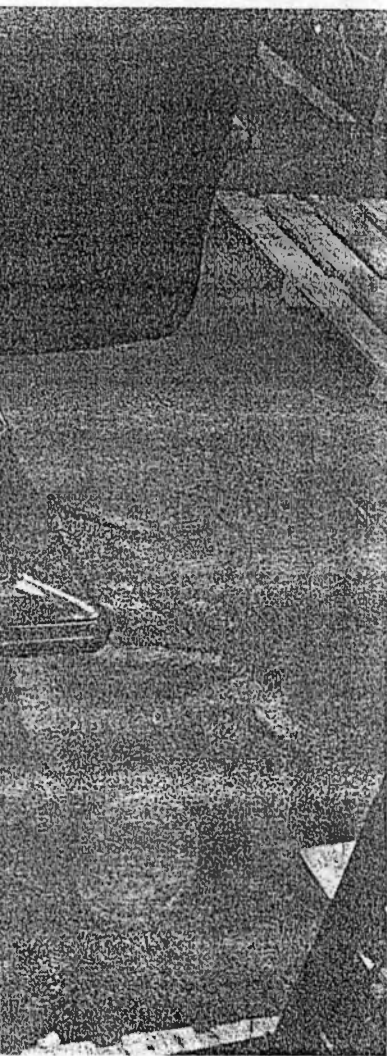

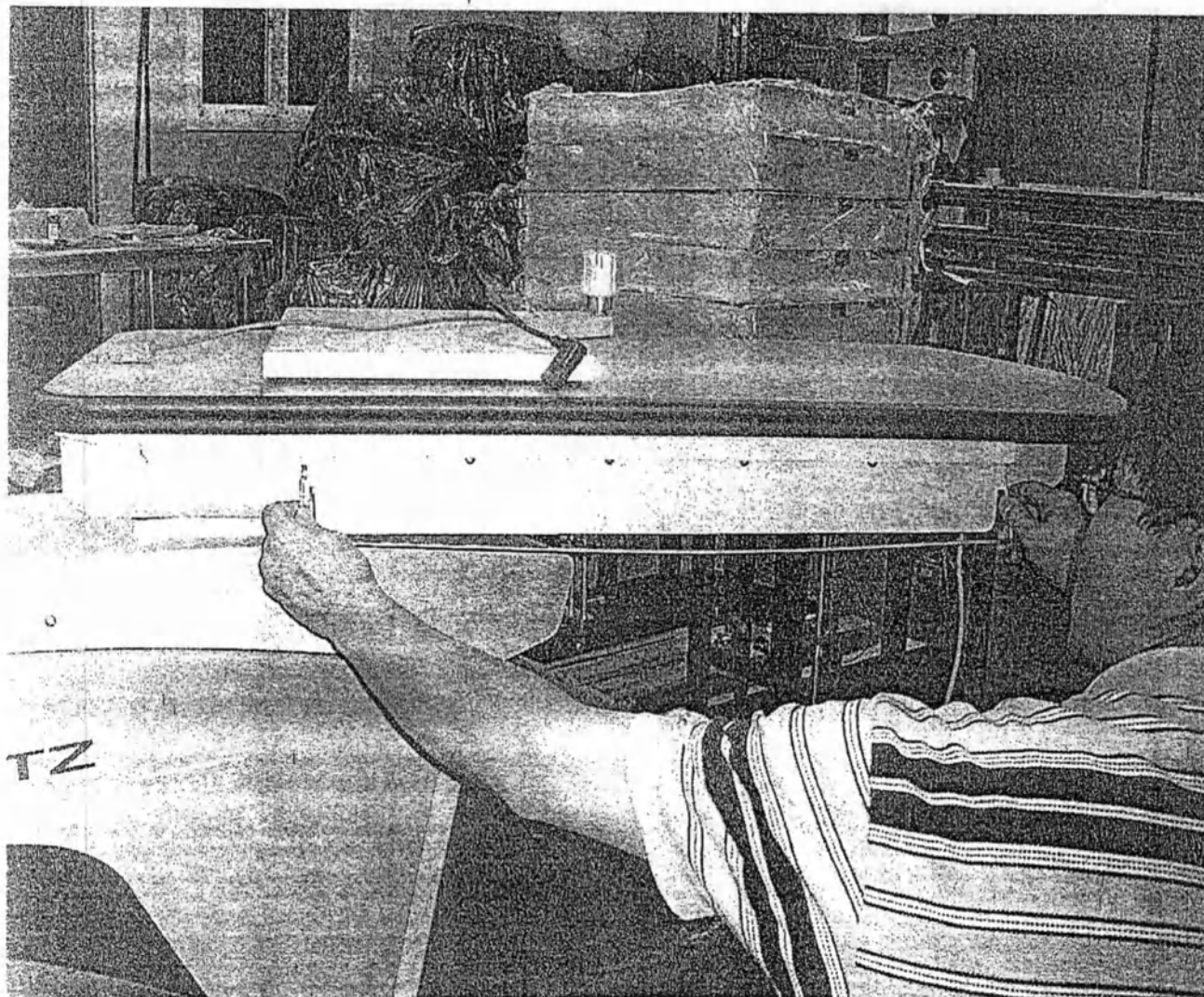

Закрепите планку стола - ограничитель для стула

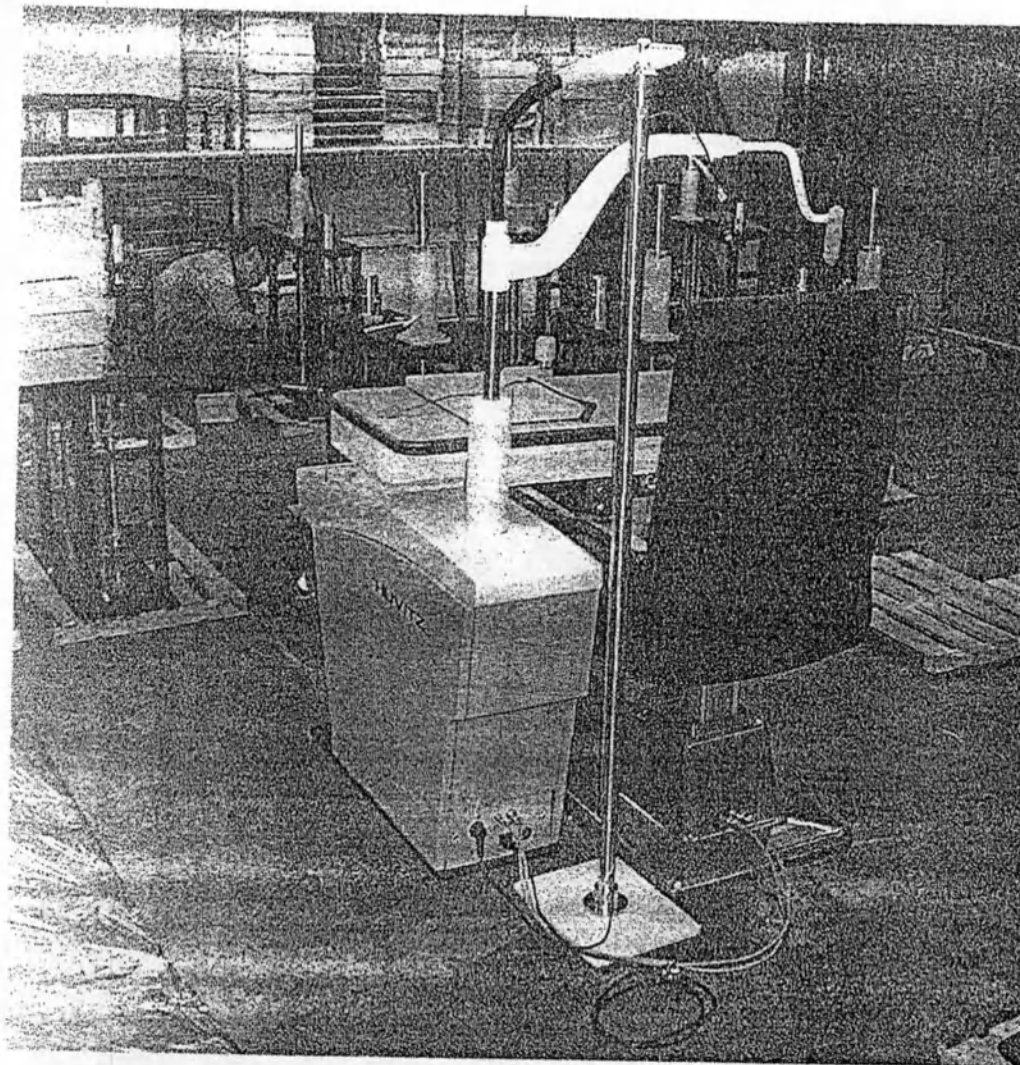

Собранный стол CRT




Price-list

January, 2004

<i>Refraction table and Chair</i>	<i>CRT-3100</i>	<i>900.00 USD</i>
<i>Refraction table and Chair</i>	<i>CRT-4000</i>	<i>950.00 USD</i>
<i>Refraction table and Chair</i>	<i>CST-4000</i>	<i>840.00 USD</i>
<i>Refraction table and Chair</i>	<i>CIT-3100</i>	<i>920.00 USD</i>

Huvitz Co., Ltd.

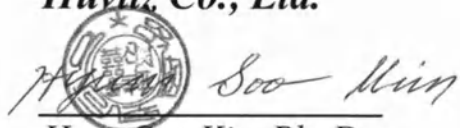 *Hyun Soo Kim*

*Hyun Soo Kim Ph. D.
CEO President*