

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Серджикс М»

 М.С. Мышалов

2011__г.



Инструкция по применению

**«Раствор офтальмологический вязкоэластичный на
основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с
канюлей для введения»**

производства «ANTEIS S.A.», Switzerland

Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей для введения служит для создания и поддержания глубокой передней камеры глаза, обеспечения пространства для работы, а также для защиты клеток эндотелия роговицы и предохранения от повреждения интраокулярных структур глаза во время операций по поводу факоемульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ и антиглаукоматозных операций.

Инструкция по применению

В случае, если растворы хранились в холодильнике, шприц необходимо достать из холодильника не менее, чем за 20 минут до использования. После освобождения офтальмологической канюли с люэровским наконечником от воздуха, можно осторожно вводить растворы в переднюю камеру глаза с помощью прилагаемой стерильной одноразовой канюли или другой совместимой канюли. Дозировка зависит от типа операции. Для возмещения потери вязкоэластика в результате утечки или промывания можно произвести несколько инъекций. По окончании операции необходимо полностью удалить остатки раствора при помощи ирригационного/аспирационного устройства.

Меры предосторожности


- Растворы, также как и стерильные канюли, предназначены для однократного внутриглазного применения.
- Перед использованием растворов необходимо проверить целостность первичной (стерильной упаковки), чтобы гарантировать стерильность.
- Не использовать растворы и канюли, если стерильная упаковка была повреждена.
- После интраоперационного использования растворов в послеоперационном периоде возможно кратковременное повышение внутриглазного давления. Необходимо проводить подходящие меры по снижению внутриглазного давления.



Президент,
государство
и (или) иер



Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей для введения

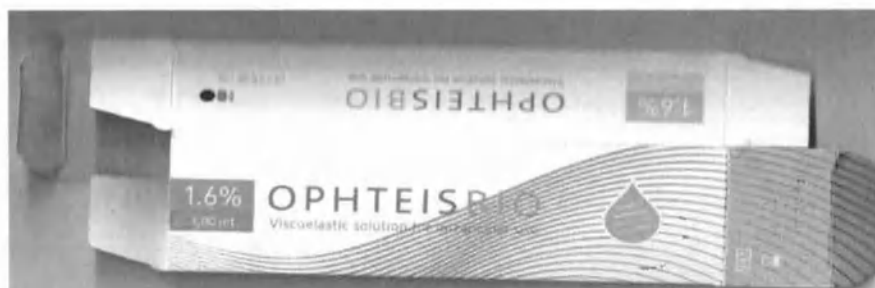

Упаковка раствора офтальмологического Ophteisbo 1.6



Система доставки раствора офтальмологического Ophteisbo 1.6



Упаковка раствора офтальмологического Healaflow



Система доставки раствора офтальмологического Healaflow

Брешиуровано,
зрениуровано 2 (сва)
ица



2-4-4