

МОЧЕПРИЁМНИК ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
по ТУ 32.50.13-001-47102357-2017

Медицинское изделие «Мочеприёмник педиатрический по ТУ 32.50.13-001-47102357-2017», предназначен для сбора мочи для последующего анализа, имеет универсальную конструкцию, адаптированную под физиологические особенности мальчиков и девочек грудного возраста.

Область применения – педиатрия.

Показания к применению:

Предназначен для сбора мочи на анализ у детей раннего возраста, в том числе грудного возраста

- универсальный, для детей разного пола
- для однократного применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОЧЕПРИЁМНИКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО

- освободить мочеприёмник от стерильной упаковки;
- снять защитную бумажную ленту с фиксирующего липкого слоя;
- прикрепить мочеприёмник к телу ребенка (у мальчиков мошонку поместить внутрь мочеприёмника), следя, чтобы не образовались складки на клеевом слое;
- при необходимости закрепить мочеприёмник на подгузник клеевым слоем с задней стороны мочеприёмника;
- после сбора мочи мочеприёмник аккуратно отклеить и перелить в контейнер для мочи.

ВНИМАНИЕ! Не оставлять прикрепленным мочеприёмник более 1 часа.

В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприёмник и использовать новый.

Меры предосторожности

- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки;
- не снимать мочеприёмник резким движением или с использованием механических средств или химических растворителей.


Противопоказания и возможные побочные действия:

Противопоказания при правильном применении мочеприёмника отсутствуют.

Не рекомендуется принимать лицам, страдающим аллергией к латексу, силикону и ПВХ.

Технические характеристики

- мочеприёмник имеет обратный клапан, который препятствует обратному оттоку мочи;
- снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством;
- объем мочеприёмника 120 ± 2 мл;

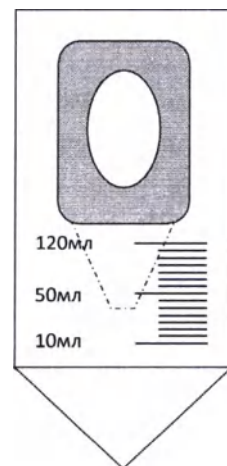

МОЧЕПРИЁМНИК ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

по ТУ 32.50.13-001-47102357-2017

- имеет боковую градуировку от 10 до 120 мл;
- цена деления 10 мл;
- 120-миллилитровые мешочки из полиэтилена высокого давления, размеры: длина 184 ± 2 мм, ширина 70 ± 2 мм, толщина сдвоенного слоя $0,09 \pm 0,01$ мм;
- внутренний мешочек с защитой от вытекания, размеры: длина 109 ± 2 мм, ширина 70 ± 2 мм, толщина сдвоенного слоя $0,09 \pm 0,01$ мм;
- боковое входное отверстие овального сечения с одинаковыми радиусами основных дуг, размеры: длина 44 ± 1 мм; ширина 30 ± 1 мм; радиус основной дуги 11 ± 1 мм.
- клейкий с обеих сторон материал (стикер) – водорастворимый, нетоксичный, гипоаллергенный, размеры: длина 68 ± 2 мм, ширина 55 ± 2 мм;
- элемент фиксации мочеприёмника к подгузнику. Клейкий с обеих сторон материал (стикер) – водорастворимый, нетоксичный, гипоаллергенный, размеры: длина 35 ± 2 мм, ширина 40 ± 2 мм;
- упаковка для мочеприёмника изготовлена из пластилена МТА – Н09111РЕ/РР и бумаги марки ГС – 60, размеры: длина 130 ± 2 мм, ширина 100 ± 2 мм, толщина сдвоенного слоя $0,14 \pm 0,01$ мм;
- масса изделия без упаковки ($2,24 \pm 0,2$ г.); масса в упаковке ($3,74 \pm 0,2$ г.);
- индивидуальная стерильная упаковка;
- стерилизован оксидом этилена;
- изготовлен из полиэтилена высокого давления;
- Основные действующие вещества клейкого материала (CP15-053926-SZ):
каучук,
сосновая смола,
материал водонепроницаемого фиксирующего слоя: хлопковая бумага.

Сведения о материалах, из которых изготовлено медицинское изделие:

«Мочеприёмник педиатрический по ТУ 32.50.13-001-47102357-2017» изготовлен из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) У-ВЛ8.879.001-17 по ТУ 2245-001-50619880-2016.

Элементы фиксации изготовлены из водорастворимого клейкого с обеих сторон материала (стикера) CP15-053926-SZ.

Условия хранения и транспортировки:

- избегать попадания прямых солнечных лучей, не хранить при экстремальных температурах
- хранить при температуре от -30 до $+45^{\circ}\text{C}$
- транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с

МОЧЕПРИЁМНИК ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
по ТУ 32.50.13-001-47102357-2017

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 °С).
- при транспортировании при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течении 1 суток с момента получения при температуре хранения.
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Условия эксплуатации:

Температура воздуха при эксплуатации от +10 до +35°С.

Относительная влажность воздуха среднегодовое значение 60% при 20°С, верхнее значение 80% при 25°С.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывать мочеприёмник в канализацию.

После использования мочеприёмники подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Обработка, способ и метод утилизации производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 отходы класса А.

REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до
этилена

L OT Номер партии

Рег. уд. №

ТУ 32.50.13-001-47102357-2017



Для одноразового использования



Смотрите инструкцию

Стерилизовано оксидом

STERILE

EO

Произведено:

ООО «Паритет»

420030, Россия, РТ, г. Казань, ул. Набережная 31 А,
помещение 10.
(843) 225-25-40

120мл.

Дата изготовления:

Годен до:

Место производства:

420030, Россия, РТ, г. Казань, ул. Набережная 31 А

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (Три)

листов(а)

Директор

Шишикина А.М.

