

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Диспотрейд»

П.Б.Суворов



2010г.
м.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Предметы индивидуальной защиты пациента и врача
«Dispodent»:**

- Маска защитная «Dispodent» однократного применения**
- Салфетка для защиты пациента «Dispodent» однократного применения**
- Фартук для защиты пациента «Dispodent» однократного применения**
- Чехлы для врачебного кресла и подголовника врачебного кресла «Dispodent»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Предметы индивидуальной защиты пациента и врача «Dispodent»: Маска защитная «Dispodent» однократного применения (далее- маска); Салфетка для защиты пациента «Dispodent» однократного применения (далее салфетка); Фартук для защиты пациента «Dispodent» однократного применения (далее –фартук); Чехлы для врачебного кресла и подголовника врачебного кресла «Dispodent» (далее –чехлы) – предназначены для защиты пациента и врача во время проведения медицинских и стоматологических процедур.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Салфетки синего, зеленого, белого, желтого, розового, фиолетового цвета, типоразмер: 33 см x 48 см. Абсорбционная способность не менее 0,01 г/см²

Тип «Standard» 1 слой бумаги + 1 слой полиэтиленовой пленки

Тип «Deluxe» 2 слоя бумаги + 1 слой полиэтиленовой пленки

Тип «Perfect» 3 слоя бумаги + 1 слой полиэтиленовой пленки

2.2. Фартуки изготовлены из полиэтиленовой пленки плотностью 22-25 микрон. Цвет: синий, типоразмер: 55 см x 84 см

2.3. Чехлы для подголовника изготовлены из:

Наружный слой - высококачественная бумаги плотностью 20-22 грамм/см

Внутренний слой - полиэтиленовая пленка плотностью 15-18 микрон.

Цвет: синий, зеленый, белый, типоразмеры: 25 см x 25 см; 25 см x 33 см

Чехлы для стоматологического кресла изготовлены из полиэтиленовой пленки плотностью 22-25 микрон. Цвет: прозрачный, синий, зеленый, белый, типоразмер: 73 см x 210 см

2.4. Маска различного цвета: синий, зеленый, белый, желтый, розовый, типоразмер: 90x175мм

Маски изготовлены из:

- наружный слой – спанбонд (нетканый материал) или бумага;
- внутренний слой – фильтр;
- носовой фиксатор

3. Противопоказания к применению.

Физиологическая непереносимость материала из которого сделаны изделия.

4. Подготовка к работе изделия.

Вскрыть упаковку и взять необходимые для работы изделие.

5. Порядок работы изделия.

Поместить изделие на защищаемый объект.

6. Правила хранения и использования.

Транспортирование изделий производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по ГОСТ 7000. Валики устойчивы к условиям хранения и транспортирования по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

7. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления

Таблица сравнения с аналогами

	Салфетка для защиты пациента «Dispodent» Производство «ВН Medical Products Co., Ltd.» Китай	Салфетки для пациентов JNB Производство Shanghai Dochem Industries Co. Китай, РУ ФСЗ № 2009/04369 от 01 июня 2009 года
Область применения	предназначены для защиты пациента во время приема в медицинских учреждениях	предназначены для защиты пациента во время приема у стоматолога
Материалы из которых изготовлены	Тип «Standard» 1 слой бумаги + 1 слой полиэтиленовой пленки Тип «Deluxe» 2 слоя бумаги + 1 слой полиэтиленовой пленки Тип «Perfect» 3 слоя бумаги + 1 слой полиэтиленовой пленки (используется высококачественная рифленая бумага плотностью 20-22 грамм/см и полиэтиленовая пленка плотностью 15-18 микрон)	- один или два слоя рифленой бумаги плотностью 20-22 грамм/см - полиэтиленовая пленка плотностью 15-18 микрон
Размеры	33 см x 48 см	33 см x 48 см
Цвета	синий, зеленый, белый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый	синий, зеленый, белый, желтый, розовый, фиолетовый
Упаковки	<u>Салфетки для защиты пациентов «Dispodent» типов «Standard», «Deluxe» и «Perfect» № 500:</u> Полиэтиленовый пакет – 250 штук Транспортная коробка – 2 полиэтиленовых пакета (500 штук) <u>Салфетки для защиты пациентов «Dispodent» типов «Standard», «Deluxe» и «Perfect» № 1000:</u> Полиэтиленовый пакет – 500 штук Транспортная коробка – 2 полиэтиленовых пакета (500 штук)	Транспортная коробка – 500 штук
Срок хранения с даты производства	5 лет	5 лет
	Фартук для защиты пациента «Dispodent» однократного применения Производство «ВН Medical Products Co., Ltd.» Китай	Фартук для пациентов JNB Производство Shanghai Dochem Industries Co. Китай, РУ ФСЗ № 2009/04369 от 01 июня 2009 года
Область применения	предназначены для защиты пациента во время приема в медицинских учреждениях	предназначены для защиты пациента во время приема у стоматолога
Материалы из которых изготовлены	Фартуки с завязками изготовлены из полиэтиленовой пленки плотностью 22-25 микрон.	Фартуки с завязками изготовлены из полиэтиленовой пленки плотностью 20-22 микрон.
Размеры	55 см x 84 см	55 см x 80 см
Цвета	синий	синий
Упаковки	<u>Фартуки для защиты пациентов:</u> Рулон – 200 штук (в полиэтиленовой упаковке) Картонная упаковка – 10 рулонов (2000 штук)	<u>Фартуки для защиты пациентов:</u> Рулон – 200 штук (в полиэтиленовой упаковке) Картонная упаковка – 10 рулонов (2000 штук)
Срок хранения с даты производства	5 лет	5 лет
	Чехлы для врачебного кресла и подголовника врачебного кресла «Dispodent» Производство «ВН Medical Products Co., Ltd.» Китай	Чехлы для подголовников JNB Производство Shanghai Dochem Industries Co. Китай, РУ ФСЗ № 2009/04369 от 01 июня 2009 года
Область применения	- обеспечение гигиенической защиты и дополнительного комфорта для пациента - предохранения медицинского кресла от загрязнения, что уменьшает риск кросс-контаминации	предназначены для защиты пациента и предохранения медицинского кресла от загрязнения

Материалы из которых изготовлены	<u>Чехлы для подголовника</u> - один слой высококачественной рифленой бумаги плотностью 20-22 грамм/см - полиэтиленовая пленка плотностью 15-18 микрон <u>Чехлы для стоматологического кресла</u> - изготовлены из полиэтиленовой пленки плотностью 22-25 микрон	Чехлы для подголовника - один слой бумаги плотностью 18-22 грамм/см - полиэтиленовая пленка плотностью 15-18 микрон Чехлы для стоматологического кресла - изготовлены из полиэтиленовой пленки плотностью 20-22 микрон
Размеры	<u>Чехлы для подголовника</u> 25 см x 25 см 25 см x 33 см <u>Чехлы для стоматологического кресла.</u> 73 см x 210 см	Чехлы для подголовника 25 см x 25 см Чехлы для стоматологического кресла. 70 см x 210 см
Цвета	<u>Чехлы для подголовника</u> синий, зеленый, белый <u>Чехлы для стоматологического кресла</u> прозрачный, синий, зеленый, белый	Чехлы для подголовника Синий Чехлы для стоматологического кресла синий, белый
Упаковка	<u>Чехлы для подголовников «Dispodent»:</u> Полиэтиленовый пакет – 100 штук Транспортная коробка – 5 полиэтиленовых пакета (500 штук) <u>Чехлы для стоматологического кресла:</u> Полиэтиленовая упаковка – 5 штук Транспортная коробка – 20 полиэтиленовых упаковок (100 штук)	Чехлы для подголовников Транспортная коробка – 500 штук <u>Чехлы для стоматологического кресла:</u> Транспортная коробка – 50 штук
Срок хранения с даты производства	5 лет	5 лет
	Маска защитная «Dispodent» однократного применения Производство «ВН Medical Products Co., Ltd.» Кумай	Маска защитная JNB Производство Shanghai Dochem Industries Co. Кумай, РУ ФСЗ № 2009/04369 от 01 июня 2009 года
Область применения	Применение масок необходимо для защиты медицинских работников и пациентов от воздушных инфекций	Применение масок необходимо для защиты медицинских работников и пациентов от воздушных инфекций
Материалы из которых изготовлены	<u>Маска защитная «Dispodent» :</u> - наружный слой – спанбонд (нетканый материал) или бумага; - внутренний слой – фильтр; - носовой фиксатор.	Маска: - наружный слой – спанбонд (нетканый материал); - внутренний слой – фильтр; - носовой фиксатор.
Размеры	90 мм x 175 мм	90 мм x 175 мм
Цвета	синий, зеленый, белый, желтый, розовый	синий, зеленый, белый
Упаковка	<u>Маска защитная «Dispodent» :</u> Картонная коробочка – 50 штук. Транспортная коробка – 40 картонных коробочек (2000 штук).	Картонная коробочка – 50 штук. Транспортная коробка – 40 картонных коробочек (2000 штук).
Срок хранения с даты производства	5 лет	5 лет

Генеральный директор

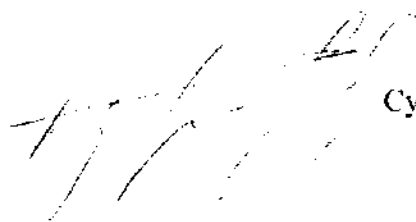

Суворов П.Б.

