

公 证 书

中华人民共和国辽宁诚信公证处



ПОДТВЕРЖДАЮ
точность, достоверность
и правильность

Вице-президент

Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co., Ltd.

Ли Чуньхуай



Инструкция по применению

**Презервативы из натурального латекса марки LUXE ROYAL, в вариантах
исполнения**

2017г.

1. Наименование медицинского изделия.

Презервативы из натурального латекса марки LUXE ROYAL в вариантах исполнения:

Презервативы из натурального латекса марки LUXE ROYAL:

1. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
2. Презерватив стимулирующий с усиками «МАХИМА КОНЕЦ СВЕТА»
3. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА КОРОЛЕВСКИЙ ЭКСПРЕСС»
4. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА ГЛУБИННАЯ БОМБА»
5. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА СИГАРА ХУАНА»
6. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
7. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА АРИЗОНСКИЙ БУЛЬДОГ»
8. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ»
9. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА ЗЛОЙ КОВБОЙ»
10. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХИМА ГАВАЙСКИЙ КАКТУС»
11. Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE КРАСНЫЙ КАМИКАДЗЕ»
12. Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE ЧЕРТОВ ХВОСТ»
13. Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE КРИЧАЩИЙ БАНАН»
14. Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
15. Презерватив стимулирующий с шариками-усиками «EXCLUSIVE НОЧНОЙ РАЗВЕДЧИК»
16. Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
17. Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «EXCLUSIVE СЕДЬМОЕ НЕБО»
18. Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА»
19. Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE МОЛИТВА ДЕВСТВЕННОЦЫ»
20. Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE ЗАВОДНОЙ ИСКУСИТЕЛЬ»

2. Назначение.

Для применения в качестве контрацептива барьерного типа, а также для профилактики заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, гепатит В или СПИД и др.)

Показания:

Данный продукт предназначен для предотвращения беременности, главным образом используется во время полового акта, чтобы не допустить попадания сперматозоидов в яйцеклетку, уменьшает вероятность зачатия. Также помогает снизить риск заболеваний, передающихся половым путём (сифилис, гонорея, гепатит В или СПИД и др.)

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материала.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции. При наличии повышенной чувствительности на латекс или аллергических реакций проконсультируйтесь с врачом до начала использования изделия.

3. Класс потенциального риска

26

4. Контакт с организмом человека.

Кратковременно контактирующие со слизистой оболочкой и кожным покровом

5. Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

Транспортировка:

при температуре

от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха до 80% °С при атмосферном давлении 760±10мм рт.ст.

Хранение:

при температуре

от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при атмосферном давлении 760±10мм рт.ст.

Не подвержайте воздействию прямых солнечных лучей.

6. Условия применения:

Для индивидуального применения

7. Комплект поставки и упаковка.

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Каждый презерватив упаковывается в индивидуальную (первичную) упаковку. Первичная (индивидуальная) упаковка имеет следующее исполнение: алюминиевая фольга и пластик. Первичная (индивидуальная) упаковка имеет круглую/капсульную или прямоугольную форму. Индивидуальная упаковка является герметичной. Каждая первичная (индивидуальная) упаковка с изделием должна быть упакована во вторичную (потребительскую) упаковку. Вторичная (потребительская) упаковка имеет следующие виды исполнения: картонные коробки. Первичная (индивидуальная) упаковка размещается во вторичной по 24 штуки. Дополнительно, вторичная (потребительская) упаковка может быть запечатана в полиэтиленовую пленку с отрывной лентой методом «конверт». Для транспортировки изделия одного вида в потребительской упаковке укладывают в ящики из гофрированного картона. Ящики из гофрированного картона с изделиями оклеивают клеевой лентой на бумажной основе, полиэтиленовой лентой с липким слоем или пропиленовой лентой по действующей нормативной и технической документации. Масса

брутто транспортной тары не должна превышать 30 кг. Упакованные изделия могут поставляться в виде транспортных пакетов

8. Описание принципа действия медицинского изделия.

Принципы действия барьерных контрацептивов заключаются в блокировании проникновения спермы в шейную слизь. Преимущества барьерных методов контрацепции следующие: они применяются и действуют только местно, не вызывая системных изменений; они имеют небольшое число побочных эффектов; они в значительной степени предохраняют от болезней, передающихся половым путем, кроме того, они не требуют привлечения в высококвалифицированного медицинского персонала.

Способ применения:

Применяется как гигиеническое средство индивидуального назначения для профилактики венерических заболеваний и нежелательной беременности.

Порядок применения:

Инструкция по применению и графические изображения:



- Пользуйтесь новым презервативом при каждом половом акте.
 - При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
 - Откройте упаковку, извлеките презерватив.
 - Надевайте презерватив на половой член до начала полового акта.
 - Расположите свернутый презерватив на головке полового эрегированного члена. Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы вытеснить воздух. Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива. Расправьте презерватив вниз до основания полового члена.
 - После эякуляции извлеките половой член, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив.
 - Сверните использованный презерватив и поместите в емкость для отходов.
- Презерватив в случае правильного использования является надежной защитой от нежелательной беременности и снижают вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ-инфекций.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Надевайте презерватив до начала полового акта.
- Не используйте презерватив, если его упаковка повреждена или поврежден сам презерватив.
- При необходимости используете смазку только на водной основе.
- Не пользуйтесь в качестве дополнительной смазки растительными, животными и

любыми другими жирами, а также лосьонами и вазелином.

- Не касайтесь презервативом или половым членом влагалища после того, как сняли презерватив.
- НЕ выбрасывайте использованные презервативы в унитаз.

9. Состав медицинского изделия.

Презервативы сформирован из натурального латекса с добавлением вспомогательных веществ, смазки и красителей.

№	Наименование сырья	%
1	Натуральный латекс	96,49%
2	Диспергирующий агент NF (метиленбис нафталинсульфонат натрия)	0.15%
3	Казеин	0.28%
4	Сера	0.85%
5	Окись цинка	1,15
6	Катализатор Рх (цинковая соль этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты)	0,78%
7	Антиоксидант 264 (дитретичный бутил-крезол)	0,30%

Допускается отклонение фактического содержания каждого вещества в изделии не более чем на 0,3% от фактически указанной нормы в таблице.

№	Химическое вещество	Анализ токсичности
1	Сера	сера является добавкой, используемой при вулканизации, может иметь обеззараживающие, инсектицидные свойства, может быть использована для профилактики грибковых заболеваний растений и т.п. В дерматологии сера используется для смягчения кожного покрова и как препарат для лечения чесотки. Токсичность серы чрезвычайно мала, в процессе производства она никак не может привести к отравлению, сера в больших количествах (10-20гр) может вызвать отравление сероводородом, при длительном вдыхании порошка серы может возникнуть невыраженная токсикация. Серный порошок иногда может вызывать конъюнктивит. У аллергиков может привести к экземе. При взаимодействии с секретами, выделяемыми кожными железами, может образовать сероводород и сернистую кислоту, а потому привести к слабому раздражению, но также может впитаться, не причиняя вреда коже.
2	Окись цинка	Цинк, содержащийся в окиси цинка, и его соединения в зависимости от каналов попадания в организм классифицируются от малотоксичных до среднетоксичных веществ, при испытаниях на кошках была выявлена слабость после вдыхания 110-660мг/м ³ на

		протяжении 15 минут. После 45 минут – затруднённое дыхание, после 8 месяцев в стенках бронхов образуются лимфоидные клетки, среди которых много образований из волокон соединительной ткани. Цинк имеет особое негативное воздействие на лёгкие, вызывая медленно прогрессирующий фиброз.
3	Катализатор РХ (цинковая соль этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты)	Катализатор РХ (цинковая соль этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты) относится к веществам с очень малой токсичностью, раздражает кожу и конъюнктиву, может вызвать аллергическую реакцию на коже, при длительном контакте может привести к разрастанию щитовидной железы, смертельная доза для человека – 5-15гр/кг.
4	Антиоксидант 264 (дитретичный бутил-крезол)	антиоксидант 264 (дитретичный бутил-крезол) часто используется в качестве антиоксиданта симптомы острого отравления у животных: слюноотделение, незначительное сужение зрачков, беспокойство. На основании наблюдений за собаками и крысами можно сделать вывод, что при хронической интоксикации является относительно безопасным соединением.
5	Казеин	казеин – это фосфоросодержащий белок, получаемый из бобов и молока, гигроскопичен, после поглощения влаги происходит его стремительная модификация, является нетоксичным веществом
6	Диспергирующий агент NF (метиленбис нафталинсульфонат натрия)	(не найден в материалах по промышленной токсикологии)
7	Смазка силиконовое масло	абсолютно нетоксичное и безвредное вещество (не найдено в материалах по промышленной токсикологии) следует обратить внимание: все указанные выше данные взяты из материалов по промышленной токсикологии.

Изделие представляет собой непроницаемый для спермы чехол, изготовленный из натурального латекса, который надевается на эрегированный половой член.

Герметично упакован в первичную (индивидуальную) упаковку и содержит не менее 20 мг силиконового масла.

Силиконовое масло CAS: 63148-62-9

Состав продукта:

Название	Действующий стандарт	Номер CAS	Процентное содержание
Диметилциклосилоксан	HG/T 2366-92	9016-00-6	99,78%
Катализатор	HG/T 2366-92	75-59-2	0,0022%

Производитель: Пекинская торгово-промышленная компания «Дин Е Кемикалс Ко., Лтд.»

Состав красителя: Красный, Зеленый, Синий, Жёлтый


Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 Варианты цвета: Красный, Зеленый, Синий, Жёлтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3


Состав упаковки:

Индивидуальная упаковка:

Материал: Алюминиевая фольга, алюминизированная пленка или пластик для обертки, ПВХ. Фольга: D8019788-(PET/ALFOIL/LDPE)Полимерная пленка/Алюминиевая фольга Фольга/полиэтилен низкой плотности. Изделие герметично упаковано в первичную (индивидуальную) упаковку и содержит не менее 20 мг силиконового масла.

Чертеж упаковки

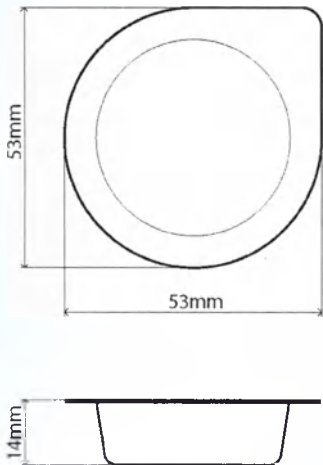

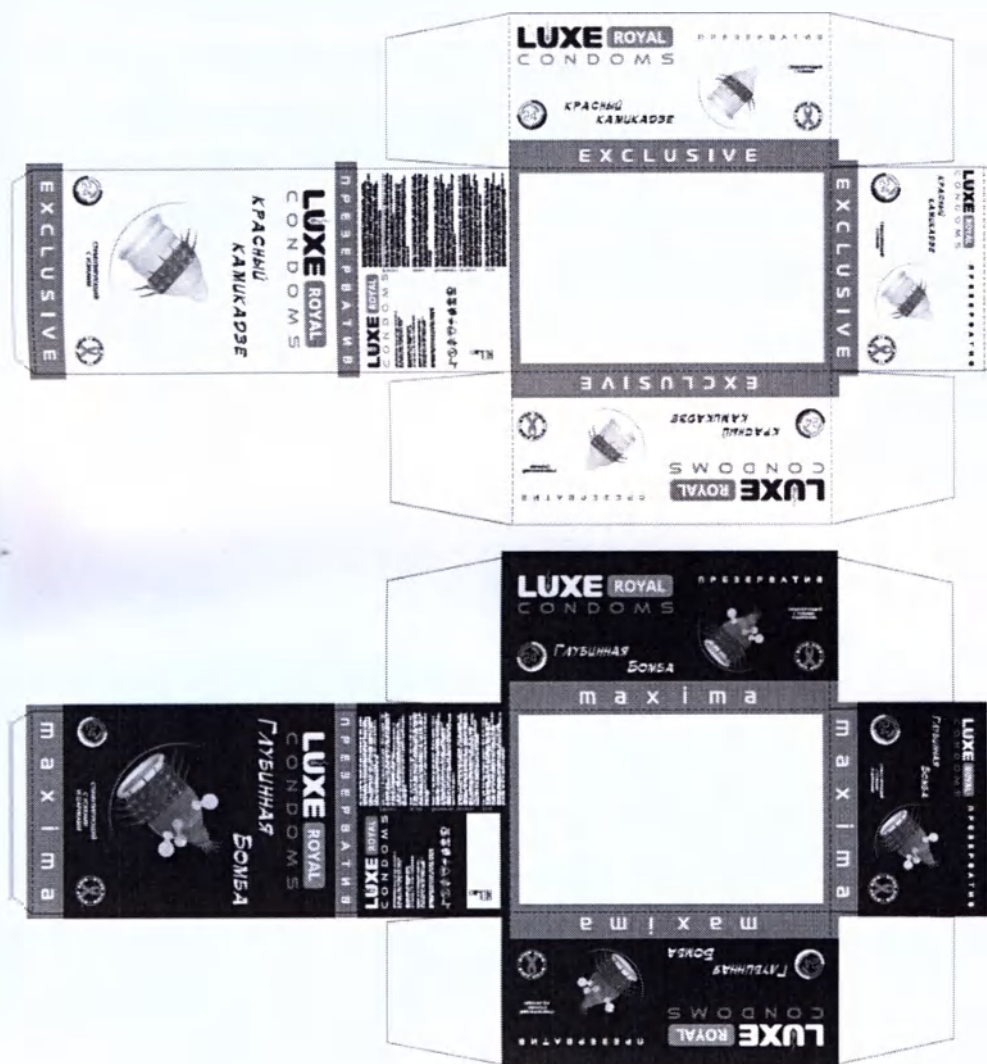

Вторичнаяупаковка (FOLDINGBOXBOARD GC1, Bohui)

Материал: серая бумага, белая бумага, картон.

МаркиLUXE ROYAL MAXIMAиEXCLUSIVE:

Ширина: 120±2 мм;

Высота: 68±2 мм;

Плотность картона: от 300 г/м2.

ЯщикизгофрированногокартонаDomino, Luxe Royal (Grade A Cardboard Paper FD1, Bohui):


Ширина: 240 мм x высота 380 мм x глубина 540 мм

ЯщикизгофрированногокартонаLuxe (GradeACardboardPaperFD1, Bohui):

Ширина: 300 мм x высота 490 мм x глубина 450 мм

10. Технические характеристики, требования и нормы, определяющие показатели качества, функциональные и эксплуатационные характеристики МИ и принадлежностей.

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

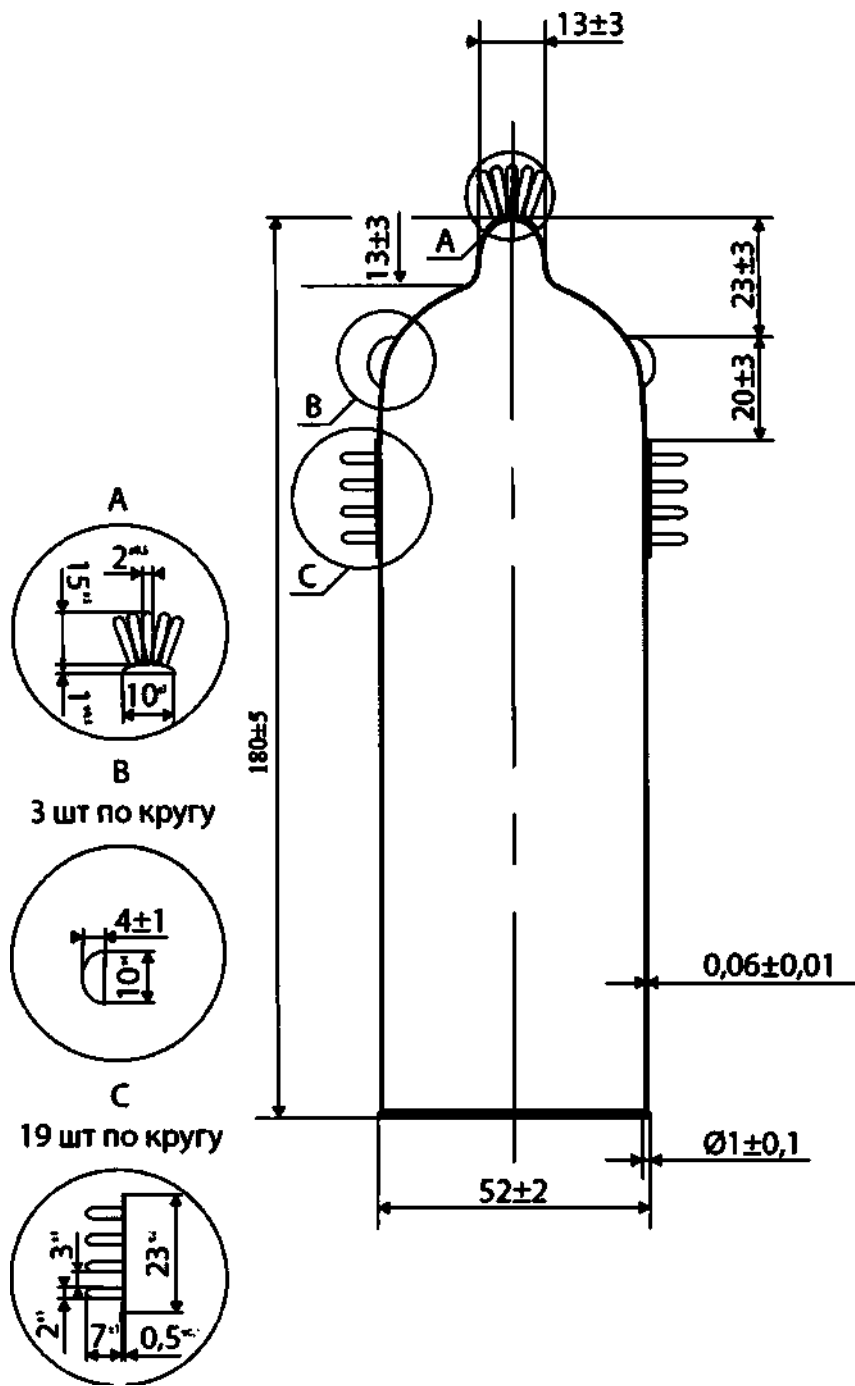


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Толщина:
Манжет: 1±0.1 мм
Презерватив: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Зеленый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками «MAXIMA КОНЕЦ СВЕТА»

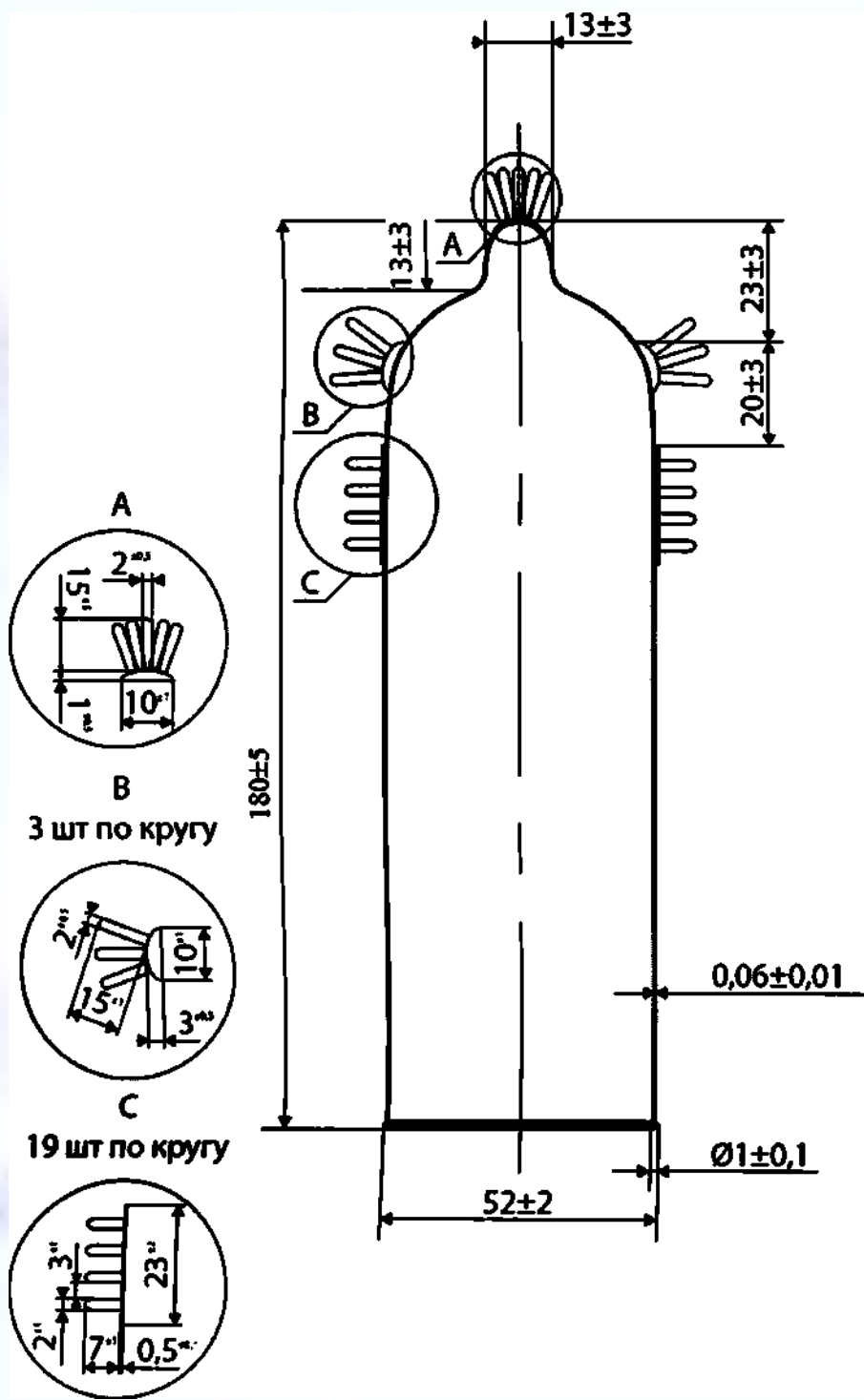


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Толщина:
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Красный	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA КОРОЛЕВСКИЙ
ЭКСПРЕСС»

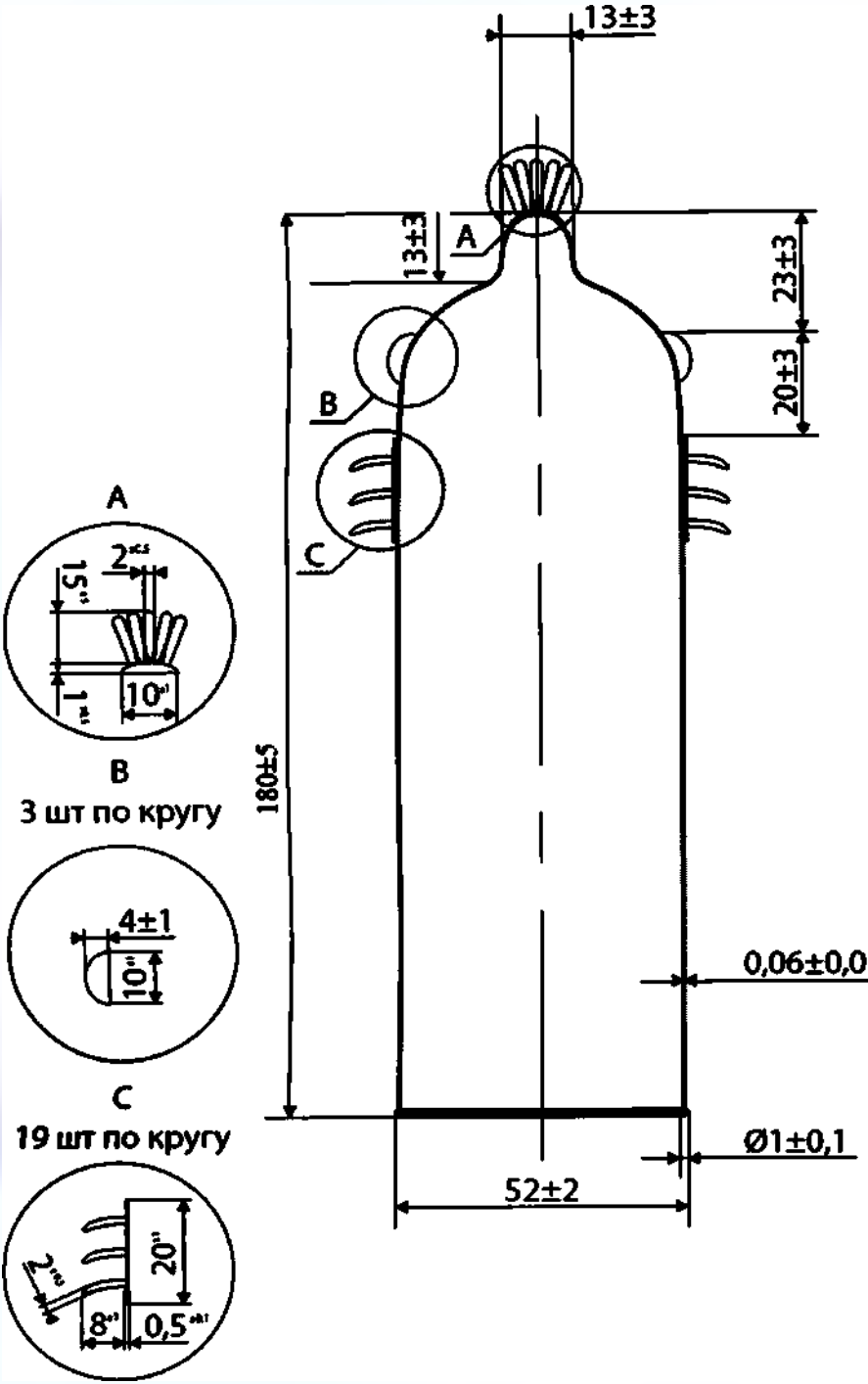


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Зеленый, Синий	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
 Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «МАХІМА ГЛУБИННАЯ БОМБА»

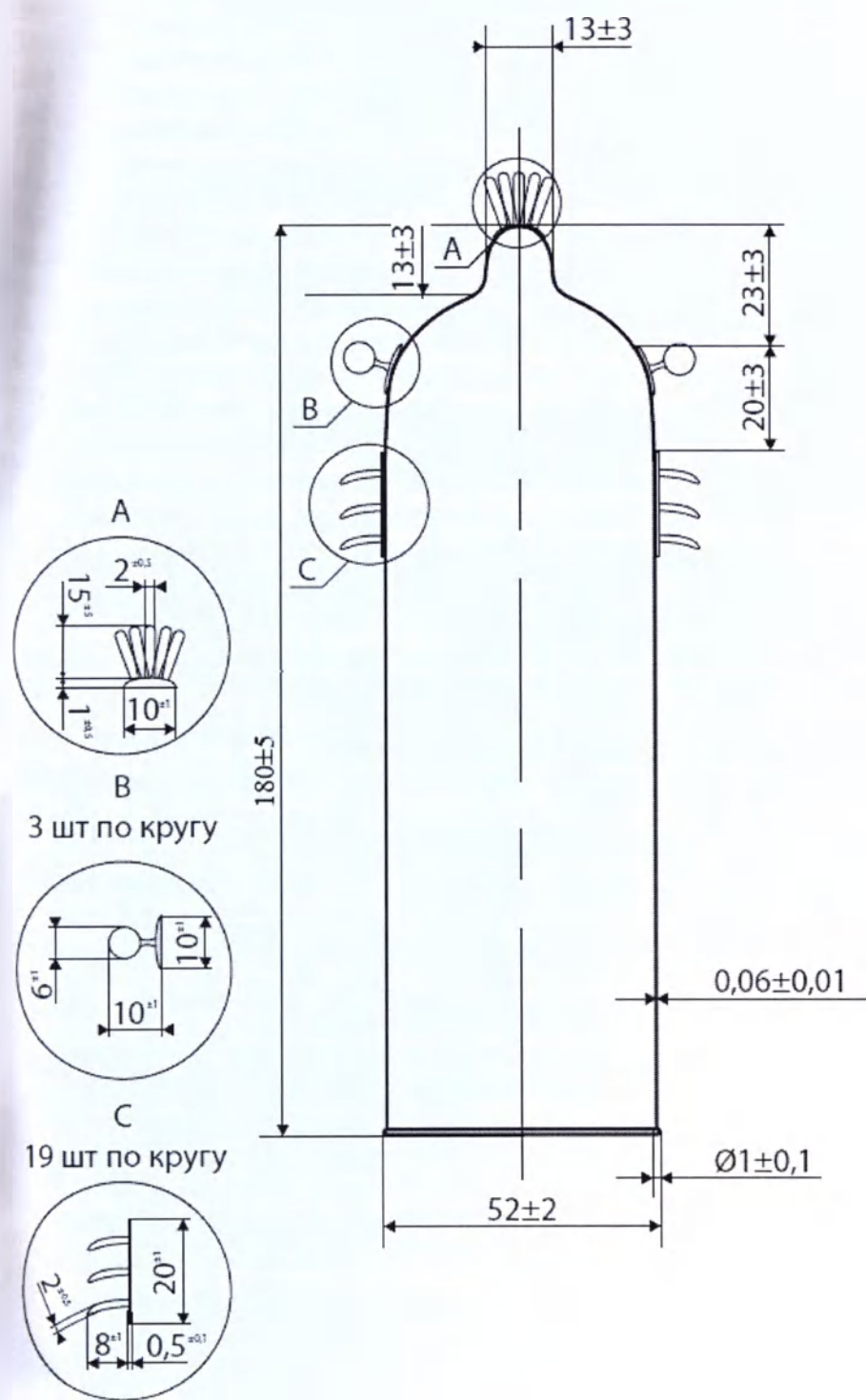

Размеры:

Длина: 180±5 мм

Диаметр: 52±2 мм

Длина накопителя: 13±3 мм

Ширина накопителя 13±3мм

Диаметр манжета: 1±0.1 мм

Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 2,1±0,3 г

Материал усиков и шариков: Натуральный латекс

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая


Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Синий, Желтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA СИГАРА ХУАНА»

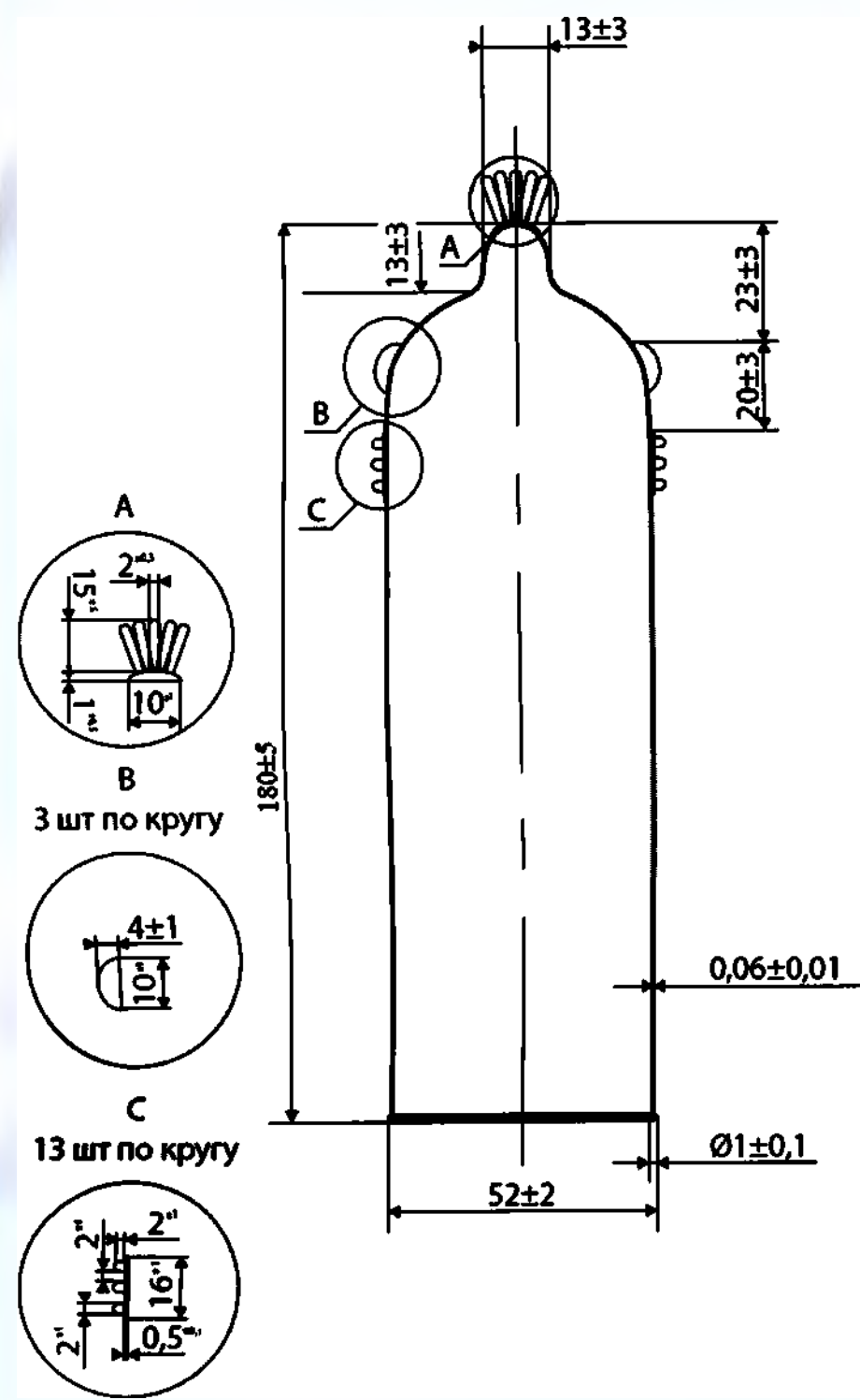


измеры:
 длина: 180±5 мм
 диаметр: 52±2 мм
 длина накопителя: 13±3 мм
 Диаметр накопителя 13±3мм
 Диаметр манжета: 1±0.1 мм
 Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
 Масса: 2,1±0,3 г.
 Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
 Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая.
 Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Желтый, Зеленый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»

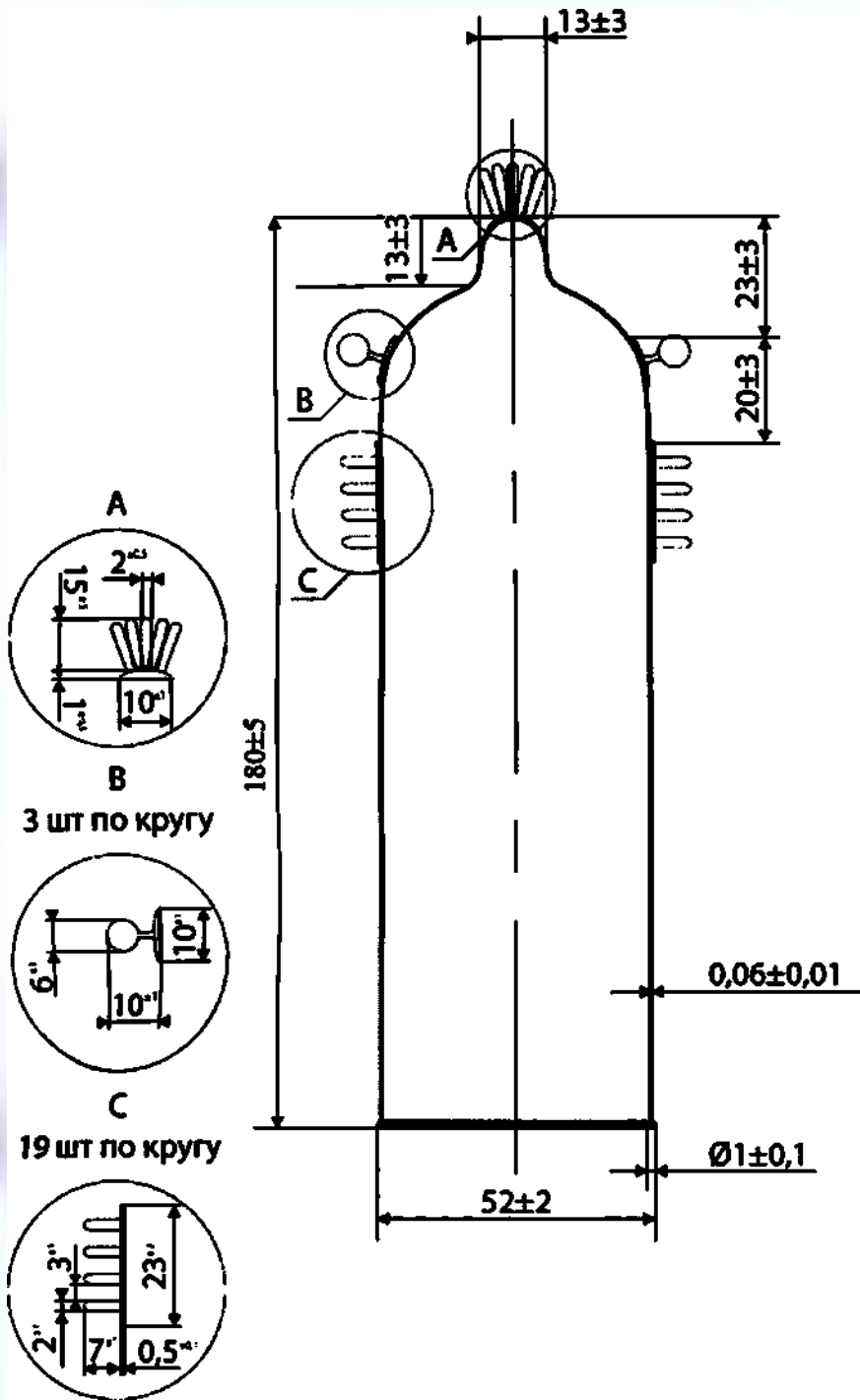


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Толщина:
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: красный, желтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA АРИЗОНСКИЙ
БУЛЬДОГ»

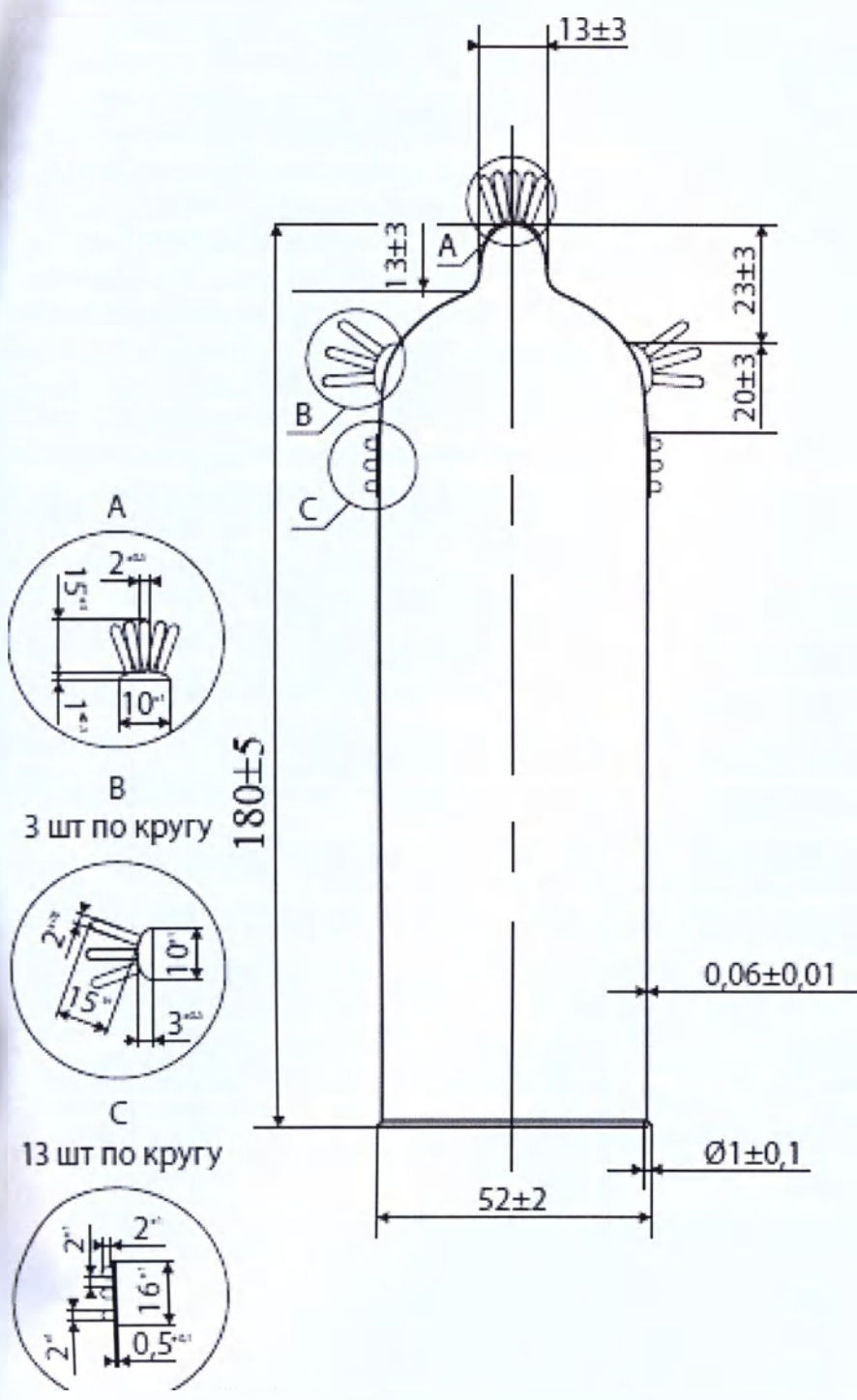


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета: 1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Желтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ»

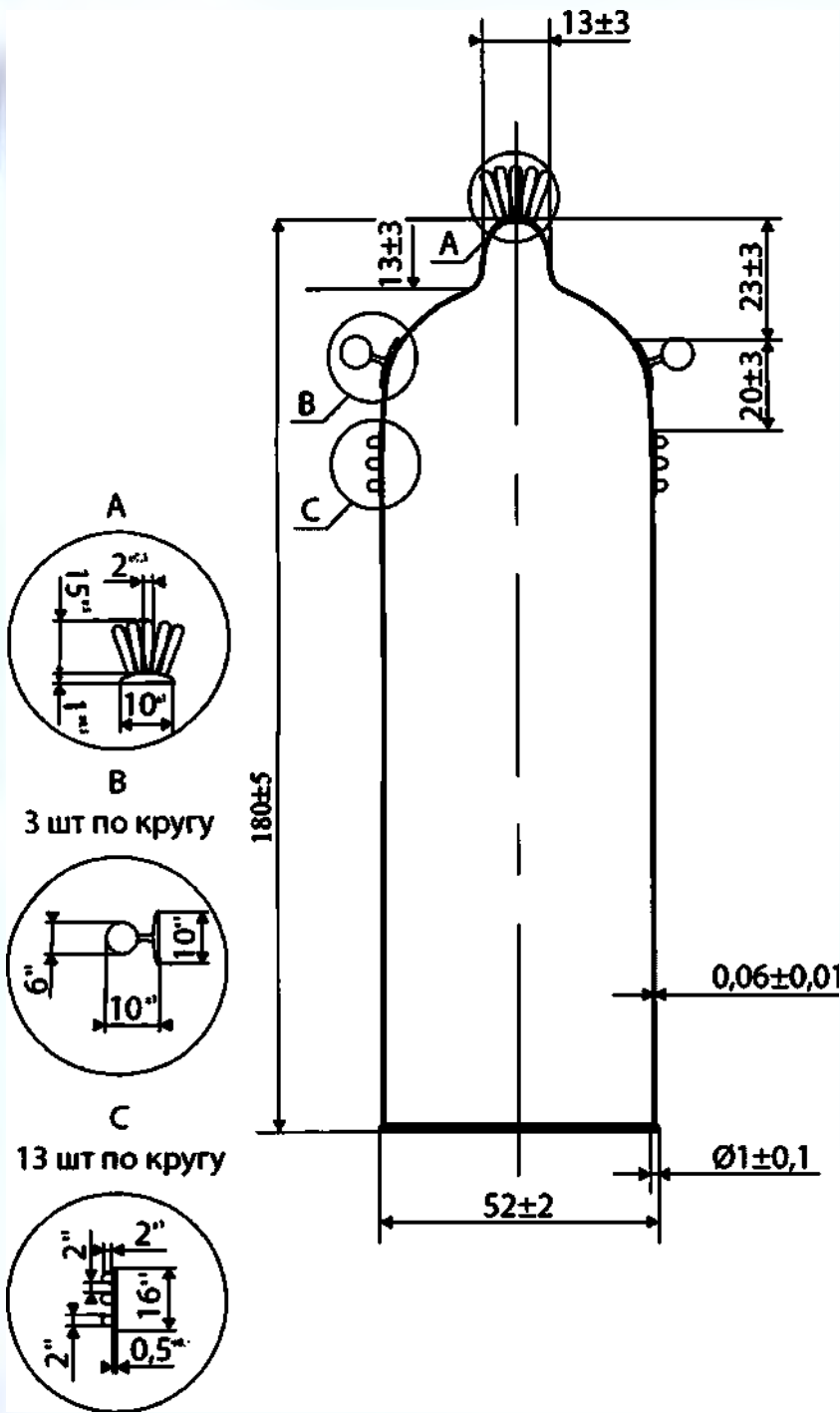


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Желтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «MAXIMA ЗЛОЙ КОВБОЙ»

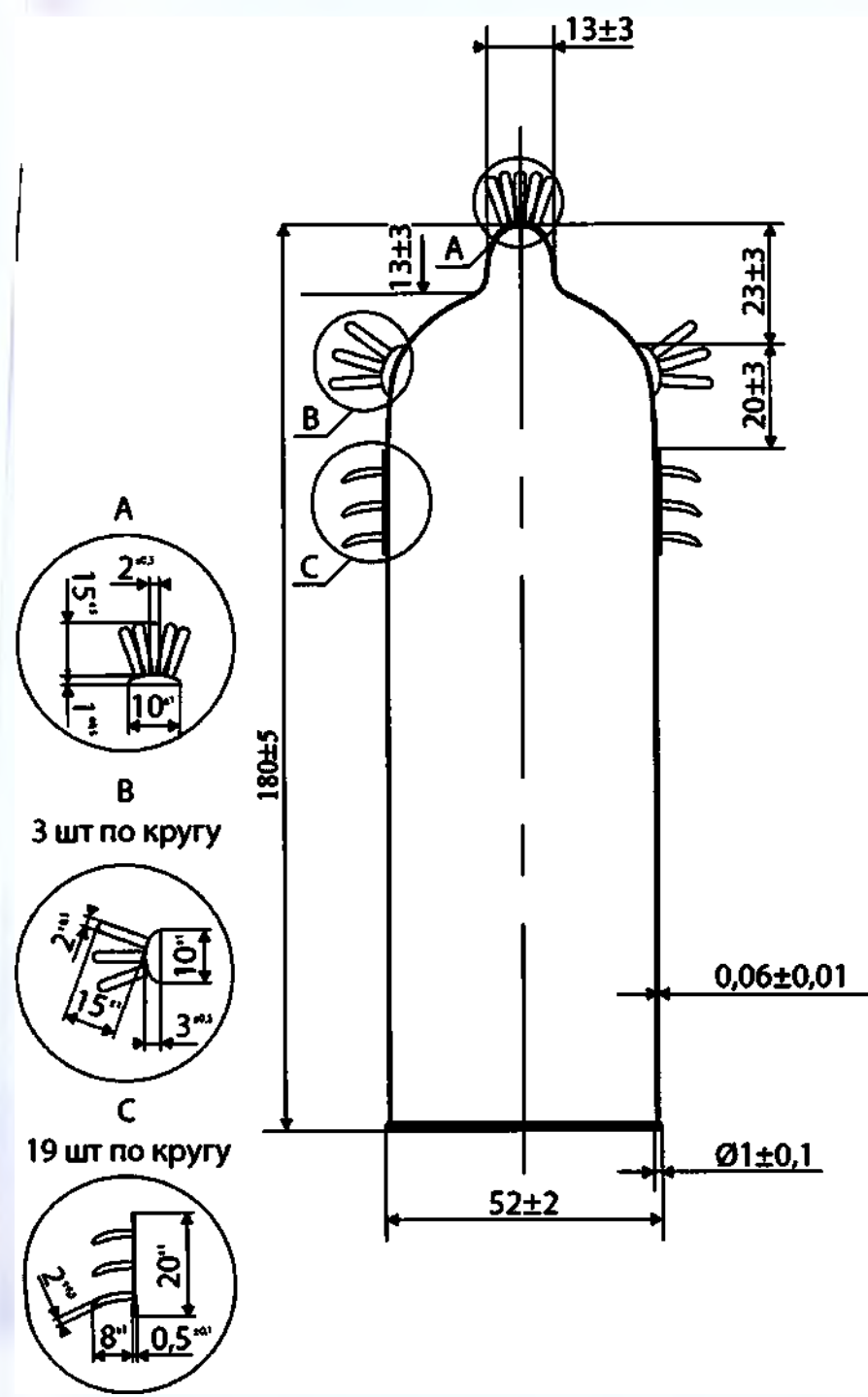

измеры:
лина: 180±5 мм
иаметр: 52±2 мм
лина накопителя: 13±3 мм
ирина накопителя 13±3мм
иаметр манжета:1±0.1 мм
олщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
асса: 2,1±0,3 г.
атериал усиков и шариков: Натуральный латекс
физико-механические показатели:
вет: бесцветный
орма выпуска: с накопителем
манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
оверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
ромат: без запаха
мазка: силиконовое масло
орма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
ип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.


остав красителя усиков и шариков:

аименование сырья	%
еионизированная вода	58
гент, предотвращающий замерзание F-19	8
нтисептик Н-28	1,1
нтивспенивающий агент Н-9	1,6
раситель J-11 вета: Красный, Синий	30
ейтразлизатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
словная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:

Презерватив стимулирующий с усиками и шариками « MAXIMA ГАВАЙСКИЙ КАКТУС »

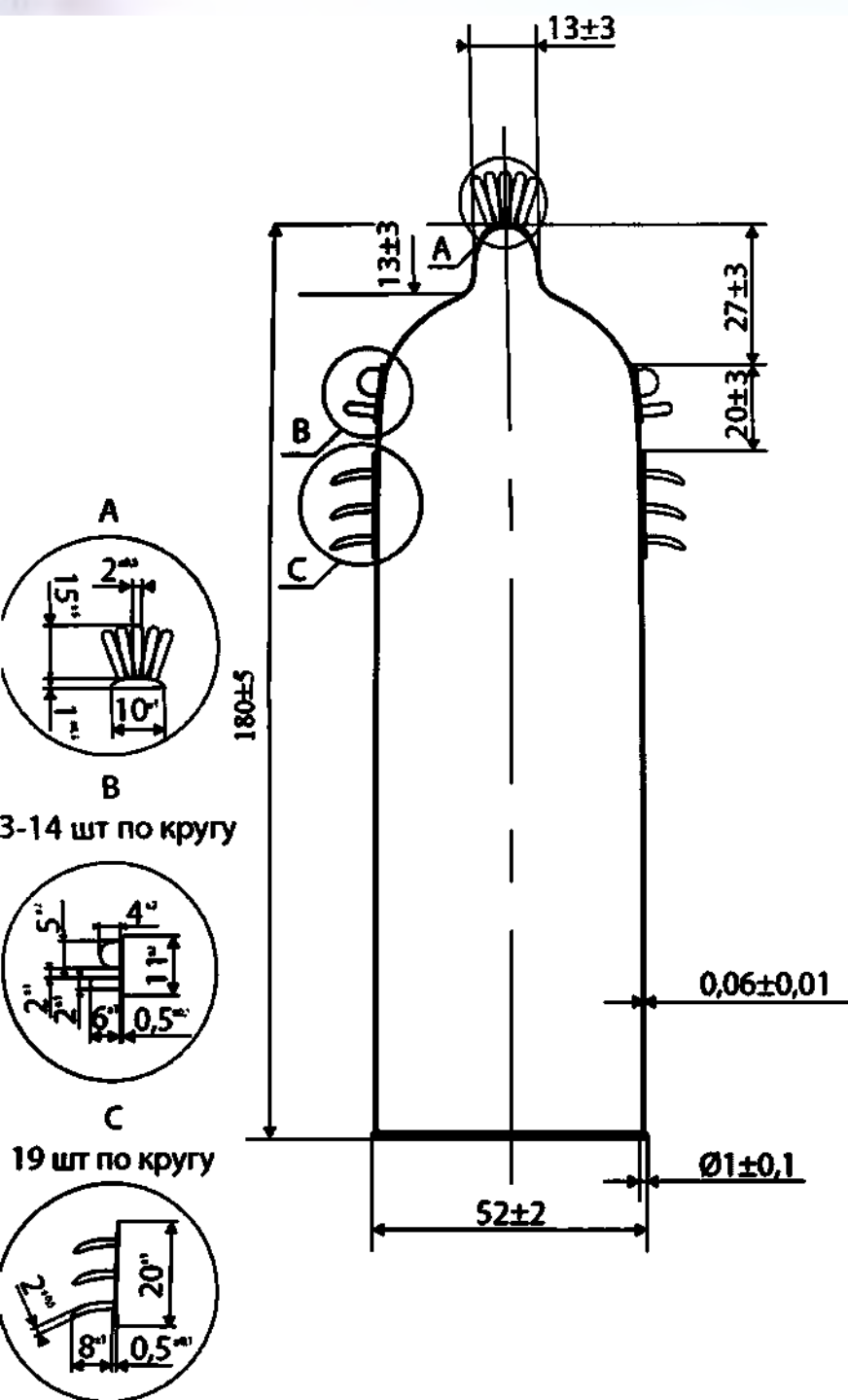


Размеры:
 Длина: 180±5 мм
 Диаметр: 52±2 мм
 Длина накопителя: 13±3 мм
 Ширина накопителя 13±3мм
 Диаметр манжета:1±0.1 мм
 Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
 Масса: 2,1±0,3 г.
 Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
 Физико-механические показатели:
 Цвет: бесцветный
 Форма выпуска: с накопителем
 Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
 Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
 Аромат: без запаха
 Смазка: силиконовое масло
 Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
 Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Зеленый, Синий	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE КРАСНЫЙ КАМИКАДЗЕ»

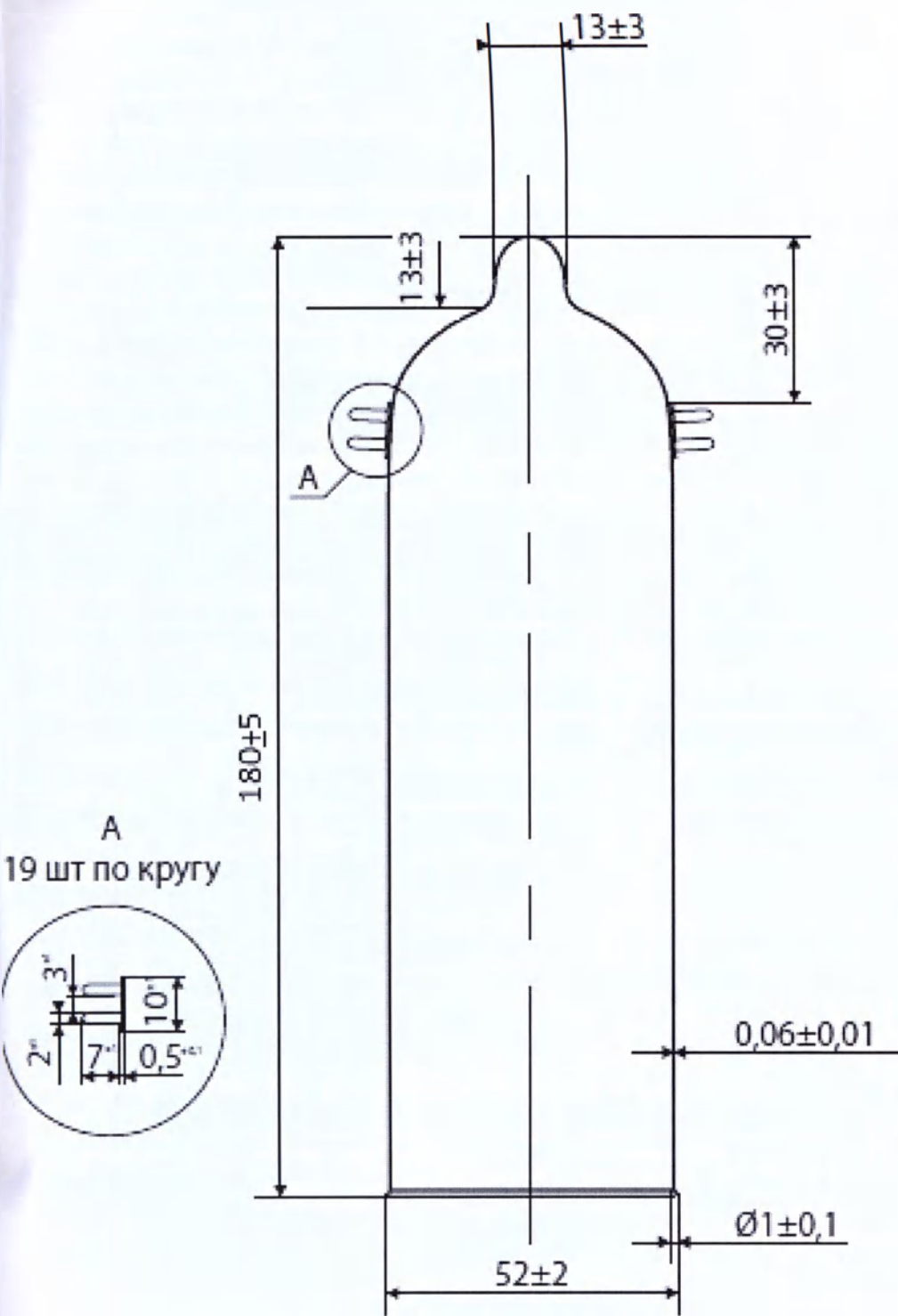


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков :

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Красный	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE ЧЕРТОВ ХВОСТ»

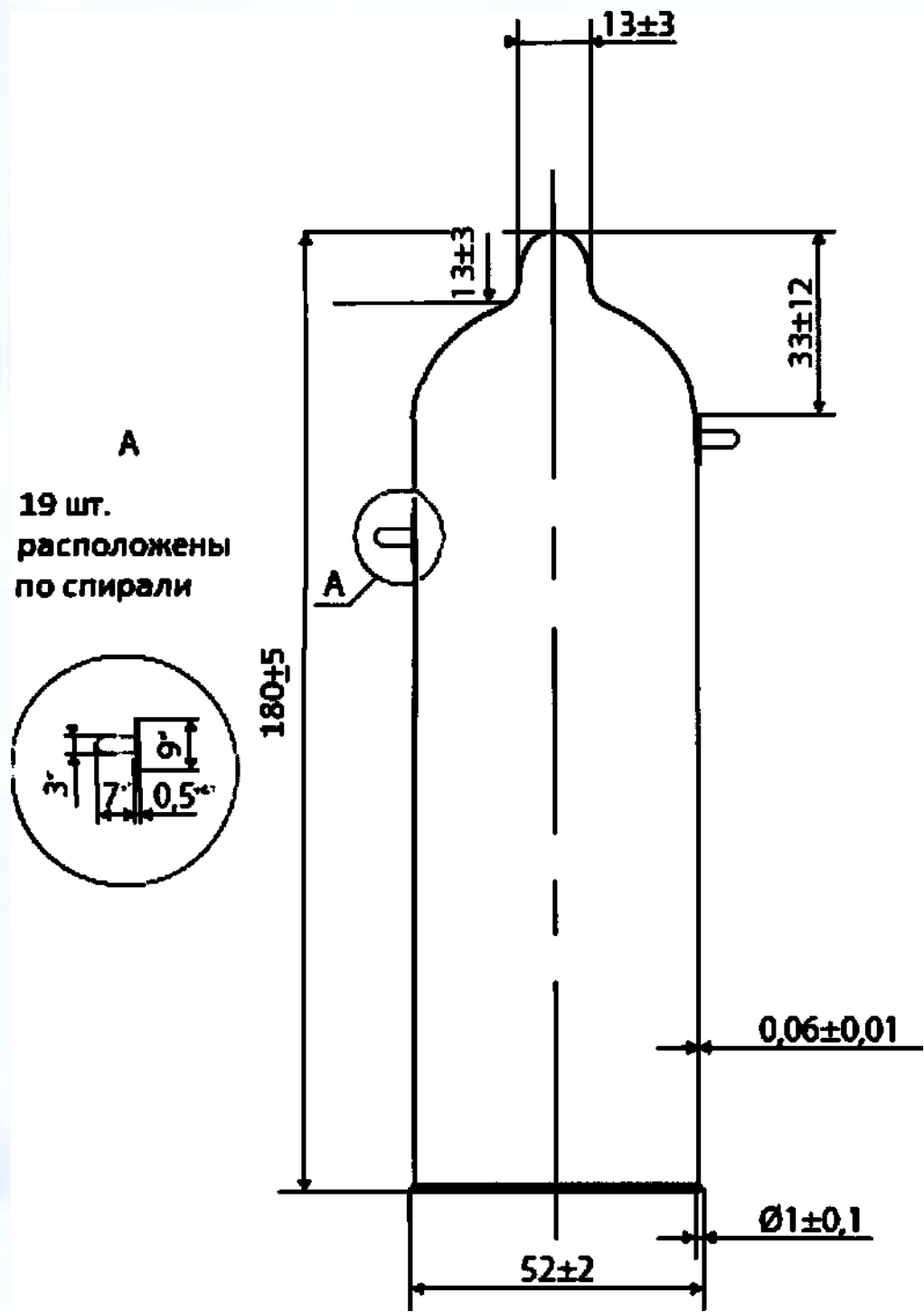


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Красный	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE КРИЧАЩИЙ БАНАН»

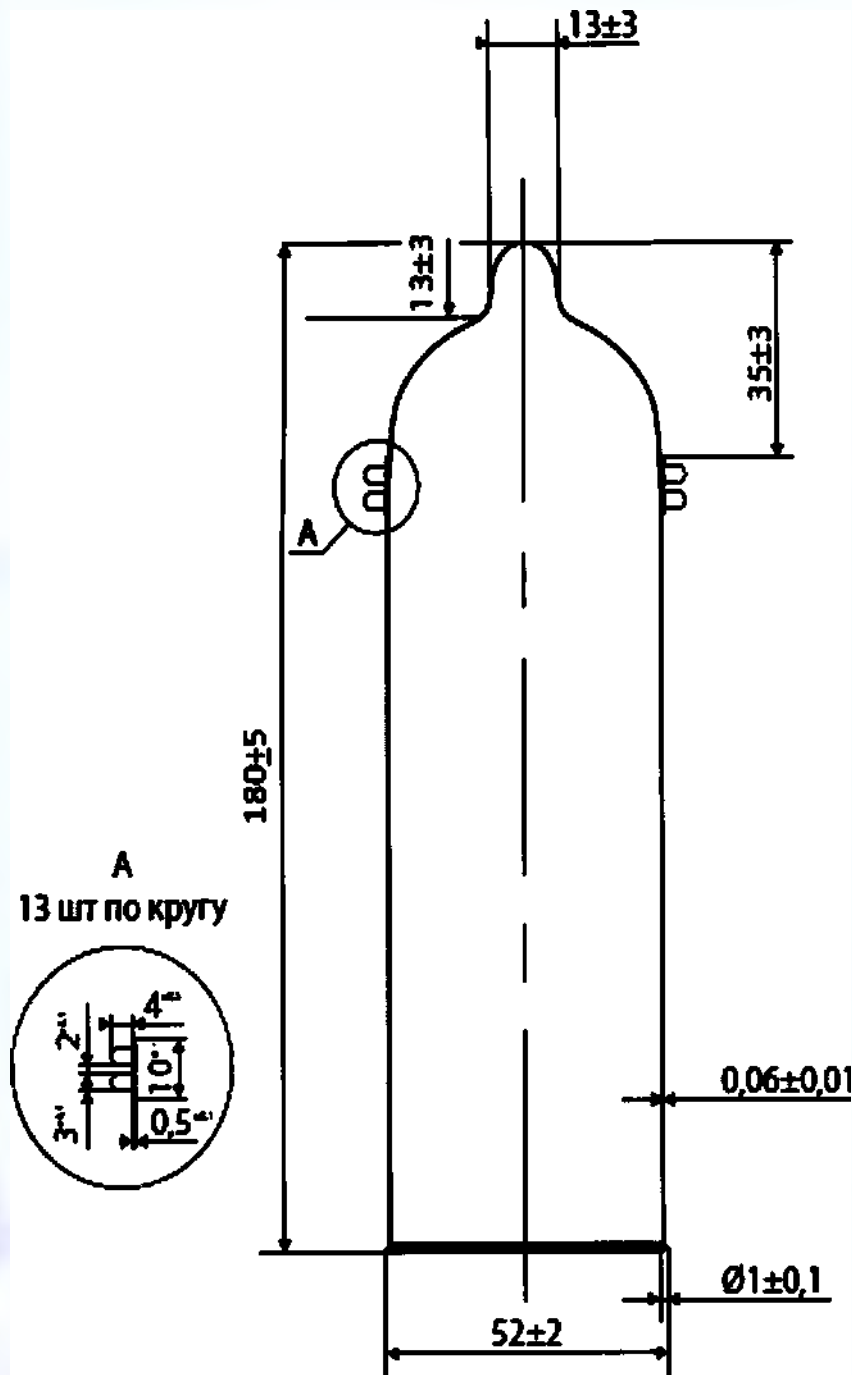


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Желтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»

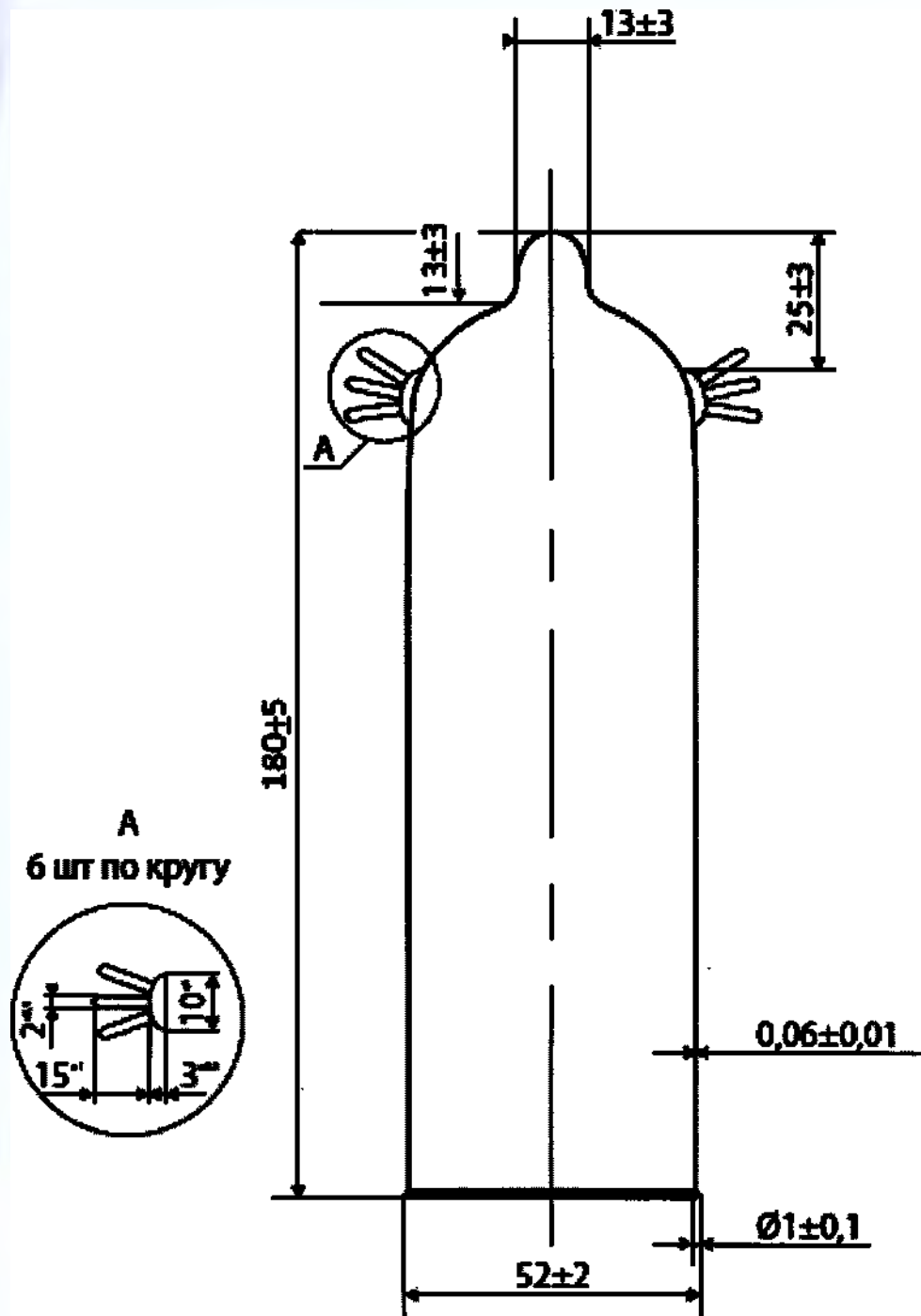


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Красный	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий усиками «EXCLUSIVE НОЧНОЙ РАЗВЕДЧИК»

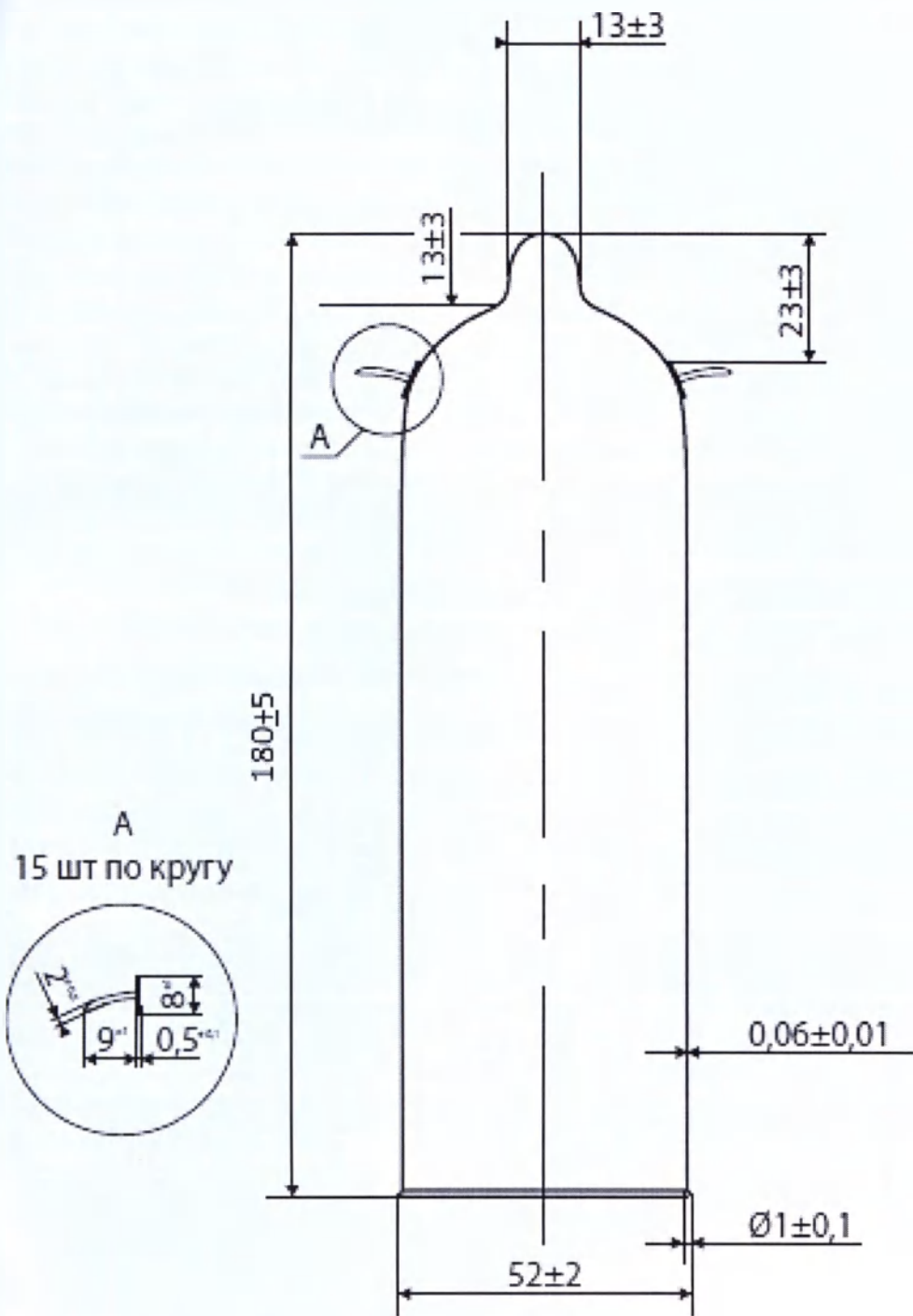


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик :
Поверхность: текстура – гладкая с шариками-усиками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая.
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Синий	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив стимулирующий с усиками «EXCLUSIVE ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

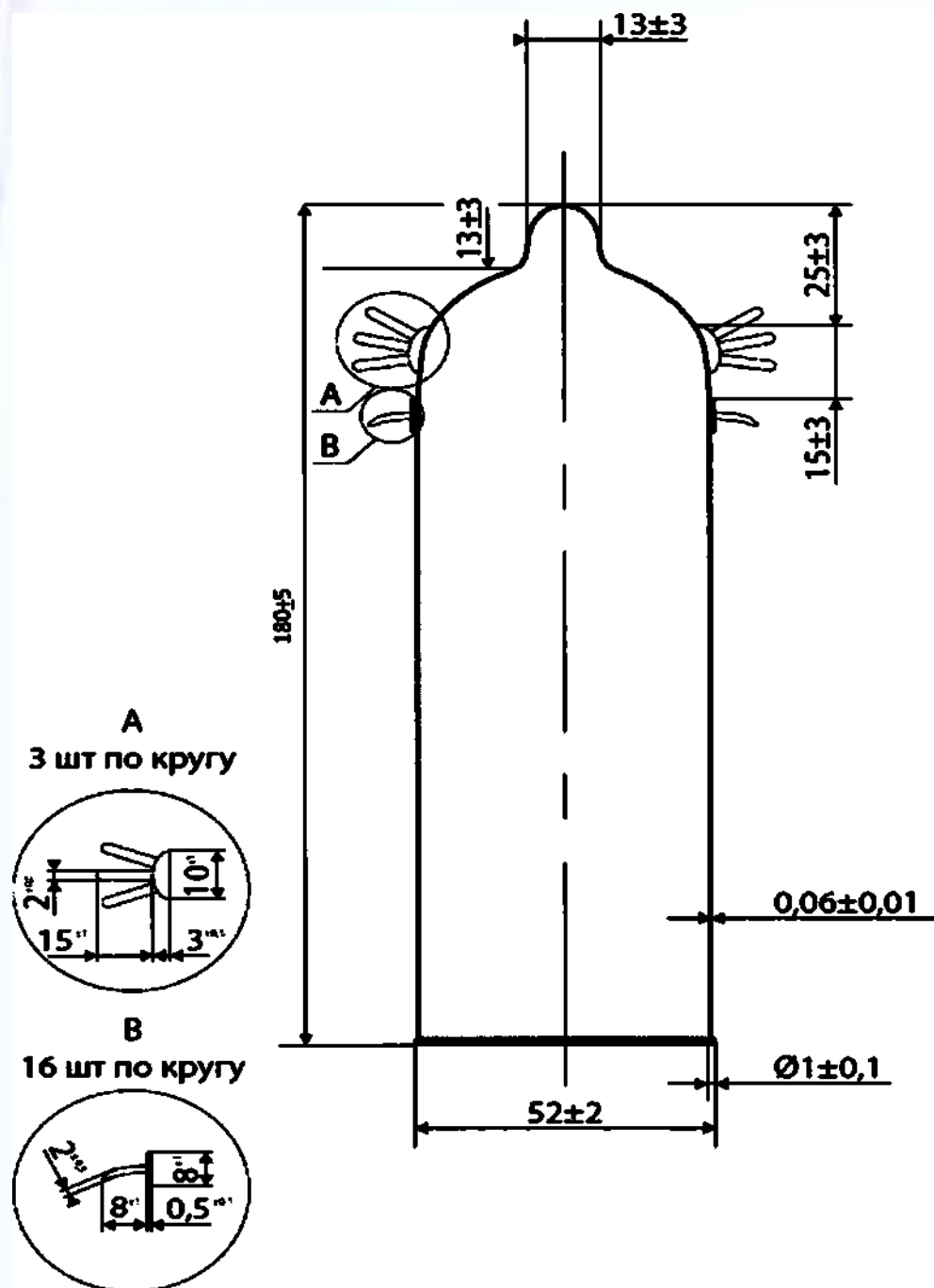


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Красный, Синий	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с усиками и шариками «EXCLUSIVE СЕДЬМОЕ НЕБО»

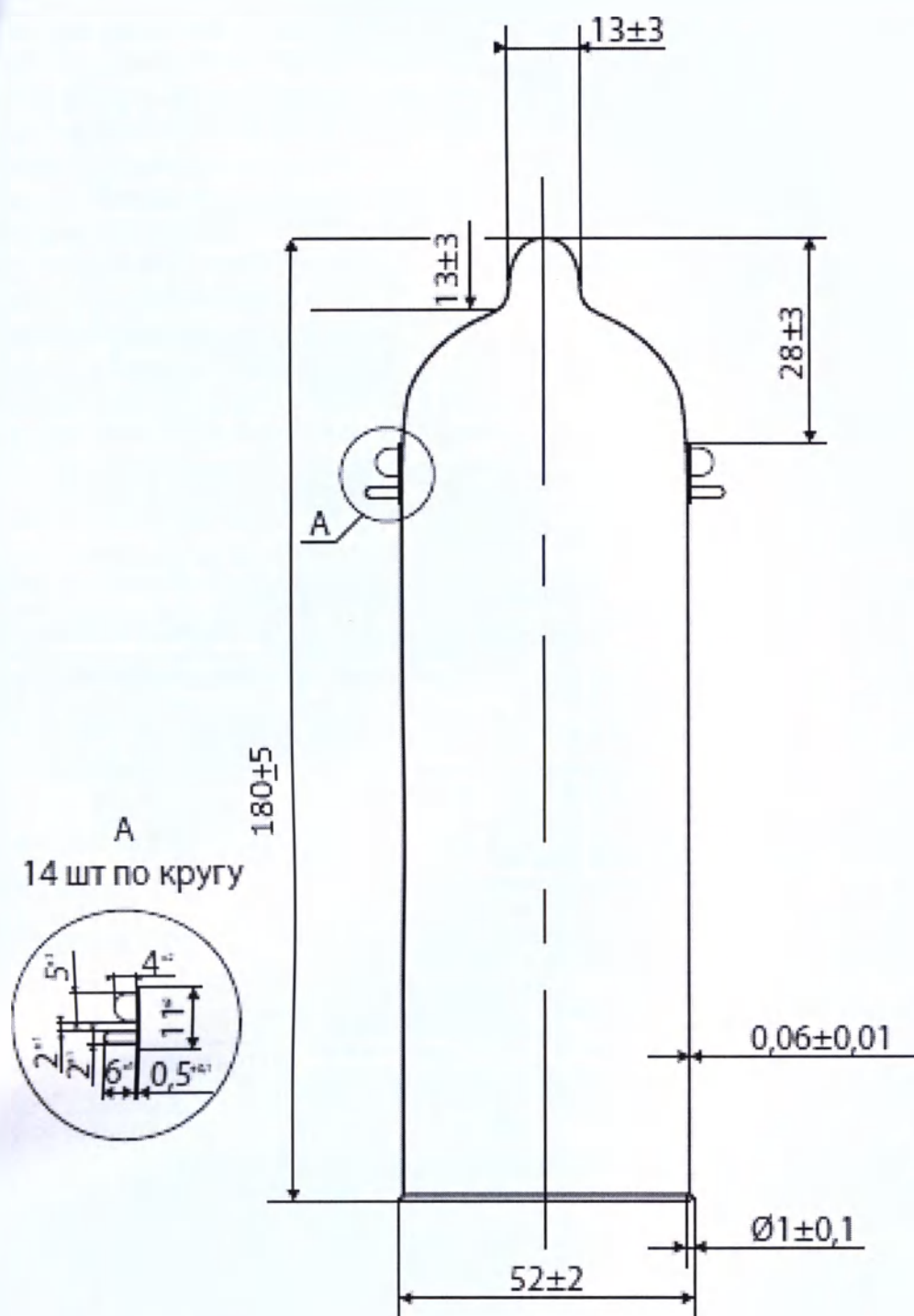


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета: 1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с усиками и шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя усиков и шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Синий	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА»

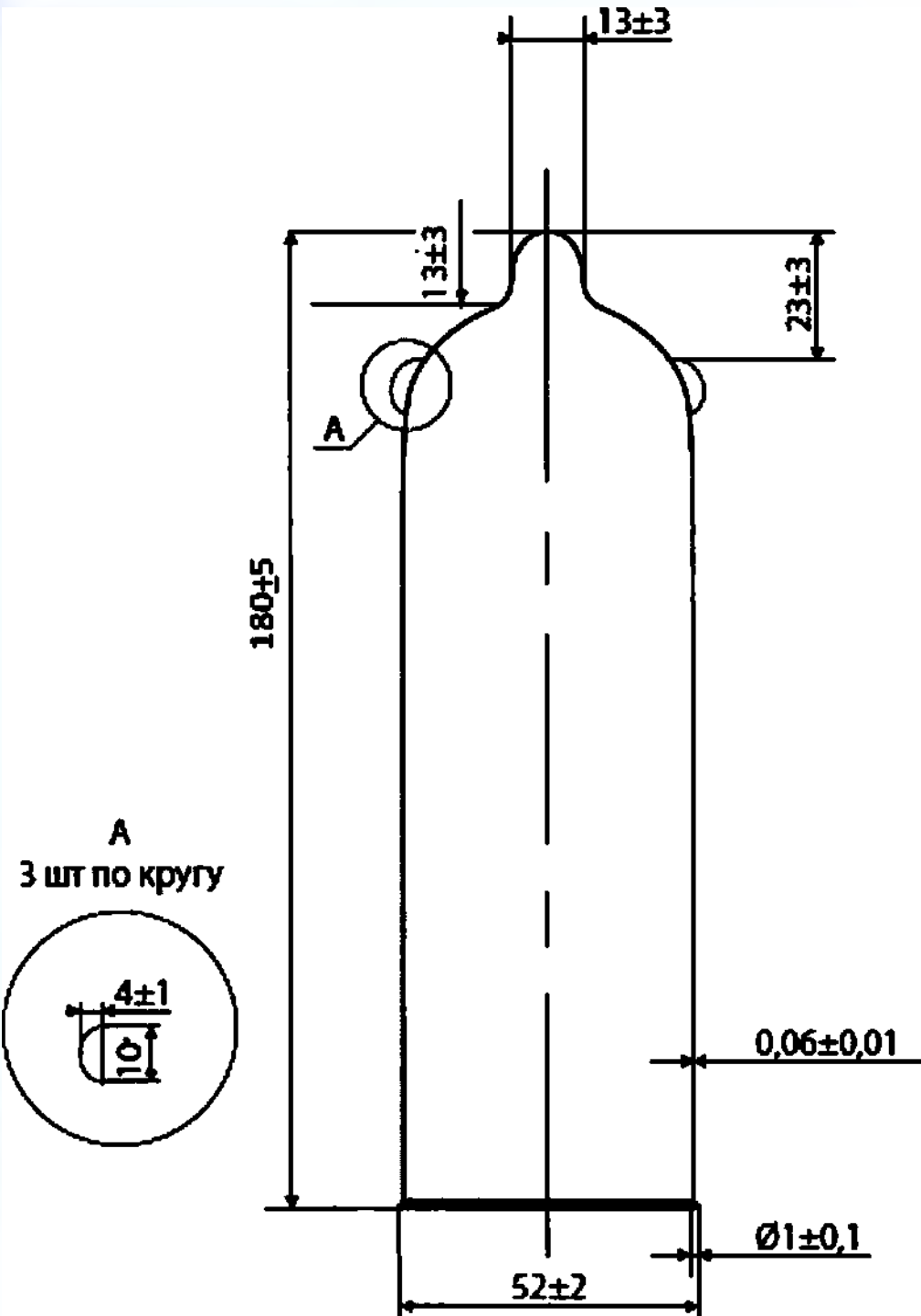


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Голщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.
Поверхность: текстура – гладкая с шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Зеленый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE МОЛИТВА ДЕВСТВЕННОИЦЫ»

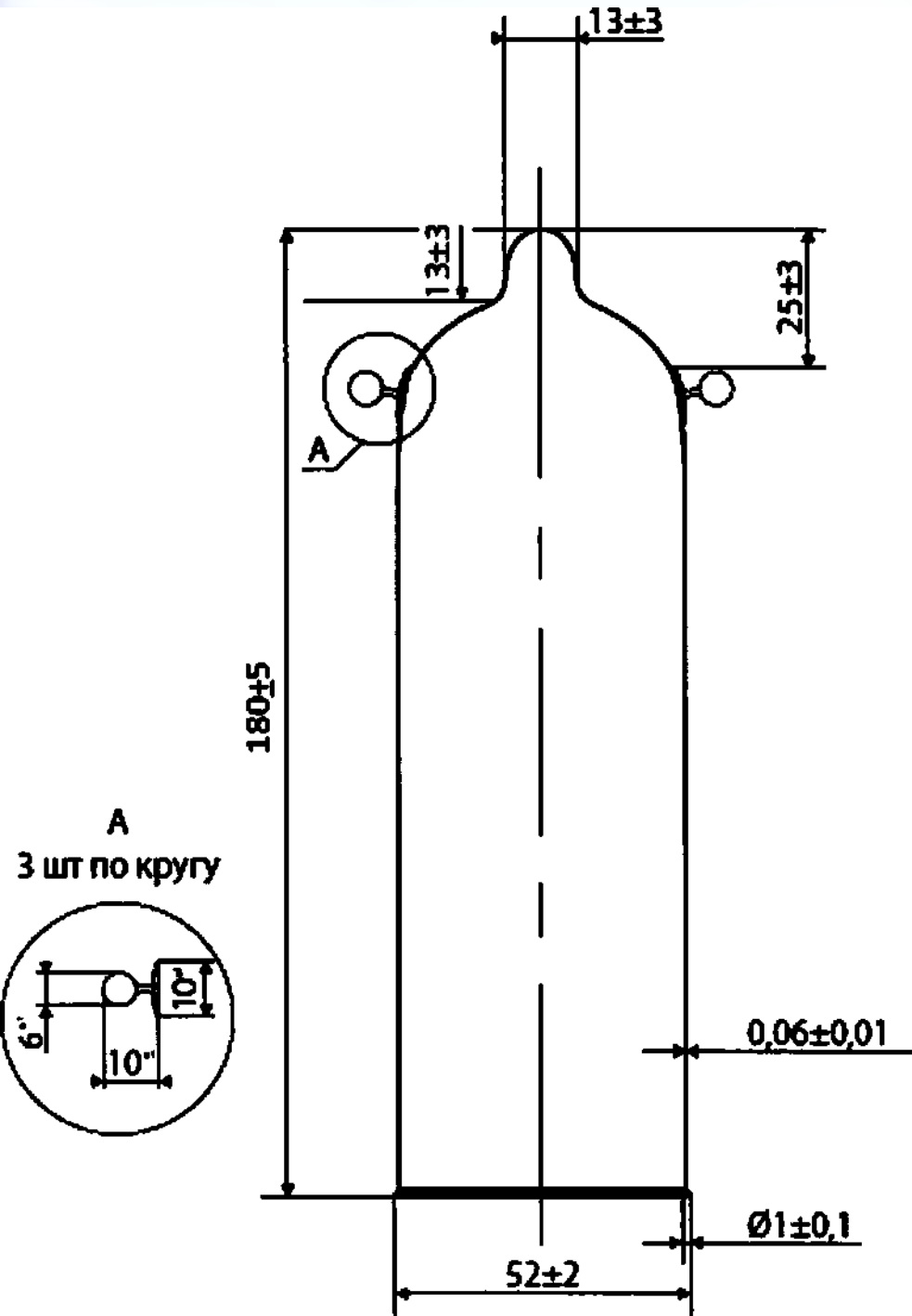

Размеры:

Длина: 180±5 мм

Диаметр: 52±2 мм

Длина накопителя: 13±3 мм

Ширина накопителя 13±3мм

Диаметр манжета: 1±0.1 мм

Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм

Масса: 2,1±0,3 г.

Материал усиков и шариков: Натуральный латекс

Физико-механические показатели:

Цвет: бесцветный

Форма выпуска: с накопителем

Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик.

Поверхность: текстура – гладкая с шариками

Аромат: без запаха

Смазка: силиконовое масло

Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая


Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя шариков:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвета: Желтый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Презерватив из натурального латекса марки LUXE ROYAL:
Презерватив стимулирующий с шариками «EXCLUSIVE ЗАВОДНОЙ ИСКУСИТЕЛЬ»

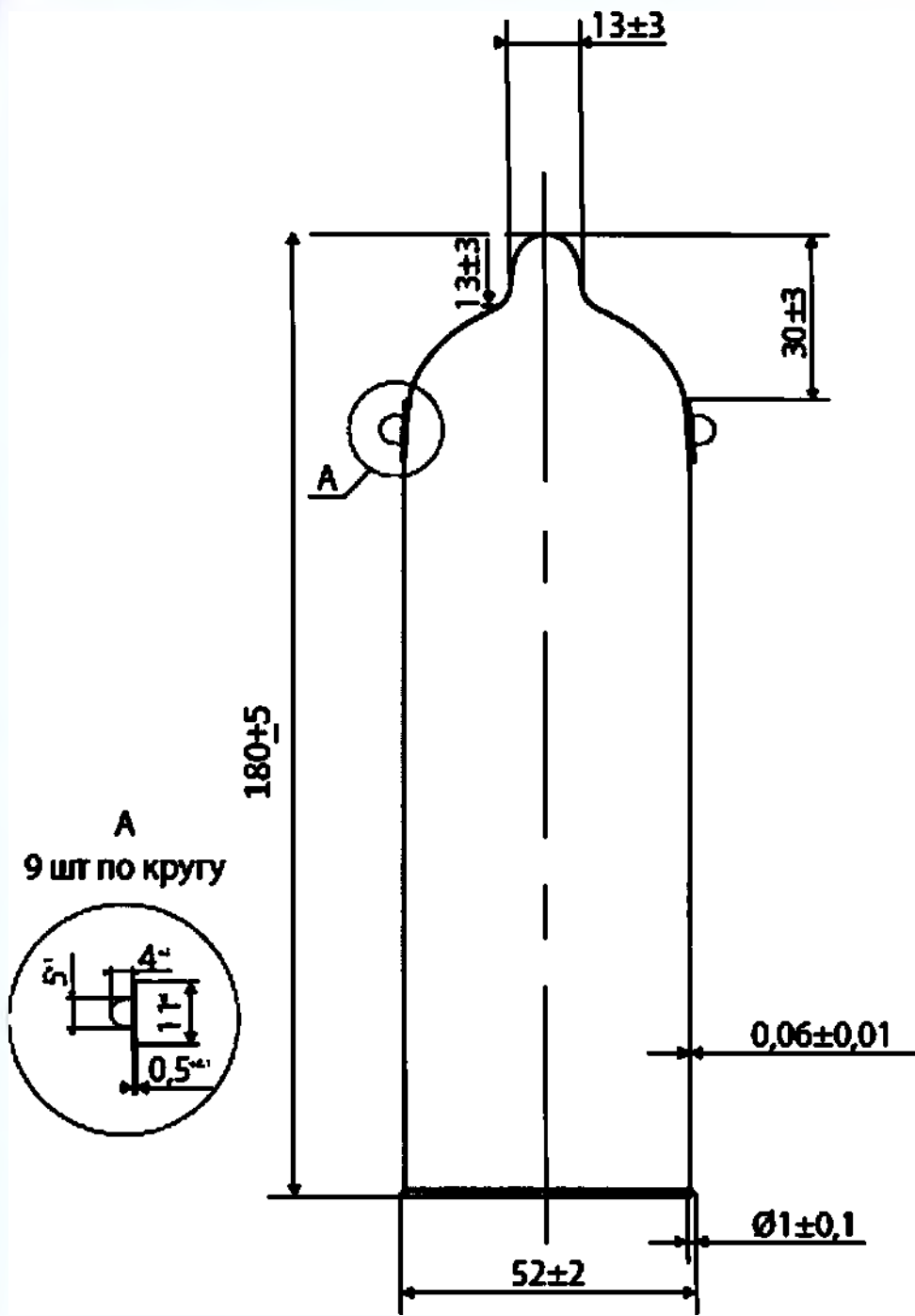


Размеры:
Длина: 180±5 мм
Диаметр: 52±2 мм
Длина накопителя: 13±3 мм
Ширина накопителя 13±3мм
Диаметр манжета:1±0.1 мм
Толщина презерватива: 0,06 мм ±0,01 мм
Масса: 2,1±0,3 г.
Материал усиков и шариков: Натуральный латекс
Физико-механические показатели:
Цвет: бесцветный
Форма выпуска: с накопителем
Манжета: открытый конец презерватива закатан в венчик :
Поверхность: текстура – гладкая с шариками
Аромат: без запаха
Смазка: силиконовое масло
Форма первичной (индивидуальной) упаковки: круглая
Тип первичной (индивидуальной) упаковки: пластиковая капсула.

Состав красителя зеленый:

Наименование сырья	%
Деионизированная вода	58
Агент, предотвращающий замерзание F-19	8
Антисептик Н-28	1,1
Антивспенивающий агент Н-9	1,6
Краситель J-11 цвет: Зеленый	30
Нейтрализатор Н-21	1,3

Показатели	До теплового Старения	После теплового старения
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²)	Не менее 20(200)	Не менее 17(170)
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700	Не менее 600

Макет упаковки.

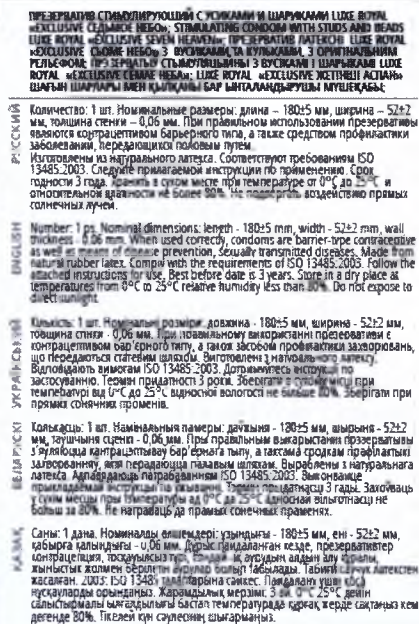



Маркировка:

Маркировку наносят печатным способом или в виде наклейки на каждую единицу потребительской упаковки.

Надписи, содержащие данные о месяце, годе изготовления, сроке годности, номера партии, допускается выполнять штампованием.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- дату изготовления (месяц, год);
- гарантийный срок хранения или указание «годен до»;
- номер партии;
- условия хранения;
- количество презервативов.

Инструкция по эксплуатации (применению) должна быть нанесена непосредственно на потребительскую упаковку или вложена в виде вкладыша в потребительскую упаковку.

Маркировка транспортной тары должна включать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя изделий;
- наименование изделия;
- условия транспортирования и хранения;
- количество потребительских упаковок с изделиями;
- гарантийный срок хранения или указание «годен до».

Допускается наносить другие манипуляционные знаки и информационные надписи, обеспечивающие сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

 АЯ 46	Знак соответствия техническому регламенту
	Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту ISO 13485:2003
	Выбросить в урну.
	Беречь от влаги
	Изготовлено из натурального латекса
	Не допускать воздействия солнечного света
	Дважды не использовать
	Диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им
	Партия №
	Дата производства

	Срок годности
--	---------------

- На индивидуальной упаковке должны быть нанесены следующие данные:
- 1) Идентификация производителя , наименование изделия, дата изготовления и срок годности
 - 2) Номер партии

12. Условия безопасного применения.

При производстве презерватива используются только высоко качественные материалы.

Каждый презерватив проходит электронный и дерматологический контроль. И только прошедший все этапы презерватив, упаковывается в индивидуальную упаковку, с учетом всех гигиенических требований.

Презервативы произведены из высококачественного латекса. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к латексу. Если во время использования презерватива, Вы почувствуете дискомфорт или раздражение, немедленно прекратите использование презерватива и обратитесь к врачу. Если Вы ранее использовали презервативы из латекса и Вы считаете что у вас повышенная чувствительность или аллергия на латекс, перед использованием презервативов обратитесь за консультацией к врачу.

При правильном использовании, презервативы помогают снизить риск заражения ВИЧ (СПИД) и многими инфекциями, передающихся половым путем. Для каждого раза (вида) секса используйте новый презерватив. Для анального секса необходимо использовать дополнительную смазку, с наружи презерватива. Внимательно ознакомитесь с инструкцией на упаковке лубриканта.

Не используйте в качестве лубриканта: содержащие жиры, крема и масла, например, детские, массажные или от солнечных ожогов масла, вазелин, лосьон для тела, маргарин. Это оказывает вредное воздействие на презерватив, повреждает его текстуру и делает его менее эффективным.

Ни один метод контрацепции не может обеспечить 100% защиты от беременности или передачи ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем. Если Вы беспокоитесь по поводу возможной беременности или заражения у Вас или Вашего партнера, немедленно

обратитесь к врачу.

Обращайте внимания на срок годности презерватива, который Вы собираетесь использовать.

Срок годности находится на картонной упаковке или на персональной упаковке презерватива.

Храните в сухом, прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Используйте презерватив только один раз.

13. Требования охраны окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения и утилизации.

Презервативы являются нетоксичными.

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путём совместно с твёрдыми бытовыми отходами.

Презервативы после использования подлежат уничтожению путем захоронения (как нетоксичные промышленные отходы).

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

Презервативы и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с требованиями страны изготовителя.

При утилизации отходов материалов и химикатов, а также при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно требованиям страны изготовителя.

Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируются в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» страны изготовителя.

Медицинское изделие необходимо утилизировать как отходы класса А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

14. Данные по сроку службы или сроку годности.

3 года со дня изготовления

15. Требования к транспортированию и хранению.

Презервативы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха до 80% °С при атмосферном давлении 760±10мм рт.ст.

При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует

распаковывать после выдержки в течение 1 суток с момента получения при нормальных климатических условиях.

Презервативы следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

16. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует качество презервативов при соблюдении условий использования, хранения и транспортировки.

17. Перечень сертификатов, деклараций соответствия национальным и международным стандартам.


Процесс производства, дистрибьюции продукции и конечный контроль качества полностью соответствует требованиям, устанавливаемым Приложением 1 Директивы 93/42/ЕС, а также национальным стандартам качества и технической безопасности КНР и Лицензией на производство изделий медицинского назначения.

Подтверждается следующими документами:

Лицензия производственного предприятия лечебной аппаратуры. Выдан Управлением по надзору за производством продовольственно-фармацевтической продукции пров. Ляонин. Срок действия: до 28.10.2018 г.

Декларация о соответствии. производителя Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd.

Сертификат системы качественного менеджмента ISO 13485:2003

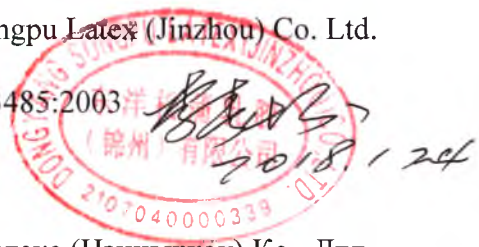

18. Производитель.

DongyangSongpuLatex (Jinzhou) Co. Ltd. /Дунян Согпу Латекс (Цзиньчжоу) Ко., Лтд.

№1, New and High-tech Development Zone 121013, Jinzhou, Liaoning , China

№1, Зона развития новых и высоких технологий, 121013, Цзиньчжоу, Ляонин, Китай

+86-416-2961066

24. Уполномоченный представитель производителя

Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Максима»

119048, г.Москва, ул. Ефремова, д. 20

тел./факс(495)544-33-81

E-mail: ulanova@luxlite.ru

公 证 书

(2018)辽诚证字第 929 号

申请人：东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司，统一社会信用代码：91210700742756288X，住所：辽宁省锦州高新技术产业开发区工业园区。

法定代表人：李春怀，男，一九六一年七月十九日出生，公民身份号码：210381196107194716。

公证事项：印鉴、签名

兹证明东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司的俄文本的《使用说明》的原件上所盖的“东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司”的印鉴及东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司的法定代表人李春怀的签名均属实。

中华人民共和国辽宁诚信公证处

公 证 员

张彤云

二〇一八年一月二十四日



IV08080129

Нотариальный акт

(перевод)

(2018) ЛХКА. Цзы №.929

Заявитель: ООО Эмульсионная компания «Дунянсунпу», Единый код общественной кредитоспособности: 91210700742756288X, Местонахождение: Индустриальный парк зоны развития высокой и новой техники, г. Цзиньчжоу провинции Ляонин.

Законный представитель: Ли Чуньхуай, мужской пол, родился 19. 07. 1961 г. номер удостоверения личности: 210381196107194716.

Нотариальное дело: печать, подпись

Настоящим удостоверяю, что официальная печать ООО Эмульсионной компании «Дунянсунпу» и подпись законного представителя Ли Чуньхуай ООО Эмульсионной компании «Дунянсунпу» в оригинале на русском языке “Инструкция по применению” являются действительными.

Нотариальная контора ХОРОШИЙ КРЕДИТ Ляонин КНР

(печать)

нотариус: Чжан Тунюнь (гриф)

24. 01. 2018 г.

I V0808014 I

公 证 书

(2018)辽诚证字第 930 号

申请人：东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司，统一社会信用代码：91210700742756288X，住所：辽宁省锦州高新技术产业开发区工业园区。

法定代表人：李春怀，男，一九六一年七月十九日出生，公民身份号码：210381196107194716。

公证事项：译本与原本相符

兹证明前面的俄文译本内容与 (2018)辽诚证字第 929 号公证书中文原本相符。

中华人民共和国辽宁诚信公证处

公证员

张彤云

二〇一八年一月二十四日



I V08080130

Нотариальный акт

(перевод)

(2018) ЛХКА. Цзы №.930

Заявитель: ООО Эмульсионная компания «Дунянсунпу», Единый код
общественной кредитоспособности: 91210700742756288X,

Местонахождение: Индустриальный парк зоны развития высокой и новой
техники, г. Цзиньчжоу провинции Ляонин.

Законный представитель: Ли Чуньхуай, мужской пол, родился 19. 07.
1961 г. номер удостоверения личности: 210381196107194716.

Нотариальный предмет: Соответствие перевода текста оригиналу

Настоящим удостоверяю, что перевод текста на русском языке
вышеуказанного «Нотариальный акт» (2018)ЛХКА. Цзы №. 929
отвечает китайскому оригиналу настоящего нотариального акта.

Нотариальная контора ХОРОШИЙ КРЕДИТ Ляонин КНР

(печать)

нотариус: Чжан Тунюнь (гриф)

24. 01. 2018 г.

I V08080142

Перевод с китайского и английского языков на русский язык

Нотариальный акт

**Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин
Китайской Народной Республики**

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Дунян Сонпу Латекс (Цзиньчжоу) Ко., Лтд. 2107040000339

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Печать: Нотариальная контора "Чэнсинь" провинции Ляонин

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепневым Виктором Игоревичем.

Город Москва

Двадцать девятое марта две тысячи восемнадцатого года

Я, Мартынова Наталья Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнева Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018-

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Н.А. Мартынова

Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 63 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса



[Signature]