

Микроспирали SD

Инструкция по применению

ПОКАЗАНИЯ

Использование микроспиралей SD обеспечивает оптимальное проведение хирургической операции и показано для осуществления интракраниальной эмболизации аневризм.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- При лечении больных с противопоказаниями к антитромбоцитарным препаратам и/или антикоагулянтам.
- Когда считается, что у пациента имеется поражение, которое воспрепятствует введению инородных тел в сосуды.

ЗАМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только врачи, прошедшие адекватное обучение, могут использовать микроспирали SD.
- Применение микроспиралей SD допустимо только в тех больницах, где имеется необходимое оборудование.
- Нельзя допускать контакт микроспиралей SD с органическими растворителями (например, с алкоголем).

ОБРАЩЕНИЕ С МИКРОСПИРАЛЬЮ – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для одноразового применения. Не рестерилизуйте и не используйте данное изделие повторно.
- Никаким образом не нарушайте положение микроспирали; будьте особенно осторожны во время ее извлечения из упаковки.

Несоблюдение мер предосторожности и/или приложение чрезмерного усилия потенциально может привести к потере микроспирали.

МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Оценка степени поражения по рентгеновскому снимку.
 2. Выбор микрокатетера.
 3. Позиционирование микрокатетера.
 4. Последовательное введение микроспирали через микрокатетер
- Введение первой микроспирали сферической формы с целью «обрамления» аневризмы в «корзинку». Если размер аневризмы превышает 4 мм. рекомендуется введение второй микроспирали сферической формы (на один размер меньше первой) с целью стабилизации «корзинки».
- Последовательное введение микроспиралей винтовой формы (каждая на один размер меньше предыдущей) с целью заполнения аневризмы.
5. Оценка степени поражения по рентгеновскому снимку.
 6. Завершение процедуры.

Генеральный директор
ООО «Технопроект»



Ерофеев Н. И.