



Инструкция по применению микропроводника HYBRID

ПОКАЗАНИЯ

Микропроводник HYBRID используется в качестве вспомогательного инструмента для введения микрокатетра в краниальные сосуды, что показано в следующих случаях:

- осуществления интракраниальной эмболизации аневризм.
- При лечении острой или угрожающей окклюзии сосудов у пациентов с негативными результатами интервенционного лечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- При лечении больных с противопоказаниями к антитромбоцитарным препаратам и/или антикоагулянтам.
- Когда считается, что у пациента имеется поражение, которое воспрепятствует введению инородных тел в сосуды.

ЗАМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Применение микропроводника несет в себе риск подострого тромбоза, сосудистых осложнений и/или кровотечения.
- Только врачи, прошедшие соответствующее обучение, могут использовать микропроводники.
- Применение микропроводников допустимо только в специализированных медицинских центрах.
- Нельзя допускать контакт микропроводника с органическими растворителями (например, с алкоголем).

ОБРАЩЕНИЕ С МИКРОПРОВОДНИКОМ – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для одноразового применения. Не рестерилизуйте и не используйте данное изделие повторно.
- Будьте особенно осторожны во время извлечения проводника из упаковки, установки катетера, и во время проведения катетера через сосуд.

МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выбор микрокатетера и микропроводника.
- Открыть стерильную упаковку.



- Ухватить крепко коннектор и внимательно вывести микрокатетер.



- Удаление микрокатетера. Завершение процедуры.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при комнатной температуре (оптимально 25°C) и умеренной влажности, в сухом помещении, в месте, защищенном от прямого попадания солнечного света.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности определен производителем на период 5 лет от даты стерилизации.

Изготовитель:

BALT EXTRUSION LTD., Франция.

10, rue de la Croix Vigneron, 95160 Montmorency

