

Инструменты хирургические многоповерхностного воздействия (зажимные)

Руководство по эксплуатации

Инструменты хирургические многоповерхностного воздействия (зажимные) – медицинский инструмент, состоящий из двух половин, встречное движение которых осуществляется при помощи шарнира, ползуна, пружины или по принципу замка с осью для захватывания и зажатия органов и тканей человека, медицинских материалов, предметов и инструментов. Инструменты предназначены для многократного использования.

Материал, применяемый в изготовлении инструментов, разрешен Министерством Здравоохранения РФ. Он устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов, применяемых в медицине и стерилизации.

Все виды изделия являются коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дезинфекция и стерилизация

Инструменты устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки, воздушной стерилизации.

Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре 120° С в течение 45 минут.

Предстерилизационная очистка состоит из:

1.погружение инструментов в дезинфицирующий моющий раствор (**не использовать хлоро-, хлоридо-, перекиси водорода содержащие и другие средства, которые вызывают коррозию. Рекомендуется использовать средства с нейтральным рН 7,0 или слабо щелочные средства с ингибитором коррозии**) сразу после использования их в ходе операции при температуре 25° С в течение 30-60 мин (**не оставляйте инструменты в растворе больше положенного времени!**);

2.мойка в моющем растворе при помощи ерша в течение 0,5±0,1 мин (не использовать металлические щетки и губки)

После мойки в моющем растворе и перед стерилизацией обязательно соблюдать пункты №3,4,5.

3.ополаскивание проточной водой в течение 3+1 мин;

4.ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5±0,1 мин;

5.протирайте инструменты с помощью сухой тканевой тряпки, оставьте на открытом воздухе при температуре 22-40°С до полного исчезновения влаги.

На не полностью высушенном изделии, оставленном на хранение, могут появиться следы коррозии.

Примечание: Инструмент, который имеет коррозию, следует обязательно отделить от другого инструмента, так как он может вызывать коррозию.

Перед стерилизацией инструменты должны быть чистые, полностью высушены и в открытом виде. Стерилизацию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре 170-180°С в течение 50-60 мин.

За коррозию, вызванную влагой, дезинфицирующим раствором, остатками крови и других веществ – завод изготовитель ответственности не несет.

Применение.

Изделия применяются согласно своего функционального назначения.

Хранение.

Хранение инструментов должно осуществляться при температуре от 10°С-30° С и влажности воздуха от 30 до 60%. При этом температура и влажность воздуха в помещениях хранения не должны резко колебаться. Инструменты не должны быть подвержены прямым солнечным лучам и влаге, а также подвергаться воздействию химических паров. Гарантированный срок хранения инструментов 10 лет.

Директор ООО «МК Волга-НН» -



Д.В.Голунов

10.02.2012

Поступ. в банк плат.

10.02.2012

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 60

10.02.2012

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 5260151709

КПП 526001001

Сумма

3000-00

МК Волга-НН ООО

Сч. №

40702810101010008801

Платательщик

ОАО "НБД-БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

БИК

042202705

Сч. №

30101810400000000705

Банк плательщика

ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

БИК

044501002

Сч. №

Банк получателя

ИНН 7710537160

КПП 770901001

Сч. №

40101810500000001901

МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, л/сч.
04951000600)

Вид. оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

06010807200011000110

45286580000

ТП

МС.02.2012

0

0

ГП

Государственная пошлина за регистрацию медицинских изделий. Сумма: 3000-00, НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ОАО "НБД-БАНК"
ОКПО 10668259 БИК 042202705
К/с 30101810400000000705Документ **оплачен** 10/02/2012
Электронные платежи
по системе «Интернет-Банк».
ЭЦП корректна

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НБД-Банк»	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ	
ОАО «НБД-Банк»	
ОКПО 10668259 БИК 042202705	
корр/счет 30101810400000000705 код 705	
Исп. Павлинова Н.Ю.	(подпись)



Общество с ограниченной ответственностью

Медицинская компания ВОЛГА-НН

И Н Н 5260151709 К П П 526001001 О Г Р Н 1055238075661
603028, г. Нижний Новгород, пер. Спортсмеский, д. 12а Тел/факс (831) 245-97-62, 437-16-43
р/сч. 40702810101010008801 в ОАО «НБД-Банк» к/с 30101810400000000705, БИК 042202705
mkvolga@mkv.nnov.ru


Руководителю Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

109074, Москва,
Славянская пл., д. 4, стр. 1

Просим Вас денежные средства, перечисленные по платежному поручению № 60 от 10.02.12 г., зачесть в качестве государственной пошлины за регистрацию изделия медицинского назначения: Инструменты хирургические многоповерхностного воздействия (зажимные).

Директор

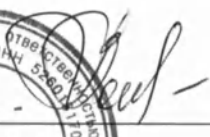

 Д.В. Голунов

Tuchklemmen
Towel Clamps
Pinces a champs
Pinzas de campo
Зажимы для операционного белья



SCHAEDEL
9,0 cm, 3½"
07-22-101-09



ENGL. MODELL
9,0 cm, 3½"
07-22-109-09



JONES
5,5 cm, 2" 07-22-105-05
9,0 cm, 3½" 07-22-105-09



JONES
9,0 cm, 3½"
07-22-107-09

mit Schlauch- oder Kabelhalter
with clip for tubing or cable
avec clamp porte-tube
con porta-tubo o porta-cable
с зажимом для кабеля и трубки



BACKHAUS
9,0 cm, 3½" 07-22-000-09
11,0 cm, 4¾" 07-22-000-11
13,0 cm, 5" 07-22-000-13
15,0 cm, 6" 07-22-000-15



11,0 cm, 4¾" 07-22-005-11
13,0 cm, 5" 07-22-005-13
15,0 cm, 6" 07-22-005-15




ROEDER
13,0 cm, 5" 07-22-010-13
15,0 cm, 6" 07-22-010-15

Tuchklemmen
Towel Clamps
Pinces a champs
Pinzas de campo
Зажимы для операционного белья



BERNHARD
16,5 cm, 6½"
07-22-044-16

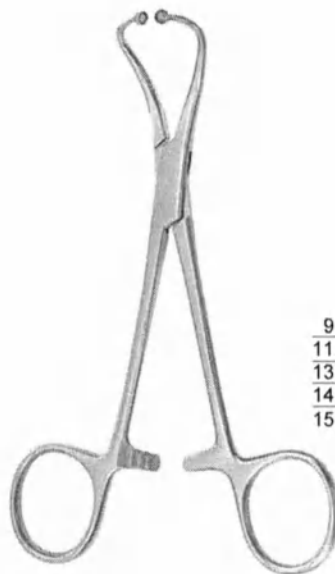

9,5 cm, 4"	07-22-024-10
11,0 cm, 4¾"	07-22-024-11
13,0 cm, 5"	07-22-024-13
14,0 cm, 5½"	07-22-024-14
15,5 cm, 6¼"	07-22-024-16




LORNA
9,0 cm, 3½" 07-22-014-09
11,0 cm, 4¾" 07-22-014-11
13,0 cm, 5" 07-22-014-13




LANE
13,0 cm, 5" 07-22-040-13
15,0 cm, 6" 07-22-040-15
20,0 cm, 8" 07-22-040-20

Tuchklemmen, Korn- und Tupferzangen
Towel Clamps, Sponge and Dressing Forceps
Pinces a champs, Pinces a pansement et a éponges
Pinzas de campo, Pinzas para vendajes y torundas
Зажимы для операционного белья, зажимы для тампона

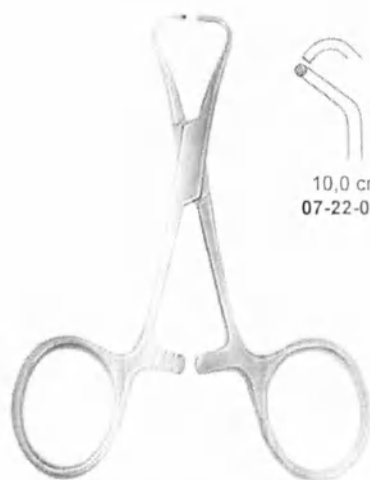


TOHOKU

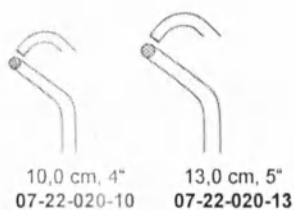


PEERS
14,5 cm, 5 3/4"
07-22-030-14



LISTER
13,0 cm, 5" 07-22-360-13
16,0 cm, 6 1/4" 07-22-360-16
18,0 cm, 7" 07-22-360-18

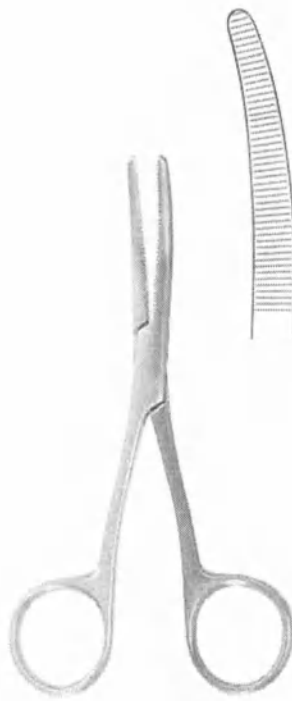

BRYANT
13,0 cm, 5"
07-22-351-13

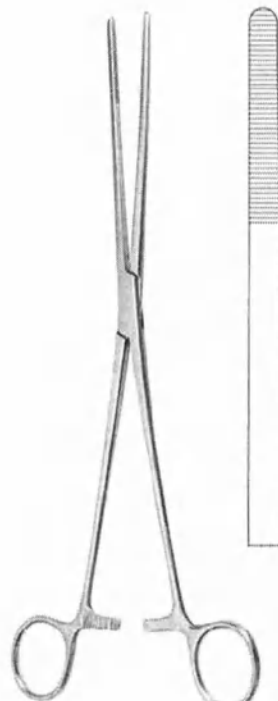

BOZEMANN
26,0 cm, 10 1/4"
07-22-320-26