

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нить полиэфирная «Spring Thread»

Наименование:

Нить полиэфирная «Spring Thread» в силиконовой оболочке с зубцами, с иглами атравматическими и без, стерильная, с принадлежностями

Область применения:

- Нить полиэфирная с зубцами предназначена для использования в пластической хирургии для подтяжки мягких тканей лица и тела
Изготовлена без использования тканей животного или человеческого происхождения.
Иглы из нержавеющей стали.

Показания для применения:

Коррекция возрастных изменений лица

Противопоказания:

- Аллергия к компонентам
- Инфекция
- Беременность, кормление грудью, системные заболевания
- Нестабильная психика

⚠ Меры предосторожности при использовании :

- Процедуру лигатурного лифтинга должен проводить врач, прошедший курс специального обучения
- Врач несет ответственность за выбор подходящего изделия; врач также обязан проинформировать пациента о результатах и возможных побочных эффектах процедуры
- Изделия поставляются стерильными. Перед использованием необходимо убедиться в целостности упаковки. Не использовать в случае обнаружения повреждения упаковки или изделия
- При повторном использовании возможно нарушение стерильности или ухудшение функциональных характеристик изделия

⚠ Возможные побочные действия:

- Отечность в течение 15 дней. Для ее устранения применяют массаж
- Быстрое ухудшение косметического эффекта вследствие чрезмерного обвисания кожи
- Гипо- или гиперкоррекция, которую обычно можно устранить под местной анестезией в первые недели после операции
- Видимость или выпячивание нитей
- Воспалительная реакция; несильная боль, проходящая со временем
- Локальная инфекция
- Прощупывание нити под кожей при слишком поверхностном размещении, след в месте введения нити
- Разрыв нити, особенно при травме во время введения
- Асимметрия в результате несимметричного протягивания нити и в зависимости от первоначального дефекта
- Временные складки на коже в период стабилизации
- Экхимоз, отечность или гематома
- Повреждение окружающих анатомических структур, особенно нервов и сосудов

⚠ Хирургическая методика:

- Проводят стандартную предоперационную оценку в зависимости от используемого анестетика – местного или общего действия
- Подготавливают операционное поле путем обработки кожи повидоном или другим аналогичным раствором (при непереносимости йода можно использовать хлоргексидин)
- Устанавливают границы стерильных операционных полей

- Выполняют разрезы в местах введения нитей (и в возможных местах их выхода) с помощью иглы Nokog или хирургического лезвия № 11
- Проводят иглу (являющуюся неотъемлемой частью изделия или поставляемую отдельно) в подкожно-жировую ткань
- Не следует проводить иглу слишком близко к поверхности кожи
- Имплантируют нескольких нитей в каждую проблемную зону. Траектория проведения нитей может быть прямой или в виде «V» или «X». Нити протягивают с помощью нитепротягивателя.

Послепроцедурный период:

- Обработка повидоном на следующий день
- Последующие меры – в зависимости от необходимости (наложение асептической или эластичной компрессионной повязки)
- В течение нескольких дней возможен отек или экхимоз и небольшое уплотнение тканей

⚠ **Не используйте трокарные иглы, так как ими можно повредить силиконовую оболочку.**

Зажимы используют при применении методики «easylift».

- Создают нужную форму в нужном месте путем подтягивания нити и «нанизывания» на нее ткани

- Слегка натягивая нить, обрезают концы, которые за счет своих упругих свойств материала утапливаются в коже

Лигатурный лифтинг можно сочетать со следующими процедурами: липоскульптура, резекция кожи, интрадермальные инъекции, ботокс.

⚠ Условия хранения:

- Хранить в сухом месте, защищенном от света, при температуре ниже 30 градусов Цельсия в оригинальной упаковке.

5°C  30°C 

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления

Производитель: 1st SurgiConcept» 228 Boulevard Clemenceau, F-57900, Marcy en Baroeul, France (Франция)

Дистрибьютор: ООО «Кloverмед» 121099, г. Москва, ул.Новый Арбат, д.34, стр.1

STERILE EO

стерильно этиленоксид

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зажим для нити

Наименование:

- Зажим для фиксации, применяется исключительно только с нитями моделей FA, FL, FY, BL

Материалы:

- Полиэфирэфиркетон, не рассасывающийся.

Изготовлено без использования тканей животного или человеческого происхождения.

Показания и рабочие характеристики

- Используется при применении техники «Easylift»
- Способствует лифтингу за счет напряжения или уплотнения тканей. Позволяет фиксировать ткани в необходимом положении
- Уменьшает эффект старения кожи и подкожных структур.

⚠ Противопоказания:

- Аллергия к компонентам
- Инфекция
- Беременность, кормление грудью, системные заболевания
- Нестабильная психика

⚠ Возможные неблагоприятные эффекты :

- Воспалительная реакция; несильная боль, проходящая со временем
- Локальная инфекция
- Прощупывание нити под кожей при слишком поверхностном размещении, след в месте введения нити
- Разрыв нити, особенно при травме во время введения
- Асимметрия в результате несимметричного протягивания нити и в зависимости от первоначального дефекта
- Временные складки на коже в период стабилизации
- Экхимоз, отечность или гематома
- Повреждение окружающих анатомических структур, особенно нервов и сосудов

⚠ Меры предосторожности при использовании :

- Процедуру лигатурного лифтинга должен проводить врач, прошедший курс специального обучения
- Врач несет ответственность за выбор подходящего изделия; врач также обязан проинформировать пациента о результатах и возможных побочных эффектах процедуры
- Изделия поставляются стерильными. Перед использованием необходимо убедиться в целостности упаковки. Не использовать в случае обнаружения повреждения упаковки или изделия
- При повторном использовании возможно нарушение стерильности или ухудшение функциональных характеристик изделия

Условия хранения:

- Хранить в сухом месте, защищенном от света, при температуре ниже 30 градусов Цельсия в оригинальной упаковке. Стерильное изделие одноразового использования. Не использовать повторно. Не стерилизовать повторно.

5°C  30°C 

Производитель: «1st SurgiConcept» 228 Boulevard Clemenceau, F-57900, Marcq en Baroeul, France (Франция)

Дистрибьютор: ООО «Кловермед» 121099, г. Москва, ул.Новый Арбат, д.34, стр.1

STERILE EO стерильно этиленоксид

Пронумеровано и
заверено
Генеральным штабом
Засеова В. В. «КЛОВЕРМЕД»

